

## GÅSTOL MED SITTPÅSE

Artikelnummer: 122120

**Avsedd användning:** Används för barn som behöver en stabil och säker gästol som stöd vid rörelseträning. Gåstolens höjd från golv till sittpåsens lägsta punkt kan ställas in mellan 18 – 30 cm.

### Säkerhetsanvisningar:



Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.

- Produkten skall ordineraras av behörig personal (t.ex. sjukgymnast eller annan person med förskrivningsrätt).
- Innan användning - försäkra att gåstolens höjd är rätt inställd. Totala höjden får ej ställas högre än 54 cm. Se markering på stolens ram.
- Kontrollera att hjulen rullar fritt och inte är blockerade.
- Produkten är ej avsedd för utomhusbruk.
- Tänk på att spärra av trappor så att stolen inte kan rulla utför när barnet sitter i.
- Produkten ska ej rullas över trösklar med barnet sittande i.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt när det sitter i gåstolen.
- Produktens utformning begränsar användarens vikt, därav ingen angiven max brukarvikt.




### Teknisk specifikation

Bredd:	50 cm
Längd:	60 cm
Höjd sits till golv:	18 - 32 cm
Höjd övre kant till golv:	41 – 54 cm
Vikt:	4,2 kg
Material:	Stålrör, bomullstyg

### Användning:

1. Placera sittpåsen i stålrampen och tryck fast med tryckknapparna.
2. Ställ in höjden med hjälp av spärrar på ramens sidor.  
OBS! Markering för maximal höjd finns.
3. Justera storleken på sittpåsen med hjälp av kardborrbanden i sidan.
4. Barnet ska placeras med ansiktet i riktning mot handtaget. Se bild.

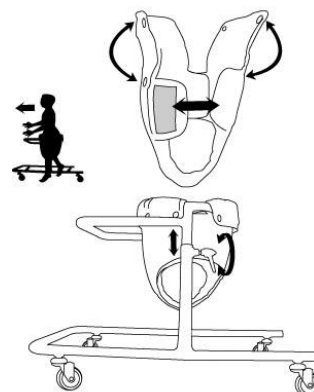

3122120

**Skötselanvisningar:** Rengörs regelbundet och vid behov (min 1ggr/månad) med tvällösning, ph 5-9. Vid rekonditionering skall produkten desinficeras genom att torkas med 70% isopropanol. Sittpåsen kan tvättas i tvättmaskin 60 grader strykfritt program.

**Reservdelar:** Art. nr 122140, Extra sittpåse till gåstol

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, ph 5-9.



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Tillverkad av:  
**Swereco AB**  
 Vagnvägen 4  
 SE-364 42 Lenhovda  
 Tel: +46 (0)8 5000 5240  
 www.swereco.com  
 info@swereco.com