

## STÖDKÄPP

Artikelnummer: 124300, 124309, 124310, 124319, 124400, 124401, 124409, 124410, 124419, 124420, 124429, 124460

**Avsedd användning:** Stödkäppen är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

### Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Stödkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskor bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskor skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskor kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttagas.
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk.

### Teknisk specifikation

Art. nr: <b>124300</b> Stödkäpp REKO Profil, höger	Art. nr: <b>124309</b> Stödkäpp, höger, vit	Art. nr: <b>124310</b> Stödkäpp REKO Profil, vänster	Art. nr: <b>124319</b> Stödkäpp, vänster, vit	Art. nr: <b>124400</b> Stödkäpp Flex, rak
Art. nr: <b>124401</b> Stödkäpp Flex, lång Ställbar höjd: 95-117 cm	Art. nr: <b>124409</b> Stödkäpp Flex, vit	Art. nr: <b>124410</b> Stödkäpp Flex Ergo, höger	Art. nr: <b>124419</b> Stödkäpp Ergo, höger, vit	Art. nr: <b>124420</b> Stödkäpp Flex Ergo, vänster
Art. nr: <b>124429</b> Stödkäpp Ergo, vänster, vit	Art. nr: <b>124460</b> Stödkäpp Flex fast längd 98 cm			

Ställbar höjd: 75-97 cm (Art. nr: 124401 95-117 cm)

Vikt: 0,34 kg

Material: Aluminiumrör, PP (handtag), naturgummi (doppskor)

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, ph 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Tillverkad av:

**Swereco AB**

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda


Tel: +46 (0)8 5000 5240

[www.swereco.com](http://www.swereco.com)

[info@swereco.com](mailto:info@swereco.com)

## Användning:

1. Justera höjden förstödkäppen med hjälp av tryckknappen. Stödkäppens höjd skall anpassas efter den individuella brukaren
2. Kontrollera tryckknappen för höjdstjusteringen regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av stödkäppen genast avbrytas.
3. Kontrollera doppskorna före användning. Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya.

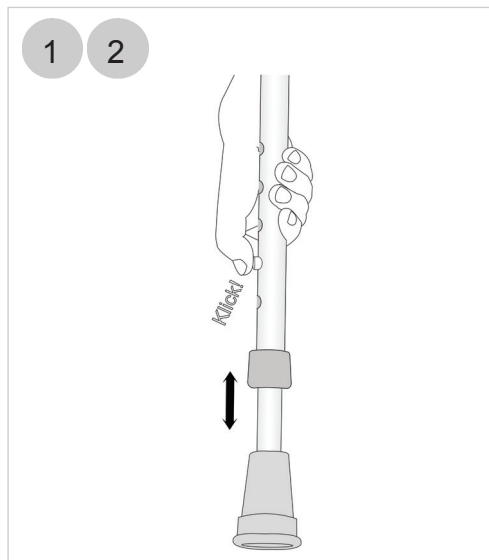

**Skötselanvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvällösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

## Reservdelar:

- Art nr 120750, Doppsko 19-20 mm
- Art nr 120760, Doppsko 21-23 mm (till 124460)

## Tillbehör:

- Art. nr 123300, Isdubb Spets
- Art. nr 123350, Isdubb Kronan
- Art. nr 124885, Käpphållare Flex
- Art. nr 124889, Gummifot Stabil

**Återvinning:** Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

**Brukarvikt:** Inget krav på brukarvikter för stödkäppar föreligger. Stödkäpparna testas dock i tillverkningen för brukarvikt 100 kg.



Allvarliga händelser som inträffar under användande skall rapporteras till Swereco