

TOASITS FÖR BARN

Artikelnummer: 144900, 144905

Avsedd användning: Toasits för barn är avsedd att användas på toalett för att underlätta toalettbesök. Sitsen är portabel och ska fästas till toaletten med ett nylonband vid användning.

Leveranskontroll: Kontrollera att produkten är hel och att det medföljer ett nylonband. Använd inte produkten om den är skadad.



Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Sitsen skall placeras direkt på porslinet, ta bort eller fäll upp lock och befintlig toalettsits.
- Toasitsen hålls fast i porslinet med hjälp av ett nylonband som spänns runt toalettstolen. Sitsen skall spännas fast för att inte riskera att tippa över om barnet lutar sig över armstödet.
- Kontrollera att sitsen sitter stadigt på toaletten innan användning.
- Lämna aldrig barnet obevakat på toalettsitsen!
- Max brukarvikt är 50 kg.

Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet och vid behov (min 1ggr/vecka) med tvällösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, torkas med 70% isopropanol. Sitsen skall avlägsnas från toaletten vid rengöring.

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som metallsrot, trä- och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.



Alla allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till Swereco AB.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen



Max 50 kg

Max brukarvikt 50 kg.



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, ph 5-9.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



144900, hel sits

Teknisk specifikation

Art. Nr: **144900**

Art. Nr: **144905**
med urtag

Vikt: 5,4 kg

Vikt: 5,3 kg

Storlek sits:

Djup: 34 cm
Bredd: 45 cm


Hål sits:

Djup: 20 cm
Bredd: 17 cm

Material: Stålrör, lackerad spånskiva, ryggstöd i PUR.

Montering:

1. Placera toasitsen direkt på porslinet på toaletten.
2. Spänn fast toalettsitsen i toaletten genom att dra spännbandet bakom ryggen och fäst spännet.
3. Kontrollera att sitsen sitter stadigt på toaletten innan användning.

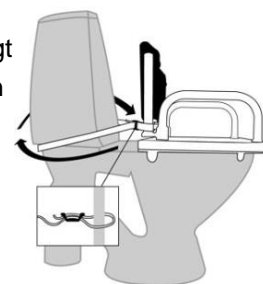

3144900

Tillverkad av:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda

Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com