

Rörelsehjälpmedel • Stödkäppar

Art nr: 505sirf, 505uesirf

Stödkäpp med reflex är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Hög Maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalitet på ingående material. Stödkäppen går lika bra att använda inne som ute. Stödkäpp i aluminium, justerbar längd, med handtag i Derby-utförande som är skönt och skonsamt för handen, och passar både vänster och höger hand.

Mellan rören sitter en låsring som säkerställer en klickfri gång. Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp.

Benämning	Stödkäpp basic s 75-95 cm	Stödkäpp basic lång 75-95 cm
Art nr	505sirf	505uesirf
Längd på käpp	75-95 cm	80-100 cm
Färg på handtag	Svart	
Vikt per produkt	0,35 kg	
Färg rör	Alu	
Tillbehör -Rekommenderad doppsko	Doppsko rekommenderas med 16 mm i Ø, t.ex. 716 + färgkod	
Material		
Platsdelar	Polypropen	
Handtag	Polypropen	
Rör	Aluminium	
Doppsko	Naturgummi	
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.	



Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Max: 130 kg

Max brukarvikt



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, ph 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr. 505sirf, 505uesirf

Justering av höjden på stödkäppen

Höjden av stödkäppen justeras med hjälp av tryckknappen. Tryck in knappen och drag i det undre röret till önskad längd. Efter justering av höjden är det viktigt att tryckknappen är fixerad i de båda rören avsedda hål och att tryckknappen är helt ute efter justering.



Stödkäppen skall även tas ur bruk om den är defekt, har synliga skador, utsliten eller glappar i höjjusteringen vilket kan medföra risk vid användning. OBS!! Då du behöver använda stödkäpp eftersom din vanliga rörlighet är nedsatt, även om stödkäppen hjälper dig i den här situationen bör du alltid tänka på att din grundläggande rörlighet fortfarande är nedsatt. Var alltid medveten om detta och var alltid försiktig när du använder stödkäpp. Förvara aldrig stödkäppen i närheten av värme. Undvik att lägga stödkäppen ute i solen längre stunder då plasten påverkas negativt. Undvik att tappa stödkäppen. Kontrollera regelbundet doppskons kvalitet för att öka användarsäkerheten. Regelbunden rengöring av stödkäppen med ett mildt medel samt mjuk trasa. Reflexerna skall endast rengöras med varmt vatten. Handtag samt doppsko får inte rengöras med oljiga ämnen pga halkrisk! Regelbunden kontroll av stödkäppen skall göras och skadad eller söndrig krycka skall kasseras. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemiddelsverket.



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine



Swereco AB, Vagnvägen 4,
364 42 Lenhovda



SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda
www.swereco.com • order@swereco.com • +46 (0)8-5000 5240

Användaranvisning

OBS! Läs anvisningarna noga innan kryckan tas i bruk

- För rätt användning av stödkäppen skall längden justeras till individuell längd. Tryck in knappen som fixerar de båda rören, dra därefter isär eller skjut ihop rören till önskad längd. Lås sedan rören genom att matcha de två bulthålen och se till att tryckknappen snäpper på plats igen.
- OBS! Kontrollera alltid att rören är fixerade genom att försöka rotera eller flytta rören! Hur stödkäppen används är beroende på individuella behov och gångförmåga, utprovning/justering skall ske i samråd med kunnig personal som har kunskap om produkten och dess funktion i olika situationer för bästa möjliga resultat.
- Använd alltid stödet på motsatt sida av den skadade eller svaga sidan.
- Håll stödkäppen nära kroppen och luta den inte utåt,
- Placera stödkäppen så rakt mot marken som möjligt så att den inte glider iväg
- Sätt inte stödkäppen för långt bort från kroppen. Du riskerar då att ramla.

- När du sitter bör du använda stolar med armstöd så att när du ställer dig upp kan du använda armstödet som stöd.
- Om möjligt bör kvalificerad personal visa dig hur man går upp för trappor med stödkäpp
- När du går i en trappa med en stödkäpp bör du hålla ledstången med den lediga handen.
- Håll stödkäppen i ett stadigt och omslutande grepp i handtaget.
- Välj en sko med låg och stadig klack så att benet klarar den extra vikten bättre.
- Användning av stödkäpp kan ge tryck i händerna eller belastning på armar och axlar, var därför noga med att vila ofta.
- Om du ramlar. Låt om möjligt stödkäppen falla från kroppen så att du inte faller på den!

Varning! Trappor utan ledstång utgör en ökad risk för fall och stor försiktighet bör iaktas när du går i en sådan trappa!

Säkerhetsföreskrift

- Produkten skall enbart användas till avsedd användning och föreskrifter enligt nedan skall följas!
- Utprovning/justering skall ske i samråd med personal som har kunskap om produkten och dess funktion. Felaktigt justerad stödkäpp begränsar användningsområdet samt kan leda till en ökad felbelastning och i värsta fall en säkerhetsrisk!
- Max brukarvikt får ej överskridas.
- Stödkäppen skall användas i original utförande för att garanti skall gälla samt original- Reservdelar/tillbehör.
- Handtaget får ej belastas med kassar el dyl.
- Stödkäppen får ej användas att lyfta med, trycka på knappar osv
- Gör en regelbunden kontroll av stödkäppen och om det finns yttre skador rådgör med en specialist. Sned eller skadad stödkäpp får ej användas då de har en sämre stabilitet. Stödkäppen skall under dessa omständigheter ej lagas utan bytas ut!

- Regelbunden kontroll av doppskon, defekt doppsko skall bytas ut mot original doppsko. Kontrollera att doppskon är fri från smuts för ett säkert grepp mot underlaget.
- OBS! Risk för sämre grepp och risk för halka vid våta och fuktiga underlag; löv, grus etc. Även fuktiga golv innebär risk för halka!
- Ojämnheter och hål i underlag är mycket farliga eftersom stödkäppen kan glida iväg eller sjunka. Var extra försiktig vid dålig belysning! Löst liggande mattor eller dyl. kan glida iväg och orsaka olyckor!
- Vid justering av höjden är det viktigt att tryckknappen är fixerad i de båda rörens hål och att tryckknappen är helt ute efter justering.
- Alla skruvfästen måste dras åt ordentligt innan användning.
- Undvik snö eller is om din stödkäpp inte är utrustad med doppskor för vinterbruk. Vid vinterväglag finns separat isbrodd art nr 1719 (en pigg) och 1718 (hel krona) som tillbehör.

Garanti — Garantitiden 2 år gäller under förutsättning att käppen har använts på ett korrekt sätt och för sitt ändamål samt att leverantörens original delar har använts. Garantin omfattar ej förbrukningsdelar. Efter garantitiden ligger ansvaret för användandet av käppen hos användaren.

Livslängd — Den beräknade livslängden på produkten är satt till två år vid normal användning. Brukaren ansvarar för ytterligare användning efter denna tidpunkt.

Rekonditionering/Återanvändning — Rekonditionering samt återanvändning av annan brukare rekommenderas ej! Allt sådant sker på antingen köparens eller rekonditionerarens risk och varken tillverkaren eller Swereco AB står för några garantier efter detta.