

GÅSTATIV BETA

Artikelnummer: 122200, 122210, 122220

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Gåstativet bör endast brukas på plant underlag. Detta då den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i golvet.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. arbetsterapeut, sjukgymnast eller motsvarande) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Kontrollera regelbundet att knappen för höjjustering inte glappar.
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten omedelbart tas ur bruk och skickas på service.
- Kontrollera regelbundet att doppskorna inte har blivit utslitna eller skadade. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya vilka kan beställas från Swereco.
- Produkten får ej belastas med ex. klädesplagg, väskor eller liknande under användning.

Avsedd användning: Produkten är avsedd som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Teknisk specifikation

Art nr: 122200 Vuxen

Höjd: 85-97 cm
Vikt: 1,7 kg
Bredd: 60 cm
Djup: 48 cm
Material: Aluminium
Max 120kg

Art nr: 122210 Junior

Höjd: 73-85 cm
Vikt: 1,6 kg
Bredd: 60 cm
Djup: 51 cm
Material: Aluminium
Max 120kg

Art nr: 122220 Barn

Höjd: 60-72 cm
Vikt: 1,5 kg
Bredd: 51 cm
Djup: 47 cm
Material: Aluminium
Max 70kg

Tillverkad av:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda


Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com

Användning:

1. Justera höjden på gåstativet med hjälp av tryckknappen. Gåstativets höjd skall anpassas för den individuella brukaren.
2. Kontrollera tryckknappen för höjdstyret regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av gåbocken genast avbrytas och produkten skickas in för service.
3. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

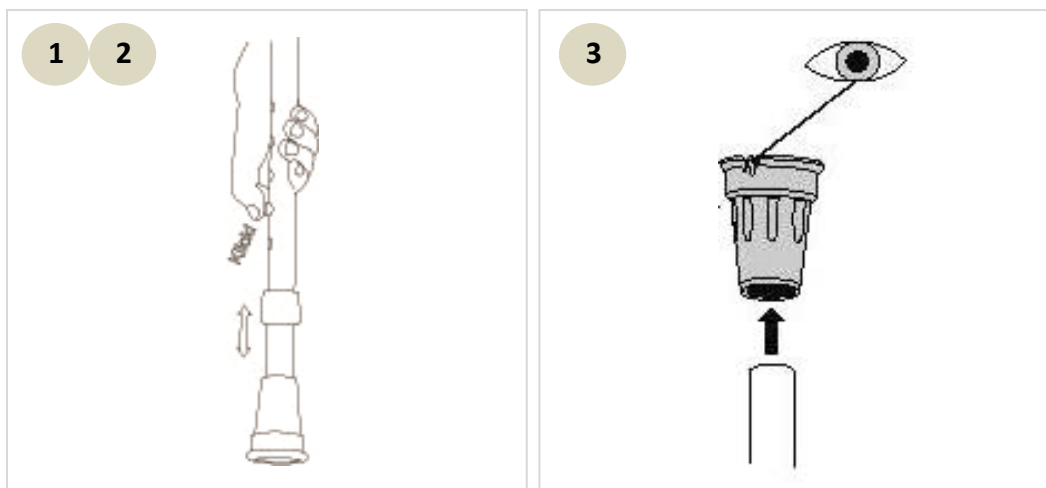

Skötselansvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1 ggr/månad) med tvållösning, pH 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

3122200

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

Reservdelar: Art. nr 120750, Doppsko



Alla allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till Swereco AB.