

POTTSTOL FÖR BARN

Artikelnummer: 144971, 144972

Avsedd användning: Pottstol för barn är en toainsats monterad på ett höj- och sänkbart stativ med en löstagbar potta. Pottstolen ger en säkrare känsla eftersom barnet sitter närmare golvet.

Leveranskontroll: Kontrollera att produkten är hel och att stödfötter är monterade på alla ben. Använd inte produkten om den är skadad.



Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Pottstolen skall placeras på en plan yta där stolens alla fyra ben står stadigt mot golvet.
- Vid tecken på att höjdjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk och skickas in för service.
- Stödfötterna bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter kan innebära ett försämrat grepp och slitage på golv.
- Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Använd sele/midjebälte för att underlätta för barnet att sitta upprätt.
- Lämna aldrig barnet obevakat på pottstolen!
- Max brukarvikt 50kg.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max 50 kg

Max brukarvikt 50 kg.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



144971



144972

Teknisk specifikation

Art. Nr: **144971**
Pottstol 1

Storlek sits:
Djup: 22 cm
Bredd: 20 cm
Höjd*: 23 cm

Hål sits:
Djup: 16 cm
Bredd: 12 cm

Ställbar höjd: 19,5-28 cm
Maxbredd stol: 38 cm
Maxbredd benstativ: 41 cm

Vikt: 3,0 kg

Art. Nr: **144972**
Pottstol 2

Storlek sits:
Djup: 29 cm
Bredd: 23 cm
Höjd*: 35/25 cm

Hål sits:
Djup: 18 cm
Bredd: 14 cm

Ställbar höjd: 22-30,5 cm
Maxbredd stol: 37 cm
Maxbredd benstativ: 42 cm

Vikt: 3,8 kg

Material: stålrör, aluminium och ABS

*Höjd är från sits till upp till säkerhetsbältesgenomföringarna.

Tillverkad av:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda


Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com

Användning:

1. Justera pottstolen till lämplig höjd med hjälp av tryckknappen.
2. Kontrollera tryckknappen för höjjusteringen regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av pottstolen genast avbrytas.
3. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.
4. Placera den löstagbara pottan på plats.

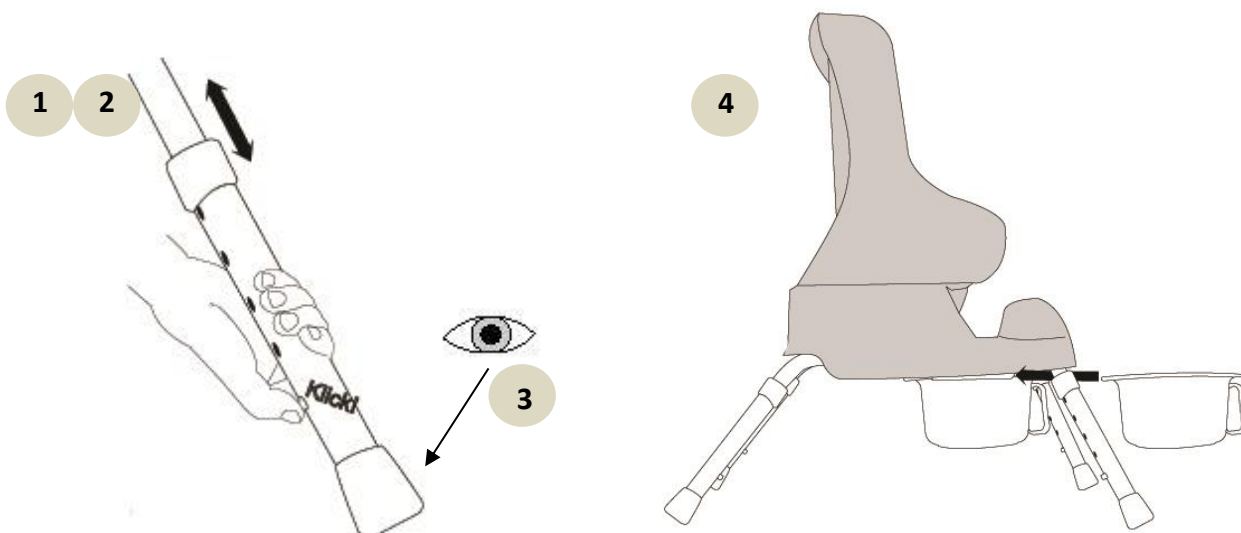

Skötselansvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1 ggr/månad) med tvållösning, pH 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

Reservdelar:

Art. nr: 120700, Stödfot
Art. nr: 14497115, Potta
Art. nr: 14491040, Sele
Art. nr: 14497110-S, Insticksben inkl. Doppsko till 144971
Art. nr: 14497210-S, Insticksben inkl. Doppsko till 144972



Alla allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till Swereco AB.