

GÅBOCK KVADRANT BARN

Artikelnummer: 121165

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Gåbocken bör endast brukas på plant underlag. Detta då den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i golvet.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. arbetsterapeut, sjukgymnast eller motsvarande) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Gåbockens ben ska vara riktade bort från brukaren så att de inte utgör någon snubbelrisk.
- Innan användning säkerställ att clipset för höjdjustering sitter ordentligt intryckt.
- Vid tecken på att höjdjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk och skickas in för service.
- Vid byte av clips säkerställ att det är rätt modell. (olika storlekar finns)
- Doppskorna skall kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnar under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan annars försämrats.
- Max brukarvikt 50 kg.

Avsedd användning: Gåbock Kvadrant är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max 50 kg

Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Teknisk specifikation

Höjd: 48,5-58,5 cm

Vikt: 0,7 kg

Material: Stålrör, PVC (handtag)

Tillverkad av:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda



Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com

Användning:

1. För justering av höjden. Tryck loss clipset från benet, justera till rätt höjd och tryck sedan dit clipset igen. Kontrollera att clipset är ordentligt intryckt före användning. Ersätts clipset med ett nytt kontrollera att det är rätt storlek (finns i flera storlekar).
2. Kontrollera doppskorna före användning. Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya.

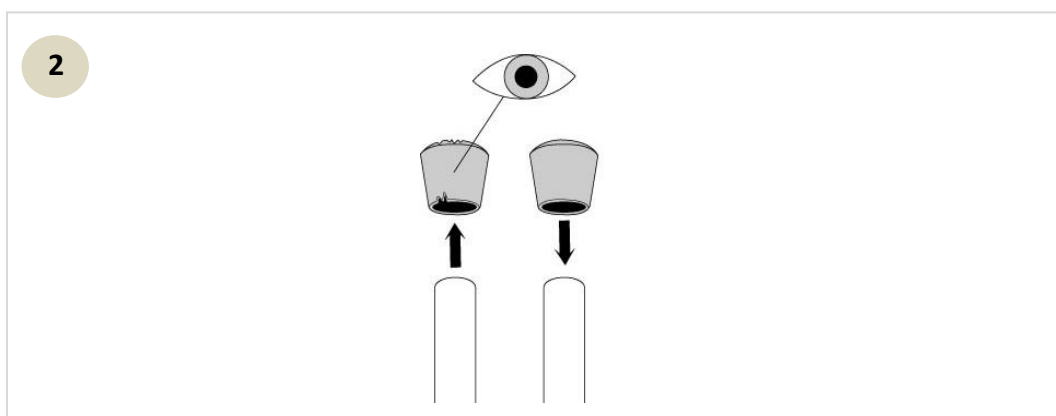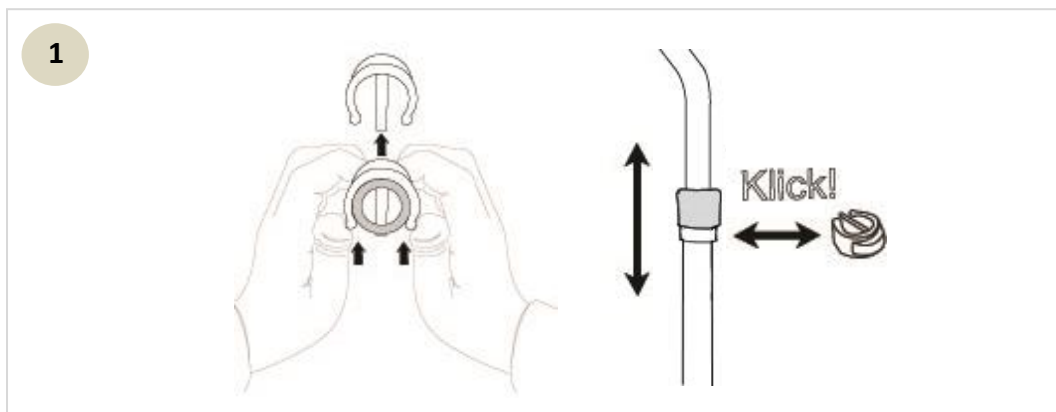

Skötselansvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

Reservdelar: Art. nr 120710, Doppsko Kvadrant



Alla allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till Swereco AB.