



Rollator tillbehör **Flexiwise Bas**

Monteringsanvisning för rollator modell "Dolomite".



- A. Montera Flexiwise bas så högt som möjligt på sidoramén.

Placera fästtappen långt åt sidan.

- B. Fixera rollator-tillbehöret till fästtappen.

Därefter fixera plastklon till sidoramén, långt ner.



- C. Fixera droppstängen till rollator-tillbehöret.

Kontrollera att droppstängen står vertikalt – justera!

Kontrollera att ALLA vred är åtdragna.



Flexiwise AB, Bäckvägen 22, 435 35 Mölnlycke
e-mail: info@flexiwise.com, tel: 0707-77 85 74