




### **Barnvagn**

Flexiwise® monteras horisontellt över handtaget.

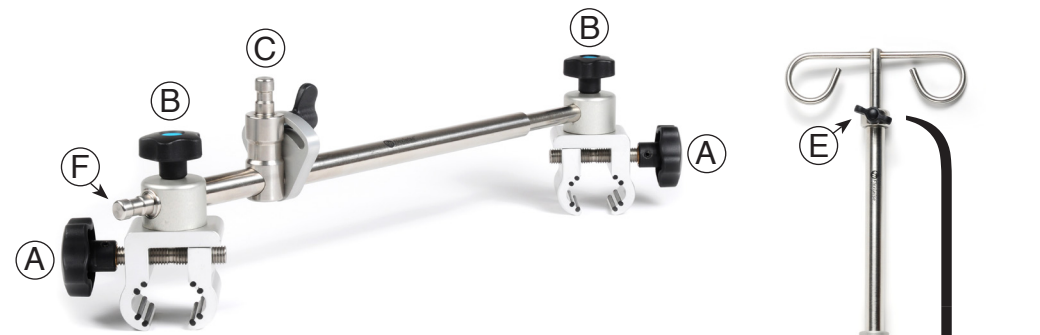

### **Instruktioner**

- 1a.** Öppna båda klorna med **A** vreden.
- b.** Lossa lite på båda **B** vreden.
- 2.** Montera på valt föremål, och skruva åt alla vreden **A** och **B**.
- 3.** Sätt fast infusionsstången **D**, vid **C** (eller **F**), och skruva åt vredet.
- 4.** Justera **C** så att infusionsstången står vertikalt.
- 5.** Justera med **E** infusionsstångens längd.

*När Flexiwise® flyttas från ett föremål till ett annat, bör infusionsstången **D** först tas bort.*

### **Rengöring:**

Tvättas med tvål, vatten, och sprit.

Flexiwise® är framtagen för användning tillsammans med följande föremål: **rullstol, säng, rollator, gåbord, barnvagn, väggfäste, parasoll, och bildörr.**

Företaget Flexiwise® har inget ansvar om den monteras felaktigt, eller om den fastsättes på andra föremål än ovan.