

Användarmanual



TRAVELLER HD

20160114

Innehållsförteckning

1. Introduktion	3
1.1. Om denna manual	3
1.2. Vad finns i förpackningen?	3
1.3. Lär känna din Traveller HD	4
2. Kom igång.....	5
2.1. Använda Traveller HD	5
3. Handhavande.....	6
3.1. Använda glidskenan och läsa.....	6
3.2. Knappar	6
3.2.1. Ström På / Av.....	6
3.2.2. Justera förstoringen	6
3.2.3. Välja olika visningslägen	6
3.2.4. Belysning På /Av.....	7
3.2.5. Bildtagning	7
3.2.6. Meny.....	7
3.2.7. Läslinje.....	7
3.2.8. Positionera läslinjen	7
4. Menyn i Traveller HD	8
4.1. Aktivera menyn	9
4.2. Navigera i menyn	9
4.3. Avsluta menyn.....	9
Meny: Information	9
Meny: Bilder.....	10
Meny: Ljusstyrka.....	11
Meny: Ström	11
Meny: Ljud	13
Meny: Ljus	14
Meny: Färg	14
Meny: Återställning	15
5. Ladda batteriet	16
5.1. Ladda Traveller HD	16
5.2. Standby och automatisk avstängning	16
5.3. Batterivarning	16
Bilaga A: Regler och säkerhetsföreskrifter	17
Bilaga B: Specifikationer.....	19

1. Introduktion

Gratulerar till ditt val av Traveller HD, en lätt portabel förstöringskamera utvecklad av Optelec. Traveller HD ger dig möjlighet att läsa, titta på fotografier, utföra handarbeten och mycket mer. Traveller HD förstörar och förbättrar utseendet på text, objekt samt bilder och låter dig välja olika färgkombinationer, ljusstyrka och kontrast. Den är enkel att hantera och kan användas hemma på arbetet samt i skolan.

1.1. Om denna manual

Hos Optelec försöker vi hela tiden förbättra våra produkter och dess funktioner. Därför är det möjligt att denna manual ej är senaste versionen. Ladda ner den senaste manualen på polarprint.se under produkten Traveller HD.

Manualens syfte är att lära dig hantera samt sköta funktionerna i Traveller HD. Läs igenom den noga innan du börjar använda enheten.

Om du har frågor eller förslag angående denna produkt, var god kontakta Polar Print. Längst bak i manual finns kontaktinformation. Vi uppskattar verkligen dina åsikter. Hoppas att du kommer att trivas med din Traveller HD.


1.2. Vad finns i förpackningen?

Förpackningen för Traveller HD innehåller följande:

- Traveller HD
- En skyddande bärväska
- En strömadapter
- En rengöringsduk för skärmen
- Denna användarmanual

1.3. Lär känna din Traveller HD

Följande figurer visar huvudkomponenterna i Traveller HD.

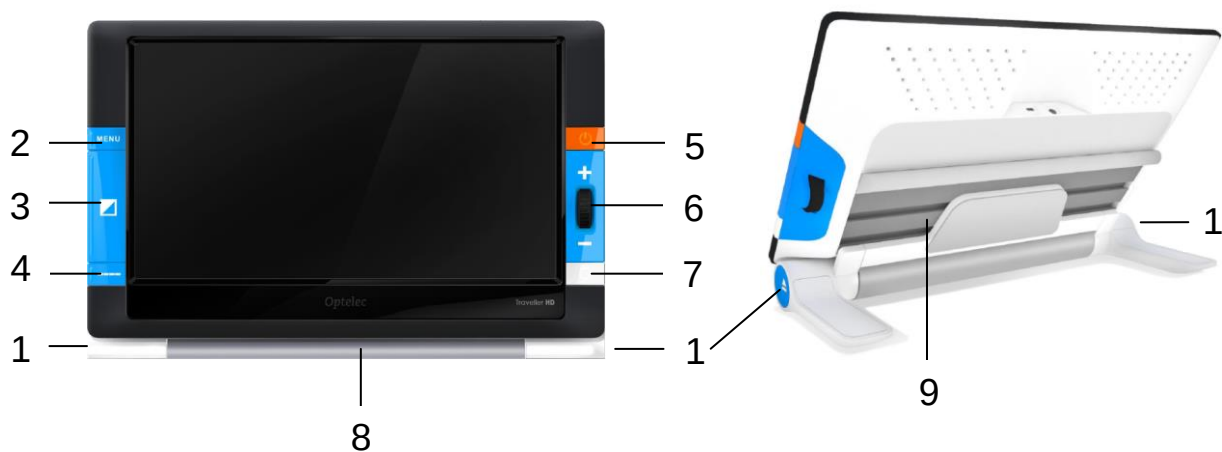

- 1. Låsknappar
- 2. Menyknapp
- 3. Lägesknapp
- 4. Läslinje
- 5. På/av-knapp

- 6. Förstoringsvred
- 7. Bildknapp
- 8. Rullhjul
- 9. Glidskena

2. Kom igång


Traveller HD är korrekt placerad framför dig när skärmen är riktad uppåt och förstöringsvredet sitter på höger sida av skärmen.

2.1. Använda Traveller HD


Traveller HD kan endast användas i den öppna positionen. Skärmen placeras i en ergonomisk vinkel för optimal läsning samtidigt som kameran pekar nedåt. Den öppna positionen låter dig läsa långa texter och enkelt glida över dokument.

För att öppna enheten, följ dessa steg:

1. Placera Traveller HD framför dig så att skärmen är riktad uppåt och förstöringsvredet sitter på höger sida av skärmen.
2. Tryck på de två blå låsknapparna på ytterkanterna av rullhjulet. Skärmen på Traveller HD kommer att lösgöras, vikas upp samt starta enheten.
3. Lyft skärmen tills den låses till sin upprätta position.

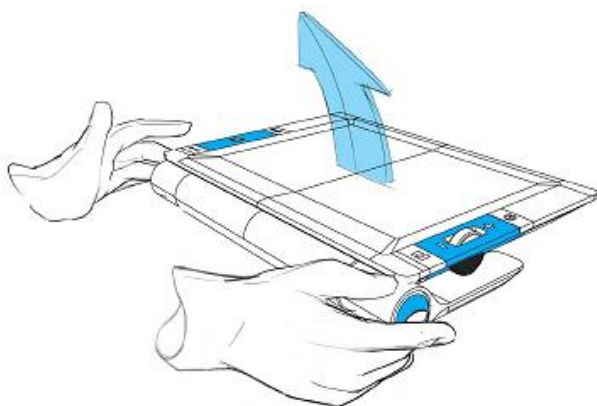

Tryck in de två blå låsknapparna för att fälla upp Traveller HD

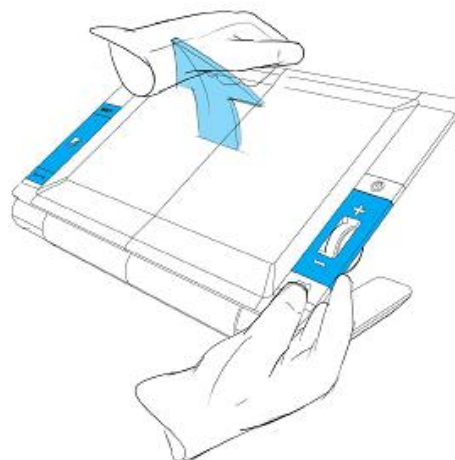

Lyft skärmen tills den låses i sin upprätta position

För att stänga enheten, följ dessa steg:

1. Placera Traveller HD framför dig så att skärmen är riktad uppåt och i mittenposition samt förstöringsvredet på höger sida av skärmen.
2. Tryck på de två blå låsknapparna på ytterkanterna av rullhjulet.
3. Vik ner skärmen tills den låses i sin stängda position.

Viktigt: Använd endast de blå låsknapparna för att låsa upp eller fälla ihop skärmen. Vik inte upp eller ner skärmen med våld.

3. Handhavande

3.1. Använda glidskenan och läsa

Placera Traveller HD på dokumentet som du vill läsa. För att navigera vertikalt använder du rullhjulet och flytta enheten upp och ner över dokumentet. För att läsa eller navigera horisontellt använder du glidskenan som skärmen vilar på och flyttar hela skärmen till vänster och höger efter den rad du önskar läsa.

3.2. Knappar

3.2.1. Ström På / Av

För att starta Traveller HD, tryck in den orange-färgade På/Av-knappen ovanför Förstoringsvredet på höger sida av enheten i 2 sekunder. Traveller HD kommer att spela ett uppstartsljud samt starta i samma visningsläge som när den stängdes av. Tryck på knappen i 2 sekunder igen för att stänga av Traveller HD. Beroende på ströminställningarna i menyn kan Traveller HD starta när du öppnar enheten samt stänga av automatiskt när den viks ihop.

3.2.2. Justera förstoringen

Använd förstöringsvredet på högra sidan av Traveller HD för att justera förstoringen. Vrid uppåt för att öka förstoringen och nedåt för att minska förstoringen.

3.2.3. Välja olika visningslägen

Tryck på den stora blå Lägesknappen mellan knapparna Meny och Läslinje på vänster sida av skärmen för att välja ett av 5 olika visningslägen beroende på hur systemet är konfigurerat:

1. **Fullfärgs fotoläge:** Detta visningsläge visar originalfärgerna för text och bilder.
2. **Läsläge 1:** Detta läge förstärker kontrasten på förgrunden / bakgrunden. Bilder och text visas i förkonfigurerade färger för förgrund och bakgrund, standard är svart text på vit bakgrund. Färger för förgrund och bakgrund kan ändras i menyn i Traveller HD.
3. **Läsläge 2 (alternativt):** Detta läge förstärker kontrasten på förgrunden / bakgrunden. Bilder och text visas i förkonfigurerade färger för förgrund och bakgrund, standard är vit text på svart bakgrund. Färger för

förgrund och bakgrund kan ändras eller inaktiveras i menyn i Traveller HD.

4. **Läsläge 3 (alternativt):** Detta läge förstärker kontrasten på förgrunden / bakgrunden. Bilder och text visas i förkonfigurerade färger för förgrund och bakgrund. Som standard är detta alternativ inaktiverat. Färger för förgrund och bakgrund kan aktiveras och ändras i menyn i Traveller HD.
5. **Läsläge 4 (alternativt):** Detta läge förstärker kontrasten på förgrunden / bakgrunden. Bilder och text visas i förkonfigurerade färger för förgrund och bakgrund. Som standard är detta alternativ inaktiverat. Färger för förgrund och bakgrund kan aktiveras och ändras i menyn i Traveller HD.

3.2.4. Belysning På /Av

Tryck på Lägesknappen i tre sekunder för att stänga av belysningen. Tryck på Lägesknappen i tre sekunder igen för att starta belysningen igen.

3.2.5. Bildtagning

För att ta en bild, tryck ner Bildknappen nedanför Förstoringsvredet. Detta låter dig ta en temporär bild av en text eller en bild. Tryck på Bildknappen igen i 2 sekunder för att spara den temporära bilden. Traveller HD kan spara upp till 1000 bilder.

3.2.6. Meny

Tryck på den blå Menyknappen i mitten markerad med ordet "Menu" för att aktivera inställningsmenyn i Traveller HD. För mer information om menyn i Traveller HD, läs i kapitel 4.

3.2.7. Läslinje

Traveller HD kan visa en läslinje för att hjälpa dig att positionera enheten rakt över ett dokument. För att aktivera läslinjeen, tryck på den blå Linjeknappen nedanför Lägesknappen på vänster sida av enheten i 2 sekunder. Tryck på samma knapp igen för att dölja läslinjen.

3.2.8. Positionera läslinjen

När läslinjen är aktiverad, tryck på knappen Läslinje i 2 sekunder igen. Linjen blinkar för att indikera att den kan flyttas. Tryck på knappen Läslinje för att flytta linjen till en av sina tre positioner, övre halvan, mitten eller nedre halvan av skärmen. Efter 5 sekunder slutar läslinjen att blinka och avslutar inställningsläget automatiskt.

4. Menyn i Traveller HD

Visar batteristatus och firmware-version



Låter dig visa eller radera sparade bilder



Låter dig justera bildskärmens ljusstyrka.



Låter dig konfigurera ströminställningar



Låter dig slå på och av ljudet



Låter dig slå på och av belysningen




Låter dig ändra färgerna i högkontrastlägena



Låter dig återställa alla inställningar till fabriksinställningar




4.1. Aktivera menyn

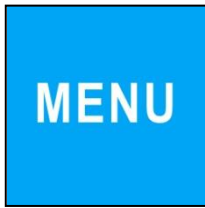

Tryck på Menyknappen i 2 sekunder för att aktivera menyn.

4.2. Navigera i menyn

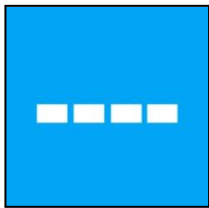


Använd knappen Läslinje eller Meny för att navigera mellan menyobjekt. Lägesknappen aktiverar aktuellt menyobjekt eller bekräftar inställning. Använd knappen Läslinje eller Meny för att ändra en inställning. Använd Bildknappen för att backa i menyn.



4.3. Avsluta menyn



Tryck på Menyknappen eller Bildknappen i 2 sekunder för att avsluta menyn.

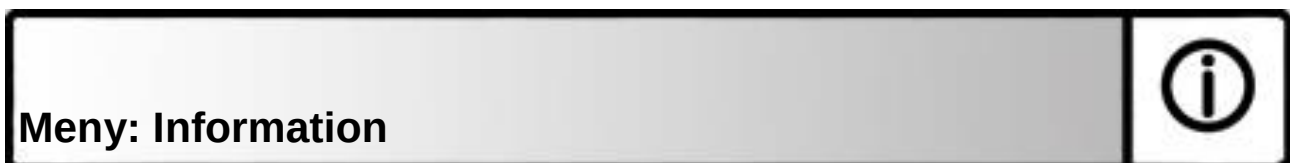

Detta menyobjekt visar batteristatus och aktuellt firmware i enheten. I den här menyn är det inte möjligt att göra några ändringar.

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder.
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen för att flytta nedåt i menyn.
- Tryck på Bildknappen för att avsluta menyn.

Meny: Bilder



Den här menyn innehåller 2 undermenyer:

- Visa: För att visa sparade bilder
- Radera: För att ta bort sparade bilder

Undermenyn Visa

Visa bilderna du har tagit:

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder.
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Bilder och aktivera det genom att trycka på Lägesknappen.
- Välj alternativet Visa i menyn genom att använda knapparna Meny och Läslinje för att bläddra bland alternativen. Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val.
- Välj bilden du vill visa genom att flytta uppåt i bildlistan med Menyknappen och nedåt i listan med knappen Läslinje. Tryck på Lägesknappen för att välja bilden.
- Använd Bildknappen för att återvända till videoläget.



Undermenyn Radera

Ta bort bilderna du har tagit:

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder.
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Bilder och aktivera det genom att trycka på Lägesknappen.
- Välj alternativet Radera i menyn genom att använda knapparna Meny och Läslinje för att bläddra bland alternativen. Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val.
- Välj bilden du vill ta bort genom att flytta uppåt i bildlistan med Menyknappen och nedåt i listan med knappen Läslinje. Tryck på Lägesknappen för att välja bilden.
- Tryck på Lägesknappen för att bekräfta borttagning av bilden eller Bildknappen för att avbryta.
- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny.



Meny: Ljusstyrka



Detta menyalternativ låter dig ljusstyrkan på bildskärmen.

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder.
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Ljusstyrka och aktivera det genom att trycka på Lägesknappen.
- Välj nivå på ljusstyrkan med hjälp av Menyknappen för att öka den och Linjeknappen för att minska nivån. Det finns fem nivåer på ljusstyrka att välja bland. Standardvärde för ljusstyrka är 5.
- Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val.
- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny.

Meny: Ström



Den här menyn innehåller fyra undermenyer:

- Standby: För att ställa in tiden innan Traveller HD går in i standby-läge
- Stäng av: För att ställa in tiden innan Traveller HD stänger av
- Öppna: För att aktivera eller inaktivera funktionen ström på när Traveller HD öppnas.
- Stäng: För att aktivera eller inaktivera funktionen ström av när Traveller HD viks ihop.

Undermeny Standby

Ställer in tiden innan Traveller HD går in i standby-läge för att spara ström. En tryckning på någon knapp tar enheten ur standby-läget. Som standard går enheten in i standby-läget efter 15 minuter.



För att justera standby-tiden i Traveller HD:

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder.
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Ström och aktivera det genom att trycka på Lägesknappen.

- Välj alternativet Standby i menyn genom att använda knapparna Meny och Läslinje för att bläddra bland alternativen. Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val.
- Ange tiden innan enheten går in i standby-läge med Menyknappen för att öka och Linjeknappen för att minska tiden. Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val. Välj ALDRIG för att inaktivera automatiskt standby-läge.
- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny.

Undermeny Avstängning

Ställer in tiden innan Traveller HD automatiskt stänger av. Som standard stänger enheten av sig efter 5 minuter. Dessa 5 minuter aktiveras efter en standard standbytid på 15 minuter. Som standard ska enheten därför automatiskt stängas av efter 20 minuter.



För att justera tiden för automatisk avstängning av Traveller HD:

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder.
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Ström och aktivera det genom att trycka på Lägesknappen.
- Välj alternativet Avstängning i menyn genom att använda knapparna Meny och Läslinje för att bläddra bland alternativen. Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val.
- Ange tiden innan enheten stänger av med Menyknappen för att öka och Linjeknappen för att minska tiden. Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val. Om du väljer ALDRIG kommer funktionen för automatisk avstängning att vara inaktiv.
- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny.

Undermeny Öppna

För att aktivera eller inaktivera funktionen ström på när Traveller HD öppnas:

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder.
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Öppna och aktivera det genom att trycka på Lägesknappen.
- Välj alternativet Öppna i menyn genom att använda knapparna Meny och Läslinje för att bläddra bland alternativen. Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val.
- För att aktivera funktionen ström på när enheten öppnas, välj alternativet STRÖM PÅ med hjälp av Menyknappen eller Linjeknappen.




Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val. Välj INGENTING för att inaktivera funktionen ström på när Traveller HD öppnas.

- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny.

Undermeny Stäng

För att aktivera eller inaktivera funktionen ström av när Traveller HD viks ihop:

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder.
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Öppna och aktivera det genom att trycka på Lägesknappen.
- Välj alternativet Stäng i menyn genom att använda knapparna Meny och Läslinje för att bläddra bland alternativen. Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val.
- För att aktivera funktionen ström av när enheten stängs, välj alternativet STRÖM AV med hjälp av Menyknappen eller Linjeknappen. Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val. Välj INGENTING för att inaktivera funktionen ström av när Traveller HD viks ihop.
- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny.

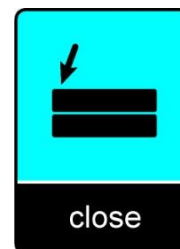

Detta menyalternativ låter dig aktivera eller inaktivera ljud (knappljud och liknande). Som standard är ljud aktiverat.

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder.
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Ljud och aktivera det genom att trycka på Lägesknappen.
- För att aktivera ljud, välj värdet PÅ med hjälp av Menyknappen och Lägesknappen. Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val. Välj värdet AV för att inaktivera ljud.
- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny.

Meny: Ljus



Detta menyalternativ låter dig aktivera eller inaktivera belysningen. Som standard är belysningen aktiverad.

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder.
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Ljus och aktivera det genom att trycka på Lägesknappen. För att aktivera ljus, välj värdet PÅ med hjälp av Menyknappen och Lägesknappen. Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val. Välj värdet AV för att inaktivera belysning.
- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny.

Meny: Färg



Traveller HD stödjer fyra kontrastlägen. För varje av de fyra högkontrastlägena kan förgrunds- och bakgrundsfärg väljas. Tre av högkontrastlägena kan inaktiveras om endast ett högkontrastläge önskas.

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder.
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Färg och aktivera det genom att trycka på Lägesknappen.
- Välj högkontrastläge med hjälp av Menyknappen för att flytta uppåt och Linjeknappen för att flytta neråt i undermenyn färg. Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val.
- Välj en ny färg för högkontrastlägets förgrund och bakgrund med hjälp av Menyknappen för att flytta uppåt och Linjeknappen för att flytta neråt i listan med färgkombinationer. Välj en färgkombination med Lägesknappen. Hökontrastlägena 2, 3 och 4 kan inaktiveras genom att välja värdet AV.
- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny.

Meny: Återställning



Traveller HD kan återställas till sina fabriksinställningar. Alla ändrade inställningar kommer att återgå till sina ursprungliga fabriksinställningar.

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder.
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Återställ och aktivera det genom att trycka på Lägesknappen.
- För att aktivera återställning av fabriksinställningar, välj värdet JA med hjälp av Menyknappen och Lägesknappen. Tryck på Lägesknappen för att bekräfta återställning av alla inställningar till fabriksinställningar. Om du väljer NEJ lämnas alla inställningar såsom de är.
- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny.

5. Ladda batteriet

5.1. Ladda Traveller HD

För att ladda Traveller HD, anslut strömadaptern till 12V strömkontakten på vänstra sidan av enheten. Anslut den andra änden av strömadaptern till ett vägguttag. Ljusedioden bredvid strömkontakten kommer att lysa orange när Traveller HD laddar. När enheten är fulladdad lyser ljusedioden grönt. Om ljusedioden blinkar indikerar detta ett laddningsproblem. Om så är fallet, koppla bort strömadaptern och försök igen.

Laddning av Traveller HD tar ungefär 6 timmar. En fulladdad Traveller HD går att använda i ungefär 3 timmar beroende på ströminställningarna. Av säkerhetsskäl ska endast strömadaptern som levererades med Traveller HD användas för att ladda enhetens batteri.

5.2. Standby och automatisk avstängning

Traveller HD kommer automatisk att aktivera standby-läget efter 15 minuter om ingen knapp har tryckts eller någon bildförändring skett. Tryck på någon knapp för att väcka enheten. Fem minuter efter att Traveller HD har aktiverat standby-läget kommer enheten automatiskt att stänga av. Tryck på den orangea På / Av-knappen för att starta den igen. Tiden för standby och automatisk avstängning kan ändras eller inaktiveras i menyn i Traveller HD. Läs i kapitel 4 om hur du ändrar dessa inställningar.

5.3. Batterivarning



När batteriet när under 5% laddning kommer enheten att varna varje minut genom att visa en symbol för tomt batteri i 2 sekunder. När detta inträffar bör du ladda enheten så snart som möjligt. När batteriet är helt tomt kommer enheten automatiskt att stänga av.

Om enheten inte startar, försäkra dig om att den är laddad.

Bilaga A: Regler och säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder Traveller HD. Behåll denna användarmanual framtida referens.

Tänkt användning

Traveller HD är designad så att den kan användas i sjukhusmiljöer för generella uppgifter såsom att förstora journaler. Traveller HD kan inte användas för kirurgiska ingrepp i kombination med livsuppehållande system.

Varning: Kritiska beslut gällande diagnoser ska inte baseras på bilder som visas på denna enhet.

- Utsätt inte Traveller HD för överdriven värme eller direkt solljus för att undvika brandrisk.
- Ta inte lös några komponenter från Traveller HD. Kontakta Polar Print.
- Undvik risk för elchocker, håll Traveller HD borta från vätskor och kemikalier.
- Hantera Traveller HD varsamt. Våldsam behandling skadar de interna komponenterna.
- Använd inte Traveller HD nära otillräckligt avskärmad medicinsk utrustning.
- Försök inte öppna batterifacket eller plocka ur batteriet.
- Kontakta din återförsäljare för att få service om utrustningen kräver det. **Öppna inte** din enhet eftersom detta upphäver garantin.
- Ta alltid ut strömkabeln och stäng av enheten vid rengöring. Använd en mjuk torr tygbit för att rengöra utsidan. Använd inte rengöringsmedel eller slipmedel eftersom dessa skadar din enhet.

Användning av Traveller HD på annat sätt än det som rekommenderas i denna manual upphäver garantirätten.

Kontakta produktsupport

Om du har frågor gällande användande, installation eller inställning av Traveller HD, var god kontakta närmaste återförsäljare. Se sista sidan av denna manual för en komplett lista med adresser.

Garantivillkor

Optelec garanterar att din Traveller HD skall vara fri från defekter i material eller sammansättning vid tiden för dess leverans.

Garantin är inte överförbar och gäller ej för grupper eller flera användare.

Traveller HD har designats för enskilda slutanvändare för användning i hem-, skol- samt arbetsmiljöer. Optelec förbehåller sig rättigheterna till att reparera eller ersätta en inköpt Traveller HD med en liknande eller bättre produkt.

Under inga omständigheter skall Optelec eller dess återförsäljare hållas ansvariga för indirekta eller konsekvensbaserade skador. Originalanvändarens kompensationer är begränsade till ersättning av Traveller HD-moduler. Denna garanti är endast giltig i inköpslandet och med obrutna sigill. För ytterligare garantiyrkanden eller service under garantiperioden, var god kontakta din återförsäljare.

Optelec tar inget ansvar för användning av denna enhet utöver det som beskrivits i denna manual.

Uppfyllda krav

Denna produkt uppfyller kraven hos följande direktiv:

Council directive 93/42/EEC 14e Juni 1993 beträffande medicinska enheter Class I / Annexe VII.

Elektrisk medicinsk utrusning kräver speciella försiktighetsåtgärder i enlighet med EMC (Electro Magnetic Compatibility) och måste installeras samt användas i enlighet med riktlinjer upprättade av EMC.

WARNING: Användning av tillbehör eller kablar annat än de specificerade och sålda av återförsäljare av Traveller HD som reservdelar kan resultera i förhöjd strålning eller försämrad funktionalitet hos systemet.



Denna enhet bär märkning med godkännande från CE, FCC och UL

Enheten faller under Del 15 av FCC-reglerna.

Användande sker under följande två villkor:

- (1) Enheten får ej skapa skadlig störningar, och
- (2) Enheten måste hantera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan skapa driftproblem.

Bilaga B: Specifikationer

Förstoringsgrad	2.4 – 30 gånger (+/-3%)
Visningslägen	Fullfärags fotoläge Högkontrastläge 1, vitt på svart Högkontrastläge 2, svart på vitt Högkontrastläge 3, (ospecificerat) Högkontrastläge 4, (ospecificerat)
Skärm	13,3" TFT
Batteri	ungefär 3 timmar kontinuerlig användning 6 timmars laddningstid
Integrerad LED-belysning	
Vikt	1995 g
Dimensioner	365x240x49 mm

Operationsförhållanden

Temperatur	+10°C till 35°C
Luftfuktighet	< 70%, ingen kondensering
Höjd över havet	upp till 3000 m
Tryck	700 – 1060 hPa

Lagrings- & transportförhållanden

Temperatur	+10°C till 40°C
Luftfuktighet	< 95%, ingen kondensering
Höjd över havet	upp till 12192 m
Tryck	186 – 1060 hPa

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

info@polarprint.se
help@polarprint.se

Region nord

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 0920-20 34 30

Umeå

Tvistevägen 47 C
907 36 UMEÅ
Tel 090-13 95 72

Region öst

Stockholm

Rosterigränd 14
117 61 STOCKHOLM
Tel 08-442 42 70

Region väst

Falköping

Tel 076-241 69 89

Region syd

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö
Tel 040-97 17 00

Växjö

Merkuriusvägen 3
352 64 Växjö
Tel 0470-39030