

## Användarmanual

### AmbuTech hopvikbara Teknikkäppar

#### **Fäll ut käppen**

Lossa gummibandet som håller ihop käppens delar men håll fortfarande ihop delarna. Håll käppen så högt att den kan vecklas ut utan att röra marken. Håll kvar greppet i handtaget, men släpp de andra delarna. Eventuellt kan man behöva skaka försiktigt på käppen för att alla skarvar skall gå in ordentligt.

#### **Fäll ihop käppen**

Ta tag i den nedersta delen av käppen och dra ut den och vik ned in mot resten av käppen. Gör motsvarande med del för del. Handlovsremmen har en knut längst ut. För den ögla som bildats av knuten över käppen så hålls delarna ihop och vecklas inte ut av misstag.

#### **Skötsel**

Se till att skarvarna är fria från smuts när käppen viks ut. Om skarvarna kärvar så smörj dem med en droppe vegetabilisk olja.

Använd inte käppen om gummibandet som håller ihop käppen är slitet.

#### **Rengöring**

Käppen rengörs enklast med fuktad trasa. Vatten eller milda rengöringsmedel kan användas. Sitter smutsen fast ordentligt kan man skrubba med t ex disksvamp.

#### **Byte av doppsko**

Doppskon sitter fast i det genomgående gummibandet som håller ihop käppen med en krok. Gör så här för att byta doppsko:

1. Dra ut doppskon så mycket att knuten på gummibandet kommer utanför käppen.
2. För in en penna eller motsvarande i mellan knuten och käppens nedre del så att doppskon hänger lös.
3. Kroka av den gamla doppskon och fäst den nya i gummibandet.
4. Dra i doppskon så att gummibandet spänns och ta bort pennan.
5. För den nya doppskon på plats i käppen.

## **Polar Print**

Teknisk hjälp och support  
Tel 020-82 69 13

[info@polarprint.se](mailto:info@polarprint.se)  
[help@polarprint.se](mailto:help@polarprint.se)

Växel  
Tel 010-470 99 00

### **Huvudkontor, Luleå**

Polar Print  
Box 950  
971 28 LULEÅ

### **Umeå**

Twistevägen 47 C  
907 36 UMEÅ

### **Stockholm**

Rosterigränd 14  
117 61 STOCKHOLM

### **Falköping**

Rantens Gårds väg 3  
521 31 FALKÖPING

### **Malmö**

Gasverksgatan 2  
211 29 Malmö

### **Växjö**

Merkuriusvägen 3  
352 64 Växjö