

Brailliant BI med JAWS

Inledning

I denna kommandosammanställning används följande knappbeteckningar:

- Tumtangenter på framkanten: T1 - T4 (från vänster till höger)
- Kommandotangenter till vänster om läsraden: K1 - K3 (K1 längst bak)

Grundläggande

Navigering

Föregående rad: T1

Flytta vänster: T2

Flytta höger: T3

Nästa rad: T4

Flytta vänster på aktuell rad: T1+T2

Flytta höger på aktuell rad: T3+T4

Aktiv markör följer punkten: T1+T4

Punkten följer aktiv markör: T2+T3

Windows-kommandon

Aktivera menyraden: Mellanslag+m

Aktivera snabbmenyn: Mellanslag+M

Aktivera Start-menyn: Mellanslag+P34

Minimera alla program: Kommando d (K145)

Backsteg: P7

Enter: P8

Escape: Mellanslag+e

Växla 6/8 punkt: K235

Ändra punktinställningar: Kommando b (K12)

Informationskommandon

Jaws snabbkomandohjälp: K356

Jawsfönstret: Kommando j (K245)

Lista ikoner i systemfältet: K2356

Lista aktiva program: Kommando s (K234)

Läs fönstertitel: Kommando t (K2345)

Läs systemtid: K1356

Tangentbordshjälp på/av: Kommando h (K125)

Redigeringskommandon

Klipp ut: Mellanslag+x

Kopiera: Mellanslag+c

Klistra in: Mellanslag+v

Ta bort: Mellanslag+d

Internet explorer

Gå bakåt: K12356

Gå framåt: K23456

Lista länkar: K346

Lista ramar: Kommando f (K124)

Lista rubriker: K236

Modifieringstangenter

Alt: Mellanslag+P28

Ctrl: Mellanslag+P38

F-tangenter: Mellanslag+P48

Insert: Mellanslag+P68

Jaws-tangenten: Mellanslag+P58

Shift: Mellanslag+P78

Win: Mellanslag+P18