

OBS:

Detta är endast en kort brukarinformation att ha med vid färd.
Den fullständiga bruksanvisningen skall läsas innan rullstolen får användas!

iChair junior



Luftryck


Länkhjul 2,5bar (35psi)
Drivhjul 2,5bar (35psi)
Däcken har en "Bilventil"

Håll rullstolen ren, kontrollera med jämna mellanrum för bästa driftsäkerhet
så att luftrycket är rätt och lamporna är fungerande.
Rengör rullstolen med mild tvållösning.

Max brukarvikt 75 kg.


Med PG Drives elektronik R-net med LCD färgdisplay
Rullstol med belysning



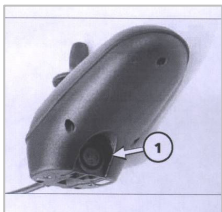


Manöverbox

Laddningskontakt finns i manöverboxens framkant

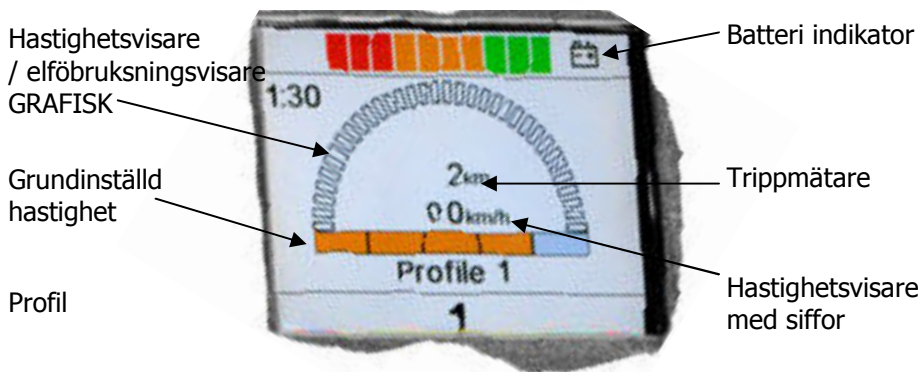

Så här manövrerar du rullstolen:

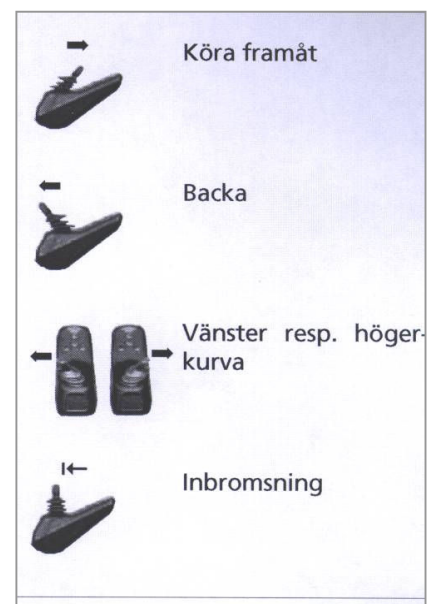

Funktionsindikatorn – MODE – styrfunktion, se sidan 4

Rullstolens mått:

Total bredd med 12" bakhjul: 58 cm

Total längd inkl. benstöd: 97 cm

Total längd exl. benstöd: 79 cm

Höjd med standardsits utan nackstöd: sh 43,5 = 89 cm / sh 47 = 93 cm

Körsträcka i 10 km/h och nya batterier 73Ah ca 35 km, 50 Ah ca 25 km

Vikt på rullstol med 50 Ah (20H) batterier: 108 kg

Rullstolen godkänd i så kallad klass B för begränsat utomhusbruk.

Nödbromsning: Släpp joysticken/manöverreglaget och rullstolen bromsas.


Notera att när man trycker PÅ/AV knappen så bryts kontakten först när man släpper fingret från knappen!

Låsfunktion:

Aktivera låsfunktionen:

1. Rullstolen måste vara påslagen:
2. Tryck på/av-knappen till det hörs en signalton.
3. För joysticken framåt till det ljuder en signalton.
4. För joysticken bakåt tills det ljuder en signalton
5. Släpp joysticken så att den går tillbaka till nollläget (mittenläget), då stängs elektroniken av och man hör en lång signalton.
6. Låset är aktiverat

När du trycker på rullstolen går den inte att köra, man ser symbolen nedan i displayen.

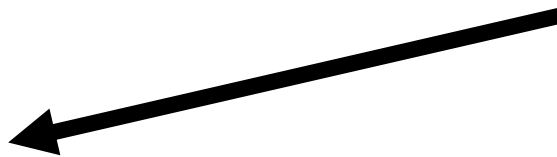

Koppla ur låsfunktionen:

1. Tryck På/Av-knappen
2. För joysticken framåt till det ljuder en signalton
3. För joysticken bakåt tills det ljuder en signalton
4. Släpp joysticken så att den går tillbaka till nollläget (mittenläget), då stängs elektroniken av och man hör en lång signalton.
5. Låset är urkopplat

Kontroller för körning

är manöverboxen kopplats på visar batteriindikeringen batterispänningen efter systemtestet. Med avtagande batterispänning lyser färre ljussegment hos batteriindikeringen.

Färgernas betydelse:

Grön = Batterierna laddade

Gult = Laddning rekommenderas

Rött = Batterikapaciteten är nästan eller helt slut, omedelbar laddning krävs.




Felindikering

Rullstolen har ett inbyggt felsökningssystem som kontrollerar viktiga funktioner. Skulle elektroniken upptäcka ett fel indikeras detta i displayen (15) genom en Error-code (felkod) som hjälper Er att hitta problemet, se tabellen nedan.




- (a) Visar orsak
(b) Visar Error-code

Error-code	Felorsak
1E01	Batteriladdare ansluten
2C00	Batterierna urladdade
1505	Magnetbroms urkopplad
1506	
3800	Motor eller kontakt defekt
3C00	

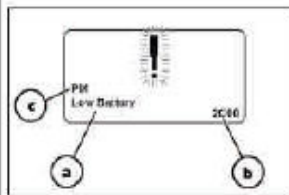


- (c) Visar var felet är

Visar	Felkälla
JSM	Joysticksmul
PM	Elektronik- powermodul
ISM	Ljus-ställdonsmodul
STLM	Ljus-styrmodul
DUAL	Vårdarstyrningen

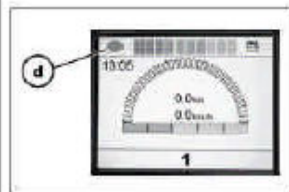

- (d) Visar orsak

Display	Orsak
	Överbelastning av motorerna

MODE funktionen

1



Funktionen på ställdonen regleras enligt följande:

När **MODE** knappen har tryckts

- Joystick åt höger växlar till nästa funktion

2



- Joystick åt vänster växlar till förra funktionen

- Joystick framåt ökar funktionen

- Joystick bakåt minskar funktionen

3



Funktionernas ordning

- 1 Ryggstödvinkling

- 2 Sitslutningen

4



- 3 Benstödvinkling höger och vänster

- 4 Benstödvinkling höger

- 5 Benstödvinkling vänster

5

