

# Monteringsanvisning

## Bröstsele Bodypoint large på Ichair



Montering på Ichair med ortoflex sittsystem och nackstöd

# HEA Monteringsrör för bröstsele på rullstol

## Anvisningar för montering och bruk för 37619K och 37612K

Art. nr: **37619K** (Passar Rea Focus, Spirea2 och Spirea4NG) **37612K** (Passar ETAC Cross och ETAC Panther)

ba\_HEA\_37612K\_37612K\_1303

Produktens syfte är att möjliggöra infästning av bröstselars axelband på rullstolar med låga ryggstöd eller som på annat sätt saknar lämpliga fästpunkter.

### Anvisningar för montering

Delarna är hopmonterade vid leverans. Slutmontering skall utföras av sakkunnig personal.

1. Kontrollera att stolens rygg är hel och rätt monterad.
2. Montera horisontalröret på nackstödsstaget.
3. Kontrollera att alla skruvförband har dragits åt väl.
4. Kontrollera att produkten inte stör övriga funktioner.

### Anvisningar för anpassning

Utprovnigen tillsammans med användaren skall göras av en fackutbildad person. Användaren skall vara bekant med stolen och ha sittdyna och eventuell ryggdyna som skall användas med bröstselen och monteringsröret.

1. Välj förlängningsband (för åtdrag fram eller bak) och fäst dem i bröstselen.
2. Horisontalröret skall monteras så högt att förlängningsbanden löper i höjd med axlarna.
3. Horisontalröret ska vara så nära användarens rygg som möjligt  
– ju kortare band mellan skuldrans överdel och bandlåset på horisontalröret desto större stabilitet i sidled.
4. Avståndet mellan förlängningsbanden skall anpassas så att de dels inte skaver mot användarens hals, dels inte glider av axlarna.



**WARNING:** Av hållfasthetsskäl skall de medlevererade bandlåsen av metall inte ersättas med plastlås.

**WARNING:** Ett höftbälte skall alltid användas tillsammans med ett bröstbälte av säkerhetsskäl.

### Monteringsset horisontalrör



Består av ett horisontellt rör med beslag och förlängningsband. Det kan användas om man redan har en nackstödsstolpe (med eller utan nackstöd) som är fäst i stolen.

**OBS!** Stolpe ingår ej. Använd den plattovala nackstödsstolpen (Rea Focus, Spirea2 och Spirea4NG).

**OBS!** Stolpe ingår ej. Använd nackstödsstolpen, 15x15 mm (ETAC Cross och ETAC Panther).

### Delar som ingår

Del	Artnr	Benämning	Antal
1a	37619	Horisontalrör 22 mm, plattovalt fäste, med ratt	1
1b	37612	Horisontalrör 22 mm, 15x15 mm fäste, med ratt	1
2	HW303	Rörsvep 22 mm	2
3	FS134	Bandlås med lock	2
4	Q911	Förlängning övre band 50 cm, för Bodypoint bröstsele, åtdrag framifrån	2
5	Q912	Förlängning övre band 50 cm, för Bodypoint bröstsele, åtdrag bakifrån	2

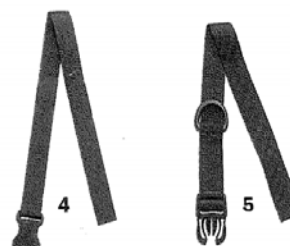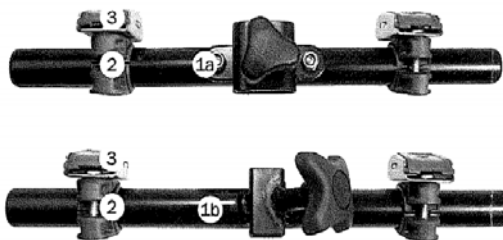

1. Plocka bort nackstödet montera dit monteringsröret för bröstsele på rullstol



2. Borra i ryggramen med 5,2 mm borrar 11 cm från angiven punkt och 3 cm från framkant

3. Gänga M6 fäst bandlåset med 1 st kullerförsänkt M6x12



## Montering på Ichair med Ergoseat sittsystem utan nackstöd



1. Montera bröstselens bakre fästen enligt bild

2. Fästena skruvas fast med M6 x16 kullerförsänkt genom gummiklammer 22mm med M6 mutter



2. Borra i ryggramen med 5,2 mm borrh 11 cm från angiven punkt och 3 cm från framkant
3. Gänga M6 fäst bandlåset med 1 st kullerförsänkt M6x12

