

- A - Tag ett stadigt grepp om manöverboxen
- B - Drag Joysticksgreppet rakt upp
- C - Tryck det alternativa joysticksgreppet rakt ned på joysticken
- D - Kontrollera att joysticken går till nollläger när du släpper den
- E - Kontrollera att joysticken rör sig fritt över hela manöverfältet

De alternativa joysticksgreppen passar alla Meyra/Ortopedia eldrivna rullstolar.





Artnr; H-1062395

Joysticksgrepp
Tetragaffel vertikal

Gaffelhöjd 50/70 mm, Greppbredd 43 mm, gaffeln är gummerad.
Passar till Can-Bus, VR2, VSI.



Artnr; H-487002-0301

Joysticksgrepp T-grepp

Höjd 44mm bredd 80mm.
Passar till Can-Bus, VR2, VSI

Inom ramen för vårt modulsystem har vi dessa joysticksgrepp i vårt försäljningsprogram;



Artnr; H-1054119

Joysticksgrepp
Tetragaffel horisontal

Gaffelhöjd 36 mm, Greppbredd 98 mm, gaffeln är gummerad.
Passar till Can-Bus, VR2, VSI.



Artnr; H-487002-0306

Joysticksgrepp
Joysticksgrepp spak

Höjd 80mm diameter 18-24mm.
Passar till Can-Bus, VR2, VSI.



Artnr; H-208111410

Joysticksgrepp standard
på VSI/VR2

Höjd 41 mm diameter 17,5 mm.
Passar till VR2, VSI, ej Can-Bus



Artnr; H-487002-0303

Joysticksgrepp
svampformad

Modell "Campion"
Höjd 48 mm diameter 45 mm.
Passar till Can-Bus, VR2, VSI.



Artnr; H-487002-0304

Joysticksgrepp för
hakstyring

Modell "Kantarell"
Höjd 25,4 diameter 38,4 mm.
Passar till Can-Bus, VR2, VSI.



Artnr; H-206952320

Joysticksgrepp rund
standard på Can-Bus

Höjd 25,7 mm diameter 18,6 mm.
Passar Can-Bus och VR2, VSI.



Artnr; H-487002-0305

Joysticksgrepp
kula rund

Diameter 38 mm.
Passar till Can-Bus, VR2, VSI.



Artnr; H-487002-0307

Joysticksgrepp softball
gul rund

Diameter 70mm av skumgummi.
Passar till Can-Bus, VR2, VSI.

Notera:
Joysticksgreppen är delvis försedda med distanshylsor på 6,3 mm för infästningen.