


Monteringsanvisning och inställning av benstödsunderdel/fotplatta

Montera benstödsunderdelen

- För in benstödsunderdelens rör i benstödsöverdelen och fäst på önskad höjd med skruvförbandet (1)

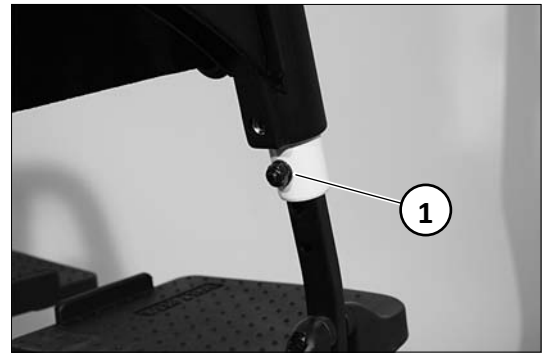

Ställa in fotplattans höjd

- För inställning av höjden ska du demontera skruvförbandet (1)
- Dra ut/in fotplattan till den önskade höjden och montera skruvförbandet (1) igen

Vinkeljustering av fotplattan

- För att göra det ska du lossa skruvförbandet (2) på sidorna så mycket så att kuggningen inte längre griper tag
- Separera fotplattans kuggning och ställ in fotplattans vinkel
- Vrid fast fotplattans skruvförband (2) igen
- ☞ Då måste vinkelinställningens kuggning gripa tag i varandra igen

