

1

Montering av Elbenstöd

Demontera standardbenstöden och lägg in benstödsöverdelarna på lager

Demontera benstödsfästena genom att lossa på skruvarna "A" och främsta skruvarna på plansitsen. Dra benstödsfästet framåt och lägg på lager.

Montera benstödsfästena för elbenstöd i omvänd ordning och skruva åt alla skruvar igen.

Dra kablarna på insidan av ramen bak till elektroniken.

Montera ihop de elektriskt vinkelreglerbara benstödsöverdelarna med respektive benstödsunderdel från standardbenstöden.


Lyft på elbenstöden på hållarna så att de klickar på plats.

2a Inkoppling VR2

Koppla in switchboxens trepoliga kontakt i elektronikkens trepoliga kontakt "OBC"

Koppla ihop switchboxens svarta kontakt med vänster elbenstödsfästes kontakt

Koppla ihop switchboxens blå kontakt med höger elbenstödsfästes kontakt.

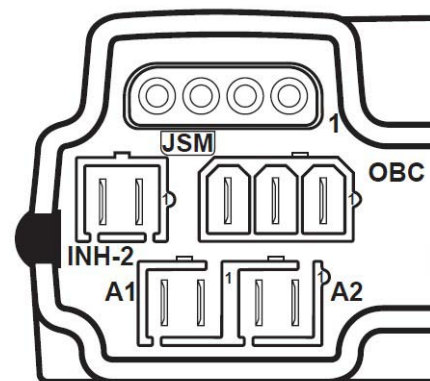

2b


Inkoppling R-net

Montera ställdonsboxen under plansitsen
Flytta manöverboxens buskabel från elektroniken till ställdonsboxen

Montera den nya buskabeln mellan ställdonsbox och elektronik

Koppla in vänster benstödsfästes kontakt i ställdonsboxens utgång "3"

Koppla in höger benstödsfästes kontakt i ställdonsboxens utgång "4"

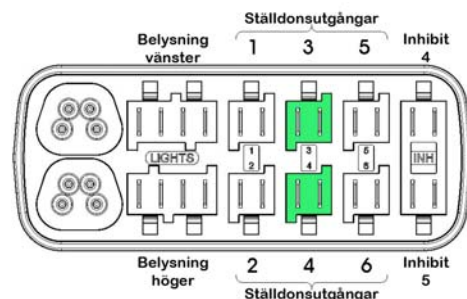

3

Se till att alla kablar är ordentligt uppfästa
Gör funktionskontroll