


## Modell 1

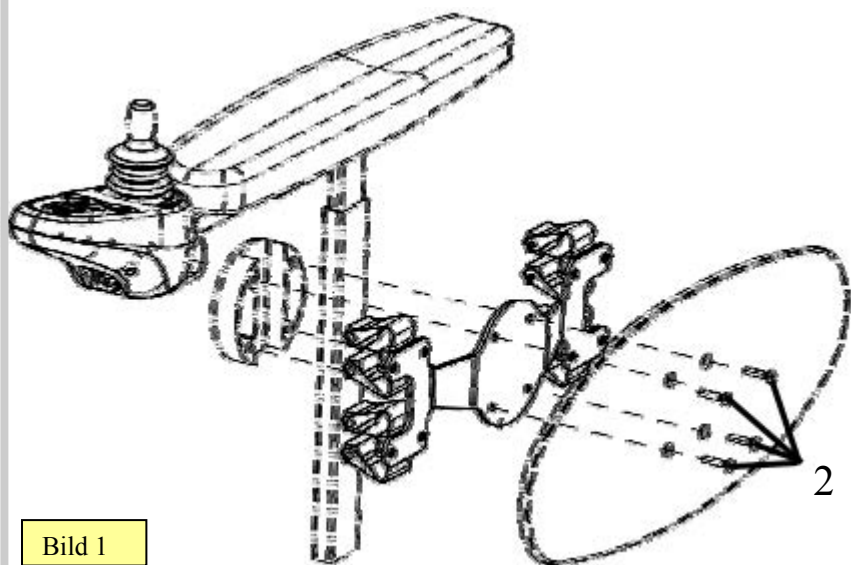

H-1070835  
Kryckkäppshållare för liggande kryck-  
käpp

Skruva bort skruvförbanden (2)  
Placera kryckkäppshållaren mellan  
klädskyddet och armstödet och  
återmontera skruvförbanden (2)  
[Bild 1]

Bild 1

## Modell 2



Bild 3



Bild 4

H-1059340 Kryckkäppshållare för stående kryckkäpp

H-122127-1844 Fäste för kryckkäppshållare iChair

Fäst fästet längst bak på sitsen [Bild 3]

Fäst kryckkäppshållaren på fästet [Bild 4]

Fäst bandet uppe på handtaget på lämpligt ställe beroende på  
konfiguration.



Bild 5