

# Stötdämpning

## Stötdämpning i chassit

För optimal sitskomfort kan fjädringen (1) ställas in enligt användarens önskemål.

### Observera:

- ! Kontrollera innan körning att inställningsringen sitter fast.
- Dra åt lösa inställningsringar så att fjäderns tryckkraft förhindrar att de lossnar ytterligare.

## Ställa in sitsens stötdämpning

Det finns tre olika stötdämpare för olika modeller och maxvikter:

- 1– Stötdämpare för upp till 120kg (modell iChair mc1 (1.610))
- 2– Stötdämpare för upp till 160kg (modell iChair mc2/mc3 (1.611/1.612))
- 3– Fjädrer upp till 200kg (modell iChair mc2 XL (1.614))

Vid inställning av fjädringen ska inställningsringen (2) skruvas in eller ut efter önskemål.

Därvid gäller följande anhaltspunkter:

### Inställningsringen kort framskruvad

#### **(a) – mjuk fjädring**

- ☞ Även för personer med låg brukarvikt.

Fabriksinställning:

Inställningsringen är normalt framskruvad

#### **(b) – medelfjädring**



- ☞ För normal sittkomfort

Inställningsringen långt framskruvad

#### **(c) – hård fjädring**

- ☞ Även för personer med hög brukarvikt

- ☞ I position (a) och (c) så måste minst tre gängtrådar vara synliga!

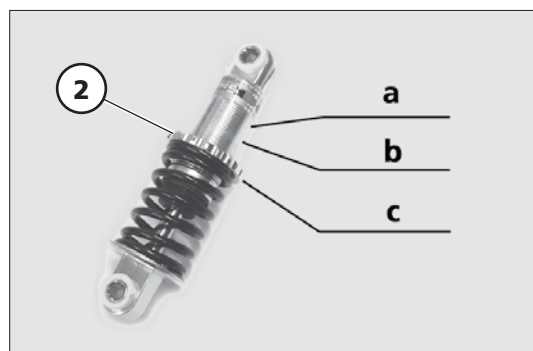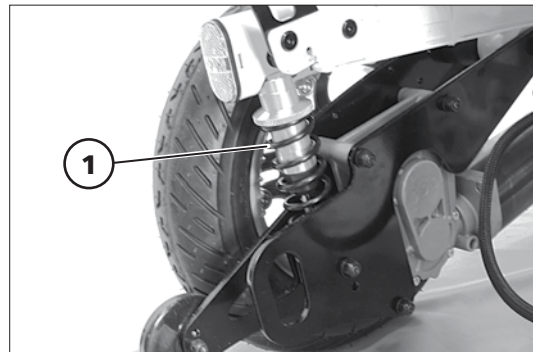

## Byta ut stötdämpare


☞ Beakta även kapitlet *Länkhjul* på sidan 30.

### ! Observera:

- Stötdämparna kan stå under hög spänning.


### Modell iChair mc1/mc2/mc2 XL (1.610./1.611/1.614)

För att byta ut stötdämparna ska skruvförbanden (1) demonteras.

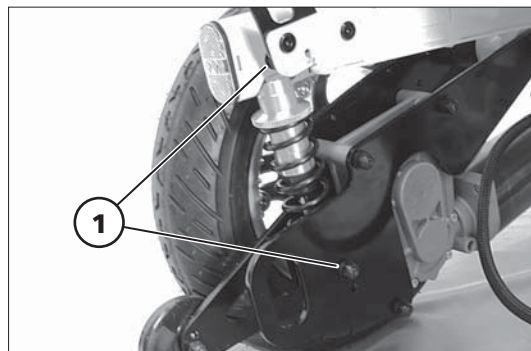

### Modell iChair mc3 (1.612)

För att byta ut de båda fjädrarna för framchassit/svingen ska skruvförbanden (2) demonteras på båda sidorna.

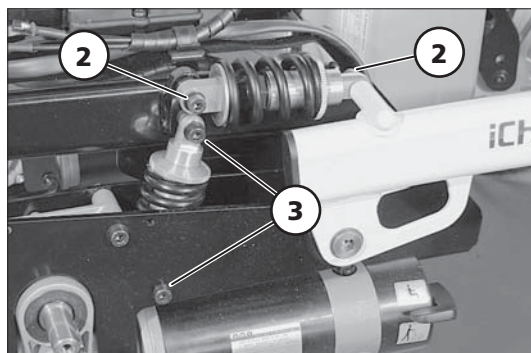

För att byta ut de båda fjädrarna för bakhjulen ska skruvförbanden (3) demonteras på båda sidorna.