

Monteringsanvisning Z-styrning iChair

Z-styrningen är en ergonomisk vårdarstyrning som kan användas antingen med enkelkommando eller dubbelkommando.

Montera Z-styrningen

1. Skruva bort skruvförbanden (2) och ta bort standard körhandtag/ryggbåge (3).
2. Montera täcklocken (4) och sedan Z-styrningens fäste (5) med skruvförbanden (2).
3. Fäst höjdjusteringsrören [6] och sedan Z-styrningen på dem [7] i önskad höjd och dra åt skruvförbanden (8) (9).

☞ Skruvförbanden (8) skall säkras med locktite

☞ Försätt antingen med "Endast vårdarstyrd" eller "Dubbelkommando".





Endast vårdarstyrd

4. Koppla ifrån manöverboxens kontakt från elektroniken och för kabeln framåt.
5. Skruva bort manöverboxen från dess fäste och lossa dess kabel från rullstolen.
6. Fäst manöverboxen vid fästet [9] och sedan fästet på Z-styrningen [7].

☞ Joysticken skall vara centrerad i Z-styrningens spår [10] och skall i viloläge ej vara i kontakt i någon ledd.

7. Fäst manöverboxens kabel så att den ej riskerar att klämmas eller skadas. Koppla in manöverboxens kontakt i elektroniken.

☞ Slutligen ska du genomföra ett funktionstest.

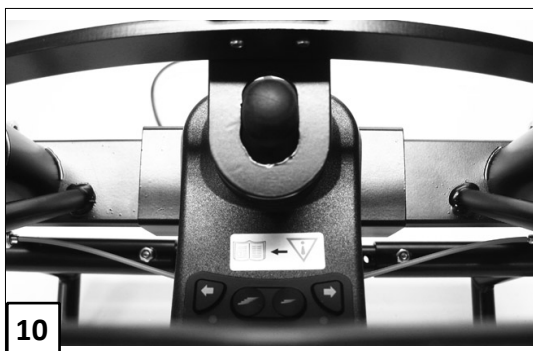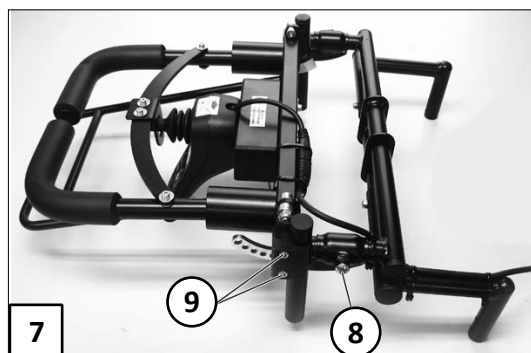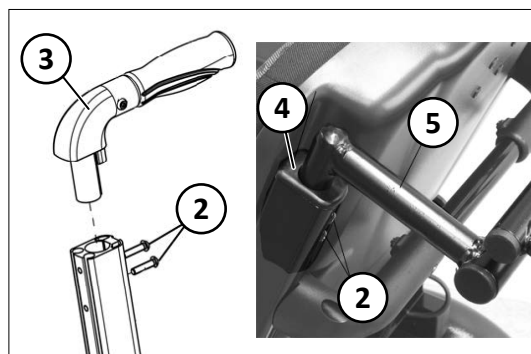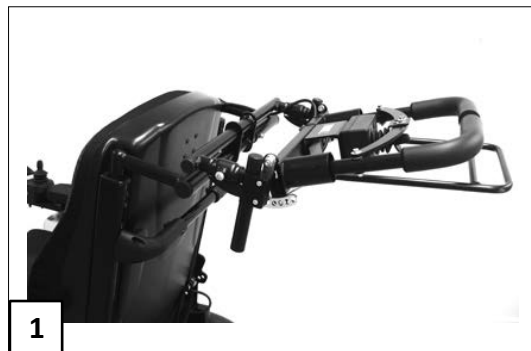

Dubbelkommando

- 4 Skruva fast dubbelkommandoboxen i sitt fäste[11] och sedan i Z-styrningen [12].

☞ Joysticken skall vara centrerad i Z-styrningens spår [13] och skall i viloläge ej vara i kontakt i någon ledd.

- 5 Lossa manöverboxens kontakt från elektroniken, fäst fördelningsblocket och koppla in manöver- och dubbelkommandoboxens kontakter i det.

Observera:

- ❗ Se till att kabeln inte skadas eller knäcks vid kabeldragningen.

- 6 Koppla ihop fördelningsblocket och elektroniken med adapterkabeln.
- 7 Starta rullstolen och välj styrning med dubbelkommandoboxen (tryck på knapp(14) så att dubbelkommandoboxens hastighetsskala lyser gult).
- 8 Stäng av rullstolen.
- 9 På dubbelkommandoboxen; håll in hastighetsknappen (15) och håll joysticken fullt framåt. Fortsätt hålla in dem under steg 10.
- 10 Starta rullstolen.
- 11 Då dubbelkommandoboxens dioder blinkar rött och grönt släpper du joysticken och knappen (15).
- 12 Tryck en gång på hastighetsknappen, en gul stapel lyser nu på hastighetsskalan.
- 13 Tryck och håll in Z-styrningshandtaget neråt så att joysticken når sitt ändläge och tryck en gång på hastighetsknappen (15). Två gula staplar lyser nu på hastighetsskalan.
- 14 Tryck och håll in Z-styrningshandtaget åt höger så att joysticken når sitt ändläge och tryck en gång på hastighetsknappen (15). Alla gula staplar visas nu på hastighetsskalan.
- 15 Starta om rullstolen.

☞ Slutligen ska du genomföra ett funktionstest.



FUNKTIONSTEST

Kontrollera kabeldragningen

Kontrollera att kabeln har dragits korrekt.

Observera:

- ! Kablar får inte sticka ut utanför rullstolen.
- Kablar får inte vara klämda eller vridna i någon av Z-styrningens positioner.

Allmän kontroll

- Kontrollera alla skruvförband, fästen och förbindelser.
- Genomför en visuell kontroll av hela fordonet.
- Växla till påskjutningsläge och kontrollera att fordonet har fri rörlighet.
- Kontrollera att alla belysningskomponenter och elektriska inställningar fungerar.

Provkörning

- Kör sedan försiktigt och iaktta om fordonets körförhållande har ändrats.
- Var uppmärksam på onormala ljud.
- Kontrollera att Z-styrningen fungerar som den skall och att stolen stannar då man släpper handtaget.