


Monteringsanvisning och inställning av amputationsstöd

Montera amputationsbenstödet

- Håll in spaken (1) och trä på amputationsstödet på hållaren uppifrån. Se till att benstödet klickar fast i mittenläge och ej kan vridas åt sidorna.

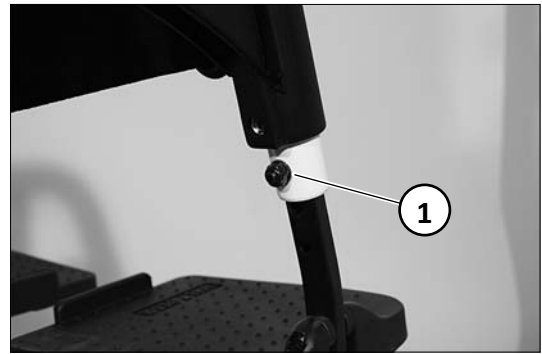

Ställa in amputationsstödet höjd

- Håll i amputationsstödet samtidigt som du lossar på skruvförbandet (2).
- Dra upp/ner amputationsstödet till den önskade höjden och montera skruvförbandet (2) igen



Vinkeljustering av amputationsstödet

- För att göra det ska du lossa skruvförbandet (3) så mycket så att kuggningen inte längre griper tag
- Separera amputationsstödet kuggning och ställ in önskad vinkel
- Vrid fast fotplattans skruvförband (3) igen
- ☞ Då måste vinkelinställningens kuggning gripa tag i varandra igen

Djupinställning av amputationsstödet

- Håll i amputationsstödet samtidigt som du lossar på skruvförbandet (2).
- Dra upp/ner amputationsstödet till den önskade höjden och montera skruvförbandet (2) igen