



R-Net

Teknisk information





R-Net

Batterimätarens indikeringar




Batterimätare: fast indikering

Viloläge: blinkar var 2.5sec

Laddar: stegar uppåt

Joystick ej centrerad: stegar upp och ner

Felindikering: snabb blinkning (se felkodslista)

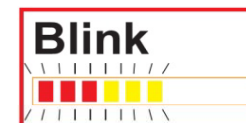



R-Net

Hastighetsindikationer



Maxhastighet : fast indikering

Vald profil : fast indikering


Rullstolen låst : stegar upp och ner

Reducerad maxhastighet : snabb
blinkning



R-Net



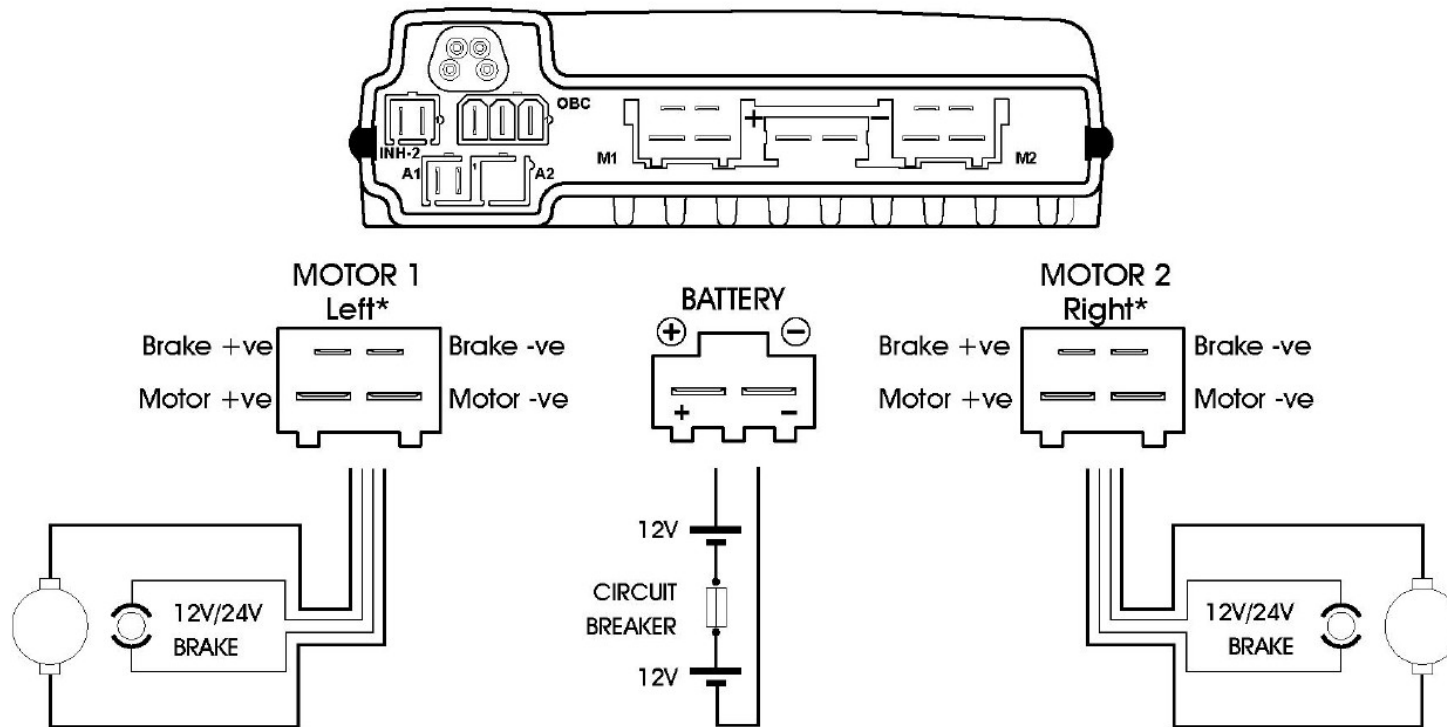







Kopplungschema





R-Net

Felkoder (indikeras på batterimätaren)

Indication	Faultcode	Possible Reason	Recommended Action
	2C00	Low battery voltage	Recharge Batteries
	3B00	Left Motor Disconnected	Check Motor Connector
	3D00	Left Motor Wiring Fault	Check Motor
	3C00	Right Motor Disconnected	Check Motor Connector
	3E00	Right Motor Wiring Fault	Check Motor
	1E04	Inhibit Active	
	3000	Joystick Fault	Contact Service Agent
	4401	Controller Fault	Contact Service Agent
	1502	Safety Brake Trip	Check Freewheel Mode
	1600	High Battery Voltage	



R-Net

Låsa rullstolen

- Medans rullstolen är påslagen, tryck och håll in ON/OFF-knappen.
- Efter 1 sekund så ger manöverboxen ifrån sig ett pip. Släpp nu ON/OFF-knappen
- För nu joysticken framåt tills manöverboxen ger ifrån sig ett pip (ca 1 sekund)
- För nu joysticken bakåt tills manöverboxen ger ifrån sig ett pip (ca 1 sekund)
- Släpp joysticken, manöverboxen kommer nu ge ifrån sig ett långt pip
- Rullstolen är nu låst



R-Net

Låsa upp rullstolen

- Starta rullstolen (hastighetsindikatorn kommer att stega upp och ner)
- För joysticken framåt tills manöverboxen ger ifrån sig ett pip (ca 1 sekund)
- För joysticken bakåt tills manöverboxen ger ifrån sig ett pip (ca 1 sekund)
- Släpp joysticken, manöverboxen kommer nu ge ifrån sig ett långt pip
- Rullstolen är nu upplåst