

Lathund:

Inhalera med nebulisatorn **PARI LC SPRINT**[®]

Följ alltid nebulisatorns och kompressorns bruksanvisningar. Där finns en detaljerad beskrivning. Dessa medföljer apparaterna. Vid förlust kan bruksanvisningen laddas ner från www.activecare.se eller beställas på 031-91 75 25.



1

Tvätta alltid händerna noga före varje inhalering.



2a

Anslut munstycke eller mask.



2b

Vid användning av en BABYmask, använd BABY-vinkeln. Rikta in masken utifrån hur babyen ligger.



3

Koppla ihop nebulisator och kompressor med anslutningsslangen. Anslut kompressorn till elnätet.



4

Öppna locket.



5

Fyll på inhalationslösning och stäng locket.



6

Sitt upprätt och avslappnat. Slå på apparaten.



7a

Ta munstycket mellan tänderna och låt läpparna sluta tätt om munstycket.



7b

Håll nebulisatorn upprätt. Masken måste sluta tätt.




8

Andas in långsamt och djupt genom munstycket/masken. Andas sedan ut långsamt och fullständigt. Ett förändrat ljud från nebulisatorn signalerar att inhalationen kan avslutas.



9

Stäng av apparaten. Ta av nebulisatorn från slangen. Vid ev. kondens i slangen se komplett bruksanvisning.

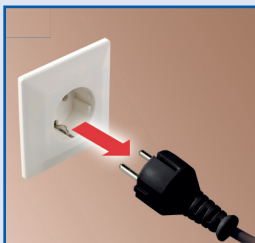

10

Ta ur kontakten från vägguttaget.

Lathund: Hygien och underhåll av PARI LC SPRINT® nebulisatorer – för hemmabruk

Följ alltid nebulisatorns och kompressorns bruksanvisningar. Där finns en detaljerad beskrivning. Dessa medföljer apparaterna. Vid förlust kan bruksanvisningen laddas ner från www.activecare.se eller beställas på 031-91 75 25.

Gör följande efter varje användning:

1



Rengöring

- Plocka isär nebulisatorn.
- Rengör med varmt vatten och lite diskmedel.
- Spola alla delar noggrant under rinnande vatten.

2



Desinfektion

- Kokas i en tillräcklig mängd vatten (15 minuter)
- eller
- I vaporisator (ångdesinfektor, egentligen för nappflaskor).

3



Torkning

- Lägg delarna på en torr, luftfri duk.

4



Förvaring

- Förvara delarna på en torr och dammfri plats.

5



Underhåll: minst en gång per år

- Byt luftfilter, nebulisator och anslutnings slang (PARI årsförpackning). Byt tidigare om rengöring ej kan ske eller vid skada.

Active Care Sverup AB

Uggleålsvägen 47

427 40 Billdal

Tel: 031-91 75 25

Fax: 031-97 75 05

E-post: info@activecare.se

Internet: www.activecare.se

Specialister på effektiv inhalation



PARI GmbH

Moosstrasse 3 • 82319 Starnberg • Germany

Tel.: +49 (0) 8151-279 0 • Fax: (0) 8151-279 101

E-Mail: info@pari.de • www.pari.de