




SÅRBEHANDLING
INTENSIVVÅRD
STOMIVÅRD
UROLOGI
OPERATION
FIXATION

CarboFlex®

Förbandet som tar bort lukt

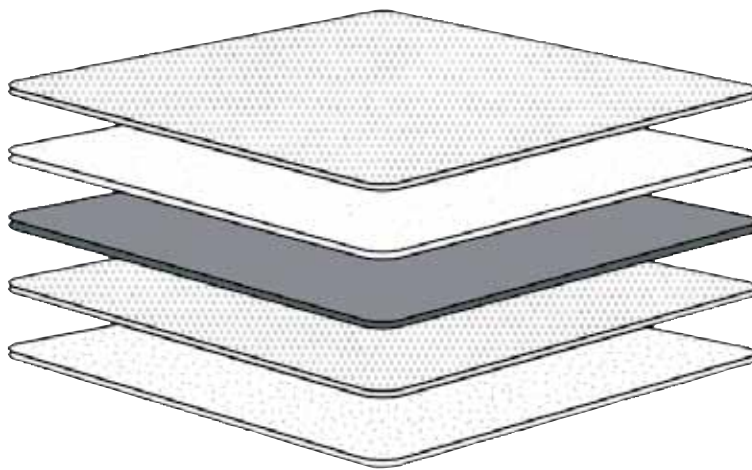


CarboFlex® förband är ett lukt- och vätskeabsorberande förband som kan användas till vätskande och illaluktande sår. Absorptionsytan absorberar vätska och skapar en fuktig sårmiljö. Kolfiltret i CarboFlex förband absorberar lukten, vilket ger en luktreduktion. Resultatet kan bli en lägre omlägningsfrekvens, kostnadseffektiv behandling och mindre lidande för patienten.



ConvaTec

Realise the possibilities™

CarboFlex®

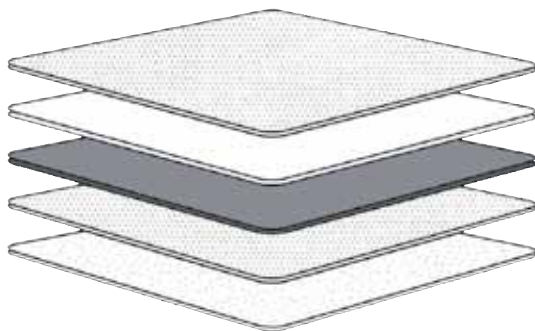

CarboFlex förband bevarar en fuktig sårmiljö och avlägsnas enkelt från såret.

Kolfiltret som består av aktivt kol, absorberar lukt från såret.

Gynnsam såråkningsmiljö – absorptionsytan (Hydrofiber® och alginat) bildar en gel som skapar en fuktig sårmiljö.

ABSORBERAR LUKT OCH SÅRVÄTSKA

CarboFlex förband har en god och snabb absorptionsförmåga och binder in sårvätskan. Risken för maceration reduceras och antal förbandsbyten minimeras. CarboFlex förband är lämpligt att använda vid vätskande- och illaluktande sår.

BEHAGLIG FÖR PATIENTEN

CarboFlex förband bildar en gel i kontakt med sårvätska, och är därför lätt att ta bort utan att orsaka obehag för patienten.

ENKEL ATT ANVÄNDA

CarboFlex förband läggs direkt i såret och appliceras med en marginal på 3 cm utöver sårkanterna. CarboFlex förband kan användas som primär- och sekundärförband.

Vid djupa sår kan sårhålan fyllas ut med AQUACEL® Hydrofiber® förband.

CarboFlex förband kan användas på infekterade sår som behandlas av medicinskt ansvarig personal. Vid infekterade sår rekommenderas AQUACEL® Ag med 1,2% joniserad silver som primärförband.

FAKTA

CarboFlex® förband är ett sterilt ej vidhäftande förband med ett absorberande sårkontaktskikt (bestående av Hydrofiber® och alginat), ett mitskikt av aktivt kol och ett smidigt vattenavstötande lager. Förbandet får ej klippas eller skäras sönder. **Lägg den fibrösa ytan mot såret.**

INDIKATIONER

CarboFlex förband kan användas vid behandling av akuta och kroniska sår med dålig lukt, t ex bensår, trycksår, cancersår och diabetessår, akuta sår som t ex postoperativa sår, tagställen och delhudsbrännskador. CarboFlex förband kan användas på infekterade sår. Vid behandling av infekterade sår rekommenderas AQUACEL® Ag förband med 1,2% joniserad silver som primärförband.

BYTESINTERVALL

Max tre dagar eller så byts förbandet när det är mättat. Om såret är infekterat bör CarboFlex förband bytas mer frekvent.

FÖRVARING

Förvaring sker i rumstemperatur. Undvik starkt ljus, kyla och hög luftfuktighet.

STERILISERINGSMETOD

Gammasteriliserad

KLASSIFICERING

CarboFlex är CE-märkt och tillfredställer relevanta miljö- och säkerhetskrav.

HÅLLBARHET

5 år.

För ytterligare information se bruksanvisning i förpackningen.

CarboFlex®

Storlek	Antal/förp	Kod	Varunummer
10 x 10 cm	10	403202	868273
8 x 15 cm (oval)	5	403203	868281
15 x 20 cm	5	403204	868299



ConvaTec

Realise the possibilities™

ConvaTec (Sweden) AB
Box 15 138
167 15 Bromma
Sweden
ConvaTec kundservice:
Tel: 020-21 22 22
Fax: 08-704 89 98
E-mail: convatec.kundeservice@convatec.com
www.convatec.com