

Rekonditioneringsanvisning MagniLink produkter

Utför bara den rekonditionering/underhåll som anges i denna instruktion. All annan service skall utföras av behörig serviceman. Kontakta alltid behörig serviceman eller LVI vid osäkerhet.

- Om en MagniLink produkt ska rekonditioneras bör den ses över. Kontrollera att produkten inklusive kablar och kontakter inte är skadade. Kontakta befintlig serviceman eller LVI vid eventuellt utbyte av skadade delar.
- Om produkten behöver rengöras, dra ut nätsladden från vägguttaget och använd en lätt fuktad (ej våt) trasa. Använd i första hand vatten eller rengöringsmedel som är avsett för monitorer och datorer. Använd endast milda rengöringsmedel. Spraya ej rengöringsmedel direkt på produkten, då det är risk för att vätska tränger in i apparaten som sedan kan orsaka elektriska stötar.
- Vid slitage kan eventuell läsbordsmatta och lampa bytas. Kontakta befintlig serviceman eller LVI vid eventuellt utbyte.
- Alla reparationer ska utföras av LVI eller av LVI utsedd/godkänd serviceman. Serviceavdelningen på LVI kontaktas genom service@lvi.se eller 0470-72 77 07.

Tillverkare: LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö

Tel: 0470 - 727700
Fax:0470 - 727725

info@lvi.se
www.lvi.se