


FÖRSKRIVARINFORMATION

Introduktion

Stimulite® sittdynor är avsedda för rullstolar och tillverkade för att förebygga trycksår. De sittdynor som har 2 lager Stimulite® material, *Slimline™*, *Sport*, *Smart & Silver*, är främst avsedd för att förebygga trycksår. De sittdynor med 3 lager Stimulite® material, *Contoured*, *Classic* samt *Classic Bariatric* är avsedda för högriskbrukare. Alla Stimulite produkter är mycket luft- och fuktgenomsläppliga allt för att man skall sitta torr och sval.

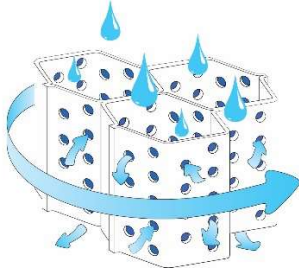

Upprättningsinstruktion

Placera dynan i rullstolen med den släta sidan uppåt och den avrundade sidan bakåt med uttag för ryggstödsrören.

Kardborrebanden på överdraget skall vara neråt och dragkedjan bakåt. Låt personen sitta på dynan minst 30 minuter då den anpassar sig under en första inprovning. Önskar man förändra ex sittvinkel använd exempelvis våra kilar (kil3 och kil5). Dynan kräver ingen övrig inställning. Du kan skära i dynan för att få den att passa optimalt i stolen enligt nedan beskrivning.

Standard storlekar:

36x36 cm	41x41 cm	46x41 cm
36x41 cm	41x43 cm	46x43 cm
36x46 cm	41x46 cm	46x46 cm
36x51 cm	41x51 cm	46x51 cm
38x41 cm	43x41 cm	51x41 cm
38x43 cm	43x43 cm	51x46 cm
38x46 cm	43x46 cm	51x51 cm
38x51 cm	43x51 cm	

Rund botten för hängmattesits (S)

– Standardbotten för plan sits.



Inkontinensskyddet om det beställts placeras under dynan inuti överdraget.

Dynans vikt

Vikt 41x41 cm ca, *Slimline™* och *Sport* 1 kg, *Classic* och *Contoured* 1,5 kg. *Bariatric* 3 kg.

Höjder:

<i>Slimline™</i> (SM och SMXS)	6 cm
<i>Sport</i> (SP)	5 cm
<i>Contoured</i> CD & CDXS & CDBBXS)	8 cm
<i>Classic</i> (CL och CLXS)	6 cm
<i>Silver</i> (Si)	3 cm
<i>Smart</i> (SMRT)	5 cm
<i>Pediatric Contoured</i> (PDCD)	7 cm
<i>Pediatric Corbee™</i> (PD)	5 cm
<i>Classic Bariatric</i> (CLBA)	7 cm

Max brukarvikt

Barndynor (PD, PDCD)	Max 50 kg
Vuxendynor	40 – 130 kg
<i>Classic Bariatric</i>	120 - 360 kg

Innehåll produkt

Stimulite® sittdynor är tillverkade av termoplastisk polyuretanplast (TPU). Överdraget består av Cordura® Kevlar (brandfilt) och polyester.

Tvätt-rengöring

Stimulite® sittdyna kan antingen handtvättas eller maskintvättas. Gäller både dyna och överdrag. Tvätta dyna och överdrag separat i medföljande tvättpåse. Tvätta gärna dynan ofta (1 gång/månad) då detta ökar livslängden.



Max 30 min

Max 50°

Använd kulörtvättmedel utan blekmedel.

Efter tvätt, sätt på överdraget

Rekonditionering

Virkonlösning kan användas för att rengöra Stimulite®-produkter från MRSA-bakterien.

Kontroll av dyna

Det är lämpligt att regelbundet kontrollera sin sittdyna. Tag då av överdraget och "känn" på cellerna. Det skall vara fjädrande spänstiga. Om de inte fjädrar tillbaka är dynan uttjänt.

Beräknad livslängd

Beroende på skötsel och användning beräknas Stimulite® sittdynor bibehålla sin funktion 3-4 år

Beräknad livslängd

Beroende på skötsel och användning beräknas Stimulite® sittdynor bibehålla sin funktion 3-4 år

Brandtest

Samtliga Stimulite® sittdynor är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 och SS-EN 1021 samt CE-märkta. Överdragets flamskydd är ett tunt stretchtyg i Kevlar, vilket är fäst under överdragets ovasida.

MDR2 (EU) 2017/745

CE-märkta enligt denna förordning.

Garanti

2 års garanti gäller för Stimulite® sittdynor. Garantin inkluderar skador som beror på tillverkning eller materialfel. Garantin täcker inte handhavande eller förslitningsskador.

Skrotning

När produkten är förbrukad lämnas den för plaståtervinning.

Lycka till med din Stimulite® sittdyna



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB

Bultgatan 17

442 40 KUNGÄLV

Tel: 031-52 18 95

email: order@rehabshop.com

www.rehabshop.se, www.stimulite.se

Med bibehållen CE märkning får Du förändra dynan på följande sätt:

BAKKANT: Man får skära ut för rullstolsrör. Tag då av hörnet på dynan lika stort som röret har i diameter.

Utanför MDR (specialanpassning) tål dynan också följande: Den kan skäras till med en vass kniv, värmekniv eller bandsåg. Dynan "repar" ej upp sig utan bibehåller sin form efter att den är skuren.

SITTBREDD: Du kan skära i längsriktning max 2,5 cm per sida i dynan.

FRAMKANT: Du kan skära av dynan i djupled och Du kan skära olika långt för varje ben om du vill. Gör då ett vertikalt 90° snitt mot skärytan. Max 5 cm totalt i djupled.

DYNANS HÖJD: Det är inte tillåtet att förändra eller skära i sittytan eller på undersidan på dynan. Ej heller att korta hela dynan i bakkant.

