

## AXILLARKRYCKA

Artikelnummer: 126895, 126896

### Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Kryckan får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnar under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttagas.
- Kryckan bör ej brukas utan pauser under en längre tid då axlar och armhålor kan överbelastas.
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk och skickas in för service.
- Max brukarvikt 150 kg.

**Avsedd användning:** Axillarkryckan är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max 150 kg

Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



max  
85°C  
3 min

Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

### Teknisk specifikation

**Art nr: 126895**

Axillarkrycka

Ställbar höjd:  
112-132 cm

Vikt: 0,9 kg

**Art nr: 126896**

Axillarkrycka, lång

Ställbar höjd:  
122-143 cm


Vikt: 0,9 kg

Material: Aluminium

Tillverkad av:  
**Swereco Group AB**  
Barnhusgatan 4  
SE-111 23 Stockholm  
Tel: +46 8 444 38 20  
Fax: +46 8 754 30 80  
www.swereco.se  
info@swerecogroup.se

## Användning:

1. För höjjustering av handtaget använd dig av en vingmutter så som bilden nedan visar.
2. För justering av höjden på kryckan tryck in knappen så som bilden visar och justera till önskad höjd.
3. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

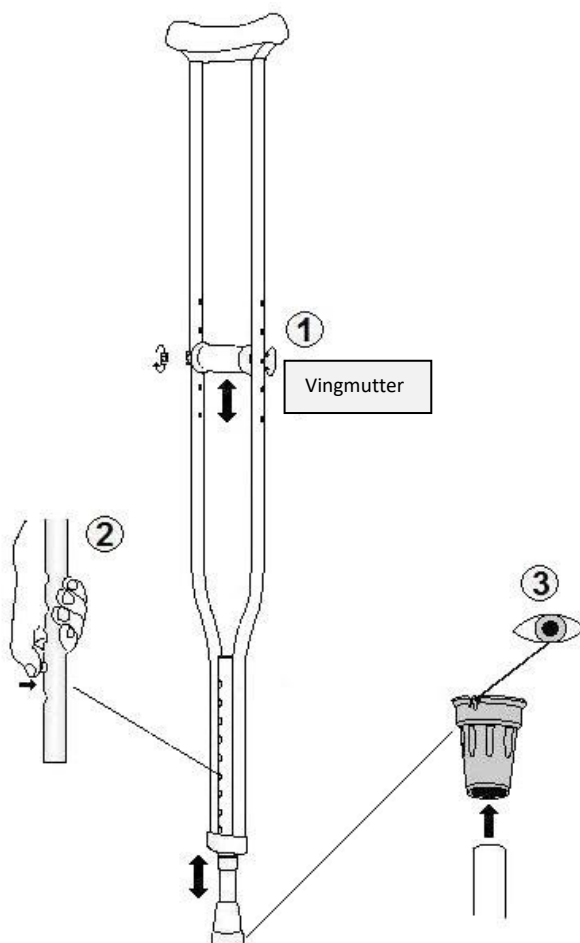

**Skötselansvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

## Tillbehör:

Art. nr 123300, Isdubb spets  
Art. nr 123350, Isdubb kronan  
Art. nr 123360, Isdubb med 4 piggar

## Reservdelar:

Art. nr 120760, Doppsko  
Art. nr 12689501, Handtag  
Art. nr 12689502, Polstring