

Anpassa Handi5



En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5.



ABILIA

Om den här guiden

Handi har stora anpassningsmöjligheter, vilket både är en styrka och en svaghet.

Det är en **styrka** eftersom Handi med största sannolikhet kan ställas in efter användarens behov och önskemål.

Det är en **svaghet** eftersom det ställer höga krav på den stödperson som ska göra anpassningarna. De behöver känna till alla funktioner och dessutom kunna visa dem på ett pedagogiskt sätt för användaren.

Med denna guide presenteras de olika inställningarna visuellt och gör det därmed enklare att ta ställning till vad som ska väljas. Längst ned på varje sida visas hur man gör inställningen.

Det är inget krav att gå igenom alla sidor, utan man väljer bara de som är aktuella.





Handi Startmeny – välj funktioner

Vilka Handifunktioner är aktuella för användaren?

Funktioner som är markerad med * gäller inte för Handi5 version 5.5 eller senare.

Kalender	<input type="checkbox"/>
Anteckningar	<input type="checkbox"/>
Röstanteckningar	<input type="checkbox"/>
Album	<input type="checkbox"/>
Kamera	<input type="checkbox"/>
Checklista	<input type="checkbox"/>
Kontakter	<input type="checkbox"/>
Telefon	<input type="checkbox"/>
SMS	<input type="checkbox"/>
Formulär *	<input type="checkbox"/>
Formulärsvar *	<input type="checkbox"/>
Krisplan	<input type="checkbox"/>
Prisräknaren	<input type="checkbox"/>
Spelaren *	<input type="checkbox"/>
Snabbinställningar	<input type="checkbox"/>
Miniräknare/Kalkylator	<input type="checkbox"/>
Foton	<input type="checkbox"/>
Batteri	<input type="checkbox"/>

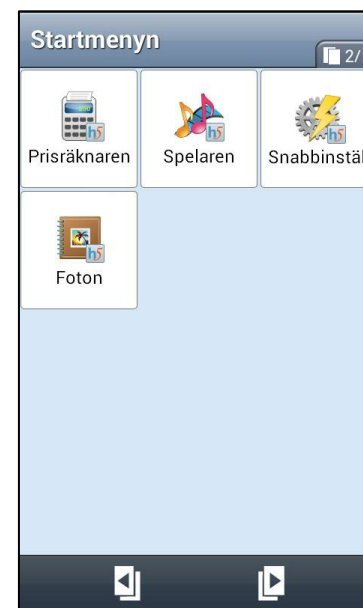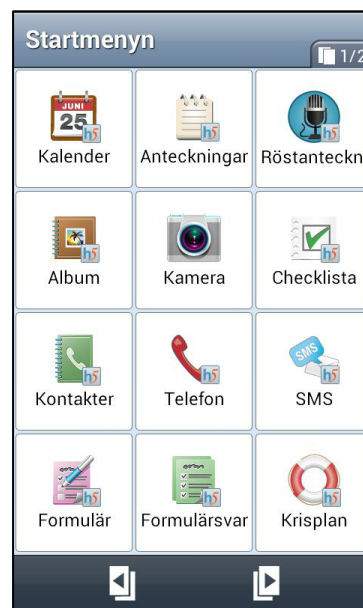


Handi Startmeny – välj genvägar

Ska någon av dessa kalenderfunktioner kunna startas direkt från Startmenyn?

Lägga in aktivitet
Starta timer
Veckovyn
Månadsvyn
Klockvyn


<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

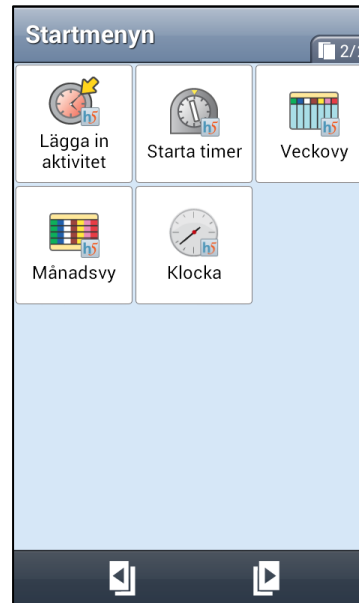


Handi Startmeny – utseende

Hur ska programmen visas i Startmenyn?


- Med ikoner
- Med rader
- Standard (liknar Android)

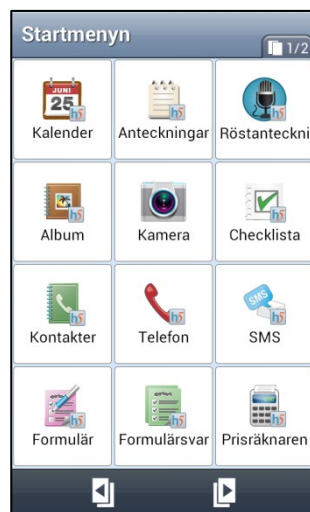

Handi Rutnät

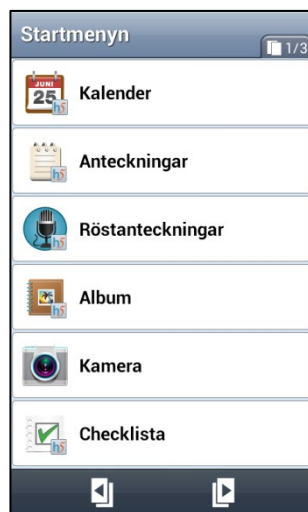

Handi Rader

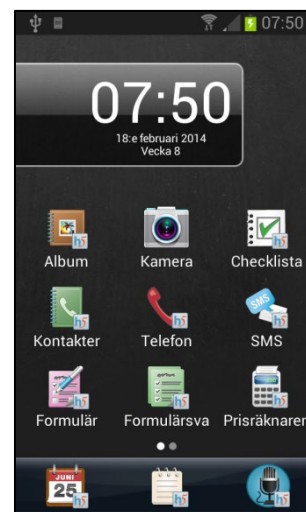

Standard



Åtkomst till Inställningar

Ska det finnas ikon för Inställningar i Startmenyn?

Ja
Nej

Ska Inställningar kodskyddas?

Ja
Nej

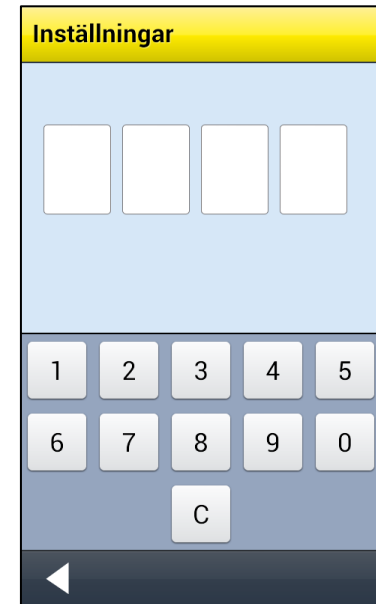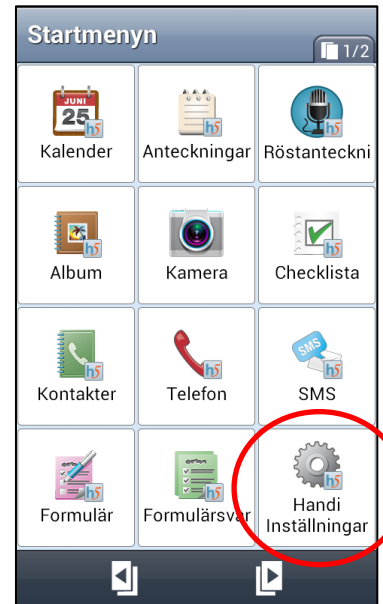

Ikon: Välj i **Inställningar** | **Startmenyn** | **Ordna appar**.
Kodskydd: Välj i **Inställningar** | **System** | **Kodskydd Inställningar**.


Knapparnas utseende

Vilket tema ska knappraden ha?

Klassisk knapprad
Modern knapprad



Klassisk

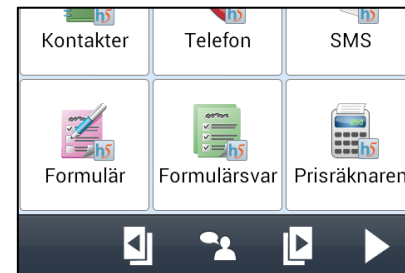

Modern

Talstöd

Ska talstöd (talsyntes) användas?


Ja

Nej

Ska det vara manlig eller kvinnlig röst?

Man

Kvinna

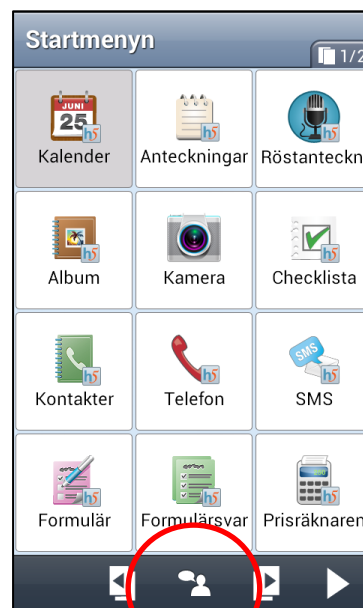


Talstöd: Välj i **Inställningar** | **System** | **Talstöd** | **Talstöd-inställningar**.
Röst: Välj i **Inställningar** | **System** | **Talstöd** | **Välj röst**.

Bläddra i listor

Ska man kunna dra med fingret upp/ned eller trycka på Bläddra-knappar?

Använd rullistor (dra)
Använd knappar

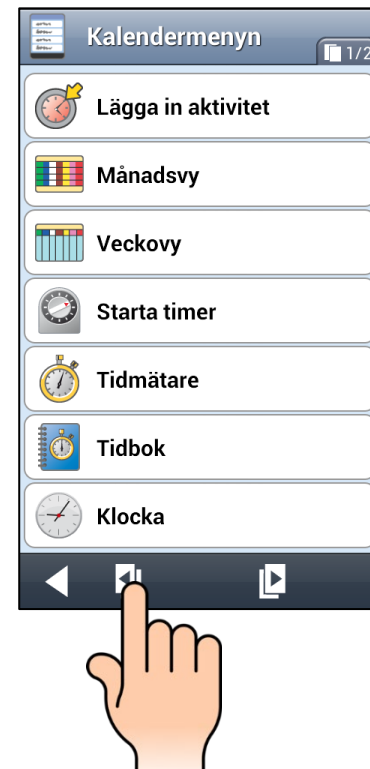

Ska man kunna dra med fingret höger/vänster och byta sida?


Använd sidsvepning

(Gäller bara i Startmenyn Handi Rutnät, Album och bildarkivet.)

Tangentbord

Vilket tangentbord ska användas?

Handi Tangentbord
Inbyggt tangentbord

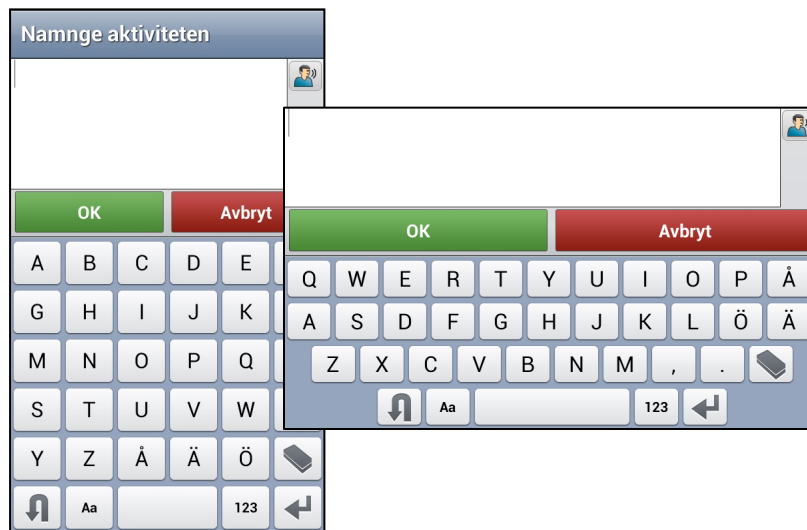


Handi tangentbord
ABC-ordning i stående läge
QWERTY i liggande läge



Inbyggt tangentbord
QWERTY, med ordprediktion
(Bilden visar Handi Xcover 2)

Bildstöd

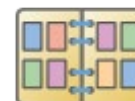

Behöver användaren bildstöd?

Ja

Nej

Om ja, vilka bildbaser?

Handi-bilder



Rolltalk-bilder

PCS

Pictogram

Bildfabriken

Annat

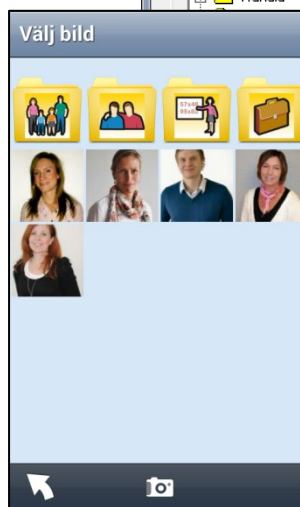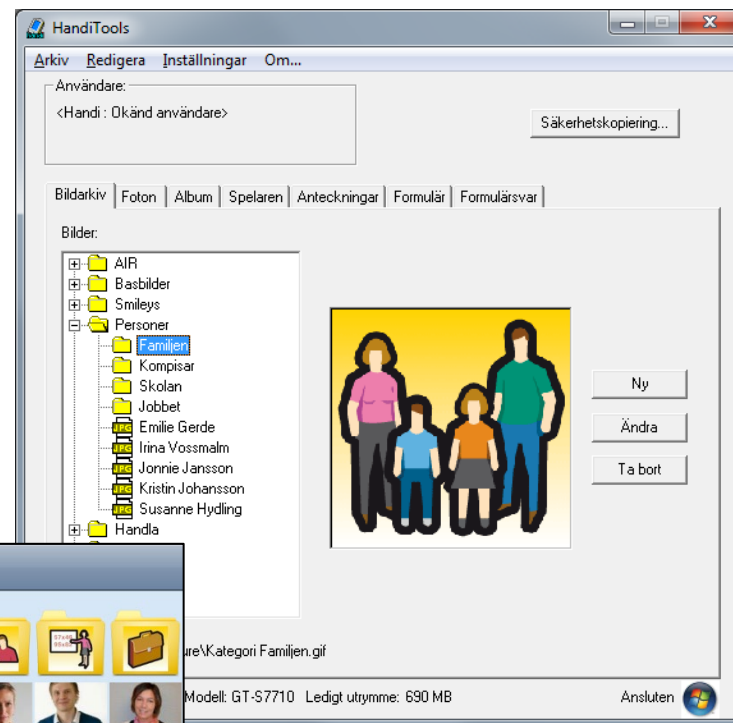

Kameran kan användas för bildstöd!

Använd HandiTools eller myAbilia för att anpassa bildarkivet i Handi.

Kalendervyn - aktiviteter



Hur ska aktiviteterna visas?

I en lista
Vid en tidpelare



Lista



Tidpelare

Kalendervyn – bläddra



Ska man kunna bläddra bakåt till aktiviteter som har varit samma dag?

Ja
Nej

Ska man kunna bläddra i dagar framåt?

Ja
Nej

Ska man kunna bläddra i dagar bakåt?

Ja
Nej





Kalendervyn – aktiviteter



Ska den digitala tiden för aktiviteten visas?

Ja



Nej

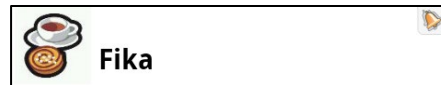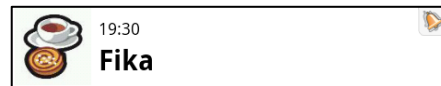

Ska texten för aktiviteten visas?

Ja

Nej

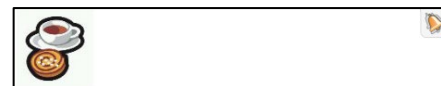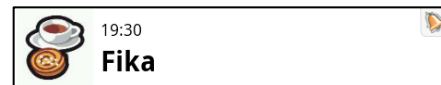


Kalendervyn - tid



Ska klockvyn visas vid tryck på klockan?

Ja
Nej, läs upp tiden istället

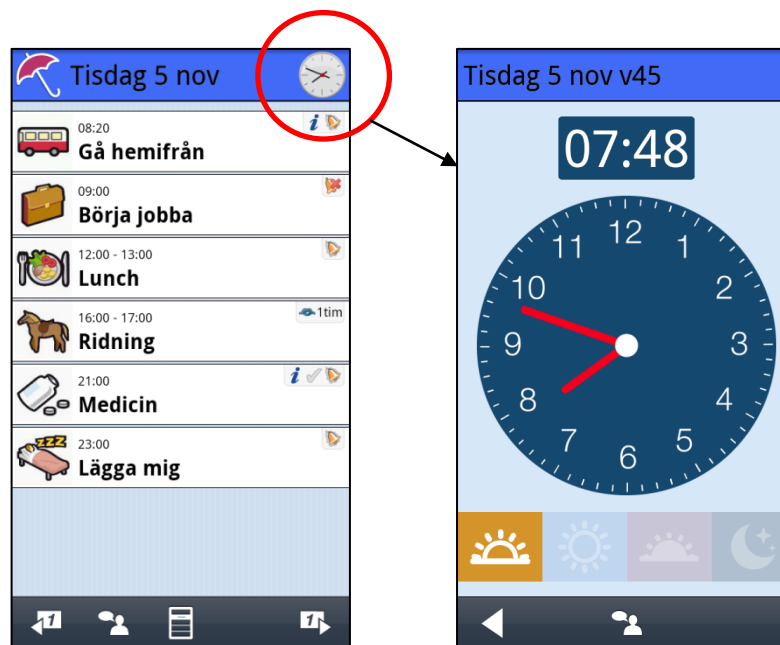

Aktivitetsvyn



Ska användaren kunna ta bort en aktivitet?

Ja
Nej

Ska användaren kunna ändra en aktivitet?

Ja
Nej

Ska användaren kunna ändra typ av larm?

Ja
Nej


Ska kvartret visas för att ge visuellt tidsstöd?



Ja
Nej

← Visa sista kvarten som 5 punkter

← Visa digital nedräkning nedanför kvartret

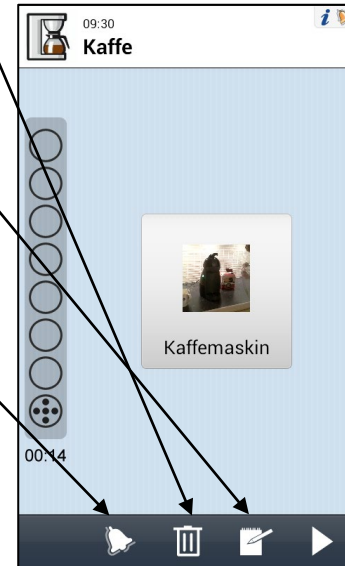

Lägga in aktivitet



Ska man kunna lägga in aktiviteter på starttid som passerat?

Ja
Nej

Ska man lägga in aktiviteter via Ändravyn eller i sekvens?

Ändravyn
Sekvens

Ändravyn



Sekvens




Lägga in aktivitet via sekvens



Om sekvens är valt, vilka vyer ska visas?

- Välj datum
- Välj typ av aktivitet
- Välj basaktivitet
- Välj bild
- Namnge aktiviteten
- Info-meny
- Ta bort efteråt
- Ange kvitterbarhet och larm
- Välj kategori
- Ange påminnelse
- Ange tidslängd
- Ange sluttid

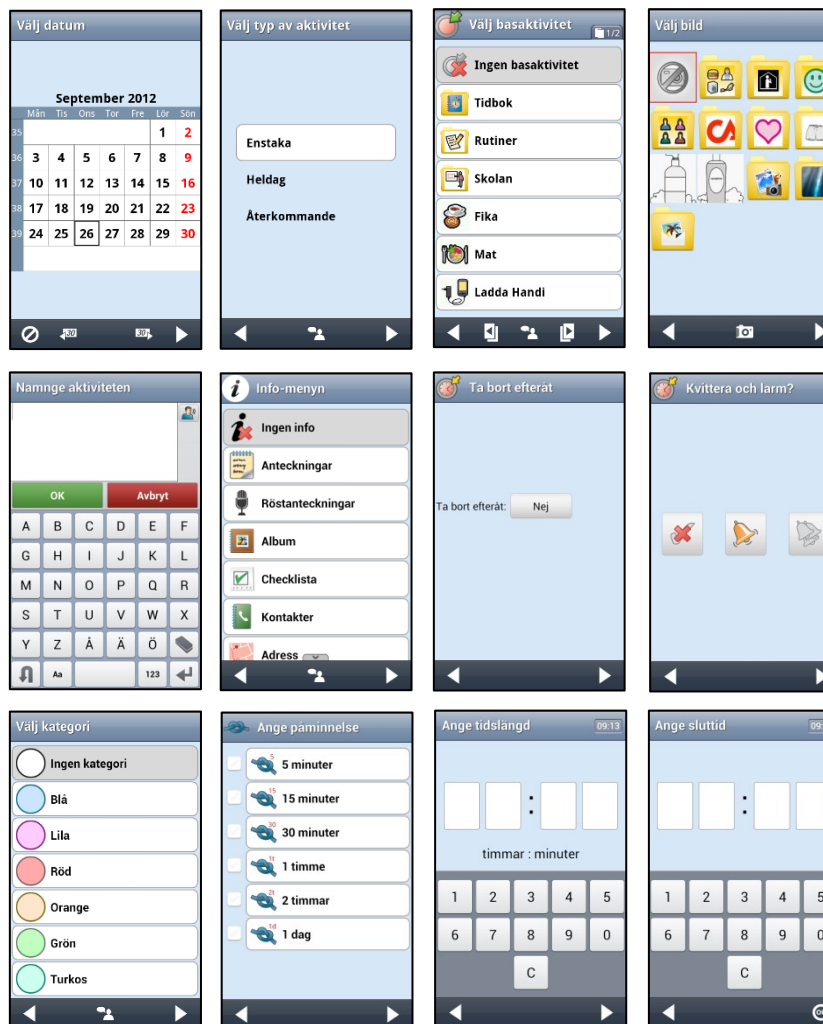

Lägga in aktivitet via Ändravyn



Om Ändravyn är valt, vilka vyer ska visas?

Ska man kunna välja typ av aktivitet?

Ja
Nej

Ska man kunna välja basaktivitet?

Ja
Nej

Välj typ av aktivitet

Enstaka

Heldag

Återkommande

Onsdag 26 september

Namn: Namnge aktiviteten

Starttid: : : Bild

Sluttid: : :

Tidslängd: : :

Tidszon: GMT+01:00

Heldag: Nej i

Ta bort efteråt: Nej

Kategori: Ingen

Ändravyn



Vilka funktioner ska finnas i Ändravyn?

- Datum
- Namn
- Starttid
- Sluttid
- Tidslängd
- Heldag
- Kvittering
- Ange larm
- Bild
- Info-menyn
- Påminnelse
- Ta bort efteråt
- Kategori



Koppla aktivitet



Vilka funktioner ska kunna kopplas till en aktivitet via Info-meny?

Funktioner som är markerad med * gäller inte för Handi5 version 5.5 eller senare.

Anteckningar	<input type="checkbox"/>
Röstanteckningar	<input type="checkbox"/>
Bild	<input type="checkbox"/>
Timer	<input type="checkbox"/>
Telefonnummer	<input type="checkbox"/>
SMS	<input type="checkbox"/>
Länk	<input type="checkbox"/>
Album	<input type="checkbox"/>
Checklista	<input type="checkbox"/>
Formulär *	<input type="checkbox"/>
Adress	<input type="checkbox"/>
Kontakt	<input type="checkbox"/>
Spelaren (musik och video) *	<input type="checkbox"/>
Prisräknaren	<input type="checkbox"/>
Snabbinställningar	<input type="checkbox"/>
Annan app	<input type="checkbox"/>

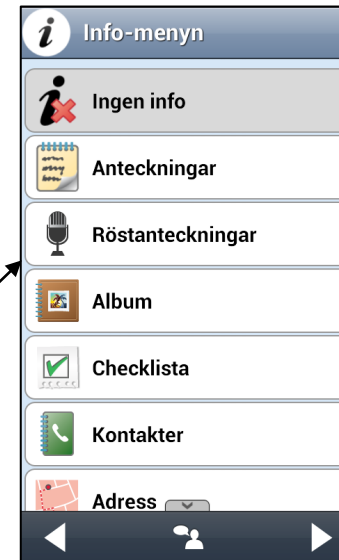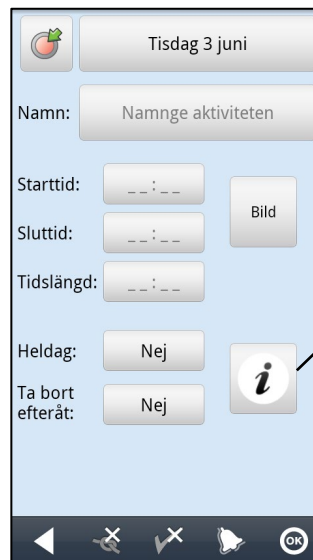

Funktioner i Kalendermenyn



Ska användaren kunna lägga in nya aktiviteter själv?

Ja
Nej

Ska användaren kunna gå till andra dagar i kalendern?


Ja, månadsvy
Ja, veckovy
Nej

Ska användaren kunna använda timer?

Ja
Nej

Ska användaren ha tillgång till Tidmätaren och Tidbok?

Ja
Nej

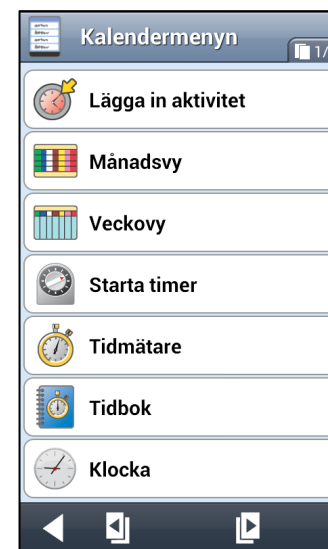

Funktioner i Kalendermenyn



Ska användaren kunna söka aktiviteter?

Ja
Nej

Ska användaren kunna skapa och ändra basaktiviteter?

Ja
Nej

Ska användaren kunna skapa och ändra bastimers?

Ja
Nej

Ska användaren kunna ändra larmljud och larmtid?

Ja
Nej




Kalendervyn - tid



Ska det vara analog eller digital klocka i visningen?

Analog klocka
Digital klocka

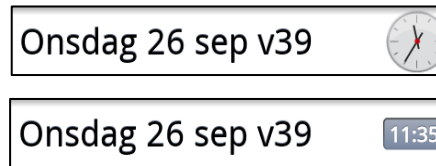

Ska månad markeras med symbol eller med veckonummer?

Handi-symbol
Pictogram
Veckonummer
Inget



Ska dagarna ha veckodagsfärger eller inte?

Veckodagsfärger
Inte veckodagsfärger




Grön måndag
Blå tisdag
Vit onsdag
Brun torsdag
Gul fredag
Rosa lördag
Röd söndag

Tidinmatning




Ska man välja start- och sluttid genom att skriva in tiden med siffror, eller genom att flytta visarna på en urtavla?


- Digital (med siffror)
 - Analog (med urtavla)
 - Digital med Analog-knapp
 - Analog med Digital-knapp
- (Då kan man växla mellan de två metoderna)*

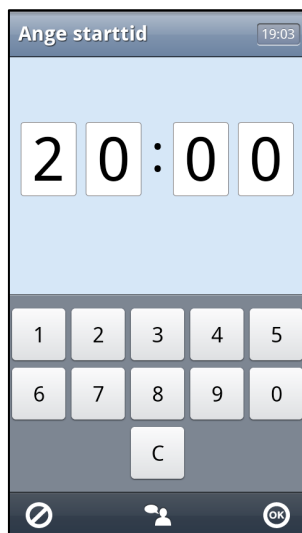


Digital

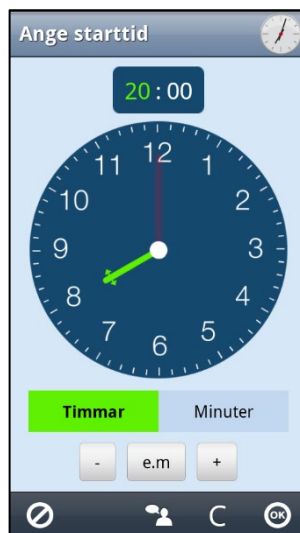

Analog

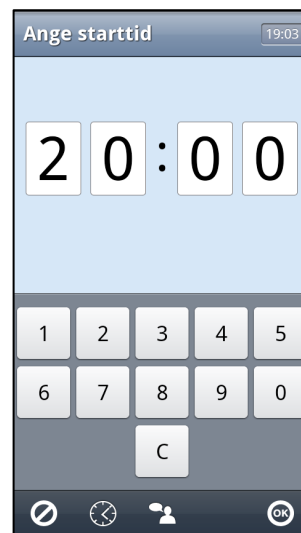

Digital med knapp

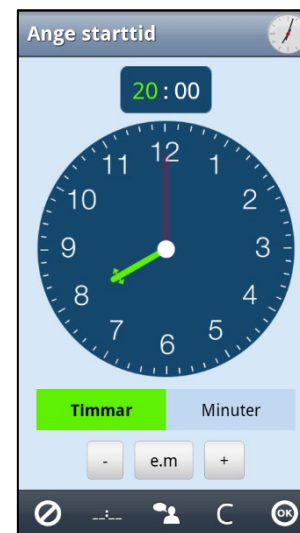

Analog med knapp

Klockvyn




Ska det vara analog eller digital klocka i visningen?

Analog	<input type="checkbox"/>
Digital	<input type="checkbox"/>
Analog och digital	<input type="checkbox"/>

Vad ska visas i klockvyn?

Datum	<input type="checkbox"/>
Tid på dygnet	<input type="checkbox"/>
Knapp för uppläsning varje kvart (chime)	<input type="checkbox"/>

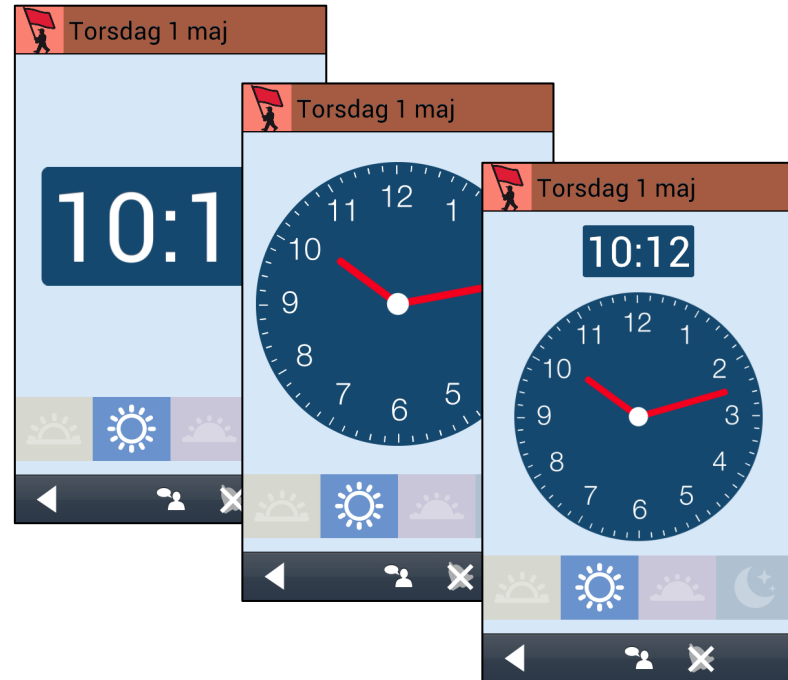

Veckovyn



Hur många dagar ska visas i veckovyn?

5
7

Hur ska aktiviteter visas?

Alltid tid
Med bild

Ska återkommande aktiviteter visas?


Ja
Nej

Ska Timvy-knapp visas?

Ja
Nej

Ska ny aktivitet-knapp visas?

Ja
Nej

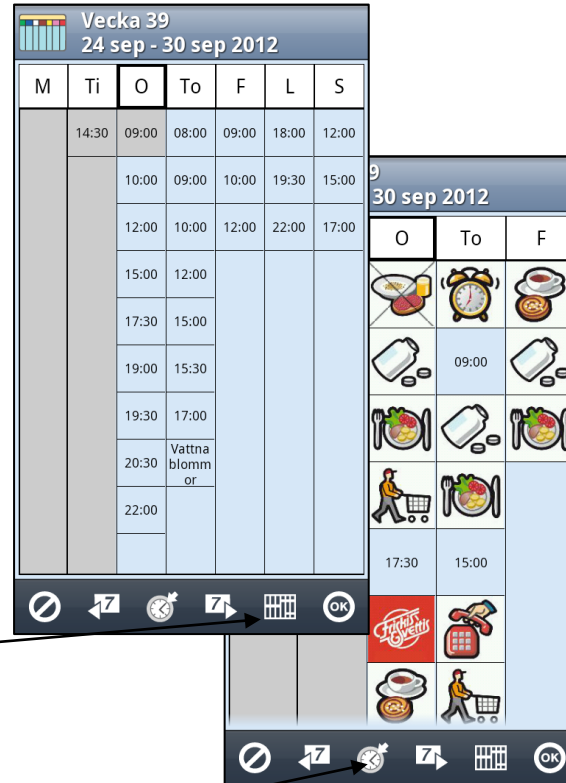

Starta timer



Ska användaren kunna
välja Bastimers?


Ja
Nej

Ska man kunna lägga
in text till en ny timer?

Ja
Nej

Ska man kunna välja
en bild till en ny timer?

Ja
Nej

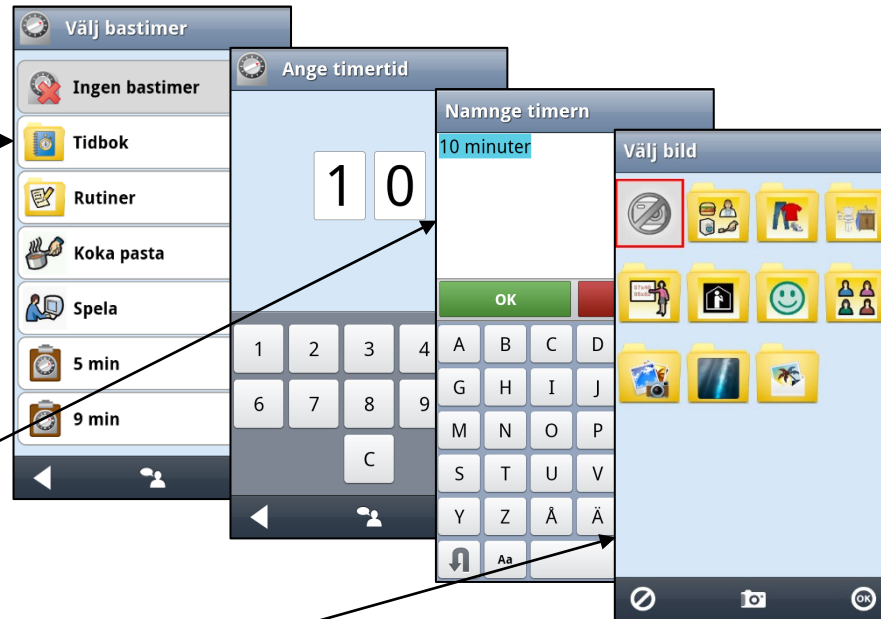

Basaktiviteter och bastimers



Vilka **basaktiviteter** behöver användaren?



Vilka **bastimers** behöver användaren?




Kontakter



Vad ska visas i Kontaktvyn?

Adress	<input type="checkbox"/>
Bild	<input type="checkbox"/>
Telefonnummer	<input type="checkbox"/>
Mobilnummer	<input type="checkbox"/>
E-postadress	<input type="checkbox"/>
Info	<input type="checkbox"/>
Ta bort	<input type="checkbox"/>
Ändra	<input type="checkbox"/>

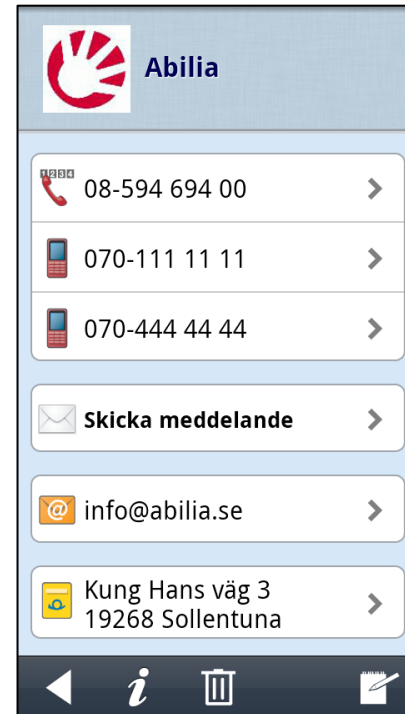

Behövs en extra bekräftelse "Vill du ringa"?

Ja	<input type="checkbox"/>
Nej	<input type="checkbox"/>

Ska användaren kunna lägga in nya kontakter själv?


Ja	<input type="checkbox"/>
Nej	<input type="checkbox"/>

SMS



Ska Handi-SMS eller Androids SMS-app ta emot nya meddelanden?

Handi-SMS (Avisering = På)
Androids SMS-app (Avisering = Av)

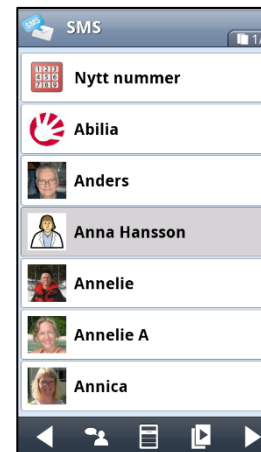

Ska basmeddelanden användas?

Ja
Nej



Om ja, vilka basmeddelanden behöver användaren?

Ta emot SMS: Välj i **Inställningar | SMS | Meddelandeinställningar**.

Basmeddelanden: **Inställningar | SMS | Skriv meddelande och Inställningar | SMS | Basmeddelanden**.

Album



Ska Foton visas i Album?

Ja
Nej

Ska videoklipp som filmats med kameran visas i Album?

Ja
Nej

Ska sparade mottagna bilder (e-post, MMS) visas i Album?


Ja
Nej

Ska man kunna skicka MMS genom att **dela** bilder?

Ja
Nej

Ska man kunna skapa album från användarläget?

Ja
Nej

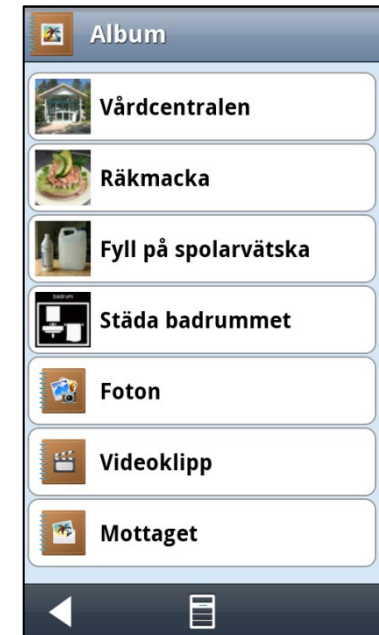

Krisplan



Behöver användaren stöd när han/hon hamnar i stressiga situationer?


Någon att ringa?

Färdigskrivet meddelande att skicka till utvalda personer?

Skicka kartlänk om var man befinner sig?

Ja, förbered för stressiga situationer


Nej

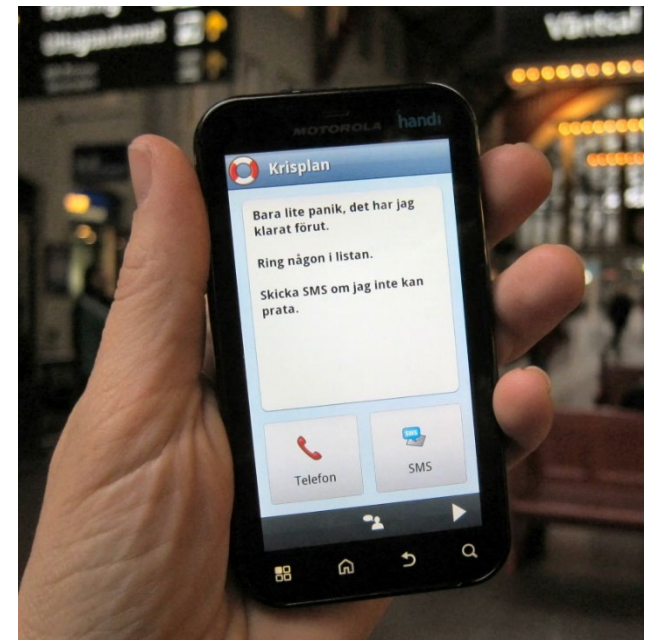

myAbilia



Vill användaren kunna hantera sin kalender, sina checklistor eller sitt bildarkiv från datorn?

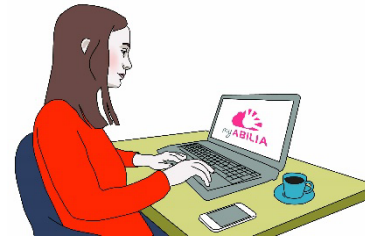

Vill användaren kunna få bättre överblick på stor skärm?



Vill användaren få hjälp med kalendern från stödpersoner?



Ja, skaffa myAbilia
Nej, myAbilia behövs inte

**Rätt hjälpmedel i rätt tid
kan göra verklig skillnad**

