

Kom igång med MEMOplanner Go

Mobilt stöd för MEMOplanner

Generation 4




MEMOplanner Go – Mobilt stöd för MEMOplanner

Appen MEMOplanner Go installeras på din smartphone och fungerar som ett komplement till din MEMOplanner-enhet.



Innehållsförteckning

1. Installera appen på din smartphone
2. Få en överblick och håll reda på tiden
3. Ställ in larm ljud för MEMOplanner Go
4. Få tydliga påminnelser
5. Kvittera aktiviteter
6. Starta en timer
7. Lägg till bilder
8. Planera om kalendern

Installera MEMOplanner Go på din smartphone för att få omedelbar överblick över dagen, veckan och månaden när du inte har tillgång till din MEMOplanner-enhet.

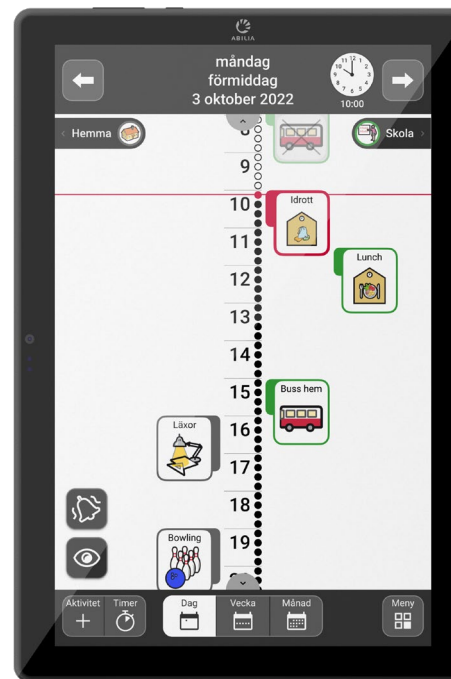

*MEMOplanner
Medium/Large*

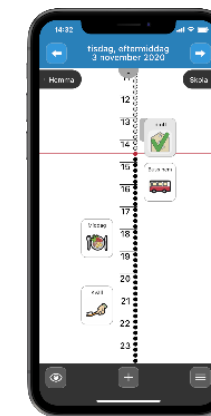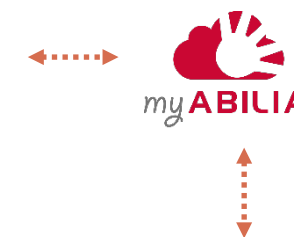

*MEMOplanner Go
på en smartphone*

1. Installera appen på din smartphone

Så här installerar du MEMOplanner Go




1. Ladda ned appen **MEMOplanner Go** gratis från din appbutik.
2. Logga in med samma användarkonto som på din MEMOplanner.
3. Appen får samma inställningar som MEMOplanner.

Teknisk information


- Kompatibilitet: Från Android 8/iOS 9 och upp
- Automatisk uppdatering av programvara (enligt telefonens inställningar)
- Tillgänglig för smartphone and surfplatta
- Kompatibel med smartklocka (notiser)
- Kan installeras på flera enheter
- Loggar ut när MEMOplanner-licensen går ut
- Använder enhetens inbyggda talsyntes




2. Få överblick och håll reda på tiden

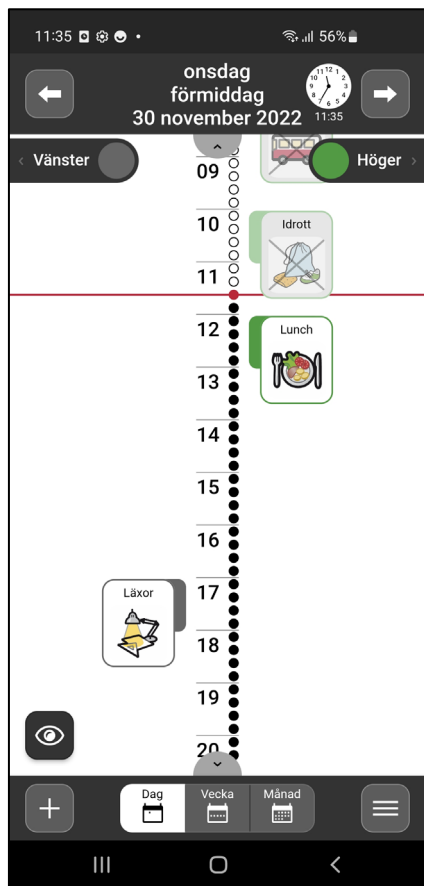

Dagsöversikt

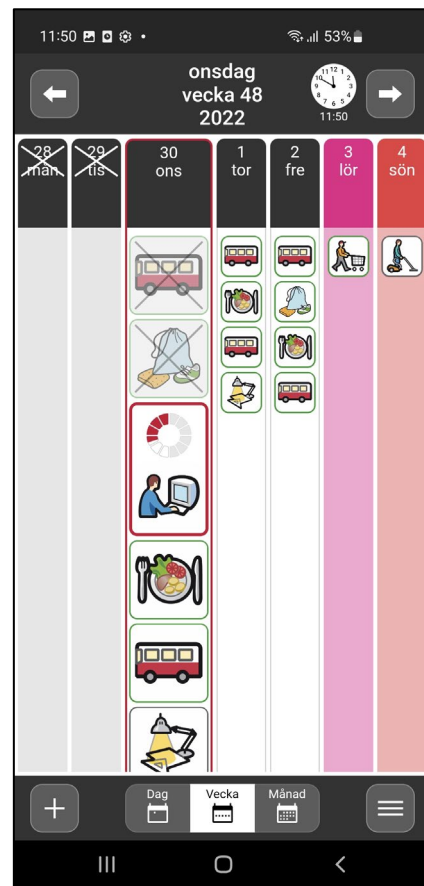

Veckoöversikt



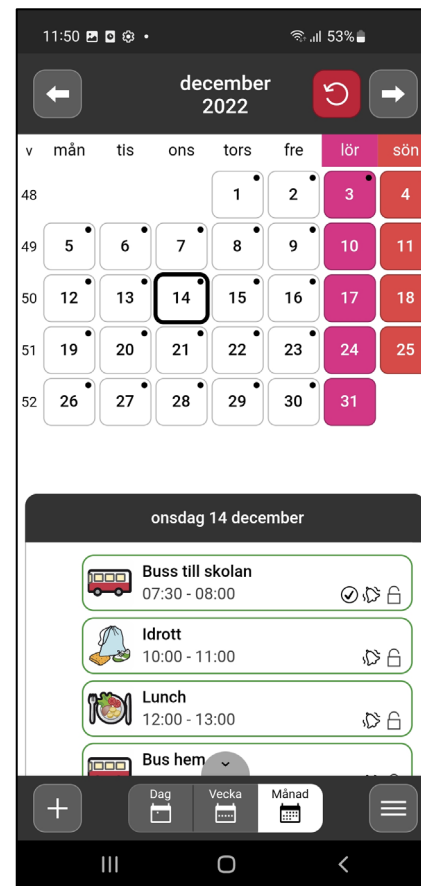


Månadsöversikt

I MEMOplanner Go visas dags-, vecko- och månadskalendern på samma sätt som du är van vid från MEMOplanner Medium eller Large.

3. Ställ in larmljud för MEMOplanner Go



- 1 Öppna Larminställningar.
- 2 Välj önskat ljud för *Ej kvitterbara aktiviteter*.
- 3 Välj önskat ljud för *Kvitterbara aktiviteter*.
- 4 Välj önskat ljud för *Påminnelser*.
- 5 Välj om *vibration* ska slås på eller av för påminnelser.
- 6 Klicka för att öppna *larmtidsvyn*.
- 7 Välj önskad larmtid.

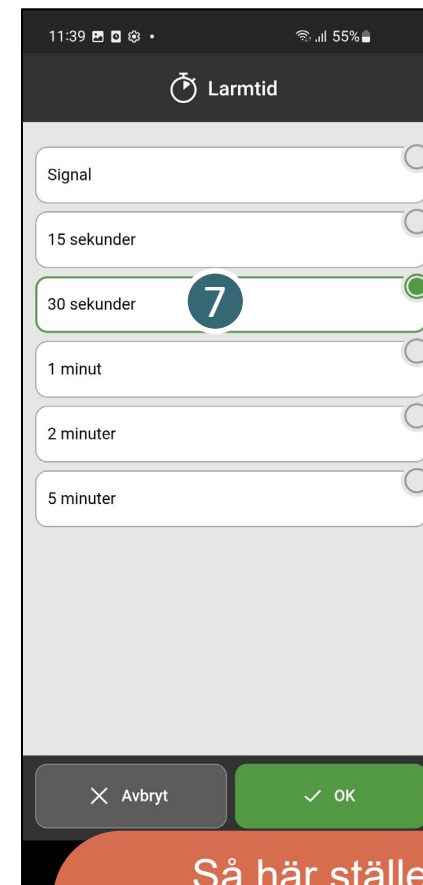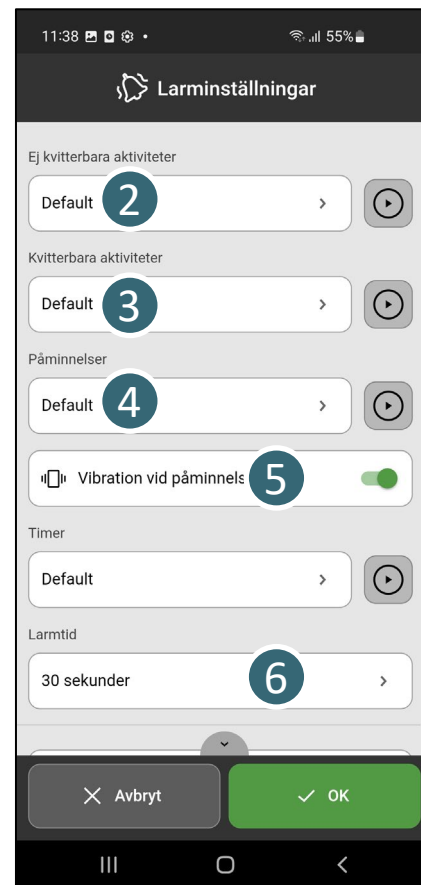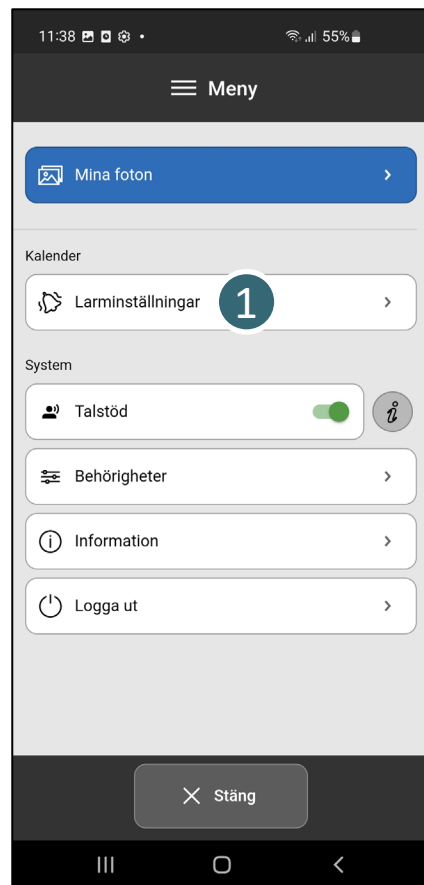

Så här ställer du in larmljud i MEMOplanner Go

4. Få tydliga påminnelser



- 1 Klicka för att öppna pushmeddelanden från MEMOplanner Go.
- 2 Enkelt att bekräfta kvitterbara aktiviteter.
- 3 Ställ in påminnelser för att få pushmeddelanden på din smartklocka.
- 4 Få diskreta påminnelser när din smartklocka är ansluten till din smartphone.

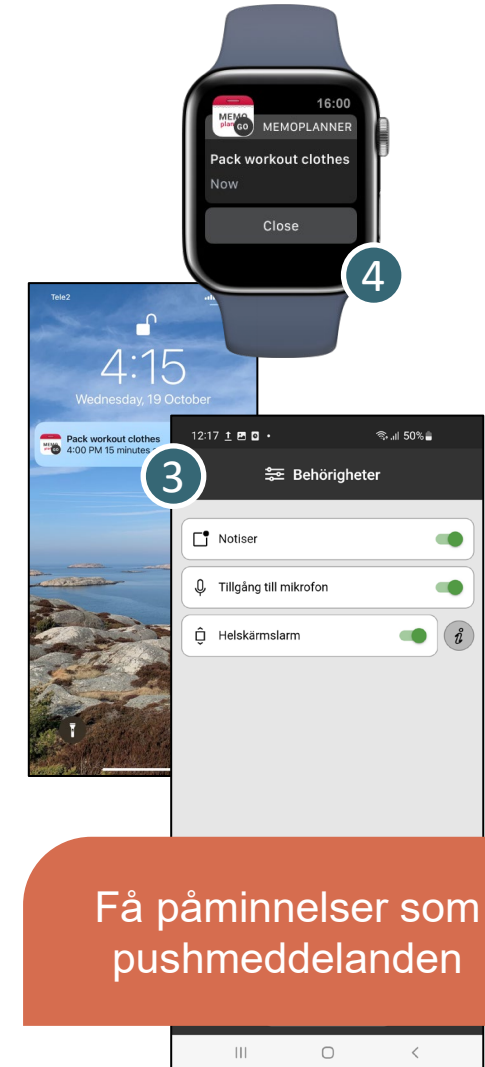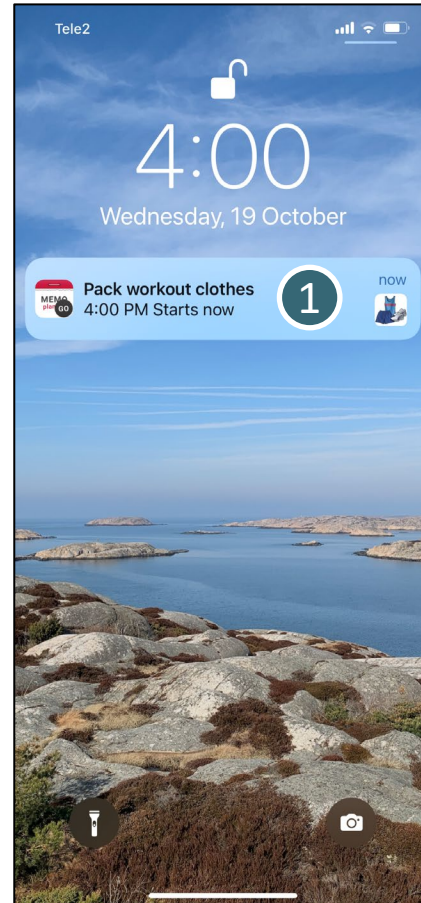

Få påminnelser som pushmeddelanden

5. Kvittera aktiviteter

- 1 Om en aktivitet har en checklista kan dess uppgifter kvitteras.
- 2 Det är enkelt att bekräfta kvitterbara aktiviteter när de genomförts.
- 3 När aktiviteten kvitterats visas detta tydligt i kalendern och du hör inga fler påminnelser.

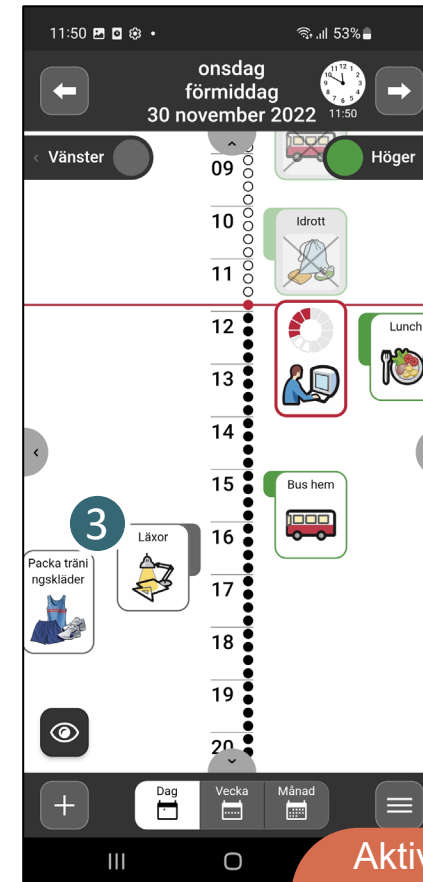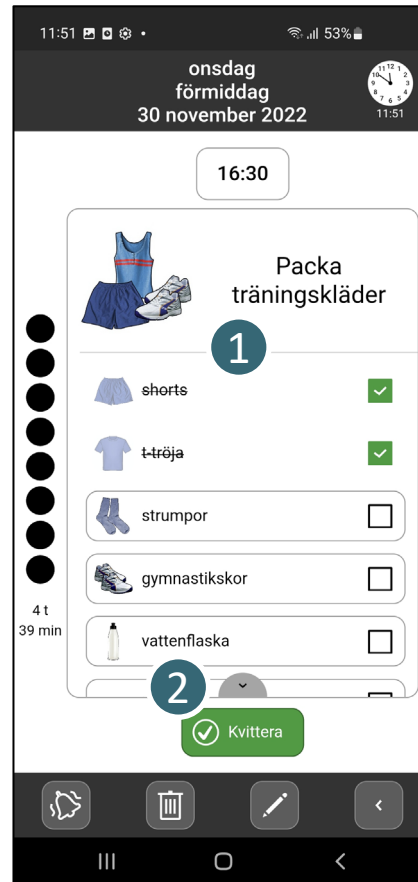


Aktiviteter som kvitterats i MEMOplanner Go kvitteras även på andra enheter

6. Starta en timer

Du kan enkelt starta en timer i MEMOplanner Go för att få hjälp med att hålla reda på tiden.

Endast när appen används som ett komplement till MEMOplanner Generation 4

- 1 Klicka på knappen *Lägg in (+)* i kalendervyn.
- 2 Välj för att starta en *Ny timer* eller *Från mall*.
- 3 Timern startar direkt när den lagts till.
- 4 Timern visas i kalendern på samma sätt som aktiviteter.

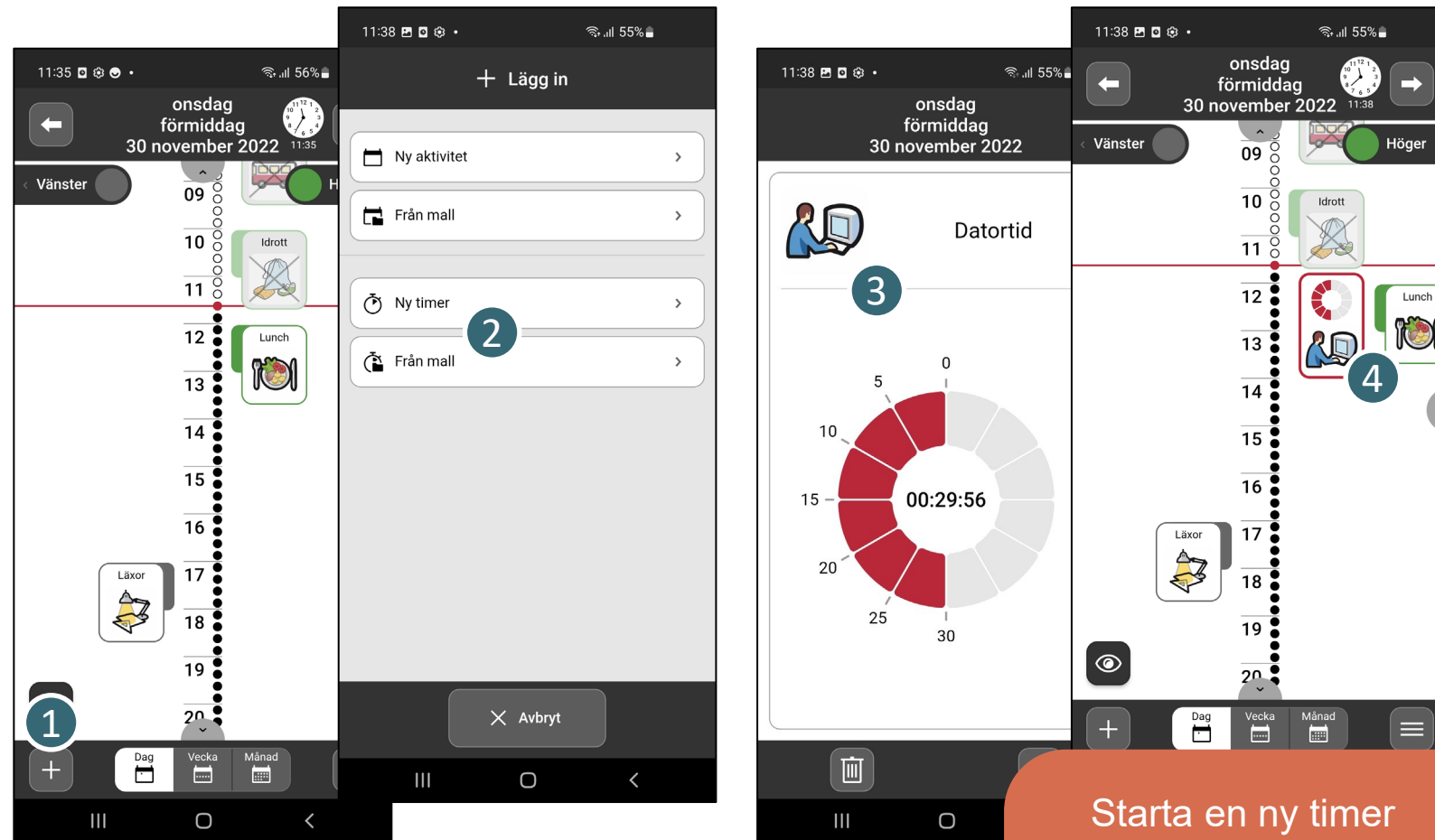



Starta en ny timer eller från en mall

7. Lägg till bilder

Du kan lägga till dina egna bilder på din smartphone till Mina foton i MEMOplanner.

Endast när appen används som ett komplement till MEMOplanner Generation 4

- 1 Klicka på knappen *Meny*.
- 2 Klicka på *Mina foton*.
- 3 Klicka på knappen *Lägg in (+)* för att öppna fotoalbumen på din smartphone.
- 4 Välj bilder som ska läggas till i *Mina foton* i MEMOplanner.

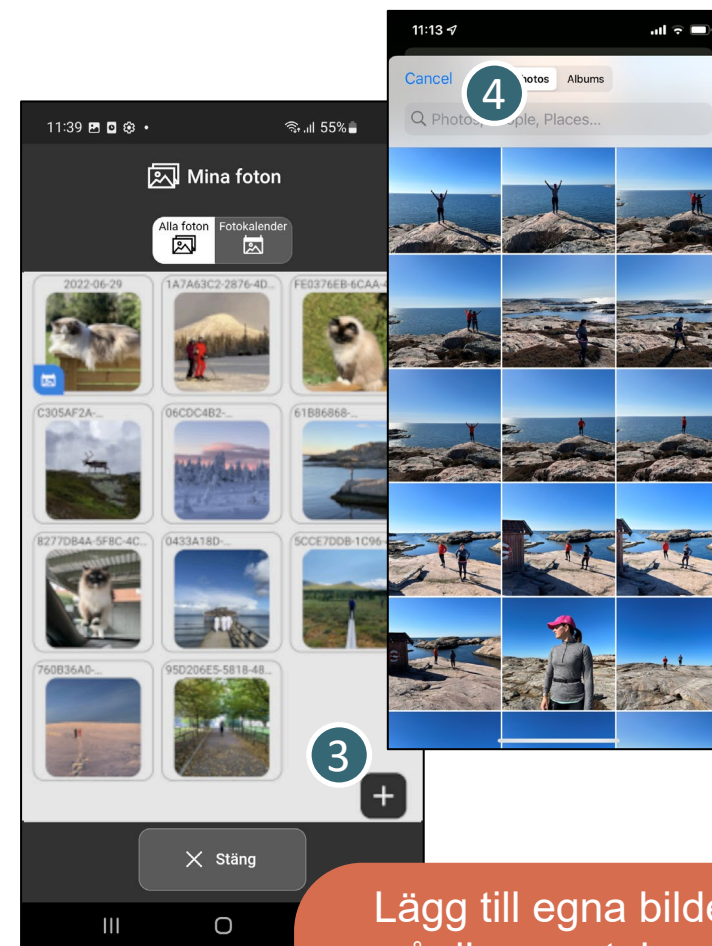
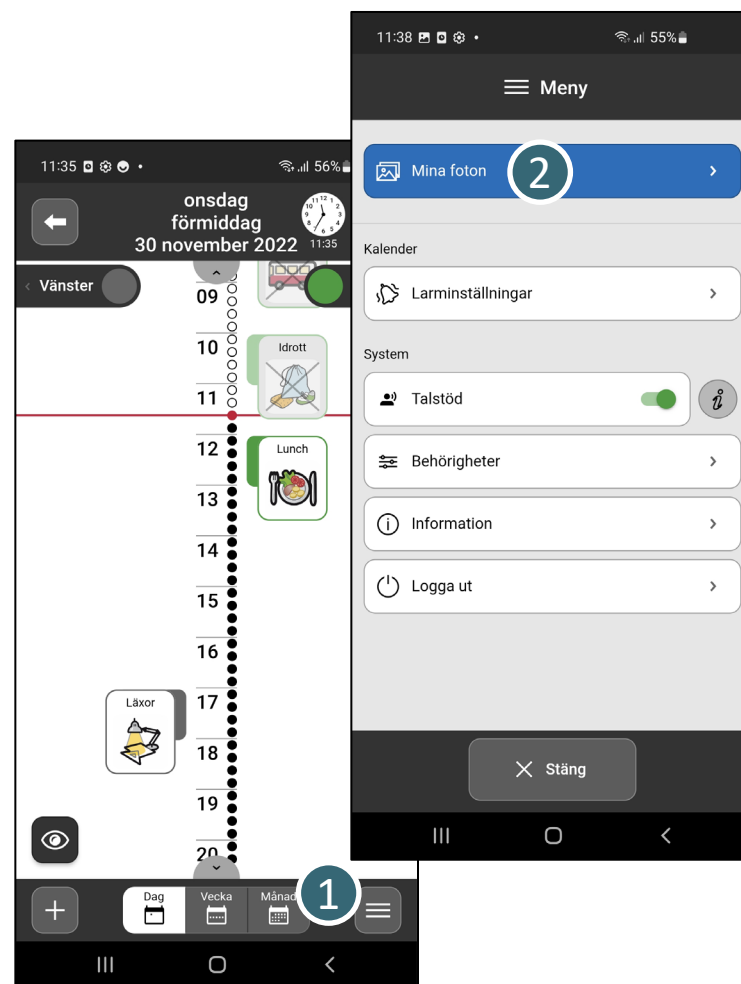


Lägg till egna bilder på din smartphone i bildarkivet

8. Planera om kalendern

Du kan göra ändringar i din kalender i MEMOplanner Go.

- 1 Läs mer om hur du kan hantera dina aktiviteter i kalendern i MEMOplanner Go i *Snabbguide för MEMOplanner*.
- 2 När du lägger till eller ändrar en aktivitet via MEMOplanner Go kommer du att känna igen ändravyn från MEMOplanner Medium och Large.

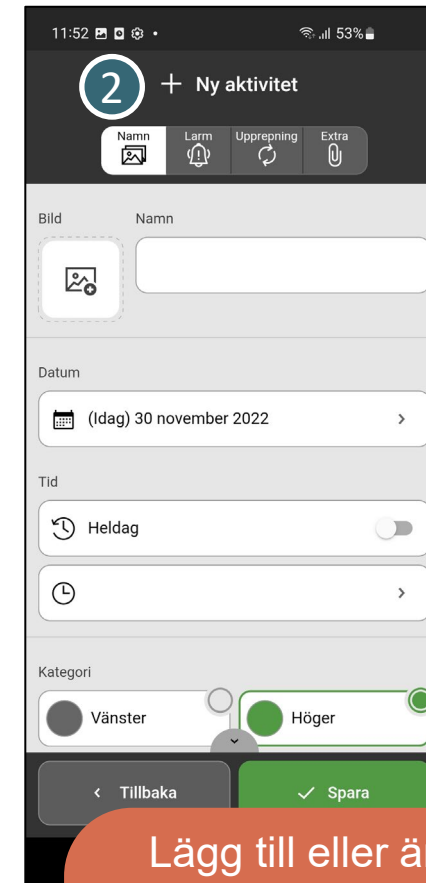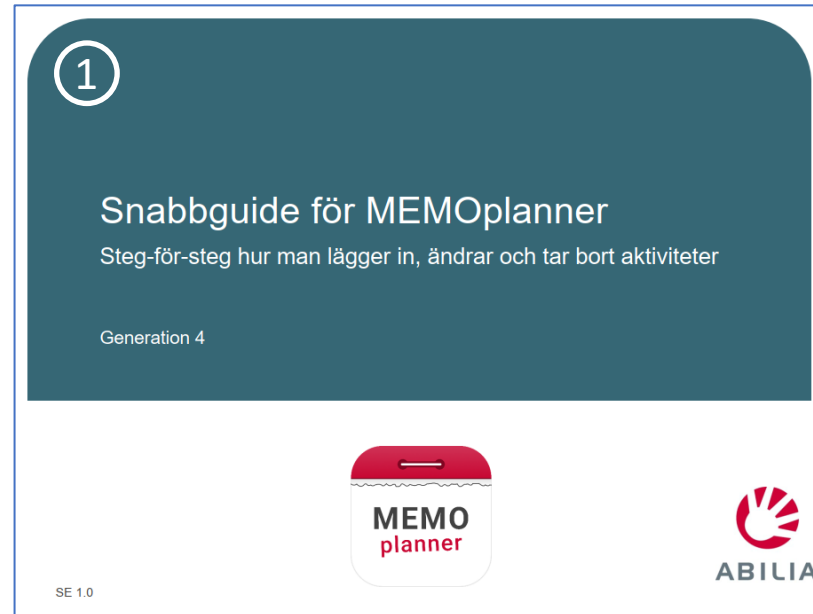

Lägg till eller ändra aktiviteter i MEMOplanner Go



Ett hjälpmedel för säkerhet och oberoende

Läs mer på www.abilia.com eller skanna QR-koden
med kameran på din mobiltelefon för att läsa
de senaste manualerna

