
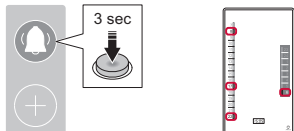


## Rengör MEMO Dayboard


Rengör MEMO Dayboard genom att fukta whiteboardytan med lite vatten och sedan torka av med den medföljande mikrofiberduken.

 **TIPS:** Använd en whiteboardpenna för att skriva över det som är svårt att få bort. Vänta en minut innan ytan torkas av.

## Visa alla aktuella larm




1. Gå in i inställningsläget.  
Alla tidpunkter med larm tänds.

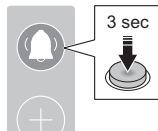


2. Lämna inställningsläget.


## Ställ in ett nytt larm

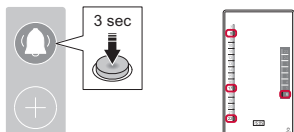


1. Gå in i inställningsläget.

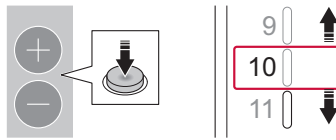

2. Använd + och – knappar för att välja en tidpunkt.

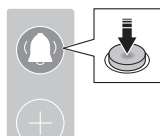


3. Ställ in larmet.

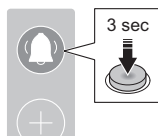


4. Lämna inställningsläget.

## Stäng av ett larm med sidopanelen

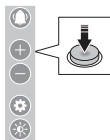


1. Tryck på valfri knapp på sidopanelen.  
Larmljudet slutar efter en minut. Larmljuset slocknar efter 15 minuter.


## Radera ett larm

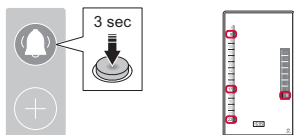


1. Gå in i inställningsläget.  
Alla tidpunkter med larm tänds.

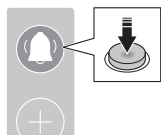

3. Radera larmet.

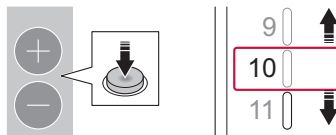


2. Använd + och – knappar för att välja en tidpunkt med larm.

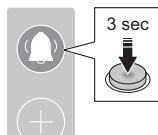


4. Lämna inställningsläget.

## Ställ in låsläge

Det är möjligt att låsa knapparna på sidopanelen så att inga inställningar kan ändras.

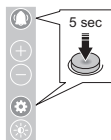

1. För att aktivera eller inaktivera låsläget, tryck och håll in larmknappen och inställningsknappen tills ett pip hörs.

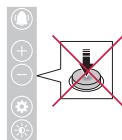

2. När MEMO Dayboard är i låsläge är alla knapparna inaktiverade. Det är fortfarande möjligt att stänga av ett pågående larm. När låsläget är aktivt och man trycker på valfri knapp visas "LOC" kort på displayen.

## Få mer information och tillgång till hela manualen

Gå till [www.abilia.com/sv/our-products/memo-dayboard-24h](http://www.abilia.com/sv/our-products/memo-dayboard-24h) eller skanna QR-koden.



Skanna mig!