



Starta upp MEMOplanner

Introduktion

Art. nr: 4628XX

Programversion 4.2 eller senare

Grattis till din nya MEMOplanner!

Denna guide hjälper dig steg för steg att starta din MEMOplanner enhet för första gången.

Läs även de andra medföljande manualerna som kan ge hjälp med följande:

- *Bruksanvisning*: Produktöversikt, strömförsörjning, konto och licens, hur man hanterar enheten och hur man använder kameran.
- *Referensmanual*: Detaljerad information om hur kalendern i MEMOplanner fungerar, hur aktiviteter läggs in, hur en timer startas och hur MEMOplanner kan anpassas för användaren.
- *Snabbguide*: Hur du snabbt kommer igång med att lägga in en aktivitet eller starta en timer.

1 Anslut nätadaptern

Anslut nätadaptern mellan MEMOplanner och ett vägguttag.

Se *Bruksanvisningen* för mer information om hur du ansluter.

2 Starta MEMOplanner


Tryck och håll in *Av/på*-knappen för att starta.

Se *Bruksanvisningen* för mer information om hur du startar enheten.


3 Följ instruktionerna i konfigurationsguiden

Konfigurationsguiden hjälper dig att konfigurera MEMOplanner för att:

Ansluta till internet

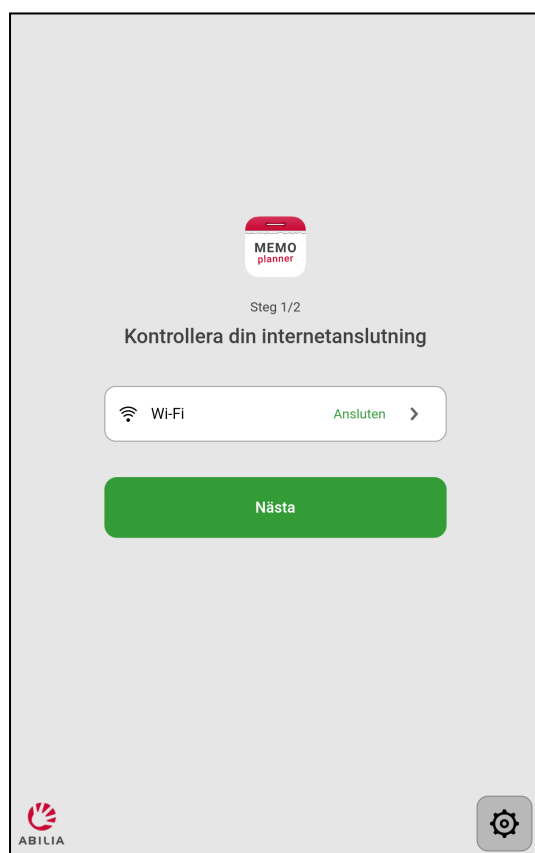

Välja talstödsröst

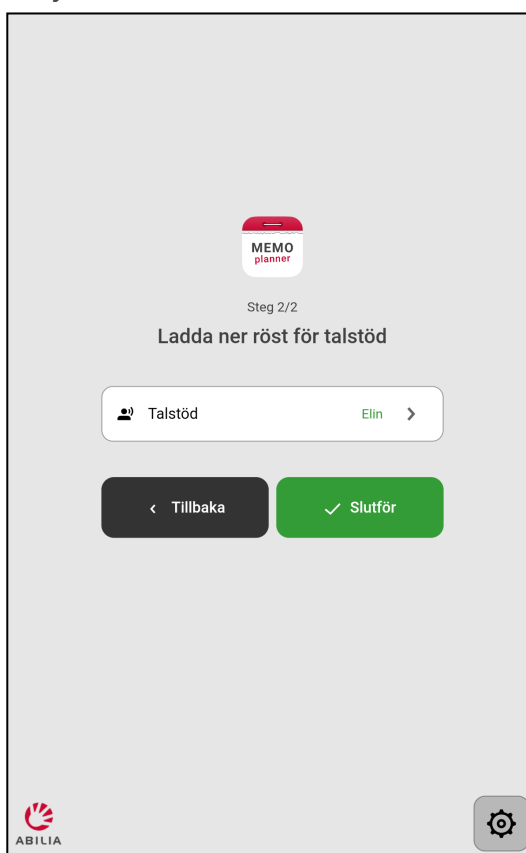

4 Logga in med myAbilia-konto

För att använda MEMOplanner måste du ha ett myAbilia-konto.

Om du har ett myAbilia-konto, skriv in ditt användarnamn och lösenord och tryck på **Logga in**.

Tänk på följande när du skapar ett konto:

- Om du anger din *e-postadress* som användarnamn kan du enkelt ändra ditt lösenord om du glömmer bort det.
- Om du anger ditt *telefonnummer* som användarnamn kan vi på Abilia hjälpa dig att ändra ditt lösenord om du glömmer det.

I *Bruksanvisningen* kan du läsa mer om myAbilia-kontot och MEMOplanner licensen.

5 Kom ihåg dina kontouppgifter

Skriv ner dina kontouppgifter här för att komma ihåg dem.

Mina kontouppgifter för MEMOplanner och webbtjänsten myAbilia:

Användarnamn: _____

Lösenord: _____

i **OBS:** Förvara inloggningsuppgifterna på ett säkert ställe.

Om du vill skapa ett myAbilia-konto, tryck på **Skapa konto** och följ instruktionerna.

6 Lägga in startupsättning

Om myAbilia-kontot är helt nytt får du valet att lägga in en startupsättning med bildarkiv, aktivitetsmallar, timermallar och checklistor.



7 Nu är MEMOplanner klar att användas!

Se den medföljande *Referensmanualen* och *Snabbguiden* för att komma igång med att lägga in aktiviteter och hantera kalendern.



- i** *OBS: Efter att ha loggat in kan MEMOplanner-enheten användas utan internetuppkoppling.*

8 Distanshjälp med webbtjänsten myAbilia

Starta en webbläsare på en dator, smartphone eller surfplatta.

Gå till adressen myabilia.com och logga in med ditt myAbilia-konto.

Här kan du bjuda in stödpersoner som kan ge dig support på distans. En stödperson, inloggad i myAbilia, kan hjälpa dig med att lägga in aktiviteter och bilder, skapa checklistor etc. Så länge din MEMOplanner-enhet är ansluten till internet visas ändringar gjorda i myAbilia på din enhet.

- i** *OBS: För att använda webbtjänsten myAbilia krävs en giltig licens för MEMOplanner*

9 Hjälp på mobilen med appen MEMOplanner Go

Ladda ner appen MEMOplanner Go gratis från App Store eller Google Play.

Logga in med samma användarnamn och lösenord som för MEMOplanner.



- i** *OBS: Om aktiviteter läggs in eller ändras via MEMOplanner Go-appen måste MEMOplanner-enheten vara ansluten till Internet för att dessa ändringar ska visas där.*

Vi hjälper dig!

E-post: support@abilia.se

Telefon: +46 (0)8 594 694 00

Måndag - fredag 9.00-17.00

För mer information om MEMOplanner och dess tillbehör, scanna QR-koden eller gå till www.abilia.com - MEMOplanner.



Scanna mig!
Medium



Scanna mig!
Large