



# Starta MEMOplanner för första gången

Grattis till din nya MEMOplanner – så här kommer du igång!

Art. nr: 4628XX


# 1. Anslut strömadaptern

Koppla in strömadaptern mellan MEMOplanner och ett vägguttag.

# 2. Starta MEMOplanner

Håll in *Power*-knappen för att starta.

# 3. Följ instruktionerna i installationsguiden

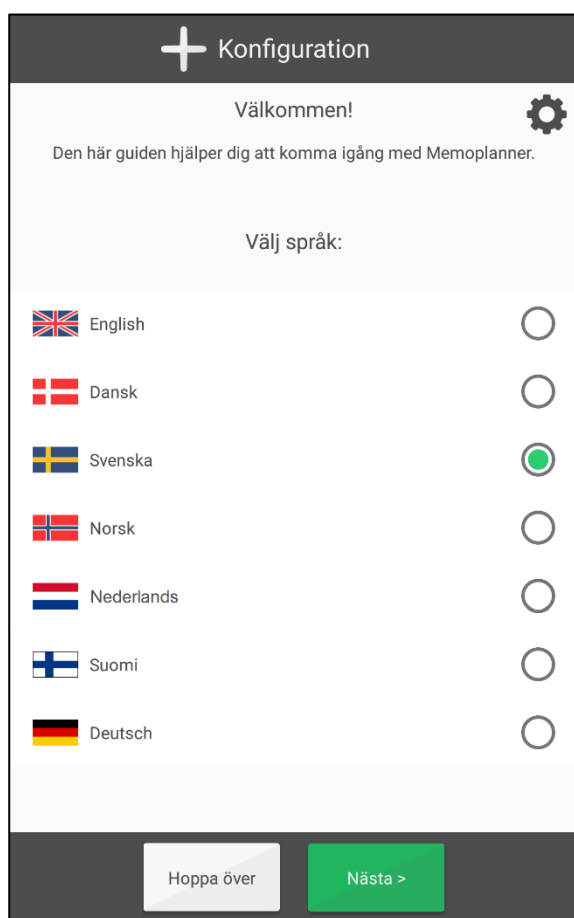



I installationsguiden får du hjälp att ställa in MEMOplanner genom att:

- Välja språk\*
- Ansluta till internet
- Uppdatera till senaste version
- Ställa in datum och tid
- Välja talsyntesröst

\* Gäller inte MEMOplanner Large 3 (art. nr. 462885), MEMOplanner Medium 3b (art. nr. 462875), och MEMOplanner Medium 4 (art.nr. 462890). Om du vill välja ett annat språk, se handboken för MEMOplanner.

## 4. Logga in med myAbilia-konto

För att kunna använda MEMOplanner behövs ett myAbilia-konto.

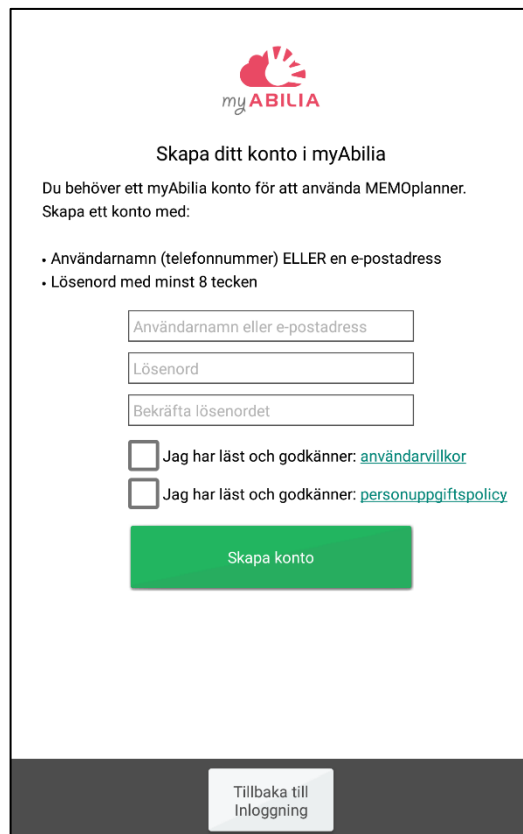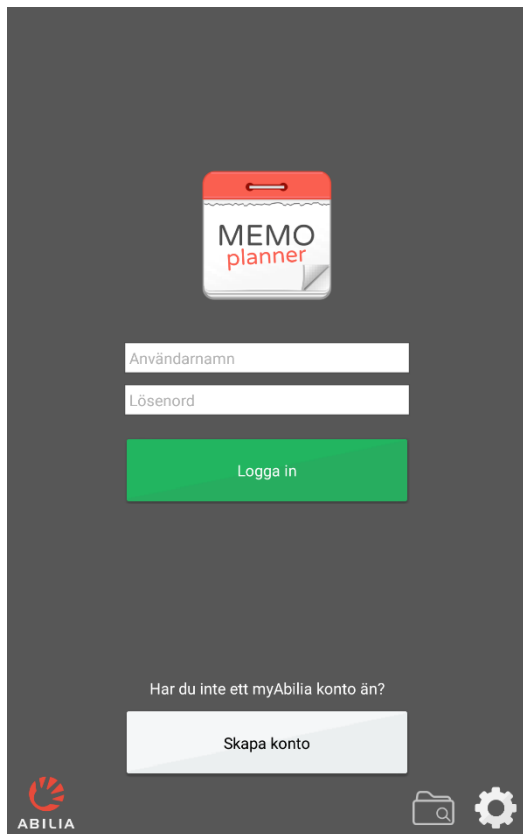

### Har du redan ett myAbilia-konto?

Skriv in ditt användarnamn och lösenord och logga in.

### Vill du skapa ett myAbilia-konto?

Tryck på knappen **Skapa konto** och följ instruktionerna på skärmen.

- Om du väljer din e-postadress som användarnamn kan du enkelt byta lösenord om du har glömt det.
- Om du väljer ditt telefonnummer som användarnamn kan vi på Abilia hjälpa dig byta lösenord om du har glömt det.

## 5. Kom ihåg dina inloggningsuppgifter

Skriv gärna ned dina inloggningsuppgifter här för att komma ihåg dem. Spara papperet på en säker plats.

### Min inloggning till MEMOplanner och webbtjänsten myAbilia

Användarnamn: \_\_\_\_\_

Lösenord: \_\_\_\_\_

## 6. Lägg in start uppsättning

Om myAbilia-kontot är helt nytt får du nu möjlighet att lägga in en start uppsättning med bildarkiv, basaktiviteter, bastimers och checklistor.



## 7. Nu är MEMOplanner klar att användas!



## 8. Hjälp på distans med webbtjänsten myAbilia

Starta en webbläsare på en dator, smarttelefon eller surfplatta. Skriv in *myabilia.com* och logga in med ditt myAbilia-konto. Nu kan du bjuda in stödpersoner som med eget myAbilia-konto kan hjälpa till med aktiviteter, bilder mm i MEMOplanner.



### MEMOplanner och internet

Tack vare att MEMOplanner är ansluten till internet kan du göra det här:

- Använda webbtjänsten myAbilia
- Ha MEMOplanner som app i din smarttelefon
- Få dina användardata sparade i "molnet" som säkerhet
- Uppdatera MEMOplanner till senaste programversion



**Tänk på att om MEMOplanner flyttas till en ny plats behöver den anslutas till internet på nytt.**

Om det inte finns internet går det bra att använda MEMOplanner ändå.

## Vi hjälper dig!

E-post: [support@abilia.se](mailto:support@abilia.se)

Telefon: 08-594 694 00

Måndag-fredag kl. 8:00-16:00

Scanna QR-koden med mobilkameran för att hitta de senaste bruksanvisningarna.

