



Micro Voice röstförstärkare

Bruksanvisning

Art. Nr: 462230

Innehållsförteckning

Inledning	3
Översikt över Micro Voice	3
Komma igång med Micro Voice	4
Ladda Micro Voice.....	4
Använda Micro Voice	5
Slå på (Energisparläge)	5
Slå på (Oavbrutet)	6
Slå av.....	6
Volym.....	6
Tyst läge (Vänteläge).....	6
Skötsel	7
Rengör Micro Voice	7
Felsökning	7
Förvaring och kassering	7
Förvaring.....	7
Kassering.....	7
Produktspecifikationer	8
Tillbehör	8
Viktig information	9
Säkerhetsdefinitioner	9
Säkerhetsinstruktioner innan du använder Micro Voice	9
Allvarliga incidenter.....	9
Överensstämmelse med krav för medicintekniska produkter.....	9
Produktansvar	10
Kontaktinformation	11

Inledning

Micro Voice är en röstförstärkare som passar den som har en svag eller ansträngd röst eller den som regelbundet använder sin röst intensivt. Denna produkt är avsedd för inomhus- och utomhusbruk i hemmet, skolan eller arbetsmiljön.

Micro Voice marknadsförs som ett tekniskt hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Den uppfyller alla nödvändiga krav, föreskrifter och direktiv för medicintekniska produkter.

Denna bruksanvisning är avsedd för slutanvändarna. I detta dokument lär du dig hur du säkert använder Micro Voice.

Översikt över Micro Voice



Micro Voice



Laddare



Midjebälte



Headset



Volymkontroll

Kontrollknapp



Mikrofonport

Ljudutgångsport

LED-indikator

LED-indikator för laddning



Laddningsport

Komma igång med Micro Voice

Ladda Micro Voice

▲ VARNING: Endast tillhörande laddare, levererad av Abilia, får användas för att ladda Micro Voice. Om annan laddare används kan produkten skadas allvarligt.

1. Ladda Micro Voice fullständigt innan du använder den första gången.
2. Anslut laddaren till laddningsporten på sidan av Micro Voice.
3. Kontrollera att LED-indikatorn för laddning blinkar grönt, då vet du att den laddas.

Batteriet tar sex timmar att ladda och håller i upp till fem dagar om du använder enheten åtta timmar per dag. LED-indikatorn kan ha dessa färger:

Grönt	Batteriet är laddat. Blinkar grönt– batteriet laddas.
Blinkar orange	Batterinivån är låg.
Blinkar rött	Batteriet är nästan urladdat.


Använda Micro Voice

⚠ VARNING: Sätt inte mikrofonen och förstärkaren nära varandra. Detta skapar rundgång som, när den är inställd på hög volym, kan orsaka hörselskador.

1. Bestäm hur du vill bära din Micro Voice innan du börjar använda den. Du kan bära den vid höften med bältesklämman eller midjebältet.
2. Anslut mikrofonen till mikrofonporten.
3. Placera mikrofonen:
 - a. Om du använder ett Headset – Sätt det runt nacken med bygel över öronen och justera mikrofonen så att den sitter nära munnen.
 - b. Om du använder Myggmikrofonen - Fäst den på dina kläder, nära munnen.
 - c. Om du använder en Strupmikrofon – Kontrollera att den sitter nära huden, högt upp på halsen ovanför kragelinjen.



Headset

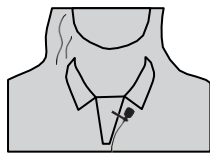

Myggmikrofon




Strupmikrofon

💡 TIPS: Strupmikrofon – Om du har en smal hals kan du stoppa in en bit tyg innanför bygelns så att den sitter bättre. Den ska däremot inte sitta så nära att det blir obekvämt.

Slå på (Energisparläge)

1. Tryck en gång på Kontrollknappen
Du kan börja prata i mikrofonen. LED-indikatorn lyser grön så länge Micro Voice är påslagen. Om Micro Voice inte används på 15 minuter stängs den av.

Slå på (Oavbrutet)

 *OBS: Denna funktion gäller endast enheter med serienummer 02969 / VAMP, eller senare.*

1. Håll kontrollknappen nedtryckt.
LED-indikatorn blinkar grönt och orange ett par gånger och blir sedan röd.
LED-indikatorn lyser grönt så länge Micro Voice är påslagen. Den kommer att vara påslagen tills den stängs av för hand.

Slå av

1. Tryck och håll ned Kontrollknappen tills LED-indikatorn blir röd.

Volym

1. Roterar Volymkontrollen medurs för att öka volymen.
2. Roterar Volymkontrollen moturs för att sänka volymen.

Tyst läge (Vänteläge)

Om du vill ha ett privat samtal kan du ställa Micro Voice i vänteläge.

1. Tryck en gång på Kontrollknappen.
LED-indikatorn blinkar orange för att indikera att Tyst Läge är aktiverat.
2. Du går tillbaka till normalt läge genom att trycka en gång på Kontrollknappen.
LED-indikatorn blir grön.

Skötsel

Rengör Micro Voice

Rengör förstärkaren med en lätt fuktad trasa. Rengör produkten när den är smutsig eller när du förbereder dig för återanvändning.

Felsökning

Om du har frågor angående funktionerna eller inställningarna i produkten, tala med din produktleverantör eller återförsäljare.

Om produkten inte fungerar korrekt, kontakta Abilias support, se *Kontaktinformationen*.

Förvaring och kassering

Förvaring

Produkten ska förvaras inomhus i rumstemperatur och skyddad från fukt

Kassering



Produkten innehåller elektronik som skall återvinnas efter produktens livslängd. Lämnas till miljöstation för elavfall

Produktspecifikationer

Mått, H x B x D	67 x 122 x 32 mm
Vikt	210 g
Batteri	Integrerat laddningsbart NiMH batteri
Batteritid	200t (Vänteläge) 40t (aktivläge)
Audio ingång och utgång	3.5 mm, stereo och mono

Tillbehör

Det är möjligt att använda alternativa mikrofoner för Micro Voice. De tillgängliga mikrofonerna listas som tillbehör till Micro Voice.



Skanna mig!

Mer information om Micro Voice och tillbehör finns på www.abilia.com/sv/our-products/kommunikation/rostforstarkare/micro-voice-rostforstarkare eller skanna QR-koden.

Viktig information

Säkerhetsdefinitioner

▲ *VARNING: Risk för skada eller dödsfall om anvisningarna inte följs.*

⚠ *FÖRSIKTIGHET: Risk för produktskada om anvisningarna inte följs.*

ⓘ *OBS: Information som är nödvändig i en viss situation.*

Säkerhetsinstruktioner innan du använder Micro Voice

⚠ *Läs följande varningsinstruktioner innan du använder produkten.*

- Innan du använder produkten ska du läsa och förstå innehållet i denna handbok.
- Använd endast den medföljande laddaren för att ladda produktens batteri.
- Sätt inte mikrofonen och förstärkaren nära varandra. Detta ger skapar rundgång som, när den är inställd på hög volym, kan orsaka hörselskador.

Allvarliga incidenter

Om en allvarlig händelse relaterad till produkten inträffar, måste detta rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i ditt land. En händelse anses allvarlig om den direkt eller indirekt ledde, kan ha lett, eller kan leda till dödsfall av användare eller annan person, vid tillfällig eller permanenta allvarliga försämringar av användarens eller andra personers hälsotillstånd eller ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Överensstämmelse med krav för medicintekniska produkter

Micro voice röstförstärkare marknadsförs som ett tekniskt hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar och uppfyller alla nödvändiga krav, förordningar och direktiv för medicintekniska produkter.

Produktansvar

Produkten har utvecklats och riskbedömts i enlighet med ISO 14971. Bruksanvisningen och de tekniska specifikationerna har utformats i enlighet med säkerhetsbedömningen i riskanalysen. Beakta alltid säkerheten vid användning av produkten. Abilia AB tar inte ansvar för konsekvenser efter felaktig användning eller installation av produkten. All form av åverkan eller manipulering av produkten gör garantin ogiltig och friskriver tillverkaren från ansvar. Produktens beräknade livslängd gäller när den används i enlighet med dess avsedda användnings- och underhållsinstruktioner.

Kontaktinformation

Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge
Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Storbritannien

Abilia UK Ltd, Unit 10 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Storbritannien
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

Internationell

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

