



# Elektronisk PODD mini

Handbok

Art. nr: 462351



# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
Om Elektronisk PODD mini .....	4
Avsedd användning.....	4
<b>Översikt över Elektronisk PODD mini</b> .....	<b>5</b>
<b>Kom igång med Elektronisk PODD mini</b> .....	<b>7</b>
Använd Elektronisk PODD med Nova 2 .....	7
Kontrollera innehållet i kartongen .....	7
Ladda batteriet, Elektronisk PODD mini .....	7
Ladda batteriet, extern högtalare.....	8
<b>Använd Elektronisk PODD mini</b> .....	<b>9</b>
Starta enheten .....	9
Anslut till ett nätverk .....	9
Stäng av enheten.....	9
Avsluta Elektronisk PODD.....	10
Lägg in egna bilder.....	10
Nätverksanslutning.....	10
Extern högtalare.....	11
Säkerhetskopiering .....	14
<b>Skötsel</b> .....	<b>15</b>
Rengöring .....	15
Uppdatera av Elektronisk PODD .....	15
Installera Elektronisk PODD .....	17
Avinstallera Elektronisk PODD .....	19
<b>Felsökning</b> .....	<b>21</b>
Batteriproblem.....	21
Systemproblem .....	21
Pekskärmsproblem .....	22
Nätverksproblem .....	22
<b>Förvaring och kassering</b> .....	<b>23</b>
<b>Produktspecifikationer</b> .....	<b>23</b>
Elektronisk PODD mini.....	23
Laddare för Elektronisk PODD mini.....	23
Tillbehör .....	23
<b>Viktig information</b> .....	<b>24</b>
Säkerhetsdefinitioner .....	24
Säkerhetsinstruktioner före användning av Elektronisk PODD mini.....	24
Allvarliga incidenter .....	24
Överensstämmelse med krav för medicintekniska produkter.....	24
Produktansvar.....	24

# Inledning

## Om Elektronisk PODD mini

I denna handbok beskrivs hur man kommer igång med att använda Elektronisk PODD mini.

Elektronisk PODD mini är en 8 tums samtalsapparat för den som behöver en alternativ eller kompletterande kommunikation, s.k. AKK. Elektronisk PODD bygger på normal språkutveckling och hjälper till att utveckla språket och organisera ordförrådet så att man kan använda det i alla sammanhang. Man får möjlighet att uttrycka vad man vill, när man vill och var man än befinner sig.

PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display, vilket helt enkelt betyder effektiv och pedagogisk organisering av ord på ett sätt som stöder språkflexibilitet samtidigt som man uttrycker sig exakt. PODD utgår från det mest effektiva sättet att organisera ordförrådet för att möta varierande krav på kommunikationen. PODD från Abilia har utvecklats i nära samarbete med Gayle Porter, grundaren av PODD-metoden.

PODD i kombination med gester och texter ger möjlighet att använda den mest effektiva metoden i varje situation - detta gör PODD till ett kraftfullt verktyg i kommunikationsutvecklingen.

Syftet är att ge ett ordförråd så att men på ett konsekvent sätt kan kommunicera med omgivningen. Materialet är det mest kompletta och grundligt dokumenterade materialet på den svenska marknaden och systemet erbjuder kontinuerligt nytt material till nästa språkutvecklingsnivå.

## Support

Abilia kan ge support för PODD-funktionerna och inställningar för dessa i Elektronisk PODD mini.

Välkommen att kontakta Abilias support. Skriv till [support@abilia.se](mailto:support@abilia.se) eller ring 08–594 694 15.

## Licens

Licensen för Elektronisk PODD gäller för installation på 5 enheter som har anknytning till användaren.

- 1 licens är installerad på den levererade enheten.
- 4 extra licenser finns på det USB-minne som levereras med enheten. För installation, se kapitel Installera Elektronisk PODD.


## Avsedd användning

Elektronisk PODD mini är avsedd för personer som har svårigheter med att kommunicera genom tal och som inte har utvecklat eller har svårt för att utveckla läskunnighet. Den möjliggör autonom kommunikation ansikte mot ansikte och fjärrkommunikation via telefon, sociala medier, eller sms.

Produkten kan användas närsomhelst och varsomhelst - inomhus och utomhus, hemma, i skolan, på arbetsplatsen, eller på resa.

# Översikt över Elektronisk PODD mini

Ovansida

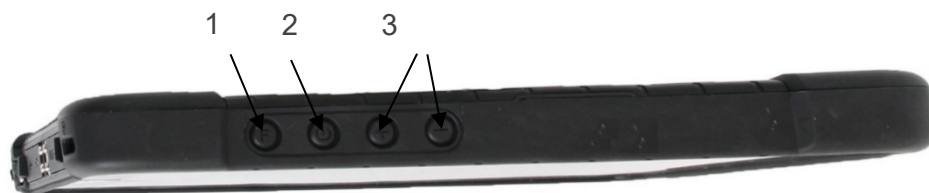


Framsida



Baksida



Vänster sida

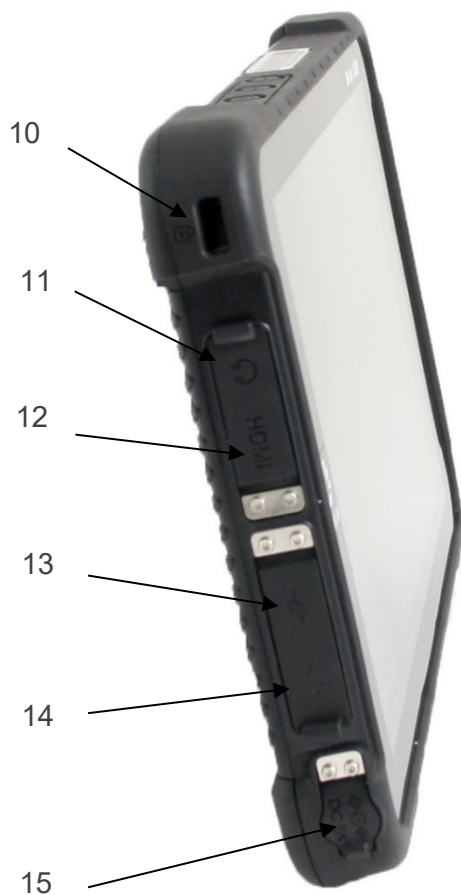

Höger sida



1. (används ej)
2. *Power*-knapp
3. Volym upp/ner
4. Kamera på framsida
5. Statuslampa för ström/batteri
6. Kamera på baksida
7. Högtalare
8. SIM (används ej)

9. Ingång för Micro-SD-kort
10. Kingston låsfäste
11. Ingång för headset
12. Mini HDMI-port
13. Micro-USB
14. USB 2.0
15. Laddningskontakt

Hänvisningarna i denna handbok har formatet "(X)", där X refererar till en punkt i listan ovan.

## Kom igång med Elektronisk PODD mini

Vid leverans är programvaran Elektronisk PODD installerat på enheten.

Innan du sätter igång är det **viktigt** att läsa igenom *Bruksanvisning Elektronisk PODD*. Här står det bland annat följande:

- Teorin bakom PODD
- Hur man startar upp och anpassar Elektronisk PODD
- Hur PODD 15 resp. PODD 60 fungerar
- Hur man redigerar innehållet i Elektronisk PODD, till exempel lägger in egna bilder

Första gången du startar Elektronisk PODD visas en anpassningsguide som hjälper dig att ställa in PODD. Följ anvisningarna på skärmen för att välja inställningar för röst, PODD-program och inställningar, tangentbord och styrsätt. Alla inställningar kan också göras senare från inställningsmenyn i programmet.

## Använd Elektronisk PODD med Nova 2

För information om hur Elektronisk PODD kan användas med Nova 2 se Bruksanvisning Nova 2.

## Kontrollera innehållet i kartongen

I kartongen ska följande finnas:

Art.nr	Benämning	Beskrivning	Antal
462338	Elektronisk PODD mini	Hårdvara med Elektronisk PODD 15 & 60 och Rolltalk Designer	1 st.
462333	Laddare Elektronisk PODD mini		1 st.
462335	Handtag Elektronisk PODD mini	X-remms på baksidan av Elektronisk PODD mini. Kan inte användas ihop med bärrem.	1 st.
462337	Extra högtalare till Elektronisk PODD mini	Trådlös och vattentät högtalare för att få extra kraftigt ljud.	1 st.
101332	Bärväska Lightwriter och Elektronisk PODD mini	Mjuk transportväska för Elektronisk PODD mini, med plats för laddaren i egen ficka.	1 st.
462328	Bärrem Elektronisk PODD		1 st.
	USB-minne	Med licens, programvara och bruksanvisningar	1 st.
	Bruksanvisningar	Handbok (detta dokument), Bruksanvisning Elektronisk PODD. Bruksanvisning Nova 2	3 st.

## Ladda batteriet, Elektronisk PODD mini

Anslut laddaren till laddningskontakten (15) på Elektronisk PODD mini. Anslut laddaren till ett eluttag och ladda tills batteriet är fulladdat.

Det rekommenderas att enheten laddas varje natt. Använd endast medföljande laddare. Ett helt urladdat batteri tar ca 5 till 6 timmar att ladda.






## Kontrollera ström- och batteriladdning på Elektronisk PODD mini

Man kan kontrollera status på ström- och batteriladdning på statuslampan för batteriladdning eller batteriikonen längst ned på skrivbordet i Windows.

## Statuslampa för batteriladdning på Elektronisk PODD mini (5)

Fast rött	Batteriet är fulladdat
Blinkar rött	Batteriet laddas
Släckt	Batteriet laddas inte eller batteriet är fulladdat

## Batteriikonen i Windows

	Enheten är ansluten till laddaren och batteriet är fulladdat.
	Enheten är ansluten till laddaren och batteriet laddas.
	Enheten körs med batteriström och batteriet laddas ur.
	Enheten körs på batteri och att batterinivån är låg.
	Enheten körs på batteriström och batteriet är nästan uttömt.

## Ladda batteriet, extern högtalare

För Elektronisk PODD mini med Extern högtalare måste också batteriet i högtalaren laddas.

Högtalaren kan laddas via en standard 5 V mobilladdare. Alternativt kan den laddas via Elektronisk PODD mini genom att ansluta USB-kabeln till USB-ingången (14). Batteriladdningstid: 2,5 timme (5V, 0,5A).

Högtalaren kan spela kontinuerligt i ca 8 timmar på en laddning.

**OBS:** Det följer inte med en egen laddare för den externa högtalaren.



# Använd Elektronisk PODD mini

**⚠ VARNING:** Var försiktig när du använder hörlurar så att högt ljud inte skadar din hörsel. Sänk volymen till ett minimum innan du höjer den.

## Starta enheten

Håll *Power*-knappen (2) intryckt (cirka 3 sekunder) tills statuslampan för ström/batteri (5) lyser för att starta enheten.


## Anslut till ett nätverk

Om användarprogrammet ska användas tillsammans med till exempel Google Drive behöver enheten anslutas till ett trådlöst nätverk, se kapitel *Nätverksanslutning*.

## Stäng av enheten

Enheten ska stängas av genom att man trycker på *Power*-knappen eller via snabbknapparna.

För att avsluta med *Power*-knappen ska den hållas intryckt i minst 4 sekunder. Sveg sedan nedåt på bekräftelseskärmen för att stänga av enheten. Om surfplatteläge är aktiverat så fungerar inte *Power*-knappen.

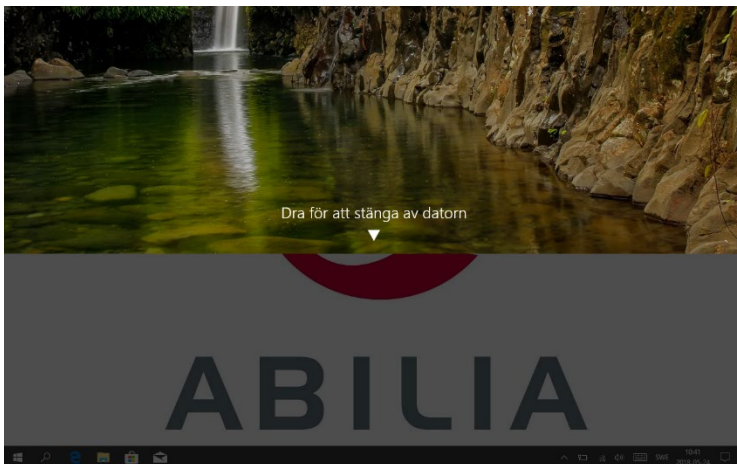

För att avsluta med strömbrytaren på startskärmen:

1. Tryck på *Start*
2. Tryck på **strömbrytaren**  → **Stäng av** för att stänga av enheten.

För att stänga av skärmen:

1. Tryck på *Start*
2. Tryck på **strömbrytaren**  → **Strömsparläge** för att stänga av skärmen.

Man kan också stänga av skärmen med ett snabbt tryck på strömbrytaren.

## Avsluta Elektronisk PODD

Om man behöver få tillgång till skrivbordet måste användarprogrammet avslutas. Gå till **Inställningar|Stäng program**.

## Lägg in egna bilder

Det är möjligt att lägga in egna bilder i mappen *Mina bilder*, Windows standardmapp.

Det är även möjligt att lägga in egna bilder från GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive. Dessa program måste installeras lokalt på enheten innan de kan användas.

För att installera respektive online-lagringsprogram, gå till:

[drive.google.com](http://drive.google.com)

[OneDrive.live.com](http://OneDrive.live.com)

[www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)

Följ sedan nedladdningsinstruktionerna.

Bilder från GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive kan synkroniseras mellan olika enheter om samma konto används på de olika enheterna.


### OBS:

- GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive kräver att man skapar ett konto.
- Det rekommenderas att inte använda bilder med hög upplösning då det längre tid att ladda hem och visa bilder med hög upplösning.
- Om man använder OneDrive måste bilderna göras tillgängliga lokalt, högerklicka på OneDrive-mappen och välj att göra tillgängliga lokalt.


## Nätverksanslutning

För att få tillgång till skrivbordet måste användarprogrammet avslutas se kapitel Avsluta Elektronisk PODD.


Gör så här för att ansluta till ett nätverk:

1. Tryck på Wi-Fi ikonen  i det nedre högra hörnet på skärmen.
2. I listan med tillgängliga nätverk, tryck på det nätverk du vill ansluta till och tryck sedan på *Anslut*.

Slå på eller av Wi-Fi:

1. Svep inåt från den högra kanten för att öppna Åtgärdscenter.
2. Tryck på  för att slå på eller stänga av Wi-Fi.

Inställningar för mobilt nätverk:


1. Tryck på Nätverk  i det nedre högra hörnet av skärmen.
2. Under **Mobil**, tryck på namnet på din bredbandsleverantör och sedan på *Anslut*.
3. I avancerade alternativ, tryck på *Anslut*.

## Extern högtalare


Den externa högtalaren som levereras med är sammankopplad med enheten vid leverans, så normalt är det inte nödvändigt att genomföra stegen nedan.

### Anslut extern högtalare


- Dra fingret inåt från höger kant på skärmen eller välj Åtgärdscenterikonen för att starta "Windows Åtgärdscenter". Du hittar Åtgärdscenterikonen på "Windows aktivitetsfältet".

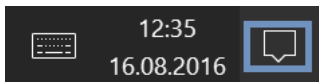


- Högerklicka eller håll fingret på Bluetooth-ikonen för att välja menyvalet "Gå till inställningar". Välj "Gå till Inställningar".

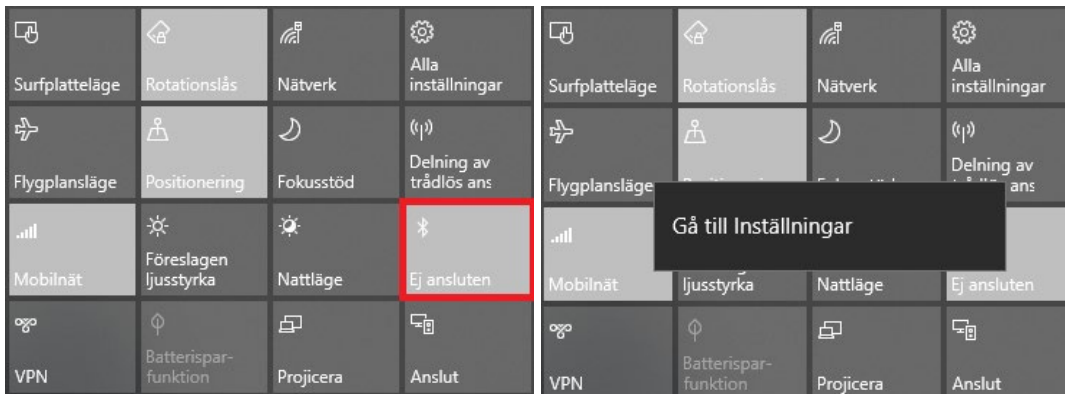

- Välj "Lägg till Bluetooth eller annan enhet".

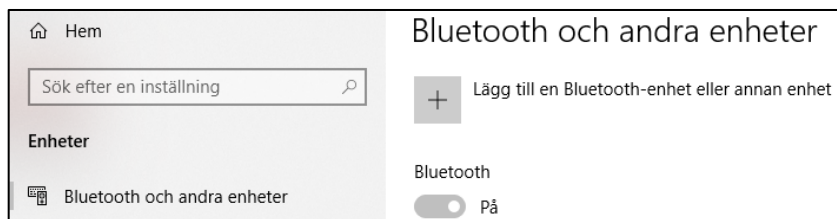


- Välj "Bluetooth"

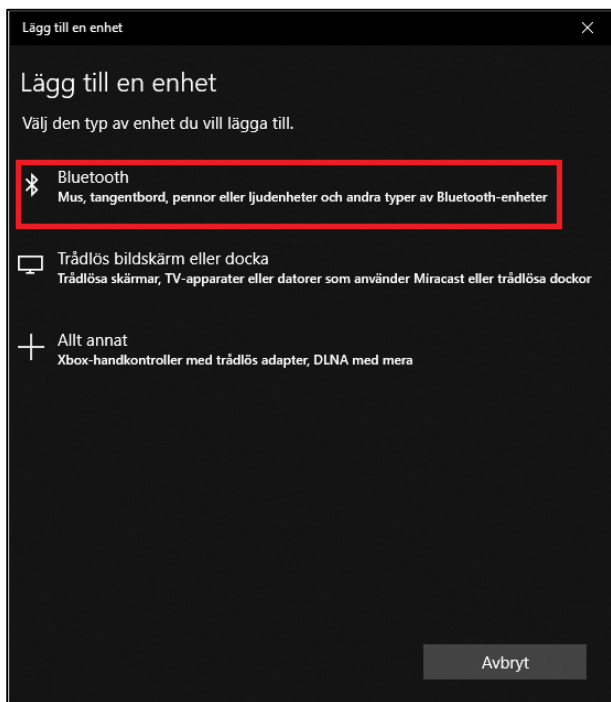

- Håll in *Power*-knappen på högtalaren tills den spelar en melodi.
- Håll in *Bluetooth*-knappen på högtalaren tills den spelar en melodi (mer än 5 sek.)



- Välj "JBL Clip 4" i listan över enheter.

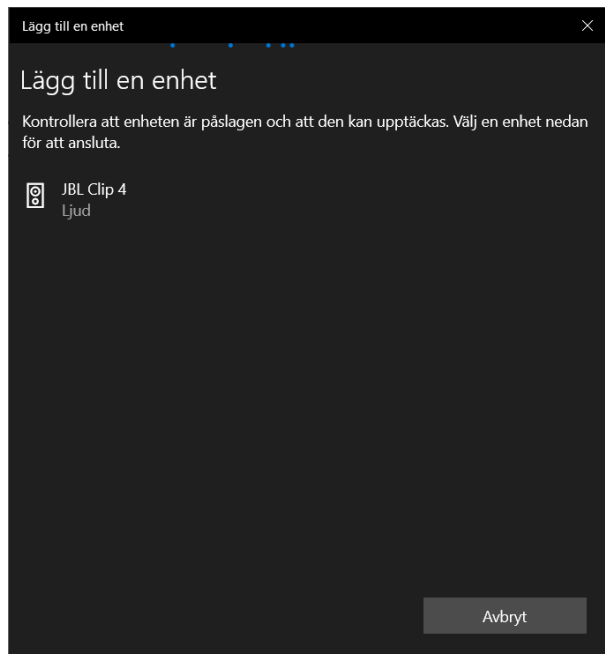

Högtalaren spelar en liten melodi när anslutningen är upprättad.

- Om "JBL Clip 4" **inte** visas i listan gör du följande:



- Håll in *Volym upp*-knappen och *Play*-knappen samtidigt i 10 sek.
- Högtalaren spelar en liten melodi, och visas i listan efter några sekunder.

- Välj "Klart" i den vy som visas.



### Använd extern högtalare

När Elektronisk PODD mini har varit avstängd eller utanför högtalarens räckvidd går högtalaren i viloläge.

Högtalaren väcks genom att man trycker på *Power*-knappen. Den spelar först melodin för *påslagen* och sedan melodin för *ansluten*.

Högtalaren stängs av genom att man trycker på *Power*-knappen tills den spelar en melodi.

Volymen på högtalaren ställs in genom att använda *Volym*-knapparna. När maxvolym är nådd avger högtalaren en ljudsignal.



## Säkerhetskopiering

### Automatisk säkerhetskopiering

Elektronisk PODD säkerhetskopieras automatiskt varje vecka natten till måndag klockan 05.00. Detta gör det möjligt att återställa data från föregående vecka. Enheten måste vara på för att backup ska kunna köras.

De säkerhetskopierade filerna sparas på diskpartitionen "Abilia Backup" i enheten:

E:\Backup\Rolltalk

### Säkerhetskopiering av användarprogrammet

Det är viktigt att man gör en kopia av användarprogrammet som sparas på en extern enhet (till exempel ett USB-minne) både som säkerhetskopia vid stöld eller skada på enheten, eller om användaren ska få en ny enhet och användarprogrammet måste flyttas.


### Återställning från en säkerhetskopia

**OBS:** Återställning från säkerhetskopia ska göras endast om man verkligen behöver det. Om du är osäker kontakta din hjälpmedelscentral eller Abilia för support.

Det som har lagts in efter en säkerhetskopiering som har gjorts efter måndagen för veckovis säkerhetskopiering försvinner.

Innan en säkerhetskopia kan återställas måste Rolltalk avslutas.

I Windows startmeny finns en genväg till mappen Rolltalk. I Rolltalk-mappen finns en genväg, "Återställa backup". Denna kan nyttjas för att starta en backup.

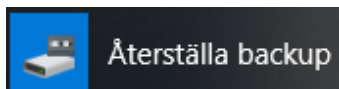

# Skötsel

## Rengöring

**OBS:** Innan rengöring av enheten ska alla kablar tas ur och enheten ska stängas av.

Rengör med en mjuk trasa som fuktats med vatten. Använd inte flytande eller aerosolbaserade rengöringsmedel som kan innehålla antändbara ämnen.

1. Stäng av enheten, se kapitel *Stäng av enheten*.
2. Koppla från alla inkopplade (med kabel) enheter, till exempel hörlurar och högtalare från enheten och från respektive uttag.
3. Fukta en mjuk, luddfri trasa med antingen vatten eller skärmrengöring och torka ytan på enheten tills den blir ren. Låt inget vatten från trasan droppa in i enhetens uttag eller knappar.

**OBS:** För att undvika skada på enheten eller skärmen får du inte spraya rengöringslösningen direkt på skärmen. Använd bara produkter som är specifikt utformade för rengöring av skärmar och följ instruktionerna som medföljer produkten.

## Uppdatera av Elektronisk PODD




*Sök efter uppdateringar* ligger som en genväg på skrivbordet. Starta detta program och tryck på *Sök efter uppdateringar*.

Om det finns en ny version av Elektronisk PODD att ladda hem anges detta i listan. Tryck på *Ladda ner* för att ladda ned uppdateringen.

När uppdateringen är nedladdad startar installationen, följ instruktionerna på skärmen.

Vid nästa start av Elektronisk PODD eller Nova 2 kommer du bli ombedd att uppdatera användarprogrammet.

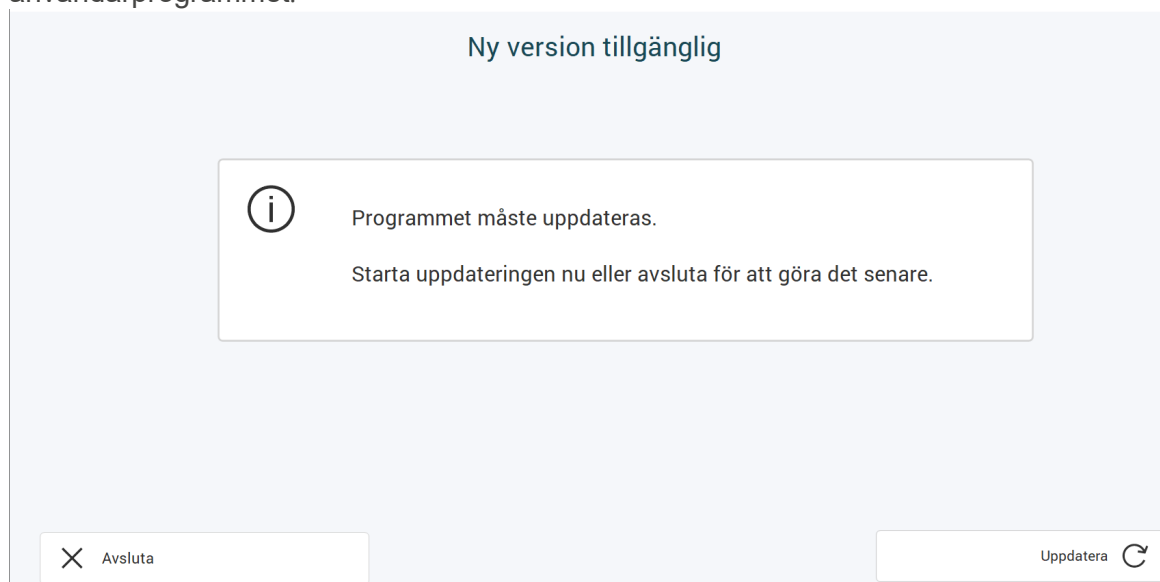

Vid behov av uppdatering av ytterligare användarprogram följ dessa steg:

När Elektronisk PODD har uppdaterats måste man använda de nya PODD 15/PODD 60-filerna för att alla funktioner för redigering och inställningar ska fungera. Om de anpassningar som gjorts i det gamla användarprogrammet ska användas måste det sedan importeras.

Gör så här efter uppdatering:

1. Öppna *PODD Anpassa* från skrivbordet.
2. Välj den nya versionen av PODD 15 eller PODD 60 som valt program. I exemplet nedan är PODD 60 v1.2 valt:

The screenshot shows the 'PODD Anpassa' interface. At the top, the title 'PODD Anpassa' is centered. Below it, the section 'Valt program:' is displayed. A dropdown menu shows 'PODD 60 v1.2' as the selected option. Below the dropdown are five menu items, each with a right-pointing arrow: 'Välj PODD-program', 'Administrera program', 'Återställ originalversioner', and 'Ta bort program'. In the bottom left corner, there is a button labeled 'Avsluta' with a left-pointing arrow. In the bottom right corner, there is a button labeled 'Använd anpassningsguide' with a checkmark icon, and below it, a button labeled 'Starta program' with a right-pointing arrow.

3. Spara den nya PODD-versionen med önskat namn genom att gå till **Administrera program|Spara som**. Det nya filnamnet visas som *Valt program*. Det nya programmet startar, med anpassningsguide om det är valt.
4. I anpassningsguiden (eller gå till **Redigera och inställningar|Inställningar|Administrera program**), tryck på *Importera ändringar*. Följ instruktionerna för att importera de individuella ändringar som har gjorts i den gamla versionen. Se instruktioner för *Importera ändringar* i *Bruksanvisning Elektronisk PODD*.



## Installera Elektronisk PODD

Vid leverans är Elektronisk PODD redan installerat på enheten, så normalt är det inte nödvändigt att genomföra stegen nedan.


Licensen läggs in automatiskt av installationsprogrammet.

**OBS:** För att kunna installera krävs administratörsrättigheter.


- För att starta installationen av Elektronisk PODD, anslut USB-minnet till enheten och kör programmet "Electronic - PODD Swedish" från USB-minnet.
- Tryck på *Nästa* i vyn "Välkommen".



- För att komma vidare i installationen måste man acceptera villkoren i licensavtalet, tryck sedan på *Installera*.

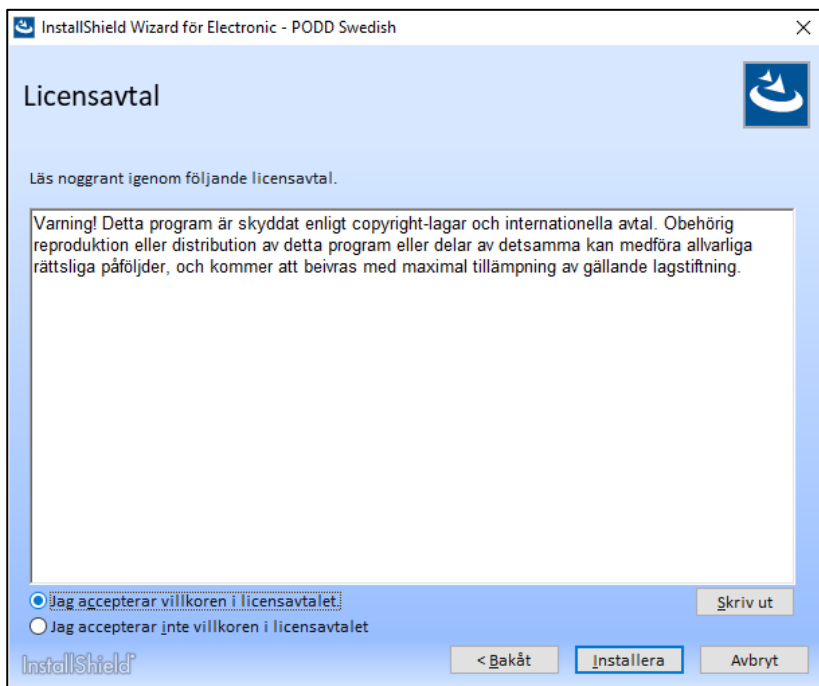

- Installationsprogrammet installerar de nödvändiga komponenterna på enheten. Detta kan ta upp till 15 minuter.

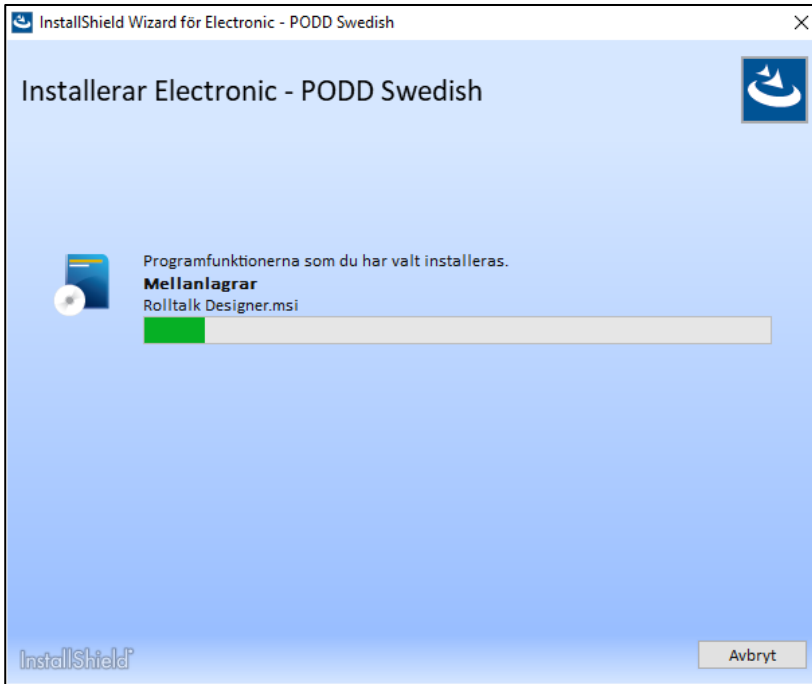

- Tryck på *Slutför* för att avsluta guiden.



## Avinstallera Elektronisk PODD

För att starta avinstallationen av Elektronisk PODD, kör programmet "Electronic - PODD Swedish" från USB-minnet.

**OBS:** För att kunna avinstallera krävs administratörsrättigheter.

- Välj "Ta bort".



- Elektronisk PODD tas bort från enheten.



- Tryck på *Slutför* för att avsluta guiden.



# Felsökning

## Batteriproblem

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Batteriet laddas inte		1. Kontrollera alla anslutningar för att säkerställa rätt anslutning. 2. Koppla ur medföljande AC-strömadapter från vägguttaget och kontrollera att vägguttaget fungerar som det ska. 3. Kontrollera alla kabelanslutningar, koppla in adaptern till enheten och anslut sedan adaptern till vägguttaget.
	Enhetens temperatur ligger under 0°C eller över 35°C.	Ladda batteriet i en omgivande temperatur på 0°C till 35°C.
	Batteriet eller strömadaptern är skadad.	Kontakta hjälpmedelscentral eller Abilia för att byta batteri eller strömadapter.
Batteriet töms snabbt även när Enheten är i standby-läge.	Om Enheten inte är i ett nätverks räckvidd fortsätter enheten att sända ut signaler för att lokalisera en basstation och tömmer batteriet.	Stäng tillfälligt av Enheten. Flytta enheten inom räckvidden för ett nätverk eller stäng tillfälligt av den trådlösa anslutningen på enheten.
Enheten slås inte på	Batteriet är helt urladdat.	Ladda enheten i minst 4h.

## Systemproblem

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Enheten startar inte	Batteriet är helt urladdat.	1 Ladda enheten i minst 4 timmar. 2 Håll in <i>Power</i> -knappen i 2 sekunder.
Enheten stängs inte av		Kontrollera om surfplatteläge är aktiverat, om ja är <i>Power</i> -knappen deaktiverad. Håll <i>Power</i> -knappen intryckt i 10 sekunder för att få enheten att stängas av.
Enheten låser sig		Håll <i>Power</i> -knappen intryckt i 10 sekunder för att få enheten att stängas av.
Enheten svarar inte eller betar sig oväntat		1. Starta om enheten. 2. Kontakta Abilia.

## Pekskärmsproblem

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Pekskärmen svarar långsamt eller felaktigt	Skärmen är smutsig. Smuts innanför rugged case (mellan skärm och rugged case).	Fukta en mjuk, luddfri trasa med antingen vatten eller skärmrengöring och torka ytan på skärmen tills den blir ren. Låt inget vatten från trasan droppa in i enhetens uttag eller knappar.  Ta bort rugged case och gör rent.

## Nätverksproblem

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Ingen trådlös anslutning, WiFi		1. Kontrollera om det trådlösa nätverket är valt. Se <i>Nätverksanslutning</i> . 2. Försök att komma närmare den trådlösa åtkomstpunkten. 3 Återställ den trådlösa routern vid användning av ett privat nätverk; öppna webbläsaren för att visa landningssidan vid användning av ett offentligt nätverk.
Långsam Internet-anslutning	Flytta enheten till en annan plats för bättre signalmottagning.	Flytta enheten till en annan plats för bättre signalmottagning.

## Förvaring och kassering

Produkten ska förvaras inomhus i rumstemperatur och skyddad från fukt.



Produkten innehåller elektroniska komponenter som måste återvinnas. Kassera produkten på en lämplig återvinningsplats.

Ytteremballaget ska återvinnas som pappersavfall och inneremballaget som plastavfall.

## Produktspecifikationer

### Elektronisk PODD mini

Uttag för hörlurar:	3,5 mm
Batteri:	Li-Ion 3,7 V/8300 mAh. Max 8 timmar drifttid.
Kamera:	5 Megapixel, 2,0 Megapixelkamera på framsidan
Skärm:	8" touchskärm
Operativsystem:	Windows 10
Nätverk:	WiFi, Bluetooth 4.0
Storlek (H x B x D):	145 x 228 x 16,5 mm
Vikt:	630 g
Kapslingsklass:	IP 67
Portar:	Micro-USB, USB, Kortplats för Micro-SD-kort,
Minne:	4 GB
Lagring:	64GB
Temperaturområde:	Vid användning: 0°C till 40°C Förvaring: -40°C till 70°C
Laddare:	462333 Laddare för Elektronisk PODD mini
Beräknad livslängd:	5 år

### Laddare för Elektronisk PODD mini

Ingående spänning:	100–240 V AC
Utgående effekt:	10 W
Utgående ström:	2 A
Utgående spänning:	5 V DC

### Tillbehör


För tillbehör, se [www.abilia.se](http://www.abilia.se).

## Viktig information

Innan du använder produkten ska du läsa och förstå innehållet i bruksanvisningen.

### Säkerhetsdefinitioner

 **WARNING:** Risk för skada eller dödsfall om anvisningarna inte följs.

 **FÖRSIKTIGHET:** Risk för produktskada om anvisningarna inte följs.

**OBS:** Information som är nödvändig i en viss situation.

**TIPS:** Ytterligare information som kan förbättra användningen av produkten.

### Säkerhetsinstruktioner före användning av Elektronisk PODD mini

 **WARNING:** Läs följande varningsinstruktioner innan du använder produkten.

- Var försiktig när du använder hörlurar så att högt ljud inte skadar din hörsel. Sänk volymen till ett minimum innan du höjer den.

### Allvarliga incidenter

Om en allvarlig incident som rör produkten inträffar måste den rapporteras till tillverkaren och behörig nationell myndighet. En incident betraktas som allvarlig om den direkt eller indirekt leder till, kunde ha lett till eller kan leda till en patient, användares eller annan persons dödsfall, tillfällig eller permanent allvarlig försämring av en patients, användares eller annan persons hälsotillstånd eller ett allvarligt hot mot folkhälsan.

### Överensstämmelse med krav för medicintekniska produkter

Elektronisk PODD mini marknadsförs som ett tekniskt hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar och uppfyller alla nödvändiga krav, förordningar och direktiv för medicintekniska produkter.

### Produktansvar

Produkten har utvecklats och riskbedömts i enlighet med ISO 14971. Bruksanvisningen och de tekniska specifikationerna har utformats i enlighet med säkerhetsbedömningen i riskanalysen. Beakta alltid säkerheten vid användning av produkten. Abilia AB tar inte ansvar för konsekvenser efter felaktig användning eller installation av produkten. All form av åverkan eller manipulering av produkten gör garantin ogiltig och friskriver tillverkaren från ansvar. Produktens beräknade livslängd gäller när den används i enlighet med dess avsedda användnings- och underhållsinstruktioner.







## Kontaktinformation

### **Sverige:**

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige  
Telefon: +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

### **Norge:**

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge  
Telefon: +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

### **Storbritannien:**

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingway Business Park, Swavesey,  
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom  
Telefon: +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

### **Internationell:**

[www.abilia.com/intl/get-products/distributors](http://www.abilia.com/intl/get-products/distributors)

