



# GEWA Maxi

Bruksanvisning

Art. nr: 461130

SE 6.0

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
Om GEWA Maxi .....	3
Avsett ändamål .....	3
Om detta dokument .....	3
<b>Översikt över GEWA Maxi</b> .....	<b>4</b>
Medföljande delar .....	4
Medföljande dokument .....	4
<b>Kom igång med GEWA Maxi</b> .....	<b>5</b>
Skapa ett överlägg .....	5
Lägg in ett överlägg .....	5
Sätt i batterier .....	6
Ändra grundinställningarna .....	6
Sätt på plasthåttor .....	8
Fäst kardborrebanden .....	9
<b>Programmera GEWA Maxi</b> .....	<b>10</b>
Återkopplingssignaler .....	11
Makroinspelning .....	11
Spela in en signal .....	12
<b>Använd GEWA Maxi</b> .....	<b>15</b>
<b>Skötsel</b> .....	<b>15</b>
Byt batterier .....	15
Rengör GEWA Maxi .....	16
Återställ till fabriksinställningar .....	16
<b>Felsökning</b> .....	<b>17</b>
<b>Förvaring och kassering</b> .....	<b>18</b>
Förvaring .....	18
Kassering .....	18
<b>Produktspecifikationer</b> .....	<b>19</b>
Tillbehör .....	19
<b>Viktig information</b> .....	<b>20</b>
<b>Kontaktinformation</b> .....	<b>23</b>

# Inledning

## Om GEWA Maxi

GEWA Maxi är en fjärrkontroll med stora knappar som kan märkas med bilder eller symboler för kognitivt stöd. En inbyggd fingerguide gör det enkelt att trycka på rätt knapp.

Produkten används för olika vardagsuppgifter, till exempel:

- Styra IR-styrd hemelektronik.
- Styra lampor, fläktar, gardiner, eluttag och dörrar med GEWA-LINK IR.
- Styra dörrar på ett säkert sätt med en 4096-kodad signal.

## Avsett ändamål


GEWA Maxi är en stor och lättanvänd fjärrkontroll avsedd för personer som inte kan använda en vanlig fjärrkontroll på grund av motorisk eller kognitiv funktionsnedsättning eller synnedsättning. Produkten kan hjälpa användaren styra elektronisk utrustning i hemmet, bland annat tv-apparater, belysning och fönster- och dörröppnare. Produkten är avsedd för inomhusbruk.

## Om detta dokument

 Läs den viktiga information på sida 20 innan du använder produkten.

Bruksanvisningen innehåller information om att ställa in och använda produkten. Den är avsedd för tekniker och supportpersonal som ska konfigurera produkten och instruera användaren om hur produkten fungerar. Bruksanvisningen förutsätter att läsaren har kunskap om infraröds signaler (IR).

# Översikt över GEWA Maxi

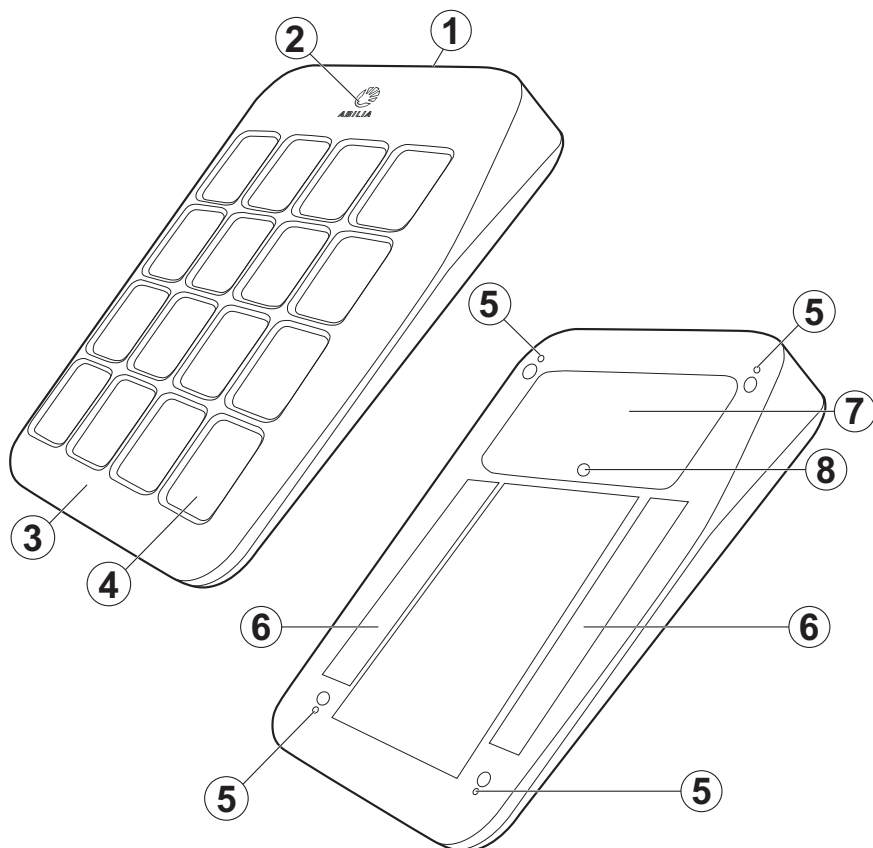

1. IR-mottagare
2. Lysdiod
3. Fingerguide
4. 16 programmerbara knappar
5. Skruvar för bakstycke
6. Plats för kardborreband
7. Batterifack
8. Skruv till batterifack

## Medföljande delar

- GEWA Maxi
- 4 AA-batterier
- 16 plathättor
- 8 kardborreband
- 1 plastfodral

## Medföljande dokument

- Bruksanvisning (detta dokument)
- Överlägg

# Kom igång med GEWA Maxi



## Skapa ett överlägg

Med ett överlägg kan du välja en lämplig märkning GEWA Maxi för knapparna så att de blir lättare att känna igen. Du kan skapa och skriva ut överlägg på [www.gewa.se/overlay](http://www.gewa.se/overlay) eller rita ett.

## Lägg in ett överlägg



Innan du ändrar överlägget, se till att ha följande till hands:

- Ett utskrivet eller ritat överlägg
- En spårskruvmejsel

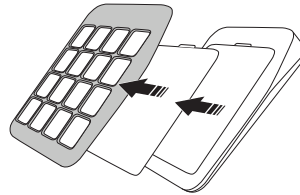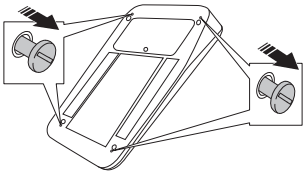



1. Lossa skruvarna helt tills du hör att de klickar.

2. Ta bort fronten och plastfodralet.

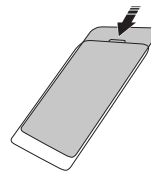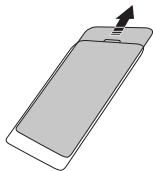

3. Ta ut det gamla överlägget ur plastfodralet.

4. Lägg in det nya överlägget i fodralet.

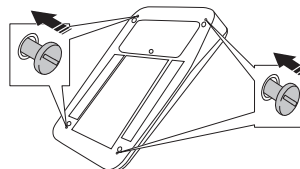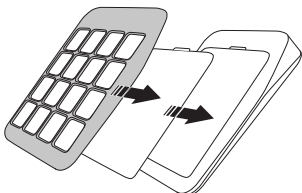

5. Sätt tillbaka fodralet och fronten.

6. Dra åt skruvarna ordentligt.

## Sätt i batterier

Se *Byt batterier* på sida 15.

## Ändra grundinställningarna

**TIPS:** Använd överlägget som medföljer GEWA Maxi för att visa inställningsknapparna på produkten.

Det finns fem olika grundinställningar för GEWA Maxi:


- **Volym:** Ljudvolymen när man trycker på en knapp.
- **Ton:** Tonläget för återkopplingen från GEWA Maxi.
- **Anslagsfördröjning:** Den tid en knapp behöver hållas intryckt för att utlösa en åtgärd.
- **Lysdiod:** Lysdiodens ljusstyrka.
- **Vibration:** Vibrationsstyrkan när en knapp trycks in.

Varje inställning har fyra värden. Navigera genom värdena genom att trycka på inställningsknappen upprepade gånger. Lysdioden ändrar färg för varje värde enligt tabellen. Standardinställningsvärdet är markerat med **fetstil**.

### Inställning

Volym	Av	Låg	<b>Normal</b>	Hög
Ton	Låg	Medel	<b>Hög</b>	Högst
Anslagsfördröjning	<b>Av</b>	0,3 sekunder	0,6 sekunder	1 sekund
Vibration	Av	Låg	<b>Normal</b>	Hög



Inställningen för lysdioden ändrar ljusstyrkan från låg till hög. Den kan ställas in på Av, Låg, Normal (standard) och Hög.

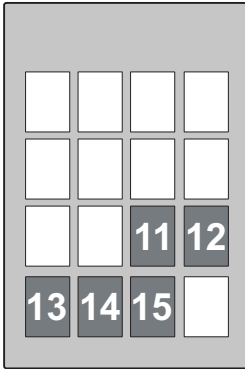

## Inställningsknappar

- 11 Volym
- 12 Ton
- 13 Anslagsfördröjning
- 14 Lysdiod
- 15 Vibration



Gör följande för varje inställning som ska ändras:

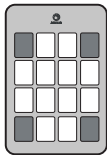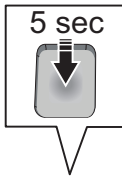

1. Håll alla fyra knapparna intryckta tills lysdioden lyser vitt.



2. Tryck upprepade gånger på inställningsknappen för att navigera till önskat värde.

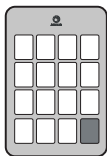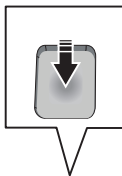


3. Tryck på Enter för att spara. Lysdioden blinkar grönt.


## Sätt på plashättor

Om du inte använder alla knappar på överlägget kan du dölja de oanvända knapparna med de medföljande *plashättorna*. Plashättorna gör att knapparna inte syns och ytan känns slät.


**OBS:** Kom ihåg att göra alla inställningsändringar innan plashättorna sätts på plats. Plashättorna kan annars blockera en eller flera av inställningsknapparna.

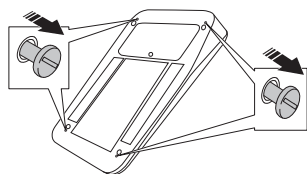


1. Lossa skruvarna helt tills du hör att de klickar.

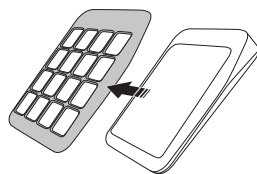


2. Ta bort fronten.

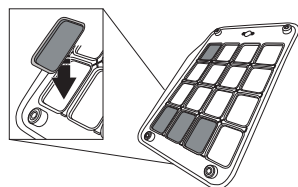

3. Vänd på fronten och tryck fast plashättorna på de knapplatser som inte används.

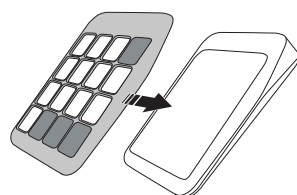

4. Sätt tillbaka fronten.

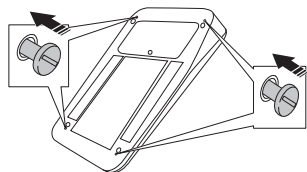


5. Dra åt skruvarna ordentligt.




## Fäst kardborrebanden


GEWA Maxi levereras med åtta kardborreband som du kan fästa på undersidan för att säkerställa att produkten sitter kvar på bordet.

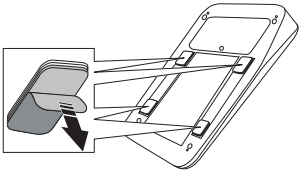

**1.** Para ihop kardborrebanden två och två. Dra av skyddsarket från ett i taget av kardborrebanden och fäst bandet på produktens baksida.

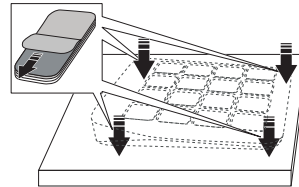

**2.** Dra av skyddsarken från banden du vill ha på bordsytan och fäst dem GEWA Maxi där du vill ha dem.

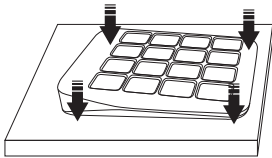

**3.** Tryck ordentligt för att fästa kardborrebanden och låt dem vila i 30 minuter för bättre vidhäftning.

## Programmera GEWA Maxi

**⚠ FÖRSIKTIGHET:** Använd inte GEWA Maxi med medicintekniska produkter som har en högre klass än klass 1.

**TIPS:** Använd överlägget som medföljer GEWA Maxi för att se de knappar som används för programmering av enheten.

De 16 knapparna på GEWA Maxi är förprogrammerade med GewaLink-kanalerna 16-31: den första knappen är kanal 16, den andra är kanal 17 och så vidare. Detta innebär att GEWA Maxi kan användas direkt. Varje knapp kan dock omprogrammeras efter användarens behov.




GEWA Maxi kan programmeras för följande insignaler.

Signal	Användning	Exempel på användning
IR	Alla typer av IR-sändare.	Fjärrkontroller till TV eller kabelbox.
GewaLink	Någon av Abilias IR-mottagare.	Andromeda Socket eller fönsteröppnare.
4096	Funktioner med strikt behörighet.	Dörrar till lägenhet eller hus.

**OBS:** GEWA Maxi lämnar inspelningsläget automatiskt efter 30 sekunders inaktivitet. Felsignalen ljuder och ändringarna sparas inte.

## Återkopplings signaler

Under programmeringen ger GEWA Maxi återkoppling genom lysdiodens färg och olika ljudsignaler som står för olika meddelanden.



Signaltyp	Ton	Tonförklaring
Inställning		Tre stigande toner
Lyckades		Tre positiva toner
Fel:		Åtta negativa toner

## Makroinspelning


Varje knapp på GEWA Maxi kan programmeras att utföra en enda åtgärd eller en serie med flera åtgärder med en knapptryckning (ett makro). Till exempel kan en serie åtgärder vara att slå på tv:n och kabelboxen och sedan gå till kanal 4 med ett knapptryck.

I *Spela in en signal* på sida 12 finns det möjlighet att programmera ett makro.

## Spela in en signal

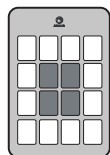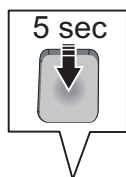


**1.** Håll in de fyra knapparna tills lysdioden blinkar grönt för att gå in i inspelningsläge.

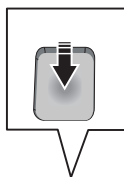

**2.** Tryck på den knapp du vill spela in på. Lysdioden lyser med ett fast grönt sken.




3±1 cm

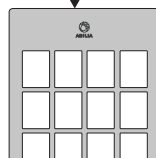


**3.** För IR:  
Placera sändaren som ska spelas in, t.ex. en tv-fjärrkontroll, cirka 3 cm från IR-fönstret.

**4.** Välj ett av följande:

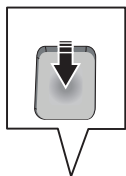



För IR:

Tryck på knapp 1. En återkopplingssignal indikerar att GEWA Maxi är klar för inspelning.

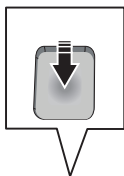

För GewaLink:


Tryck på knapp 2. Vänta tills lysdioden lyser med ett fast vitt sken.

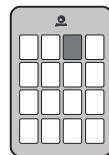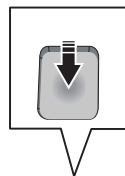

För 4096:

Tryck på knapp 3. Vänta tills lysdioden lyser med ett fast blått sken.

## 5. Välj ett av följande:

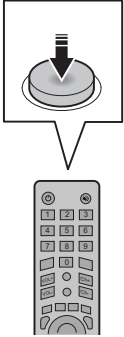


För IR:

Håll in knappen på sändaren som du vill spela in.

Släpp knappen när lysdioden börjar lysa rött.


Upprepa tills lysdioden blinkar gult.

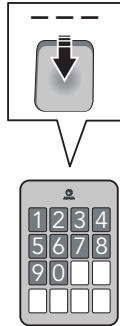

För GewaLink:

Ange den 3-siffriga koden, mellan 000 och 128, för enheten som inspelningen gäller.

Inställningssignalen spelas upp och lysdioden blinkar gult.

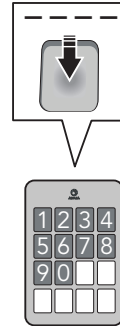



För 4096:

Ange den 4-siffriga koden, mellan 0000 och 4095, för enheten som inspelningen gäller.

Inställningssignalen spelas upp och lysdioden blinkar gult.



**TIPS:** Om IR-inspelning misslyckas:

- Ändra avståndet mellan fjärrkontrollen och GEWA Maxi.
- Kontrollera att inget ljus, till exempel starkt solljus, stör GEWA Maxi.
- Gör proceduren igen, men tryck på och släpp fjärrkontrollsknappen i stället för att hålla den intryckt.

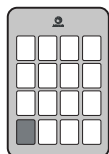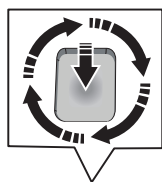

**6. Välj ett av följande:**

- Om du vill spela in en annan åtgärd:
  - a. Tryck på Fördröjning upprepade gånger för att ställa in fördröjningen till nästa åtgärd. Lysdiodens blinkande mönster indikerar fördröjningen till nästa åtgärd.
  - b. Tryck på Enter en gång för att spara och fortsätt till nästa del av inspelningen.
  - c. Upprepa steg 3–6.
- Om du är klar med inspelningen, gå till nästa steg.

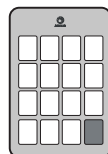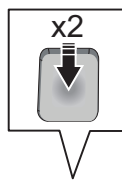

**7. Tryck på Enter en gång för att spara inspelningen.**

**8. Tryck på Enter en gång till för att lämna inspelningsläget.**

# Använd GEWA Maxi


Använd GEWA Maxi i samma rum som den enhet du vill styra. GEWA Maxi är inte känslig för pekriktningen.

## Skötsel


### Byt batterier

När batterierna behöver bytas blinkar lysdioden rött och en lång och tre korta pipsignaler upprepas två gånger.


Innan du börjar ska du se till att ha följande till hands:

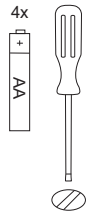

**OBS:** Använd icke-uppladdningsbara alkaliska batterier till GEWA Maxi. Andra batterier är inte tillräckligt starka för att driva GEWA Maxi.

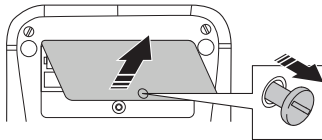


1. Lossa skruven och öppna batterifacket.

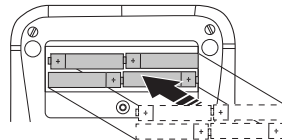

2. Ta ut de gamla batterierna och sätt i de nya.

**OBS:** Passa in "+"-tecknen korrekt.

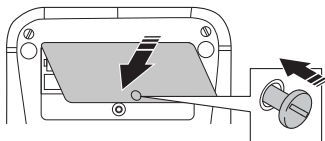





3. Stäng batterifackets lucka och dra åt skruven.

## Rengör GEWA Maxi

Rengör GEWA Maxi med mikrofiberduk och lite vatten. För att rengöra plastfodralet med överlägget lossar du de bakre skruvarna och tar bort fronten.

## Återställ till fabriksinställningar

Du kan behöva återställa GEWA Maxi vid renovering av produkten eller vid felsökning. Återställningen till fabriksinställningar tar bort all programmering och alla inställningar.

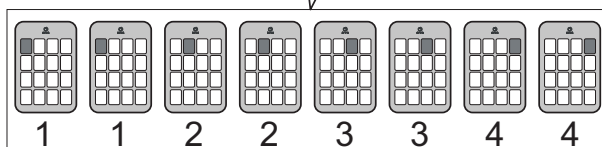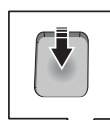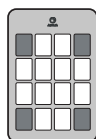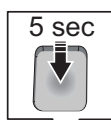

**1.** Håll in de fyra knapparna tills lysdioden lyser vitt.

**2.** Tryck knappsekvensen 11223344 för att återställa enheten till fabriksinställningarna.

**Resultat:** Lysdioden blinkar grönt i några sekunder och en signal hörs efter en lyckad återställning.



# Felsökning

Om du behöver hjälp med GEWA Maxi, se *Kontaktinformation* sista sidan i denna bruksanvisning eller gå till [www.abilia.com](http://www.abilia.com).


Problem	Orsak	Lösning
Programmeringen av GEWA Maxi misslyckas.	Sändarens batterier är svaga.	Byt batterier i sändaren.
	Batterierna i GEWA Maxi är slut eller nästan slut.	Byt batterierna i GEWA Maxi, se <i>Byt batterier</i> på sida 15.
Programmering av GEWA Maxi för IR-signaler misslyckas.	Sändaren är för nära eller för långt ifrån IR-mottagaren på GEWA Maxi.	Öka eller minska avståndet mellan GEWA Maxi och sändaren.
	GEWA Maxi känner inte igen eller tar inte emot sändarens signaler.	Upprepa proceduren i <i>Spela in en signal</i> på sida 12, men tryck och släpp knappen i stället för att hålla den intryckt i steg 5.
	Sändaren använder radio- eller Bluetooth-signaler.	Kontrollera att sändaren inte använder radio- eller Bluetooth-signaler. Endast IR-signaler kan programmeras.
	Externa källor till infrarött ljus, t.ex. starkt solljus, påverkar GEWA Maxi.	Skydda GEWA Maxi från externa infraröda ljuskällor.
Fronten lossnar inte.	Skruvarna till bakstycket är inte helt urskruvade.	Fortsätt skruva tills du hör ett klick.
Batterifackets lucka lossnar inte.	Skruvarna till batterifacket är inte helt urskruvade.	Fortsätt skruva tills du hör ett klick.

# Förvaring och kassering

## Förvaring

Produkten ska förvaras inomhus i rumstemperatur och skyddad från fukt.

Förvara produkten mellan -10 och 50 °C.

 **FÖRSIKTIGHET:** Ta ur batterierna om du inte planerar använda produkten under en längre tid.

## Kassering



Produkten innehåller elektroniska komponenter som måste kontrolleras. Kassera produkten på en lämplig återvinningsplats.

# Produktspecifikationer

Mått, L × B × H	242 x 160 x 42 mm
Vikt	540 g
Temperatur (förvaring)	-10–50 °C
Temperatur (användning)	5–40 °C
Batterityp	4 AA icke-uppladdningsbara alkaliska batterier
Batteritid	2 år, baserat på 100 sändningar per dag
IR-räckvidd	Max. 50 m
Omgivningskontroll	GewaLink, GEWA 4096 och inspelade IR-signaler
Beräknad livslängd	5 år

## Tillbehör

För mer information om GEWA Maxi och tillbehören, gå till [www.abilia.com/sv/our-products/omgivningskontroll/fjarrkontroller/gewa-maxi](http://www.abilia.com/sv/our-products/omgivningskontroll/fjarrkontroller/gewa-maxi) eller skanna QR-koden.



**Skanna mig!**

## Viktig information

Innan du använder produkten ska du läsa och förstå innehållet i bruksanvisningen.

### Säkerhetsdefinitioner

 **VARNING:** Risk för skada eller dödsfall om anvisningarna inte följs.

 **FÖRSIKTIGHET:** Risk för produktskada om anvisningarna inte följs.

**OBS:** Information som är nödvändig i en viss situation.

**TIPS:** Ytterligare information som kan förbättra användningen av produkten.

### Allvarliga incidenter

Om en allvarlig incident som rör produkten inträffar måste den rapporteras till tillverkaren och behörig nationell myndighet. En incident betraktas som allvarlig om den direkt eller indirekt leder till, kunde ha lett till eller kan leda till en patients, användares eller annan persons dödsfall, tillfällig eller permanent allvarlig försämring av en patients, användares eller annan persons hälsotillstånd eller ett allvarligt hot mot folkhälsan.

### Överensstämmelse med krav för medicintekniska produkter

GEWA Maxi marknadsförs som ett tekniskt hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar och uppfyller alla nödvändiga krav, egenskaper och direktiv för medicintekniska produkter.

## Produktansvar

Produkten har utvecklats och riskbedömts i enlighet med ISO 14971. Bruksanvisningen och de tekniska specifikationerna har utformats i enlighet med säkerhetsbedömningen i riskanalysen. Beakta alltid säkerheten vid användning av produkten. Abilia AB tar inte ansvar för konsekvenser efter felaktig användning eller installation av produkten. All form av åverkan eller manipulering av produkten gör garantin ogiltig och friskriver tillverkaren från ansvaret. Produktens rekommenderade livslängd gäller när den används i enlighet med dess avsedda användnings- och underhållsinstruktioner.



# Kontaktinformation

## Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige  
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | [support@abilia.se](mailto:support@abilia.se) | [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

## Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge  
Telefon +47 23 28 94 00 | [support@abilia.no](mailto:support@abilia.no) | [www.abilia.no](http://www.abilia.no)

## Storbritannien

Abilia UK Ltd, Unit 10 Buckingham Business Park, Swavesey,  
Cambridge, CB24 4AE, Storbritannien  
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | [support@abilia.uk](mailto:support@abilia.uk) | [www.abilia.uk](http://www.abilia.uk)

## Internationell

[www.abilia.com/intl/get-products/distributors](http://www.abilia.com/intl/get-products/distributors)

