



Micro Voice röstförstärkare

Rekonditioneringsanvisning

Art. nr: 462230

Innehållsförteckning

Inledning	2
Säkerhetsinstruktioner och produktansvar	2
Garanti	2
Produktöversikt	2
Rekonditionera Micro Voice	3
Kontrollera medföljande delar.....	3
Byt batteri.....	3
Kontrollera funktion.....	3
Rengör Micro Voice	4
Paketera Micro Voice	4
Tillbehör och reservdelar	4

Inledning

Detta dokument är avsett för personer som ska rekonditionera Micro Voice röstförstärkare (art. nr. 462230).

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. En förutsättning för att kunna rekonditionera hjälpmedlet är att man har en grundläggande kunskap om hjälpmedlets funktion och användning.

När hänvisningar till bruksanvisningen görs i detta dokument avses Micro Voice röstförstärkare Bruksanvisning.

Säkerhetsinstruktioner och produktansvar

Se kapitel *Viktig information* i bruksanvisningen.

Garanti

Fel som omfattas av garanti ska åtgärdas av Abilia för att garantin ska gälla. Garantin på produkten kan avbrytas om produkten öppnas eller på något sätt ändras.

Kontakta alltid Abilia om osäkerhet råder om garanti.

Produktöversikt



Micro Voice



Laddare



Midjebälte



Headset



Volymkontroll

Kontrollknapp



Mikrofonport

Ljudutgångsport

LED-indikator

LED-indikator för laddning



Laddningsport

Rekonditionera Micro Voice

Kontrollera medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man komplettera med tillbehör eller reservdelar. Om något av de medföljande dokumenten saknas, kan de hämtas och skrivas ut från Abilias hemsida, se <https://www.abilia.com/intl/manuals>.

I kartongen ska följande finnas:

- Micro Voice röstförstärkare
- Headset
- Midjebälte
- Nätadapter
- Halsrem
- Bruksanvisning

Byt batteri

Nedan visas batteriet samt anslutning till kretskortet.



Kontrollera funktion

1. Anslut laddaren till Micro Voice.
2. Kontrollera att LED-lampan blinkar grönt (batteriet laddas).
3. Låt Micro Voice ladda i sex timmar.
4. Anslut headset eller strupmikrofon till mikrofonporten.
5. Starta Micro Voice.
6. Prata i mikrofonen och kontrollera att ljud kommer från Micro Voice.

Rengör Micro Voice

Rengör Micro Voice med en hårt urvriden trasa som doppats i vatten med lite diskmedel i. Torka Micro Voice med en torr trasa efter rengöring.

Paketera Micro Voice

Placera Micro Voice i en skyddande påse för att undvika repor eller nedsmutsning. Använd helst produktens originalförpackning.

Om originalkartongen saknas, använd valfri kartong och bubbelplast som stötskydd. Märk kartongen med samma information som finns på produktetiketten. Produktnamn, artikelnummer och serienummer måste finnas med.

Tillbehör och reservdelar

Art. nr.	Benämning
462221	Bältesklips
462223	Midjebälte
462226	Batteri
508800	Laddare
462206	Headset svart
462203	Strupmikrofon
890408	Halsrem
462205	Vindhätta, mikrofon svart, 10-pack

Kontaktinformation

Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige

Telefon: +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge

Telefon: +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Storbritannien

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckinghamway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom

Telefon: +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

Internationell

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

CE

