



EpiSafe 2

Rekonditioneringsinstruktion

Art. nr: 464230 464250

Innehållsförteckning

Inledning	2
Säkerhetsanvisningar och produktansvar	2
Garanti	2
Översikt över EpiSafe 2	3
Rekonditionera EpiSafe 2	4
Samla alla medföljande delar	4
Återställ kontrollenheten till fabriksinställningar.....	4
Kontrollera den allmänna funktionaliteten	5
Testa sensorn och kontrollenheten	5
Byta batteri.....	5
Stäng av kontrollenheten.....	6
Rengör EpiSafe 2	6
Lägg alla delar i lådan	6
Tillbehör och reservdelar.....	7

Inledning

Detta dokument är avsett för personer som ska rekonditionera EpiSafe.

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. En förutsättning för att kunna rekonditionera hjälpmedlet är att man har en grundläggande kunskap om hjälpmedlets funktion och användning.

Efter genomförd rekonditionering kommer produktens funktion vara kvar, men användardata försvinner.

När hänvisningar till användarmanualen görs i detta dokument hänvisas till *464230 464250_Bruksanvisning_EpiSafe 2_SE* som finns på Abilias hemsida.

Säkerhetsanvisningar och produktansvar

Se kapitlen *Varningar och försiktighetsåtgärder* i bruksanvisningen.

Garanti

Fel som omfattas av garanti ska åtgärdas av Abilia för att garantin ska gälla. Garantin på produkten kan avbrytas om produkten öppnas eller på något sätt ändras.

Kontakta alltid Abilia om osäkerhet råder om garanti.

Översikt över EpiSafe 2



1. EpiSafe 2 armband med sensor
2. Kabel för anslutning av vidarekoppling All in One
3. Laddare till sensorn
4. Kontrollenhet EpiSafe 2
5. Strömförsörjning till kontrollenhet

Rekonditionera EpiSafe 2

Samla alla medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man komplettera med tillbehör/reservdelar, se kapitel *Tillbehör och reservdelar*. Om något av de medföljande dokumenten saknas, ladda ner och skriv ut dem från Abilias hemsida, se <https://www.abilia.com/intl/manuals>.

I kartongen ska följande finnas:

- EpiSafe 2 armband med sensor
- Kabel för anslutning av Abilia vidarekoppling
- Laddare till sensorn
- Kontrollenhet EpiSafe 2
- Strömförsörjning till kontrollenhet
- Kabel med 6,3 mm plugg (ingår för utvalda kunder.)
- Bruksanvisning

Återställ kontrollenheten till fabriksinställningar

Kontrollenhet måste rensas från information relaterad till den tidigare användaren.

1. Gå in i huvudmenyn.
2. Välj ANDRA INSTÄLLNINGAR.
3. Välj VOLYM och ställ in på 3.
4. Välj KLOCKA och ställ in på aktuell tid.
5. Välj PARA SENSOR.
En ny sensor kopplas om den befintliga inte ska användas.
6. Välj en av följande:
 - För kontrollenheter med **version 1.59 eller äldre**:
 - a) Anslut sensorn till laddaren.
Inom två minuter kan sensorn nu paras med kontrollenheten.
Pairing av en ny sensor finns i en dold meny.
 - b) Tryck på båda piltangenterna samtidigt och håll dem nedtryckta tills ljuset i displayen ändras.
 - c) Tryck snabbt och håll ned OK-knappen tills ett PIN-KOD-fält visas.
 - d) Ange nu koden 1234 genom att använda piltangenterna och OK-knappen.
 - e) Hitta menyn KOPPLA SENSOR.
 - f) Gå vidare med proceduren *För kontrollenheter med version 1.60 eller senare* nedan.
 - För kontrollenheter med **version 1.60 eller senare**:
 - a) Anslut sensorn till laddaren.
Inom två minuter kan sensorn nu paras till kontrollenheten.
 - b) Välj KOPPLA ENHET i ANDRA INSTÄLLNINGAR.
 - c) Tryck på OK-knappen.
Kontrollenheten "söker" nu efter en ny sensor.
Under HITTA SENSORER visas de tillgängliga sensorerna och den valda sensorn blinkar rött.
 - d) Tryck på OK-knappen för att ansluta till sensorn.
Kontrollenheten visar SENSOR KOPPLAD.
 - e) Tryck på OK-knappen för att återgå till huvudmenyn.

Om parningen inte lyckades, upprepa proceduren.

Om tidsintervallet på två minuter har överskridit är det möjligt att sensorn måste tas bort från laddaren och återanslutas.

7. Välj RADERA RAPPORTER och ta bort alla gamla rapporter.

Kontrollera den allmänna funktionaliteten

Utför nedanstående test, kontrollera ev. fel. Läs manualen noggrant.

Kontrollera på skador

1. Kontrollera att strömförsörjning, kablar och kontakt inte är skadade. Byt ut om så är fallet.
2. Kontrollera kapslingen på Kontrollenhet samt Sensor. Om membranet på Kontrollenheten är skadat (hål), bör Kontrollenheten bytas ut.
3. Kontrollera AUX utgången och ingången för strömförsörjningen (12VDC), om det är en skada på dessa, ska Kontrollenheten bytas ut.

Kontrollera sensorn

1. Armbandsremmen bör bytas ut.
2. Kontrollera att sensorladdaren är hel. Det är viktigt att endast använda original 5V laddare för sensorn, eftersom icke-originalladdare kan orsaka skada på sensorn.

Testa sensorn och kontrollenheten

Utför nedanstående test, kontrollera ev. fel. Läs bruksanvisningen noggrant. Kontrollera särskilt kapitlet för *Tester och kontroller* samt *Felsökning*.

1. Utföra de små snabba rörelserna tills ALARM visas på kontrollenhetens display. Återställ larmet genom att trycka på OK-knappen i några sekunder.

En ny användare ska alltid utföra ett test av utrustningen innan den slutligen tas i bruk. I detta ingår även att kontrollera att vidareändring av larm (om detta används) fungerar som det ska.

Byta batteri

Byta batteri på kontrollenheten

Om kontrollenheten har använts i mer än två år rekommenderas det att byta reservbatteriet mot ett uppladdningsbart niMH 9V batteri (8,4,170 mA).

OBS: Glöm inte att avlägsna strömförsörjningen från Kontrollenheten innan byte av batteri.

1. Skruva bort de 2 skruvarna som sitter på undersidan av Kontrollenhetens kapsling.
2. Lossa batteriets anslutning försiktigt.
3. Ta bort batteriet, det kan sitta fast med dubbelhäftande tejp.
4. Montera ett nytt batteri (enligt informationen ovan) med dubbelhäftande tejp så att det sitter ordentligt.
5. Anslut batterikontakten
6. Montera ihop Kontrollenhetens kapsling.
7. Kontrollera att EpiSafe 2 GSM larmar för strömavbrott när strömkabeln avlägsnas från Kontrollenheten.

Byta batteri på sensorn

Det rekommenderas att byta batteriet på sensorer äldre än två år eller sensorer med batteritid på mindre än 24 timmar efter en timmes laddning. För att byta batteriet, kontakta Abilia.

Stäng av kontrollenheten

1. Gå in i huvudmenyn
2. Välj STÄNG AV.

Rengör EpiSafe 2

Torka av sensorn, kontrollenheten och strömförsörjningen noggrant med yt-desinfektion. Kontrollenheten får inte utsättas för vatten eller andra vätskor och ska behandlas varsamt.

Lägg alla delar i lådan

Se kapitel *Samla alla medföljande delar* på sida 4.

Tillbehör och reservdelar

Art. Nr.	Namn
464243	EpiSafe 2 sensor
464232	EpiSafe 2 Kontrollenhet
464227	EpiSafe strömförsörjning till Kontrollenhet
464225	EpiSafe laddare till sensor
464228	Kabel med 4pin/8pin modular, 1,5 m
464224	Armbandsrem till sensorn
981246	Kabel med 6,3 mm plugg

Kontaktinformation

Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon: +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge
Telefon: +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Storbritannien

Abilia UK Ltd, Unit 10 Buckinghamway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Storbritannien
Telefon: +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

International

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

CE

