

Starta upp HandiKalender

Grattis till din nya Handi – så här kommer du igång!

Om du vill veta mer om de olika stegen, se *Handboken*, som kan laddas ned från www.abilia.se.

1. Installera HandiKalender

1. Starta *App Store* / *Google Play* i enheten.
2. Sök efter "HandiKalender".
3. Installera.



HandiKalender

2. Logga in med myAbilia användarkonto

Användarkonto kan skapas direkt på myAbilia.com.

Nu kan demoversion köras i 60 dagar. Därefter behövs en licens.



3. Registrera licens

Licensen ska registreras på användarkontot. Gör så här:

1. Logga in på användarkontot.
2. Gå in på Min profil och välj Licenser.
3. Klicka på *Lägg till licens*, skriv in licensnyckeln och klicka på *Lägg till* för att spara.

Nu uppdateras licensen i HandiKalender-appen (om enheten är ansluten till internet).

4. Tips: Anpassa Handi

Handi kan ställas in på många sätt för att passa användarens önskemål. För att få tips, se *Anpassningsguiden*, som kan laddas ned från www.abilia.se.

5. Tips: Använd webbtjänsten myAbilia

Starta en webbläsare. Skriv in www.myabilia.com och logga in med dina kontouppgifter. Från myAbilia kan du enkelt hjälpa till med aktiviteter, bilder mm i Handi.