

# Rekonditionering MEMOday 2

Art.nr 508270



# Innehållsförteckning

1. Inledning .....	3
1.1 Viktig information .....	3
1.2 Garanti.....	3
2 Medföljande delar .....	3
3. Rekonditioneringsförfarande.....	4
3.1 Nollställ apparaten.....	4
3.2 Rengör apparaten .....	4
3.3 Kontrollera bruksanvisning .....	4
4. Tillbehör och reservdelar .....	4

# 1. Inledning

Den här produkten uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.

I och med att det är en MDD-produkt får endast original reservdelar användas. Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. En förutsättning för att kunna rekonditionera hjälpmedlet är att man har en grundläggande kunskap om hjälpmedlets funktion och användning. Mer information om hjälpmedlet samt manual finns att hämta på Abilias hemsida.

## 1.1 Viktig information

Efter genomförd rekonditionering kommer produktens funktion vara kvar, men användardata försvinner.

## 1.2 Garanti

Fel som omfattas av garanti ska åtgärdas av Abilia för att garantin ska gälla. Garantin på produkten kan avbrytas om produkten öppnas eller på något sätt ändras.

Kontakta alltid Abilia om osäkerhet råder om garanti.

# 2 Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man komplettera med tillbehör/reservdelar, se kapitel 4. *Tillbehör och Reservdelar*.



Följande delar ingår:

- MEMOday 2, art.nr. 508270
- Laddare till MEMOday, art.nr: 508258
- 3 bruksanvisningar (svensk, norsk, dansk)






### 3. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska och att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar.

#### 3.1 Nollställ apparaten

Nollställ så att apparaten startar upp i konfigurationsläge nästa gång den startar. Då kommer instruktionen "Komma igång" i bruksanvisningen att stämma.

1. Tryck in *På/Av*-knappen på baksidan tills två val visas.
2. Tryck på  för att starta inställningsguiden.
3. Håll in  i 20 sekunder tills knappen blir grå.
4. Tryck in *På/Av*-knappen på baksidan och sedan på  för att stänga av apparaten.



#### 3.2 Rengör apparaten

Rengör MEMOday 2 med en lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel vid rengöring. Produkten får inte nedsänkas i vatten.

#### 3.3 Kontrollera bruksanvisning

Om bruksanvisning saknas kan den laddas hem från Abilias hemsida och sedan skrivas som A5-häfte.

### 4. Tillbehör och reservdelar

MEMOday 2	1 st
Laddare till MEMOday, art.nr: 508258	1 st
Svensk bruksanvisning	1 st
Norsk bruksanvisning	1 st
Dansk bruksanvisning	1 st

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67, Solna, Sweden

Phone +46 (0)8-594 694 00 | [info@abilia.se](mailto:info@abilia.se) | [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway

Phone +47 23 28 94 00 | [info@abilia.no](mailto:info@abilia.no) | [www.abilia.no](http://www.abilia.no)

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business

Park, Swavesey, Cambridge, CB24 4AE,

United Kingdom

Phone +44 (0)1954 281210 | [info@abilia.uk](mailto:info@abilia.uk) | [www.abilia.uk](http://www.abilia.uk)

