



Lightwriter SL50

Rekonditioneringsanvisning

Art. nr: 1740100

Innehållsförteckning

Inledning	6
Säkerhetsinstruktioner och produktansvar	6
Garanti	6
Produktöversikt	7
Rekonditionera Lightwriter SL50	9
Kontrollera medföljande delar.....	9
Byt batteri.....	9
Återställ batteristatistik efter byte av batteri.....	12
Uppdatera till senaste programversionen.....	12
Återställ till fabriksinställningarna	13
Rengör Lightwriter SL50.....	14
Paketera Lightwriter SL50	15
Tillbehör och reservdelar	15

Inledning

Detta dokument är avsett för personer som ska rekonditionera Lightwriter SL50 (art. nr. 1740100).

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. En förutsättning för att kunna rekonditionera hjälpmedlet är att man har en grundläggande kunskap om hjälpmedlets funktion och användning.

Efter genomförd rekonditionering kommer produktens funktion vara kvar, men användardata är borttagna.

När hänvisningar till bruksanvisningen görs i detta dokument avses Lightwriter SL50 Bruksanvisning.

Säkerhetsinstruktioner och produktansvar

Se kapitel *Viktig information* i bruksanvisningen.

Garanti

Fel som omfattas av garanti ska åtgärdas av Abilia för att garantin ska gälla. Garantin på produkten kan avbrytas om produkten öppnas eller på något sätt ändras.

Kontakta alltid Abilia om osäkerhet råder om garanti.

Produktöversikt





Rekonditionera Lightwriter SL50

Kontrollera medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man komplettera med tillbehör eller reservdelar. Om något av de medföljande dokumenten saknas, kan de hämtas och skrivas ut från Abilias hemsida, se <https://www.abilia.com/intl/manuals>.

I kartongen ska följande finnas:

- Lightwriter SL50
- Bruksanvisning och snabbguide
- Laddare
- USB-minne
- Verktygssats (nyckelring, skruvmejsel och verktyg för att ta loss fingerguiden)
- Reservtangenter
- Ethernetkabel för att uppdatera mjukvaran genom en vanlig Ethernetport
- Tre fingerguider som höjer området runt tangenterna
- Användarväska

Byt batteri

Använd endast batteri från Abilia (art. nr. 1740037).


1. Lossa fem skruvar från baksidan.




2. Dra i ena hörnet av bakstycket för att lossa det.
3. Lyft upp och ta bort bakstycket.



4. Sätt den gula omkopplaren till OFF.

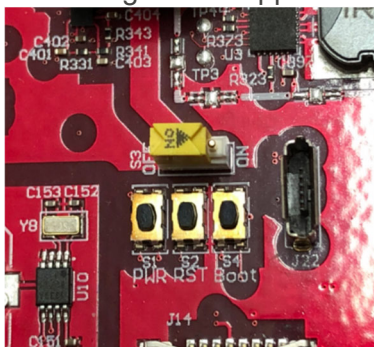


5. Lyft upp kontakten med batterikablarna.
6. Vicka på batteriet och ta bort det. Tejpen som håller batteriet kommer att lossna.

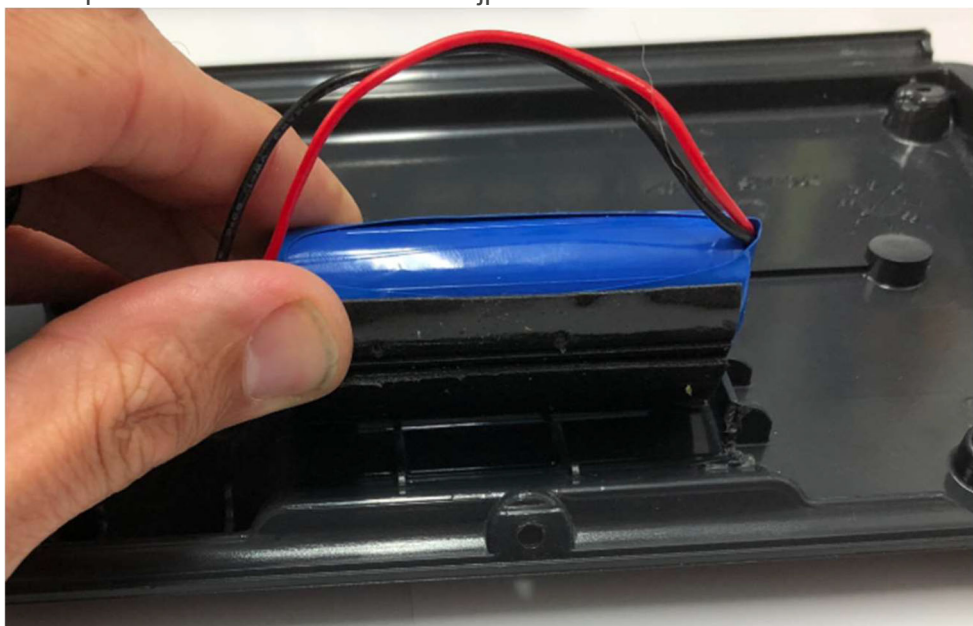

7. Fäst en vidhäftande dubbelsidig tejp på det nya batteriets ena sida.
8. Montera batteriet i bakstycket på samma plats som det gamla batteriet satt.

9. Anslut batteriet till kretskortet. Kretskortet är markerat med + och -.
10. Montera bakstycket:
 - a. Montera änden där ingångar för manöverkontakter sitter först.

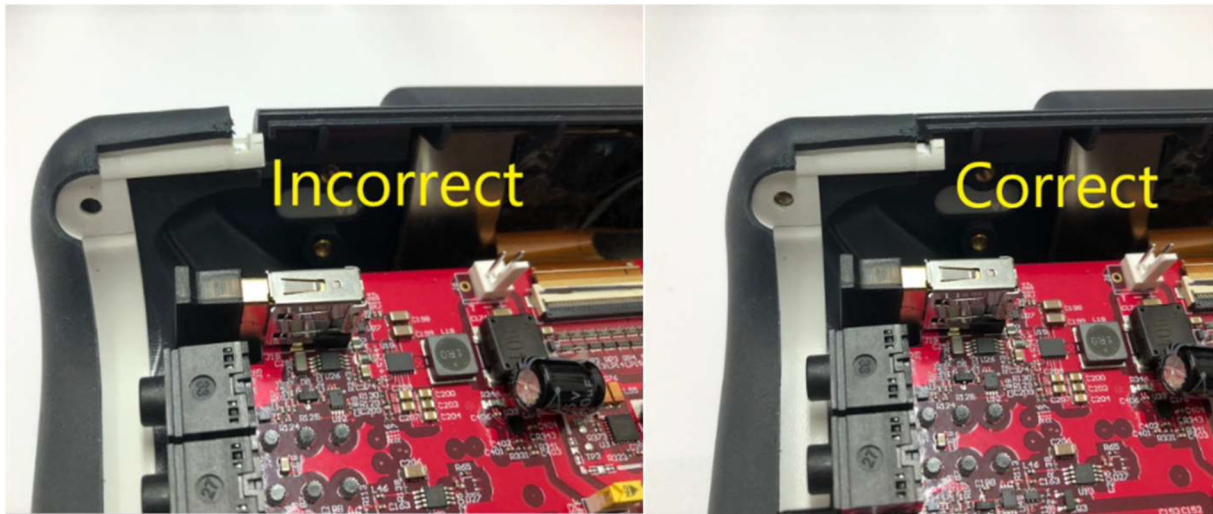

- b. Kontrollera att sidostycket är intryckt.




11. Fäst bakstycket med skruvarna.

Återställ batteristatistik efter byte av batteri

1. Tryck på **Shift+Meny**.
Avancerad meny öppnas.
2. Välj **System**.
3. Välj **Återställ batteristatistik**.




4. Välj **Ja** för att bekräfta.

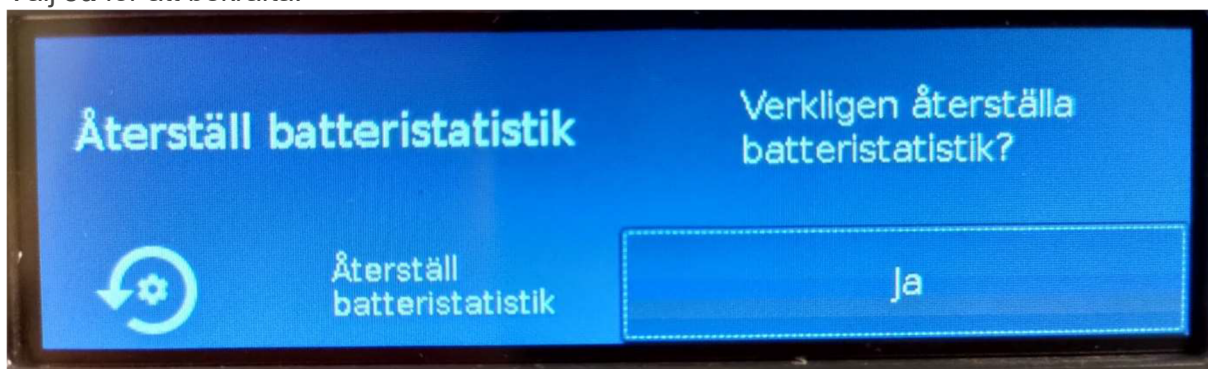

Uppdatera till senaste programversionen


1. Anslut en Ethernetkabel till din Lightwriter och en router.
Molnikonen visar status på din Lightwriter enligt följande:

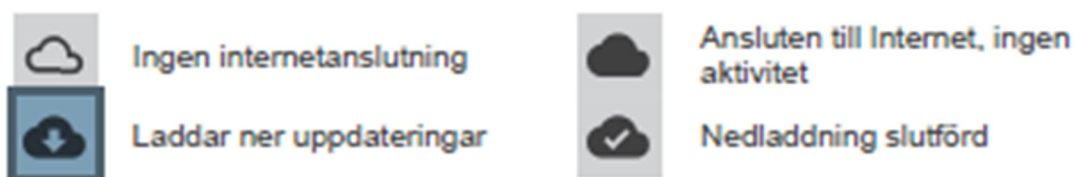


- När nedladdningen är slutförd frågar din Lightwriter om du vill starta om enheten.
2. Välj **Ja** för att starta om din Lightwriter.
Senaste programversionen installeras när enheten har startat om.
 3. Koppla bort Ethernetkabeln.

Återställ till fabriksinställningarna

1. Tryck på **Shift+Meny**.
Avancerad meny öppnas.
2. Välj **System**.

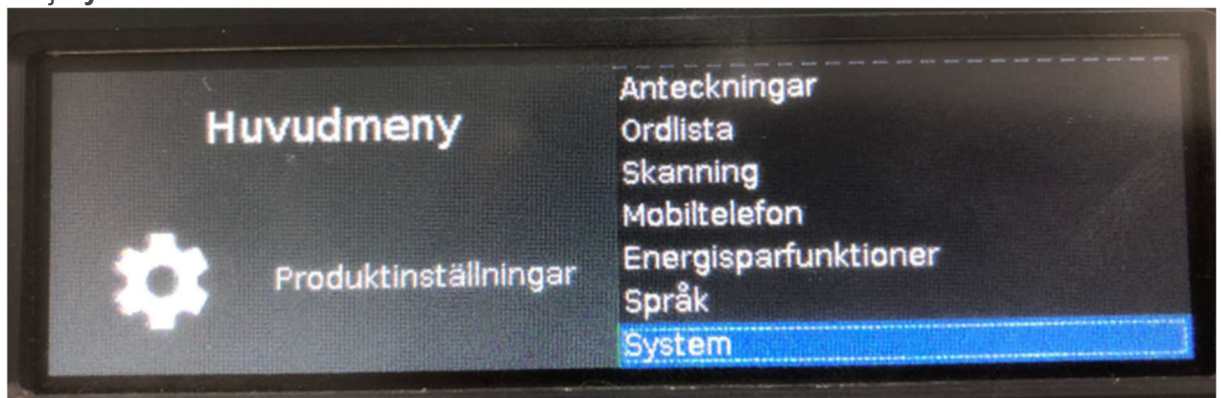

3. Välj **Återställ till fabriksinställning**.

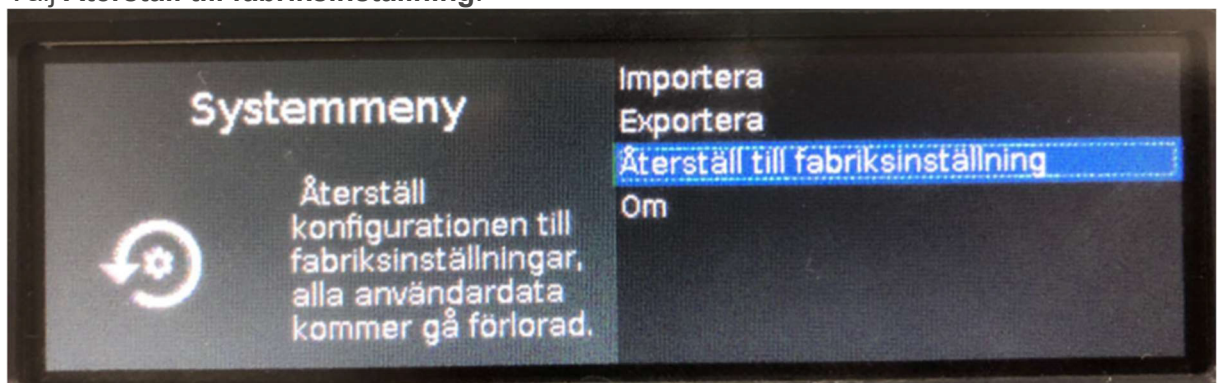

4. Välj **Ja** för att bekräfta.

Rengör Lightwriter SL50

Innan rengöring ska Lightwriter stängas av och alla kablar kopplas ur. Tryck på Power-knappen i tre sekunder tills du hör ett pip.

Rengör Lightwriter SL50 med en mjuk trasa som fuktats med vatten. Använd inte flytande eller aerosolbaserade rengöringsmedel som kan innehålla antändbara ämnen. Använd gärna antistatiskt skum.


Rengör tangentbord

1. Ta bort fingerguiden enligt steg 1-4 i *Byta Fingerguide* i bruksanvisningen.
2. Ta bort alla tangenter från den gummerade mattan.
3. Lägg tangenterna och fingerguiden i varmt vatten med tvål och låt ligga i några minuter.
4. Rengör gummimattan med en fuktig tandborste eller bomullspinne.

OBS:

- Gnugga inte för hårt mot mattan, det kan skada gummit.
 - Använd så lite vatten som möjligt. Om det kommer vatten under gummimattan kan det skada din Lightwriter
5. Torka gummimattan med en trasa och se till att den är torr.
 6. Ta upp tangenterna och fingerguiden från vattenbadet och torka dem med en trasa.
 7. Sätt tillbaka tangenterna på gummimattan enligt valfri tangentbordslayout.

Svenska QWERTY:

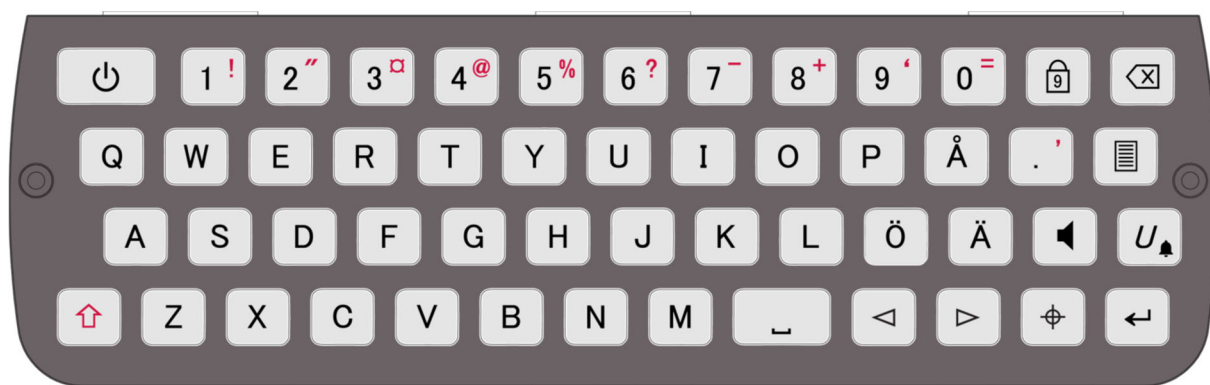

Svenska ABC:



Tangenterna måste sitta ordentligt på rätt höjd. Det kan hjälpa om de är lite fuktiga under.

8. Sätt tillbaka fingerguiden.

Paketera Lightwriter SL50

Placera Lightwriter SL50 i en skyddande påse för att undvika repor eller nedsmutsning. Använd helst produktens originalförpackning.

Om originalkartongen saknas, använd valfri kartong och bubbelplast som stötskydd. Märk kartongen med samma information som finns på produktetiketten. Produktnamn, artikelnummer och serienummer måste finnas med.

Tillbehör och reservdelar

Art. nr.	Benämning
1740010	Nätadapter till Lightwriter SL50
1740037	Batteri
1730654	Verktyg
1730209	Fingerguide Standard
1730112	Fingerguide Grund
1730210	Fingerguide Djup
1730047	Användarväska Lightwriter
1740044	Display filter, front
1740045	Display filter, bakre del

Kontaktinformation

Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige

Telefon: +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge

Telefon: +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Storbritannien

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom

Telefon: +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

Internationell

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

CE

januari 2022

1740100_Rekonditioneringsanvisning_Lightwriter SL50_SE



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sweden
Telefon: +46 (0)8- 594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

