



Lightwriter SL50

Snabbguide


Art. Nr: 1740100

VÄLKOMMEN TILL DIN LIGHTWRITER



Lightwriter SL50 är ett snabbt och lättanvänt kommunikationsverktyg.

Din Lightwriter kan levereras med skyddsfilm på bildskärmarna. Du bör ta bort skyddsfilmen innan du använder din Lightwriter.

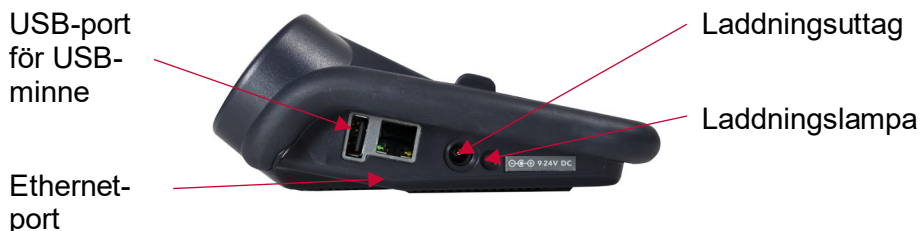

Lådans innehåll

Kontrollera att följande finns i lådan när du öppnar den:

Inkluderade delar

- Lightwriter SL50



- USB-minne



- Fingerguider



- Verktygssats



- Extra tangenter



- Ethernet-kabel



- Laddare



- Användarväska



Inkluderade dokument

- Bruksanvisning
- Snabbguide (denna dokument)

Ladda batteriet

Innan du använder Lightwriter ska du ansluta laddaren. Du kan använda Lightwriter medan den laddar.

Det tar ca **12 timmar** att ladda upp batteriet helt första gången. Därefter bör du **regelbundet ladda Lightwriter 3-4 timmar** för att batteriet skall räcka en hel dag. Detta görs förslagsvis över natten.



Laddningsuttag

Laddningslampa

Starta Lightwriter

För att slå på din Lightwriter trycker du på **Power**-knappen



Lightwriter startar efter några sekunder.

Om du inte använder din Lightwriter eller inte trycker på några knappar på en stund kommer den att stänga av skärmen och hamna i **Viloläge**. Tryck på valfri tangent för att aktivera den igen och fortsätta där du slutade.

Stäng av din Lightwriter genom att trycka på **Power**-knappen



i 3


sekunder tills du hör ett pip.

Börja tala


När du slår på din Lightwriter så tänds Användarskärmen i **Samtalsläge**.


















Ditt Lightwriter-tangentbord används i princip på samma sätt som ett vanligt tangentbord för att skriva ord och meningar. Allt som du skriver syns på skärmen framför dig.

Tryck på **Enter**  så uttalar Lightwriter de ord som du har skrivit och visar dem även på **Partnerskärmen**.

När du skriver visas prediktiv text längst ned på displayen. Tryck på motsvarande **sifvertangent** för att använda en ordprediktion. **Number Lock** måste vara avstängd för att detta ska fungera.

Använd **Shift**  för att skriva in någon av de röda symbolerna.

Ditt tangentbord

	Power		Symboler
	Enter		Valuta (tryck Shift och sedan
	Meny		Siffra
	Number Lock	 	Vänsterpil och Högerpil
	Shift	 	Bokstav och Mellanslag
	Delete		Ljud
	Union (Larm)		


Konfigurera Lightwriter

Med några enkla inställningar kan din Lightwriter konfigureras enligt dina personliga preferenser.

Använd menyerna

För att komma åt de vanligaste inställningarna i **Användarmenyn**, tryck på

Meny 

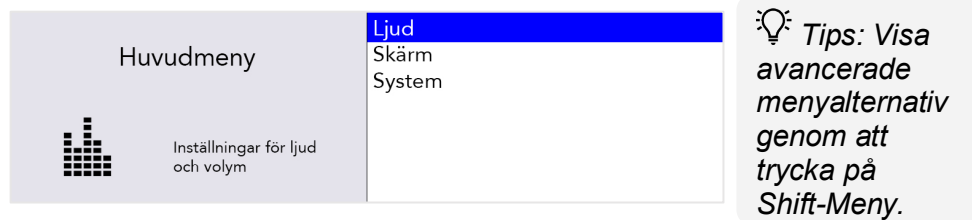

Använd **Vänsterpil** och **Högerpil** för att bläddra igenom alternativen.

I alla menyer trycker du på **Enter**  för att välja, eller **Power**  för att avbryta.

Spara dina grundinställningar

Röst – Gå till **Shift-Meny** > **Röst** > **Talröst**. Här finns ett urval av manliga och kvinnliga röster att välja mellan. Tryck på **Enter** för att bekräfta ditt val.





Röstvolym – gå till **Meny** > **Ljud** > **Mixer** > **Talvolym**. Välj mellan volymnivå 0-10 och tryck på **Enter** för att bekräfta.

Volym på tangenttryckningsljud – Gå till **Meny** > **Ljud** > **Mixer** > **Tangenttryckning**. Välj mellan volymnivå 0-10 och tryck på **Enter** för att bekräfta.

Datum och tid – Datum och tid är automatiskt inställda. Vid behov kan du ändra inställningarna, gå till **Shift-Meny** > **Datum och tid**.

Skanningshastighet – Gå till **Shift-Meny > Skanning > Skanningshastighet**. Här kan du ställa in med vilken hastighet tangenterna ska skannas.

Skanningsljud – Här kan du ställa in ljudet som hörs när tangenterna skannas. **Shift-Meny > Skanning > Skanningsljud**.

 *Tips: Mastervolymen kan även justeras genom att samtidigt trycka på tangenterna*  och  

Uppdatera programvaran

Det är viktigt att hålla programvaran i Lightwriter uppdaterad för att den ska fungera smidigt och säkert. Uppdateringar kan innehålla viktiga buggfixar, säkerhetsuppdateringar och förbättrade funktioner.

Via en internetanslutning kan du uppdatera din programvara när som helst. Anslut en Ethernet-kabel till din Lightwriter och koppla in den andra änden i din router.




En molnsymbol visar att nya uppdateringar hämtas. Efter nedladdning uppmanas du att starta om Lightwriter. Sedan är uppdateringen klar.

Anslut dina manöverkontakter (endast skanning)

Anslut två manöverkontakter till **Ingång 1** och **2**.



 *Tips: Du kan även skanna med endast en manöverkontakt eller använda valfri tangent på tangentbordet (mer information om detta finns i bruksanvisningen).*

Tryck på manöverkontakten som är ansluten till **Ingång 2** för att bläddra igenom markerade tangenter/tangentgrupper. Använd manöverkontakten som är ansluten till **Ingång 1** för att välja den markerade tangenten/tangentgruppen.

Tryck på **valfri tangent** för att återgå till vanlig tangentbordsinmatning.

Genvägar

AV	Tryck på Power -knappen  i 3 sekunder tills du hör ett pip.
PÅ	Tryck Power 
VILOLÄGE	Håll Power -knappen  intryckt i 1.5 sekunder. Tryck på valfri tangent för att aktivera din Lightwriter igen.
VÄLJ I MENYER	Tryck Enter 
BACKA I MENYER	Tryck Power 
RADERA TEXT	När du skriver använder du Power -tangentsen  för att radera hela raden med text.
VOLYM	Tryck och håll Ljud -tangentsen  i kombination med Vänsterpil  eller Högerpil  för att höja respektive sänka ljudvolymen. 
TYST LÄGE	Tryck på Ljud -tangentsen  för att slå av ljudet på din Lightwriter. Det fungerar även mitt i en mening. Tryck på Ljud  en gång till för att slå på ljudet igen.
FRAMTVINGA OMSTART	Håll ner Power  i 10 sekunder tills skärmen stängs av och sedan tänds igen.
LARM*	Tryck och håll ned Union -tangentsen  tills larmet ljuder.

*Måste aktiveras i Inställningar.

Lär dig mer om din Lightwriter genom att läsa bruksanvisningen.

1740100 Quick Guide SL50 SE Aug 2023



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se



ABILIA