

Tippbrädor



Tippbräddor

1. Marcus line	sida 02
1.1. Inledning	sida 02
1.2. Produktkodens betydelse	sida 03
1.3. Utformningshandbok	sida 04
1.3.1. Patientens ställning	sida 04
1.3.2. Reglera tippbrädans luting	sida 05
1.3.3. Typ av manöverdon	sida 06
1.3.4. Möjliga fotstöd för tippbrädan	sida 08
1.3.5. Bredd på de stoppade sektionerna	sida 10
1.3.6. Typ av läderöverdrag	sida 11
1.3.7. Val av överdragets färg	sida 11
1.4. Tillbehör	sida 12
1.4.1. Remmar och andra stoppade tillbehör	sida 12
1.4.2. Olika sidostöd	sida 14
1.4.3. Bord och tillbehör	sida 16
1.4.4. Möjligheten att omvandla grundmodellerna	sida 18
1.4.5. Fotstöd och sandaler	sida 20
1.4.6. Elektriska komponenter	sida 21
1.5. Tillval för grundmodellerna LT41 och LT42	sida 22
2. Britsar för behandling och statiska övningar i ryggläge	sida 24
2.1. Specifika tillbehör	sida 24
2.2. Modeller	sida 25
3. Bobath behandlingsbits för statiska övningar i ryggläge	sida 26
3.1. Specifika tillbehör	sida 26
3.2. Modeller	sida 27
Bilagor	
I Sammanfattande tabell för tillbehör	sida 28

I program för rörelse, styrka och balans, hjälper dessa tippbrädor patienten att gradvis uppnå en stående position från en statisk magliggande eller ryggliggande ställning, då patienten inte klarar av att bära sin egen kroppsvikt. Chinesports tippbrädor för mag- eller ryggläge, rekommenderas för både vuxna och barn.



Produktkoden för Chinesports tippbrädor beror på vilka tillval som gjorts till produkten. Varje position i koden har en specifik betydelse och motsvarar en eller fler egenskaper som produkten har. Det betyder att man kan välja en grundmodell för statiska övningar i mag- eller rygggläge, som både barn och vuxna kan använda. Den modell man valt kan sedan omvandlas med de nödvändiga tillbehören. Lutningsregleringen av tippbrädan kan utföras med en hydraulisk kolv eller ett elektriskt styrdon, som tar strömtillförseln från elnätet eller ett 24 V omladdningsbart batteri. Det finns hand- eller fotreglerade manöverdon. Man kan välja olika typer av stödytor för patienten. Vid ett senare tillfälle kan man utan problem byta mellan de olika fotstöden som finns tillgängliga. Det är möjligt att välja mellan två olika bredder på de stoppade sektionerna och mellan 24 olika färger på konstlädret som används som överdrag på dynorna. Ett stort urval av tillbehör kan bidra till att ytterligare utrusta tippbrädorna.

PLACERING KOD 4

Patientens ställning

tillval:

- 1 - Med huvudända för rygggläge
- 2 - Utan huvudända för rygggläge

PLACERING KOD 5

Reglering av lutning

tillval:

- E - Elektrisk, med strömtillförsel från elnät
- B - Elektrisk, med strömtillförsel från 24V batteri
- H - Hydraulisk, med assistans av en kolv

PLACERING KOD 6

Typ av manöverdon

tillval:

- A - Elektrisk, med fotpedal
- D - Elektrisk, med handkontroll
- G - Elektrisk, med bivalent manöverdon
- C - Hydraulisk, med fotpedal

PLACERING KOD 7

Fotstöd

tillval:

- 1 - Enkelt fotstöd
- 2 - Reglerbart fotstöd, en modul
- 3 - Reglerbart fotstöd, två moduler

PLACERING KOD 8-9-10

Sektionernas bredd

tillval:

- 060 - Insidans bredd 60 cm
- 075 - Insidans bredd 75 cm

PLACERING KOD 11

Typ av konstläder

- W - Giotto kollektionen

PLACERING KOD 12

Färg på dynornas överdrag

standardskala av 24 färger




visad modell - kod LT41 BG2 060 W3



PLACERING 4

Patientens ställning

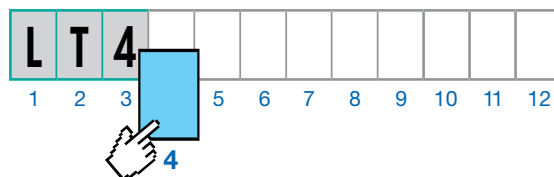


Först av allt måste man uppge patientens ställning, det vill säga, om patienten kommer att befinna sig i rygg- eller magläge. Den största skillnaden mellan de två modellerna LT41 och LT42 är tippbrädans längd. LT42 modellen har utvecklats för användning i magläge och till patienter som är minst 135 cm långa. Den passar även för pediatrik användning för övningar i ryggläge. De två modellernas längd kan varieras genom att man reglerar de valda fotstöden. Det finns två standardstorlekar på de stoppade sektionerna som kan vara antingen 60 eller 75 cm breda. För ytterligare information om fotstöden och sektionernas bredd gå ner till sidorna som motsvarar ställning 7 till 10 i vägledningen för produktens utformning.




1 Med huvudända för ryggläge

Längd A:
med fotstöd tillval 1
min-max: 182-203 cm
med fotstöd tillval 2
min-max: 191-197 cm
med fotstöd tillval 3
min-max: 189-197 cm

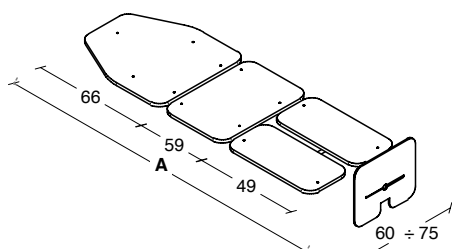


2 Utan huvudända för ryggläge

Längd A:
med fotstöd tillval 1
min-max: 115-136 cm
med fotstöd tillval 2
min-max: 124-130 cm
med fotstöd tillval 3
min-max: 122-130 cm

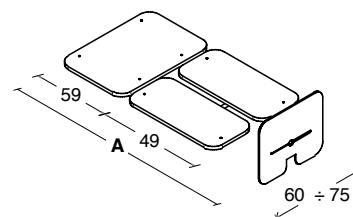


ANMÄRKNING: det är möjligt att omvandla den ena modellen till den andra genom att på ett enkelt sätt avlägsna eller sätta dit huvudändan för tippbrädan LT41, som kan köpas separat som tillbehör. För ytterligare information vänligen läs kapitlet "Möjlighet att omvandla grundmodellen".

PLACERING 5

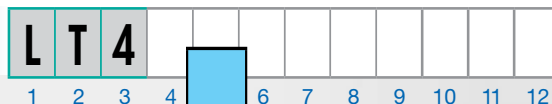

Reglering av lutning

På Chinesports tippbräda av Marcus serien kan lutningen regleras elektriskt, antingen genom att ansluta utrustningen till ett vägguttag eller ett batteri, men även med en hydraulisk kolv. Man kan välja att använda en tippbräda med hydraulisk kolv i de fall då miljön inte är den rätta för en elektrisk typ eller för att man vill minska behovet av underhåll. Till denna serie valde vi en av de mest tillförlitliga elektriska ställdonen på marknaden. Kapslingsklassen för alla elektriska komponenter är IP 54.

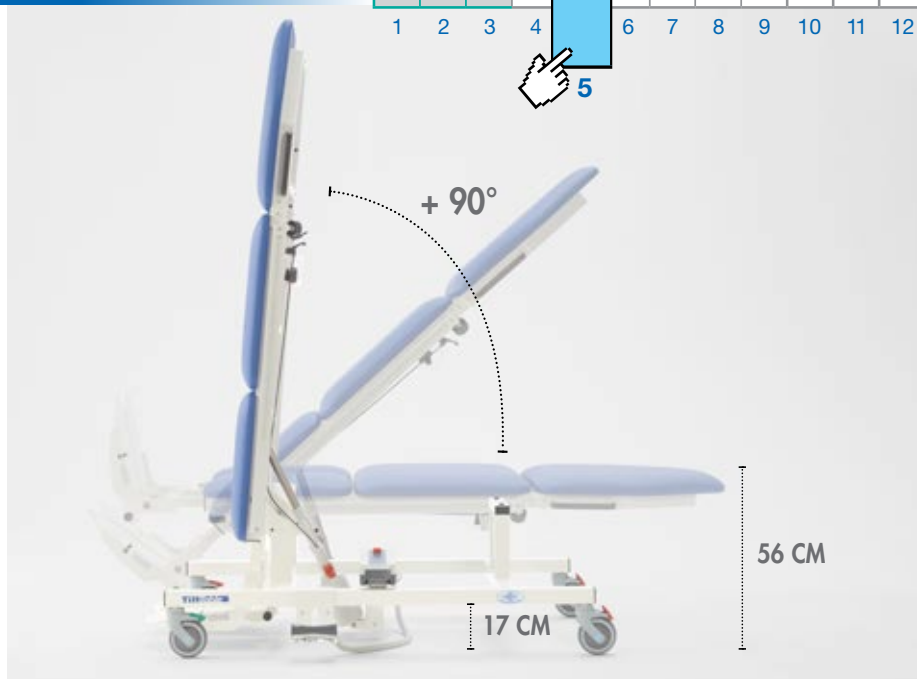

E Elektrisk, med strömtillförsel från elnät
Standard driftspänning är 220 V 50-60 HZ och alla frekvensomriktare arbetar med mycket låg säkerhetsspänning. Kunderna kan göra en speciell efterfrågan för 110V 50-60 Hz och en icke - SCHUKO-kontakt.



B Elektrisk, med strömtillförsel från batteri
Detta är ett alternativt tillval för elektrisk reglering av lutning. Tippbrädan kan drivas av ett omladdningsbart 24 V batteri som kommer med en 110/220 V 50-60 Hz batteriladdare.



H Hydraulisk, med hydraulisk kolv.
Reglering av lutning med hydraulisk kolv.

VID STRÖMAVBROTT



LT41 och LT42 modellerna har en säkerhetsanordning som tillåter tippbrädan att återgå till det ursprungliga horisontella läget på ett säkert sätt. På ramen finns nämligen en spak som aktiverar en mekanisk anordning för nedgång.



INDIKATOR FÖR LUTNING

Alla Chinesports tippbrädor har en gradskiva som tillhör standardsutrustningen och som visar lutningen i grader. Under rehabiliteringsprogrammet är det därför möjligt att kontrollera patientens utveckling i att uppnå och hålla en upprest ställning.

PLACERING 6

Typ av manöverdon

L	T	4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Beroende på om tippbrädans lutning regleras med den elektriska eller hydrauliska anordningen finns olika slags manöverdon tillgängliga. Om man har en tippbräda som drivs av en elektrisk anordning kan man välja mellan tre olika typer av manöverdon: en fotpedal som placeras på golvet eller en fotpedal som sitter på ett fäste som man monterar på tippbrädans ram eller en handkontroll. Om man har en tippbräda som drivs av en hydraulisk kolv är manöverdonet en bivalent pedal som monteras på ena sidan av tippbrädans ram.



A Elektrisk, med fotpedal
Den här typen av manöverdon kan användas för att sätta ingång den elektriska regleringen av lutningsfunktionen. Fotpedalen placeras på golvet. Anslutningskabeln tillåter total rörelsefrihet.



D Elektrisk, med handkontroll
Ergonomisk handkontroll med magnet. Användaren kan fästa den var som helst på ramens metalliska delar. En anslutningskabel medföljer.



G Elektrisk, med fotpedal på ramen
 Detta manöverdon är säkert placerat i ett speciellt fäste som måste monteras på tippbrädans nedre ram. Fotpedalen i detta fäste gör det enklare att förflytta tippbrädan och att rengöra runt utrustningen.



C Hydraulisk, med bivalent pedal
 Om tippbrädans lutning regleras med en hydraulisk kolv är denna pedal det enda tillgängliga tillvalet. Reglering av lutning med hydraulisk kolv är den perfekta lösningen på de platser där det inte finns strömtillförsel eller när man behöver förflytta tippbrädan snabbt och enkelt.


FÖRFLYTTA TIPPBRÄDAN ENKELT OCH TA UPP MINDRE UTRYMME

Modellen med den hydrauliska kolven inkluderar ett system som tillåter att snabbt avlägsna sidopedalen för att minska utrymmet som tippbrädan tar upp. Pedalen placeras sedan säkert under den lägre delen av ramen för eventuell förflyttning från ett ställe till ett annat.



PLACERING 7


Fotstöden

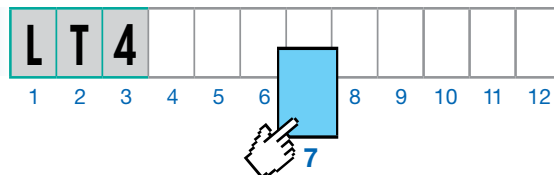

Man kan välja mellan tre olika typer av stödytor för patienten. Dessa är: enkelt fotstöd, två separata fotstöd som kan vinklas uppåt eller nedåt, eller två fotstöd som kan vinklas och som också kan regleras i längdled oberoende av varandra.



- 1 Enkelt fotstöd**
Enkelt fotstöd som inte kan vinklas. Stödgruppen kan regleras i längdled med 21 cm längs sidan av tippbrädan. Kan kombineras med tillbehör AC0002.

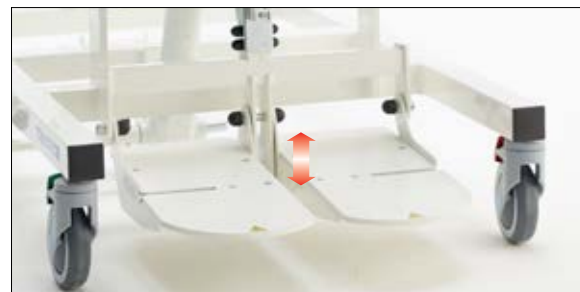

- 2 Reglerbart fotstöd, en modul**
Båda fotstöden, det högra och det vänstra, kan regleras separat till en vinkel på +/- 20°; stödblocket kan regleras i längdled med 6 cm längs sidan av tippbrädan. Kan kombineras med tillbehör AC0002.



- 3 Reglerbart fotstöd, två moduler**
Båda fotstöden, det högra och det vänstra, kan regleras separat till en vinkel på +/- 20°; stödblocket kan regleras i längdled med 8 cm längs sidan av tippbrädan. Kan kombineras med tillbehör AC0002.

MÖJLIGHET ATT BYTA FOTSTÖD

Vid köp av tippbrädan skall ett fotstöd väljas bland de typer som finns tillgängliga. Det är dock möjligt att antingen genast eller senare beställa andra moduler för en annan utformning. Du kan därför läsa mer om dessa moduler på följande sidor då de även presenteras som tillbehör.

Anmärkning: Beroende på typen av fotstöd som väljs kan tippbrädans totala längd variera. För detaljer se de tekniska ritningarna.

INTRA-EXTRA ROTATION OCH FRAMÅT-BAKÅT RÖRELSE FÖR FÖTTERNA


När intra-extra sandalerna placerats på fotplattorna håller de fast och stabiliserar fötterna. De kan vridas inåt-utåt och framåt-bakåt. De kan beställas som tillbehör med kod AC0002. Vänligen läs följande sidor om detta tillbehör.





SEPARAT REGLERING AV VINKELN UPPÅT ELLER NEDÅT FÖR FÖTTERNA

Det är möjligt att välja ett tillval som består av ett fotstöd med två separata fotplattor som möjliggör manuell vinkling av varje fotplatta för sig. De kan vinklas mellan $+20^\circ$ och -20° för att få en korrekt uppåt- eller nedåtlutning på foten. Vid PEVA (klumpfot) är det möjligt att beställa en extra kil som tillbehör AC0096, som tillåter att variera vinkeln från $+10^\circ$ till -30° . Vänligen läs följande sidor om detta tillbehör.

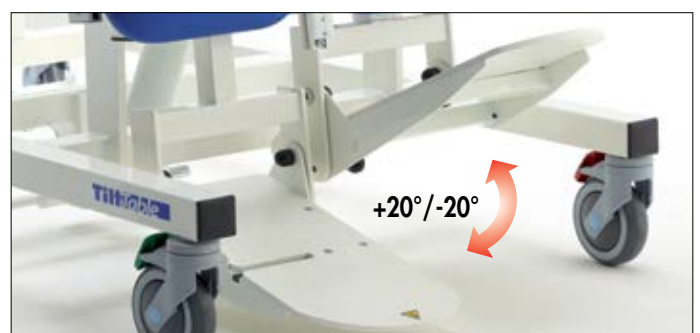


KIL FÖR PEVA (KLUMPFOT)

Fotstöden kan anpassas till att öka vinkeln på fotstödet till -30° för vinkling nedåt och $+10^\circ$ för vinkling uppåt. Detta kan behövas för patienter med PEVA. Detta specifika tillbehör måste därför beställas som tillbehör.




PLACERING KOD 8-9-10

Sektionernas bredd

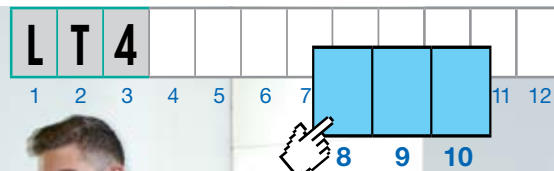

Längd A:
med fotstöd tillval 1
min-max: 182-203 cm
med fotstöd tillval 2
min-max: 191-197 cm
med fotstöd tillval 3
min-max: 189-197 cm

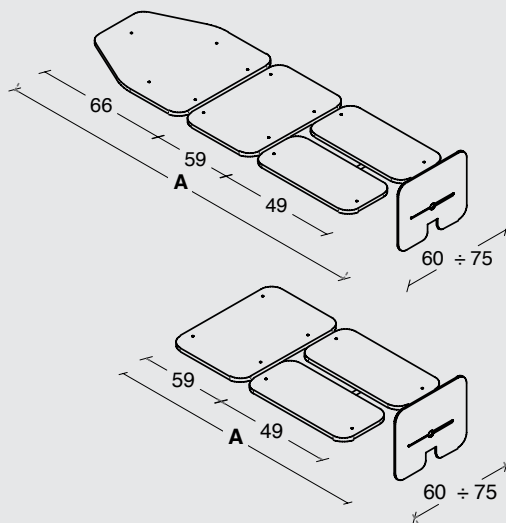

Längd A:
med fotstöd tillval 1
min-max: 115-136 cm
med fotstöd tillval 2
min-max: 124-130 cm
med fotstöd tillval 3
min-max: 122-130 cm


Det är möjligt att välja mellan två olika stoppade standardsektioner.

0 6 0 Insidans bredd 60 cm

0 7 5 Insidans bredd 75 cm

VARNING: kontrollera noggrant vilka tillbehör som kan användas beroende på de tillval som gjorts.

STOPPNINGENS DENSITET OCH TJOCKLEK

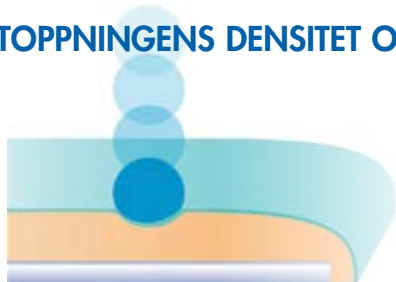

Vanligtvis använder Chinesport en stoppning som har en tjocklek och densitet på 30 mm och 30 kg/m³ för alla tippbrädor. Vår avdelning som utformar stoppningarna kan även tillfredsställa specifika, icke-standard förfrågor. I dessa fall kan en extra kostnad tillkomma.

SKIVORNAS STABILITET



Skivorna monteras fast på ramen med en bussning. Vid behov kan dessa bussningar lätt bytas ut om den stoppade skivan nöts ut eller skadas.

PLACERING 11

Typ av konstläder



**KOMFORT
OCH FLEXIBILITET**



SLITTÅLIG



VATTENTÄT



**ENKELT
UNDERHÅLL**



BRANDSÄKER



**SKYDDAR MOT
UV-STRÅLNING**



**SVAMPDÖDANDE
BEHANDLING**

GiottoCollection Standardskala

Giotto är ett ytbelagt brandsäkert tyg. Det är kraftigt och lätt att sköta om, vilket gör det speciellt lämpligt för användning i sjukhus, vilohem, spa, rehabiliteringscenter och träningshallar. Giotto har en yta som liknar äkta läder med glänsande slutbehandling och finns i många olika färger. Giotto innehåller vinyzene, ett antimikrobiellt medel som tillsätts under tillverkningen och skapar en skyddsbarriär mot kvalster, bakterier och svamp och motverkar på detta sätt oönskvärd lukter och allergier.

TEKNISKA EGENSKAPER	ENHETER	STANDARD	VÄRDEN
Vikt	g/m ²	-	550
Höjd	cm	-	140
Sammansättning	-	-	88% PVC - 12% PES
Nötningsresist	cykel	enligt ISO 5470-2	100.000
Färgbeständighet	gråskala	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Färgbeständighet	gråskala	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Färgbeständighet	blåskala	UNI EN ISO 105-B02	6
Färgbeständighet	gråskala	ISO 105-E04	4
Aderens	N	UNI EN ISO 2411	60
Töjning vid brott	N	UNI 1421	längd 450 / 190
Slitbeständig	N	UNI 4818-9 met.B	längd. 42 / 35

BRANDSÄKER UNI 9175 Klass 1 IM - EN 1021-2 BS 5852-1

PLACERING 12

Färg på dynornas överdrag

Vid beställning kom ihåg att ange färgkod för ytmaterialet. Finns i standardskala av 24 färger.

A VIT	N ELFENBEN	8 BEIGE	7 ASKGRÅ	K GRÅ	S MÖRKBRUN
B VANILJ	4 GUL	T LIMEGRÖN	1 MÖRKGRÖN	6 LJUSGRÖN	E AKVAMARIN
Z ORANGE	G KORALL	F RÖD	H VINRÖD	9 FUCHSIA	Q LILA
R LJUS KORNBÄ	2 LJUSBLÅ	3 MARINBLÅ	L MÖRKBLÅ	M ANTRACIT	P SVART



02023

För att rengöra och desinficera den stoppade konstläderytan på alla undersöknings- och behandlingsbord. Detta set inkluderar 3 x 500 ml flaskor. Ytterligare ett set med 3 burkar skyddskräm medföljer.



XCAT0020131

På förfrågan av yrkesutövare eller enskilda som skulle vilja kontrollera konstlädrets faktiska färg, skickar vi gärna våra färgprover.

REMMAR OCH ANDRA STOPPADE TILLBEHÖR



Våra tippbrädor inkluderar inte några standard remmar. Det finns ett urval av remmar som utvecklats genom vårt samråd med några yrkesspecialister. De svarar på olika behov och preferenser. Vänligen ange antal och typ av remmar vid beställning.



AC0005 GRUNDREM

Förser patienten med bättre fäste; kan monteras på önskad höjd tack vare speciella skenor. (1 styck)



AC0006 KUDDE FÖR REM

Stoppad kudde som erbjuder patienten bekvämare stöd. Används tillsammans med rem kod AC0005. (1 styck)



AC0560 FIXERINGSREM 17,5 CM

En rem med vaddering för att på bekvämt och säkert sätt spänna fast patienten. Rekommenderas för att spännas över överkroppen eller bäckenet. Endast för tippbräda med bredd på 60 cm. (1 styck)



AC0561 FIXERINGSREM DELAD 17,5 CM

En rem med vaddering för att placera och fästa ett enskild ben. Denna typ av rem kan användas på tippbrädor som har en central skena för fäste av remmen. Den kan användas på alla tippbrädor, i rygggläge. Endast för tippbräda med bredd på 60 cm. (2 styck)



AC0088 FIXERINGSREM 26 CM

En bred vadderad rem för att spänna fast båda benen. Den har ett dubbelt fäste på sidorna och ett system som förenklar fastsättning. Den kan användas på alla tippbrädor för rygggläge. Endast för tippbräda med bredd på 60 cm. (1 styck)



AC0913 FORMSKUREN REM 60

Den kan användas för att spänna fast överkroppen/bäckenet eller benen. Endast för tippbräda med bredd på 60 cm. (1 styck)

AC0947 FORMSKUREN REM 75

Samma egenskaper som kod AC913, men passar på tippbräda med bredd på 75 cm. (1 styck)

REMMAR OCH ANDRA STOPPADE TILLBEHÖR

7


AC0949.W ? KUDDE NACKE LT4

Denna vadderade formade kudde kan även användas som sidostöd och stabilisering av patientens huvud. Kudden har en rem med kardborreband på baksidan vilket gör att den snabbt kan fästas beroende på specifika behov. Kudden kan regleras i höjd såväl som för att hitta den bästa ställningen och stödet. Vänligen ange färgkoden som väljs till dynorna när du gör din beställning. (1 styck)



AC0912 FÄSTE FÖR REM FÖR BEN

En hålla som designats speciellt för detta och kan fästas på centralskenan, som befinner sig mellan tippbrädans sektioner för benen. Den kan enkelt monteras utan behov av verktyg. Denna hålla tillåter remmen med kod AC0005 - GRUNDREM eller AC0561 SEPARAT REM BEN att fästas stadigt, vilket förbättrar benens placering och fäste. Hållan kan skjutas fram och tillbaka och regleras i längdled längs den centrala skenan och fästas i önskat läge.

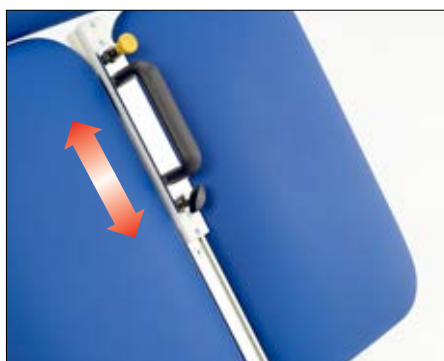

AC0911 KIL FÖR BEN

Vid behov kan denna vadderade kil monteras på den centrala skenan för att hålla isär patientens ben. Den kan enkelt monteras utan behov av verktyg. Denna anordning inkluderar också en hålla som sedan kan användas för att hålla remmen med kod AC0005 - GRUNDREM eller AC0561 SEPARAT REM BEN stadigt fäst. Hållan förbättrar fasthållande av benen. När kilen monterats kan den skjutas fram och tillbaka och regleras i längdled längs den centrala skenan och fästas i önskat läge.



SPÄNNA REMMARNA SNABBT

Vi försöker alltid lägga stor uppmärksamhet på operatörernas arbete när vi designar och vill minska tiden de lägger på att förbereda de nödvändiga tillbehören.

Alla tillgängliga remmar är utrustade med kardborreband för att spänna fast patienten när detta är nödvändigt. Dessa kan fästas på sidoramen med en mätskala som hänvisning.



? VAL AV FÄRG PÅ ÖVERDRAGET - viktigt: ange alltid färgkoden vid beställning av en produkt när detta tillval är möjligt.

A	N	8	7	K	S	B	4	T	1	6	E	Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TIPPRÄDOR

OLIKA SIDOSTÖD

Marcus line tippbrädor kan utrustas med sidostöd för att hålla fast eller stödja patienten medan denna väntar på att förbereda sig för att utföra övningar i mag- eller rygggläge. Det finns sidostöd med speciella former eller vadderingar eller klassiska handtag eller handtag med stöd för underarmarna. Man kan beställa den typ och det antal stöd som man vill beroende på de specifika behoven. Speciella fästmekanismer behövs för att fästa sidostöden.



AC0910 FÄSTMEKANISMER

Fästmekanismerna tillåter fastsättning av olika sidostöd på tippbrädans sidor. Dessa fästmekanismer kan regleras längs sidoramens och placeras i önskat läge för det specifika stödet. De tillåter också reglering i höjd av stödet. (varje par)



INSTRUKTION FÖR MONTERING AV FÄSTMEKANISMERNA

Först måste operatören montera fästmekanismen på en eller båda skenorna på tippbrädans långsidor. Detta är enkelt och inga verktyg behövs. Fästmekanismen kan skjutas längs skenan för att placeras i önskat läge för det sidostöd som skall användas. På långsidorna finns måttskalor som tillåter exakt placering av anordningen så som förskrivet för varje patient. Alla sidostöd kan regleras i höjd, djup och bredd.



Steg 1: montera fästmekanismen på sidoskenan



Steg 2: hitta rätt placering genom att skjuta den och fäst sedan anordningen



Steg 3: för in det önskade sidostödet i fästmekanismen och reglera

OLIKA SIDOSTÖD

7

AC0919 FORMSKURNA STÖD

Dessa stöd är gjorda av svart mjukt material och har kromade delar som tillåter reglering av bredden och möjligheten att fästas på fästmekanismen AC0910. Stöden som skall fästas på fästmekanismen kan sedan regleras i höjd och djup.



AC0922.W ? VADDERADE STÖD

Dessa vadderade stöd med kromade delar kan regleras på bredden och fästas på fästmekanismen AC0910. Stöden som skall fästas på fästmekanismen kan sedan regleras i höjd och djup. De är ett tillval eller tillbehör till de formskurna stöden kod AC0919.



AC0921 STÖD FÖR UNDERARMAR

Stöd för underarmar med handtag för en bekväm ställning. De kan regleras i höjd och roteras medan handtagen även kan regleras i djup. (2 styck).



AC0920 HANDTAG

Handtag på sidorna som tillåter patienten att hålla i sig och stödja sig själv medan denne utför övningar i ryggläge. De kan regleras i höjd och djup. (2 styck).



? VAL AV FÄRG PÅ ÖVERDRAGET - viktigt: ange alltid färgkoden vid beställning av en produkt när detta tillval är möjligt.

A	N	8	7	K	S	B	4	T	1	6	E	Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TIPPRÄDOR

BORD OCH TILLBEHÖR

Bordet kan vara ett viktigt tillbehör för alla stötd både i rygggläge och magläge eftersom patienten i upprest ställning kan lita sina underarmar på bordet, placera föremål på det, och utföra saker som i annat fall skulle vara svåra. Vi erbjuder därför bord tillverkade i två material, trä eller polyeten, för att svara på användarnas preferenser i hemmet eller rehabiliteringscentren.



AC0914.060 BORD 60, I TRÄ

Bordet är tillverkat i trä och är stort. Det har avrundade hörn. Inbuktningen på ena sida gör det enklare för användaren att komma nära. Detta tillbehör passar en tippbräda med bredd på 60 cm som tillhör Marcus lines LT41 eller LT42. Dessutom kan man utrusta det med en vadderad kudde i olika färger, en avtagbar bricka med kanter och ett handtag för ökad stabilitet. Dimensioner: bredd 680 mm x djup 430 mm x tjocklek 12 mm. Vikt: 2,1 kg.

AC0914.075 BORD I TRÄ

Detta tillbehör har samma egenskaper som bordet med kod AC0914.060 men passar endast för tippbräda med bredd på 75 cm som tillhör Marcus lines LT41 eller LT42. Dimensioner: bredd 680 mm x djup 430 mm x tjocklek 12 mm. Vikt: 2,1 kg.



AC0915.060 BORD 60, I POLYETEN

Detta bord är tillverkat av antibakteriell polyeten av hög densitet och är stort. Det har avrundade hörn. Inbuktningen på ena sida gör det enklare för användaren att komma nära. Detta tillbehör passar en tippbräda med bredd på 60 cm som tillhör Marcus lines LT41 eller LT42. Dessutom kan man utrusta det med en vadderad kudde i olika färger, en avtagbar bricka med kanter och ett handtag för ökad stabilitet. Dimensioner: bredd 680 mm x djup 430 mm x tjocklek 12 mm. Vikt: 3 kg.

KG.AC0915.075 BORD 75, I POLYETEN

Detta tillbehör har samma egenskaper som bordet med kod AC0915.060 men passar endast för tippbräda med bredd på 75 cm som tillhör Marcus lines LT41 eller LT42. Dimensioner: bredd 680 mm x djup 430 mm x tjocklek 12 mm. Vikt: 3 kg.


INSTÄLLNING AV BORD

Bordet kan vinklas i fyra förinställda positioner med en skillnad på 5 grader mellan varje position och totalt max 20 grader uppåt. Tack vare fästmekanismerna på sidoskenorna är det möjligt att utföra ytterligare regleringar i höjd och djup för att uppnå den bekvämaste och säkraste ställningen.



BORD OCH TILLBEHÖR

7

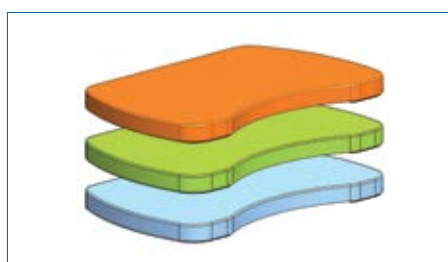

AC0767.W ? VADDERING FÖR BORD

Det är möjligt att välja till en vadderad bricka som är ett mjukare och bekvämare underlag för att luta armarna. Detta tillbehör kan på enkelt sätt avlägsnas av personalen. Den har en vaddering i konstläder i tre olika standardfärger som man kan välja mellan. Vänligen ange färgkoden som önskas när du gör din beställning. Dimensioner: bredd 680 mm x djup 430 mm x tjocklek 12 mm.



AC0764 ABS BRICKA

Vid behov kan en slät bricka med kanter, tillverkad i ABS-plast, placeras på bordet. Detta tillbehör kan avlägsnas av personalen när det ska rengöras medan patienten fortfarande står kvar på tippbrädan. Dimensioner: bredd 680 mm x djup 430 mm x AC0767.W ? tjocklek 12 mm



01608 HANDTAG

För personer med lägre stabilitet i överkroppen. Patienten behöver en eller två stödpunkter för stabilitet.



01609 HANDTAG MED HANDLEDSSTÖD

Med en stödjande kudde och kardborreband runt handleden som tillåter en säker placering av handen.

MÖJLIGHETEN ATT OMVANDLA GRUNDMODELLEN

Passar för statiska övningar i rygg- eller magläge.

En av de viktigaste egenskaperna våra Marcus line tippbrädor har är att de kan erbjuda ett större urval av behandlingar och övningar för att hjälpa ett större antal användare. Det är även möjligt att ändra tippbrädan från en som används för ryggläge till en för magläge. Detta görs med modellerna LT41 eller LT42 och de olika tillvalen som kan köpas, antingen vid samma tillfälle eller senare (och då som tillbehör). Oberoende av den grundutformning som väljs kan alltid tillbehör väljas till för att omvandla dessa tippbrädor.



AC0908.060.W ? SEKTION HUVUDÄNDA FÖR RYGGGLÄGE W60

Användning av denna huvudända på tippbräda med kod LT42 tillåter övningar i ryggläge. Denna sektion kan på enkelt sätt monteras på av operatören, utan behov av verktyg. När installationen avslutats hålls den säkert på plats tack vare ett blockeringsystem som aktiveras av en spak. Den stoppade sektionen är 60 cm bred och kan användas till en tippbräda av samma bredd.

Dimensioner: 74 x 60 x 11 cm. Vikt: kg 10 (1 styck)

AC0908.075.W ? SEKTION HUVUDÄNDA FÖR RYGGGLÄGE W75

Denna sektion har samma egenskaper som sektionen med kod AC0908.060.W? förutom att bredden är 75 cm. Detta tillbehör passar en tippbräda som har denna sektion som tillval och som har samma bredd. Dimensioner: 74 x 75 x 11 cm. Vikt: kg 11 (1 styck)



AC0909.036.W ? STÖD FÖR ÖVERKROPPEN

Denna stoppade sektion stödjer patientens överkropp i brösthöjd och kan användas på båda tippbrädorna, LT41 och LT42, för övningar i magläge. Kan på enkelt sätt monteras på av operatören, utan behov av verktyg. Den är 36 cm bred och när den är monterad kan den regleras i höjd för att passa patientens längd och för att erbjuda den bekvämaste ställningen.

Dimensioner: 58 x 36 x 10 cm. Vikt: kg 3



AC0918.1W ? VADDERAT STÖD

Monteras på LT41 och LT42 tippbrädorna när huvudändans sektion har avlägsnats och används för aktiviteter i magläge. Det är möjligt att montera detta stoppade stöd på tippbrädans övre kortända för att patienten ska kunna luta sina överarmar på kanten. Detta tillbehör kan beställas i samma färg som tippbrädans dynor. Ange den färgkod som önskas.

Dimensioner: 72 x 14 x 12 cm. Vikt: kg 1



? VAL AV FÄRG PÅ ÖVERDRAGET - viktigt: ange alltid färgkoden vid beställning av en produkt när detta tillval är möjligt.





FOTSTÖD OCH SANDALER

Vid köp av tippbrädan skall ett fotstöd väljas bland de typer som finns tillgängliga.

Det är dock möjligt att antingen genast eller senare beställa andra moduler för en annan utformning.



AC0942

ENKELT FOTSTÖD

Enkelt fotstöd som inte kan vinklas. Stödgruppen kan regleras i längdled med 21 cm längs sidan av tippbrädan. Kan kombineras med tillbehör AC0002. Dimensioner 45 x 41 x 44 cm; Vikt: kg 5 (1 styck)



AC0943

REGLERBART FOTSTÖD, EN MODUL

Båda fotstöden, det högra och det vänstra, kan regleras separat till en vinkel på +/- 20°; stödblocket kan regleras i längdled med 6 cm längs sidan av tippbrädan. Kan kombineras med tillbehör AC0002. Dimensioner 45 x 50 x 52 cm; Vikt: kg 9 (1 styck)



AC0944

REGLERBART FOTSTÖD, TVÅ MODULER

Båda fotstöden, det högra och det vänstra, kan regleras separat till en vinkel på +/- 20°; stödblocket kan regleras i längdled med 8 cm längs sidan av tippbrädan. Kan kombineras med tillbehör AC0002. Dimensioner 45 x 48 x 45 cm, Vikt: kg 4,5 (2 styck)

INTRA-EXTRA ROTATION OCH FRAMÅT-BAKÅT RÖRELSE FÖR FÖTTERNA

När intra-extra sandalerna placerats på fotplattformarna håller de fast och stabiliserar fötterna. De kan vridas inåt-utåt och framåt-bakåt. Kan beställas som tillbehör med kod AC0002.




AC0002 INTRA-EXTRA SANDALER

När intra-extra sandalerna placerats på fotplattformarna håller de fast och stabiliserar fötterna. De kan vridas inåt-utåt och framåtbakåt. (2 styck)



AC0096 KIL FÖR PEVA (KLUMPFOT)

Fotstöden kan anpassas till att öka vinkeln på fotstödet till -30° för vinkling nedåt och +10° för vinkling uppåt. Detta kan behövas för patienter med PEVA. Detta är ett specifikt tillbehör och måste därför beställas vid behov. (1 styck)

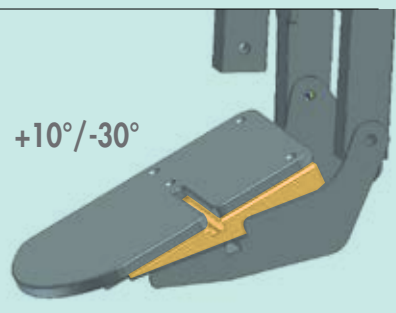

ELEKTRISKA KOMPONENTER


7

Om det medföljande standardbatteriet skadas eller nöts, kan ett nytt batteri beställas genom att använda nedanstående kod för tillbehör. Det är mycket viktigt att hålla sig till de angivna tillvägagångssätten för omladdning av batterier för att förlänga deras livslängd. Med de batteridrivna tippbrädorna följer en batteriladdare som standardutrustning. De är möjligt att beställa reservbatterier eller en ny batteriladdare. Till alla modeller med elektriskt driven lutning hör en handkontroll med magnet. Det är möjligt att lägga till ett extra hand- eller fotreglerat manöverdon, med fäste på ramen.



AC0319 BATTERILADDARE

Genom att ansluta batteriladdaren till elnätet kan den användas för att ladda reservbatterier eller batteriet som medföljer. Strömtillförseln som får användas är 110/220V - 50/60 Hz - 500 mA. Italiensk kontakt, kompatibel med SCHUKO-uttag, medföljer. På begäran kan annan typ av kontakt levereras.

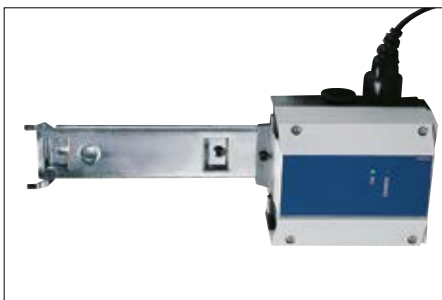

AC0318 VÄGGMONTERAD LADDARE

Genom att ansluta batteriladdaren till elnätet kan den användas för att ladda reservbatterier eller batteriet som medföljer. Strömtillförseln som får användas är 110/220V - 50/60 Hz - 500 mA. Denna laddare kommer med en standard SCHUKO-kontakt. På begäran kan den levereras med en annan kontakt.



01132 RESERVBATTERI

Tillåter konstant användning medan det andra batteriet är på laddning. Den interna strömtillförseln är 24 V / max 10 AT.



AC0037 FOTPEDAL

För modeller med en motor. Den kan användas på båda sidorna.



AC0575 FÄSTE FÖR FOTPEDAL

Kan monteras på båda sidorna av sängen, som operatören önskar och används för att fästa tillbehör AC0083.



AC0083 BIVALENT MANÖVERDON

Kan användas som fotpedal, tillsammans med det relevanta fästet, kod AC0575, eller som en handkontroll. Den har magneter för att lätt kunna fästas var som helst på ramen.



AC0039 HANDKONTROLL

För modeller med en motor. Ergonomiskt handstyrt manöverdon med magneter. Kan fästas på tippbrädans metallram. En anslutningskabel medföljer.



AC0744 HANDKONTROLL 2

För modeller med två motorer. Ergonomiskt handstyrt manöverdon med magneter. Kan fästas på tippbrädans metallram. En anslutningskabel medföljer.



AC0578 SÄKERHETSANORDNING

Denna anordning deaktiverar alla tillgängliga elektriska funktioner när operatören inte är i närheten.

TIPPBRÄDOR

Pos. 5

Reglering av

- ☐ **E** Elektrisk, med strömtillförsel från elnät
- ☐ **B** Elektrisk, med strömtillförsel från 24V batteri
- ☐ **H** Hydraulisk, med kolv

Pos. 6

Typ av manöverdon

- ☐ **A** Elektrisk, med fotpedal
- ☐ **D** Elektrisk, med handkontroll
- ☐ **G** Elektrisk, med bivalent kontroll
- ☐ **C** Hydraulisk, med pedal

Pos. 7

Fotstöden

- ☐ **1** Enkelt fotstöd
- ☐ **2** Reglerbart fotstöd, en modul
- ☐ **3** Reglerbart fotstöd, separata moduler

Pos. 8-9-10

Sektionerna

- ☐ **060** Insidans bredd 60 cm
- ☐ **075** Insidans bredd 75 cm

Pos. 11


Konstläderdesign

- ☐ **W** Sömlösa med avrundade kanter

Pos. 12


Färg på sektionernas överdrag

Finns i standardskala av 24 färger.

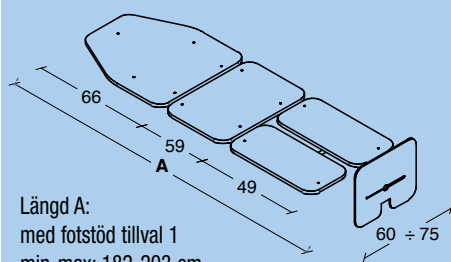

Längd A:
med fotstöd tillval 1
min-max: 182-203 cm
med fotstöd tillval 2
min-max: 191-197 cm
med fotstöd tillval 3
min-max: 189-197 cm

För ytterligare information om tillval och tillbehör, se tillägnade delar i broschyren.

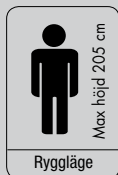

Max höjd 205 cm

Ryggläge

L	T	4	1										W
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		



Visad modell - kod LT41 BG3 060 W3

TEKNISK INFORMATION

Antal sektioner 4	4
Maximal säker arbetsbelastning (kg)	180 (elektrisk modell) 135 (hydraulisk modell)
Reglering av lutning	Elektrisk / Hydraulisk
Strömtillförsel	Elnät / Batteri
Indikator för lutning i grader	Standard
Max lutningen i grader	90°
Tippbrädans höjd från golvet	56
Maximal längd användare (cm)	205 (för ryggläge)
Hjul diameter (mm)	125
Individuellt bromssystem	På varje hjul
Styrhjul	Standard
Stoppringens säkerhetsklass	1 IM
Stoppringens tjocklek	30
Densitet (kg/m3)	30
Vikt (kg)	65



VAL AV FÄRG PÅ ÖVERDRAGET - viktigt: ange alltid färgkoden vid beställning av en produkt när detta tillval är möjligt.

A	N	8	7	K	S	B	4	T	1	6	E	Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pos. 5

Reglering av

- ☐ **E** Elektrisk, med strömtillförsel från elnät
- ☐ **B** Elektrisk, med strömtillförsel från 24V batteri
- ☐ **H** Hydraulisk, med kolv

Pos. 6

Typ av manöverdon

- ☐ **A** Elektrisk, med fotpedal
- ☐ **D** Elektrisk, med handkontroll
- ☐ **G** Elektriskt, med bivalent kontroll
- ☐ **C** Hydraulisk, med pedal

Pos. 7

Fotstöden

- ☐ **1** Enkelt fotstöd
- ☐ **2** Reglerbart fotstöd, en modul
- ☐ **3** Reglerbart fotstöd, separata moduler

Pos. 8-9-10

Sektionerna

- ☐ **060** Insidans bredd 60 cm
- ☐ **075** Insidans bredd 75 cm

Pos. 11


Konstläderdesign

- ☐ **W** Sömlösa med avrundade kanter

Pos. 12

Färg på sektionernas överdrag


Finns i standardskala av 24 färger.

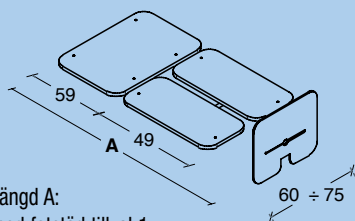

Längd A:

- med fotstöd tillval 1
min-max: 115-136 cm
- med fotstöd tillval 2
min-max: 124-130 cm
- med fotstöd tillval 3
min-max: 122-130 cm

För ytterligare information om tillval och tillbehör, se tillägnade delar i broschyren.

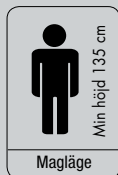

Min höjd 135 cm

Magläge

L	T	4	2									W
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	



Visad modell - kod LT42 HC1 060

TEKNISK INFORMATION

Antal sektioner 4	3
Maximal säker arbetsbelastning (kg)	180 (elektrisk modell) 135 (hydraulisk modell)
Reglering av lutning	Elektrisk / Hydraulisk
Strömtillförsel	Elnät / Batteri
Indikator för lutning i grader	Standard
Max lutningen i grader	90°
Tippbrädans höjd från golvet	56
Minimum längd användare (cm)	135 (för magläge)
Hjul diameter (mm)	125
Individuellt bromssystem	På varje hjul
Styrhjul	Standard
Stoppringens säkerhetsklass	1 IM
Stoppringens tjocklek	30
Densitet (kg/m3)	30
Vikt (kg)	55



? VAL AV FÄRG PÅ ÖVERDRAGET - viktigt: ange alltid färgkoden vid beställning av en produkt när detta tillval är möjligt.

A	N	8	7	K	S	B	4	T	1	6	E	Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tippbrädor för rygggläge och behandlingar

SPECIFIKA TILLBEHÖR



AC0003
FORMSKURNA STÖD 2



AC0004
HANDTAG 2



AC0517.W ?
VADDERADE STÖD 2



AC0090
STÖD FÖR UNDERARMARNA 2



AC0081
BORD LT2

Bordet är formskuret så att underarmarna bekvämt kan vila på ytan. Kan regleras i höjd, djup och vinkel. Dimensioner: 700 x 560 mm



AC0020.W ?
PLUGG FÖR ÖPPNING
NÄSA-MUN

Modellen LT2 är standardutrustad med ett hål för näsa-mun och plugg. Kan beställas som tillbehör i samma färg som tippbrädan.




LT2E12.W? TIPPBRÄDA 2E T

Tippbräda med fyra sektioner för övningar, undersökningar och sjukgymnastik i rygggläge, upp till 140 kg. Den kan regleras i höjd och uppnå en lutning på 90°. Den drivs med strömtillförsel från elnät, 24 V lågspänning och regleras med en handkontroll. Den har en indikator som mäter lutningen. Højden från golvet är 56 cm. Huvudändans sektion kan regleras upp/ned med en gasfjäder. Tippbräddan levereras utan remmar. Dessa måste väljas bland tillgängliga tillbehör. En central skena mellan de två sektionerna som stöder benen tillåter remmarna att fästas och spännas bättre. Transport förenklas tack vare de bromsförsedda hjulen med bred diameter, varav en med riktningsspärr. Varje fotstöd kan regleras separat med +/- 20°.

LT2B12.W? TIPPBRÄDA 2B T

Modell med 24 V omladdningsbart batteri. Batteriladdare medföljer.

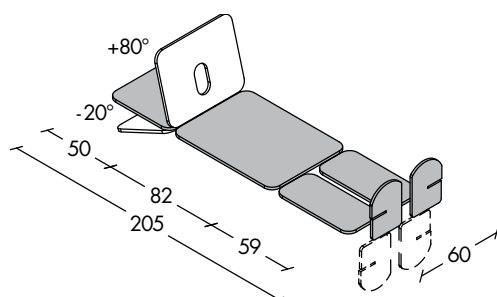

En specifik anordning som monteras för att erbjuda ett alternativt sätt reglera höjd och vinkel.



TEKNISK INFORMATION		
PRODUKTKOD	LT2E12 Tippbräda E	LT2B12 Tippbräda B
Antal sektioner	4	4
Maximal säker arbetsbelastning (kg)	140	140
Reglering av lutning	Elektrisk	Elektrisk
Höjdregering (cm)	56 - 106	56 - 106
Strömtillförsel	Elnät	Battery
Indikator för lutning i grader	Standard	Standard
Maximal längd användare (cm)	200	200
Hjul diameter (mm)	125	125
Individuellt bromssystem	På varje hjul	På varje hjul
Styrhjul	Standard	Standard
Stopperingens säkerhetsklass	1 IM	1 IM
Stopperingens tjocklek (mm)/densitet (kg/m³)	30 / 30	30 / 30
Vikt (kg)	100	100

SPECIELLA TILLBEHÖR

Remmar och andra vadderad stöd
AC0005 GRUNDREM
AC0006 KUDDE FÖR REM
AC0560 VADDERAD REM FÖR ÖVERKROPPEN
AC0561 SEPARAT REM FÖR BEN
AC0088 VADDERAD REM FÖR BEN
AC0020.W ? PLUGG FÖR ÖPPNING NÄSA-MUN
AC0087.W ? KUDDE NACKE
AC0911 KIL FÖR BEN
AC0912 FÄSTE FÖR REM FÖR BEN
AC0913 FORMSKUREN REM 60
 Sidostöd
AC0003 FORMSKURNA STÖD 2
AC0004 HANDTAG 2
AC0090 STÖD FÖR UNDERARMAR 2
AC0517.W ? VADDERADE STÖD 2
 Bord
AC0081 BORD LT2
 Fotstöd och sandaler
AC0002 INTRA-EXTRA SANDALER
AC0096 KIL FÖR PEVA (KLUMPFOT)

För modeller som drivs med anslutning till elnät: 220 V 50 / 60 Hz / 24 V 70 VA ; För modeller som är batteridrivna: 24 V / max 10AT Batteriladdare: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz - 500 mA.


? VAL AV FÄRG PÅ ÖVERDRAGET - viktigt: ange alltid färgkoden vid beställning av en produkt när detta tillval är möjligt.



Bobath tippbräda med lutningsfunktion

Den här modellen har designats för att hjälpa både operatörer och patienter under rehabiliteringsprogram, för att undvika att förlora tid och orsaka besvär p.g.a. förflyttning från ett specifikt bord till ett annat.

SPECIFIKA TILLBEHÖR

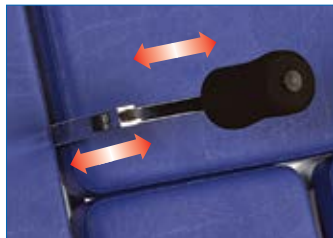

Formskurna sidostöd 2 tillbehör
AC0003 (2 styck)



Stöd för underarmarna 2 tillbehör
AC0004 (2 styck)



Hälla tillbehör AC0912 (1 styck)



Tillbehör, kil för att vidga benen.
AC0911 (1 styck)



Sandaler för att fästa fötterna tillbehör
AC0002 (2 styck)



Arbetsbord för statiska övningar i
rygggläge tillbehör AC0308 (1 styck)

CE

ANMÄRKNING:

- 1) En speciell säkerhetsanordning monteras för att ge möjlighet att reglera höjd eller vinkel.
- 2) En speciell säkerhetsanordning monteras för att ge möjlighet att sänka bordet manuellt vid strömavbrott.




Montering av fotstöd som används
vid statiska övningar i rygggläge.

LB492F2X ?

BOBATH TIPPBRÄDA 2ET

Bobath tippbräda för behandling och statiska övningar i rygggläge. Höjd: reglerbar till 250 kg (säker arbetsbelastning), eller lutning reglerbar från 0° till 90° upp till 190 kg. Den drivs med strömtillförsel från elnät, 24 V lågspänning och regleras med handkontroll. Den har en indikator som mäter lutningen. Höjden från golvet är 55 cm. Tippbrädan levereras utan remmar. Dessa måste väljas bland tillgängliga tillbehör. Huvudändans sektion kan regleras upp/ned med en gasfjäder. Den levereras med en plugg för öppningen för näsa-mun. En central skena mellan de två sektionerna som stöder benen tillåter remmarna att fästas och spännas bättre tack vare tillbehör AC0312. Tillbehör kil för ben AC0311 kan också monteras. Stoppade dynor med sidoskiva. Hjulen har ett bromssystem som aktiveras med fotpedal. Varje fotstöd kan regleras separat med +/- 20° och avlägsnas vid behov under sjukgymnastik.

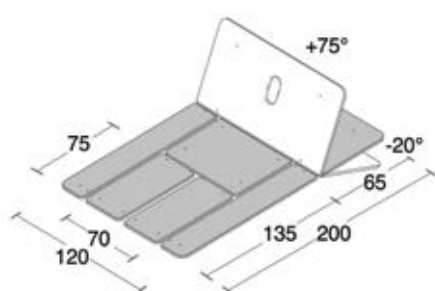

Fotstödsgrupp som kan avlägsnas



TEKNISK INFORMATION

PRODUKTKOD	LB492F2X Tippbräda Bobath 2ET
Antal sektioner	6
Maximal säker arbetsbelastning - upprest (kg)	250
Maximal säker arbetsbelastning - statiskt (kg)	190
Reglering av lutning	Elektrisk
Höjdregering (cm)	55 - 105
Strömtillförsel	Elnät
Indikator för lutning i grader	Standard
Maximal längd användare (cm)	200
Hjul diameter (mm)	65
Bromssystem	Centralt
Styrhjul	Tillämpas inte
Stoppningens säkerhetsklass	1 IM
Stoppningens tjocklek (mm)/ densitet (kg/m3)	40 / 30
Vikt (kg)	170

SPECIELLA TILLBEHÖR

Remmar och andra vadderad stöd
AC0005 GRUNDRER
AC0006 KUDDE FÖR REM
AC0911 KIL FÖR BEN
AC0912 HÅLLA FÖR REM FÖR BEN
 Sidostöd
AC0003 FORMSKURNA STÖD 2
AC0004 HANDTAG 2
AC0090 STÖD FÖR UNDERARMAR 2
AC0517.W ? VADDERADE STÖD 2
 Bord
AC00308 BORD LB492
 Fotstöd och sandaler
AC0002 INTRA-EXTRA SANDALER
AC0096 KIL FÖR PEVA (KLUMPFOT)

För modeller som drivs med anslutning till elnät: 220 V 50 / 60 Hz / 24 V 70 VA ; För modeller som är batteridrivna: 24 V / max 10AT Batteriladdare: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz - 500 mA.

? VAL AV FÄRG PÅ ÖVERDRAGET - viktigt: ange alltid färgkoden vid beställning av en produkt när detta tillval är möjligt.



Bilaga - Sammanfattande tabell för tillbehör

Detta är en lista med alla tillbehör, allmänna och specifika, för de modeller som kan omvandlas i Marcus line, men även för de med dubbel motor som tillåter reglering av lutning och höjd. Denna lista kan hjälpa er att utvärdera och kontrollera möjligheten att använda de enskilda tillbehören på de olika tippbrädorna och behandlingsborden. Den tar även hänsyn till delarnas bredd i de specifika fallen. För ytterligare information om de enskilda tillbehören eller grupper av tillbehör, vänligen läs de tillägnade kapitlen. Kom ihåg att till skillnad från tillvalen som behövs för utformningen av produkten, kan tillbehören väljas vid vilket annat tillfälle som helst, även efter att produkten köpts.



TIPPBRÄDOR

? VAL AV FÄRG PÅ ÖVERDRAGET - Viktigt! Tillbehör med kod som slutar med "?" måste integreras med överdragets färgkod.

A	N	8	7	K	S	B	4	T	1	6	E	Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KOD	MARCUS Line				Tippbrädor w/ 2	
	LT41		LT42		LT2 E/B	LB492
	W 60 cm	W 75 cm	W 60 cm	W 75 cm	W 60 cm	W 120 cm
AC0005 GRUNDEM	•	•	•	•	•	•
AC0006 KUDDE FÖR REM	•	•	•	•	•	•
AC0560 FIXERINGSREM 26 CM	•		•		•	
AC0561 FIXERINGSREM DELAD 17,5 CM	•		•		•	
AC0088 FIXERINGSREM 17,5 CM	•		•		•	
AC0087.W? KUDDE NACKE LT2					•	
AC0949.W? KUDDE NACKE LT4	•	•	•	•		
AC0911 KIL FÖR BEN	•	•	•	•		•
AC0912 HANDTAG FÖR REM FÖR BEN	•	•	•	•		•
AC0913 FORMSKUREN REM 60	•		•		•	
AC0947 FORMSKUREN REM 75		•		•		
AC0020.W? PLUGG FÖR ÖPPNING NÄSA -MUN					•	
AC0003 FORMSKURNA STÖD 2					•	•
AC0004 HANDTAG 2					•	•
AC0090 STÖD FÖR UNDERARMAR 2					•	•
AC0517.W? VADDERADE STÖD 2					•	•
AC0910 FÄSTMKANISMER	•	•	•	•		
AC0919 FORMSKURNA STÖD	•	•	•	•		
AC0920 HANDTAG	•	•	•	•		
AC0921 STÖD FÖR UNDERARMAR	•	•	•	•		
AC0922.W? VADDERADE STÖD	•	•	•	•		
AC0908.060W? SEKTION HUVUDÄNDA FÖR RYGGÄGE			•			
AC0908.075W? SEKTION HUVUDÄNDA FÖR RYGGÄGE B60				•		
AC0909.036 STÖD FÖR ÖVERKROPPEN	•	•	•	•		
AC0918.1W? VADDERAT STÖD	•	•	•	•		
AC0081 BORD LT2					•	
AC0308 BOBATH TIPPBRÄDA						•
AC0914.060 BORD 60, I TRÄ	•		•			
AC0914.075 BORD 75, I TRÄ		•		•		
AC0915.060 BORD 60, I POLYETEN	•		•			
AC0915.075 BORD 75, I POLYETEN		•		•		
AC0767.W? VADDERING FÖR BORD	•	•	•	•		
AC0764 ABS BRICKA	•	•	•	•		
AC1608 HANDTAG	•	•	•	•		
AC1609 HANDTAG MED HANDLEDSSTÖD	•	•	•	•		
AC0002 INTRA EXTRA SANDALER	•	•	•	•	•	•
AC0096 KIL FÖR PEVA (KLUMPFOT)	•	•	•	•	•	•
AC0942 ENKELT FOTSTÖD	•	•	•	•		
AC0943 REGLERBARA FOTSTÖD, EN MODUL	•	•	•	•		
AC0944 REGLERBARA FOTSTÖD, TVÅ MODULER	•	•	•	•		

BILDTE:

Remmar och andra stoppade tillbehör

Olika sidostöd och handtag

Möjligheten att omvandla grundmodellen

Bord och tillbehör

Olika fotstöd och sandaler

MOTOmed® Rörelseterapi

Effektiv, daglig rörelse som får mig att må bra

Motorstyrd, motorassisterad, muskelstyrd

