

-Stealth Tru-Comfort 2-

Denna manual skall användas för den Stealthdyna som erhållits. Om det är någon information i denna manual som är oklar eller om du behöver ytterligare hjälp, vänlig kontakta Salubrious AB. **Maxvikt brukare: 200 kg.**



Innehållsförteckning:

Placering	2
Förvaring	2
Rengöring	3

-Stealth Tru-Comfort 2-


Placering:

Stealth Tru-Comfort 2 är uppmärkt på både dynstomme och överdrag för rätt placering.

För korrekt placering av Stealth Tru-Comfort 2 gör följande:

1. Hitta stora vita etiketten på överdragets undersida. Där finns pilar/text och back/ front. Etiketten ska vara nedåt mot stolens sits.
2. Placera dynan på sitsen så att dragkedjan på överdraget och vita etiketten hamnar bak på stolens/ rullstolens sittyta. Vita etiketten skall vara nedåt. Viktigt att tänka på när du sätter på överdraget efter tvätt.
3. Nu är Din dyna klar att användas!

*Dragkedjan placeras bak på stolens/
rullstolens sittyta.*

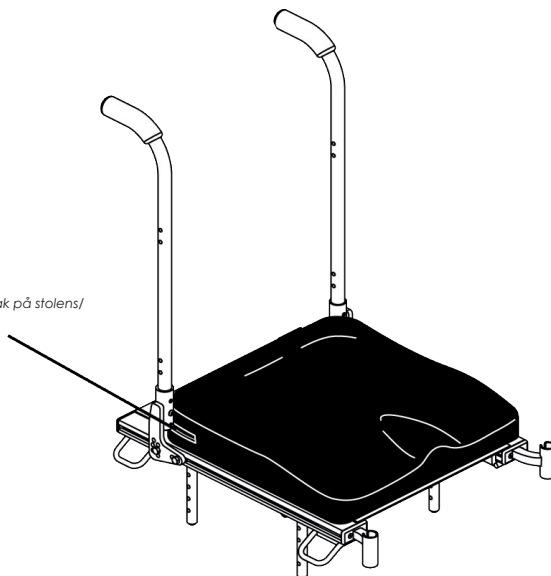


Förvaring:

Stealth Tru-Comfort 2 bör förvaras i rumstemperatur på en ren och torr plats när den inte används.

-Stealth Tru-Comfort 2-

Rengöring:

1. Öppna yttre svarta överdraget och dra ut dynan (bild nedan). Har du valt att använda inkontinensöverdraget finner du då ett inre överdrag, som desinficeras för hand alt. tvättas i maskin på 60 grader. Lufttorka eller torka i torrschåp på LÅG temperatur. (Vid speciella behov av tvätt, kontakta Salubrious AB)
2. Yttre svarta överdraget tvättas i maskin på 60°C. Hängtorka eller torka i torrschåp på **låg** temperatur, max 30°C. Använd ej blekmedel.
3. Rengör dynstommen med mjuk fuktig trasa och utspädd tvållösning eller mildt desinfektionsmedel. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller starka kemikalier. Var noga med att torka bort alla tvålrester med rent vatten och ren trasa. Låt dynan torka helt. Sänk aldrig ner dynan i vätska, detta skadar dynan (svår att få torr).
4. Sätt på överdragen (inkontinensöverdraget först om detta använts) på dynan när detta torkat helt, dra igen dragkedjan. Observera att marke ringen "bak" på dynstommen alltid ska vara åt samma håll som drag kedjan på överdraget. Trögformande/tryckavlastande skummet på dynstommen skall alltid vara uppåt. Placera sedan dynan på stolen enligt instruktionerna under "Placering".

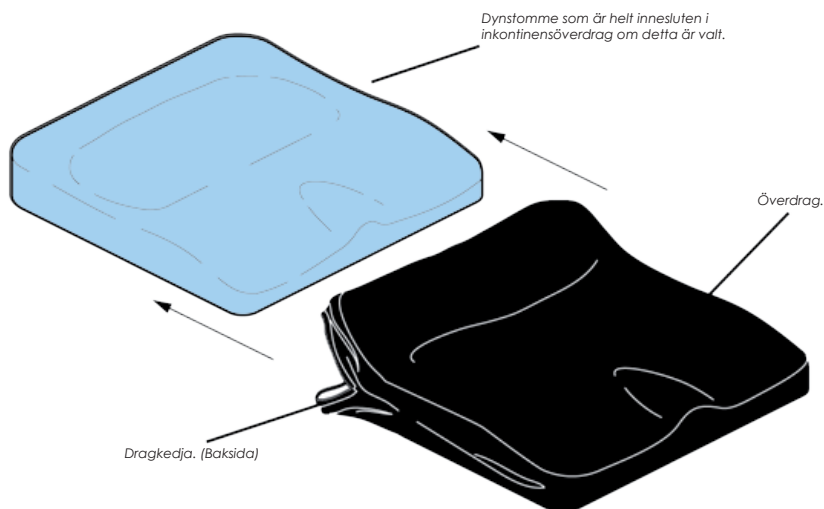



En kasserad dyna med överdrag slängs
i behållare för brännbart avfall.

Kartong återvinns som returkartong.

