



Innehållsförteckning

Uppackning af stolen	1
Udskiftning af sæde	2
Opklappelig fodbøjle	3
Antitipbøjle	4
Bremsestang	5
Bremsepedal	6
Udskiftning af rygbøjle	7
Udskiftning af nedfældbar armlæn	8
Udskiftning af armlænsstang med pude	9
Udskiftning af ryg	10
Montering af overtræk på sæde og ryg	11



VELA Salsa

TA STOL UR KANTONGEN




TA BORT RÖDA PLASTSKYDDET FRÅN HJULEN



MONTERING AV RYGGSTÖDET

Spaken för inställning av ryggstödet (1) är satt i det öppna läget och ryggstödsstången (2) monteras ned hålet. Dra åt spaken efteråt.

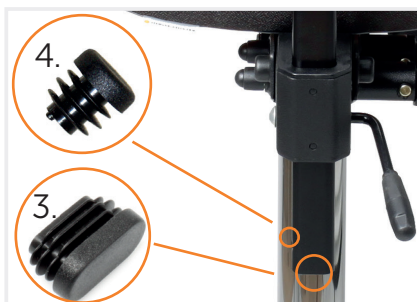

Fästa ändstycket (3) i botten av ryggstödsstången. Plastknopp (4) sätts in i hålet på vänster sida av ryggstödsstång.

Stolen är nu klar att användas



Udskiftning af sæde

Udskiftning af sæde VELA Salsa bæreplade


Varenummer:

(A)06180712xxx Delta-sæde 46x35 cm

(A)06420712xxx Kap-sæde 46x35 cm

(A)06012620xxx Ergo-sæde 46x40 cm

1. Fjern bærepladen ved at skrue de 4 skruer (A) ud. husk at fjerne de fire skiver (B).
2. Armlænsbunden afmonteres ved at skrue de 4 skruer (C) ud og sædet fjernes.
3. Monter armlænsbunden på det nye sæde med de 4 skruer (C). Bemærk at håndskruen til breddeindstilling af armlæn skal vende frem.
4. Placer bærepladen og skru den fast med de 4 skruer (A) med skiver (B) under. Spænd godt til.

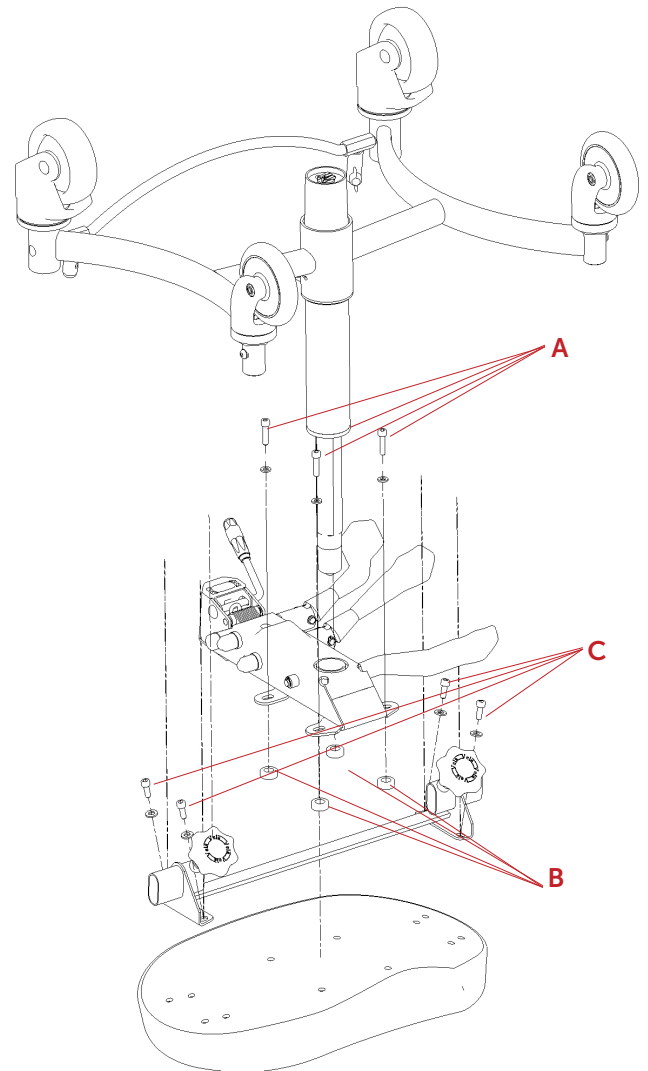






Opklappelig fodbøjle


Montering af stel med opklappelig fodbøjle VELA Salsa

Varenummer:

(A)927319

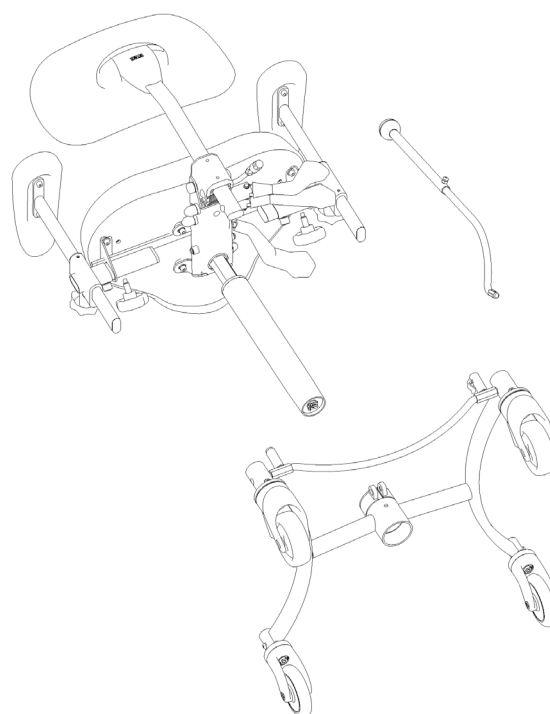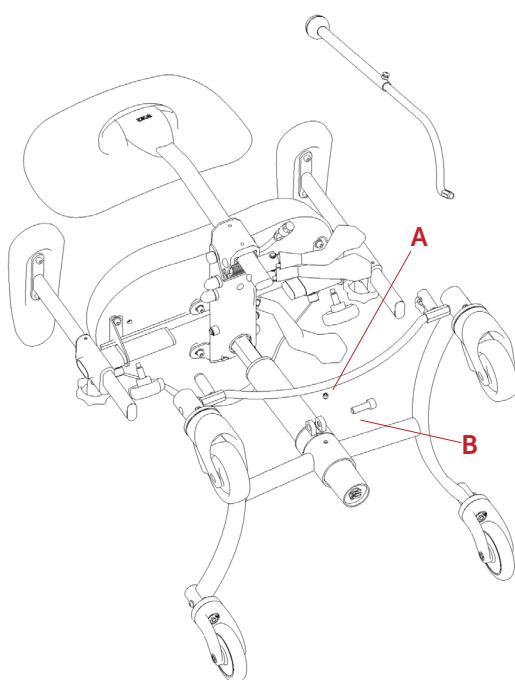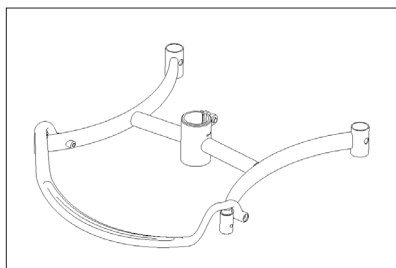

1. Skru pinolskrue (A) og stor skrue (B) ud med unbraconøgle og tag overparten af. Bemærk at skruerne skal genbruges.
2. Tag det nye stel og flyt hjul, bremseaksler og bremsestang over (se separat monteringsvejledning 105.869).
3. Sæt overparten ned i det nye stel med fodbøjle.
4. Ret overdel ind, så den flugter med stellet.
5. Skru pinolskruen i og spænd den store skrue godt.

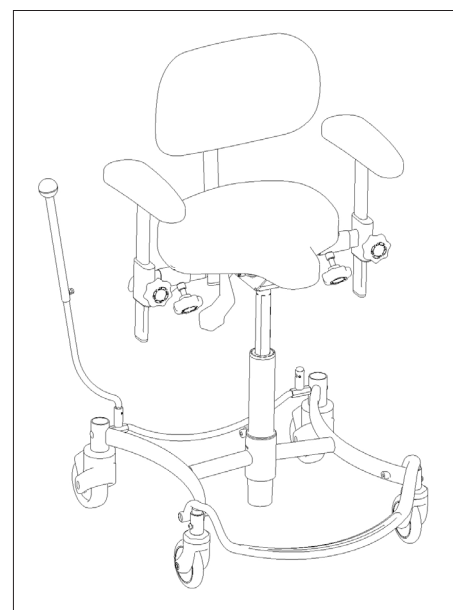





Antitipbøjle

Montering af antitipbøjle VELA Tango/Salsa

Varenummer:

(A)926970

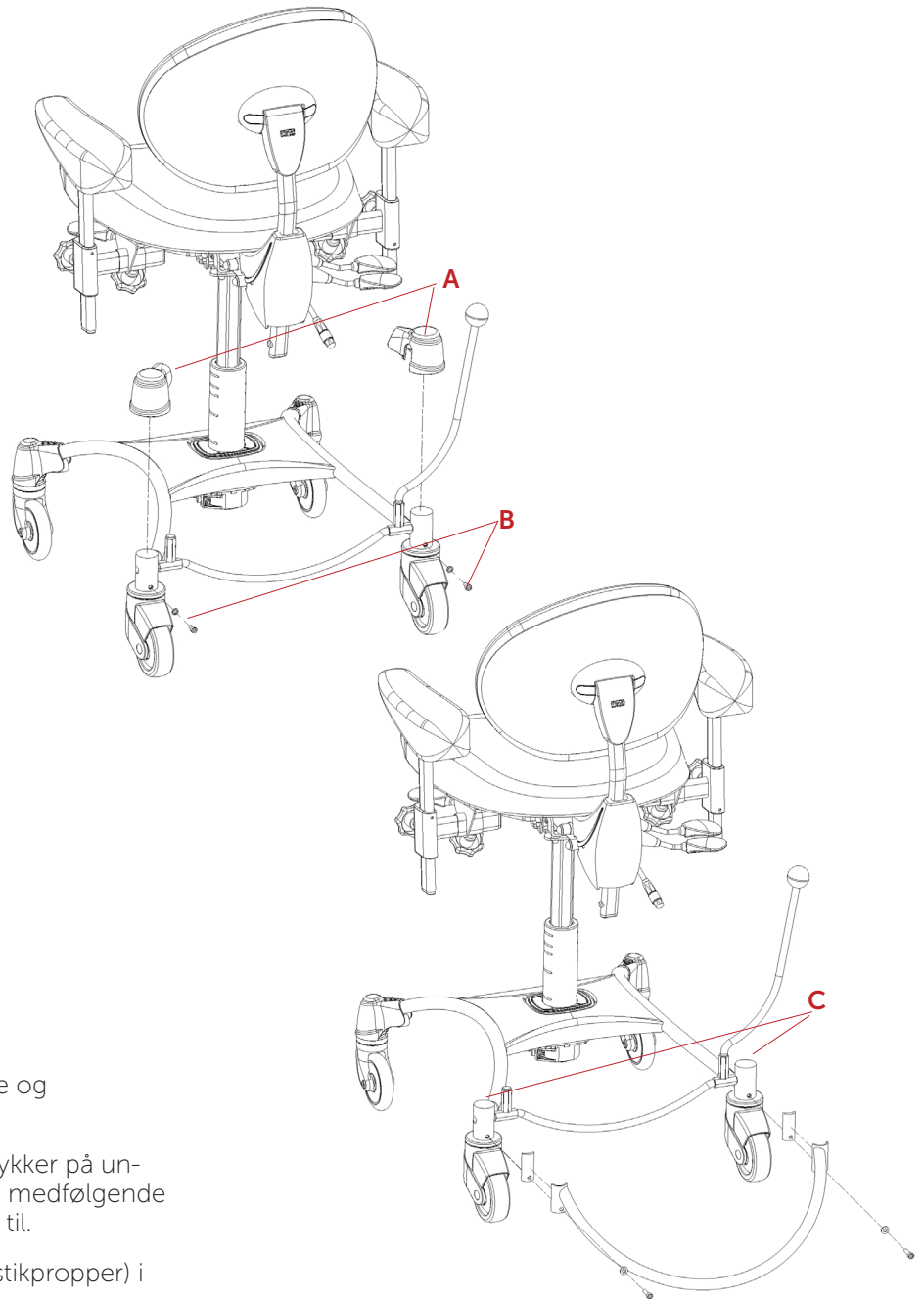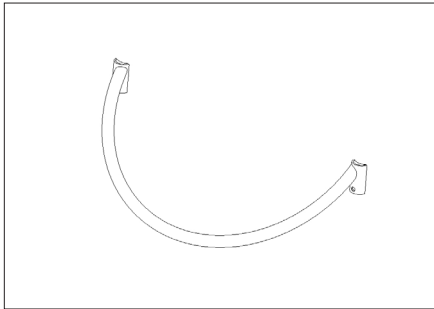

1. Lås stolen
2. Afmonter de 2 bagerste kapper (A) (skal ikke bruges igen).
3. Skru de to skruer (B) ud af baghjulene og fjern skruer og skiver.
4. Sæt antitipbøjle med plast afstandsstykker på understellet og skru den fast med de to medfølgende skruer med skive under. Spænd godt til.
5. Monter de medfølgende rørben (plastikpropper) i stellet over baghjulene (C).



Bremsestang

Montering af forlængerstykke og T-bremsegreb til bremsestang

Varenummer:

(A)926764 Forlængerstykke til bremsestang

(A)926877 T-bremsegreb til bremsestang



1. Afmonter kuglen der sidder på bremsestangen, ved at dreje eller slå den af med gummihammer.

Forlængergreb: Sæt forlængerstykket på bremsestangen og spænd skruen godt. Skruen skal vende væk fra stellet.

T-greb: Monter T-bremsegreb på samme måde. T-bremsegrebet skal sidde parallelt med understel og skruen skal pege fremad.




Bremsepedal

Montering af bremsepedal

Varenummer:

(A)925936 Bremsepedal f/ VELA Tango/Salsa

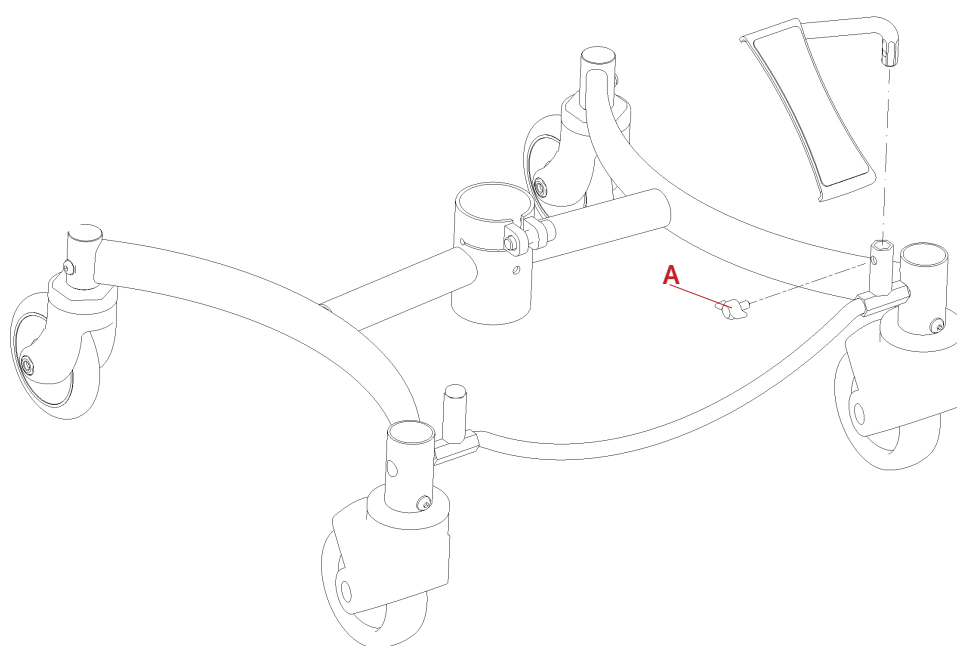

1. Løsn vingskruen (A) og fjern bremsestangen.
2. Placer bremsepedalen og spænd vingskruen igen.




Udskiftning af rygbøjle

Udskiftning af rygbøjle Tango 100-serie


Varenummer:

(A)07347 Rygbøjle til høj ryg t/vinkelrigle 52 cm



(A)07337 Rygbøjle 42 cm

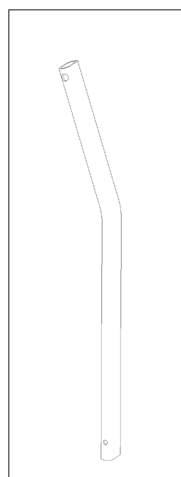

42 cm

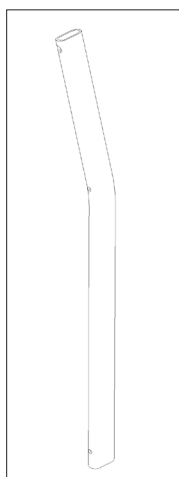

52 cm

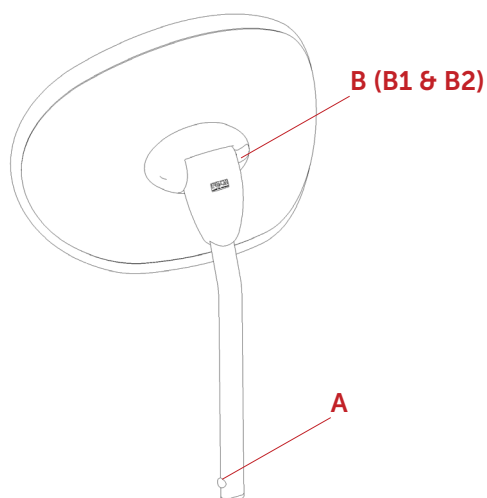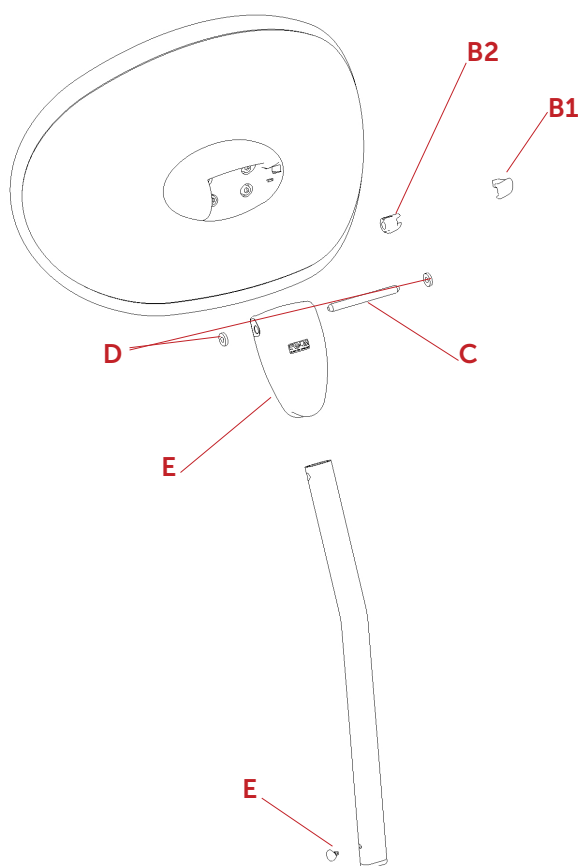

1. Proppen (A) i siden af rygbøjlen fjernes først, for at tage rygbøjle op af bærepladen.
2. Fjern låsedelen (B (B1 og B2)) på rygbeslaget (B1 lirkes ud med en skruetrækker B2 skubbes ud mod højre).
3. Rygbøjlen kan nu tages væk. Tag aksel (C) og gummiskiver (D) af og træk plastdelen (E) af rygbøjlen.
4. Sæt den nye rygbøjle i plastdelen (E).
5. Sæt akslen (C) gennem plastdelen (E) og rygbøjlen.
6. Gummiskiverne (D) sættes på akslen - én på hver side.
7. Sæt rygbøjlen i holderen på ryggen og sæt derefter de to låse del i - først låsedel (B2) og derefter låsedel (B1).
8. Sæt rygbøjlen i bærepladen og sæt proppen (A) i siden af rygbøjlen.




Udskiftning af armlæn

Montering af nedfældbar armlæn Tango 100-serie

Varenummer:

(A)928116 Armlænsset nedfældbar manuel betjening

(A)928117 Armlænsset nedfældbar el betjening

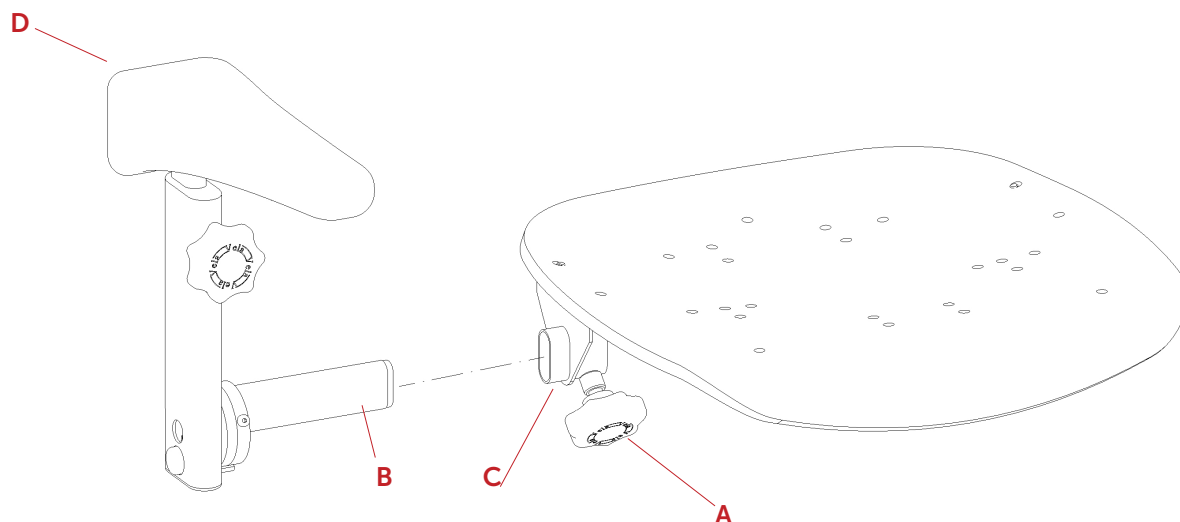

DANSK

1. Håndtag (A) under sæde løsnes. Afmonter armlæn. Knopfjeder (B) skal trykkes ind, for at kunne fjerne armlænet.
2. Sæt armlænet ind i armlænsbunden (C). Vær opmærksom på, at knopfjederen (B) skal trykkes ind, for at kunne sætte armlænet fast.
3. Placer armlænet og stram håndtaget igen.

OBS! Ved el-betjent armlæn, skal jack-stikket sættes ind bag på armlænet (D).



Udskiftning af armlæn/ Skifte av armlen/ Byta ut armstöd/ Replacing the armrest

Udskiftning af armlænsstang med pude

Varenummer:

(A)1114302003 7x35 cm Ve

(A)1024302003 7x35 cm Hø

(A)1114331003 8x26 cm Ve


(A)1024331003 8x26 cm Hø

(A)1114404003 9x30 cm Ve

(A)1024404003 9x30 cm Hø

(A)1114405003 9x30 cm Ve

(A)1024405003 9x30 cm Hø

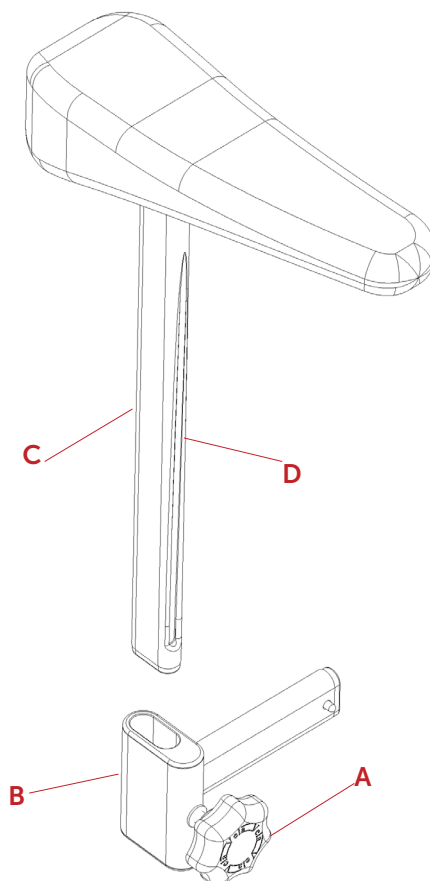

1. Løsn håndtaget (A) på sidestykket (B) og afmonter armlæn.
2. Placer den ny armlænsstang (C) i sidestykket med sporet (D) fremad.
3. Sæt armlænet i den ønskede højde og spænd håndtaget.



Udskiftning af ryg

Udskiftning af ryg på VELA Tango og VELA Salsa

Varenummer:


(A)08095111687 LP-ryg b26 h16 cm

(A)08495220687 CY-ryg b43 h45 cm


(A)08505220687 CY-ryg m/luft lændepude b43 h45 cm

(A)08325147600 S150-ryg b22 h29 cm

(A)08485120600 Y-ryg b37 h30 cm

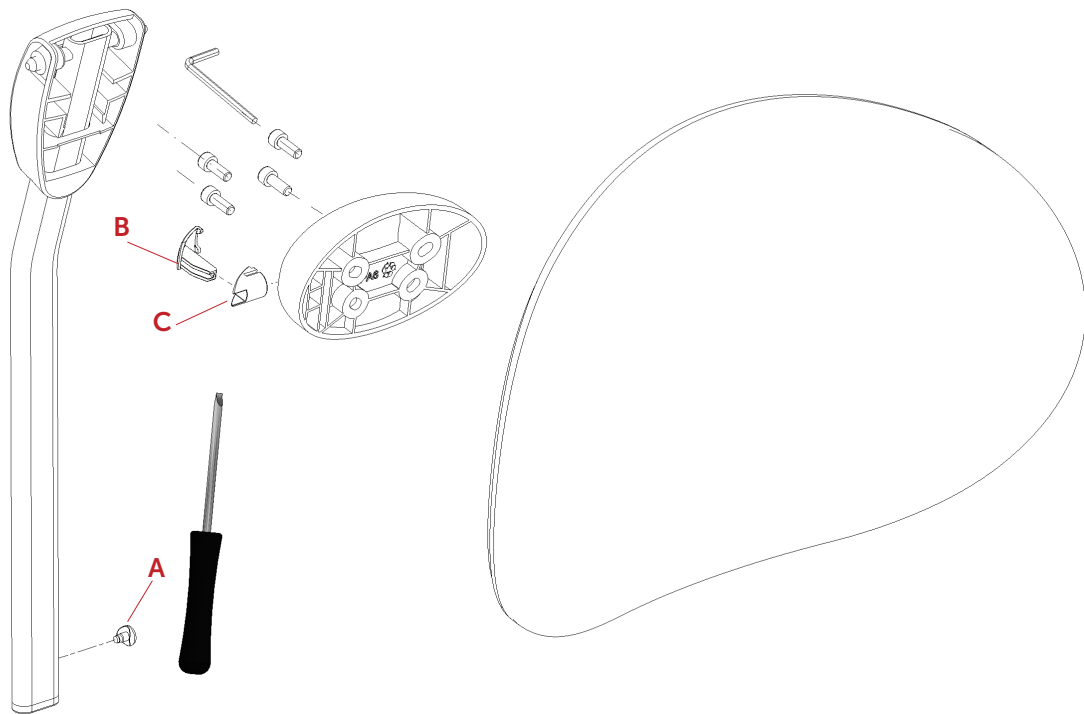

1. Fjern stopknappen (A) på rygbøjlen med en skruetrækker med lige kærnv og træk ryggen op.
2. Brug en skruetrækker til at vippe låsetapperne (B) og (C) ud.
3. Rygbøjlen kan nu aftages.
4. Brug en unbraconøgle str 6 til at afmontere ryghængslet.
5. Ryggen kan nu skiftes. Føl dig frem til hullerne i stoffet og brug en spids genstand til at stikke hullerne ud med.
6. Monter de 4 skruer i den nye ryg.
7. Rygbøjlen monteres i ryghængslet.
8. Låsetapperne (B) og (C) monteres i omvendt rækkefølge af hvordan de blev afmonteret.
9. Monter ryggen i holderen og monter stopknappen (A).

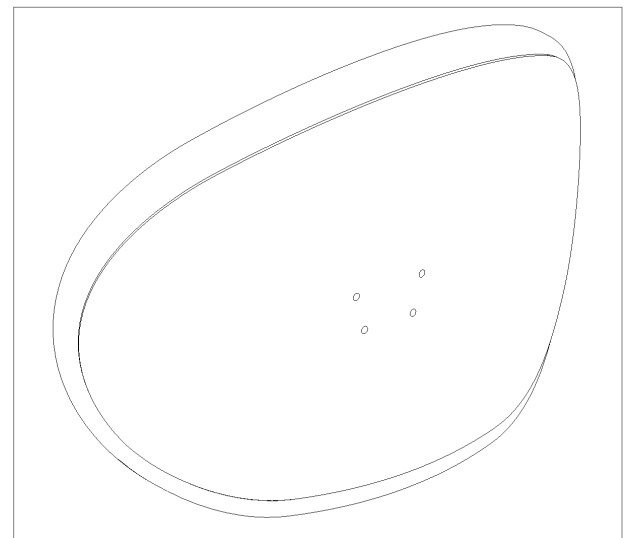



Overtræk/ Trekk/ Omslag/ Cover

Montering af overtræk sæder og rygge

Montering af inkontinensbetræk sæder

Varenummer:

Overtræk:

(A)47149xxx Y-ryg

(A)47151xxx C-ryg

(A)47101xxx Ergo-ryg

(A)46114xxx Y-sæde

(A)46115xxx CY-sæde

(A)46151xxx C-sæde

(A)46119xxx Sadel-sæde

Inkontinensbetræk:

(A)46414xxx Y-sæde

(A)46415xxx CY-sæde

(A)46451xxx C-sæde

(A)46419xxx Sadel-sæde



Overtræk sættes på sæde eller ryg. På indvendig side af betrækket findes der vaskeanvisning.