



Anatomic
Hygiensits

Bruksanvisning

Användarmanual, monterings-/justeringsanvisning,
underhåll/skötsel



Denna bruksanvisningen avser individuell sits Anatomic Hygiensits med tillbehör. För fullständig översikt av avsedda tillbehör se produktens arbetsorder.

Innehållsförteckning

Tillverkare	2	Monterings- och justeringsanvisningar	8
Introduktion	3	Huvudstöd	8
Inledning	3	Justerbar höftvinkel	9
Korrespondens - märkning	3	Fotstöd	10
Försäkran om överrensstämmelse	3	Vadstöd	11
		Bord	12
Symbolförteckning	4	Sammanfattning och efterkontroll	13
Säkerhetsföreskrifter	4	Underhåll och skötselanvisningar	13
Utbildning och kvalifikationer	4	Kontroll före användning	13
Varningar och försiktighetsåtgärder	5	Skötsel och tvättråd	14
Kontroll före användning	6	Avfallshantering	14
Kvarvarande risker	6	Garanti	15
Godkända kombinationer	6	Revision	15
Avvikelser/tillbud	6		
Användning av sitsen	7		

Tillverkare

Produkten är tillverkad av Anatomic Sitt i Norrköping AB

Postadress	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besöksadress	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-post	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com
Instruktionsfilmer	youtube.com/anatomicsitt
Följ oss på	facebook.com/anatomicsitt

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Introduktion

Inledning

Grattis till valet av hjälpmedel. Vi hoppas att du kommer få stor användning av vår produkt. För att ni ska kunna nyttja den till fullo är det viktigt att ni läser igenom denna bruksanvisning ordentligt. Detta gäller alla personer som finns i brukarens närhet.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Nya utgåvor finns att ladda ner från vår hemsida: www.anatomicsitt.com. Revision finns på framsidan tillsammans med datumet.

Korrespondens - märkning

På produktetikett finns produktens artikelnummer samt serienummer. Etiketten är placera på insidan av sitsskalet på ryggen eller sitsen. Dessa nummer ska anges vid korrespondens med Anatomic Sitt gällande produkterna.

Försäkras om överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven för specialanpassade produkter enligt förordningen (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

Symbolförteckning



Uppmärksammar läsaren om viktig säkerhetsinformation m.m.



Anvisningar och tips som underlättar användning av produkten.



Läs alltid bruksanvisningen före användning.



Läs bruksanvisningen för viktig säkerhetsinformation.



Tillverkare (ev. även tillverkningsdatum).



Tillverkningens sats-/batchnummer för identifiering.



Medicinteknisk produkt.



Referensnummer/artikelnummer för produktidentifiering.



Unik identifierare av produkt och tillverkare



Tillverkarens serienummer på produkten för identifiering.

Säkerhetsföreskrifter

Utbildning och kvalifikationer

- Montering och service ska alltid utföras av kvalificerad fackpersonal (tekniker på hjälpmedelscentral eller motsvarande).
- Beslut om anpassning ska ske av behörig medicinsk personal och utföras av kvalificerad fackpersonal (tekniker på hjälpmedelscentral eller motsvarande).
- Inställningar, justeringar samt in- och utprovning av hjälpmedlet ska alltid utföras av behörig medicinsk personal (fackpersonal på hjälpmedelscentral eller motsvarande).
- Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid utföra en riskbedömning innan användning.

Varningar och försiktighetsåtgärder



Inställningar får endast utföras av kvalificerad fackpersonal. Det är endast tillåtet att göra inställningar på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.



Kontrollera produkten med avseende på funktion innan den lämnas ut till en användare.



Den som förskriver hjälpmedlet är ansvarig för att instruera brukaren och/eller andra personer i dess närmiljö hur produkten används på ett säkert sätt. Funktionskontrollera alltid produkten innan användning.



Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren ska balansera in den valda sitsen för att säkerställa att ev tipprisk utesluts.



Efter alla monterings- justerings eller servicearbeten ska alla infästningsskruvar och muttrar kontrolleras och dras åt.



Använd aldrig fotplattan vid i- och urstigning från hjälpmedlet.



Observera att om brukaren griper tag i föremål utanför hjälpmedlet eller lutar sig för långt ut från hjälpmedlet, kan en tyngdpunktsförskjutning ske vilket kan leda till en ökad tipprisk.



Lyft alltid i underredet - aldrig i sittenheten.



Utför aldrig service medan produkten används.



Lämna aldrig brukaren utan tillsyn när hjälpmedlet används.



Gör alltid en kontroll efter användning för att upptäcka rodnader eller tryckmärken på patienten.

Kontroll före användning

Tillsyn och kontroll ska utföras före varje användning enligt nedan punkter:

- Kontrollera produkten och dess tillbehör med avseende på lösa delar, slitage och skador. Kontrollera särskilt skruvar och muttrar samt vred.
- Kontrollera att sitsen är ordentligt fastsatt på underredet
- Kontrollera produktens stabilitet
- Kontrollera bälten och selar avseende slitage, funktion samt infästning.

Om brister uppmärksammas, använd ej produkten. Kontakta din distributör av hjälpmedlet för åtgärd.

Kvarvarande risker

Var observant på att produkten och dess tillbehör är korrekt inställda så att brukaren inte åsamkas obehag eller skada under användningen.

Om så är fallet ska justering göras eller lämpliga tillbehör monteras.

Godkända kombinationer

Produkten får endast förses med tillbehör och reservdelar levererade av Anatomic Sitt AB. Se produktens beställningsunderlag för möjliga tillbehör och sprängskiss för reservdelar.

Avvikelse/tillbud




Vid funktionsfel kontakta hjälpmedelscentral eller återförsäljare/tillverkare.

Om ett allvarligt tillbud uppstår bör det rapporteras till Anatomic Sitt AB och landets behöriga myndighet.

Användning av sitsen

Användning av sitsen

1. Kontrollera att sitsen sitter stabilt fast i underredet och att det går att tilta.
2. Se till så att bromsarna är låsta och att rullstolen står på ett stabilt underlag.
3. Börja med att tilta/tippa sitsen bakåt, gärna så långt som möjligt, innan brukaren placeras i sitsen.
4. Placera brukaren i sitsen. Var noga med att brukaren kommer ordentligt in i sitsen. Kontrollera med handen vid stussen och sidorna vid höften. Bäckenet skall vara i den tänkta positionen som gjordes vid arbetet i kudden. Efterjustera vid behov.
5. Lägg höftbältet över höften (se bild 1) och fixera bäckenet med höftbältet. Bältesplösen på den sida som brukaren vrider/spänner utåt, dras åt först. Justera bältets position genom de bakre banden/infästningspunkterna. Justera spännet så det hamnar centrerat på användaren. Om spännet ej sitter centrerat finns risk att banden löper i spännet (spännet låser ej). Dra åt höftbältet hårt. Höftbältet ska sitta så väl att brukarens bäcken är stabilt. En tumregel är att du precis kan få in ett finger mellan lår och plös. Kontrollera att spännet är ordentligt knäppt och justeringsbanden tillräckligt dragna.

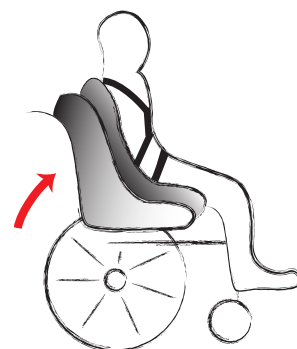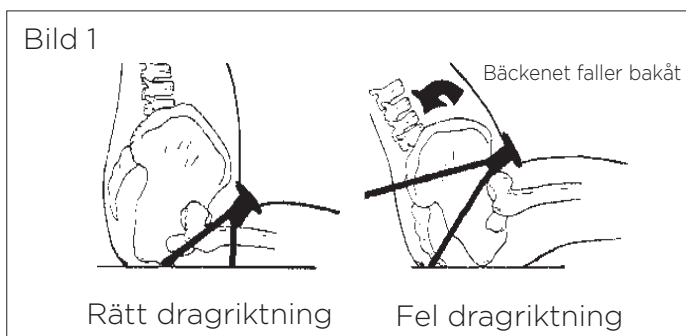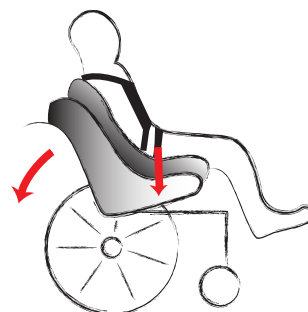

6. Fixera sele och ev. andra bälten.
7. Tilta upp stolen i normalt läge. Använd tiltfunktionen under dagen för att skapa variation i tyngdpunktsfördelning på kroppen.
8. Kontrollera då och då att brukaren sitter korrekt och stabilt.



Många brukare orkar bara sitta i aktiv sittställning kortare stunder. Genom att ändra från aktivt sittande till viloläge flera gånger om dagen får brukaren ett behagligare sittande och även trycket fördelas. Detta förhindrar uppkomsten av hudrodnad.

Monterings- och justeringsanvisningar

Montering ska alltid utföras av kvalificerad fackpersonal (tekniker på hjälpmedelscentral eller motsvarande). Instruera brukaren och/eller andra personer i dess närmiljö om produktens funktioner för att hjälpmedlet ska kunna användas på ett säkert sätt.


Huvudstöd

Montering / justering av huvudstöd

- * Ta bort skyddskåpan på ryggstaget.
- * Montera huvudstödsfästet (B) på ryggstaget.
- * Lossa skruvarna (A) lagom mycket för att det ska gå att justera med handen.
- * Sätt brukaren i sitsen och justera till önskad position.
- * Drag åt samtliga skruvar samt fingervreden och sätt tillbaka skyddskåpan.

Huvudstödet är enkelt att ta bort:

- * Lossa fingervredet (C) för att ta bort huvudstödet.

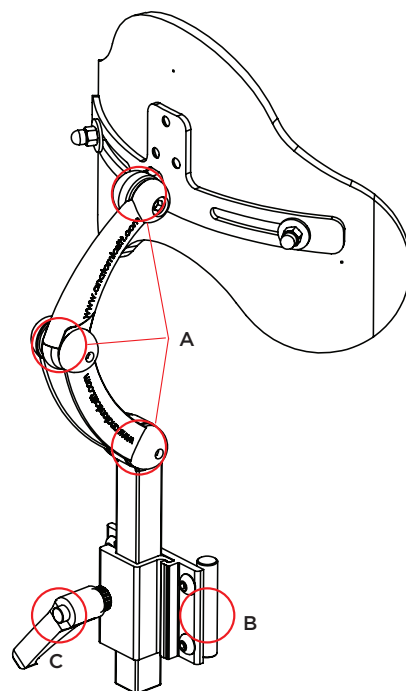

Justerbar höftvinkel


Den justerbara höftvinkeln möjliggör att ändra sitsvinkeln i höften. Sitsen levereras alltid i det mellersta av tre lägen och kan vid leverans, eller senare, antingen stängas eller öppnas med avseende på sittvinkel i höftleden.

Öka höftvinkeln

Lossa skruvarna (A) lite på sidorna av sitsen. Vik ut vinkelbeslaget (B) lite och böj ryggen bakåt tills skruvarna passar in i det nedersta spåret. Skruva fast skruvarna (A) ordentligt.

Minska höftvinkeln

Lossa skruvarna (A) lite på sidorna av sitsen. Vik ut vinkelbeslaget (B) lite och böj ryggen framåt tills skruvarna passar in i det översta spåret. Skruva fast skruvarna (A) ordentligt.

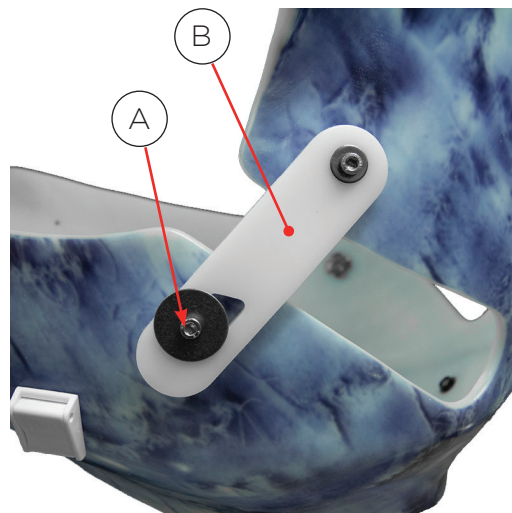

Kontrollera att sitsen är i balans på underredet för att undvika tipprisk.

Fotstöd

Inställning

Lossa vredet (H) vid sitsen och säkerställ att vinkeln inte blir för tvär så att staget tar i underredets ram eller underlaget när man tiltar.

Justera till önskad höjd av fotstödet och avsluta med önskad vinkel i ankelled (4 mm insexnyckel). Kontrollera att länkhjulen går fria.

Avtagning


När man vill ta av hela fotstödet gör man det genom att lossa skruven (J).



J H


Höjdjustering av fotplattan

För att höjdjustera fotstödet lossar du spakvredet (A) något för att justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet.

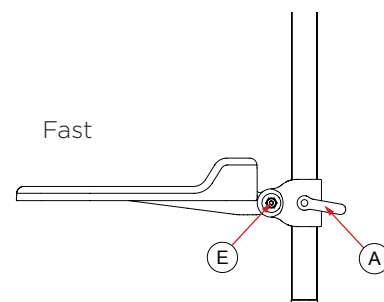


Vinkeljustering av fotplattan:

Fast fotstödsbeslag: För att vinkeljustera vid fotleden lossar du skruven (E) och justerar till önskad vinkel. Dra sedan åt skruven.

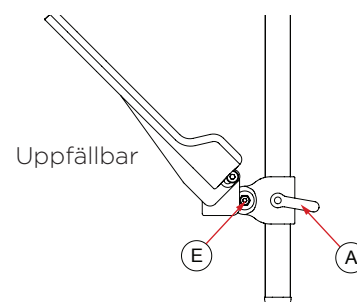

Uppfällbart fotstödsbeslag: För att vinkeljustera vid fotleden lossar du skruven (E) och justerar till önskad vinkel. Dra sedan åt skruven. För att använda den uppfällbara funktionen, lyft fotstödsplattan i framkant.

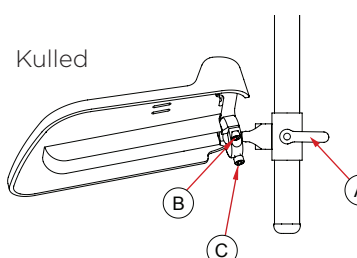

Kulledsadapter: För att använda kulledsfunktionen lossar du först skruvarna (B) och (C) och justerar till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (B) och säkerhetslås positionen med skruven (C).

Vadstöd

Montering av vadstöd

Innan montering av vadstöd kan utföras måste du först ta bort eventuella fotstöd. Börja med att ta bort ändavslutet (G) och lossa sedan på spakvredet (F) som håller fotstödet på plats på fotstödsstaget. Dra sedan fotstödsplattan och dess beslag nedåt.


Montera vadstödet genom att skjuta i sargsprinten (C) i fotstödsstaget, justera till önskad höjd och dra åt skruvarna (E). Montera därefter tillbaka fotstödet och ändavslutet (G).

Höjd- och djupjustering av vadstöd

För att höjd- och djup justera vadstödet lossar du skruvarna (E) något för att sedan justera till önskad höjd/djup. Dra sedan åt skruvarna (E).

Breddjustering av vadstöd


För att breddjustera vadstödet lossar du skruvarna (A) något för att sedan justera till önskad bredd. Dra sedan åt skruvarna (A).

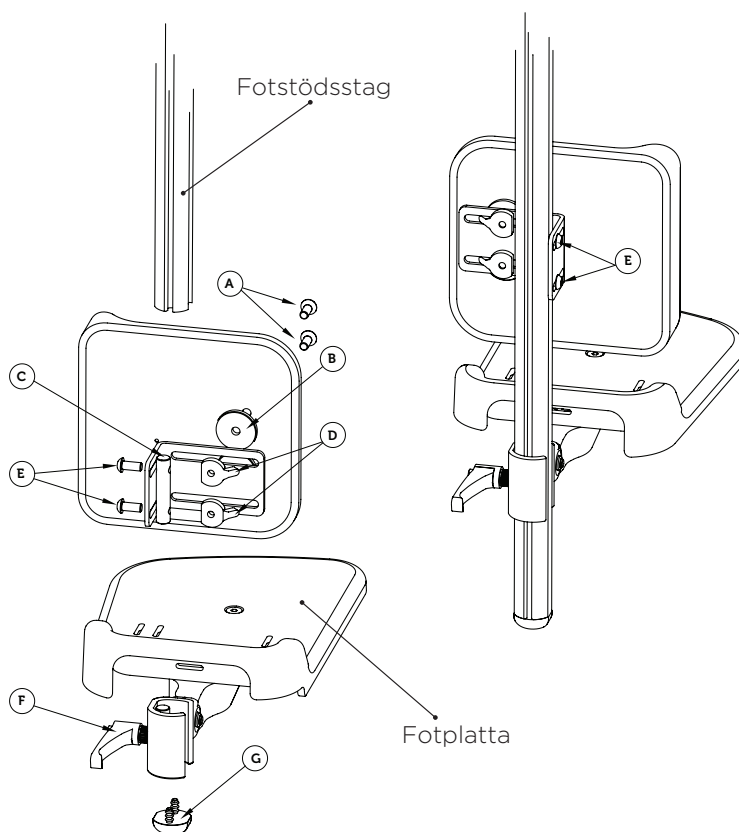

Bord

Montering av bordet


Lägg bordet på armstödsplattorna och vrid sedan in bordets låsarmar (H) under armstödsplattan (G) tills de kläms fast. Har man valt ett bord med förstärkning och som går att svänga bort, finns ett rör som bordet skall fästas i under armstödsplattan.

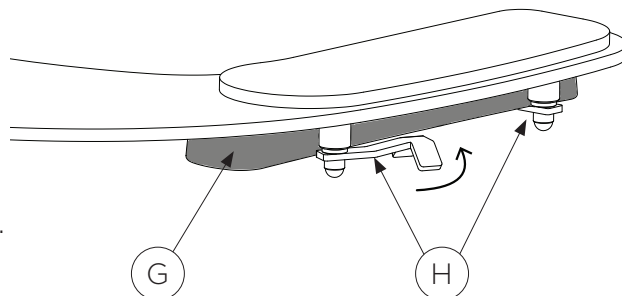

Inställning

Kontrollera att det finns tillräcklig stödyta under bordet mot armstöden. Är understödsytan för liten och bordet uppleves vingligt måste man lossa de två skruvarna (B) och (C) under armstöden och skjuta fram dessa till avsedda hål, se hålbild under armstödsplattorna.

Var uppmärksam på att bordet inte ligger för nära buken så att obehag uppstår.

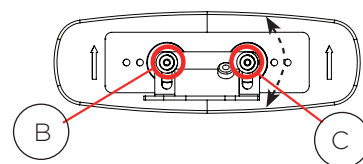

Sammanfattning och efterkontroll

Efter att montering och/eller justering är genomförd, kontrollera att produkterna (huvudprodukt samt tillbehör) är monterade på ett riktigt sätt enligt bruksanvisningen och fungerar som avsett.

Kontrollera inställningarna på produkten och dess tillbehör så att brukaren har en korrekt sittposition.

Efter alla monterings- justerings eller servicearbeten ska samtliga vred, infästningsskruvar och muttrar kontrolleras och dras åt.

Om brister uppmärksammas, använd ej produkten. Kontakta din distributör av hjälpmedlet för åtgärd.

Underhåll och skötselanvisningar

Kontroll före användning

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert är det viktigt med tillsyn och rengöring.

Tillsyn och kontroll ska utföras före varje användning enligt nedan punkter:

- Kontrollera produkten och dess tillbehör med avseende på lösa delar, slitage och skador. Kontrollera särskilt skruvar och muttrar samt vred.
- Kontrollera att sitsen är ordentligt fastsatt på underredet
- Kontrollera produktens stabilitet
- Kontrollera produktens rörliga funktioner, exempelvis ryggvinkling avseende rörlighet samt låsning.
- Kontrollera bälten och selar avseende slitage, funktion samt infästning.

Om brister uppmärksammas, använd ej produkten. Kontakta din distributör av hjälpmedlet för åtgärd.

Skötsel och tvättråd

Plasten (PEHD) tvättas med svamp eller mjuk borste. Du kan använda milt tvättmedel eller desinfektionsmedel om det behövs.

Foder

Efter bad/dusch, lossa samtliga foder (det blå materialet närmast kroppen) för kortare torktid och längre livslängd.

Fodren handtvättas. Du kan använda en mjuk tvättsvamp.

Fodren skall torka i rumstemperatur, eller i torkskåp på låg temperatur, och får inte placeras direkt mot en värmekälla. De får inte torkas i torktumlare, då kan de förlora formen. Vänd fodren ut och in vid torkning om det går.

För positioneringsselar och höftbälten från Anatomic Sitt AB följ rekommendationer på fastsydda tvättråd.

Avfallshantering

En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna ska separeras efter materialtyp och lämnas på lokal återvinningsstation.

Garanti

Garanti och reklamation

Garanti gäller generellt ett (1) år mot fabrikationsfel fr.o.m. leveransdatum eller enligt avtal. Garanti utgår inte för yttre påverkan eller onormal hantering. För garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

För att på bästa sätt kunna bedömma reklamationen ska produkten vara torr och rengjord när den skickas åter.

Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation eller eventuellt garantiutbyte. Bifoga en kopia på fakturan och ange att produkten skall tillbaka till dig efter reparation. Ange leveransadress, kontaktperson samt telefonnummer. Blankett för reklamation finns att hämta på vår hemsida.

Förpacka den torra och rena produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Revision

I denna version av bruksanvisningen har följande ändringar gjorts:

Korrespondens - märkning

Beskrivning var produktetiketten sitter.

Revisionsförteckning

ver. 2.0 - 2020-03-10

ver. 2.1 - 2021-05-26

SE

Anatomic Sitt AB (tillverkare)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

