
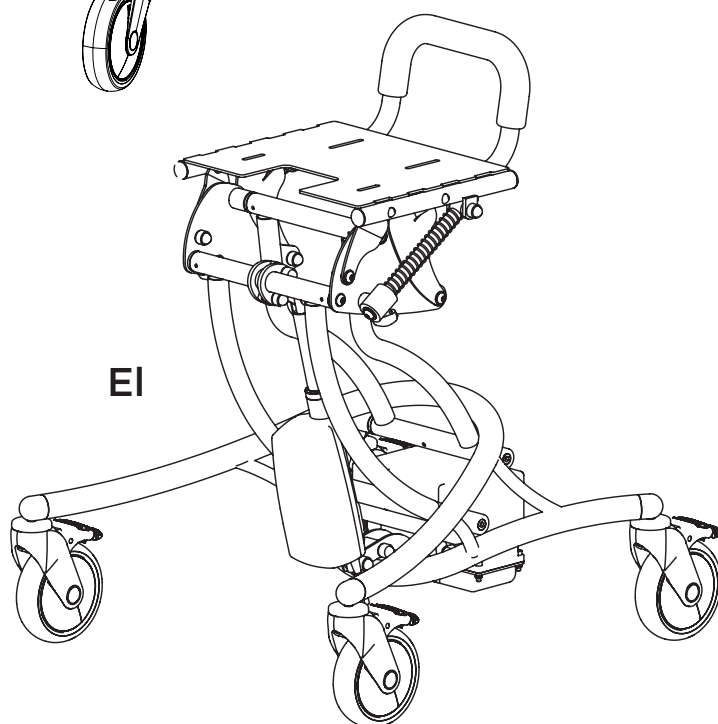


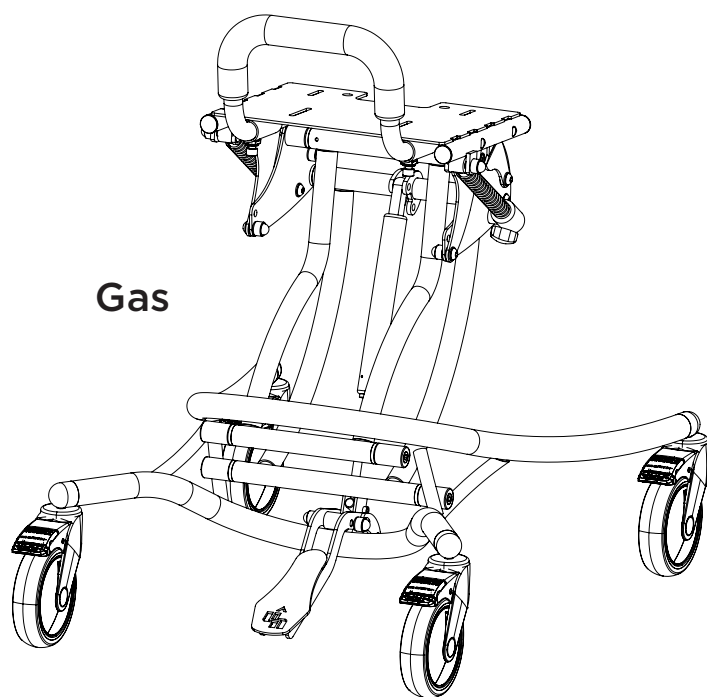

Bruksanvisning

Zitzi Flipper Pro

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter	3
Reglerbar sitthöjd – Gaskolv	4
Reglerbar sitthöjd – Ställdon	5
Laddning av batteri	6
Inkoppling av elektronikbox	6
Tiltningsfunktion	7
Körbågar	8
Parkeringsbroms och riktningsspärr	9
Montering av sittsystem	10
Fotstöd	11
Vadstöd	12
Fotlåda	13
Enkelstag	13
Från enkelstag till dubbelstag	14
Tekniska data	14
Borranvisningar för hel fotstödsplatta	15
Borranvisningar för delad fotstödsplatta	16
Underhåll & Skötselanvisning	17
Rekonditionsanvisning	17
Märkning	18
Garanti	18
Passande sittsystem	18
Demontering & Skrotning	18
Tekniska data	19

Säkerhetsföreskrifter

Inledning

För att ni ska kunna utnyttja Zitzi Flipper Pro till fullo är det viktigt att ni läser igenom denna bruksanvisning ordentligt. Detta gäller alla personer som finns i brukarens närhet. Produkten är avsedd för brukare med sittproblematik och passar många olika typer av diagnoser. Anpassning/inprovning av Zitzi Flipper Pro ska alltid utföras av medicinskt behörig person.

Om ni behöver kompletterande uppgifter är ni välkomna att kontakta Anatomic SITT AB.

Användningsområde

Produkten är avsedd att användas som ett underrede tillsammans med ett sittsystem producerade av Anatomic SITT AB. Om önskemål om annan användning finns, vänligen kontakta Anatomic SITT AB.

Korrespondens

Zitzi Flipper Pro med dess tillbehör är en CE-märkt produkt.

Du hittar serienumret på undersidan av sittplattan.

Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten.

Produkten är tillverkad av Anatomic SITT AB

Postadress	Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping
Besöksadress	Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
Fax	011-162005
E-post	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com
Instruktionsfilmer	youtube.com/anatomicsitt
Följ oss på	facebook.com/anatomicsitt



Kryssa i rutan vid eventuell specialanpassning av produkten.

CE-märkningen **upphör** att gälla vid specialanpassad produkt.



Plats för etikett

Reglerbar sitthöjd - Gaskolv

Sitthöjden är reglerbar mellan **23-61** cm.



Sitthöjden justeras enkelt med hjälp av fotpedalen.

Tänk på att alltid hålla en hand på sittsystemet vid justering.

- Aktivera gaskolven genom att trycka ned fotpedalen.
- Justera sittsystemet till önskad höjd.
- Släpp fotpedalen när du har nått önskad höjd. Höjden är nu låst.



OBS! Var uppmärksam på eventuell klämrisk.

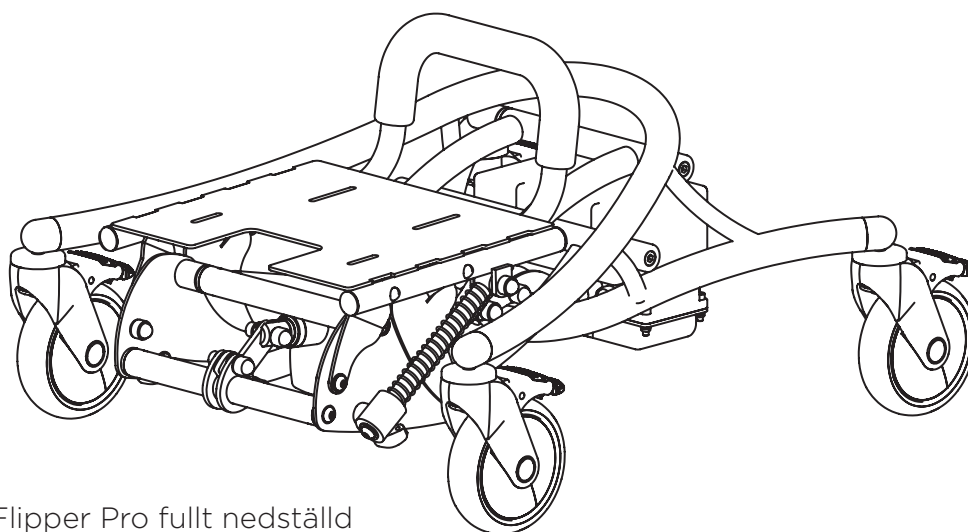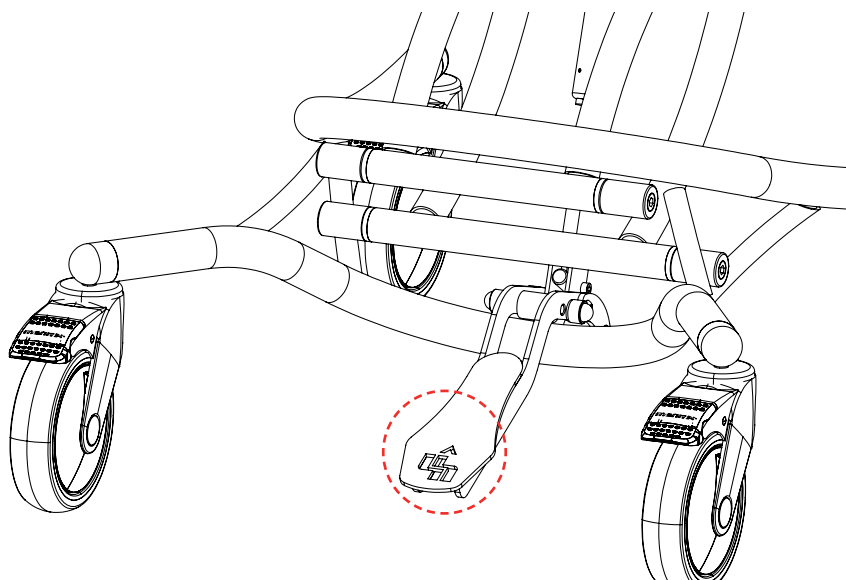

Zitzi Flipper Pro fullt nedställd

Reglerbar sitthöjd - Ställdon


Sitthöjden är reglerbar mellan 23-61 cm.

Sitthöjden justeras med en elektrisk handkontroll.


Tänk på att alltid hålla en hand på sittsystemet vid justering.



OBS! Var uppmärksam på eventuell klämrisk.

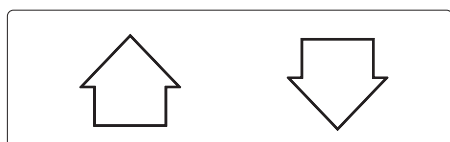

- Uppåtpil höjer sittplattan
- Nedåtpil sänker sittplattan

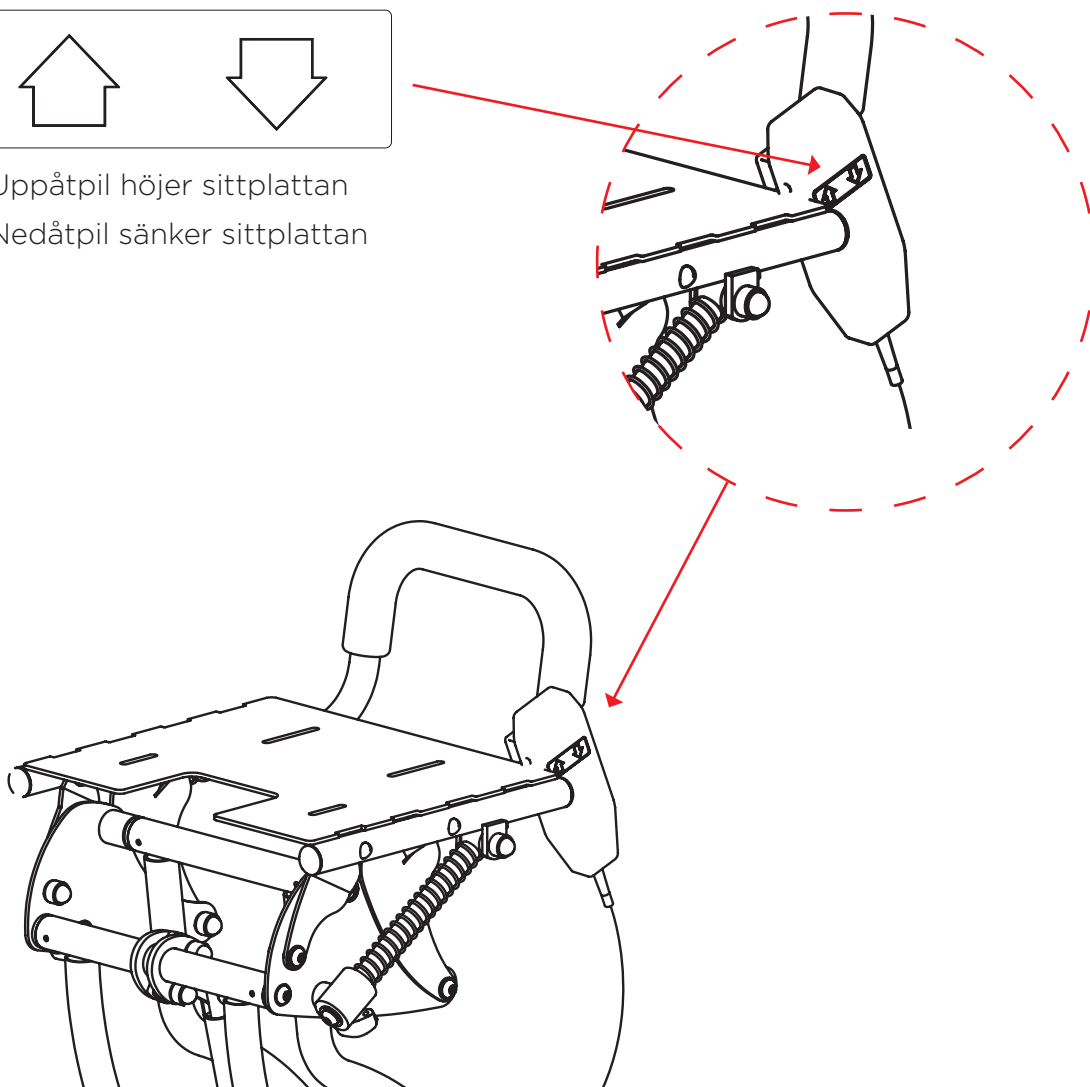


Laddning av batteri

Anslut laddarens strömkabel till ett vägguttag (220 V).

Anslut sedan laddarens kontakt till uttaget på sidan av handkontrollen. Första gången du laddar batteriet måste det ske i minst 24 timmar.

Det är mycket viktigt att batteriet aldrig laddas ur helt, eftersom att det då kan förstöras.

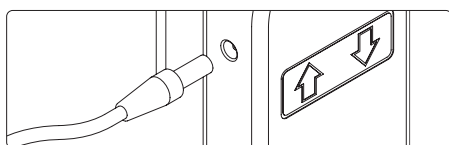

Kontakt för laddning sitter på sidan av handkontrollen.



Första laddningen skall vara i 24 timmar.
Laddning därefter rekommenderas ske varje natt.
Batteriet får aldrig laddas ur helt.

Inkoppling av elektronikbox

Vid inkoppling av elektronikboxen ska kontakten för lyftdonet kopplas till boxens kontakt märkt 1.

Vid tillval av elektronisk tiltfunktion måste elektronikboxen och den elektroniska handkontrollen bytas ut till en ny handkontroll och elektronikbox.

Tiltfunktionens ställdon kopplas då till boxens kontakt märkt 2.




HANDKONTROLL



STÄLLDON (TILT) tillval




STÄLLDON (LYFT)

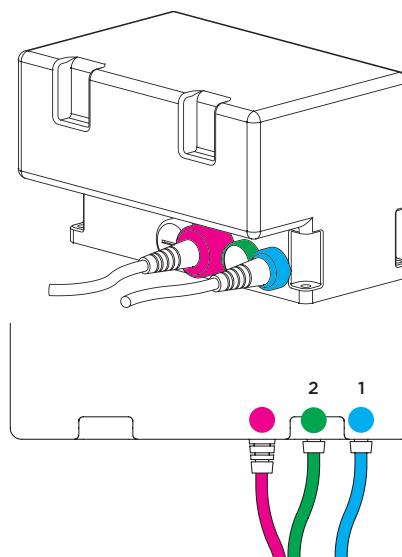

Tiltningsfunktion

Tiltningsfunktion

Flipper pro har två olika lägen för tilt vilket ställs in med hjälp av hål vid sidan om sittplattan. Om kolven fästs in i hålet längst ned (se bild) erhålls tilt på 0°-30°. Om kolven fästs in i hålet framför erhålls en tilt på -5° till 25°.

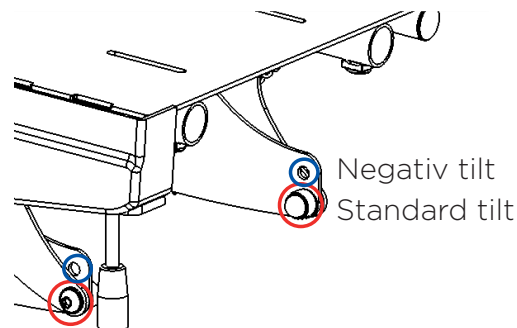


Tiltfunktion med gaskolv

Sittplattans vinkel kan justeras 30° genom att lossa fingervredet (A) och trycka handspaken (B) framåt för att sedan trycka sittplattan nedåt och framåt. Släpp handspaken (B) för att låsa önskad vinkel och dra sedan åt fingervredet (A) för att säkerställa att vinkeln är låst.



Notera! För att återställa sitsvinkeln till ursprungsläge, lossa fingervredet (A), tryck fram handspaken och dra sittplattan uppåt och bakåt genom att dra i körbygeln.

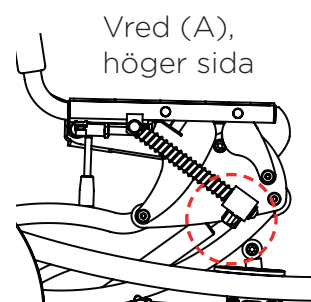

Vred (A),
höger sida

Fjäderretur

Fjädern på sidan om sittplattan hjälper till vid återställning av sittplattan till ursprungsläge.

Kontroll


Kontrollera alltid att tiltningen är låst när du uppnått önskad vinkel.

Låsning

Fingervreden (A) måste alltid låsas efter eventuell justering.



OBS! Var uppmärksam på eventuell klämrisk.

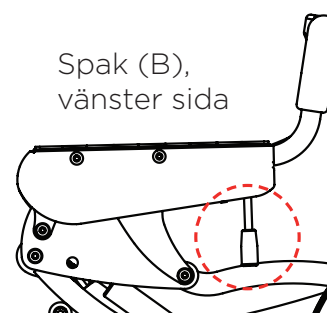

Spak (B),
vänster sida


Tiltfunktion med ställdon

Sittplattans vinkel är reglerbar mellan 0-30°. Justera tiltpositionen genom att lossa fingervredet (A) och håll ned tryckknapp (C) för framåttilt respektive tryckknapp (D) för bakåttilt. Släpp tryckknappen på handkontrollen när önskad tiltposition är uppnådd. Dra åt fingervredet (A) för att säkerställa att tiltpositionen är låst.



OBS! Det är mycket viktigt att fingervredet (A) lossas innan den elektriska tiltfunktionen används.



Ställdon

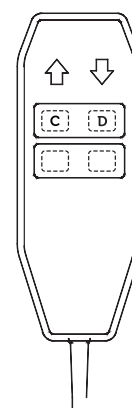

Körbågar


Montering av körbygel/körhandtag

För in körbygeln/körhandtaget i rörramen.
Dra åt skruvarna ordentligt efter montering.

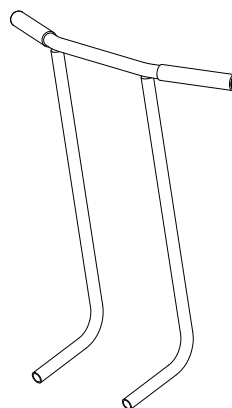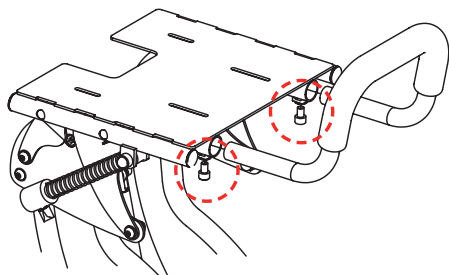




Montering av körbåge Zitzi frames

För in körbågen i rörramen.
Dra åt skruvarna ordentligt efter montering
(se bild ovan).

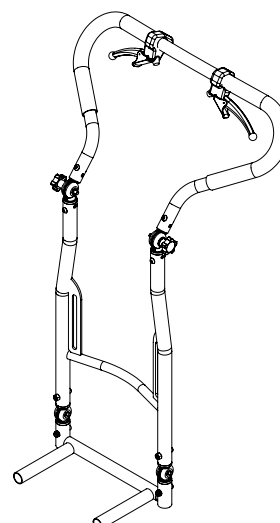

Montering av stora körbågen

Körbågen ska monteras mellan rörramen och bakre länkhjul.
Byt skruv till M10x45 och placera brickan mellan körbåge och ram.
Bygeln monteras på ramens övre rör.
Använd locktite vid återmontering av länkhjul.
Medföljande distanskuts används endast på Flipper Pro storlek 3.

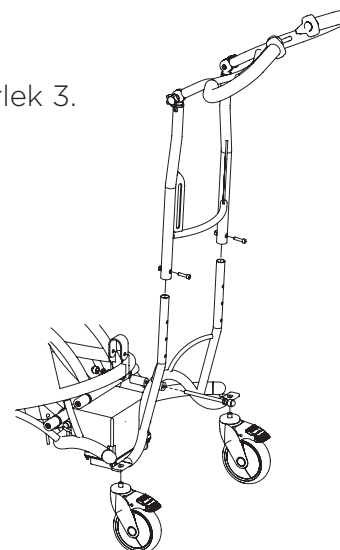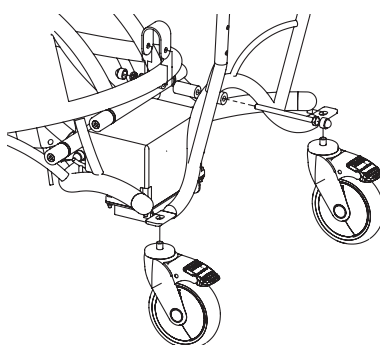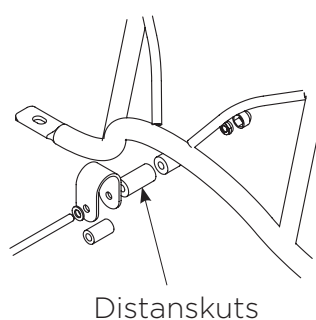

Parkeringsbroms och riktningspärr



Låsa och låsa upp parkeringsbromsen

För att låsa hjulen i aktuell position trampa på pedalens bakre kant. För att låsa upp hjulen igen, trampa på pedalens främre kant.


Vid aktivering av låsningen, låses både **hjulens rullfunktion samt hjulens riktning**.

Riktningsspärr

Riktningsspärr finns på det högra, bakre hjulet (OBS! Ingen broms på detta hjul). Du aktiverar riktningsspärren genom att trampa på pedalens bakre kant. När hjulet är riktat framåt kommer riktningsspärren börja fungera. För att lossa riktningsspärren, trampa på pedalens främre kant.

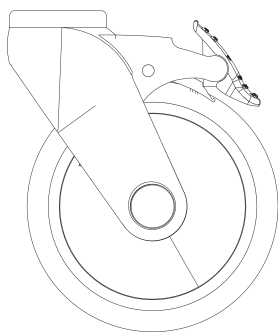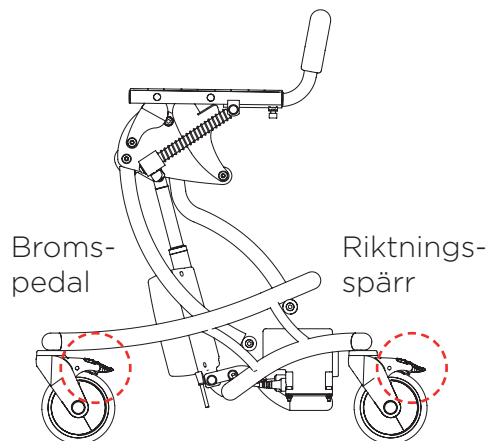

Låst broms el.
riktningsslås aktiverat.

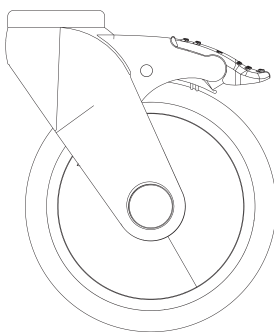

Öppen broms el.
riktningsslås avaktiverat.

Snabbguide

- **Låsa**
Lås hjulen genom att trampa på pedalens bakre kant
- **Låsa upp**
Frigör låsningen genom att trampa på pedalens främre kant

Montering av sittsystem


Sittsystemet monteras enkelt och säkert på underredet med hjälp av en fästplatta. Fästplattan är utrustad med 4 st bultar som gör att sittsystemet sitter på plats, samt ett vred undertill för att behålla sittsystemets position.

För i sittsystemet enligt bild. Tryck sedan sittsystemet bakåt tills det tar stop och att du hör ett klick.

Dra sedan åt vredet under sittplattan för att fastställa sittsystemets position.



OBS! Se till att spärren snäpper i ordentligt och att du dragit åt vredet!

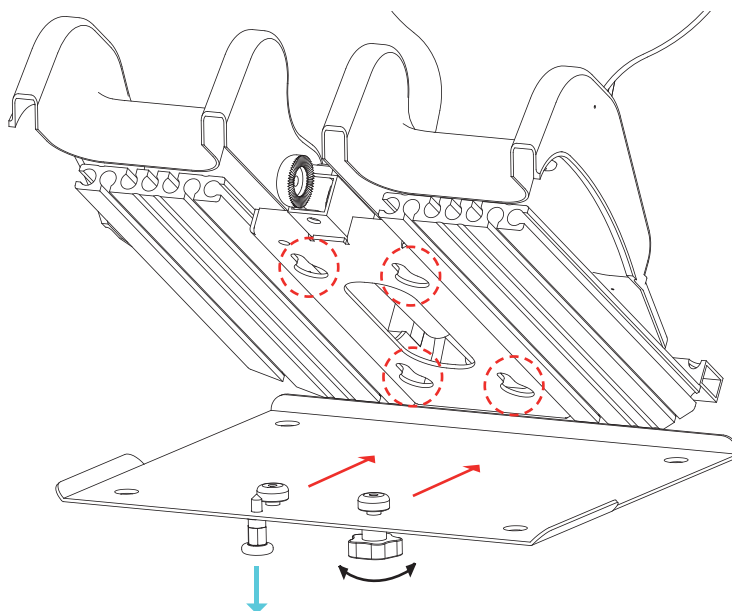

Hålbild



Dra nedåt för att öppna



Dragriktning



Vred

Fotstöd

Montering av fotstödsfäste - A


Montera profilen till fotstödsfästet under sittplattan med medföljande skruv i de försänkta hålen i framkant på sittplattan.

Justering av vinkel av knäled - B

Lossa vredet och justera sedan till önskad vinkel. Lås vredet när önskad vinkel är uppnådd.



OBS! Efter justering måste taggarna gå i varandra så det låser. Dra åt skruven hårt!

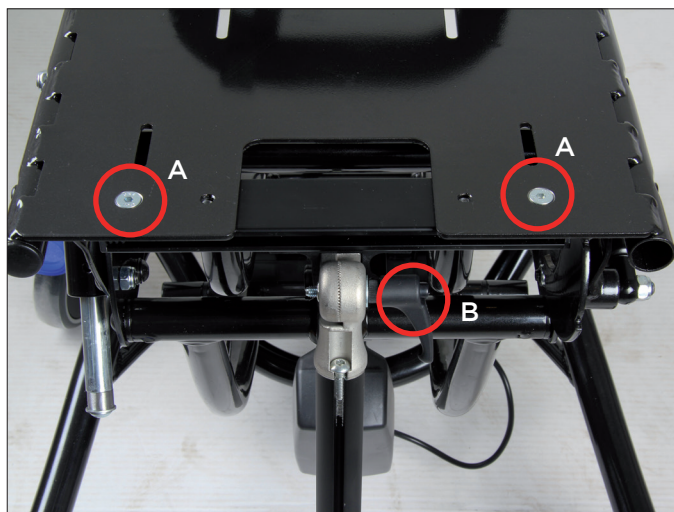

Justering av vinkel vid fotled - C


Lossa skruven och justera sedan till önskad vinkel.

Lås skruven när önskad vinkel är uppnådd.

Höjdjustering av hel fotplatta - D


Lossa vredet och justera sedan till önskad höjd.

Lås vredet när önskad höjd är uppnådd.

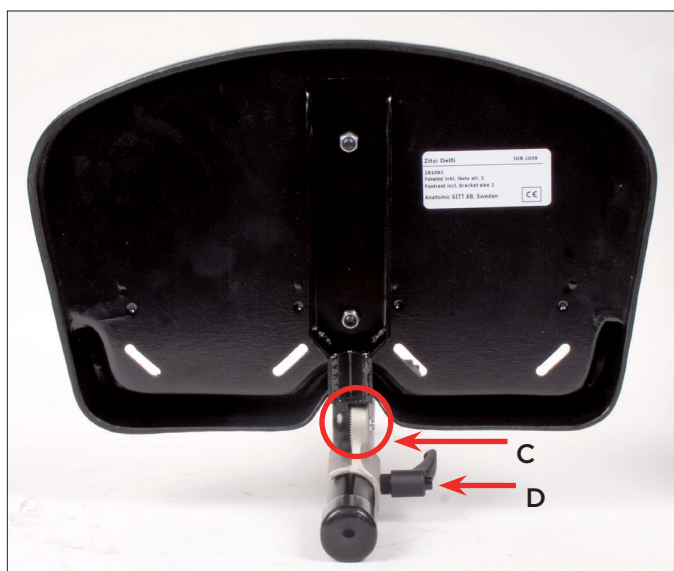

Höjdjustering av delad fotplatta - E

Lossa skruvarna och justera sedan till önskad höjd. Lås skruvarna när önskad höjd är uppnådd.

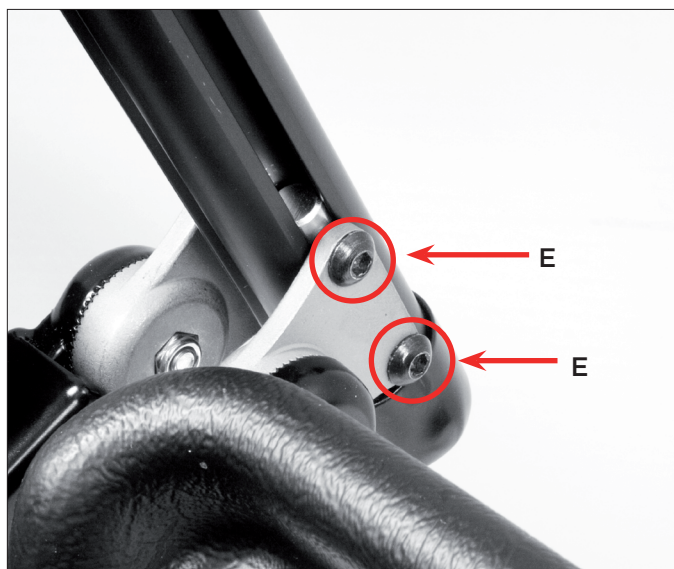


Vadstöd

Lossa på skruvarna A för att justera till önskad höjd och djup.

Dra åt skruvarna när önskad inställning är uppnådd.

Lossa skruvarna B för att justera bredden på vadstödsplattorna.

Dra åt skruvarna när önskad inställning är uppnådd.

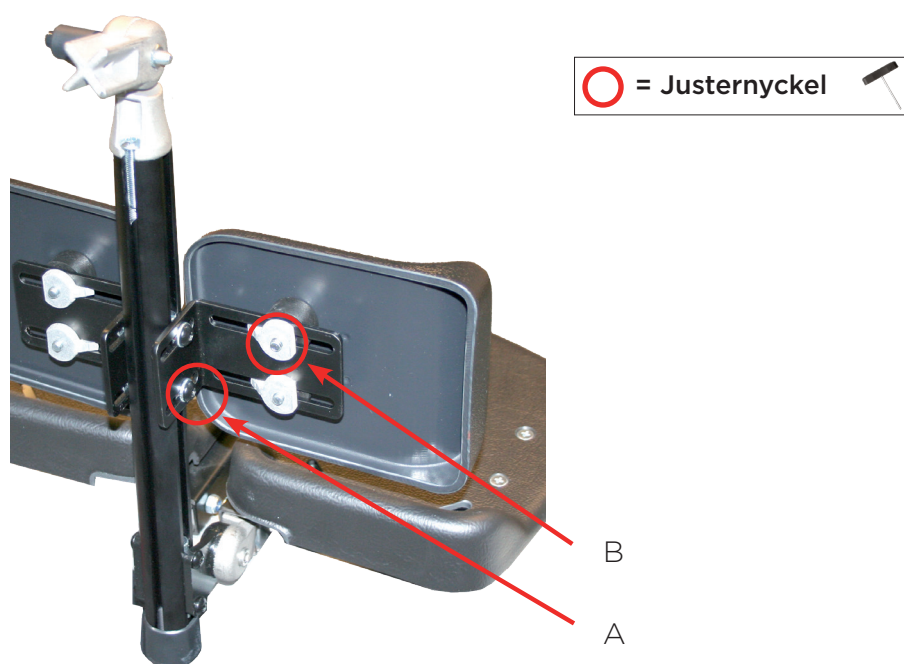

Fotlåda

Montering av fotlåda med enkelstag vid efterbeställning

Eftersom fotlådan är konstruerad på ett sådant sätt att den passar både enkelstag och dubbelstag behöver fotplattan borraras enligt instruktionerna på sida 15-16 beroende på vilken typ av fotplatta du har.


För att montera fotlådan börjar du med att skjuta in sargsprinten (A) på fotlådan (B) i fotstödsstaket (C). Ställ sedan in fotstödet (D) på önskad höjd och dra åt spakvredet (E).

Ställ in önskad höjd och bredd på fotlådan med hjälp av skruvarna (F) och (G). Plaststaket (H) på fotlådan ska föras igenom spåret (I) på fotstödsplattan. Avsluta med att montera medföljande polstring och kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

Montering av fotlåda med enkelstag vid beställning med fotstöd

För att montera fotlådan börjar du med att skjuta in sargsprinten (A) på fotlådan (B) i fotstödsstaket (C). Ställ sedan in fotstödet (D) på önskad höjd och dra åt spakvredet (E).

Ställ in önskad höjd och bredd på fotlådan med hjälp av skruvarna (F) och (G). Plaststaket (H) på fotlådan ska föras igenom spåret (I) på fotstödsplattan. Avsluta med att montera medföljande polstring och kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.


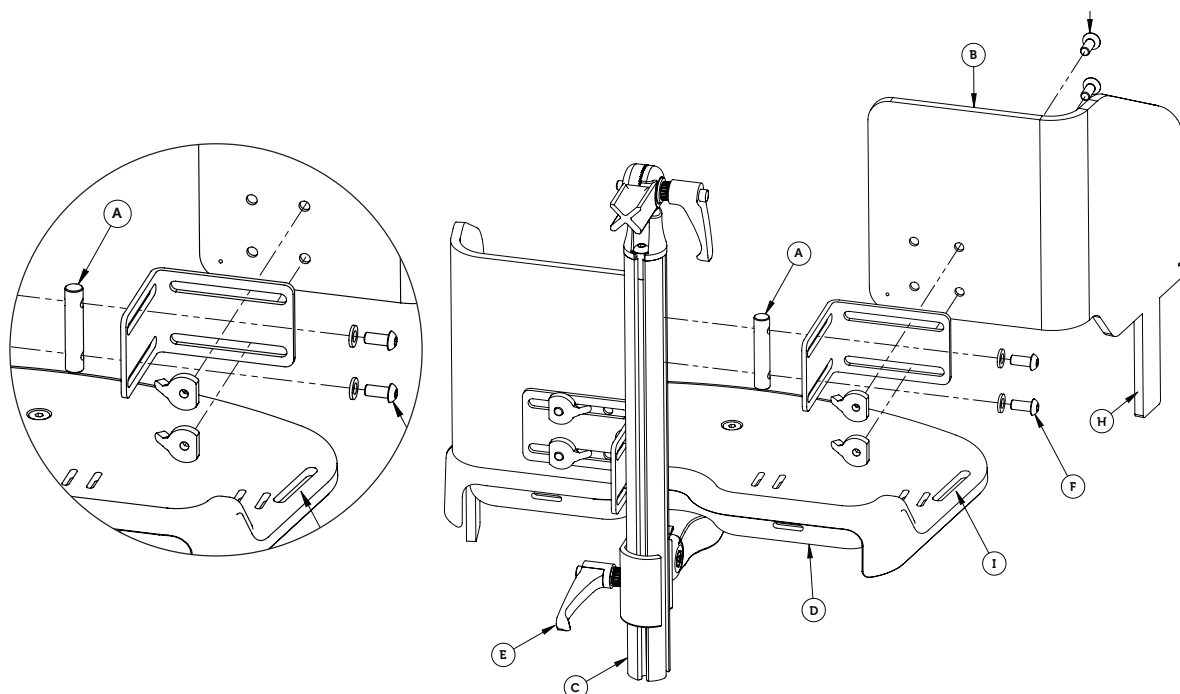


Plaststaket (H) kan efter injustering av önskad höjd kapas eller värmas in under fotstödsplattan enligt egna önskemål. Markeringar för borrhål finns markerat under fotplattan.


Från enkelstag till dubbelstag och vice versa

Som standard kommer fotlåda storlek 2, 3 och 4 förmonterade för dubbelstag och storlek 1 är förmonterad för enkelstag.

För att ändra mellan de olika varianterna vänder du vinkelblecket (A) 180 grader och byter sedan sida på sargsprinten (B).

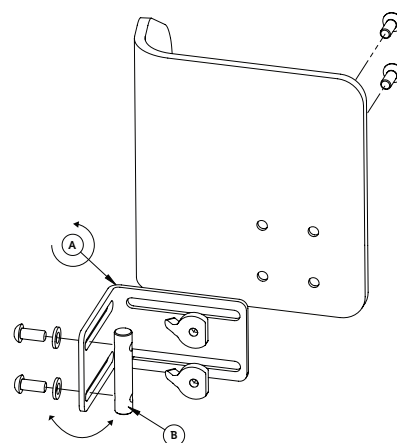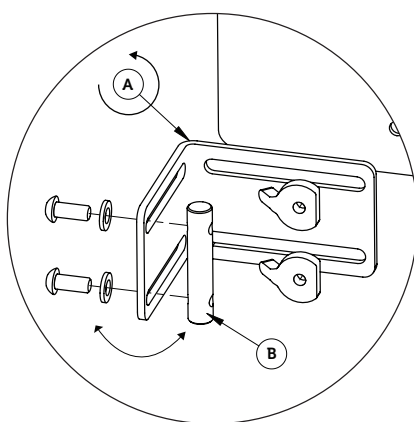


Tekniska data för hel respektive delad fotplatta

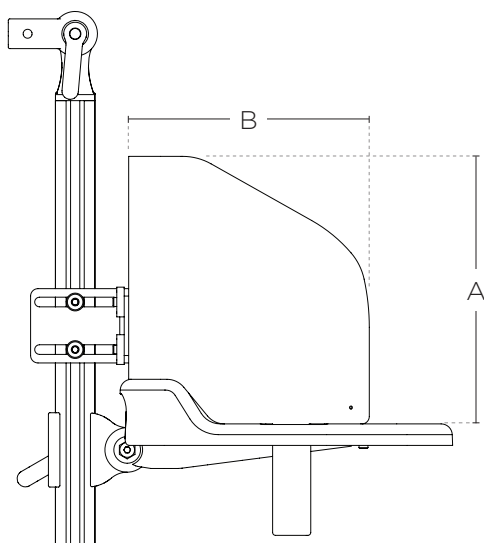

Fotplatta		Storlek	Höjd (A)	Djup (B)
Hel / Delad				
990041 / 990046		1	140 mm	130 mm
990042 / 990047		2	170 mm	160 mm
990043 / 990048		3	205 mm	190 mm
990044 / 990049		4	235 mm	240 mm

Borranvisningar för hel fotstödsplatta


Storlek 1

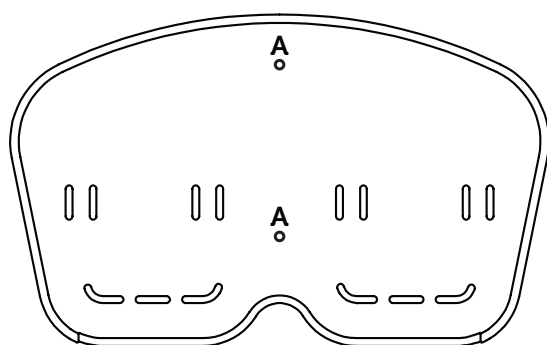

(A)

Delfi Pro & Anatomic Sits
enkelstag

Storlek 2

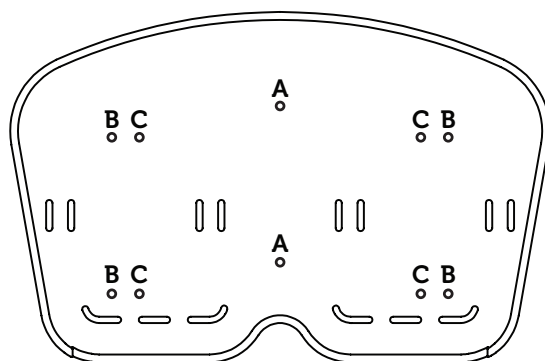

(A)

Delfi Pro & Anatomic
Sits enkelstag


(B)

Seabass Pro
dubbelstag

(C)

Clozitt
dubbelstag

Storlek 3

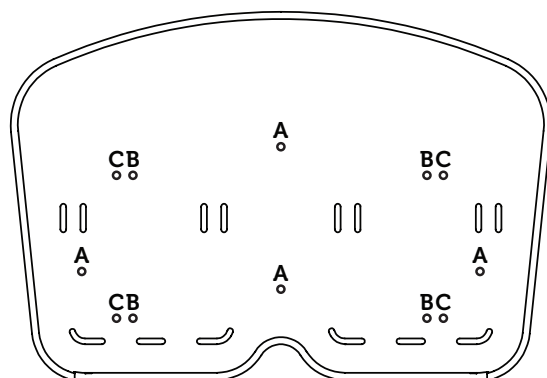

(A)

Delfi Pro & Anatomic
Sits enkelstag


(B)

Seabass Pro
dubbelstag

(C)

Anatomic Sits & Clozitt
dubbelstag

Storlek 4

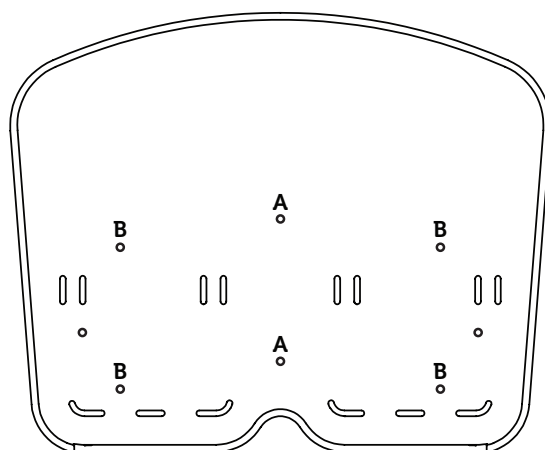

(A)


Anatomic Sits
enkelstag

(B)

Anatomic Sits
dubbelstag

Borranvisningar för delad fotstödsplatta

Storlek 1

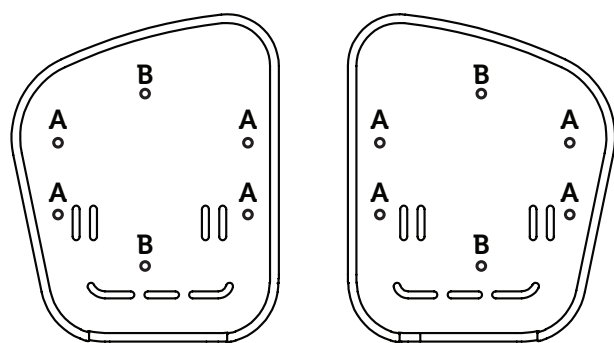


(A)

Delfi Pro & Anatomic Sits
enkelstag

(B)

Anatomic Sits
dubbelstag

Storlek 2

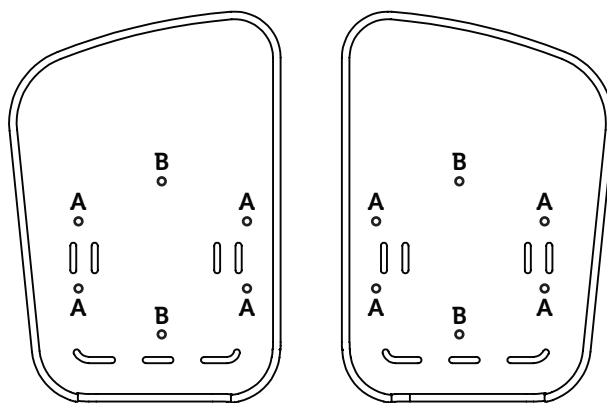


(A)

Delfi Pro & Anatomic Sits
enkelstag

(B)

Seabass Pro, Clozitt,
Anatomic Sits & Sharky Pro
dubbelstag

Storlek 3

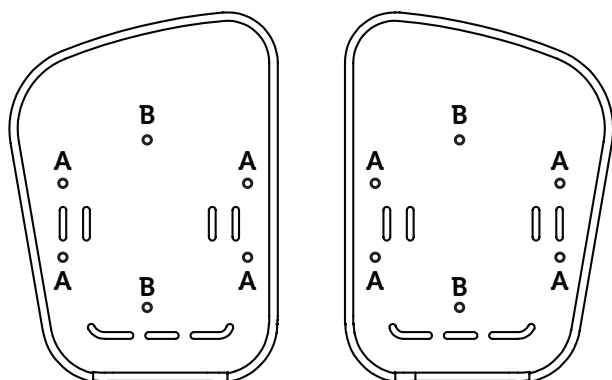


(A)

Delfi Pro & Anatomic Sits
enkelstag

(B)

Seabass Pro, Clozitt
& Anatomic Sits dub-
belstag

Storlek 4

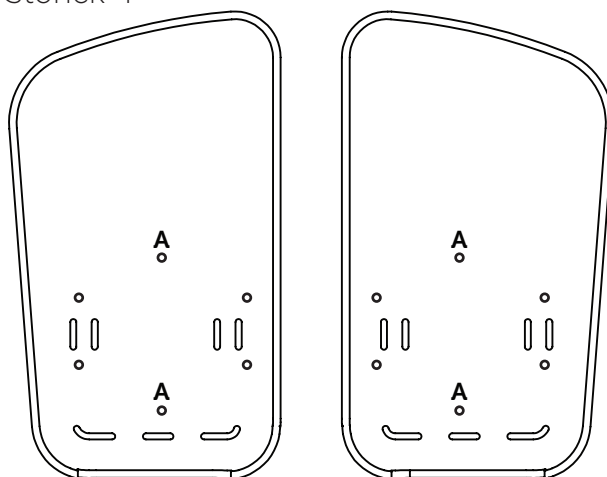

(A)

Anatomic Sits
dubbelstag

Underhåll & Skötselanvisning

Rengöring av chassit

Rengör chassit regelbundet med bilschampo eller liknande. Vid kraftig nedsmutsning kan avfettningsmedel användas. Akta alla elektriska detaljer och använd inte medel som tar bort smörjfett. Tänk grönt, tänk på miljön! Använd gärna biologiskt nedbrytbart avfettningsmedel.

Batteriskötsel



Första laddningen måste vara i 24 timmar.
Laddning därefter rekommenderas ske varje natt.
Batteriet får aldrig laddas ur helt, vilket kan innebära att batteriet slutar att fungera.

Rekonditioneringsanvisning

Kontroll

Kontrollera alla rörliga delar med avseende på slitage. Byt vid behov. Kontrollera regelbundet allmän kondition på underredet samt att alla skruvar är åtdragna ordentligt. Kontakta oss om du är osäker!

Gaskolv



Viktigt! Gaskolven bör användas regelbundet för att bibehålla sin funktion. Då produkten inte används måste gaskolven aktiveras minst en gång var 6:e månad. Dessutom bör de lagras på så sätt att kolvstången placeras riktad nedåt. Annars kan gaskolvens tätning gå sönder och gaskolven sluta fungera.

EI

Elektroniken är IP klassad: IPX0. Detta innebär att den bara får göras ren med fuktad trasa.

Reservdelar

Zitzi Flipper Pro får endast förses med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB.

Märkning

Underredet är märkt med ett unikt serienummer som ska anges vid all korrespondens gällande produkten.

Du hittar serienumret på undersidan av sittplattan.



Garanti

Garanti Underrede	Garanti Lack	Garanti Hjul
24	12	12
24 månaders garanti mot fabrikationsfel	12 månaders garanti mot fabrikationsfel	12 månaders garanti mot fabrikationsfel

Passande sittsystem

Produkten passar till sittsystem Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky Pro & Anatomic SITS. För övriga kombinationer vänligen kontakta Anatomic SITT på telefon 011-161800 eller via e-post info@anatomicsitt.com.

Demontering & Skrotning

Plast

Hjul, vred, låsanordning för hjul

Metall


Ram, gaskolv, ställdon, skruvar och stag

Brännbart

Polstring

Tekniska data

Vid brukarvikt över 40 kg ska underredet med el användas.

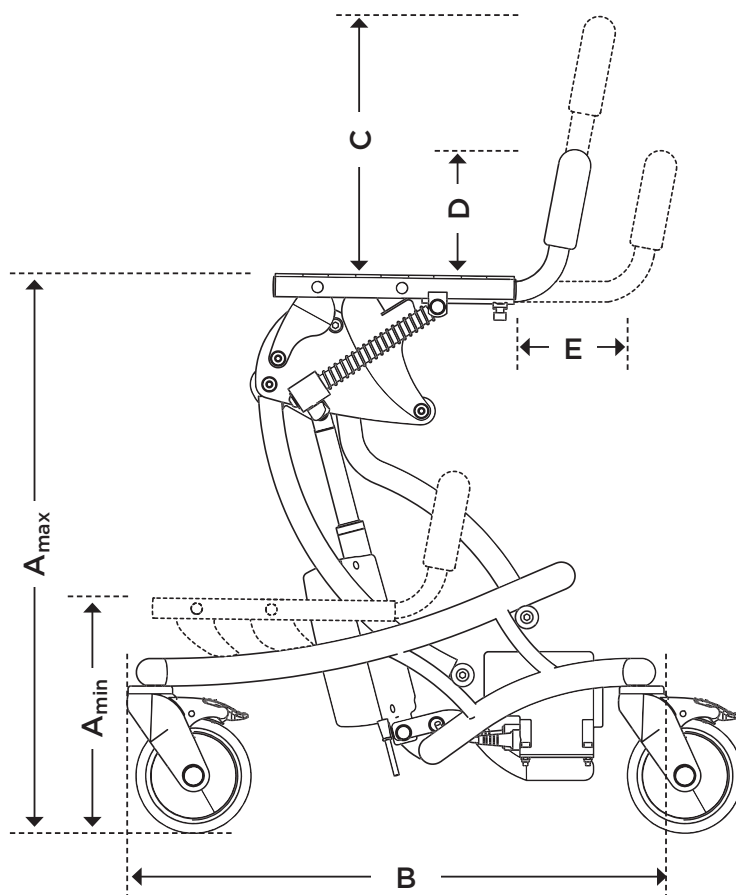

Mått med 125 mm hjul

Storlek	Sittplatta	Belastningsvikt	Bredd	Vikt Manuell	Vikt Elektrisk	Tilt	A (min-max)	B	C	D	E
Storlek 1	32x23 cm	Max 35 kg	58 cm	17 kg	20 kg	0° till 30° -5° till 25°	21-60 cm*	53 cm	35 cm**	13 cm**	7 cm
Storlek 2	32x26 cm	Max 50 kg	58 cm	18 kg	21 kg	0° till 30° -5° till 25°	21-60 cm*	60 cm	35 cm**	13 cm**	7 cm
Storlek 3	32x26 cm	Max 75 kg	58 cm	19 kg	22 kg	0° till 30° -5° till 25°	21-60 cm*	70 cm	35 cm**	13 cm**	7 cm
Storlek 4	35x34 cm	Max. 135 kg	58 cm	--	26 kg		36-71 cm*	80 cm	35 cm**	13 cm**	7 cm

* Anger lägsta och högsta sitthöjd.

** Körbygel är EJ justerbar i höjd. Anger höjd på Körbygel stl. 1 respektive Körbygel stl. 2

SE

Anatomic SITT AB (tillverkare)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden
Tel +46 11 16 18 00
Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark
Tel +45 86 17 01 74
Fax +45 86 17 01 75

FI

Rehaco OY

Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland
Tel: +35 840 775 22 88

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands
Tel +31 344 63 45 40
Fax +31 344 62 33 61

World wide

anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com
facebook.com/anatomicsitt
youtube.com/anatomicsitt

