



BRUKSANVISNING

VARILITE® Reflex



Innehållsförteckning

Symbolförteckning	2
Tillverkare och återförsäljare	2
Introduktion	3
Avsedda ändamål	3
Brukar- och dynvikter	3
Produktmärkning	4
Säkerhetsföreskrifter	5
Att placera dynan rätt	6
Användning och skötsel av dynan.....	7
Monteringsanvisning	8
När du inte använder dynan	8
Rengöring och tvättråd.....	9
Rekonditionering	9
Checklista vid punktering	10
Återvinning och materialspecifikation	11
Garanti.....	11
Brandtest.....	11



Tillverkare Cascade Design Limited,
Dwyer Road Midleton Co. Cork, Republic of Ireland
Telefon +353-214-632-399





Denna bruksanvisningen avser VARILITE dynor med utvalda tillbehör.
För fullständig översikt av tillbehör se produktens beställningsunderlag.

Symbolförteckning



Denna symbol återfinns i bruksanvisningen och uppmärksammar tillsammans med text, moment där brukarens eller hjälparens säkerhet kan äventyras.



Symbolen indikerar anvisningar och tips som underlättar vid användning av produkten.



Läs alltid bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

Tillverkare och Återförsäljare

Tillverkare av produkten är Cascade Design Limited

Dwyer Road Midleton Co. Cork, Republic of Ireland
Telefon +353-214-632-399

Återförsäljare för produkten är Anatomic SITT i Norrköping AB

Postadress	Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping
Besöksadress	Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-post	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com
Instruktionsfilmer	youtube.com/anatomicsitt
Följ oss på	facebook.com/anatomicsitt

Introduktion

Grattis till köpet, vi hoppas du kommer få stor användning av din sittdyna. För att du ska kunna utnyttja den till fullo är det viktigt att du läser igenom denna bruksanvisning. Detta gäller alla personer som finns i brukarens närhet. När du byter sittdyna kan det vara nödvändigt att konsultera en terapeut eller annan medicinskt behörig person för att göra mindre justeringar på din rullstol. Om du behöver kompletterande uppgifter är du välkommen att kontakta din leverantör eller Anatomic SITT AB.

Dynan är en CE-märkt produkt.

Ett unikt serienummer är placerat på en etikett som sitter på dynans originalkartong samt medföljande registreringskort. Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten.

Avsedda ändamål

Produkten är ett hjälpmedel avsett att sitta på för personer som har behov av tryckfördelning eller korrigerings. VARILITE dynorna är avsedda för användning i de på marknaden förekommande rullstolarna samt sittsystemen. VARILITE dynorna får endast kombineras ihop med VARILITES egna tillbehör och reservdelar. För övriga kombinationer, kontakta Anatomic SITT AB.

Dynan är en flergångsprodukt med en uppskattad livslängd på ca 5 år. Livslängden är beroende på slitage, skötsel och hur ofta dynan används. Kombinationen av luft och skum ger dynan en mycket lång livslängd.

Brukar- och dynvikter

Max brukarvikt är beroende av dynans storlek och varierar från 100 kg upp till 300 kg. Max brukarvikt är tryckt på innerdynan (se kapitlet Produktmärkning). Praktiskt så kan man inte överstiga max brukarvikt om man valt rätt storlek på dynan till användaren. Dynans vikt är beroende av dynans storlek.

Dyna	Brukarvikt	Dynans vikt
Varilite Reflex	< 300 kg	0.5 - 1.2 kg

Produktmärkning



Etikett med serienr. mm.




Märket FRONT (framåt)
visar dynans framkant.



Max brukarvikt

Trycket FRONT (framåt)
visar innerdynans framkant.

Märket BACK är insytt i
överdragets bakkant.

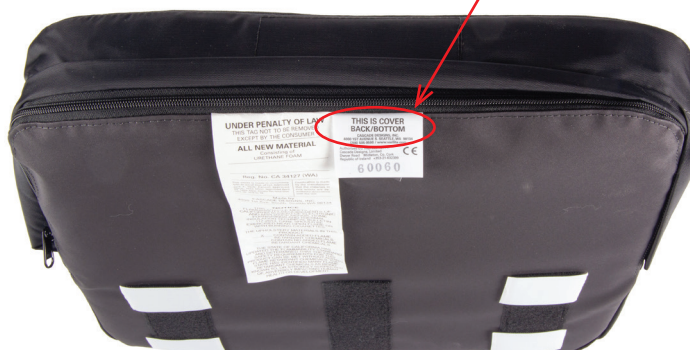

Säkerhetsföreskrifter

Utbildning och kvalifikationer

- Anpassning/inprovning av dynan ska alltid utföras av medicinskt behörig person.
- Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid utföra en riskanalys innan användning. Om denna analys visar att det kan finnas risk för allvarlig personskada får brukaren aldrig lämnas utan tillsyn när hjälpmedlet används.
- Den som förskriver hjälpmedlet är ansvarig för att brukaren och andra i närmiljön får de instruktioner som behövs för ett riskfritt användande och för att säkerställa att inga incidenter och komplikationer uppstår.

Varningar/Försiktighetsåtgärder



Funktionskontrollera alltid hjälpmedlet innan brukaren börjar använda det.



Kontrollering av huden bör göras regelbundet för att övervaka eventuell hudrodnad, särskilt runt sittbensknölar. Kontakta din läkare omedelbart om ihållande rodnad noteras för att undvika trycksår.



Använd inte dynan om skummet på insidan av överdraget är skrynkligt eller vikt. Detta kan skapa en tryckpunkt som kan orsaka ett trycksår. Var försiktig med överdraget så att du inte skrynklar eller viker skummet under transport. Byt överdraget om skummet är skrynkligt eller vikt.



Utsätt aldrig din sittdyna för vassa föremål.



Förvara aldrig din sittdyna i extrem värme eller direkt solljus under en längre tid.

Godkända kombinationer

VARILITE dynorna är avsedda för användning i de på marknaden förekommande rullstolarna samt sittsystemen. VARILITE dynorna får endast kombineras ihop med VARILITES egna tillbehör och reservdelar enligt beställningsunderlaget.

För övriga kombinationer, kontakta Anatomic SITT AB.

Risikanalys

Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid utföra en riskanalys innan användning. Om denna analys visar att det kan finnas risk för allvarlig personskada får brukaren aldrig lämnas utan tillsyn när hjälpmedlet används.

Avvikelser/tillbud

Vid funktionsfel kontakta hjälpmedelscentral eller Anatomic Sitt.

Om ett allvarligt tillbud uppstår bör det rapporteras till Anatomic Sitt AB och landets behöriga myndighet.

Att placera dynan rätt

- Reflex-dynan har innerdyna som är märkt med "FRONT" (framåt) för enkel placering. Överdraget har en insydd lapp mitt bak vid dragkedjan som har texten BACK (bakåt). Handtaget på överdraget ska alltid placeras framåt.
- Tänk på att eventuell kil i dynan hamnar underst.
- Placera dynan på ett plant och tillräckligt stort underlag så dynan inte blir deformationerad eller vikt.
- Dynan har kardborreremmar insydda i överdragets undersida för att fixera dynan på underlaget (rullstolssitsen). Dra loss de vita skyddspappren till de självhäftande kardborreremmarerna innan dynan placeras på rätt plats i rullstolen.



Användning och skötsel av din sittdyna

Reflex är Varilites första sittdyna med inbyggd automatventil vilket gör den ännu enklare att använda. I bakkant på innerdynan finns ett lufthål som alltid ska vara öppet vid användning. Det röda pluggen som medföljer ska användas till att försluta lufthålet vid t.ex. rengöring.


Reflexdynan justerar själv in sig efter användaren och återfyller sig automatiskt när den inte används. Dynan har en inbyggd ventil som automatiskt släpper ut rätt mängd luft när brukaren sätter sig på dynan. Den formar sig efter brukaren och brukarens vikt fördelas ut över hela dynans yta.

När dynan inte längre belastas återfyller den sig automatiskt med luft igen.

Sitta på dynan

1. Lägg dynan på rullstolen, helt uppblåst.
2. Sätt dig på dynan enligt rekommenderad sittställning.
3. Du kommer sjunka ner ca 5 cm tills dynan justerat sig.

Rekommenderad sittställning

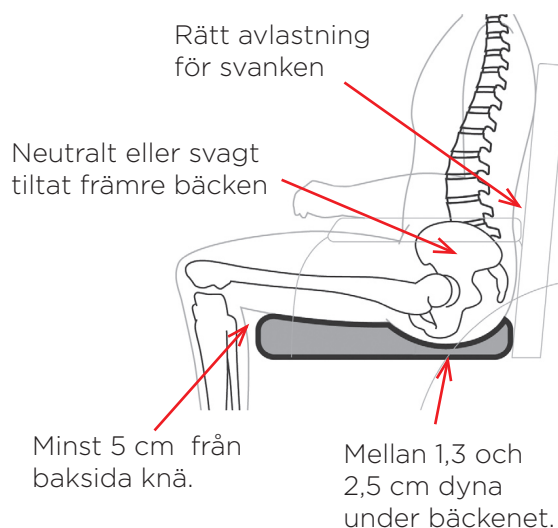

Innerdynan och dess överdrag ska alltid användas tillsammans. Överdraget är en väsentlig del av sittdynan genom att bidra till tryckfördelning och främja luftcirkulationen för friska vävnader. Överdraget skyddar dessutom innerdynan från punktering, brännskador och smuts.

Du bör kontrollera din sittdyna dagligen för att säkerställa att sittdynan inte punkterats och att automatventilen fungerar.

Kontakta din leverantör och du misstänker att dynan blivit skadad eller inte fungerar som den ska.

Monteringsanvisning

Tänk på följande efter isärtagning vid exempelvis tvätt:

Som hjälp vid ihopsättning är innerdynan märkt med FRONT (framåt).

Överdraget är framtill märkt FRONT (framåt) och en insydd lapp mitt bak vid dragkedjan har texten BACK (bakåt).

Tänk på att den röda pluggen **inte** ska sitta i dynan vid normal användning.



När du inte använder dynan

Låt dynan ligga fritt utan belastning när du ej använder den så den automatiskt kan återfylla sig för att skummet i dynan ska bibehålla optimal prestanda.

Rengöring och tvättråd

När dynan behöver tvättas/rengöras, ta ur innerdynan ur överdraget genom att öppna dragkedjan. Sätt i den röda pluggen i lufthålet så inte något vatten kan komma in i innerdynan.



Innerdynan torkas av med en fuktig trasa (vid behov med ett mildt tvättmedel). Lufttorkas eller i torkskåp på låg temperatur.

Överdraget kan maskintvättas i max 60° C. Det kan torkas i torkskåp eller torktumlas på låg värme. Torkar bäst hängande.

Övriga tillbehör

Wavebaser och kilar kan rengöras med tvål och vatten. Lufttorkas. Planskivor av trä får endast torkas av med en fuktig trasa.

Rekonditionering

Vid rekonditionering, torka noga av dynan med ytdesinfektionsmedel för att sterilisera dynan och förhindra smittspridning. Vid behov kan innerdynan tvättas i autoklav (utan vakuum) i 60° C max 30 minuter (korttidsprogram). OBS! Sätt i den röda pluggen i lufthålet så inte något vatten kan komma in i innerdynan.

Lufttorkas eller i torkskåp på låg temperatur.

Överdraget maskintvättas i max 60° C. Det kan torkas i torkskåp eller torktumlas på låg värme. Torkar bäst hängande.

Övriga tillbehör


Wave baser och kilar kan rengöras med tvål och vatten eller tvättas i autoklav i 60°C max 30 minuter. Lufttorkas. Planskivor av trä får endast torkas av med en fuktig trasa.

Checklista vid punktering

Börja med dynan helt uppfylld. Ta bort överdraget. Inspektera dynan efter tecken på punktering. Ser du synliga tecken på det kontakta din leverantör eller Anatomic SITT AB.

Finns inga synliga fel på dynan bör du genomföra följande test:

1. Fyll ett badkar eller större ho med vatten
2. Börja med kudden helt luftfylld
3. Ta bort överdraget
- 4. Sätt i den röda pluggen i den runda öppningen på baksidan av dynan så att inte vatten kan komma in i dynan.**
5. Lägg dynan under vattnet.
6. Om dynan är punkterad bör du kunna se små luftbubblor från den skadade delen.
7. Kontakta din leverantör eller Anatomic SITT AB

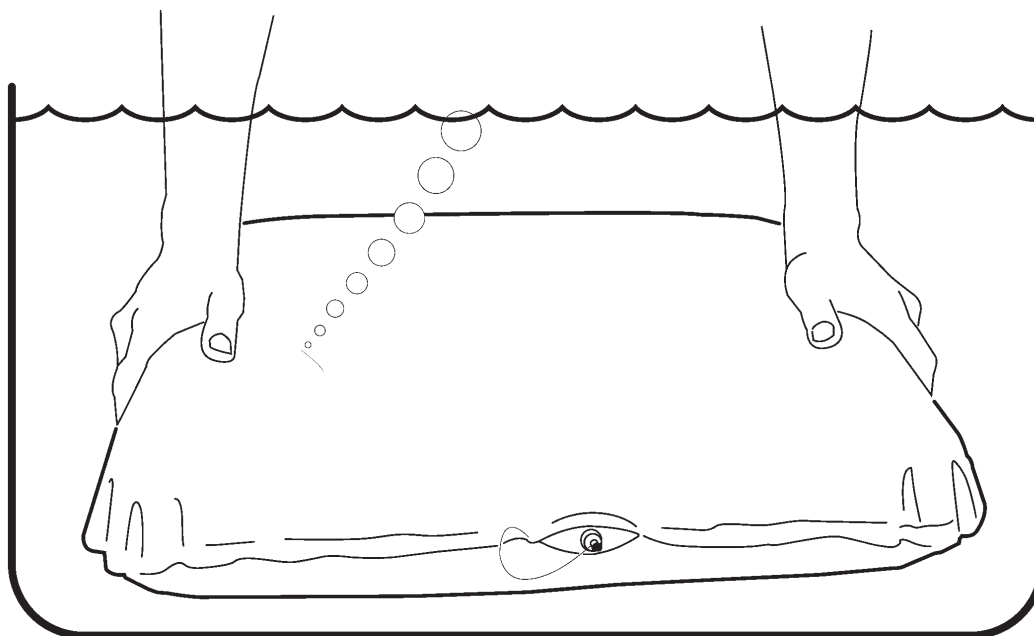

Återvinning & materialspecifikation

Vid kassation/återvinning ska dynan delas upp och sorteras enligt nedan:

Innerdyna	Kallskum med öppna celler samt vinyl är brännbart
Överdrag	Polyester, nylon samt filterskumplast är brännbart

Garanti

Dynan och överdraget har garanti mot fabrikationsfel gällande två år från leveransdatum. Vid tveksamheter eller frågor gällande ditt Varilitesystem är du välkommen att kontakta din leverantör eller Anatomic SITT AB.

Kontaktuppgifter finner du på sista sidan. Det går även bra att skicka e-post.

OBS! Medföljande registreringskort skall sparas.

Brandtest

Brandtestad och godkänd enligt standard ISO 7176-16; ISO 8191-1

SE

Anatomic SITT AB (Återförsäljare)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 (0)11 161800

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

