

Varilite sittdynor

Tryckavlastande dynor med en
kombination av luft och skum



VARILITE®




• Reflex • Zoid • Evolution • Meridian • Proform



Varilite

Varilite sittdynor är en unik serie sittdynor som anpassar sig till brukaren genom en kombination av luft och skum.

Komfort, tryckavlastning och stabilitet är viktiga egenskaper för god hälsa hos personer som sitter i rullstol. Sittdynan är avgörande för att uppnå ett effektivt posturalt stöd för såväl arbete, lek och fritid.

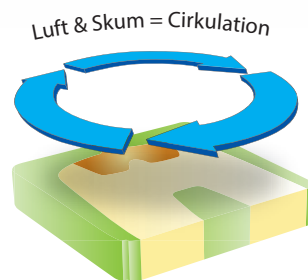

Varilite sittdynor ger dig flera fördelar:

- Dynorna har mycket goda tryckavlastande egenskaper vilket ger en hög komfort och minskar risken för sittersår.
- Konstruktionen med skum och luft dämpar även effektivt stötar, vibrationer och skjuvningskrafter.
- Med den inbyggda luftventilen ställs dynan lätt in efter varje användare.
- Kombinationen av olika hårdheter på skummet i dynorna ökar stabiliteten och förbättrar positioneringen.
- Varilites dynor anpassar sig till den enskilde individen varje gång man sätter sig.
- Dynorna går enkelt att anpassa till vänsterhänta. De har inga lösa delar utan allt ligger i övedraget.
- Skummet i dynorna har samma goda egenskaper oberoende av omgivande temperatur (sommar/vinter).
- Dynorna har en låg vikt och en låg sitthöjd i belastat läge.
- När dynorna avlastas och luftventilen öppnas återgår skummet till sin ursprungliga form vilket gör att skummet behåller sin spänst och egenskaper under en lång tid.
- För ökad positionering finns passande kilar (wavebasar).

Så fungerar det ...

1. Kärna av skum

Dynan består av olika typer av skum;

- **Mjukt skum** i sittgropen för det tryckkänsliga området runt sittbenen, tryckavlastar och positionerar.
- **Mediumhårt skum** ger tryckfördelning och positionering av bäcken och lår.
- **Hårdare skum** runt om dynan samt som grendelare ger stöd och positionering.

Användare som har nedsatt balans eller som ofta gör överflyttningar får en viktig stabilitet av dynan. Dynornas skum är innesluten av ett vatten- och lufttätt stretchmaterial.

2. Ventilen justerar luftmängden

Alla dynor utom Reflex använder sig av Varilites tvåvägsventil. Brukaren sätter sig på en fullt luftfylld dyna och öppnar sedan ventilen för att släppa ut luft ur hela sittdelen. Brukaren sjunker ner i dynan och positioneras och ventilen stängs när korrekt stöd uppnåtts. Innerdynan är vändbar, om man önskar ventilen på vänstersidan.

3. Överdrag



Alla dynor utom Reflex går att få med både luftöverdrag eller inkontinensöverdrag. Överdragen är tillverkade av ett stretchmaterial med ett nätliknande tunt skum på insidan. Materialet ger extra tryckfördelning och en viss luftcirkulation som håller dynan svalare. Undersidan är tillverkad i ett antiglidmaterial. Överdragen uppfyller ISO-standard 7176-16* och är tvättbara i maskin.

4. Kil

Anpassningsbar kil ingår som standard för Evolution och Proform. Den avlastar på ett enkelt och bra sätt sittbenen genom att lägga mer belastning på låren och skapa en större sittgrop. Kilen motverkar även skjuvningskrafter.

Testvinnare

Oberoende studier har visat att Varilites teknik med luft och skum gör Evolution till testvinnande dyna när det kommer till att dämpa stötar och vibrationer (RESNA 2000)

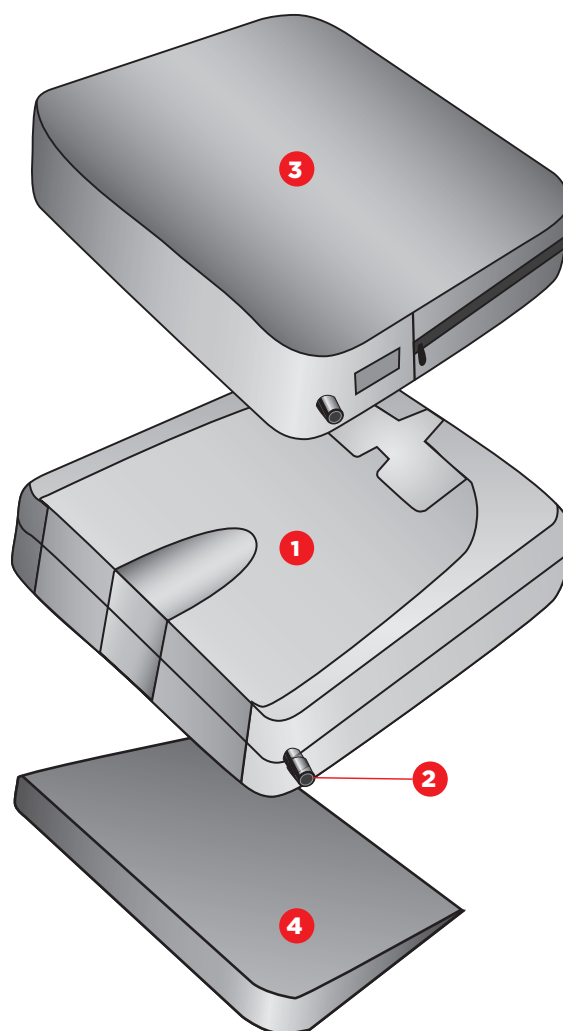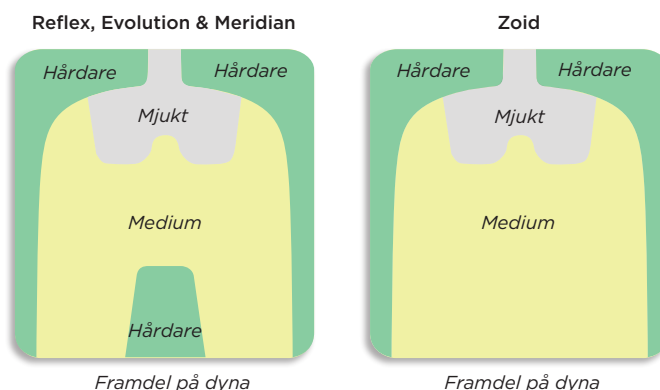

*Överdraget uppfyller ISO-standard 7176-16 gällande användning av stoppade rullstolskomponenter och är testade enligt ISO 8191-1 och ISO 8191-2 (motsvarande EN 1021-1 och EN 1021-2 enligt SP-utlåtande).

Dynor översikt



Reflexdynan har en inbyggd ventil/funktion som tillåter brukaren att sjunka ner och positioneras i dynan utan att man sitter genom skummet. När brukaren lämnar dynan så blåser den automatisk upp sig själv. Ingen inställning behövs göras, dynan sköter sig helt själv.

Reflex



Zoid är idealisk för aktiva brukare med medelstor risk för trycksår. Låg höjd och kilformad design gör den perfekt att använda till aktiva rullstolar.

Zoid

Dynans uppbyggnad	Luft och skum	Luft och skum
Tryckavlastning	Medel	Medel
Positionering	Medel	Medel
Sittgrop	Låg	Låg
Lateralt bäckenstöd	Mjukt skum	Mjukt skum
Medial lårdelare	Hårdare skum	Nej
Lateralt lårstöd	Mediumhårt skum	Mediumhårt skum
Antal luftkammare	En	En
Höjd	8 cm	7,5 cm
Vikt	800 g	560 g
Max brukarvikt (beroende av dynstorlek)	upp till 300 kg	upp till 300 kg
Storlekar	30x30 - 50x50	30x20 - 50x50
Anpassningsbar kil	Nej	Nej
Wavebase som tillval	Nej	Ja
ISO-kod	043303	043303
Överdrag	Inkontinens	Luft alt. Inkontinens
Trycksårskategori (EPUAP)	----	upp till nivå 2



Evolution är idealisk för brukare med hög risk för trycksår och som är i behov av en symmetrisk positionering. Kil ingår för att motverka skjuvning.

Evolution



Meridian är idealisk för att förhindra att bäckenet tippar bakåt. Meridian passar till de brukare som har stor risk att utveckla trycksår samt som behöver symmetrisk positionering.

Meridian



Proform NX är en idealisk dyna för brukare med tex benlängdsskillnad, snedställt bäcken eller som är amputerad. Proform NX passar till dem som behöver en tryckavlastande, lätt, anpassningsbar dyna. Kan beställas med en eller två luftkammare.

Proform

Luft och skum	Luft och skum	Luft och skum + hård bas
Medel-hög	Hög	Hög
Hög	Hög	Maximal
Hög	Hög	Maximal
Mjukt skum	Mjukt skum	Formad bas
Hårdare skum	Hårdare skum	Formad bas
Mediumhårt skum	Mediumhårt skum	Formad bas
En	Två	En eller två
9,5 cm	9,5 cm	12 cm
997 g	997 g	1300 g
upp till 300 kg	upp till 300 kg	upp till 300 kg
30x35 - 60x50	30x35 - 60x50	30x35 - 50x50
Ja (ingår)	Nej	Ja (ingår)
Ja	Ja	Ja
043303	043303	043303
Luft alt. Inkontinens	Luft alt. Inkontinens	Luft alt. Inkontinens
upp till nivå 3	upp till nivå 3	----

Reflex™

Dyna för brukare som har låg eller medelstor risk för trycksår.



Varilite Reflex är en mycket uppskattad dyna av både brukare och förskrivare då den aldrig behöver justeras. Dynan anpassar sig själv efter brukarens kropp och ger tryckavlastning, komfort och stabilitet.

Reflex är en idealisk dyna för till exempel vårdboenden och sjukhus, där en effektiv, underhållsfri och tryckavlastande dyna behövs.

Reflex är en ventilfri sittdyna vilket gör den ännu enklare att använda. Dynan består av kombinationen luft och skum.

Reflexdynan justerar själv in sig med rätt mängd luft när brukaren sätter sig på dynan. Den formar sig efter brukaren form så vikten fördelas över hela dynans yta.

När belastningen upphör återfylls dynan automatiskt med luft.

FAKTA Reflex

Höjd 8 cm

Vikt 800 g (dyna 45x45 cm)

Max brukarvikt: upp till 300 kg
(beroende av dynstorlek)

ISO-kod 043303

Antändningstestad enligt:
ISO 7176-16 och 8191-1



Fördelar med Reflex

- **Hög komfort och stabilitet**
- **Enkel hantering - ingen utprovning**
- **Automatisk anpassning till brukaren**
- **Överdraget är avtagbart, antiglidbehandlat och tvättbart i maskin 60°C**


UPPBYGGNAD

- 1. Överdrag**
Inkontinensöverdrag
- 2. Stretchmaterial**
Skumdynan är innesluten av ett vatten- och lufttätt stretchmaterial.
- 3. Skumstomme**
Luftgenomsläppligt skum med olika fasthet.



Jämförande tryckmätning

Reflexdynan visar en i stort sett oföränderlig tryckavlastning även efter en rigorös testning av dess livscykel.

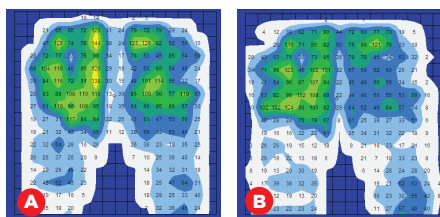


- A Tryckmätning av ny Reflex dyna
- B Tryckmätning av en Reflexdyna som testats 20 000 gånger med 80 kg tryck.

Zoid

Dyna för aktiva brukare med medelstor risk för trycksår.

Varilite Zoid är dynan för brukare som behöver en låg, kilformad dyna utan medial lårdelare.

Dynans låga vikt och utmärkta stötdämpningsegenskaper uppskattas av aktiva brukare.

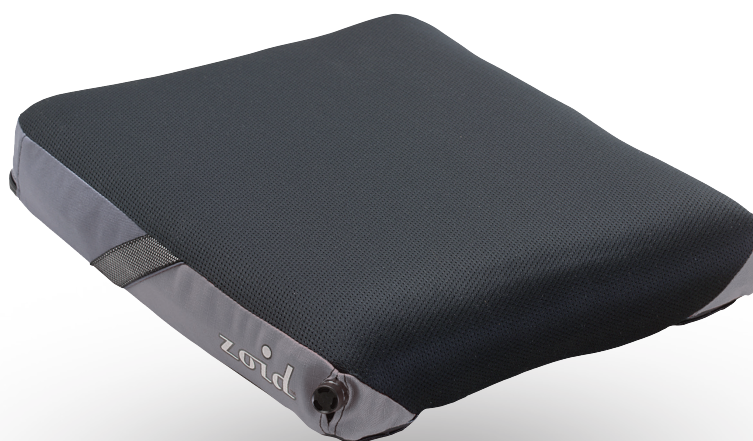

Låg dyna, rundad framkant, stabilitet, komfort och enkelhet har gjort Zoid till de aktiva brukarnas val. Med en höjd på endast 7 cm väger den största storleken av Zoid endast 560 gram. Den kilformade designen gör dynan idealisk för rullstolar med fast ram/aktiva rullstolar. Överdraget är designat för att skydda låren för brukare med korta hamstrings eller brukare som gärna stoppar in sina ben under rullstolen.

FAKTA Zoid

Höjd 7.5 cm

Vikt 560 g

Max brukarvikt: upp till 300 kg
(beroende av dynstorlek)

ISO-kod 043303

Antändningstestad enligt:

ISO 7176-16 och 8191-1




Fördelar med Zoid

- Låg vikt
- Enkel ventiljustering
- Utmärkt anpassning till brukaren
- Kilformad design passar aktiva brukare
- Vändbar dyna ger möjlighet att välja ventilsida för att passa olika brukare
- Överdraget är avtagbart, antiglidbehandlat och tvättbart i maskin 60°C
- Kan kombineras med Wavebas

UPPBYGGNAD

- 1. Överdrag**
Luftöverdrag alt. inkontinensöverdrag
- 2. Stretchmaterial**
Skumdynan är innesluten av ett vatten- och lufttätt stretchmaterial.
- 3. Skumstomme**
Luftgenomsläppligt skum med olika fasthet.
- 4. Ventil**
Justerar luftmängden i dynan

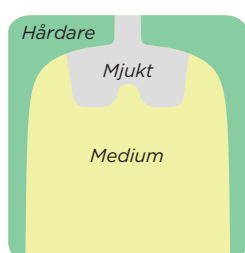

Skumgummi utan markerad grenkil.

Evolution™

*Dyna för brukare med
hög risk för trycksår.*



Varilite Evolution rekommenderas till brukare med många olika diagnoser, t.ex. stroke, MS, neurologiska skador/sjukdomar, cerebral pares och ryggmärgsskador.

Evolution har en mycket bra tryckfördelning samt positionering. Brukarna uppskattar den låga vikten, bekvämligheten och att dynan är enkel att använda. Det finns inget behov av att knåda, manipulera eller pumpa dynan – den sköter helt enkelt sig själv.

FAKTA Evolution

Höjd 9.5 cm

Vikt 997 g

Max brukarvikt: upp till 300 kg
(beroende av dynstorlek)

ISO-kod 043303

Antändningstestad enligt:

ISO 7176-16 och 8191-1



Fördelar med Evolution

- Enkel ventiljustering
- Anpassningsbar kil avlastar sittbenen
- Utmärkt anpassning till brukaren
- Vändbar dyna ger möjlighet att välja ventil sida för att passa olika brukare
- Överdraget är avtagbart, antiglidbehandlat och tvättbart i maskin 60°C
- Kan kombineras med Wavebas

UPPBYGGNAD


- 1. Överdrag**
Luftöverdrag alt. inkontinensöverdrag
- 2. Stretchmaterial**
Skumdynan är innesluten av ett vatten- och lufttätt stretchmaterial.
- 3. Skumstomme**
Luftgenomsläppligt skum med olika fasthet.
- 4. Kil**
Anpassningsbar kil
- 5. Ventil**
Justerar luftmängden i dynan




Fördelar med kil

Kilen ökar trycket på undersidan av låren vilket avlastar sittbenen och sprider ut trycket på en större del av dynan. Genom att använda kilen ändrar man inte vinkeln mellan dyna och rygg på rullstolen. Kilen är 5 cm hög och enkel att justera vid behov.

Tryckmätning med kil

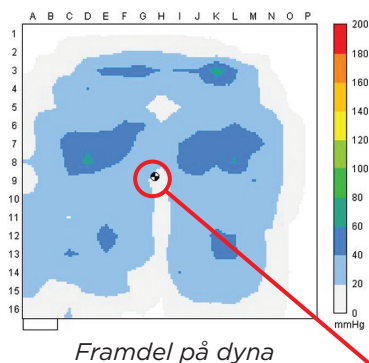


Tryckmätning utan kil

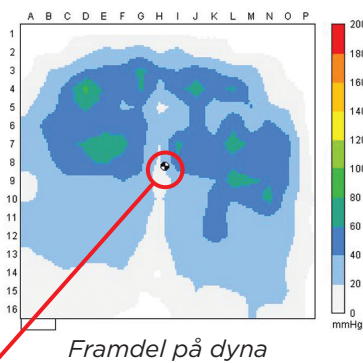

Tryckets mittpunkt

Tre olika hårdheter på skummet

- Hårdare skum används runt om dynan och som medial lårdelare (ej på Zoid) för att ge posturalt stöd.
- Mediumhårt skum används under låren och låter brukaren sjunka ner i dynan för att öka tryckfördelningen.
- Mjukt skum används under sittben och svanskota för att avlasta det mest tryck-känsliga området. Skummen jobbar tillsammans för att skapa en bra sittgrop och ge brukaren optimal tryckavlastning.

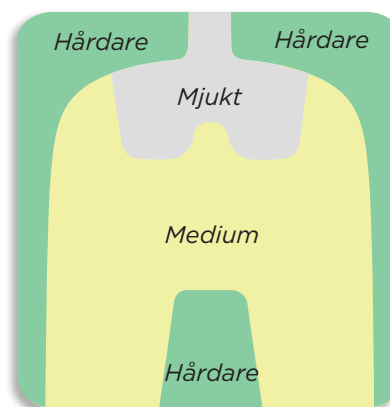

Framdel på dyna


Wave basar

- tillbehör för ytterligare positionering

Wavekil 1 CPW



Wavebas 2 LPB

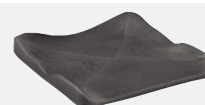

Wavebas 3 CPB



Meridian™

För brukare med hög risk för trycksår och ett behov av symmetrisk positionering.



Varilite Meridian, med två luftkammare, rekommenderas till brukare inom ett stort område diagnoser, t.ex. stroke, ALS, MS, neurologiska skador/sjukdomar, cerebral pares och ryggmärgsskador.

Meridians tryckfördelning och positionering är mycket bra. Brukarna uppskattar den låga vikten, bekvämligheten och att dynan är enkel att använda.

Det finns inget behov av att knåda, manipulera eller pumpa dynan – den sköter helt enkelt sig själv.

FAKTA Meridian

Höjd 9.5 cm

Vikt 997 g

Max brukarvikt: upp till 300 kg
(beroende av dynstorlek)

ISO-kod 043303

Antändningstestad enligt:

ISO 7176-16 och 8191-1



Fördelar med Meridian

- Enkel ventiljustering
- Dubbla luftkammare gör att bäcken och lår kan justeras separat
- Utmärkt anpassning till brukaren
- Överdraget är avtagbart, antiglidbehandlat och tvättbart i maskin 60°C
- Kan kombineras med Wavebase

UPPBYGGNAD

- 1. Överdrag**
Luftöverdrag alt. inkontinensöverdrag
- 2. Stretchmaterial**
Skumdynan är innesluten av ett vatten- och lufttätt stretchmaterial.
- 3. Delad skumstomme**
Luftgenomsläppligt skum med olika fasthet.
- 4. Ventil**
Till bakre kammaren
- 5. Ventil**
Till främre kammaren





Wavekil 1 CPW

Wavebas 2 LPB

Wavebas 3 CPB


Tillbehör för ytterligare positionering
Wave basar

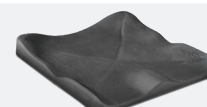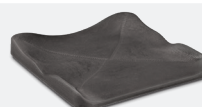

Meridian förhindrar tippat bäcken

Målet med ett sittsystem är att få en liknande ryggkurvatur som vid stående. Meridiandynan underlättar detta genom att med den bakre kammaren skapa en sittgrop för bäckenet och med den främre kammaren ge tryck/stöd under låren vilket förhindrar sittbenen från att glida framåt och tippa bäckenet.

Genom att hålla bäckenet på plats ges bäckenet en neutral eller lätt framåttippad position vilket resulterar i en ordentlig lumbar lordos samt en korrekt positionering av ryggraden upp genom brösttrygg och nacke.

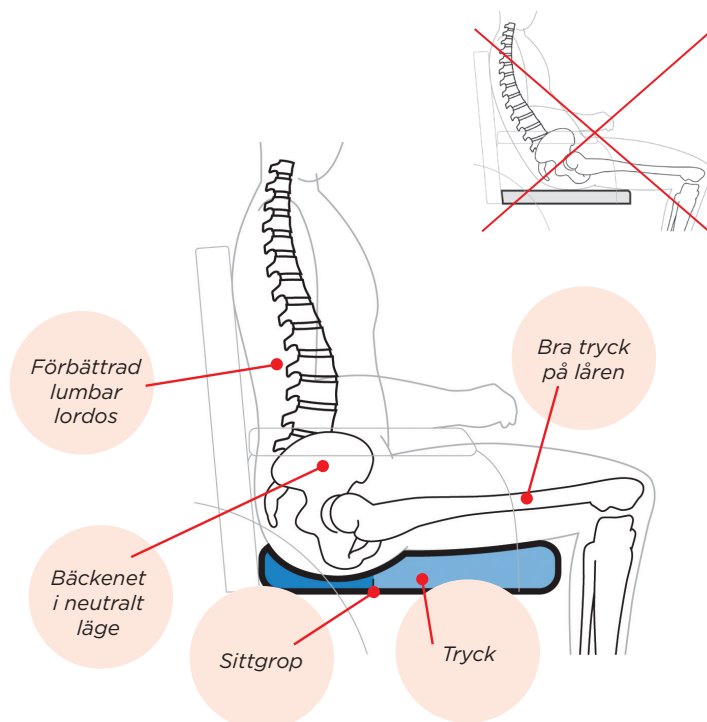

Dubbla kammare tillåter individuell positionering av bäcken och lår.

Exceptionell tryckavlastning, positionering, komfort och enkelhet har gjort Meridian till vår mest avancerade tryckavlastande rullstolsdyna. Två individuellt justerbara kammare skapar maximal tryckfördelning, vilket ger den absolut bästa tryckavlastningen.


Brukaren kan positioneras snabbt och enkelt. Meridian väger extremt lite utan att dynan kompromissar med tryckavlastning och stöd.



Jämförande tryckmätning

Jämfört med en dyna som har en kammare så fördelar Meridians två kammare trycket framåt från sittbenen mot låren som inte är lika tryck känsliga.

Meridian-dynan tillåter brukaren eller vårdaren att justera den bakre kammaren/bäckenkammaren individuellt. Detta tillåter maximal positionering av bäckenet och trycket omfördelas från sittbenen fram till låren.

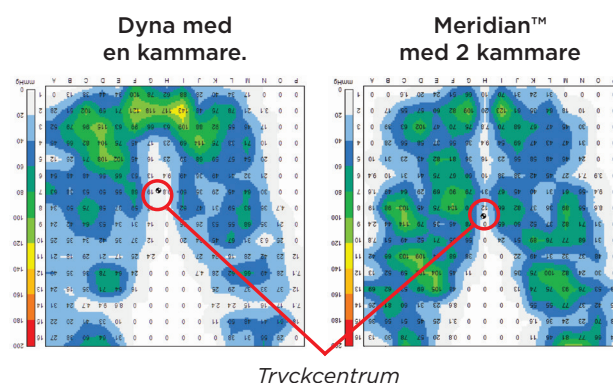

Proform NX™

ProForm NX är designad för brukare med snedställda bäcken och andra asymmetriska problem.



Varilite ProForm NX är den mest avancerade dynan. Passar brukare med t.ex. benlängdsskillnad, snedställt bäcken eller som är amputerade. Dynan kan enkelt anpassas till brukarens behov.

Varför välja ProForm NX?

Specialister inom sittande väljer ProForm NX på grund av att den kan anpassas både genom att bygga på material och genom att ta bort material. Som ett exempel så kan ProForm NX ge både extra medialt stöd och extra lateralt stöd genom att bygga upp den del av dynan där stödet behövs. ProForm NX kan även anpassas genom att man skär i basen, den främre dynan och/eller kilen för att underlätta vid till exempel benlängdsskillnad.

ProForm kan beställas med hel eller delad luftkudde för bästa avlastning.

FAKTA Proform NX

Höjd 12 cm

Vikt 1300 g

Max brukarvikt: upp till 300 kg
(beroende av dynstorlek)

ISO-kod 043303

Antändningstestad enligt:

ISO 7176-16 och 8191-1



Fördelar med Proform NX

- Möjlighet till speciella anpassningar till brukare med speciella behov som:
 - Snedställt bäcken
 - Amputerade
 - Benlängdsskillnad
- Kan beställas med hel eller delad luftkammare.
- Enkel ventiljustering
- Överdraget är avtagbart, antiglidbehandlat och tvättbart i maskin 60°C


UPPBYGGNAD

- 1. Överdrag**
Tvättbart inkontinensöverdrag
- 2. Stretchmaterial**
Skumdynan är innesluten av ett vatten- och lufttätt stretchmaterial.
- 3. Anpassningsbar skumstomme (främre innerdyna)**
Skummet kan skäras för olika behov (se nästa sida).
- 4. Bas**
Modifierbar bas
- 5. Kil**
Anpassningsbar kil
- 6-7. Ventiler**
En eller två ventiler beroende på om luftkammaren är hel eller delad.




Anpassningsguide för personal inom sittande och positionering

Proform NX passar brukare med stora positioneringsbehov och/eller som behöver modifiera dynan. Nedan följer vanliga modifieringsexempel.

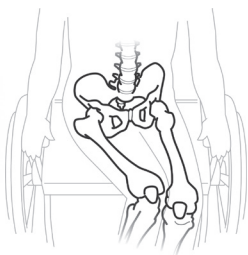


Windswept

- Skär i basen för att följa med bäckenets rotation.
- Skär bort den mediala lårdelaren.
- Bygg en ny lårdelare med anpaskum.
- Skär i den främre dynan och kilen för att följa med basen.
- Sätt fast överdraget.

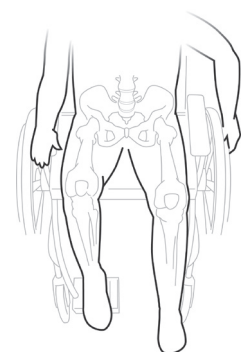

Stroke/Hjärnblödning (CVA) Amputerade över knänivå Begränsad höftflexion

- Skär upp basen och den främre dynan till kanten för sittgropen.
- För stroke/CVL och amputerade, skär till kilen och lägg under det påverkade benet. För brukare med begränsad höftflexion, skär till kilen lägg under det icke påverkade benet.

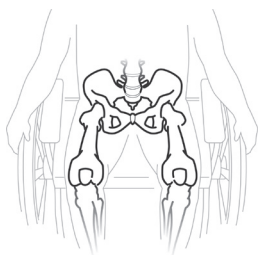


Symmetrisk brukare i behov av extra stöd

- Modifiera basen med hjälp av anpaskum och bygg upp den mediala lårdelaren och/eller de laterala lårstöden.

Existerande röd hud/tryckkänslighet:

- Identifiera vart på dynan trycket ligger, förslagsvis med en tryckmätning.
- Skär ut hål eller karva en grop i basen för att ge extra tryckavlastning.

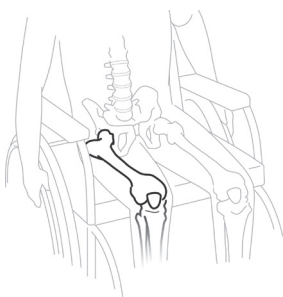

Benlängdsskillnad (Lårben)


- Skär i basen på det kortare benets sida.
- Skär i den främre dynan för att följa basen.
- Anpassa överdraget (se steg 4-6).



TILLBEHÖR

Kil

Anpassningsbar kil som avlastar på ett enkelt och bra sätt sittbenen genom att lägga mer belastning på låren och skapa en större sittgrop. 30-60 cm bred. För ytterligare positionering, välj till planskiva eller wavebasar.

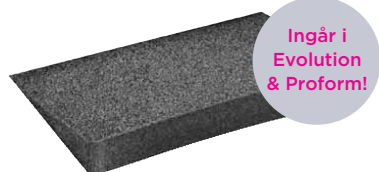

Bredd Art.nr.

Kil, 30 cm	4352
Kil, 35 cm	4355
Kil, 40 cm	4357
Kil, 45 cm	4358
Kil, 50 cm	4359
Kil, 55 cm	4374
Kil, 60 cm	4375

Sitsöverdrag

Finns i standard luftöverdrag eller inkontinensskyddat utförande. Vid beställning anges storlek (breddxdjup) och artikelnr beroende av dyna enligt nedan (t.ex. Evolution med luftöverdrag 40x40 cm blir 4040-71)

Inkontinensöverdrag

Reflex	-89
Zoid	-50
Evolution	-72
Evolution (S)	-74*
Meridian	-82
Meridian (S)	-84*
Proform	-31

Luftöverdrag

Zoid	-40
Evolution	-71
Evolution (S)	-75*
Meridian	-81
Meridian (S)	-83*
Proform	-32

* S=För dynor större och lika med 55x45 cm.



Planskiva

Utgjenningsplatta för kryssramstolar. En enkel och kostnadseffektiv lösning för att göra sitsen hård och motverka att dynan formas av hängmattesitsen.



Artikelnr**-528**

Vid beställning anges storlek (breddxdjup) och artikelnr (t.ex. 4045-528)

Anpaskum

Självhäftande ark i storlek 50x50 cm som används bl.a. för att modifiera basen till ProForm NX. Finns som fasta ark.



Artikelnr**2101**

Wave - Positioneringsbasar

CPW - Contoured Positioning Wedge.

Lateralt lårstöd som motverkar abduktion av låren. Medialt lårstöd som motverkar adduktion.


CPW



LPB - Lateral Positioning Base

Lateralt bäckenstöd som hjälper bäckenet att stanna i mitten av dynan/sätet. Lateral lårstöd som förhindrar abduktion av låren. Solid bas som erbjuder bättre postural stabilitet.


LPB

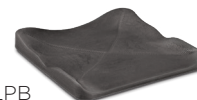

CPB - Contoured Positioning Base

Lateralt bäckenstöd som hjälper bäckenet att stanna i mitten av dynan/sätet. Lateral lårstöd som motverkar abduktion av låren. Medialt lårstöd som motverkar adduktion. Solid bas som erbjuder bättre postural stabilitet.

CPB

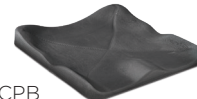

Wave basar jämförelse

Wave basar	Artikel-nummer	Lateralt bäckenstöd	Posteralt bäckenstöd	Lateralt lårstöd	Medialt lårstöd	Hel fast bas
Wavekil 1 CPW	- 4360			X	X	
Wavebas 2 LPB	- 4362	X	X	X		X
Wavebas 3 CPB	- 4364	X	X	X	X	X

Drop Base System

Vinkel- och höjddjusterbar sittplatta.
Passar rullstolar med sittbredd
33 - 50 cm. Måtten är Bredd x Djup
Exempel. Art. 4288 (för rullstolar
med sittbredd från 29 till 32cm och
33cm djup)



Finns i storlekarna:

Drop Base system 49-52 / 52 cm - art nr 4258
Drop Base system 44-47 / 48 cm - art nr 4378
Drop Base system 39-42 / 43 cm - art nr 4278
Drop Base system 34-37 / 39 cm - art nr 4308
Drop Base system 29-32 / 33 cm - art nr 4288

STORLEKSÖVERSIKT/ARTIKELNUMMER

Artikelnummer för dyna med luftöverdrag (grå ruta) och med inkontinensöverdrag (vit ruta)

Bredd x Djup cm	Brukarvikt max kg	REFLEX	ZOID	EVOLUTION	MERIDIAN	PROFORM hel	PROFORM delad
		Inkontinens	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft
30 x 20	100	-	41210	-	-	-	-
		-	41212	-	-	-	-
30 x 30	100	-	41220	-	-	-	-
		591010	41222	-	-	-	-
30 x 35	100	-	41240	72410	74310	72411	72412
		591012	41242	72420	74312	72421	72422
35 x 35	180	-	41440	74410	74314	74411	74412
		591014	41442	74420	74316	74421	74422
35 x 40	180	-	41460	74610	74318	74611	74612
		591016	41462	74620	74320	74621	74622
35 x 45	180	-	41464	74631	74322	-	-
		591018	41466	74632	74324	-	-
35 x 50	180	-	-	74634	74326	-	-
		591020	-	74636	74328	-	-
38 x 38	180	-	41468	74638	74330	74623	74624
		591022	41470	74640	74332	74625	74626
38 x 43	180	-	41472	74642	74334	74627	74628
		591024	41474	74644	74336	74629	74630
40 x 35	180	-	-	74646	74338	-	-
		591026	-	74648	74340	-	-
40 x 40	180	-	41660	76610	74342	76611	76612
		591028	41662	76620	74344	76621	76622
40 x 45	180	-	41664	76810	74346	76811	76812
		591030	41666	76820	74348	76821	76822
40 x 50	180	-	41668	76010	74350	76011	76012
		591032	41670	76020	74352	76021	76022
43 x 43	180	-	41672	76110	74351	76027	76026
		591034	41674	76120	74353	76029	76028
45 x 40	180	-	41676	78610	74354	78611	78612
		591036	41678	78620	74356	78621	78622
45 x 45	180	-	41880	78810	74358	78811	78812
		591038	41882	78820	74360	78821	78822
45 x 50	300	-	41884	78010	74362	78011	78012
		591040	41886	78020	74364	78021	78022
50 x 40	180	-	41888	70610	74366	78026	78034
		591042	41890	70620	74368	78027	78036
50 x 45	300	-	41892	70810	74370	78028	78038
		591044	41894	70820	74372	78029	78040
50 x 50	300	-	41896	70010	74374	70011	70012
		591046	41898	70020	74376	70021	70022
55 x 45	300	-	-	7281	74378	-	-
		-	-	7282	74380	-	-
55 x 50	300	-	-	7201	74382	-	-
		-	-	7202	74384	-	-
60 x 45	300	-	-	7481	74386	-	-
		-	-	7482	74388	-	-
60 x 50	300	-	-	7421	74390	-	-
		-	-	7422	74392	-	-

För beställning av tillbehör och överdrag se föregående sida.