



Zitzi

Seabass Pro/
Seabass G2

Bruksanvisning

Användarmanual, monterings-/justeringsanvisning,
service och underhåll samt rekonditionering



Denna bruksanvisningen avser rullstolsunderrede Seabass med tillbehör. För fullständig översikt av avsedda tillbehör se produktens beställningsunderlag.

Innehållsförteckning

Tillverkare	3	Drivhjulsplacering	21
Specialanpassning	3	E-drive	23
Introduktion	4	Broms.....	24
Avsedda ändamål	4	Parkeringsbroms	28
Symbolförteckning	5	Sitstilt	30
Produktmärkning	6	Fotstöd Pro	31
Säkerhetsföreskrifter	7	Fotstöd G2.....	32
Utbildning och kvalifikationer	7	Fotstödsbeslag.....	33
Varningar och försiktighetsåtgärder.....	7	Fotlåda	35
Kontroll före användning	9	Vadstöd.....	36
Begränsningar.....	10	Körhandtag Pro.....	37
Kvarvarande risker.....	11	Körbåge Pro.....	38
Godkända kombinationer	11	Körbåge vinkelställbar G2.....	40
Avvikelser/tillbud.....	11	Körbåge fällbar.....	40
Tekniska data/Prestanda	12	Armstöd vikbart från rygg.....	42
Seabass Pro	12	Tippskydd	43
Seabass G2.....	13	Tramprör.....	45
Anpassning och specialanpassning.....	14	Stänkskärm.....	46
Rekommendationer	14	Transportfästen.....	47
Tillåtna anpassningar.....	14	Sittdel.....	48
Risikanalys	14	Sammanfattning och efterkontroll	49
Märkning.....	14	Transport i fordon.....	50
Monterings- och justeringsanvisningar	15	Körteknik.....	52
Länkhjul.....	16	Underhåll och skötselanvisningar	54
Färdriktningsspärr	18	Kontroll före användning	54
Hjul	19	Service och underhåll.....	55
		Rekonditionering	56
		Avfallshantering	59
		Garanti och retur.....	60
		Revision.....	61

Tillverkare

Produkten är tillverkad av Anatomic Sitt i Norrköping AB

Postadress	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besöksadress	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-post	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com
Instruktionsfilmer	youtube.com/anatomicsitt
Följ oss på	facebook.com/anatomicsitt

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Specialanpassning



Kryssa i rutan vid eventuell specialanpassning av produkten.

CE-märkningen upphör att gälla vid specialanpassad produkt.



Introduktion

Inledning

Grattis till valet av hjälpmedel vi hoppas du kommer få stor användning av vår produkt. För att ni ska kunna nyttja den till fullo på ett säkert sätt är det viktigt att ni läser igenom denna bruksanvisning ordentligt. Detta gäller alla personer som finns i brukarens närhet.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Nya utgåvor finns att ladda ner från vår hemsida: www.anatomicsitt.com. Revision finns på framsidan tillsammans med datumet.

Korrespondens - märkning

På produktetiketten finns produktens artikelnummer samt serienummer (huvudprodukt) eller LOT-nummer (tillbehör). Dessa nummer ska anges vid korrespondens med Anatomic Sitt gällande produkterna.

CE-märkning - klassificering

Hjälpmedlet med dess tillbehör är en CE-märkt medicinteknisk produkt, klass I enligt klassificeringsreglerna i annex VIII (EU) 2017/745.

Försäkran om överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven för medicintekniska produkter enligt förordningen (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter. Se aktuell EU-försäkran om överensstämmelse för produktvarianter och tillbehör, www.anatomicsitt.com/ dokument

Avsedda ändamål

Zitzi Seabass är ett vårdarmanövrerat rullstolsunderrede för utomhusbruk. Produkten är avsedd att användas tillsammans med sittsystem eller individuell sits från Anatomic Sitt i Norrköping AB. Zitzi Seabass är en flergångsprodukt.

Symbolförteckning

	Denna symbol återfinns i bruksanvisningen och uppmärksammar läsaren om t.ex. viktig säkerhetsinformation m.m.		Anger tillverkningens satsnummer så att sats/batch kan identifieras.
	Denna symbol indikerar eventuell klämrisk.		Anger att produkten är en medicinteknisk produkt.
	Anvisningar och tips som underlättar vid användning av produkten.		Anger tillverkarens referensnummer/artikelnnummer så att den medicintekniska produkten kan identifieras.
 www.anatomicsitt.com	Anger att bruksanvisningen alltid ska läsas före användning. Webb-adress anger var dokumentet finns elektroniskt.		Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk produkt kan identifieras.
	Anger att bruksanvisningen ska läsas för att få viktig säkerhetsinformation om t.ex. varningar som inte återfinns på den medicintekniska produktens etikett.		Unik produktidentifierare som möjliggör entydig identifiering av specifika medicintekniska produkter.
	Anger tillverkaren av den medicintekniska produkten enligt definition i (EU) MDR 2017/745. Kan också användas tillsammans med tillverkningsdatum.		Anger att produkten är CE-märkt enligt tillämpliga EU-direktiv.
	Anger datumet när den medicintekniska produkten tillverkades.		Anger vart transportsäkring ska fästas på produkten vid transport i fordon.

Produktmärkning

Etikett på huvudprodukt

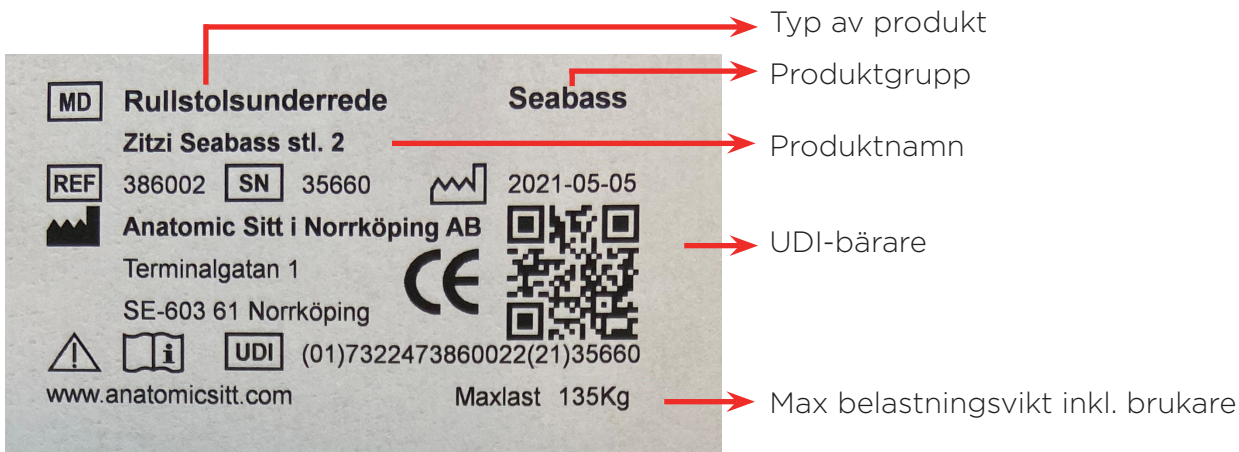


Diagram illustrating the main product label (Etikett på huvudprodukt) with annotations:

- Typ av produkt**: Rullstolsunderrede
- Produktgrupp**: Seabass
- Produktnamn**: Zitzi Seabass stl. 2
- UDI-bärare**: QR code
- Max belastningsvikt inkl. brukare**: Maxlast 135Kg

Additional information on the label includes:

- MD (Medical Device)
- REF 386002, SN 35660
- Anatomic Sitt i Norrköping AB
- Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping
- UDI (01)7322473860022(21)35660
- www.anatomicsitt.com
- 2021-05-05
- CE mark

Etikett på tillbehör

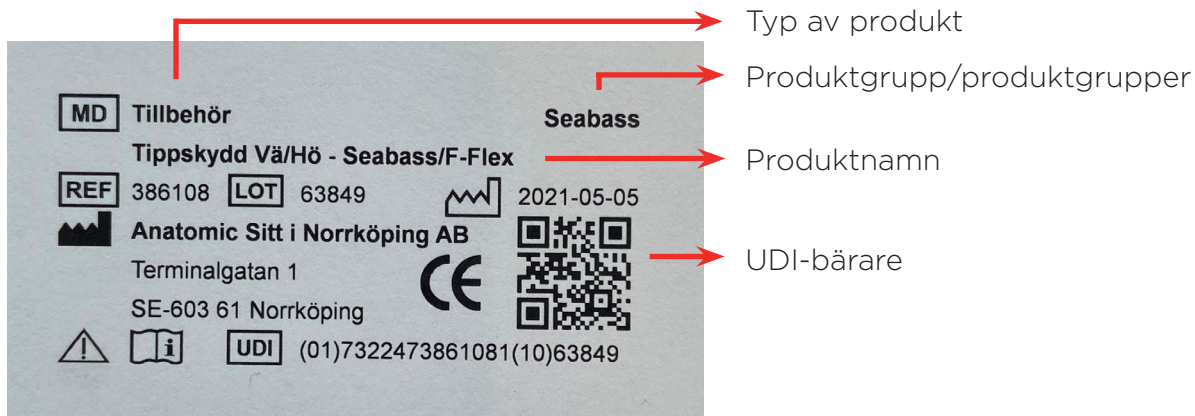


Diagram illustrating the accessory label (Etikett på tillbehör) with annotations:

- Typ av produkt**: Tillbehör
- Produktgrupp/produktgrupper**: Seabass
- Produktnamn**: Tippskydd Vä/Hö - Seabass/F-Flex
- UDI-bärare**: QR code

Additional information on the label includes:

- MD (Medical Device)
- REF 386108, LOT 63849
- Anatomic Sitt i Norrköping AB
- Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping
- UDI (01)7322473861081(10)63849
- 2021-05-05
- CE mark

Säkerhetsföreskrifter

Utbildning och kvalifikationer

- Montering, service och rekonditionering ska alltid utföras av kvalificerad fackpersonal (tekniker på hjälpmedelscentral eller motsvarande).
- Beslut om anpassning/specialanpassning ska ske av behörig medicinsk personal och utföras av kvalificerad fackpersonal (tekniker på hjälpmedelscentral eller motsvarande).
- Inställningar, justeringar samt in- och utprovning av hjälpmedlet ska alltid utföras av behörig medicinsk personal (fackpersonal på hjälpmedelscentral eller motsvarande).
- Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid utföra en riskbedömning innan användning.

Varningar och försiktighetsåtgärder



Läs alltid bruksanvisningen alltid före användning.



Inställningar får endast utfärdas av kvalificerad fackpersonal. Det är endast tillåtet att göra inställningar på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.



Kontrollera produkten med avseende på funktion innan den lämnas ut till en användare.



Den som förskriver hjälpmedlet är ansvarig för att instruera brukaren och/eller andra personer i dess närmiljö hur produkten används på ett säkert sätt. Funktionskontrollera alltid produkten innan användning.



Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren ska balansera in den valda sitsen för att säkerställa att ev tipprisk utesluts.



Justeringar får endast utföras på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.

-  Efter alla monterings- och justerings eller servicearbeten ska alla infästnings-skravar och muttrar kontrolleras och dras åt.
-  Kontrollera att sittsystemet sitter ordentligt fast i underredet före användning.
-  Bromsarna ska alltid vara låsta vid i- och urstigning.
-  Vårdarbromsen som verkar på drivhjulens trumbroms är avsedd att användas som broms vid framfart och parkering. Parkeringsbroms som verkar på däckets ska endast användas som låsbroms.
-  Länkhjulen kan kollidera med fotplattan i vissa fall. Länkhjulens styrförmåga kan därmed påverkas och fotplattans inställningar kan då behöva ändras.
-  Använd aldrig fotplattan vid i- och urstigning från hjälpmedlet.
-  Iakttag försiktighet och var medveten om ökad tipprisk när underredet används på sluttande underlag. Underredet får bara parkeras på horisontella och jämna underlag.
-  Lyft alltid i underredet - aldrig i sittenheten.
-  Utför aldrig service medan produkten används.
-  Observera att om brukaren griper tag i föremål utanför hjälpmedlet eller lutar sig för långt ut från hjälpmedlet, kan en tyngdpunktsförskjutning ske vilket kan leda till en ökad tipprisk.
-  Överbelasta aldrig hjälpmedlet, se avsnittet Begränsningar för aktuell maxlast.
-  Lämna aldrig brukaren utan tillsyn när hjälpmedlet används.

Kontroll före användning

Tillsyn och kontroll ska utföras före varje användning enligt nedan punkter:

- Kontrollera produkten och dess tillbehör med avseende på lösa delar, slitage och skador. Kontrollera särskilt skruvar och muttrar samt vred.
- Kontrollera att sitsen är ordentligt fastsatt på underredet.
- Kontrollera produktens stabilitet.
- Kontrollera funktionen på eventuella tippskydd.
- Kontrollera bromsarnas funktion.
- Kontrollera hjulens skick och att de sitter fast.
- Kontrollera produktens rörliga funktioner, exempelvis ryggvinkling, tilt, höjdjustering, mm. avseende rörlighet samt låsning.
- Kontrollera justering av vajer för tilt så den fungerar korrekt.

Om brister uppmärksammas: Använd ej produkten. Kontakta din distributör av hjälpmedlet för åtgärd.

Begränsningar

Maxlast

Den högsta belastningsvikten är 135 kg. Med belastningsvikt avses den maximala vikt som underredet får utsättas för t.ex. brukare och sittsystem.

Livslängd

Produktens förväntade livslängd är 5 år vid normal användning i enlighet med produktens avsedda ändamål, förutsatt att instruktioner i denna bruksanvisning efterföljs. Den faktiska livslängden kan dock variera beroende på hur frekvent och intensivt produkten används, men är max 10 år.

Gaskolv

Om produkten ska förvaras under en längre tid, beakta följande:

Gaskolvar bör användas regelbundet för att bibehålla sin funktion. Då produkten inte används måste gaskolven aktiveras minst en gång var 6:e månad. Dessutom bör de lagras på så sätt att kolvstången är riktad nedåt annars kan gaskolvens tätning gå sönder och den slutar fungera.

Kvarvarande risker

Var observant på att produkten och dess tillbehör är korrekt inställda så att brukaren inte åsamkas obehag eller skada under användningen. Om så är fallet ska justering göras eller lämpliga tillbehör monteras.

Godkända kombinationer

För att produkten ska behålla sin CE-märkning får hjälpmedlet endast förses med tillbehör och reservdelar levererade av Anatomic Sitt AB. Se produktens beställningsunderlag för möjliga tillbehör och sprängskiss för reservdelar.


Avvikelser/tillbud

Vid funktionsfel kontakta hjälpmedelscentral eller återförsäljare/tillverkare.

Om ett allvarligt tillbud uppstår bör det rapporteras till Anatomic Sitt AB och landets behöriga myndighet.

Tekniska data / Prestanda

Seabass Pro

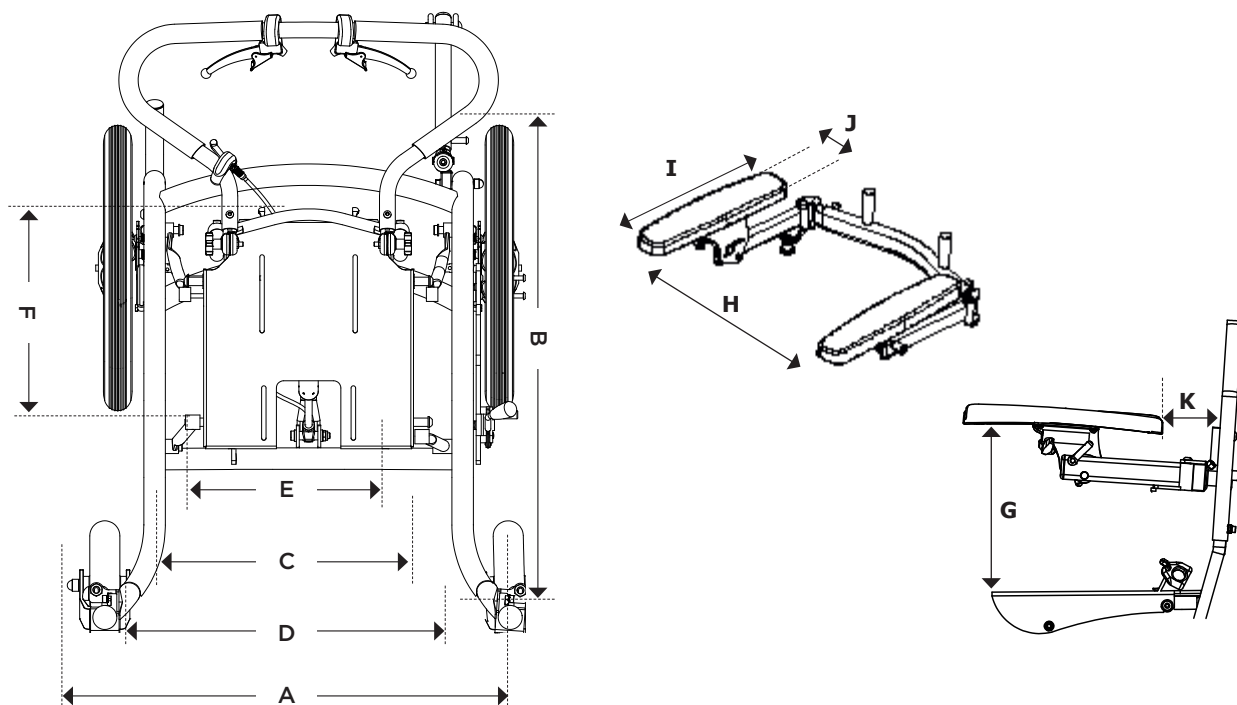

Produktdata	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3
Max belastningsvikt (brukare + sits)	135 kg	135 kg	135 kg
Sitthöjd (låg/standard)	41/46 cm	41/46 cm	41/46 cm
Längd (B) *	69 - 77 cm	69 - 77 cm	69 - 77 cm
Bredd (A) **	58 cm	63 cm	68 cm
Invändig rambredd (C)	35 cm	40 cm	45 cm
Invändig bredd drivhjul	48 cm	53 cm	58 cm
Invändig bredd länkhjul (D)	44 cm	49 cm	54 cm
Sittplatta (E/F) (bredd/djup)	26/31 cm	29/32 cm	34/34 cm
Vikt	20 kg	21 kg	22 kg
Tilt	0-35° / -7-28°	0-35° / -7-28°	0-35° / -7-28°
Höjd från sittplatta (G)	19 - 30 cm	24 - 35 cm	34 - 39 cm
Bredd mellan armstöd (H)	21,5 - 31,5 cm	26 - 41 cm	32 - 47 cm
Mått armstödsplattor (I x J)	26,5 x 9,5 cm	26,5 x 9,5 cm	30,5 x 9,5 cm
Avstånd ryggrör till armstödsplatta (K)	5 -13 cm	7 - 15 cm	5 - 15 cm

* Längden förändras beroende på val av drivhjul och drivhjulsposition. 12" är den kortaste och 24" är den längsta.

** Bredden som är angiven visar det bredaste måtten på underredet. Det är beroende av drivhjul, stänkskydd och drivringar. Med 16" drivhjul är stolen bredast vid länkhjulen.

Samtliga mått är tagna med respektive storlek i standardformat. Standardram och 16" hjul.

Tekniska data / Prestanda

Seabass G2

Produktdata	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3
Max belastningsvikt (brukare+sits)	135 kg	135 kg	135 kg
Sitthöjd (låg/standard)	41/46 cm	41/46 cm	41/46 cm
Längd (B) *	69 - 77 cm	69 - 77 cm	69 - 77 cm
Bredd (A) **	58 cm	63 cm	68 cm
Invändig rambredd (C)	35 cm	40 cm	45 cm
Invändig bredd drivhjul	48 cm	53 cm	58 cm
Invändig bredd länkhjul (D)	44 cm	49 cm	54 cm
Sittplatta (E/F) (bredd/djup)	30/36 cm	30/36 cm	35/36 cm
Vikt	19 kg	20 kg	20 kg
Tilt	0-35° / -7-28°	0-35° / -7-28°	0-35° / -7-28°

* Längden förändras beroende på val av drivhjul och drivhjulsposition.


12" är den kortaste och 24" är den längsta.

** Bredden som är angiven visar det bredaste måtten på underredet.


Det är beroende av drivhjul, stänkskydd och drivringar. Med 16" drivhjul är stolen bredast vid länkhjulen.

Samtliga mått är tagna med respektive storlek i standardformat.


Standardram och 16" hjul.

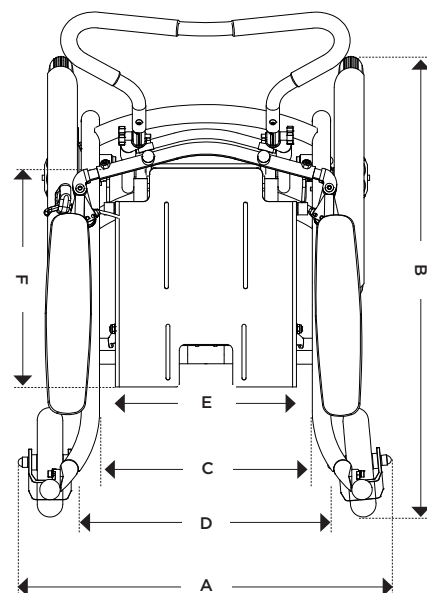


Mått armstöd från rygg Storlek	Storlek 1	Storlek 2
Mått armstödsplattor (AxB)	26,5 x 9,5 cm	26,5 x 9,5 cm
Bredd mellan armstöd (C)	25-34,5 cm	24,5-53,5 cm
Höjd från sittplatta (D)	19-30 cm	24-35 cm
Avstånd rygggrör till platta (E)	5-13 cm	7-15 cm

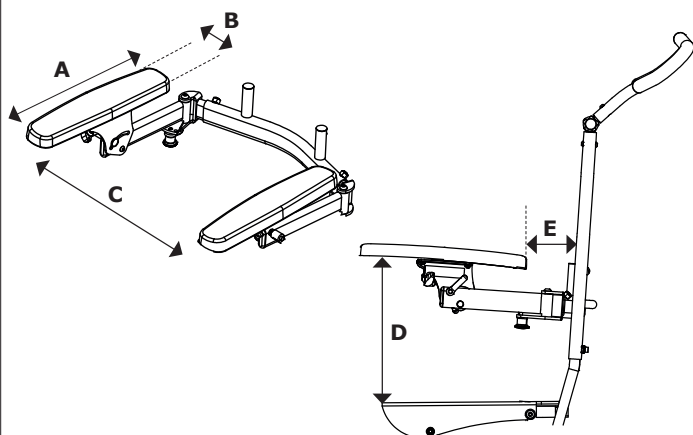

FOTSTÖD

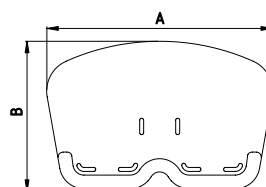

A x B
Helt stl. 2
Helt stl. 3
Helt stl. 4
Helt stl. 5

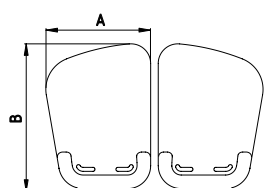

A x B
Delat stl. 2
Delat stl. 3
Delat stl. 4

Storlek	2-4
Fotstödsstag profilängd (cm)	35

Anpassning och specialanpassning

Rekommendationer

Varje gång produkten ändras på något sätt måste en bedömning göras om det är en anpassning eller en specialanpassning.

En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märkning. Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som bedöms kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt.

Tillåtna anpassningar inom ramen för CE-märkning

Fotstödsprofilens längd får kortas ned för att bättre passa brukaren.

Hål i sittplattan får läggas till för montering. Dock ska följande kriterier följas:

- Inte fler än 4 hål
- Hål ej större än 6,5 mm
- Hål får ej vara mindre än 15 mm från befintliga hål och spår
- Hål får ej vara mindre än 15 mm från kant på platta

Risikanalys


Notera att en riskbedömning alltid skall göras, såväl vid anpassning som vid specialanpassning av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren eller personer i dess närhet, att använda efter anpassning.

Märkning

Produkten bör föras med upplysning att den är anpassad till en specifik brukare, så att den inte kan misstas för en produkt i standardutförande.

Monterings- och justeringsanvisningar

Montering ska alltid utföras av kvalificerad fackpersonal (tekniker på hjälpmedelscentral eller motsvarande). Instruera brukaren och/eller andra personer i dess närmiljö om produktens funktioner för att hjälpmedlet ska kunna användas på ett säkert sätt.

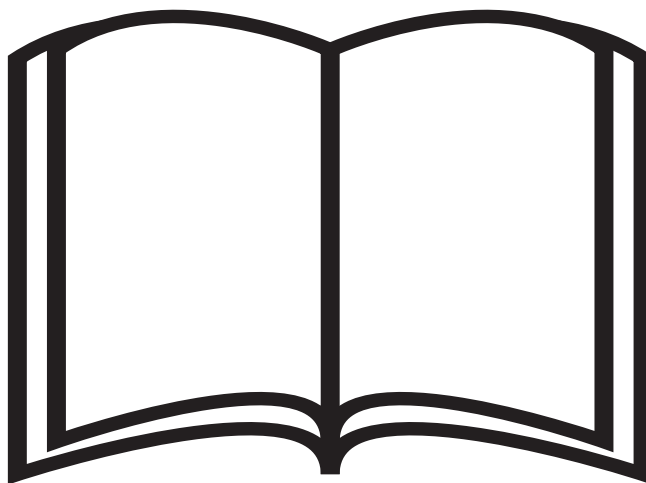

Länkhjul

Montering av länkhjul på rullstolsram

För in sargsprinten (A) i avsett hål på undersidan av rullstolsramen i länkhjuls-kustsen enligt bild. Montera sedan länkhjulet med hjälp av skruv (B), bricka (C) och excentermutter (D) och dra åt.

Montering av länkhjul på länkhjulsgaffel

Välj mellan fyra (4) olika länkhjulsplaceringar och montera sedan länkhjulet (F) med hjälp av medföljande hjulaxel (G), bricka (H) och låsmutter (I) i önskat infästningshål på länkhjulsgaffeln (K).


För upp länkhjulet (F) i länkhjulsgaffeln (K) enligt bildbeskrivning. Sätt en bricka på hjulaxeln (G) och stick sedan igenom den i önskat hål på länkhjulsgaffeln. Möt sedan upp på motsatt sida med bricka (H) och låsmutter (I). Dra åt muttern. Avsluta sedan med att sätta dit mutterkåporna (J) över låsmuttern.

Länkhjulsplaceringar

Länkhjulet kan placeras i fyra (4) olika höjdpositioner. Detta gör att du kan justera länkhjulets höjd efter val av drivhjulsplacering.



Tänk på att dra åt skruvarna ordentligt efter justering av länkhjulsplacering.

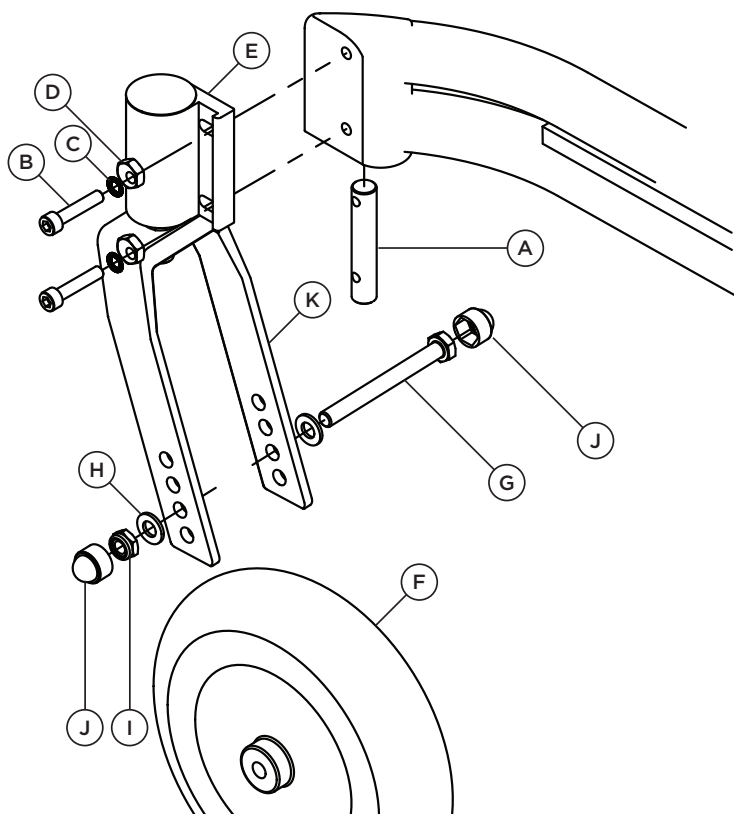

Injustering av länkhjulsgaffel

Om rullstolen inte rullar som den ska kan du behöva justera länkhjulsgaffeln (A). Detta kan uppstå om man justerat länkhjulsposition utan att justerat in länkhjulsgaffeln (A).

Det streckade området på bilden visar att länkhjulsinfästningsens (B) position ska vara 90° i förhållande till markytan.


Vinkeljustering av länkhjulsgaffel

För att vinkeljustera länkhjulsgaffeln lossar du och roterar de excentriska muttrarna (C) på länkhjulsinfästningen (B) tills korrekt vinkel erhålls.

Var noga med ett dra åt muttrarna när injustering av länkhjulsgaffeln är uppnådd.



Tänk på att dra åt muttrarna ordentligt efter injustering av länkhjulsgaffeln.

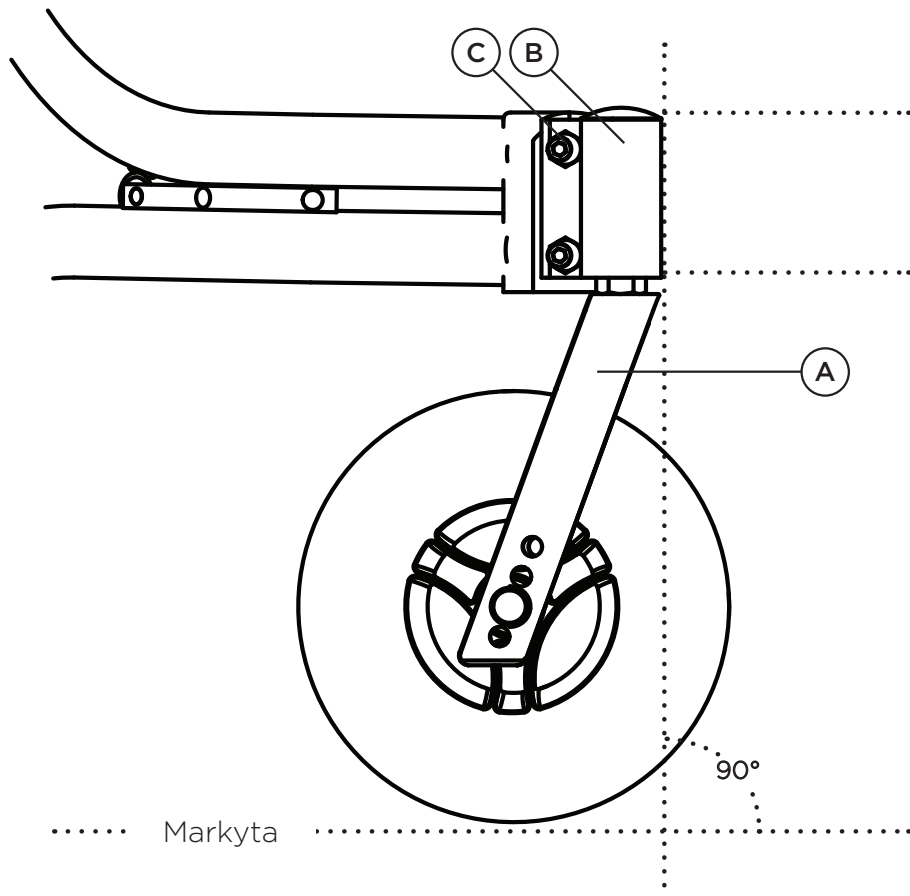

Färdriktningsspärr

Montering av färdriktningsspärr

Montera färdriktningsspärren på länkhjulsinfästningen med hjälp av medföljande monteringsdetaljer.

Börja med att ta loss länkhjulsinfästningen (A) från rullstolsramens länkhjuls-kuts (B) genom att skruva ur skruvarna (C). Lyft sedan bort ändavslutet (D) från länkhjulsinfästningens (A) topp och skruva ur centerbulten (E).

Montera sedan färdriktningsspärrensbeslagen (F) mellan länkhjulsinfästningen (A) och rullstolsramens länkhjuls-kuts (B) och mellan länkhjulsinfästning (A) och länkhjuls-gaffeln (G) med monteringsdetaljer enligt bildbeskrivning.


När montering av färdriktningsspärren är slutförd monterar du tillbaka länkhjulet på rullstols-ramen igen. Finjustera sedan länkhjulets färdriktning genom att justera något på skruv (J).

Aktivering av färdriktningsspärr

För att aktivera färdriktningsspärren drar du låsbulten (H) rakt upp och vrider den sedan 90° och släpper ner spärren i hålet på den rörliga delen. Säkerställ att färdriktningen är låst.

Frigöring av färdriktningsspärr

För att frigöra färdriktningsspärren drar du låsbulten (H) rakt så att spärren dras upp ur hålet på den rörliga delen. Vrid sedan spärren 90° och släpp ner den försiktigt.

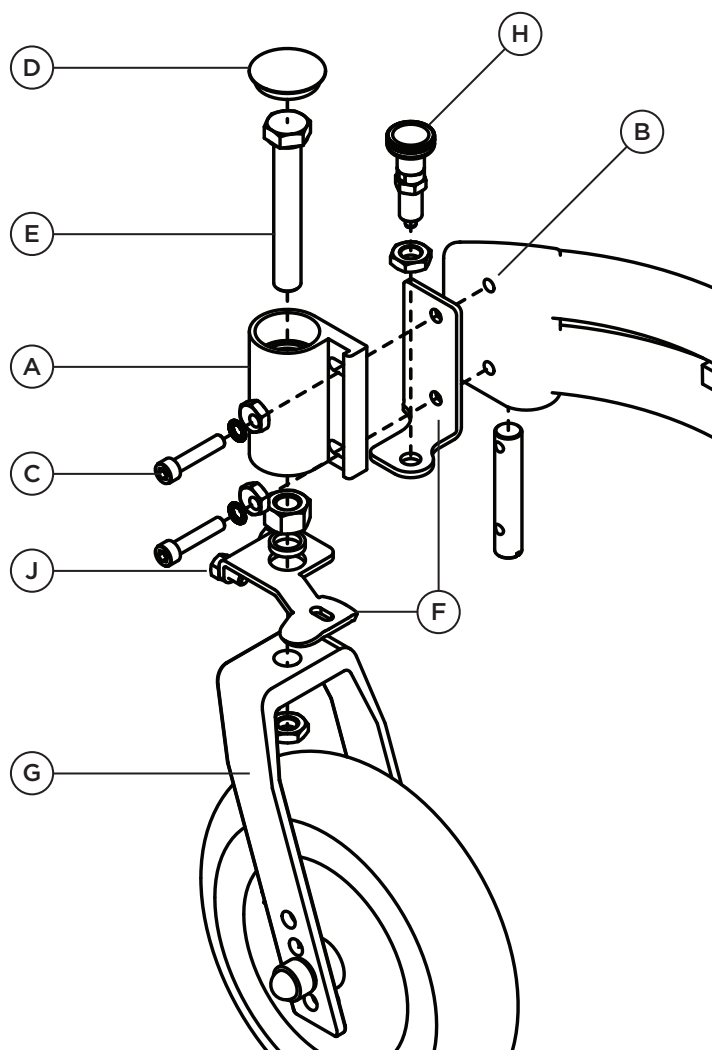

Hjul

Montering av drivhjul med quick-release

Drivhjulen kan enkelt monteras på och av genom dess quick-releasefunktion. Detta kan vara användbart vid exempelvis transporter av underredet.

För att montera drivhjulen (A) håller du in tryckknappen (B) som är centrerad i navet på quick-release axeln och skjuter in drivhjulet (A) till det tar stopp. Nu kan du släppa tryckknappen (B). Säkerställ att drivhjulet hamnat i låst läge genom att dra försiktigt i drivhjulet utan att hålla in tryckknappen (B).





Säkerställ att hjulen är i låst läge efter användning av quick-releasefunktionen.

Demontering av drivhjul med quick-release

För att montera av drivhjulen från underredet håller du in tryckknappen (B) som är centrerad i navet och drar sedan ut hjulet.

Vid byte av trumbroms eller quick-releaseaxeln kan det vara nödvändigt att justera axeln så att den låser korrekt.

För att ställa in axeln så justerar du muttern (C) in eller ut på axeln. Den ska vara justerad så att de 2 låskulorna (D) kommer precis utanför hylsan. Säkerställ att den är låst genom att kontrollera att låspiggen (E) är infälld.

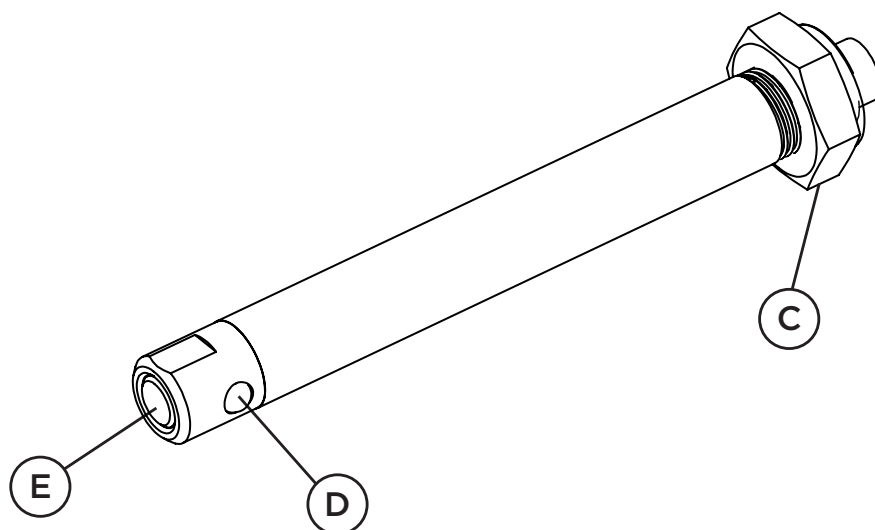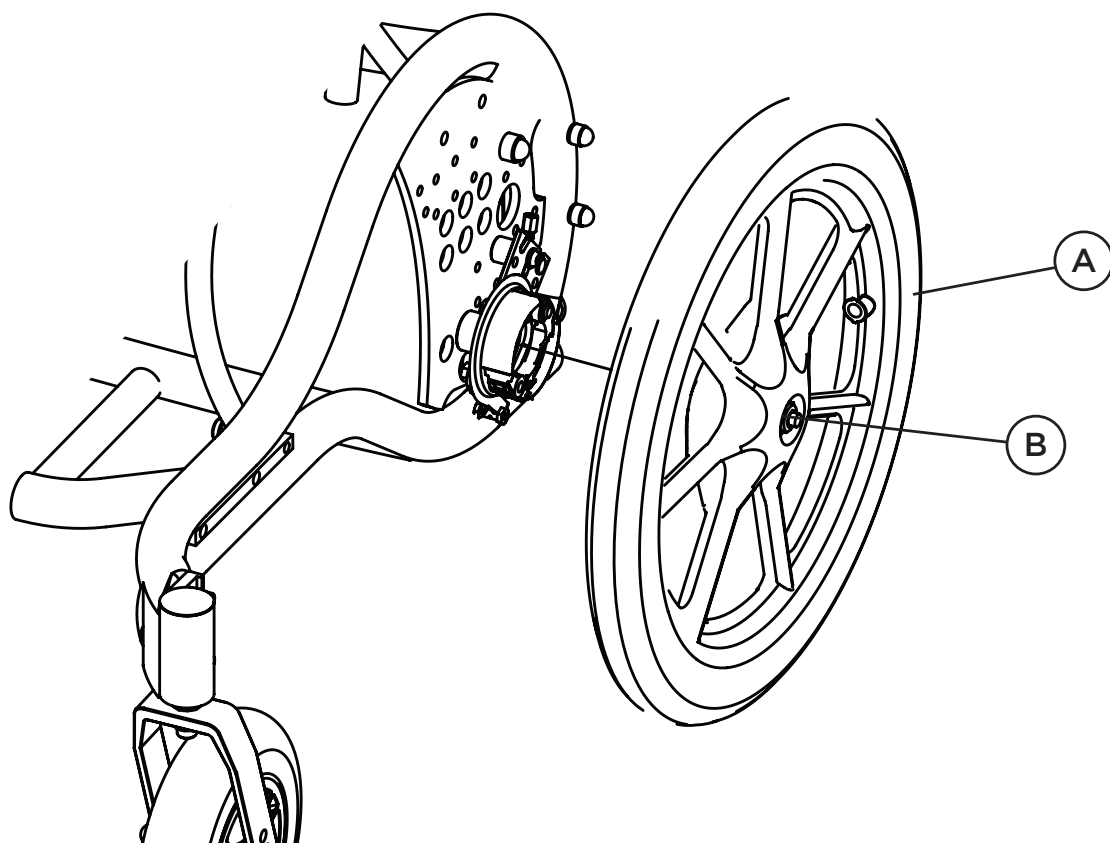

Drivhjulsplacering

Drivhjulsplaceringar

För att erhålla korrekt tyngdpunkt kan drivhjulet placeras i olika lägen beroende på sittsystemets placering på underredets sittplatta. Det finns olika antal lägen, beroende på val av hjulstorlek, att välja mellan.

Det finns även flera olika lägen att välja mellan vid samma hjulstorlek. Kontakta oss gärna för råd och tips kring drivhjulsplaceringen om du känner dig osäker.

Exempel vid Seabass med 24" drivhjul


Då har du tre (3) st olika drivhjulsplaceringar att välja mellan. Välj det läge som är lämpligast med tanke på sittsystemets placering på underredet.




Tänk på att förändring av drivhjulsplacering kan öka tipprisken. Det kan också vara nödvändigt att justera länkhjulsplaceringen vid justering av drivhjulsplaceringen.




Vid förändring av drivhjulsplacering kan det även vara nödvändigt justera parkeringsbromsen något. Se avsnitt Parkeringsbroms för ytterligare information.

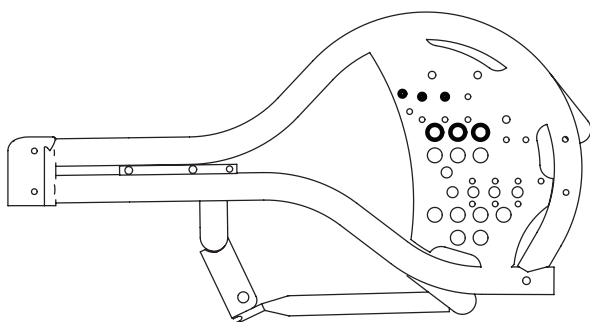


Drivhjulspacering 24"

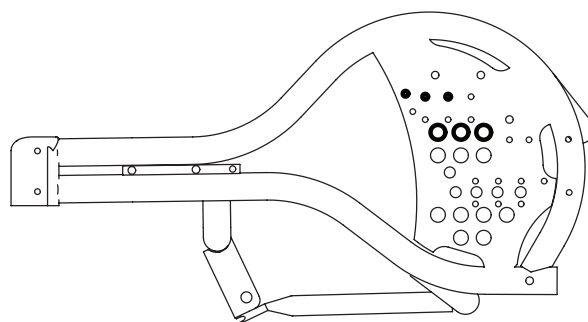


Drivhjulspacering 22"

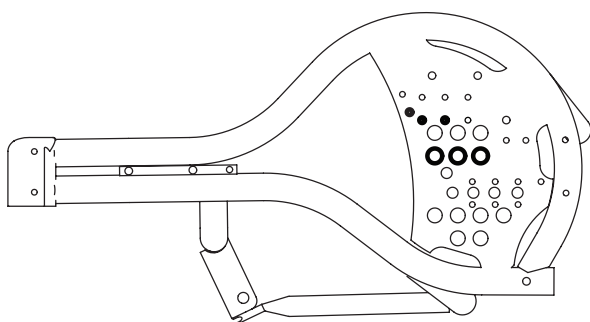


Drivhjulspacering 20"

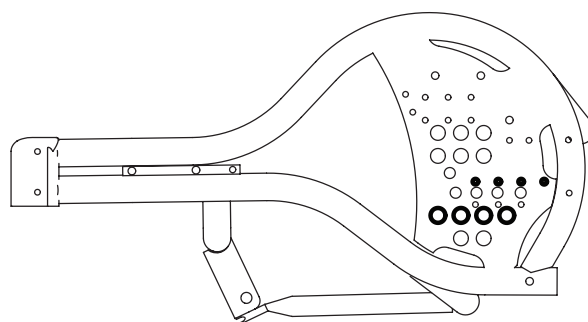


Drivhjulspacering 16"

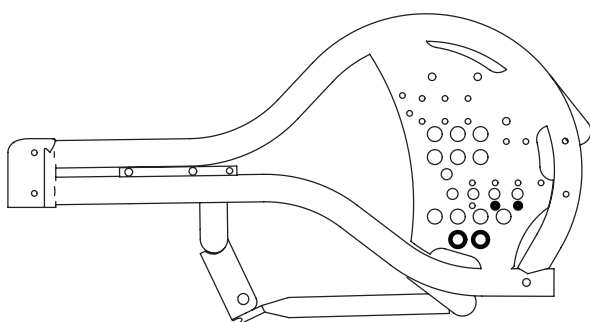

Drivhjulspacering 12"

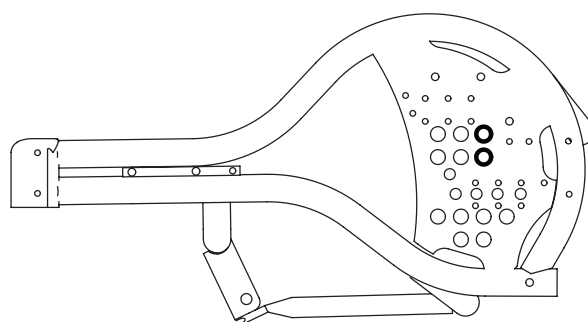

E-drive 20"

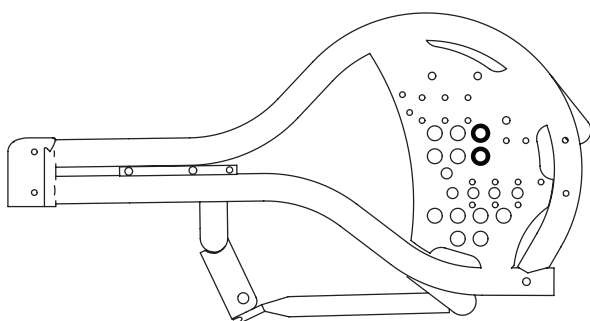

E-drive 16"

E-drive

E-drive tillsammans med Seabass G2

E-drive är ett elpaket som gör Seabass G2 elmanövrerad. E-drive finns som tillval för Seabass G2 i utförande 16" samt 20" drivhjulstorlek.

Montering av e-drive


E-drive ersätter befintliga drivhjul och monteras enligt bildbeskrivning, i avsedd hålbild på rullstolsramens sidostycke med distans, bricka, skruv, mutter och navhysla. Handkontrollen monteras med medföljande detaljer på körbågens körhandtag.



För mer utförlig information kring e-drive hänvisar vi till separat monteringsanvisning "E-drive för Seabass G2 MED3058".

Att använda e-drive

E-drive gör Seabass G2 till en elmanövrerad vårdastyr rullstol och manövreras med hjälp av en handkontroll.

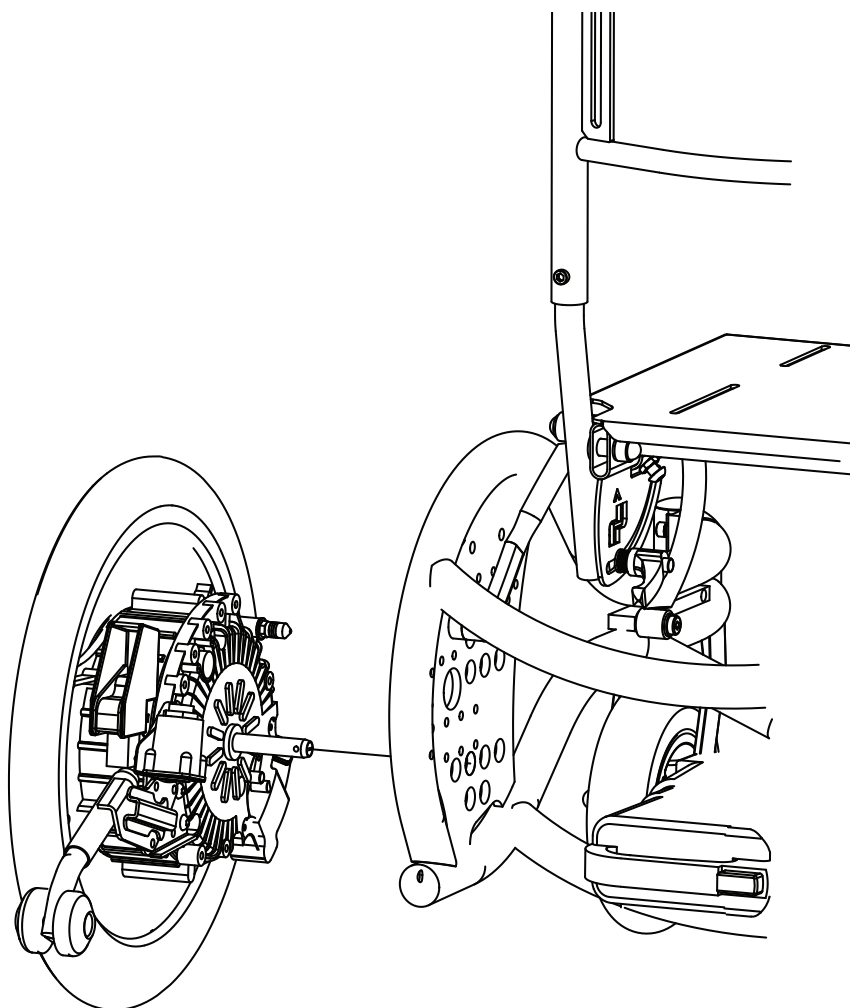

Broms

Användning av trumbroms

Underredet är utrustat med trumbroms som manövreras av vårdaren. Kontrollera alltid att bromsarna fungerar innan användning.

Tryck in höger bromshandtag (A) samtidigt som du för underredet framåt. Bakhjulet ska då bromsa och ej rulla. Bromshandtaget (A) ska ej gå att pressa ända in mot körhandtaget, utan det ska vara ett glapp på 5-10 mm mellanrum.

Upprepa sedan ovanstående procedur fast med vänster bromshandtag.

Låsning av hjul

För att aktivera låsning av hjul trycker du in bromshandtaget (A) och skjuter fram den röda låsspaken (B) till önskat läge.



Frigöring hjul

För att frigöra låsning av hjul trycker du in bromshandtaget (A) och den röda låsspaken (B) släpps automatiskt. Släpp sedan bromshandtaget (A).

Felsökning av trumbroms

Om bromsarna inte fungerar ska du först kontrollera att bromsvajern har korrekt spänning. Om vajern har en låg spänning, kan det räcka med att spänna den igen genom att skruva upp skruv (C). Om justering av skruv (C) inte räcker kan du prova nedanstående snabbguide för omspänning av bromsvajer.

1. Skruva in skruv (C) i bottenläge
2. Lossa mutter (D)
3. Pressa ihop bromsen genom att lyfta trumbromsarmen (E) och flytta mutter (D) något längre upp på vajern
4. Lås mutter (D) och finjustera sedan spänningen med skruv (C)

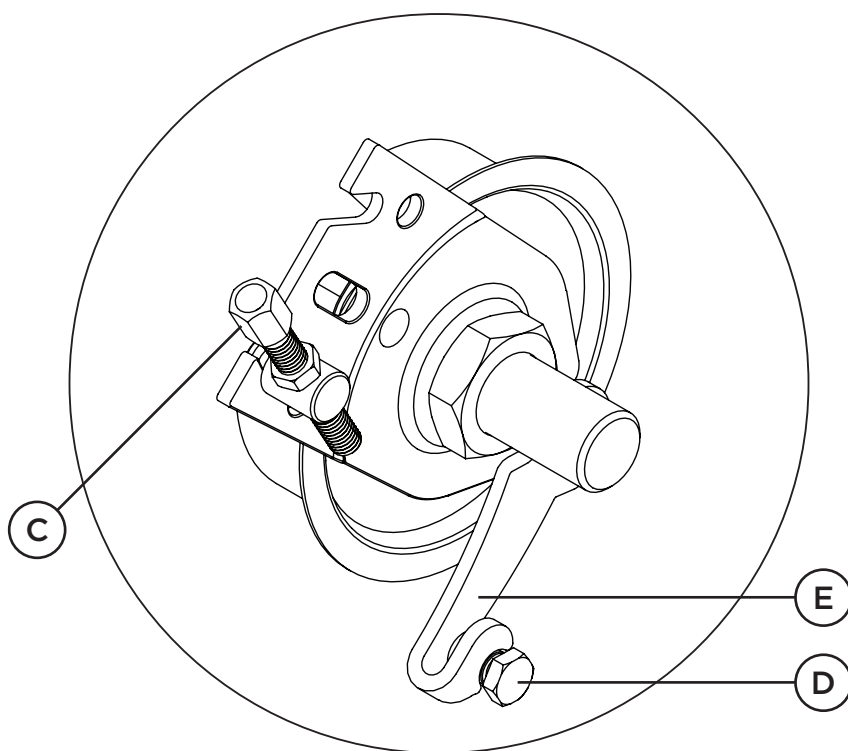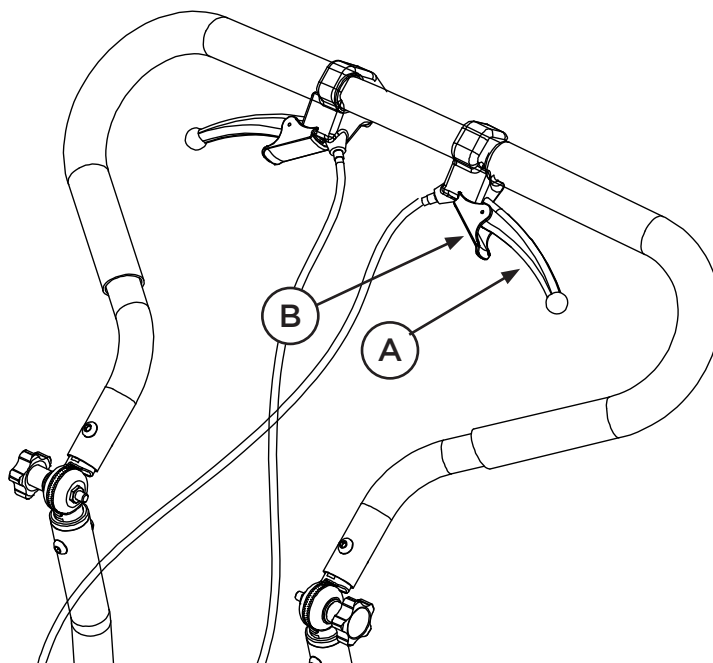

Detaljvy trumsbroms

Montering av trumbroms

För att montera trumbromsen behöver du ta loss drivhjulet från rullstolen genom att trycka in knappen på quick-releaseaxeln och dra hjul och axel ut från trumbromsen.

Montera sedan trumbromsen på rullstolsramen genom att trä den stora distansen (D) över trumbromsens gänga och stick sedan in gängan genom avsett hål i den position du önskar. Fäst med den stora muttern (H) på insidan av ramens sidoplåt och dra åt något. Det är viktigt att du inte drar åt fullt ut.

Ta sedan skruven (C) och stick den genom hålet för rotationsspärr i bromstrumman (A), in genom den lilla distansen (E) och genom hål i ramsidan. Se avsnitt med Drivhjulsplacering med sidoplåtsbilder för möjliga placeringar av drivhjul och bromstrumma.

Fäst med bricka (F) och mutter (G) på insidan av ramens sidoplåt. Dra åt båda muttrarna (H) och (G) så att bromstrumman sitter fast ordentligt. Bromstrummans rotationsspärr ska peka snett bakåt/uppåt för 12/16" och snett framåt/uppåt för 20-24".

Stick sedan tillbaka quick-releaseaxeln med hjulet och tryck in tills hjulet fäster. Testa genom att dra hjulet lätt utåt (utan att trycka på quick-releaseknappen).




Bromstrummans rotationsspärr ska peka snett bakåt/uppåt för 12/16" och snett framåt/uppåt för 20-24".



Se avsnitt Quick-release för ytterligare information kring hur du använder funktionen.



Monteringsprincipen av trumbroms är den samma oavsett hjulstorlek.

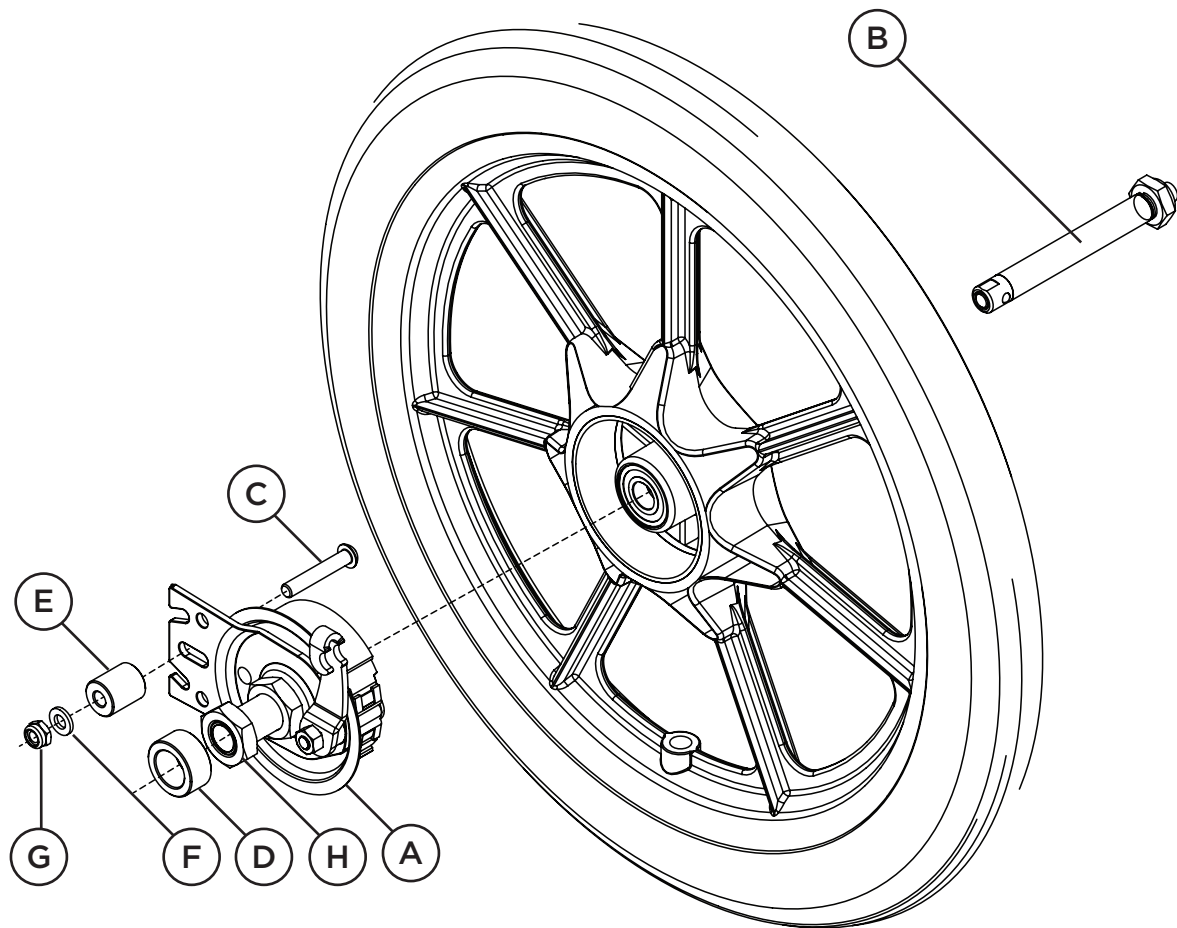

Parkeringsbroms 12-16"

Montering av parkeringsbroms för 12-16"

Parkeringsbromsfästet monteras enligt bild i avsedd hålbild på rullstolsramens sidostycke med medföljande skruvar (A), distanser (B) och muttrar (C).

Justera in parkeringsbromsen (D) vid behov genom att lossa skruven (E) och flytta sedan parkeringsbromsen (D) framåt eller bakåt i spåret.


Dra sedan åt skruven (E) när önskad position är uppnådd.

Att använda parkeringsbroms

Lås parkeringsbromsen (D) genom att trycka parkeringsbromsarmen framåt.

För att få bäst anläggning på däckytan vid användning av parkeringsbromsen rekommenderar vi att mellanrummet mellan däck och parkeringsbromspigg (F) ska vara 20 mm när parkeringsbromsen är i viloläge.

Dra parkeringsbromsarmen bakåt för att frigöra parkeringsbromsen.

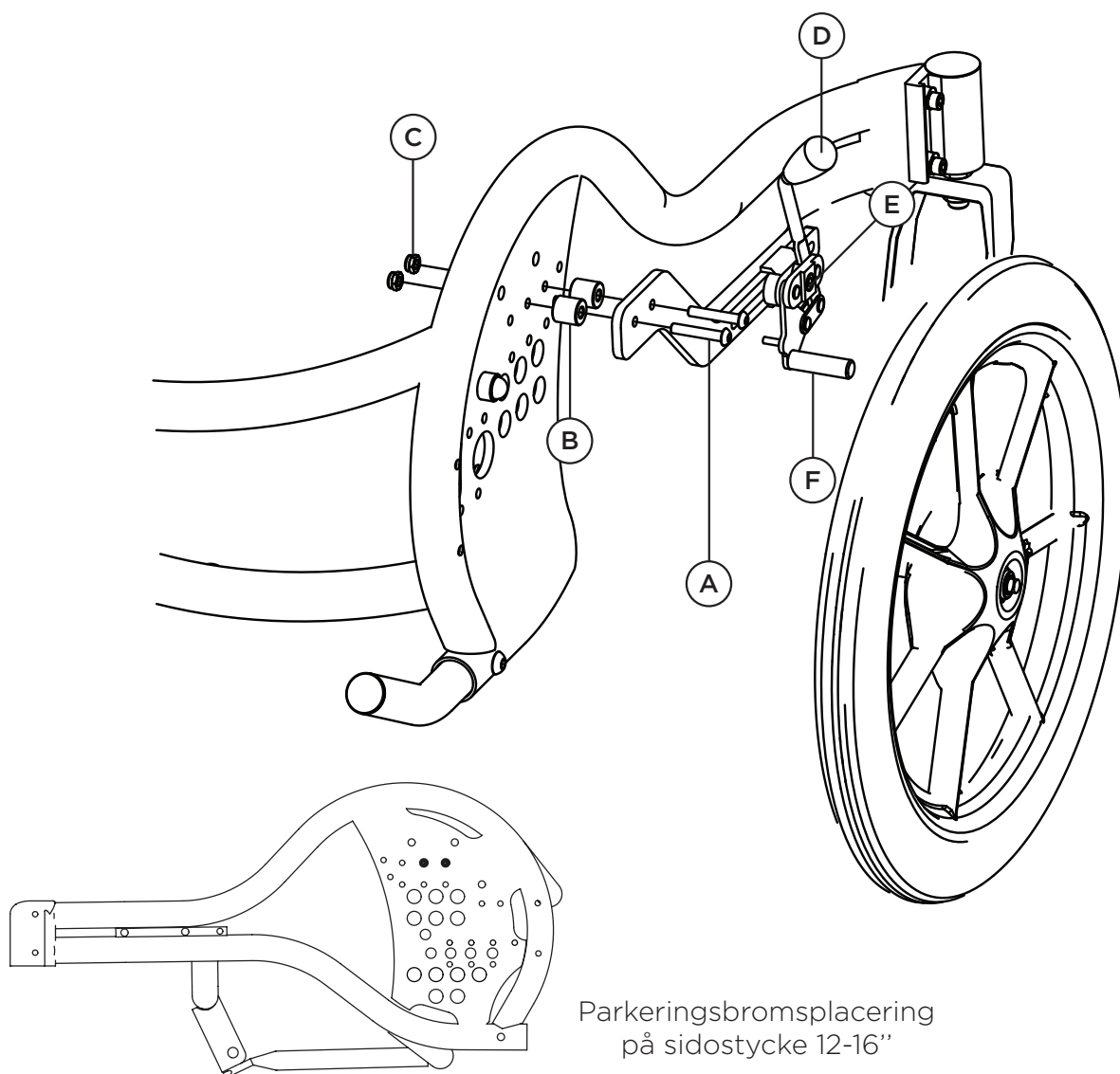

Parkeringsbroms 20-24"

Montering av parkeringsbroms för 20-24"

Parkeringsbromsfästet monteras enligt bild i avsedda hål på rullstolsramens infästning för främre transportfästen (A) med medföljande skruvar (B), brickor (C), muttrar (D) och mutterkåpor (E). Vid användning av parkeringsbroms tillsammans med transportfäste (A) ersätts skruvarna för parkeringsbromsen av transportfästet. Justera in parkeringsbromsen (F) vid behov genom att lossa skruvarna (G) på rörklämman (H) och flytta sedan parkeringsbromsarmen (F) framåt eller bakåt. Dra sedan åt skruvarna (G) när önskad position är uppnådd.





Se till att parkeringsbromsen inte lutar i sidled efter justering.

Att använda parkeringsbroms

Lås parkeringsbromsen (F) genom att trycka parkeringsbromsarmen framåt. För att få bäst anläggning på däckytan vid användning av parkeringsbromsen rekommenderar vi att mellanrummet mellan däck och parkeringsbromspigg (I) ska vara 20 mm när parkeringsbromsen är i viloläge. Dra parkeringsbromsarmen bakåt för att frigöra parkeringsbromsen.



Vid användning av transportfäste tillsammans med parkeringsbroms används ej några brickor. För mer info se avsnitt Transportfästen.

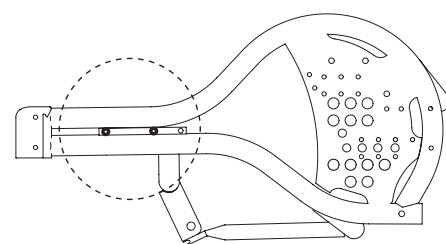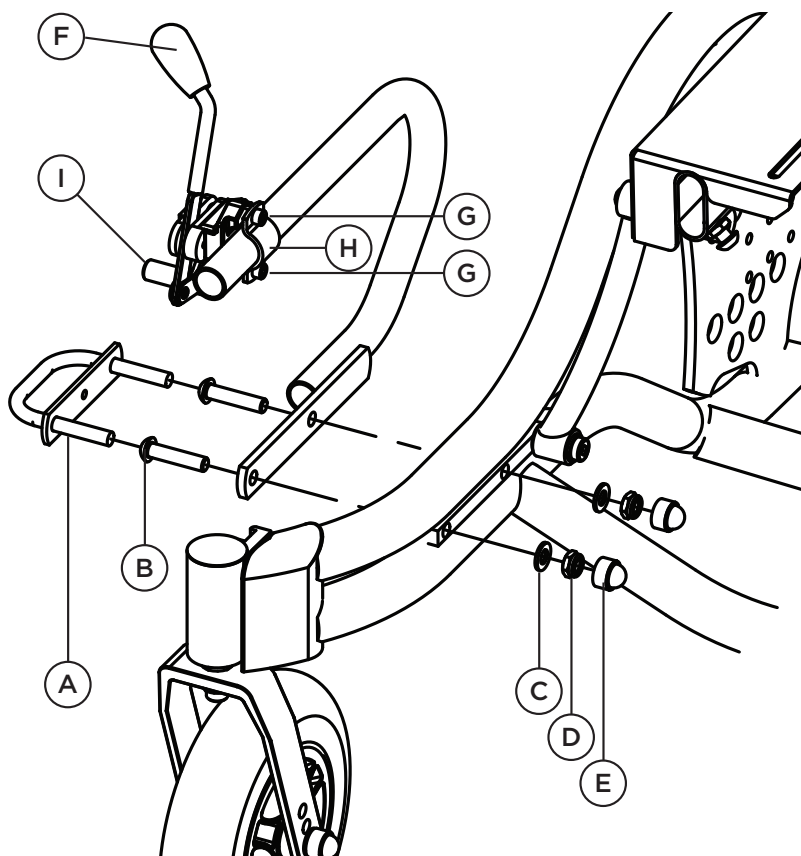

Parkeringsbromsplacering på sidostycke 20-24"




Sitstilt

Sitstiltning

Seabass har två olika lägen för tilt vilket ställs in med hjälp av hål vid nedre gaskolvsinfästningen. Om kolven fästs in i hålet längst ned (som på bild 1) erhålls tilt på 0-35°. Om kolven fästs in i hålet ovanför erhålls en tilt på -7-28°.

För att tilta underredet trycker du in reglaget (A) samtidigt som du håller i körbågen med ena handen och trycker nedåt/framåt. Släpp sedan reglaget (A) när du uppnått önskad tilt.

För att återställa sitsvinkeln till ursprungsläge, tryck in reglaget (A) och dra körbågen uppåt och bakåt genom att hålla i körbågens/körhandtagens handtag.

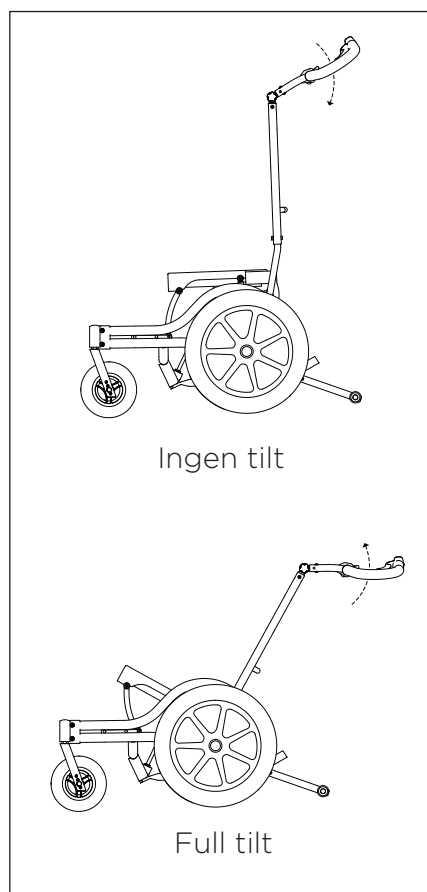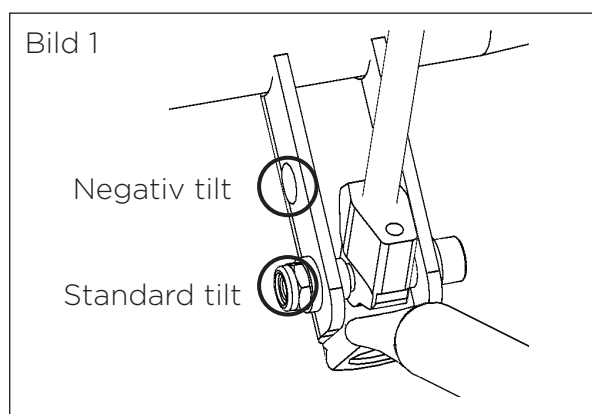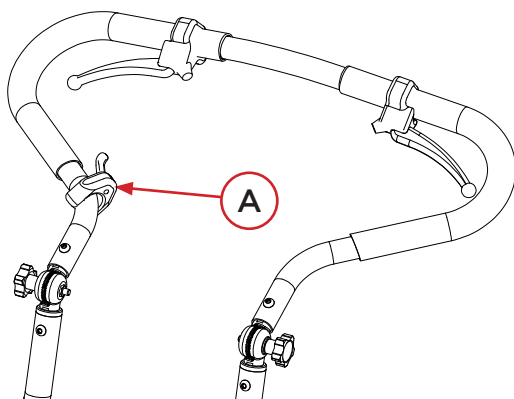

Vid tiltning av underredet skjuts tyngdpunkten nedåt/framåt vilket innebär förminskad tipprisk.



Var uppmärksam på eventuell klämrisk vid tiltning av sitsen.

Fotstöd - Pro

Montering av fotstöd

Oavsett variant av fotstöd sker montering på samma sätt.

För in fotstödsinfästningen (A) i avsedda hål under sittdelsplattans främre del på underredet och dra sedan åt skruvarna (B) på båda sidor.



Notera! Du behöver avlägsna ändavslutet från fotstödsinfästningen på underredets sittplattas främre del innan montering av fotstöd sker.

Säkerhetsstopp

Säkerhetsstopp (C) i form av en sargsprint finns monterad i botten av fotstödsprofilen innanför ändavslutet. Säkerhetsstoppet (C) kan även användas för att hitta tillbaka till en förinställd höjdposition.




Tips! Montera ett extra säkerhetsstopp ovanför fotstödet i fotstödsprofilens spår

Justering av vinkel vid knäleden

När fotstödet är monterat i sittdelsplattan finns möjlighet att vinkeljustera fotstödet vid knäleden. Lossa spakvredet (D) något och justera till önskad vinkel. Dra sedan åt spakvredet.

Justering av fotstödet höjd

När fotstödet är monterat i sittdelsplattan finns möjlighet att höjdjustera fotstödet vid fotleden. Lossa spakvredet (E) något och justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet.

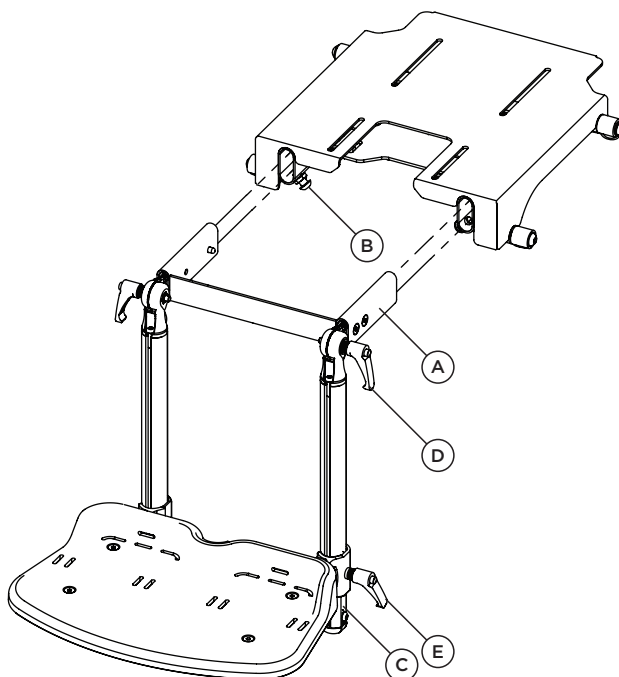

Fotstöd - G2

Montering av fotstöd

För att montera de båda fästena till fotstöden används medföljande skruvar (C). Fästena monteras enligt bild med fyra skruvar/fäste i framkant på sittdelsplattan. Observera att låsskruvarna (B) ska peka inåt/nedåt. Montera fotstödens fyrkantsrör (A) i fotstödsfästena under sittdelsplattans främre del. Lås fast fotstödet med låsskruvarna (B) på båda sidor.

Säkerhetsstopp

Säkerhetsstopp (D) i form av en sargsprint finns monterad i botten av fotstödsprofilen. Säkerhetsstoppet kan även användas för att hitta tillbaka till en förinställd höjdposition.





Montera ett extra säkerhetsstopp ovanför fotstödet i fotstödsprofilens spår för att enkelt hitta tillbaka till en alternativ höjdposition (exempelvis med eller utan skor).

Justering av vinkel vid knäleden

När fotstödet är monterat i sittdelsplattan finns möjlighet att vinkeljustera fotstödet vid knäleden. Lossa vreden (E) något och justera till önskad vinkel. Dra sedan åt vreden.

Justering av fotstödet höjd

När fotstödet är monterat i sittdelsplattan finns möjlighet att höjdjustera fotstödet vid fotleden. Lossa vreden (F) något och justera till önskad höjd. Dra sedan åt vreden.

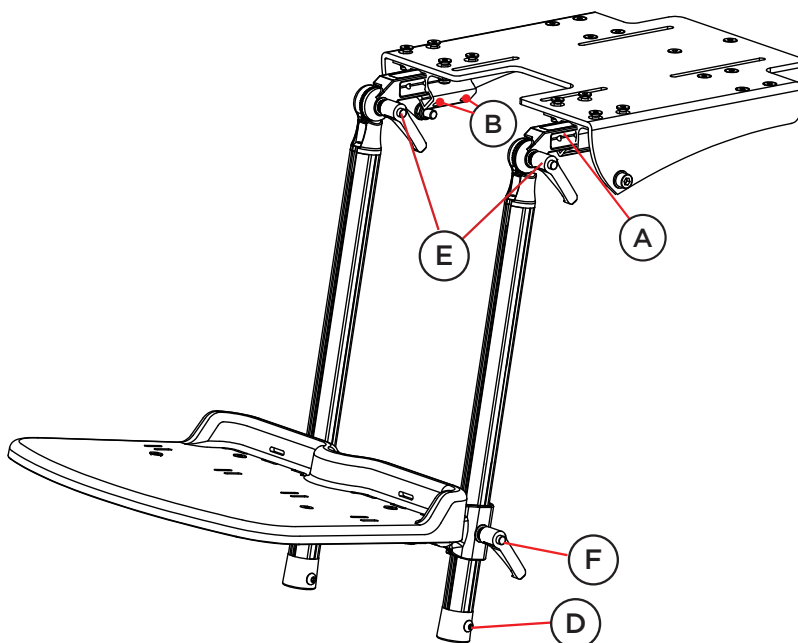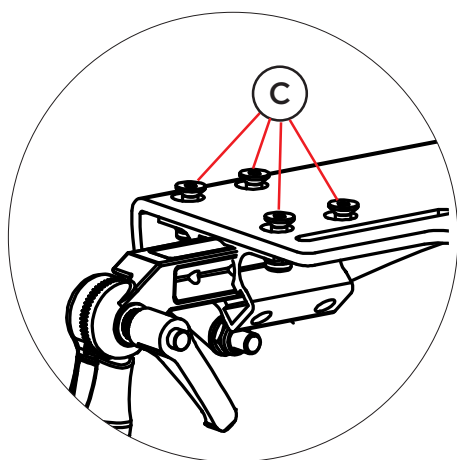

Fotstödsbeslag

Fast fotstödsbeslag (1)

För att höjjustera fotstödet lossar du spakvredet (A) något för att justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet.

Fjädrande fotstödsadapter (2)

För att höjjustera fotstödet lossar du skruven (D) och eventuellt skruven (E) något för att sedan justera till önskad höjd. Dra åt skruven (D). Välj längd på fjädrväg genom att justera skruven (E) till önskad position och dra åt den.



Fjädringens motstånd kan justeras med en spårmejsel genom att skruva på skruven i fjäderpaketet (F).


Uppfällbart fotstödsbeslag (3)

För att höjjustera fotstödet lossar du spakvredet (A) något för att justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet. För att använda den uppfällbara funktionen, lyft fotstödsplattan i framkant.

Kulledsadapter (4)

För att höjjustera fotstödet lossar du spakvredet (A) något för att justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet.

För att använda kulledsfunktionen lossar du först skruvarna (B) och (C) och justerar till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (B) och säkerhetslås positionen med skruven (C).

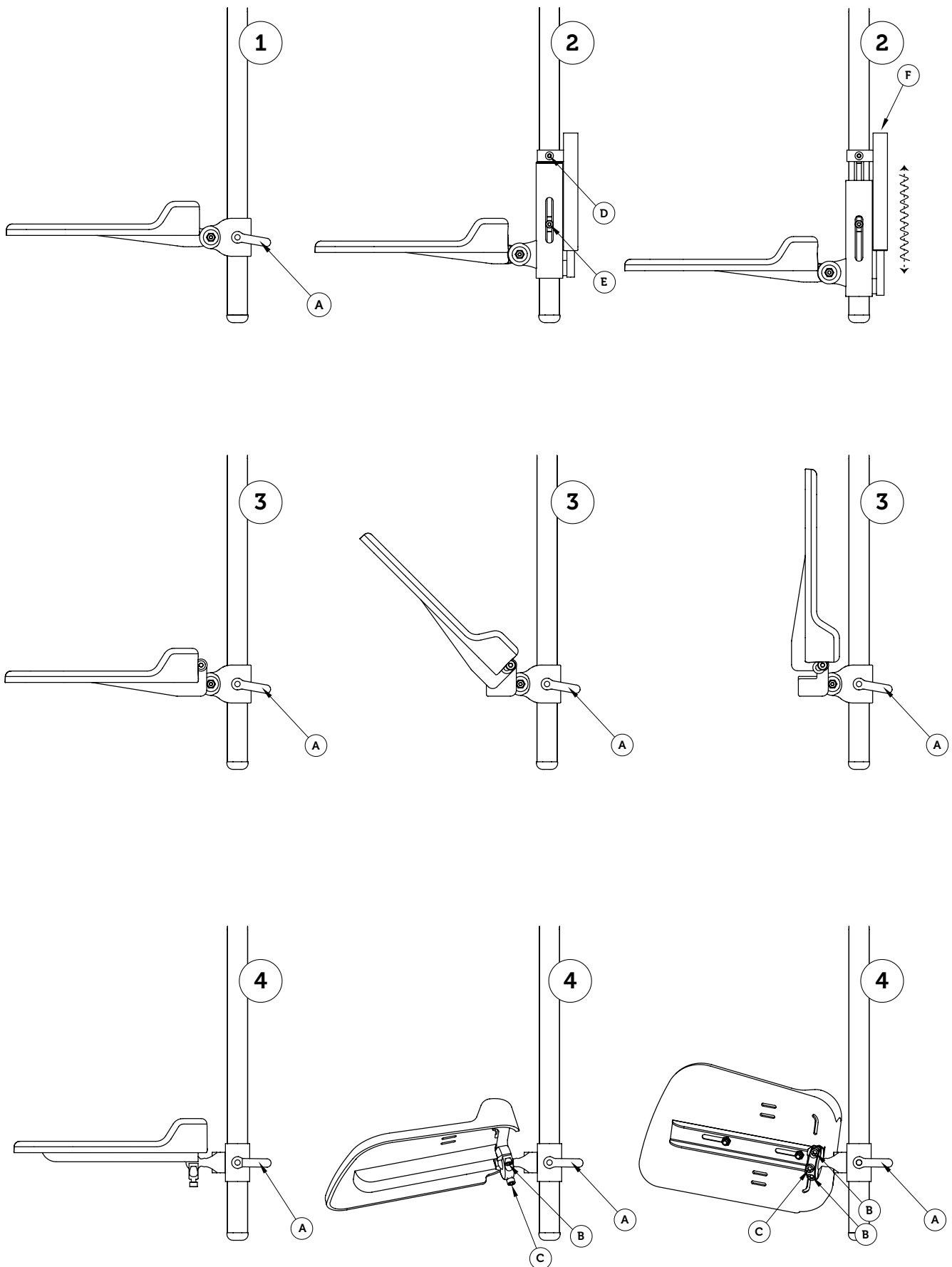


Fotlåda

Montering av fotlåda

För att montera fotlådan börjar du med att skjuta in sargsprinten (A) på fotlådan (B) i fotstödsstaget (C). Ställ sedan in fotstödet (D) på önskad höjd och dra åt spakvredet (E).

Ställ in önskad höjd och bredd på fotlådan med hjälp av skruvarna (F) och (G). Plaststaget (H) på fotlådan ska föras igenom spåret (I) på fotstödsplattan. Avsluta med att montera medföljande polstring och kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

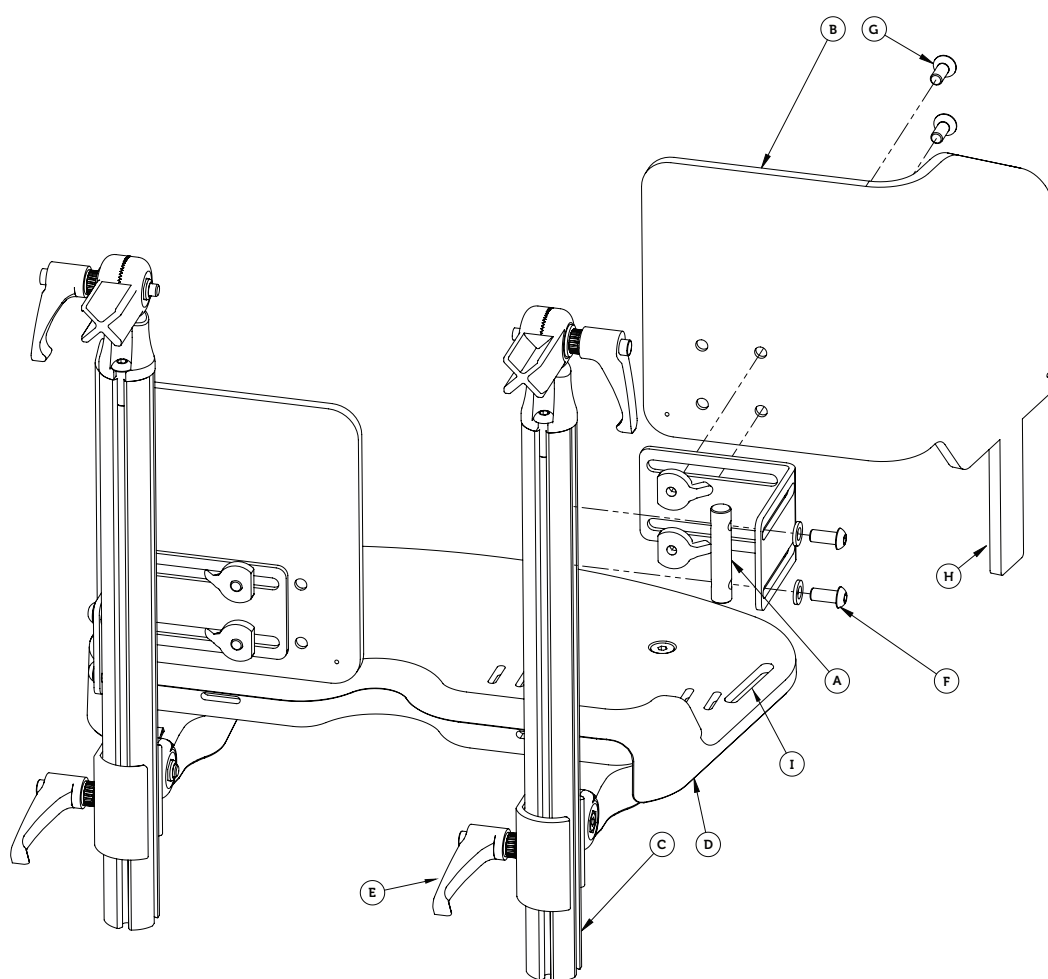

Plaststaget (H) kan efter injustering av önskad höjd kapas eller värmas in under fotstödsplattan enligt egna önskemål.

Vadstöd

Montering av vadstöd


Innan montering av vadstöd kan utföras måste du först ta bort eventuella fotstöd. Börja med att ta bort ändavslutet (G) och lossa sedan på spakvredet (F) som håller fotstödet på plats på fotstödsstaget. Dra sedan fotstödsplattan och dess beslag nedåt. Montera vadstödet genom att skjuta i sargsprinten (C) i fotstödsstaget, justera till önskad höjd och dra åt skruvarna (E). Montera därefter tillbaka fotstödet och ändavslutet (G).

Höjdjustering av vadstöd

För att höjdjustera vadstödet lossar du skruvarna (E) något för att sedan justera till önskad höjd. Dra sedan åt skruvarna (E).

Breddjustering av vadstöd

För att breddjustera vadstödet lossar du skruvarna (A) något för att sedan justera till önskad bredd. Dra sedan åt skruvarna (A).

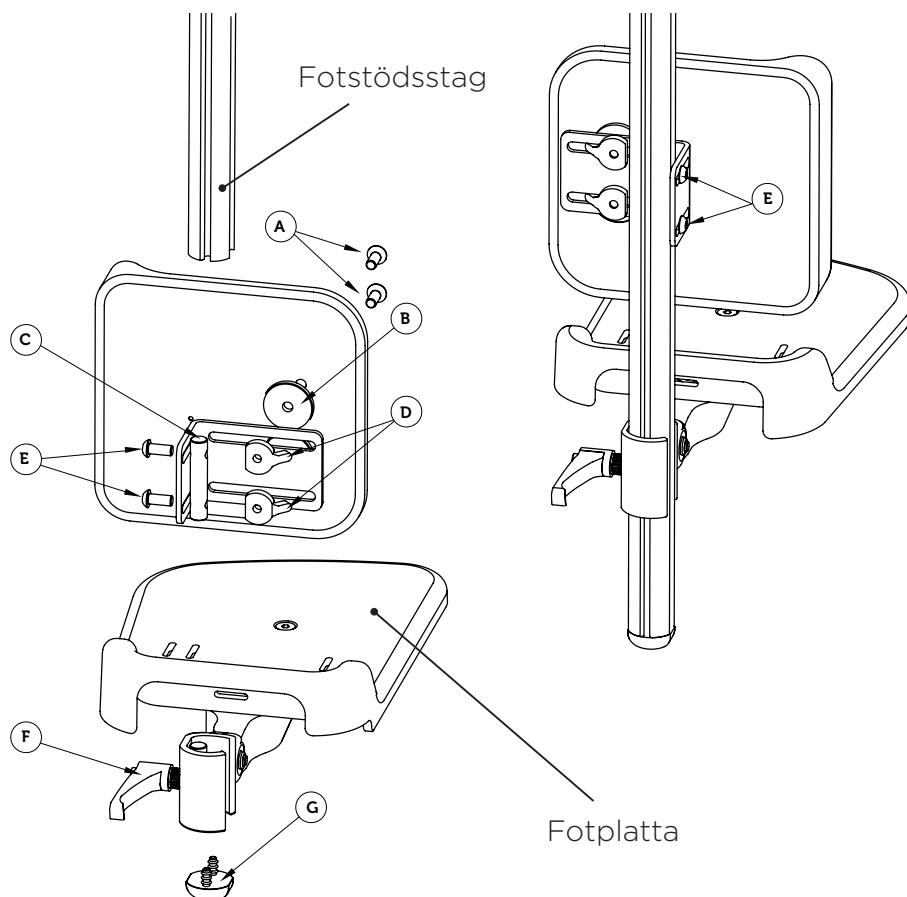

Körhandtag - Pro

Montering av körhandtag

Vid montering av körhandtagen måste du först montera körhandtagsinfästningen (A). För in körbågsinfästningen (A) i avsedda hål (B) under sittdelsplattans bakre del på underredet och dra sedan åt skruvarna (C).

För sedan körhandtagen (D) över körbågsinfästningens vertikala stag (A') och dra sedan åt skruvarna (E).

Höjdjustering av körhandtag

För att höjdjustera körbågen lossar du skruvarna (E) och flyttar sedan körbågen till något av dessa tre (3) höjdlägen. Dra sedan åt skruvarna (E).

Djupjustering av körhandtag

För att djupjustera körbågen (förlänga sittdjupet) lossar du skruvarna (C), under sittplattans bakre del, något och flyttar sedan körbågen till önskat djup. Dra sedan åt skruvarna (C).




Körhandtagen är utrustade med ett säkerhetsstopp, vilket säkerställer att du inte kan påverka säkerheten vid djupjustering av körhandtagen.

Vinkeljustering av körhandtag

För att vinkeljustera körhandtagen lossarna du spakvreden (F) något och flyttar sedan körhandtagen till önskad vinkel. Dra sedan åt spakvreden (F).



Körhandtagen ska alltid ligga an mot sittsystemets rygg vid transport i fordon.

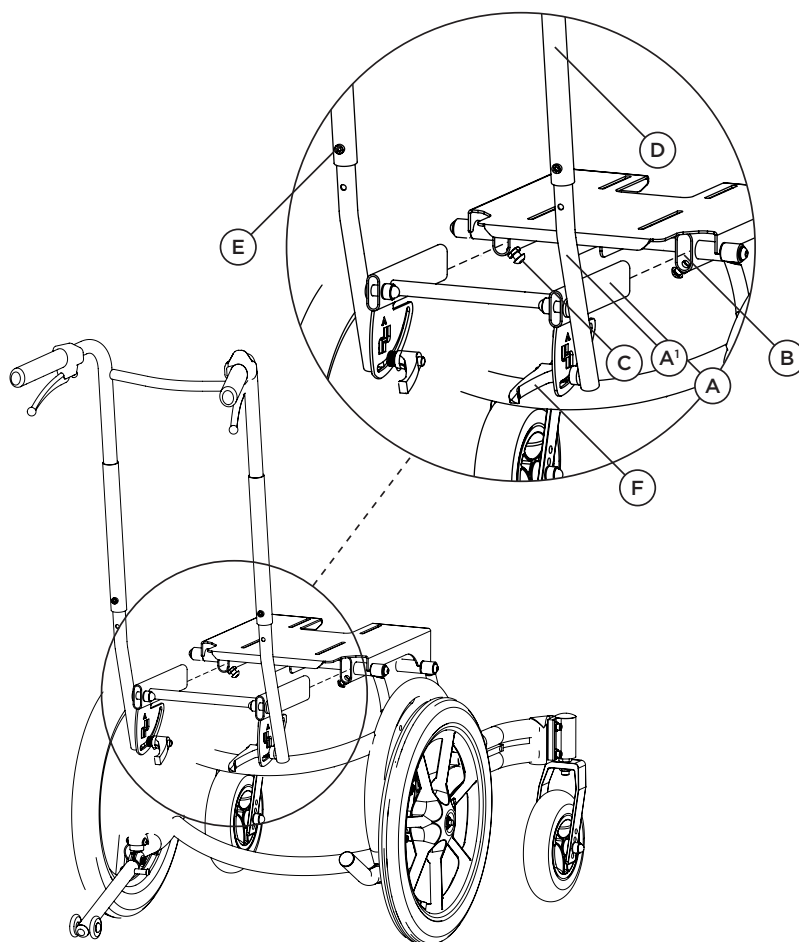

Körbåge - Pro

Montering av körbåge

Vid montering av körbågen måste du först montera körbågsinfästningen (A). För in körbågsinfästningen (A) i avsedda hål (B) under sittdelsplattans bakre del på underredet och dra sedan åt skruvarna (C).

För sedan körbågen över körbågsinfästningens vertikala stag (A') och dra sedan åt skruvarna (E).

Höjdjustering av körbåge

För att höjdjustera körbågen lossar du skruvarna (E) och flyttar sedan körbågen till något av dessa tre (3) höjdlägen. Dra sedan åt skruvarna (E).

Djupjustering av körbåge

För att djupjustera körbågen (förlänga sittdjupet) lossar du skruvarna (C), under sittplattans bakre del, något och flyttar sedan körbågen till önskat djup. Dra sedan åt skruvarna (C).



Körbågsinfästningen är utrustad med ett säkerhetsstopp, vilket säkerställer att du inte kan åverka säkerheten vid djupjustering av körbågen.

Vinkeljustering av körbåge


Körbågen kan steglöst vinkeljusteras efter typ av sittsystem. Frigör låsningen av körbågen genom att lossa båda spakvreden (F) och justera sedan till önskad vinkel. Dra sedan åt spakvreden (F).



Körbågen ska alltid ligga an mot sittsystemets rygg vid transport i fordon.

Vinkeljustering av körbågshandtag

För att vinkeljustera körbågens körhandtag lossar du vred (G) något och justerar sedan till önskad vinkel. Dra sedan åt vredet (G).

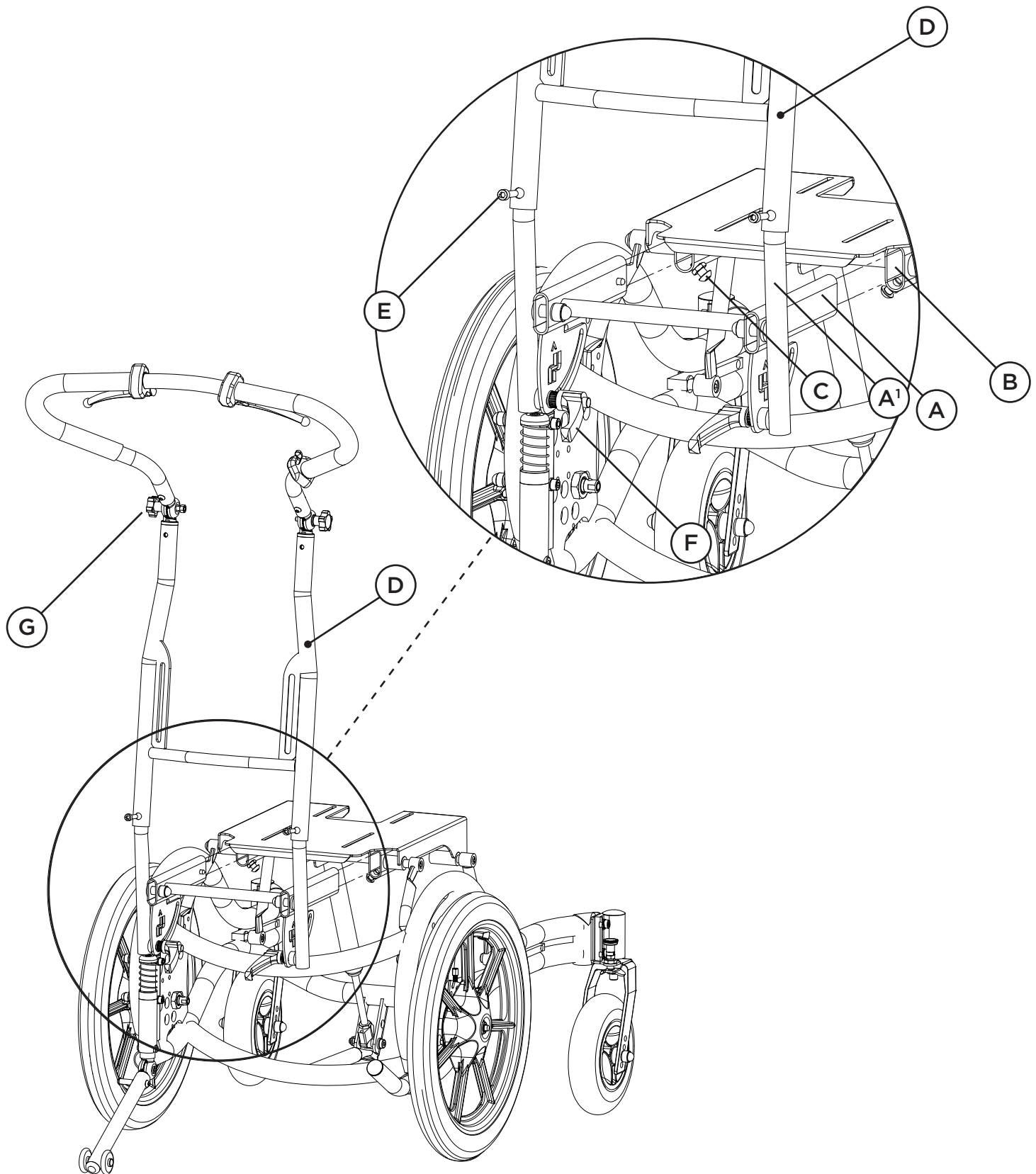

Körbåge vinkelställbar - G2

Montering av körbåge

För in körbågen i fästena i bakkant under sittdelsplattan.
Dra åt skruvarna (A) ordentligt efter montering.

Djupjustering av körbåge

För att djupjustera körbågen (förlänga sittdjupet) lossar du skruvarna (A), under sittplattans bakre del och flyttar sedan körbågen till önskat djup.
Dra sedan åt skruvarna (A).

Vinkeljustering av körbåge

Körbågen kan vinkeljusteras efter typ av sittsystem. Frigör låsningen av körbågen genom att lossa båda spakarna (B) och justera sedan till önskad vinkel. Dra sedan åt spakarna (B).



Körbågen ska alltid ligga an mot sittsystemets rygg vid transport i fordon.

Vinkeljustering av körbågshandtag

För att vinkeljustera körbågens körhandtag lossar du vreden (C) något och justerar sedan till önskad vinkel. Dra sedan åt vreden (C).

Byte av vred till snabbblås

Vreden (C) vid körhandtaget kan ersättas med snabbblås typ (D) vilka beställes separat. Snabbblåsen monteras genom att skruva bort tidigare vred och på motsvarande sätt skruva dit snabbblåset. Tänk på att inte dra åt för hårt, då kan du inte spärra låsfunktionen.


Körbåge fällbar

Montering och justering av körbåge fällbar

Körbåge fällbar monteras och ställs in på samma sätt som den vinkelställbara (se ovan). Den fällbara körbågen har två stycken snabbblås (D) monterade nertill på körbågen. Med dessa snabbblås kan körbågen enkelt fällas ner framåt för att underlätta t.ex. transport.

Fällning av fällbar körbåge

Lossa båda snabbblåsen (D) genom att vika ut låsarmen och fälla körbågen framåt. Fixera körbågen i önskad vinkel genom att vika in låsarmen (D) igen. Snabbblåsen kan justeras till att spärra hårdare eller lösare genom att låsarmen vrids åt höger eller vänster i öppet läge.

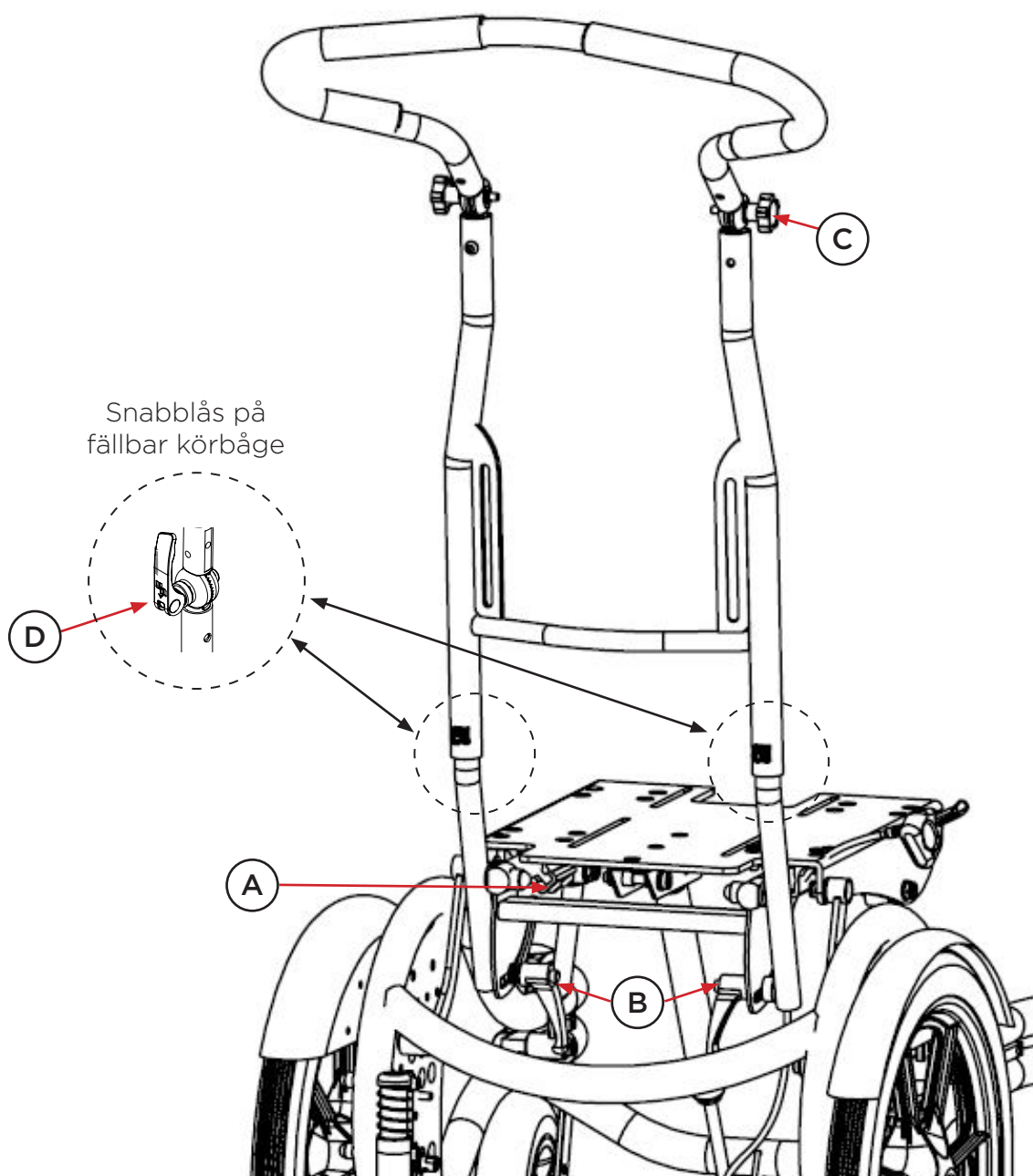

Sittdjupsjustering

För att få rätt viktfordelning och ett välbalanserat underrede kan underredets körbåge djupjusteras. Ett välbalanserat underrede medför enklare manövrering.

För att justera sittdjupet på underredet lossar du skruvarna (A) under sittplattans bakre del något och flyttar sedan körbågen till önskat djup. Dra sedan åt skruvarna (A) igen.



Häng ej väskor eller tunga föremål på körbågen. Detta tillsammans med andra faktorer kan föranleda att underredet kan tippa bakåt.

Armstöd vikbart från rygg

Den vikbara funktionen

För att vika armstödet åt sidan, dra låsmekanismen (A) nedåt och vik sedan undan armstödet. Säkerställ att ett klickljud hörs när du vikt tillbaka armstödet. Möjlighet till att vinkelställa ges genom trehålspositionen för låsmekanismen (A).

Höjdjustering

För att höjdjustera armstödet lossar du skruvarna (B) något och flyttar sedan armstödet till önskad höjd. Dra sedan åt skruvarna (B).

Breddjustering

För att ändra bredd på armstödet lossar du skruven (C) och flyttar sedan armstödet till önskad bredd. Dra sedan åt skruven.

Vinkeljustering uppåt/nedåt


Om du vill justera vinkel på armstödet lossar du spakvredet (D) och flyttar sedan armstödet till önskad vinkel. Dra sedan åt spakvredet (D).

Vinkeljustering i sidled

Om du vill justera plattan i sidled och vinkel, lossa skruvarna (E) och flytta sedan armstödet till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (E).



Säkerställ att ett klickljud hörs när du vikt tillbaka armstödet, vilket indikerar att låsmekanismen hamnat i låst läge.

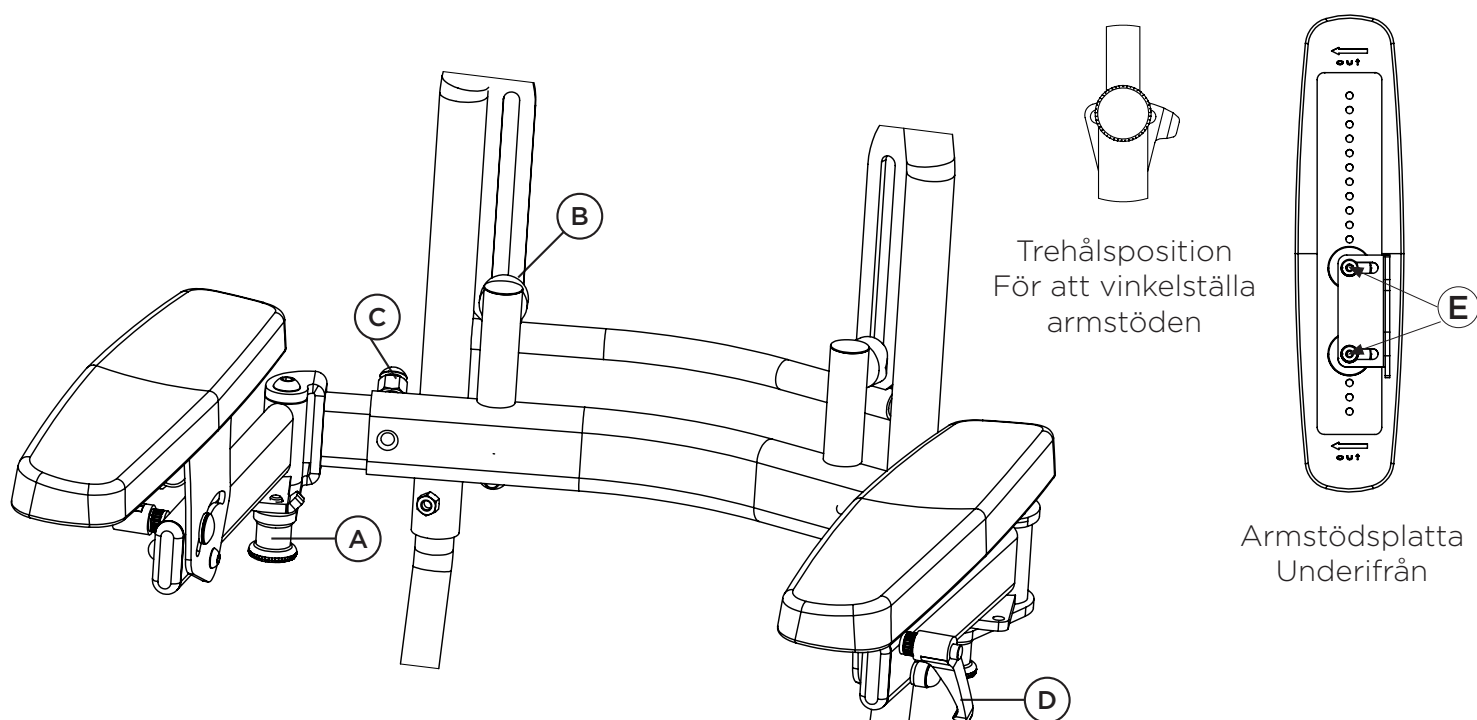

Tippskydd

Montering av tippskydd

Tippskyddet monteras på insidan av rullstolsramen enligt bild med medföljande skruvar (A), brickor (B), muttrar (C), distans (G) och mutterkåpor (D).

Sätt på bricka (B) på skruv (A) och stick igenom skruv (A) i avsedda hål på tippskyddsfästet och genom distansen (G) och igenom rullstolsramen. Möt sedan upp på motsatt sida med bricka (B), mutter (C) och dra åt skruvarna.

Avsluta sedan med att sätta på mutterkåpor (D).



Seabass G2 bör alltid utrustas med tippskydd med tanke på dess många inställningsmöjligheter.


Att använda tippskydd

Tippskydd används för säker och trygg användning av underredet och kan enkelt vikas undan för att inte vara i vägen när det inte används. Trampa försiktigt ned tippskyddet (E) med foten och vrid det åt sidan. Försök att trampa så nära tippskyddsstaget (F) som möjligt vid deaktivering av tippskyddet. Detta är för att delarna ska ha längsta möjliga livslängd.

Se till att vrida tippskyddet ända tills du hör ett klick, vilket indikerar att tippskyddet hamnat på plats.



Vid användning av tippskydd tillsammans med tramprör sitter tippskyddet monterat på vänster sida som standard.

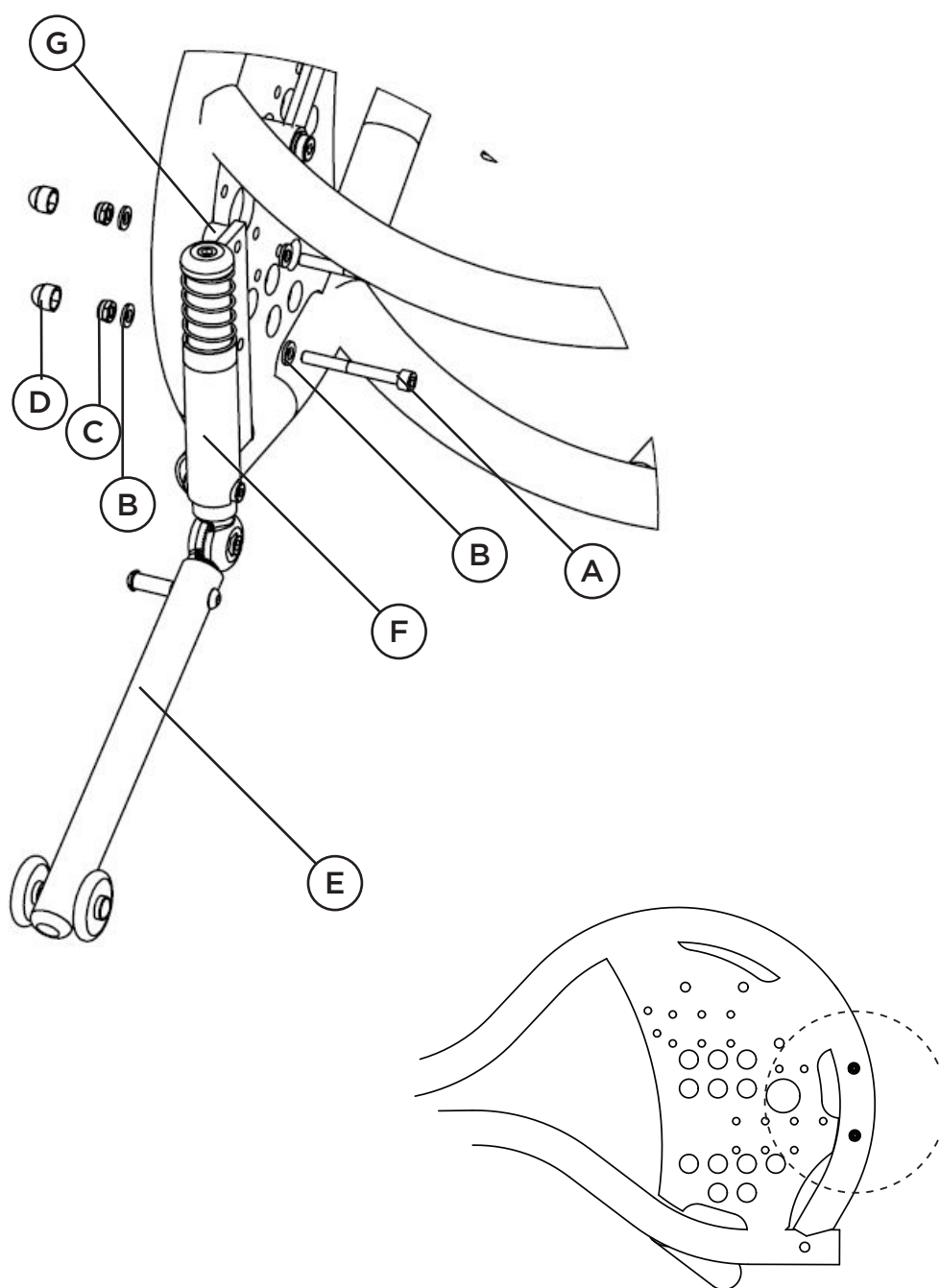

Tramprör

Montering av tramprör

Montera trampröret (A) på avsedd plats, i bakre delen av rullstolsramen, genom att trä in trampröret (A) och lås dess placering med en skruv (B) från utsidan.



Du behöver avlägsna ändavslutet från underredets bakre rör innan montering av tramprör sker.




Trampröret sitter monterat på höger sida som standard.

Att använda tramprör

Tramprör används för att underlätta uppresning av underredet, exempelvis vid trottoarkanter. Tryck med foten på trampröret samtidigt som du håller i körbågen, och drar lätt bakåt, för att frigöra utrymme under länkhjulen.



Vid användning av trampröret är det viktigt att du håller i körbåge eller körhandtag ordentligt.

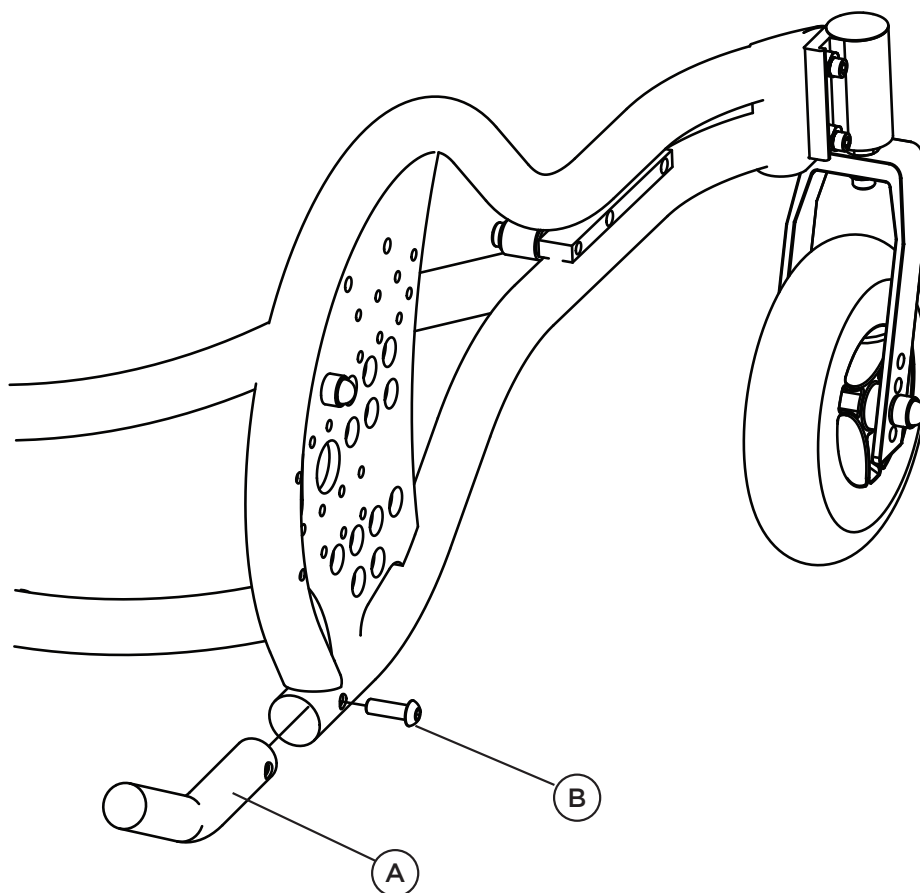

Stänkskärm

Montering av stänkskärm

Stänkskärmen monteras med hjälp av medföljande skruvar (A), brickor (B), muttrar (C) och mutterkåpor (D). Stänkskärmen monteras i samma hålbild som det bakre transportfästet, men på utsidan av rullstolsramen.


För att montera stänkskärmen behöver du först lossa drivhjulet från dess drivhjulssaxel med hjälp av quick-release funktionen och lägga det åt sidan så länge. Stick sedan igenom skruvarna (A) i avsedd hålbild och möt sedan upp med (transportfäste) bricka (B), mutter (C) och dra åt. Sätt sedan på mutterkåpor (D) och avsluta med att montera tillbaka drivhjulet när monteringen av stänkskärm nu är slutförd.

Justering av stänkskärm

Stänkskärmen kan justeras i höjddled genom att lossa skruvarna (E). Justera till önskad höjd och dra åt skruvarna (E) när önskad höjddposition är uppnådd.



Du behöver inte skruva ur skruvarna (E) helt, det räcker med att lossa dem.

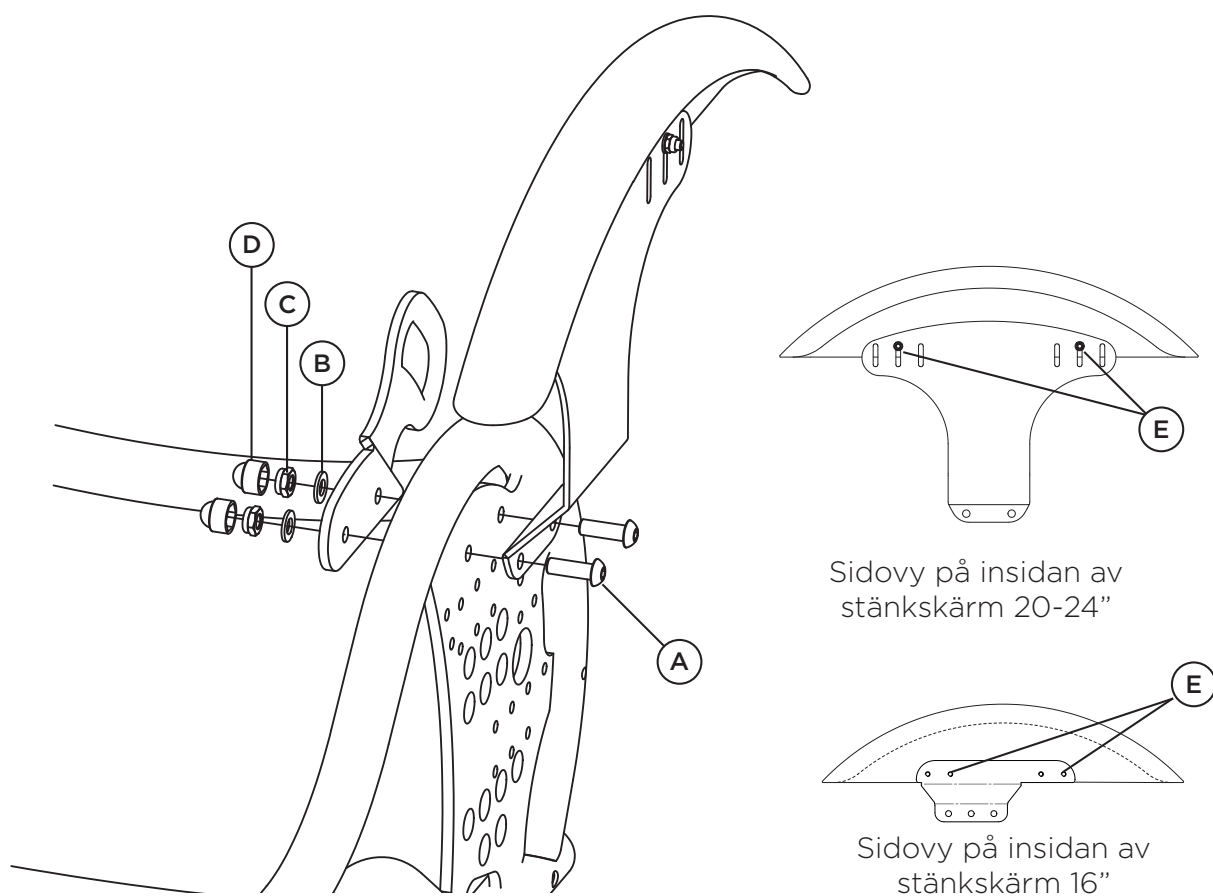

Transportfästen

Montering av främre transportfästen


Montera det främre transportfästet (A) genom att sätta på brickor (C') på transportfäststagen (B) och för sedan in transportfästet, med öglan utåt, i befintliga hål på främre delen av rullstolsramen enligt bildbeskrivning. Möt sedan upp med bricka (C) och mutter (D) på insidan av ramen och dra åt. Avsluta sedan med att sätta på mutterkåpor (E).



Vid användning av transportfästen och p-broms för 20-24" drivhjul används ej några brickor vid montering av det främre transportfästet.

Montering av bakre transportfästen

Det bakre transportfästet (F) monteras på insidan av ramen med hjälp av medföljande skruvar (G), brickor (H), muttrar (I) och mutterkåpor (J) enligt bildbeskrivning. Stick igenom skruvarna (G) i avsedd hålbild på rullstolsramens sidostycke och möt upp på insidan av rullstolsramen med transportfäste (F), bricka (H) och mutter (I). Avsluta sedan med att sätta på mutterkåpor (J).

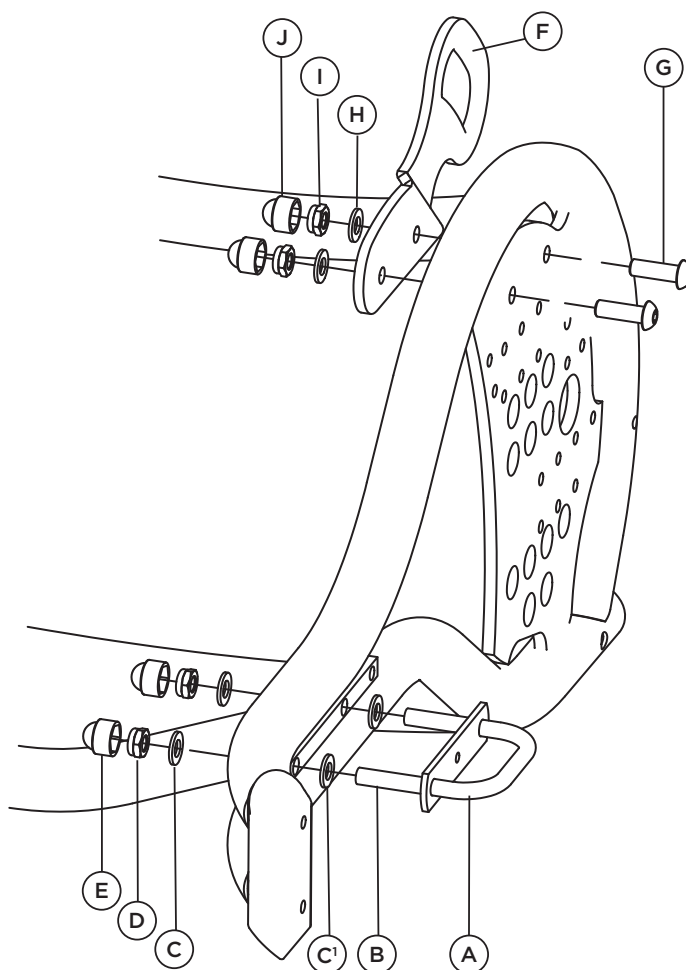



Sittdel

Montering av sittsystem

Sittsystemets fästplatta monteras enkelt på underredet genom fyra (4) skruvar, brickor och muttrar i markerade spår (A) på underredets sittplatta.




För ytterligare information kring fästplattor, se respektive bruksanvisning för valt sittsystem.

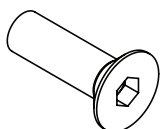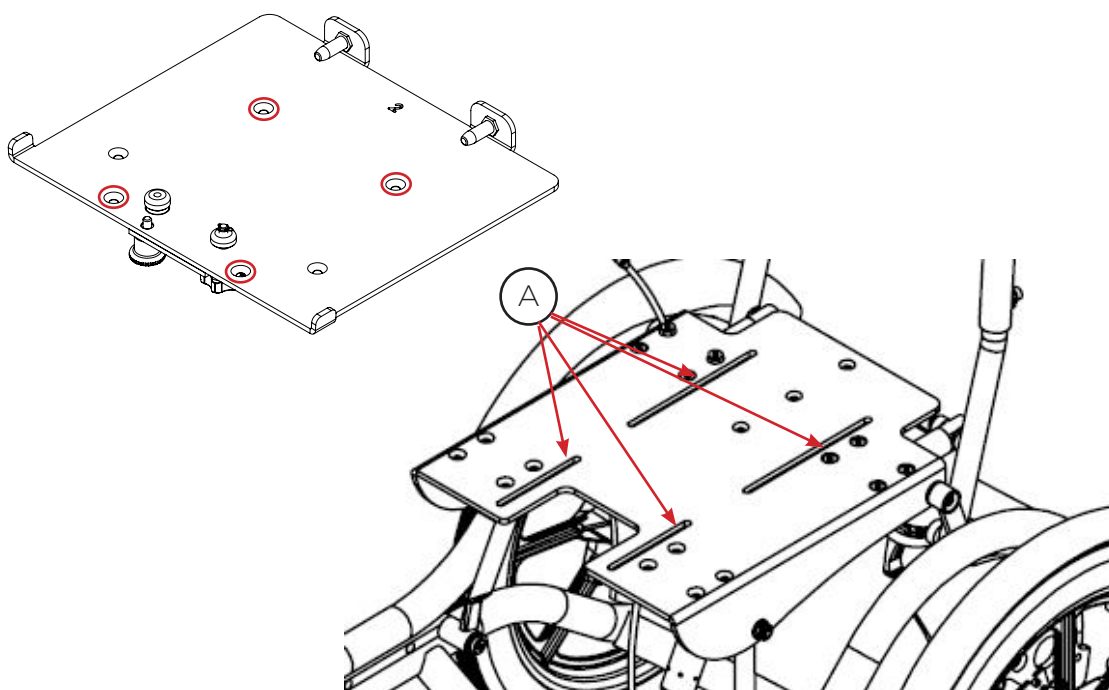

Insexskruv M6x20
Försänkt (D)
Antal 4 st



Bricka
M6/16x1 mm
Antal 4 st

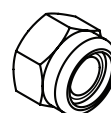

Låsmutter
M6
Antal 4 st

Sammanfattning och efterkontroll

Efter att montering och/eller justering är genomförd, kontrollera att produkterna (huvudprodukt samt tillbehör) är monterade på ett riktigt sätt enligt bruksanvisningen och fungerar som avsett.

Kontrollera inställningarna på produkten och dess tillbehör så att brukaren har en korrekt sittposition.

Efter alla monterings-, justerings eller servicearbeten ska samtliga vred, infästningsskruvar och muttrar kontrolleras och dras åt.

Kontrollera så att hjälpmedlet är korrekt balanserat för att säkerställa att ev tipprisk utesluts.

Om brister uppmärksammas: Använd ej produkten. Kontakta din distributör av hjälpmedlet för åtgärd.

Transport i fordon


Vi vill påpeka att det absolut säkraste är att transportera brukaren i fordonets fasta säten, fastspänd med ordinarie säkerhetsbältet. Vi rekommenderar inte fordonstransporter i underredet. Dock är vi medvetna om att vissa brukare och situationer innebär att brukaren måste transporteras sittandes i underredet. I dessa fall måste nedan säkerhetsanvisningarna alltid följas för att minimera risken för personskador vid en eventuell olycka. Läs mer under Transportfästen.



Anvisningar för transport i fordon

Underredet är krocktestat och godkänt enligt 7176-19 för 135 kg i bil.

Infästning ska ske med spännband, godkända enligt ISO 10542, i underredets transportfästen markerade med följande dekal. Fäst de fyra spännbanden med karbinhakarna i rullstolens fästpunkter. Lås bromsarna på rullstolen och dra åt spännbanden. Körbågen ska ligga an mot ryggen.

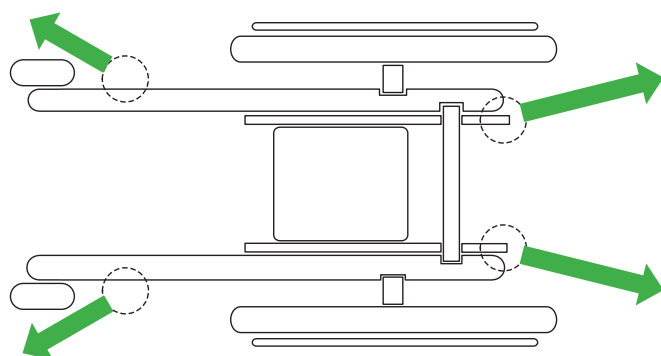

Förslag på
spännbandens
dragriktningar



Det är viktigt att endast sträcka banden, och inte spänna dem för hårt. För hård spänning av banden kan orsaka att underredet blir skevt.



Krockgodkännande gäller belastningsvikter upp till 135 kg.



Man ska färdas framåtvänd i bil med bilens trepunktsbälte..



Fastspänningssystemet samt trepunktsbältet ska vara godkända enligt ISO 10542.



Fäst de fyra spännbanden med karbinhakarna i rullstolens fästpunkter. Lås bromsarna på rullstolen och dra åt spännbanden. Körbågen ska ligga an mot ryggen.

! Korrekt positionering av bältet samt vinkel enligt fig.1.

! Bältet ska sitta spännt och slätt mot kroppen. Rullstolens delar får inte hindra bältet att komma nära kroppen.

! Den övre delen av bältet ska gå över användarens axel utan att trycka på halsen (se fig. 2)

! Överskrid inte maxbelastningen på underredet.

! Ändringar eller åverkan får inte göras på rullstolens infästningar för transportband.

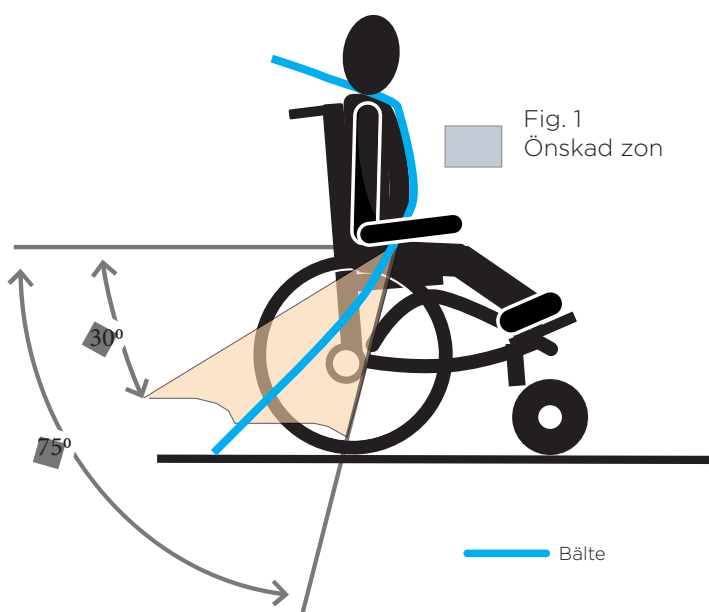


Fig. 1
Önskad zon

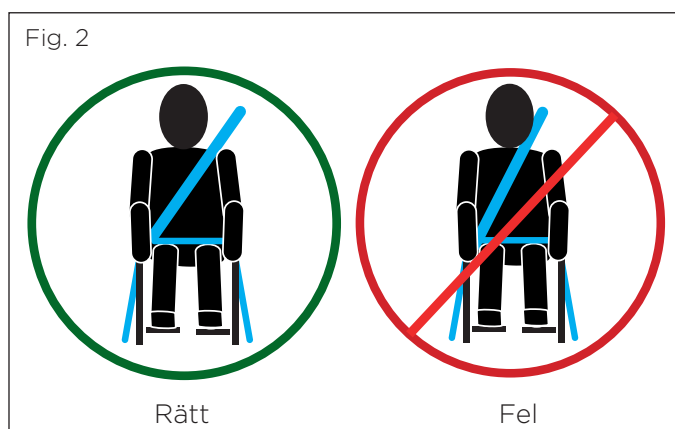


Fig. 2

! Trepunktsbälte ska användas för att minska risken för skador mot huvud och bröst orsakade av fordonskomponenter.

! Om rullstolen är utrustad med ett bord ska detta plockas bort och förvaras på ett säkert sätt under transport.

! När det är möjligt ska övrig löstagbar utrustning antingen säkras i rullstolen eller plockas bort för att förvaras säkert under transport.

! Tänk på att spännet på bilbältet inte ska hamna så att "öppningsknappen" kan komma i kontakt med lösa delar vid en kollision.

! Rullstolen ska tas ur bruk om den har varit inblandad i en kollision.


Körteknik

Assistenthjälp, upp framlänges

- Se till att inaktivera tippskydd.



Trampa ned trampröret

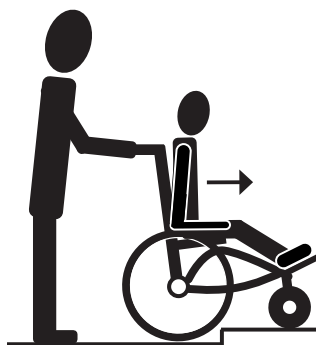


Assistenthjälp, upp baklänges

- Se till att inaktivera tippskydd.



Trampa ned trampröret

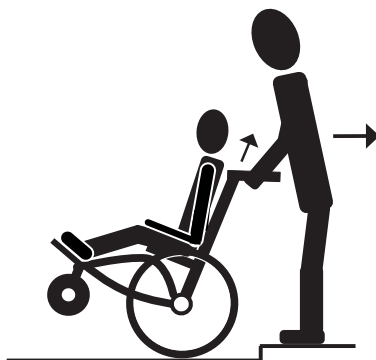


Assistenthjälp, ned framlänges

- Se till att inaktivera tippskydden.



Trampa ned trampröret

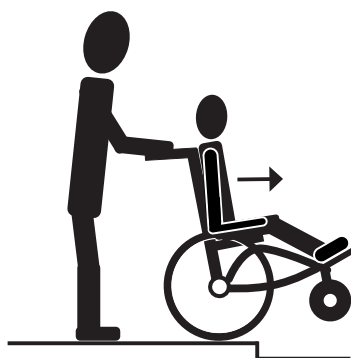


Aktivera alltid ev. tippskydd när förflyttningen är klar!

Assistenthjälp, upp trappor

- Se till att inaktivera tippskydd.

Var alltid två personer vid denna typ av förflyttning. Bär i ramen och körbågen.

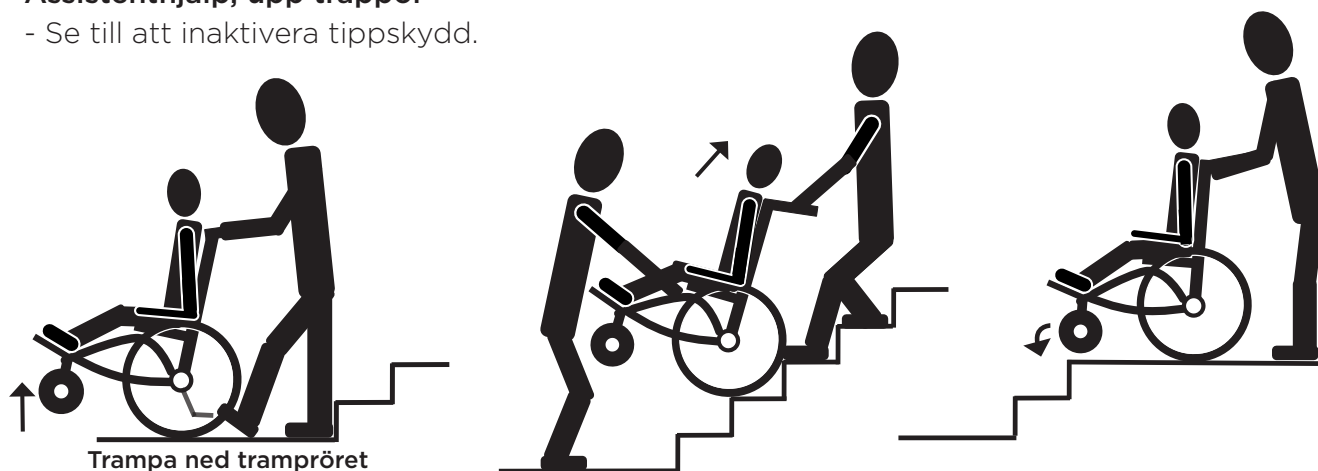

Assistenthjälp, ned trappor

- Se till att inaktivera tippskydd.

Var alltid två personer vid denna typ av förflyttning. Bär i ramen och körbågen.



Lutande underlag

- Tänk på ökad tipprisk vid användning på lutande underlag. Släpp aldrig körbågen vid transport på lutande underlag. Kontrollera att underredet står stadigt och att bromsar är låsta vid parkering.



Aktivera alltid ev. tippskydd när förflyttningen är klar!

Se till att höj- och sänkbara handtag är åtskruvade.

Åk aldrig i rulltrappa även om hjälp finns!

Underhåll och skötselanvisningar

Kontroll före användning

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert är det viktigt med tillsyn och rengöring.

Tillsyn och kontroll ska utföras före varje användning enligt nedan punkter:

- Kontrollera produkten och dess tillbehör med avseende på lösa delar, slitage och skador. Kontrollera särskilt skruvar och muttrar samt vred.
- Kontrollera att sitsen är ordentligt fastsatt på underredet
- Kontrollera produktens stabilitet
- Kontrollera funktionen på eventuella tippskydd
- Kontrollera bromsarnas funktion.
- Kontrollera hjulens skick och att de sitter fast.
- Kontrollera produktens rörliga funktioner, exempelvis ryggvinkling, tilt, höjdjustering, mm. avseende rörlighet samt låsning.

Om brister uppmärksammas, använd ej produkten. Kontakta din distributör av hjälpmedlet för åtgärd.

Skötsel

Behovet av rengöring skiftar och måste bedömas från fall till fall beroende på produktens användning men minst en gång varje vecka rekommenderas.

Rengör produkten med svamp/trasa och antibakteriella, milda rengöringsmedel. Använd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel, frätande ämnen eller lösningsmedel.

Service och underhåll

För att fungera tryggt och säkert ska regelbunden service utföras på produkten. Behovet av översyn/service skiftar och får bedömas från fall till fall beroende på produktens användning och slitage men minst en gång var 6:e månad rekommenderas.

Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt av kvalificerad personal, se avsnitt Säkerhetsföreskrifter i bruksanvisningen. Vid utbyte av delar ska alltid originaldelar från Anatomic Sitt AB användas.

Vid varje servicetillfälle ska det säkerställas att produktens funktioner är tillförlitliga och att produkten är säker att användas. Om det finns brister som påverkar säkerheten och inte kan åtgärdas ska produkten tas ur bruk.

För rengöring av produkten, se avsnitten Skötsel samt Rekonditionering.

Kontrollera följande och åtgärda vid behov:

- Kontrollera produktens samtliga funktioner.
- Kontrollera produkten och dess tillbehör med avseende på lösa delar, skevhet, slitage och skador.
- Kontrollera att alla skruvar, muttrar och bultar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att alla vred är hela och fungerar.
- Kontrollera att sitsen är ordentligt fastsatt på underredet.
- Kontrollera att eventuella tippskydd fungerar.
- Kontrollera bromsarnas funktion.
- Funktionstesta och smörj alla rörliga delar som leder, vajrar, hjul, vred mm. Använd lämplig olja eller smörjmedel (t.ex. CRC 5-56, teflonspray etc).
- Kontrollera produktens rörliga funktioner, exempelvis ryggvinkling, sitstilt, höjdjustering, mm. Både avseende justeringsmöjligheter, rörlighet samt låsning.
- Kontrollera att kolvarna låser i valt läge.
- Kontrollera att vajrarna är korrekt placerade och rätt injusterade.
- Kontrollera hjulens funktion: Kontrollera att alla hjul sitter fast och står stadigt på underlaget. Kontrollera att stolen rullar tillfredställande.
- Kontrollera ev. slitage på alla leder, taggleder och fästen. Säkerställ att de låser som de ska.
- Kontrollera märkning, etiketter och varningssymboler så de är hela och läsbara.

Tillägg för E-drive

- Kontrollera att ställdon och batterier är ordentligt monterade och i dugligt skick.
- Kontrollera att sladdar, kontakter och tätningssringar är hela och utan synliga skador.
- Kontrollera att handkontroll och laddare är i gott skick och fungerar.

Efterkontroll

När service är utförd, kontrollera att produkterna (huvudprodukt samt tillbehör) är monterade på ett riktigt sätt enligt bruksanvisningen och fungerar som avsett.

Rekonditionering

Rekonditionering görs lämpligen om hjälpmedlet är personligt och ska ges till en ny brukare eller långtidsförvaras. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt av kvalificerad personal, se avsnitt Säkerhetsföreskrifter i bruksanvisningen.

För information om produkten och dess funktioner, se bruksanvisning på www.anatomicsitt.com. För information om produktens livslängd se avsnitt, Begränsningar i bruksanvisningen.

Kontrollera alltid vid rekonditionering att hjälpmedlet inte är specialanpassat, innan det skickas till ny brukare.

Vid varje rekonditioneringstillfälle bör det säkerställas att produktens funktioner är tillförlitliga och att den är säker att användas. Om det finns brister som inte kan åtgärdas genom rekonditionering, ska produkten tas ur bruk och återvinnas.

Rengöring

Rengör produkten med svamp/trasa och antibakteriella, milda rengöringsmedel. Använd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel, frätande ämnen eller lösningsmedel.

Produkten kan med fördel rengöras i tvättkabinett: 65°C i max 10 minuter. Vid rengöring av underredet i tvättkabinett ska det stå fixerat och placerat upprätt med låsta hjul.

Tork

Underredet kan torkas i kabinett i max 70°C i upp till 10 minuter.

Kontroller vid rekonditionering

Efter rengöring och torkning kontrolleras produkten på skador/slitage. Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se avsnitt **Begränsningar** i bruksanvisningen) när en bedömning görs för att kontrollera om produkten är lämplig att rekonditionera.

Trasiga, slitna eller spruckna delar byts ut. Använd bara originaldelar från Anatomic Sitt. Reservdelar kan beställas enligt separat reservdelslista/sprängskiss för aktuell produkt. För att produkten ska behålla sin CE-märkning får hjälpmedlet endast försees med reservdelar levererade av Anatomic Sitt AB.

Funktionstesta och smörj alla rörliga delar som leder, vajrar, hjul, vred mm. Använd lämplig olja eller smörjmedel (t.ex. CRC 5-56, teflonspray etc.).
Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna.
Säkerställ att bruksanvisning och alla originaletiketter medföljer vid ny förskrivning.

Etiketter/dekaler

Vid behov av nya etiketter och dekaler, kontakta Anatomic Sitt. För dess placering på hjälpmedlet se www.anatomicsitt.com där återfinns även bruksanvisning.

Bättringsfärg

För att förhindra korrosionsskador eller bättra på repor kan bättringsfärg beställas från Anatomic Sitt AB.

Artikelnummer: 387299, Bättringsfärg underredet G2, mattsvart

Kontrollpunkter

Övergripande:

- ☐ Kontrollera hela produkten och dess tillbehör för att identifiera trasiga, spruckna eller slitna delar som ska bytas ut.
- ☐ Kontrollera produktens samtliga funktioner.
- ☐ Kontrollera att hjälpmedlet inte är skevt och att det står stadigt med alla hjul mot underlaget.
- ☐ Kontrollera att vajrar är korrekt placerade och rätt injusterade.

Chassi:

- ☐ Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna.
- ☐ Kontrollera att tiltvinklinsfunktionen fungerar och att kolven låser i valt läge.
- ☐ Kontrollera att vajrar är korrekt placerade och rätt injusterade.
- ☐ Kontrollera att eventuell lyftkolv fungerar som den ska.
- ☐ Kontrollera att körbågens justeringsmöjligheter och leder fungerar och att polstringen är hel och sitter fast.

Hjul/Bromsar:

- ☐ Kontrollera att skruvar till hjulen är ordentligt åtdragna.
- ☐ Kontrollera att länkhjulen snurrar obehindrat och att lagren inte kärvar.
- ☐ Kontrollera att quick-release axeln låser korrekt.
- ☐ Kontrollera att bromsvajrar är oskadade, korrekt placerade och rätt injusterade.
- ☐ Kontrollera bromsfunktionen på samtliga hjul.
- ☐ Kontrollera att underredet rullar lätt och rakt.
- ☐ Kontrollera eventuellt däcktryck och mönster på däcken.
- ☐ Kontrollera eventuella drivringar/ekerskydd efter grader och vassa kanter.

Fotstöd:

- ☐ Gör funktionskontroll av höjd- och vinkeljustering.
- ☐ Kontrollera ev. slitage på alla taggleder och säkerställ att de låser som de ska.

Armstöd:

- ☐ Kontrollera armstödens justeringar för höjd, djup och bredd.

Tippskydd:

- ☐ Kontrollera vinkel/vridfunktion.

Fästsysteem:

- ☐ Kontrollera funktionen så att det låser.

Övriga ev. tillbehör:

- ☐ Kontrollera alla delar efter slitage, byt vid behov.
- ☐ Kontrollera ev. låsningar och justeringsmöjligheter.

Elektriska funktioner:

- ☐ Kontrollera att ställdon och batterier är ordentligt monterade och i bra skick.
- ☐ Kontrollera att sladdar, kontakter och tätningsringar är hela och utan synliga skador.
- ☐ Kontrollera att handkontroll och laddare är i gott skick och fungerar.

Efterkontroll

När rekonditionering är utförd kontrollera att produkterna (huvudprodukt samt tillbehör) är monterade på ett riktigt sätt enligt bruksanvisningen och fungerar som avsett. Kontrollera också att märkning, etiketter och varningssymboler är hela och läsbara.

Avfallshantering

Återvinning

En förbrukad del eller produkt ska demonteras. Delarna ska separeras efter materialtyp och lämnas på återvinningscentral eller motsvarande. Batteri och gaskolv sorteras som farligt avfall.

Garanti och retur

Garanti och reklamation

Garanti gäller generellt ett (1) år mot fabrikationsfel fr.o.m. leveransdatum eller enligt avtal. Garanti utgår inte för yttre påverkan eller onormal hantering. För garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

För att på bästa sätt kunna bedömma reklamationen ska produkten vara torr och rengjord när den skickas åter.

Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation eller eventuellt garantiutbyte. Bifoga en kopia på fakturan och ange att produkten skall tillbaka till dig efter reparation. Ange leveransadress, kontaktperson samt telefonnummer. Blankett för reklamation finns att hämta på vår hemsida.

Förpacka den torra och rena produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Returer

Felbeställda eller fellevererade varor skall returneras inom 20 dagar från leveransdatum. Bifoga alltid en kopia på både följesedel och faktura. Ange orsak till retur av dina varor. Returblankett finns på vår hemsida.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Observera att specialanpassade produkter inte går att returnera!

Revision

I denna version av bruksanvisningen har följande ändringar gjorts.

Symbolförteckning

-Med fler symboler som sätts på produkten samt återfinns på produktmärkning

Produktmärkning

- Exempel på produktetikett med förklaringstexter

Säkerhetsföreskrifter

- Utbildning och kvalifikationer
- Varningar och försiktighetsåtgärder
- Begränsningar

Monterings- och justeringsanvisningar

-Tillägg avsnitt Sammanfattning och efterkontroll

Underhåll och skötselanvisningar

- Nytt avsnitt för att öka säkerheten vid den dagliga användningen
- Omarbetat och utökat avsnitt Service och underhåll samt Rekonditionering

Revision

-Tillägg avsnitt Revision med information om de förändringar som gjorts efter föregående utgåva

Revisionsförteckning

2020-02-04

SE

Anatomic Sitt AB (tillverkare)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

