



Zitzi  
Sharky Pro

# Bruksanvisning

Användarmanual, monterings-/justeringsanvisning,  
service och underhåll samt rekonditionering

---



Denna bruksanvisningen avser sittsystem Zitzi Sharky Pro med tillbehör. För fullständig översikt av avsedda tillbehör se produktens beställningsunderlag.

## Innehållsförteckning

<b>Tillverkare .....</b>	<b>3</b>	Höftbälte .....	34
<b>Specialanpassning .....</b>	<b>3</b>	Vrifthållare.....	35
<b>Introduktion .....</b>	<b>4</b>	Armstöd från sits.....	36
Inledning.....	4	Armstöd från rygg, fast.....	38
Korrespondens - märkning.....	4	Armstöd från rygg, vikbart.....	40
CE-märkning - klassificering.....	4	Överarmstöd .....	42
Försäkran om överrensstämmelse.....	4	Handbåge .....	43
<b>Avsedda ändamål .....</b>	<b>4</b>	Bord, fast.....	44
<b>Symbolförteckning .....</b>	<b>5</b>	Bord, vikbart.....	45
<b>Produktmärkning .....</b>	<b>6</b>	Bord, förstärkt.....	46
<b>Säkerhetsföreskrifter .....</b>	<b>7</b>	Stödbord .....	47
Utbildning och kvalifikationer .....	7	Fotstöd.....	48
Varningar och försiktighetsåtgärder.....	8	Helt fotstöd .....	49
Kontroll före användning.....	9	Fotstödsbeslag.....	50
Begränsningar.....	9	Fotlåda dubbelstag.....	52
Kvarvarande risker .....	10	Vadstöd.....	54
Kombinationer.....	10	Körbåge .....	56
Avvikelser/tillbud.....	10	Svankstöd/Svankstöd med pump .....	57
<b>Teknisk data/Prestanda.....</b>	<b>11</b>	Värmefoder .....	58
<b>Anpassning och specialanpassning.....</b>	<b>13</b>	<b>Sammanfattning och efterkontroll .....</b>	<b>59</b>
<b>Monterings- och justeringsanvisningar .....</b>	<b>14</b>	<b>Transport i fordon.....</b>	<b>60</b>
Montering av sittsystem .....	15	<b>Underhåll och skötselansvisningar .....</b>	<b>61</b>
Adaptersystem .....	16	Kontroll före användning.....	61
Fast montering.....	17	Service och avhjälpande underhåll.....	62
Plansits .....	18	Rekonditionering .....	63
Sittdel.....	20	<b>Avfallshantering .....</b>	<b>66</b>
Översikt av rygginställningar.....	24	<b>Garanti och retur.....</b>	<b>66</b>
Lås- och ställbar flexfunktion.....	25	<b>Revision.....</b>	<b>67</b>
Bålstöd .....	26		
Bäckenstöd .....	28		
Höftstöd.....	29		
Huvudstöd .....	30		
Positioneringsselar .....	32		

# Tillverkare

Produkten är tillverkad av Anatomic Sitt i Norrköping AB

<b>Postadress</b>	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
<b>Besöksadress</b>	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
<b>Telefon</b>	011-161800
<b>E-post</b>	info@anatomicsitt.com
<b>Web</b>	anatomicsitt.com
<b>Instruktionsfilmer</b>	youtube.com/anatomicsitt
<b>Följ oss på</b>	facebook.com/anatomicsitt

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

---

## Specialanpassning



Kryssa i rutan vid eventuell specialanpassning av produkten.

CE-märkningen upphör att gälla vid specialanpassad produkt.



# Introduktion

## Inledning

Grattis till valet av hjälpmedel. Vi hoppas du kommer få stor användning av vår produkt. För att ni ska kunna nyttja den till fullo på ett säkert sätt är det viktigt att ni läser igenom denna bruksanvisning ordentligt. Detta gäller alla personer som finns i brukarens närhet.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Nya utgåvor finns att ladda ner från vår hemsida: [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com). Revision finns på framsidan tillsammans med datumet.

## Korrespondens - märkning

På produktetiketten finns produktens artikelnummer samt serienummer (huvudprodukt) eller LOT-nummer (tillbehör). Dessa nummer ska anges vid korrespondens med Anatomic Sitt gällande produkterna. Du hittar serienumret på sittplattans bakre del.

## CE-märkning - klassificering

Hjälpmidlet med dess tillbehör är en CE-märkt medicinteknisk produkt, klass I enligt klassificeringsreglerna i annex VIII (EU) 2017/745.














## Försäkran om överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven för medicintekniska produkter enligt förordningen (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter. Se aktuell EU-försäkran om överensstämmelse för produktvarianter och tillbehör, [www.anatomicsitt.com/dokument](http://www.anatomicsitt.com/dokument)

# Avsedda ändamål

Zitzi Sharky är ett modulärt dynamiskt sittsystem för ungdomar och vuxna med sittproblematik där sitt- och ryggdelsbasen har flera inställningsmöjligheter och kan förses med olika tillbehör för att uppnå en specifik sittställning. Sittsystemet är avsett att användas tillsammans med underrede. Zitzi Sharky är en flergångsprodukt.

# Symbolförteckning

	<p>Denna symbol återfinns i bruksanvisningen och uppmärksammar läsaren om t.ex. viktig säkerhetsinformation m.m.</p>	 <p>Anger tillverkningens satsnummer så att sats/batch kan identifieras.</p>
	<p>Denna symbol indikerar eventuell klämrisk.</p>	 <p>Anger att produkten är en medicinteknisk produkt.</p>
	<p>Anvisningar och tips som underlättar vid användning av produkten.</p>	 <p>Anger tillverkarens referensnummer/artikelnummer så att den medicintekniska produkten kan identifieras.</p>
 <p><a href="http://www.anatomicsitt.com">www.anatomicsitt.com</a></p>	<p>Anger att bruksanvisningen alltid ska läsas före användning. Webbadress anger var dokumentet finns elektroniskt.</p>	 <p>Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk produkt kan identifieras.</p>
	<p>Anger att bruksanvisningen ska läsas för att få viktig säkerhetsinformation om t.ex. varningar som inte återfinns på den medicintekniska produktens etikett.</p>	 <p>Unik produktidentifierare som möjliggör entydig identifiering av specifika medicintekniska produkter.</p>
	<p>Anger tillverkaren av den medicintekniska produkten enligt definition i (EU) MDR 2017/745. Kan också användas tillsammans med tillverkningsdatum.</p>	 <p>Anger att produkten är CE-märkt enligt tillämpliga EU-direktiv.</p>
	<p>Anger datumet när den medicintekniska produkten tillverkades.</p>	

# Produktmärkning

## Etikett på huvudprodukt

<b>MD</b> <b>Zitzi Sharky Pro stl. 2 (utan rygg) std.</b> <i>Sharky Pro size2 (without back), std.</i>	→	Produktnamn
<b>REF</b> 153006    2023-11-15 <b>SN</b> 53460	→	Streckkod (EAN-13 eller REF samt SN)
7 322471 530064    Maxlast 130 kg	→	Max belastningsvikt
<b>Anatomic Sitt i Norrköping AB</b> <b>CE</b>	→	UDI-bärare: QR-kod (GS1-128)
Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping		
<b>www.anatomicsitt.com</b>	→	UDI = GS1-128
<b>UDI</b> (UDI=GTIN+(21)SN)    (01)7322471530064(21)53460	→	

## Etikett på tillbehör













<b>MD</b> <b>Bord vikbart transparent kpl. stl. 4 (st) - Zitzi</b> <i>Table, turn-up, size 4 - Zitzi</i>	→	Produktnamn
<b>REF</b> 153075    2023-11-14 <b>LOT</b> FM713127	→	Streckkod (EAN-13 eller REF samt LOT)
7 322471 530750		
<b>Anatomic Sitt i Norrköping AB</b> <b>CE</b>	→	UDI-bärare: QR-kod (GS1-128)
Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping		
<b>www.anatomicsitt.com</b>	→	UDI = GS1-128
<b>UDI</b> (UDI=GTIN+(10)LOT)    (01)7322471530750(10)FM713127	→	

# Säkerhetsföreskrifter

## Utbildning och kvalifikationer

- Montering, service och rekonditionering ska alltid utföras av kvalificerad fackpersonal (tekniker på hjälpmedelscentral eller motsvarande).
- Beslut om anpassning/specialanpassning ska ske av behörig medicinsk personal och utföras av kvalificerad fackpersonal (tekniker på hjälpmedelscentral eller motsvarande).
- Inställningar, justeringar samt in- och utprovning av hjälpmedlet ska alltid utföras av kvalificerad fackpersonal (fackpersonal på hjälpmedelscentral eller motsvarande).
- Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid vara med och prova ut produkten samt utföra en riskbedömning innan första användning.

## Varningar och försiktighetsåtgärder

-  Läs alltid bruksanvisningen före användning.
-  Inställningar får endast utföras av kvalificerad fackpersonal. Det är endast tillåtet att göra inställningar på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
-  Kontrollera produkten med avseende på funktion innan den lämnas ut till en användare.
-  Den som förskriver hjälpmedlet är ansvarig för att instruera brukaren och/eller andra personer i dess närmiljö hur produkten används på ett säkert sätt. Funktionskontrollera alltid produkten innan användning.
-  Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren ska balansera in den valda sitsen för att säkerställa att ev tipprisk utesluts.
-  Justeringar får endast utföras på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
-  Efter alla monterings- justerings eller servicearbeten ska alla infästnings-skravar och muttrar kontrolleras och dras åt.
-  Säkerställ alltid att sittsystemet sitter fast ordentligt i underredet innan patient sätts i sittsystemet! Ett säkerhetsband levereras till sitsen med avsikt att spännas från sitsens ryggprofil och runt chassits körbåge. Detta band ska alltid användas tillsammans med adaptersystem universal samt vid transport i fordon. Se till att detta band sitter stabilt och spänt.
-  Använd aldrig fotplattan vid i- och urstigning från hjälpmedlet.
-  Överbelasta aldrig hjälpmedlet, se avsnittet Begränsningar för aktuell maxlast.
-  Observera att om brukaren griper tag i föremål utanför hjälpmedlet eller lutar sig för långt ut från hjälpmedlet, kan en tyngdpunktsförskjutning ske vilket kan leda till en ökad tipprisk.
-  Lyft alltid i underredet - aldrig i sittenheten.  
Lyft aldrig hjälpmedlet med brukaren i.
-  Utför aldrig service medan produkten används.
-  Lämna aldrig brukaren utan tillsyn när hjälpmedlet används.
-  Gör alltid en kontroll efter användning för att upptäcka rodnader eller tryckmärken på patienten.



## Kontroll före användning

Tillsyn och kontroll ska utföras före varje användning enligt nedan punkter:

- Kontrollera produkten och dess tillbehör med avseende på lösa delar, slitage och skador. Kontrollera särskilt skruvar och muttrar samt vred.
- Kontrollera att sitsen är ordentligt fastsatt på underredet
- Kontrollera produktens stabilitet
- Kontrollera produktens rörliga funktioner, exempelvis ryggvinkling avseende rörlighet samt låsning.
- Kontrollera bälten och selar avseende slitage, funktion samt infästning.

Om brister uppmärksammas, använd ej produkten. Kontakta din distributör av hjälpmedlet för åtgärd.

## Begränsningar

### Maxvikt

Den högsta belastningsvikten är 130 kg och gäller för samtliga storlekar.

Med belastningsvikt avses den maximala vikt som sittsystemet får utsättas. tex brukare och ev. annan vikt. Max belastningsvikt för transport i fordon är 75 kg.

### Livslängd

Produktens förväntade livslängd är 5 år vid normal användning i enlighet med produktens avsedda ändamål, förutsatt att instruktioner i denna bruksanvisning efterföljs. Den faktiska livslängden varierar dock beroende på hur frekvent och intensivt produkten används, men rekommenderas inte överstiga 10 år.

### Gaskolv

Om produkten ska förvaras under en längre tid, beakta följande:

Gaskolvar bör användas regelbundet för att bibehålla sin funktion. Då produkten inte används måste gaskolven aktiveras minst en gång var 6:e månad. Dessutom bör de lagras på så sätt att kolvstången är riktad nedåt annars kan gaskolvens tätning gå sönder och den slutar fungera.

## Kvarvarande risker

Var observant på att produkten och dess tillbehör är korrekt inställda så att brukaren inte åsamkas obehag eller skada under användningen. Om så är fallet ska justering göras eller lämpliga tillbehör monteras.

## Kombinationer

För att med säkerhet bibehålla CE-märkningen ska hjälpmedlet användas tillsammans med produkter, tillbehör och reservdelar levererade av Anatomic Sitt AB. Se produktens beställningsunderlag för möjliga tillbehör och sprängskiss för reservdelar.

Produkten kan dock förses med CE-märkta bälten/selar och huvudstöd/nackstöd från annan leverantör med bibehållen CE-märkning om nedanstående punkter uppfylls:

- Det ska framgå av tredje parts dokumentation att kombinationen är möjlig och godkänd (att tredje parts produkt är avsedd att användas på manuella rullstolar eller modulära sittsystem samt att tredje part godkänner användningen på andras sittsystem).
- Att sittsystemets original infästningspunkter används och att bälten/selar samt huvudstöd/nackstöd fästs i för detta sittsystems avsedda fästen från Anatomic Sitt AB. Fästena måste passa aktuell tredjeparts produkt. Ingen åverkan/anpassning får göras på någon av produkterna för att möjliggöra kombinationen.
- Monteringsanvisningar för huvudstöd och bälten/selar från Anatomic Sitt AB ska följas och återfinns under avsnittet Monterings- och justeringsanvisningar senare i denna dokumentation. Inga andra produkter eller tillbehör får därför fästas på tredje parts produkt.

Notera att en riskbedömning alltid skall göras när produkter från olika leverantörer kombineras. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren eller personer i dess närhet.


## Avvikelser/tillbud

Vid funktionsfel kontakta hjälpmedelscentral eller återförsäljare/tillverkare.

Om ett tillbud som hade kunnat leda till allvarlig skada uppstår ska det rapporteras till Anatomic Sitt AB och landets behöriga myndighet. Produkten ska dessutom skickas till Anatomic Sitt i befintligt skick för vidare utredning.

# Tekniska data / Prestanda


## Sharky Pro

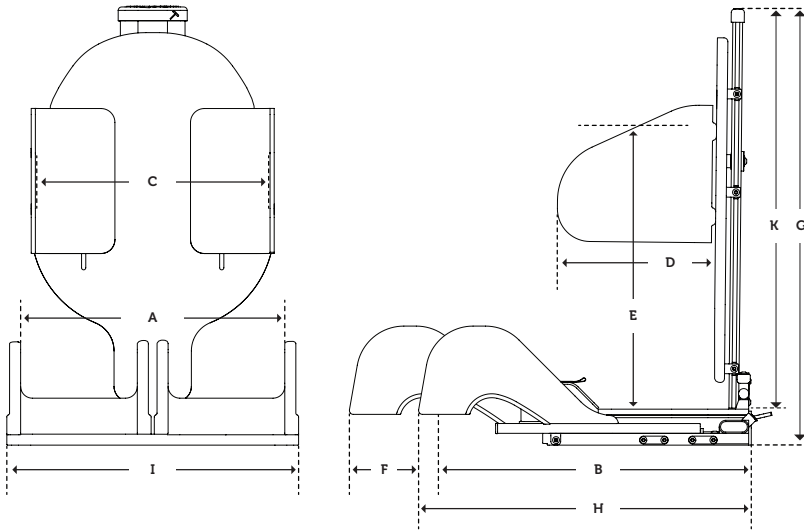

Användardata	Storlek 1	Storlek 2
Brukarlängd	150 - 180 cm	170 - 195 cm
Brukarvikt max	130 kg*	130 kg*
Sitsbredd (A)	36, 39, 42 cm	43, 46, 50 cm
Sitsdjup (B)	36 - 47 cm	45 - 55 cm
Bålbredd (C)	27 - 35 cm	30 - 38 cm
Båldjup (D)	21 cm	25 cm
Axilhöjd (E)	35 - 50 cm	40 - 55 cm
Benlängdsskillnad (F)	10 cm	10 cm
Abduktion/Adduktion	18° / 9°	18° / 9°
Höjd (G)	72 cm	77 cm
Längd (H)	52 - 62 cm	62 - 72 cm
Bredd (I)	43, 46, 49 cm	50, 53, 56 cm
Vikt	14 kg	15 kg
Ryggvinkel	-10° / +30°	-10° / +30°
Ryggplatta Bredd x Höjd	35 x 54 cm	36 x 60 cm
Ryggprofil Längd (K)	67 cm	72 cm


\* Krockgodkännande gäller brukarvikt upp till 75 kg.

### HÖFTSTÖD stl. 3

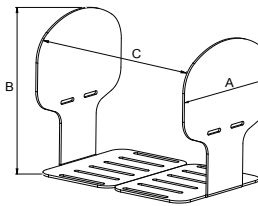

Storlek: A x B = 18 x 21 cm



### Breddjustering C

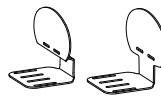

	Höftstöd:	Std.	Rakt
Sharky 1 (SB=36)		22-32	32-39
Sharky 1 (SB=39)		25-35	35-42
Sharky 1 (SB=42)		28-38	38-45
Sharky 2 (SB=43)		26-32	36-39
Sharky 2 (SB=46)		29-35	39-42
Sharky 2 (SB=50)		32-38	42-45

(SB=sitsbredd, Alla mått i cm)


### FOTSTÖD

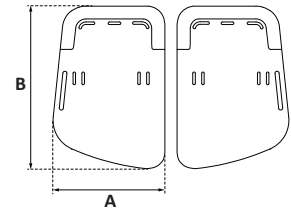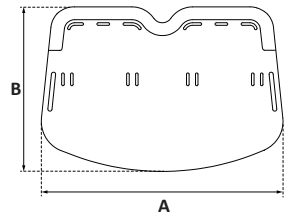

	A x B
Helt stl. 3	380 x 260 mm
Helt stl. 4	380 x 300 mm
Delat stl. 3	180 x 255 mm
Delat stl. 4	180 x 305 mm

Fotstöd storlek	3	4
Fotstödsstag profilfyllnad (cm)	35	40

### BORD

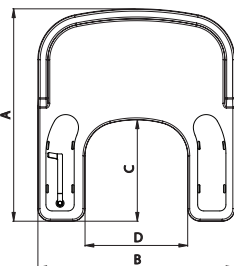


Bord	MÅTT			
	A	B	C	D
Stl. 3	570	570	280	340 mm
Stl. 4	660	600	320	385 mm
Stl. 5	660	650	320	435 mm


Stödbord	MÅTT			
	A	B	C	D
Stl. 3	490	580	300	340 mm
Stl. 4	540	640	330	380 mm
Stl. 5	620	740	380	440 mm

### STÖDBORD

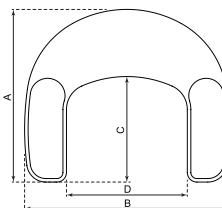

### FOTLÅDA


Fotlåda stl.3 passar stl. 3 fotstöd osv.

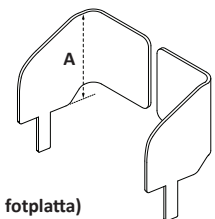

A (höjd från fotplatta)	
stl. 3	210 mm
stl. 4	240 mm

### JUSTERBAR RYGG

Alla mått är uppmätta med foder

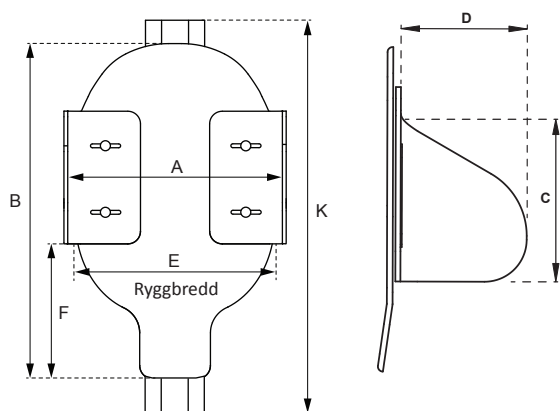

### RYGG mått i cm

B x E

Rygg stl. 1 54 x 35 cm  
Rygg stl. 2 60 x 36 cm

### BÅLSTÖD mått i cm

C x D

stl. 3 (Delfi) 25 x 18 cm  
stl. 1 (Sharky) 22 x 25 cm  
stl. 2 (Sharky) 30 x 29 cm

### BÅLSTÖD

Breddjustering (A) cm inkl. foder

Höjdjustering (F) cm inkl. foder


Bålstöd	Rygg 1	Rygg 2	Rygg 1	Rygg 2
Stl. 3 (Delfi)	21 - 30	21 - 30	13 - 20	16 - 23
Stl. 1 (Sharky)	27 - 35	27 - 35	14 - 21	17 - 24
Stl. 2 (Sharky)	30 - 38	30 - 38	12 - 18	15 - 22

Grå rutor är standardkonfiguration

stl. 1 stl. 2


Ryggprofilens längd (K): 67 72 cm

### ARMSTÖD FRÅN SITS

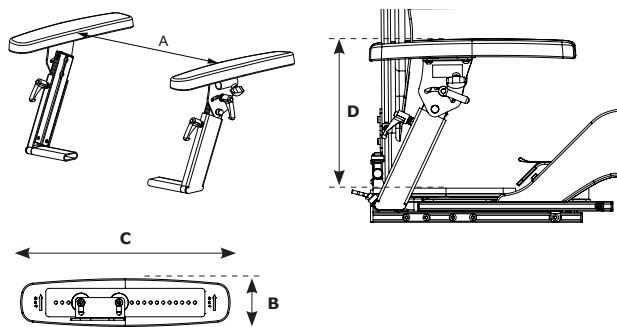

Mått A B C D  
350-460 75 330 190-280 mm


### ARMSTÖD FRÅN RYGG

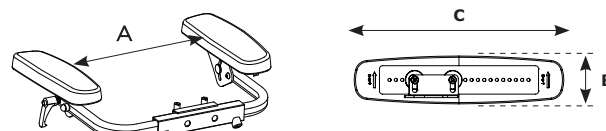

Mått std A B C  
Stl. 1-2 350 - 470 mm 75 mm 330 mm  
Mått vikbart A B C  
Stl. 1-2 380 - 500 mm 75 mm 330 mm


### HANDBÅGE

A  
Stl. 3 425 mm  
Stl. 4 480 mm  
Stl. 5 520 mm

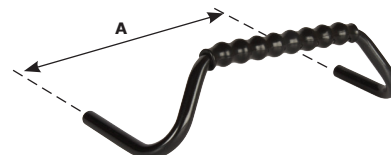


Mått mellan rörcentrum

### HUVUDSTÖD

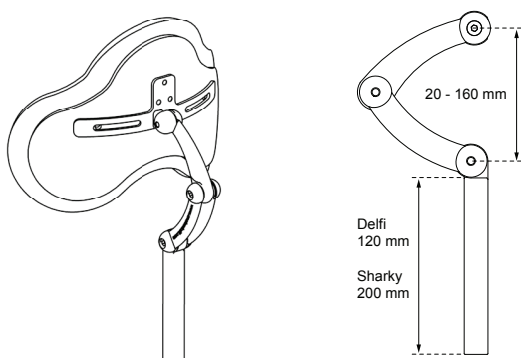


Huvudstöd A x B  
stl. 1 220 x 150 mm  
stl. 1 lång 280 x 160 mm  
stl. 2 240 x 190 mm  
stl. 2 lång 280 x 210 mm

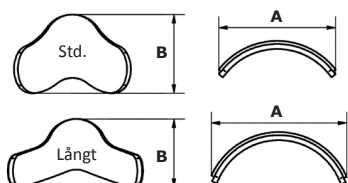

### BÄCKENSTÖD

A x B  
Stl. 1-2 200 x 120 mm

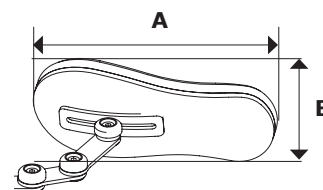

# Anpassning och specialanpassning

## Rekommendationer

Varje gång produkten ändras på något sätt måste bedömning göras om det är en anpassning eller en specialanpassning.

En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märkning. Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som bedöms kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt.

## Tillåtna anpassningar inom ramen för CE-märkning

Fotstödsprofilens längd får kortas ned för att bättre passa brukaren.

Ryggstödsprofilens längd får kortas ned. Profilen får aldrig vara kortare än att samtliga fästen till ryggplattan går att montera på denna.

## Riskbedömning


Notera att en riskbedömning alltid skall göras, såväl vid anpassning som vid specialanpassning av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren eller personer i dess närhet, att använda efter anpassning.

## Märkning

Produkten bör förses med upplysning att den är anpassad till en specifik brukare, så att den inte kan misstas för en produkt i standardutförande.

# Monterings- och justeringsanvisningar

Montering ska alltid utföras av kvalificerad fackpersonal (tekniker på hjälpmedelscentral eller motsvarande). Instruera brukaren och/eller andra personer i dess närmiljö om produktens funktioner för att hjälpmedlet ska kunna används på ett säkert sätt.

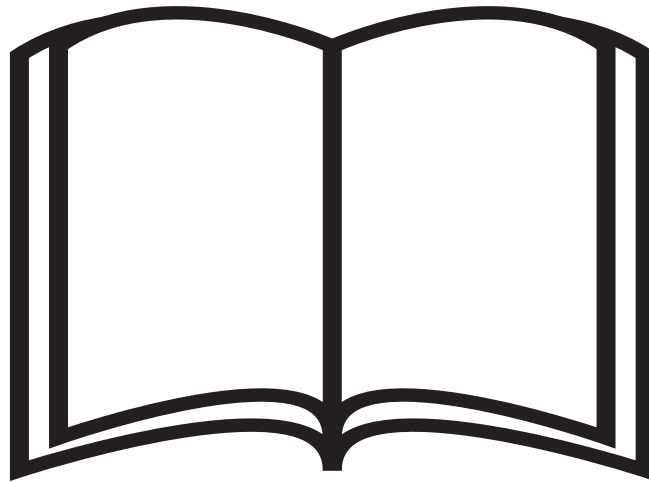

## Verktyg

Verktögsnyckeln som du behöver för att utföra justeringar finns integrerad i toppen av ryggprofilen som du hittar på baksidan av stolen. (4 mm insexnyckel)





## Montering av sittsystem

### Montering på underrede

Det finns olika sätt att montera sittsystemet på ett underrede.

Nedan förklaras de olika alternativen. Välj det sätt som passar dig bäst.

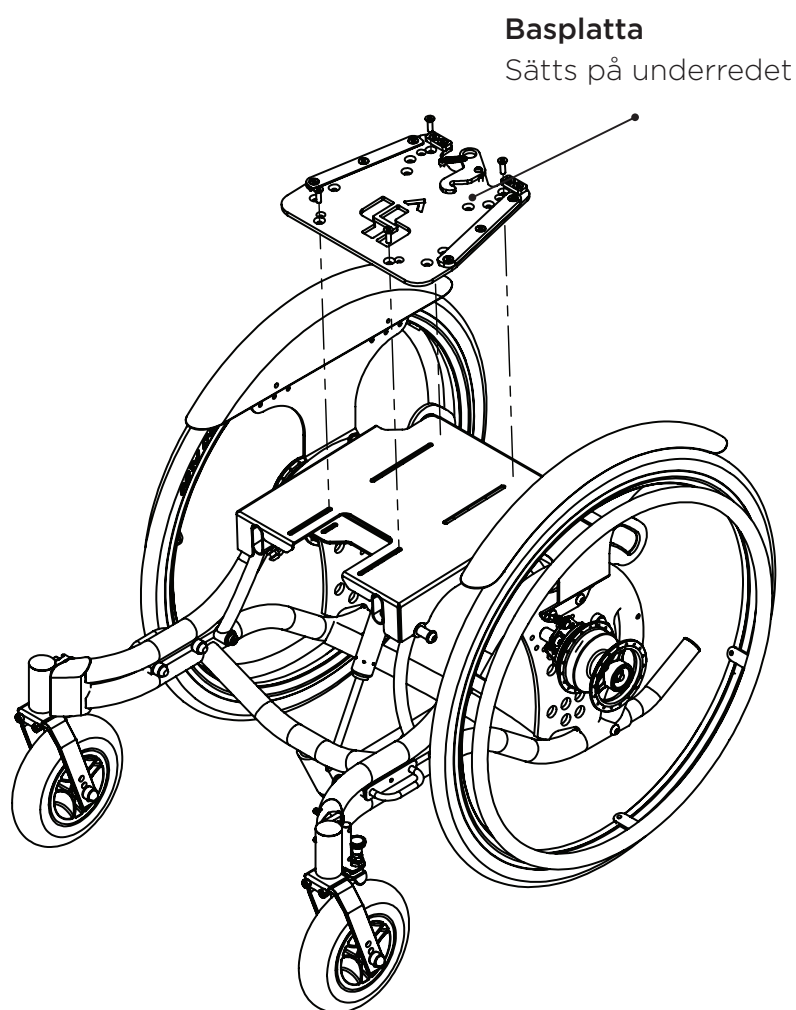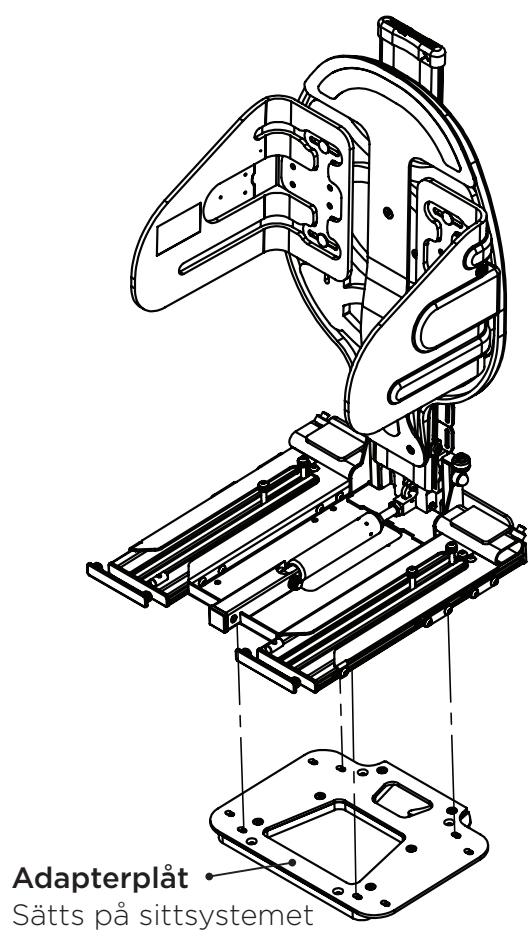


## Adaptersystem

### Montering med adaptersystem

Börja med att montera basplattan (A) på underredet genom att skruva fast den med medföljande skruvar, brickor och muttrar (B).

Montera sedan adapterplåten (C) genom att skjuta i sargsprintarna (D) i spåren på sittsystemets undersida. Dra åt skruvarna (E) när önskad position uppnåtts.

När adapterplåt respektive basplatta är monterade på sittsystem och underrede kan dessa kombineras. Sittsystemet är korrekt fastsatt när ett klickljud hörs.

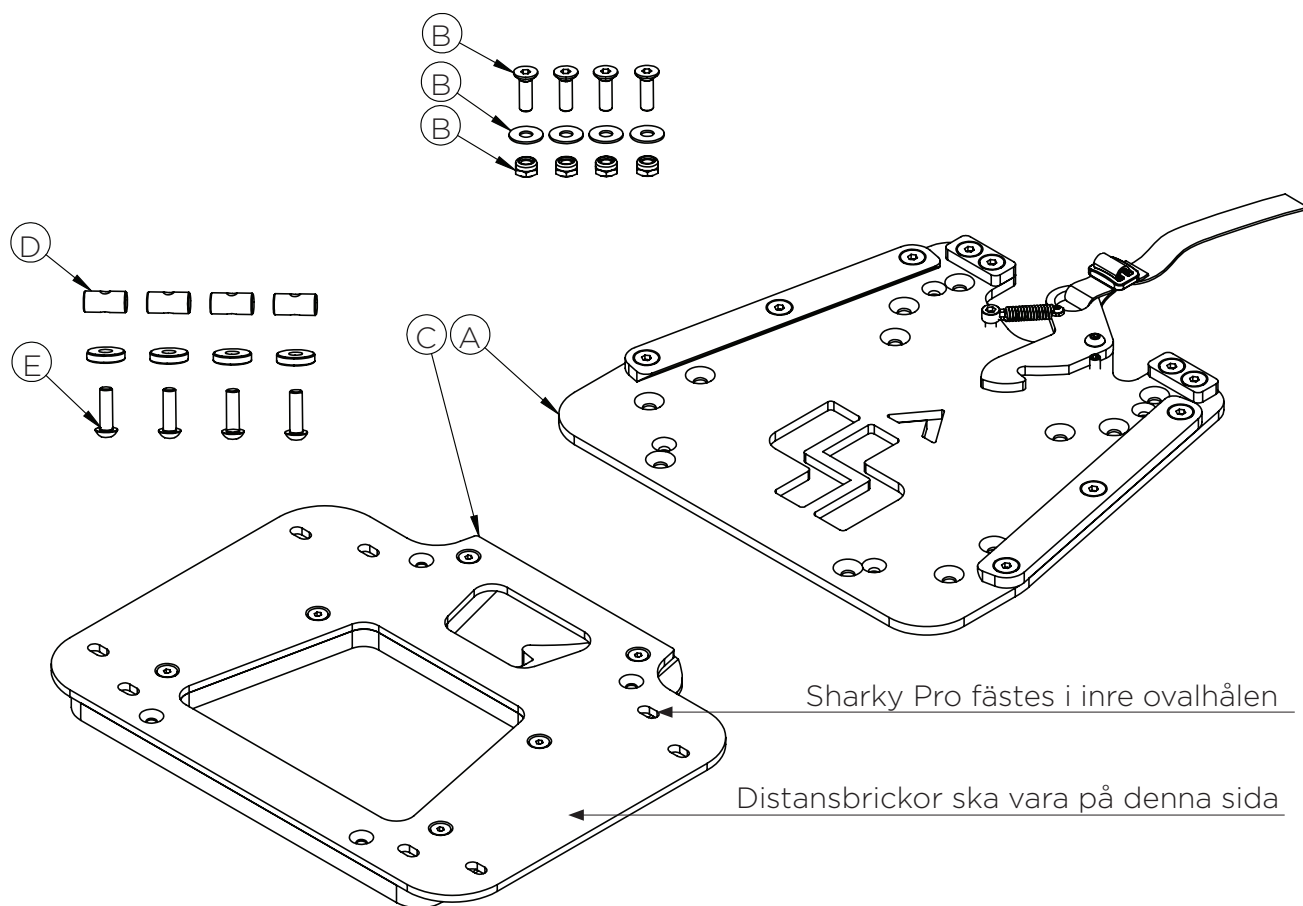

Säkerställ att sittsystemet sitter fast ordentligt på underredet innan användning sker.



Vid användning av Adaptersystem Pro (153047) ska säkerhetsbandet på sittsystemets rygg alltid användas och spänns runt körbåge/körbygel eller motsvarande på underredet (se bild). Se till att bandet sitter spänt och fixerat så det inte kan glida av.






## Fast montering

Fast montering innebär att man fäster sittsystemet direkt mot underredet. Montering med denna metod måste ske med medföljande monterings-sats.

I botten på sittsystemet finns två olika hålbilder för fast montering på underrede. Välj den hålbild som är bäst lämpad för en montering med bra balans.

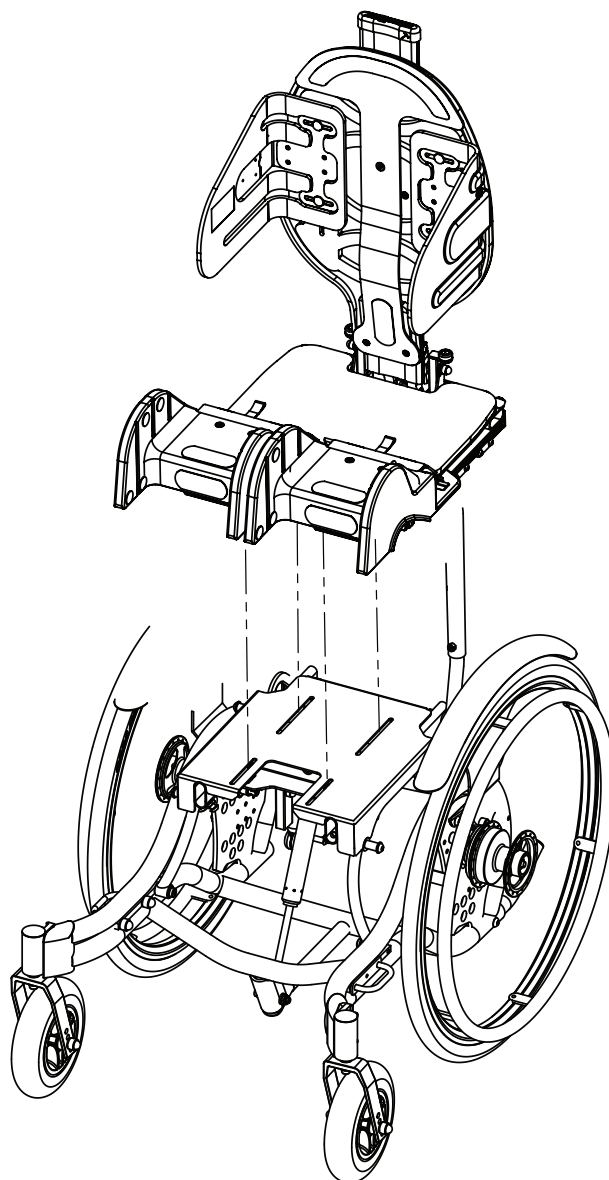

Använd aldrig några andra skruvar än de medföljande. Dessa är säkerhets-detaljer. Om andra dimensioner är önskvärda, kontakta Anatomic Sitt AB.



Innan montering av sittsystem på underrede måste plansitsen demonteras.

## Planskiva

### Montering av planskiva

En plansits innebär att man ersätter sittdelen med en planskiva. Montering med denna metod måste ske med medföljande monteringsats enligt nedanstående beskrivning.


Ta bort ändavsluten (I) från profilerna och för in sargsprintarna (A) i profilens yttre spår och fäst skruvarna (B) i dessa genom hålen (C) i plansitsskivan. Dra ej åt skruvarna (B) helt.

För in de längre skruvarna (D) med brickorna (E) genom de bakre hålen (G) i profilen. Möt sedan upp på motsatt sida av skruvarna med sargsprintarna (H). Dra ej åt skruvarna (D) helt.

Skjut därefter in planskivan i sittdelsbasen i spår 2 till önskad position och dra åt skruvarna (B) och (D). Sätt sedan tillbaka ändavsluten (I) i profilerna.




Använd aldrig några andra skruvar än de medföljande. Dessa är säkerhetsdetaljer. Om andra dimensioner är önskvärda, kontakta Anatomic Sitt AB.

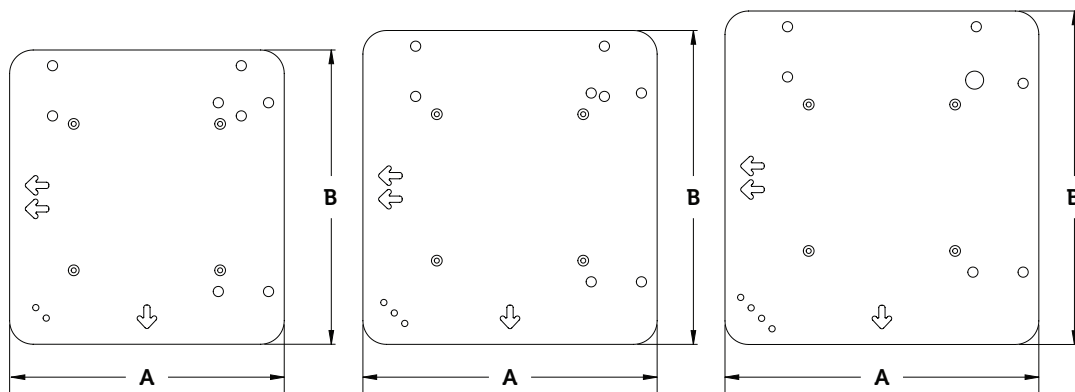

Planskiva  
Artnr. 153190  
(AxB)  
350 x 375 mm

Planskiva  
Artnr. 153191  
(AxB)  
375 x 400 mm

Planskiva  
Artnr. 153192  
(AxB)  
400 x 425 mm

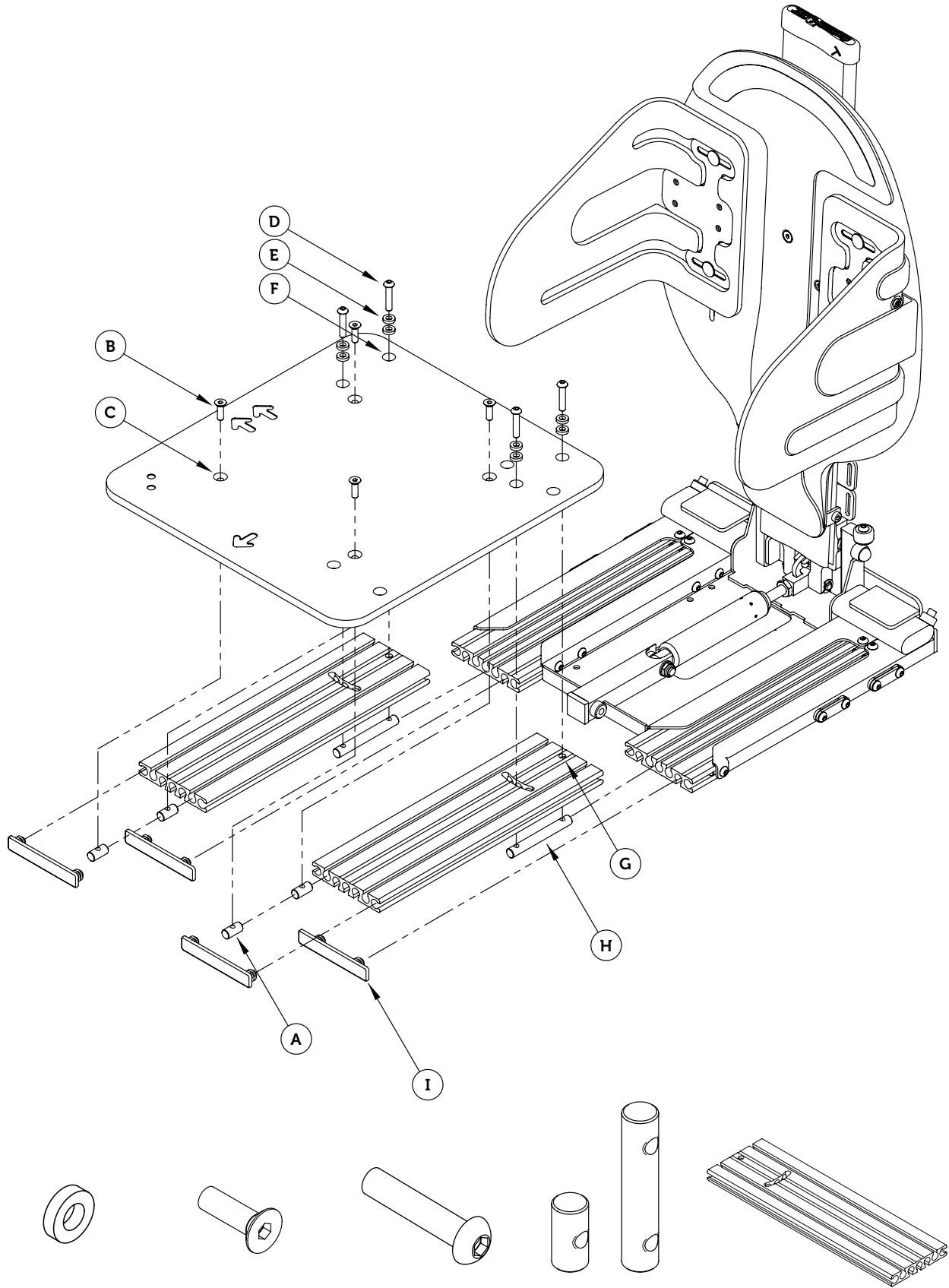

M6x3 Bricka  
8 st

M6x16 Försänkt  
4 st

M6x35 Kullrig  
4 st

Sargsprintar  
4 st / 2 st

Profiler  
2 st

## Justering av sittdel

Sittdjup, benlängdsskillnad och eventuell abduktion/adduktion av bendelarna justeras enkelt. Börja med att ta loss sittdelsfodret samt ta bort den bakre sittdelsplattan (A) för att komma åt justeringskruvarna (B) ordentligt.





Du behöver aldrig skruva ur skruvarna helt för att justera bendelarna, det räcker att lossa dem något.

### Sittbreddsjustering

För att öka eller minska sittbredden ska bendelarnas placering på profilen ändras. För att få ut bendelen från sittdelsprofilen behöver du först ta bort ändavslutet som sitter i framkant av sittdelsprofilen. Lossa sedan skruven (B) på bendelen med hjälp av justeringsnyckeln. När du lossat skruven (B) något drar du ut hela bendelen från sittdelsprofilen och flyttar den sedan till önskat spår.

För maximal sittbredd sätter du sargsprinten i spår 3, och för minimal sittbredd sätter du sargsprinten i spår 1. Bendelarna levereras grundinställda i spår 1.

Dra åt skruven (B) när du uppnått önskad placering. Den bakre skruven på bendelen kan i vissa fall behöva lossas något (C).

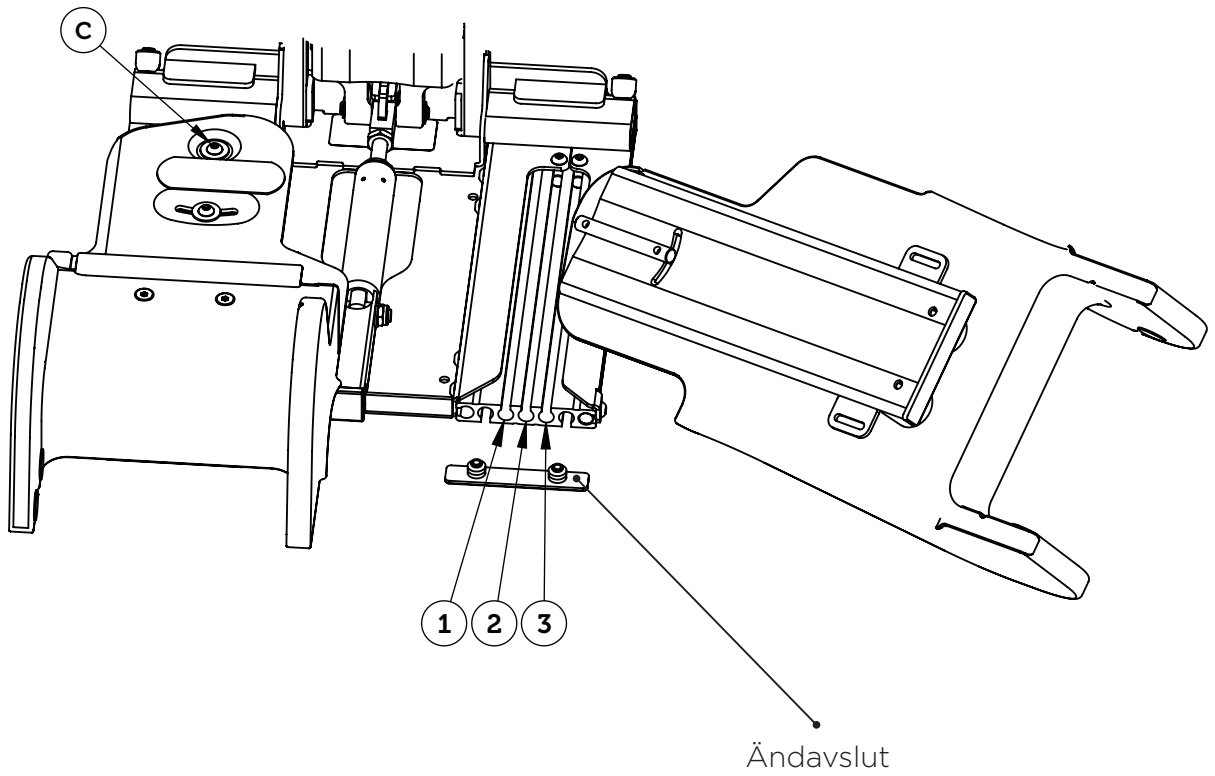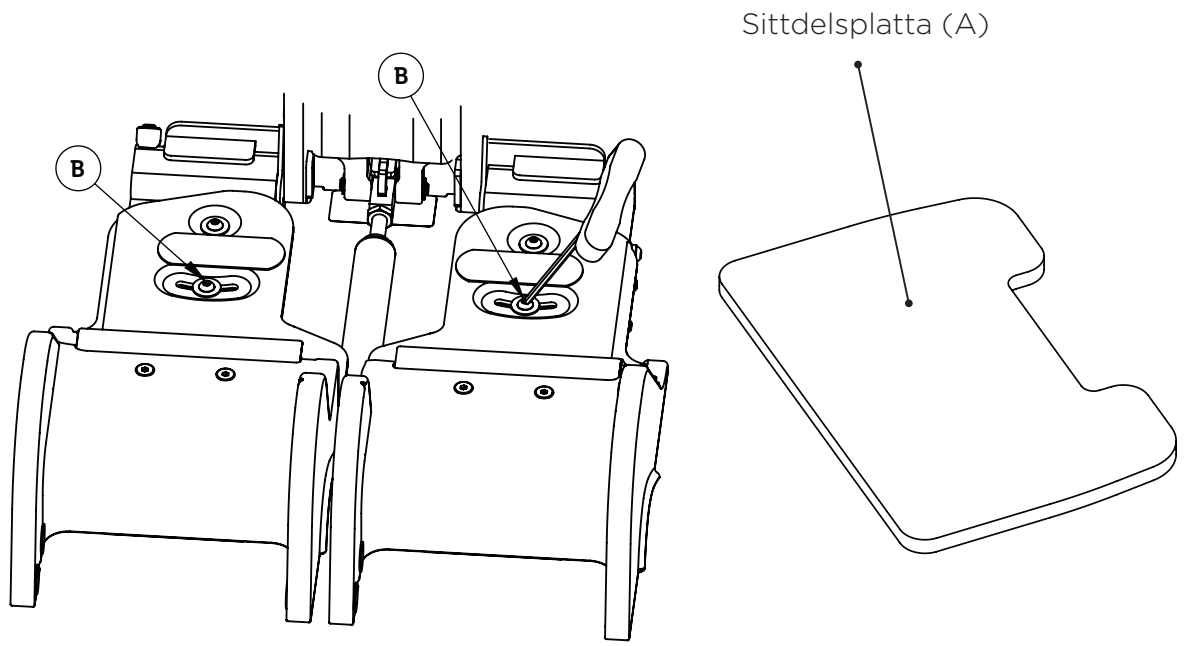

### Benlängdsskillnad/sittdjup

Lossa den främre skruven (A) på sittframdelen med hjälp av verktygsnyckeln. Dra sittframdelen till önskad position och dra åt skruven.



Säkerställ att du inte justerar sittframdelen utanför godkänt justeringsområde enligt mätsticka (B). Fräst spår (C) markerar maximal justering (se bild)

### Sittgropsjustering

Vid justering av sittdjupet bör även sittgropsjusteringen följa med.

Lossa då bendelens främre skruvar (D) med hjälp av justeringsnyckeln och dra sittgropsjusteringen till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (D).




För att få ett bra utgångsläge vid inställning av sittdjup kan färgskalan på sittdelsbasen och djupjusteringsplåten (E) användas som hjälp. Om sittdjupet är justerat till exempelvis 43 cm (grått fält) bör även sittgropsjusteringen skjutas ut till grått fält, då blir sittgropens storlek rätt och en så korrekt sittställning som möjligt ska uppnås. Finjustera alltid inställningarna efter varje brukares förutsättningar.

### Abduktion, adduktion och windswept

För att justera sittframdelen till något av dessa lägen lossar du skruv (A) med hjälp av justeringsnyckeln och för sedan sittframdelen till önskad position. Dra åt skruven (A).



Du behöver aldrig skruva ur skruvarna helt för att justera sittframdelarna, det räcker att lossa dem något.

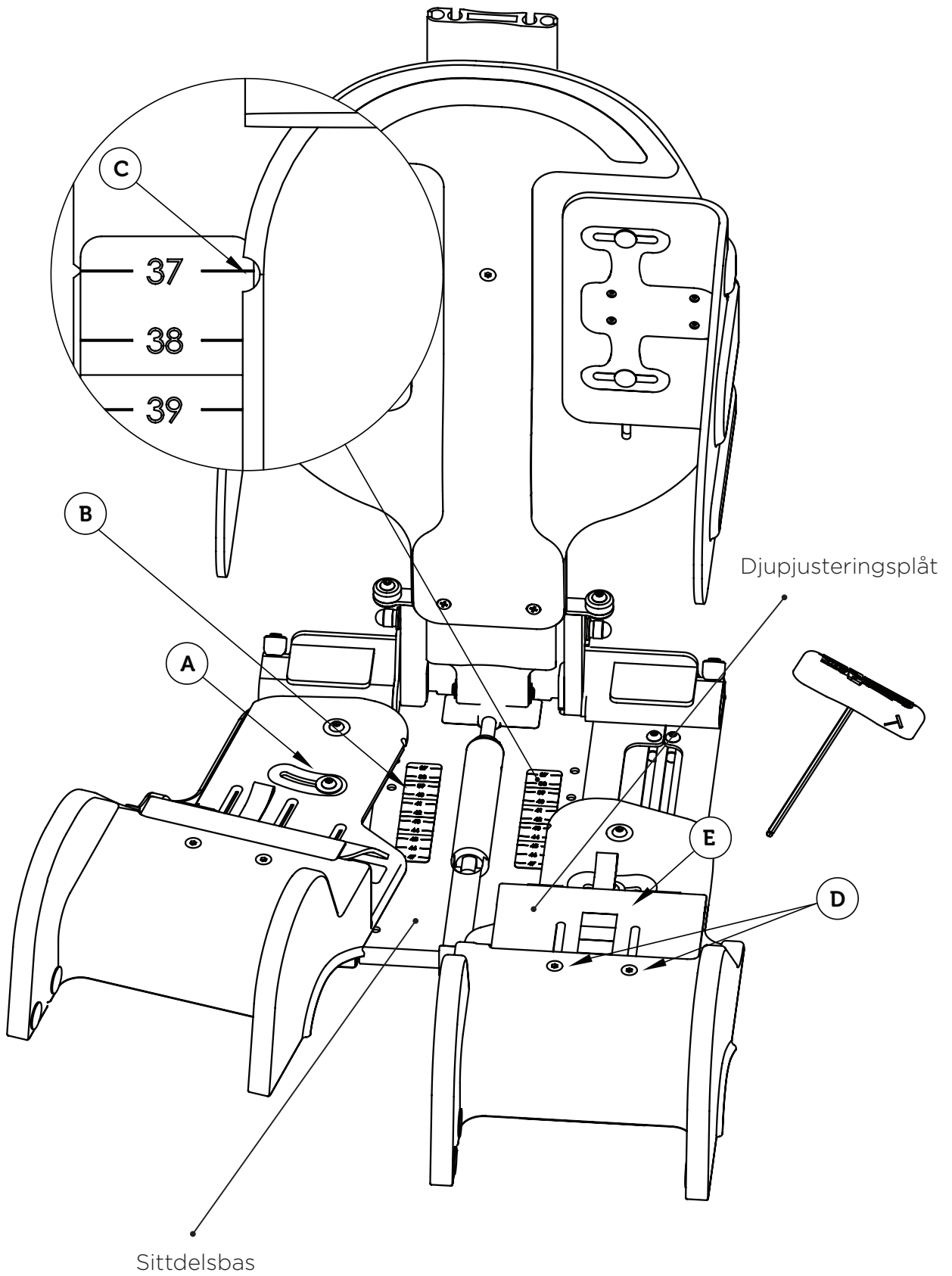

## Översikt av rygginställningar

### Montering av rygg

Ryggens infästning består av fyra (4) skruvar (A) och två (2) sargsprintar. Passa in och för ner ryggprofilen på sargsprintarna som sitter på aktiveringshuset och dra åt de fyra (4) skruvarna (A) med hjälp av justeringsnyckeln.

Ryggen hamnar automatiskt i rätt läge med hjälp av de förmonterade stoppen i ryggprofilen.

### Justering av rygghöjd

För att justera rygghöjden lossar du skruvarna (B) på båda sidorna av ryggprofilen med hjälp av justeringsnyckeln och justerar sedan in önskad höjd. När du är nöjd med inställningen drar du åt skruvarna (B) igen. Lossa även vred (E)

### Justering av ryggvinkel

Placera låsläppen (C) i aktiveringsläge genom att lyfta upp den och sedan skjuta in den på klacken.

För att justera vinkeln på ryggstödet trycker du läppen nedåt. Då aktiverar gaskolven ryggen så att du kan ställa den i önskat läge. När du uppnått önskad vinkel släpper du låsläppen igen och du behåller nu din inställda ryggvinkel.



Tänk på att alltid hålla i ryggen när du aktiverar gaskolven.

### Justering av bålstöd

För att bredd- och höjjustera bålstöden lossar du fingervreden (D) och justerar sedan till önskad höjd och bredd. Dra åt fingervreden (D) när du uppnått önskad position.

### Justering av svankstöd

Lossa vred (E) och tryck på toppen av svankstödet som finns placerat bakom ryggfodret tills önskat svankdjup uppnåtts. Håll kvar svankstödet i position och dra sedan åt vredet (E).




Rygghöjden kan behöva justeras för att svankstödet ska hamna i rätt position.



Ta bort ryggfodret för att se svankstödet bättre under justering.




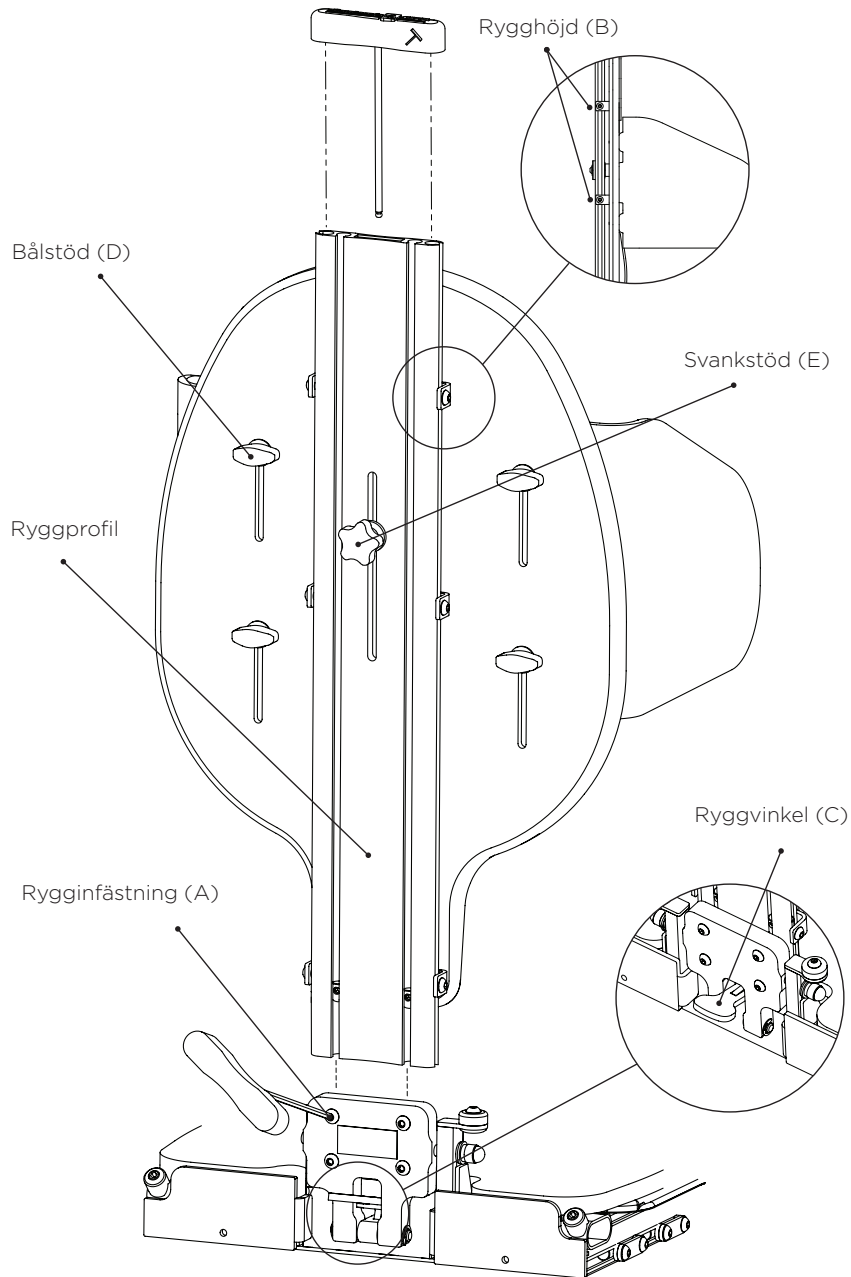

## Lås- och ställbar flexfunktion (på sittdel MLD - Sharky+)

Vrid vredet medsols (A) för att låsa flex-funktionen i ryggen och få den fast.

För att aktivera flex-funktionen så skruvar man ut vredet motsols (B), man kan även ställa hur långt ryggen ska röra sig beroende på hur långt vredet skruvas ut.

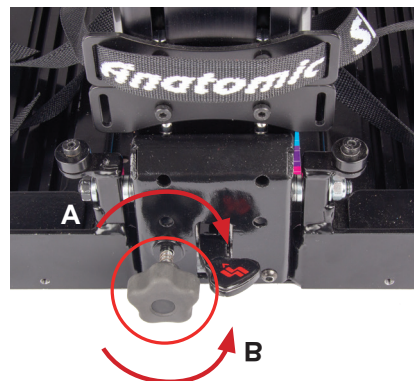

## Bålstöd

### Montering av bålstöd

Montera bålstöden med hjälp av vagnsbult (A), bricka (B) och fingervred (C).


Stick vagnsbulten (A), bålstödsvingen (D) och spåret i ryggplattan (E). Möt sedan upp med bricka (B) och fingervred (C) på motsatt sida om ryggplattan (E).

### Alternativa bålstöd

Som alternativ till de fasta bålstöden finns även vikbara bålstöd, omslutande bålstöd och förstärkta bålstöd. Monteringen av dessa sker på samma sätt som beskrivs ovan.

### Vikbara bålstöd

Öppna vikbart bålstöd genom att trycka på den röda knappen.


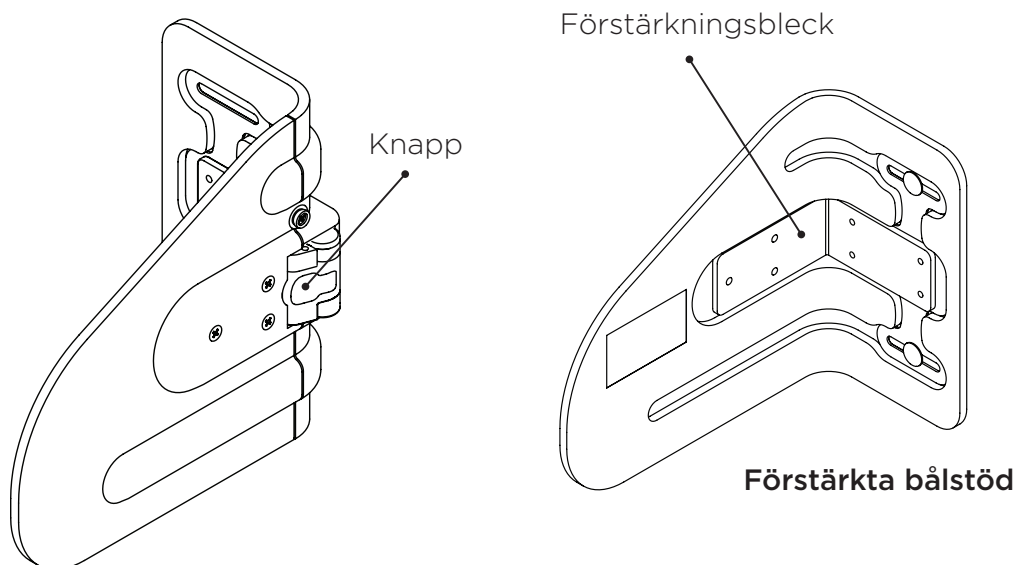


### Omslutande bålstöd

Öppna vikbart bålstöd genom att trycka på den röda knappen. För att djupjustera de omslutande bålstöden så släpper man de fyra skruvarna på sidan.



**Ryggrör**  
(vid val av förstärkt rygg)

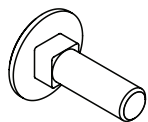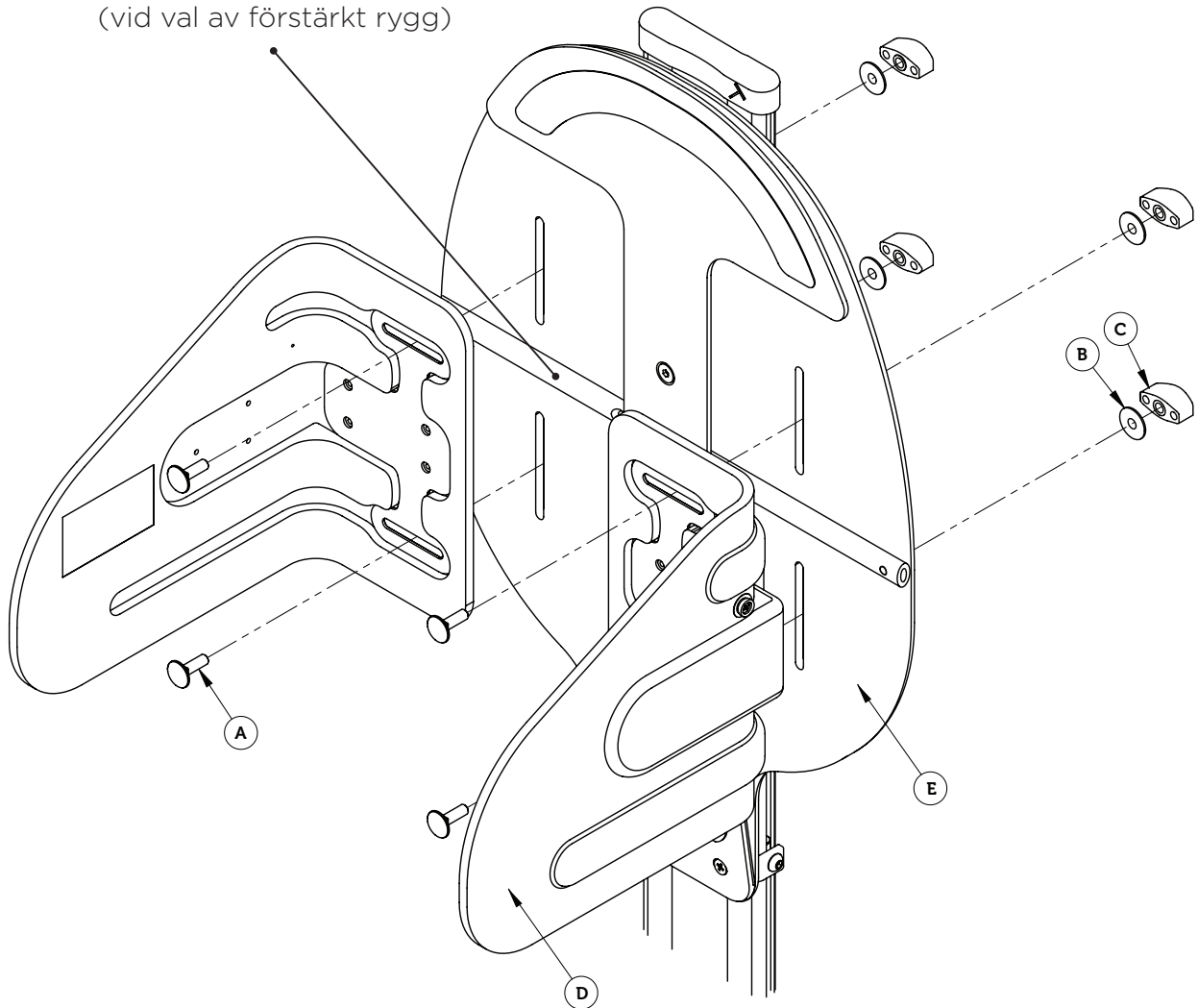

Vagnsbult (A)  
4 st



Bricka (B)  
4 st



Fingervred (C)  
4 st

## Bäckenstöd

### Montering av bäckenstöd



Innan du kan montera bäckenstödet måste du avlägsna skyddskåpan (A).

Skruva ur skruven (B) och lyft sedan bort kåpan.

Montera bäckenstödet där skyddskåpan (A) satt och fäst med skruven (B).

### Justering av bäckenstöd

För att vinkeljustera bäckenstödet lossar du skruv (B), (C) eller (D) beroende på vilka inställningar du vill göra. För att höjjustera bäckenstödsplattan skruvar du ur skruvarna (E) och flyttar plattan till önskad position. Skruva därefter dit skruvarna (E) igen.

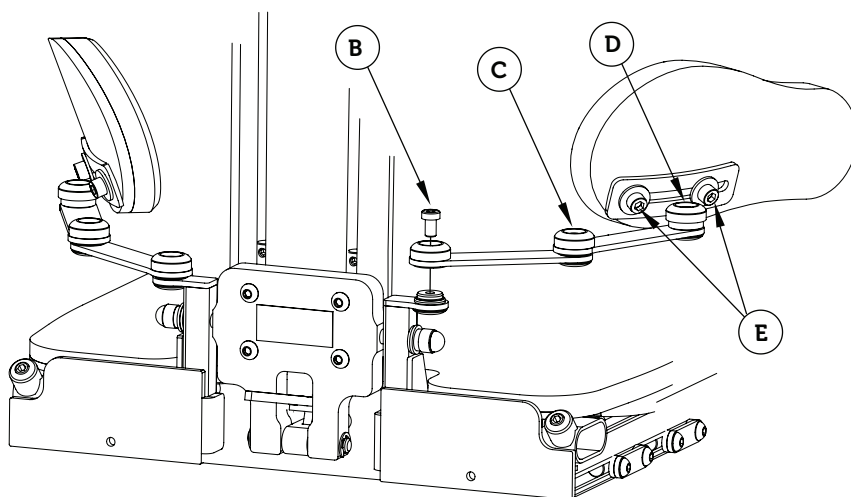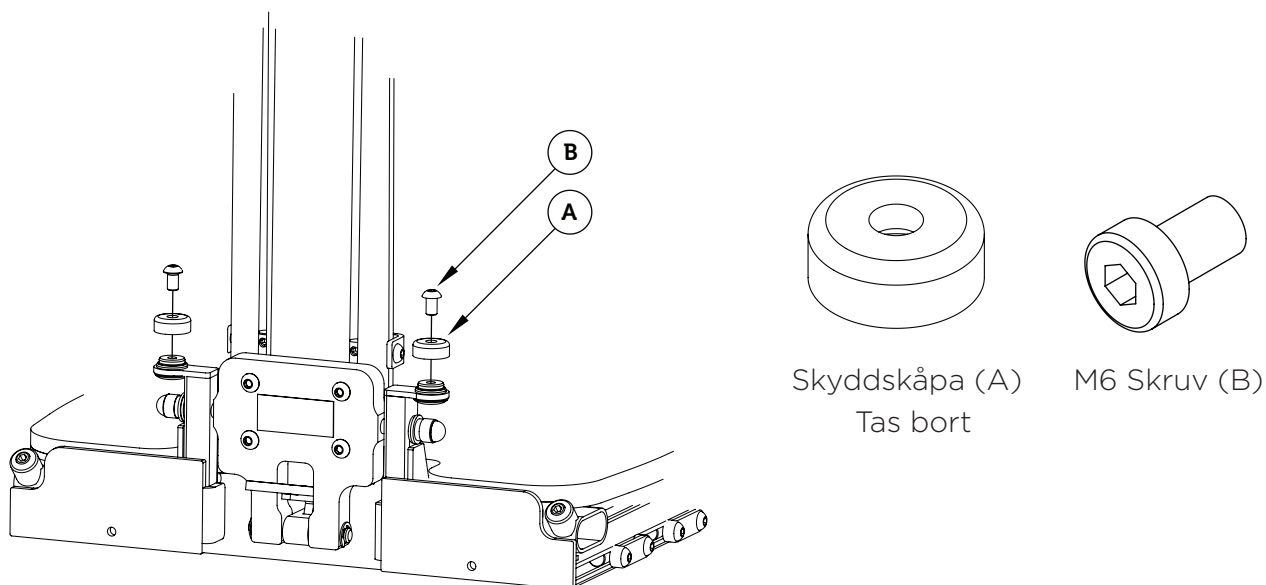


## Höftstöd

### Montering av höftstöd

Skruva bort de två skruvar som fäster bendel i bas. Montera sedan höftstödet (med de två borttagna skruvarna) mellan bendel och bas som bilden visar (mellan de två svarta profilerna för Sharky) så att höftstödet ligger mot basen.

Välj vilka spår i höftstödet du använder beroende på hur långt fram/bak du vill placera stödet, sedan justerar du stödet i sidled innan du skruvar åt skruvarna ordentligt.

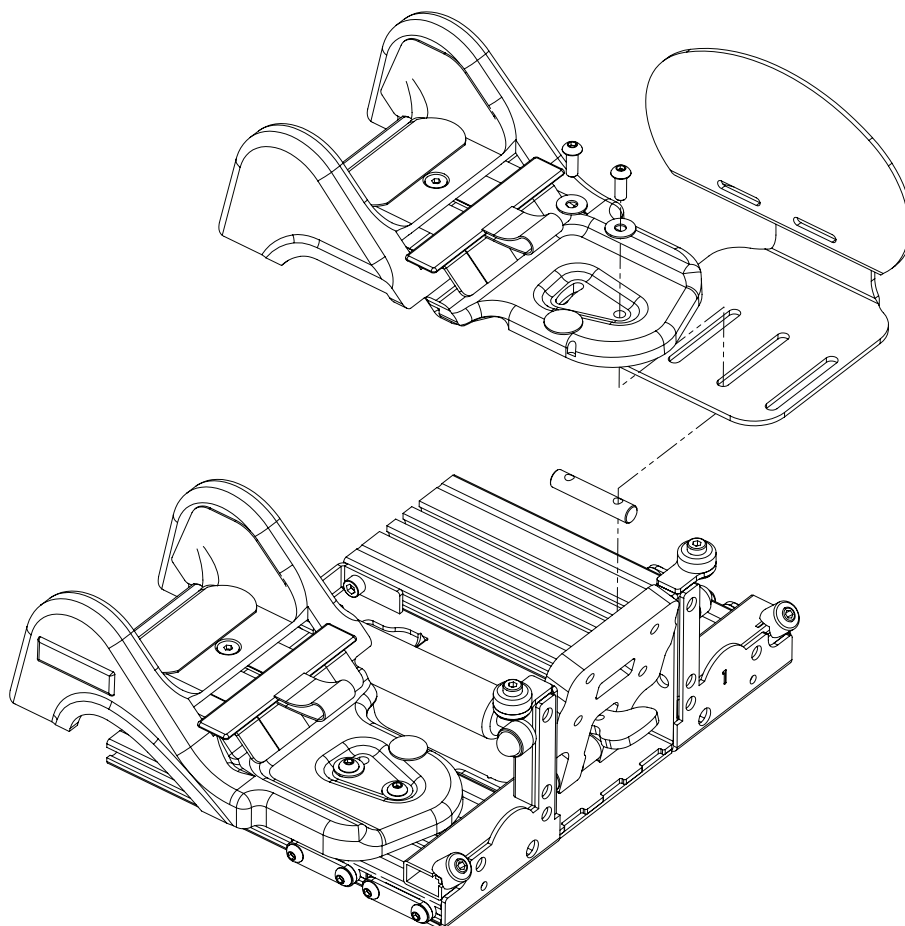

## Huvudstöd

### Montering av huvudstödsfäste

Innan montering av huvudstödet kan utföras måste du först ta bort justeringsnyckeln och eventuellt andra detaljer som kan sitta i vägen.

Skjut i huvudstödsfästets sargsprintar (A) i ryggprofilens spår. När du uppnått önskad position drar du åt de fyra skruvarna (B).

### Montering av huvudstöd

Skjut i huvudstödsstaget i huvudstödsfästet (C) och dra sedan åt spakvredet (D) när du uppnått önskad position.

### Höjdjustering av huvudstödsfäste

För att höjdjustera lossar du skruvarna (B) något och flyttar sedan huvudstödsfästet till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (B).

### Justering av huvudstöd


Vid justering av det treledade huvudstödet lossar du skruv (E) i den led du önskar justera. När du uppnått önskad position drar du åt skruven (E) igen.

För att höjdjustera huvudstödet lossar du spakvredet (D) och flyttar huvudstödet till önskad position. Dra sedan åt spakvredet (D).

### Montering av pannbandsfäste

Innan montering av pannbandsfästet kan utföras måste huvudstödsplattan (H) demonteras. För att demontera huvudstödsplattan lossar du båda skruvarna (I).

Montera sedan pannbandsfästet i hål (F) med medföljande monteringsdetaljer. Se separat bruksanvisning vid eftermontering av pannband.

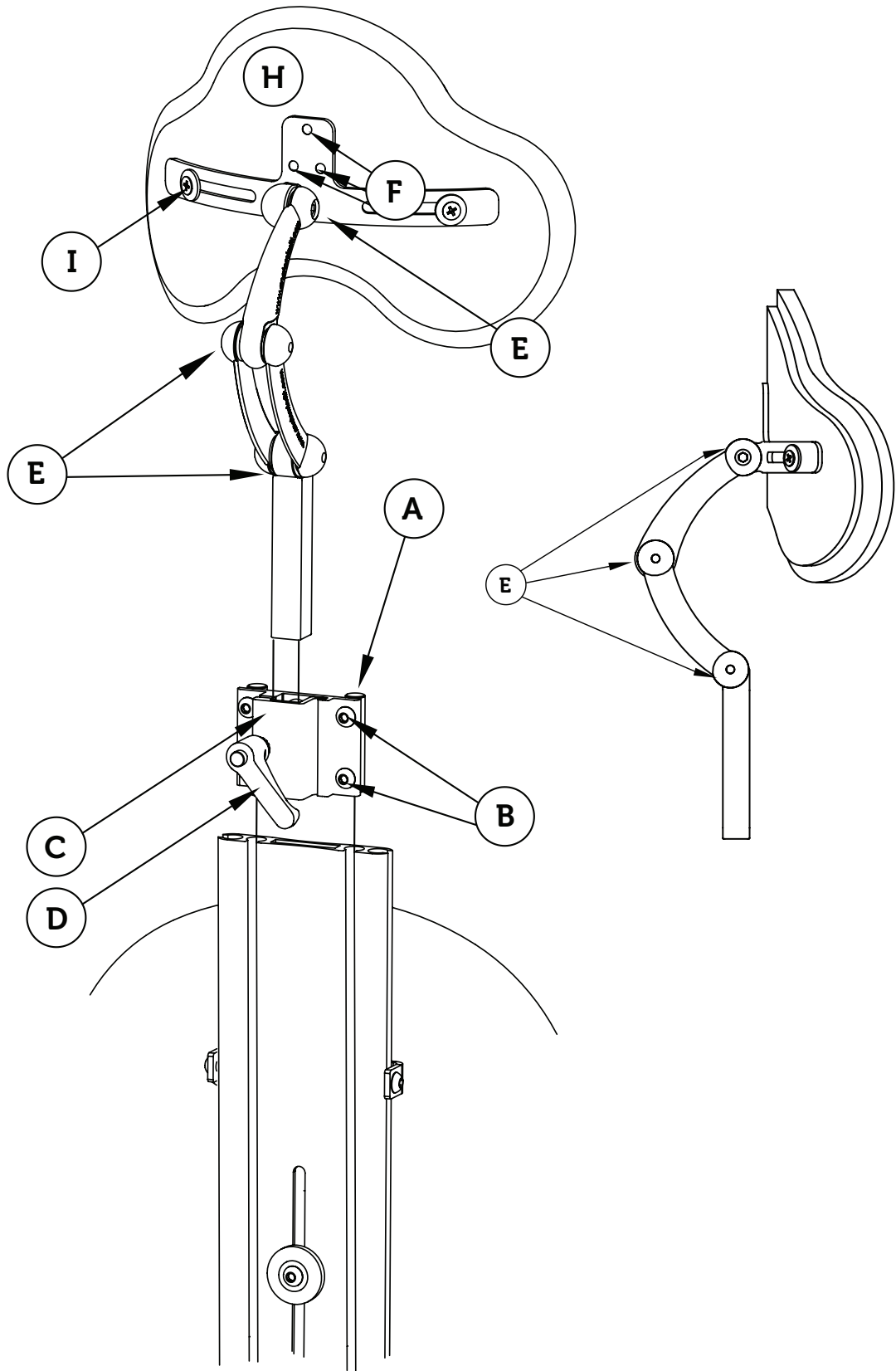

## Positioneringselar

### Montering av övre beslag

Lyft bort justeringsnyckeln och skjut sedan i sargsprinten (A) på det övre monteringsbeslaget (D) i ryggprofilens spår. När du uppnått önskad höjd på beslaget dra åt skruvarna. Sätt tillbaka justeringsnyckeln i ryggprofilen.

### Justering av övre beslag

För att höjd- och vinkeljustera det övre beslaget lossar du skruvarna något och flyttar sedan beslaget till önskad position. Dra sedan åt skruvarna.

### Montering av nedre beslag

Innan montering av det nedre beslaget (C) kan utföras måste du först ta bort justeringsnyckeln och eventuellt andra detaljer som kan sitta i vägen. Dessa detaljer kan exempelvis vara huvudstöd, övre monteringsbeslag och körbåge.


Skjut i nedre beslagets sargsprintar i ryggprofilens spår. När du uppnått önskad position drar du åt skruvarna (B). Montera eventuellt tillbaka de detaljer du plockade bort för att kunna montera det nedre beslaget.

### Justering av nedre beslag


För att höjdjustera det nedre beslaget lossar du skruvarna (B) något och flyttar sedan beslaget till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (B).

### Montering av alternativt nedre beslag

För en lägre infästning av selen kan ett alternativt nedre beslag (F) användas. Dessa monteras med medföljande skruv i befintligt hål på sittdelsbasen.

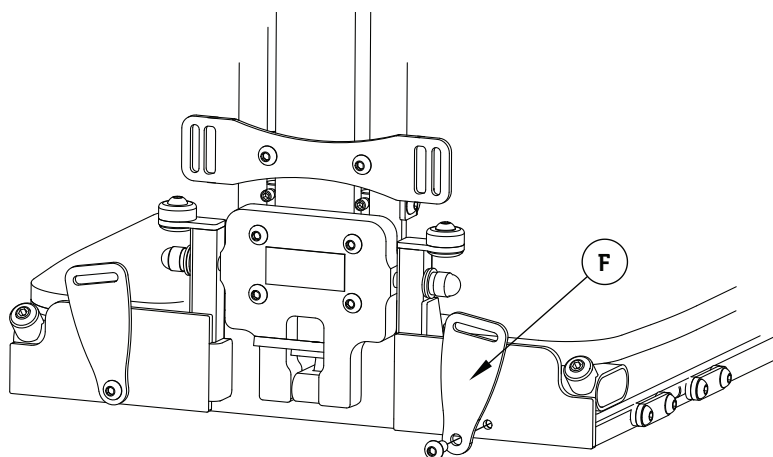



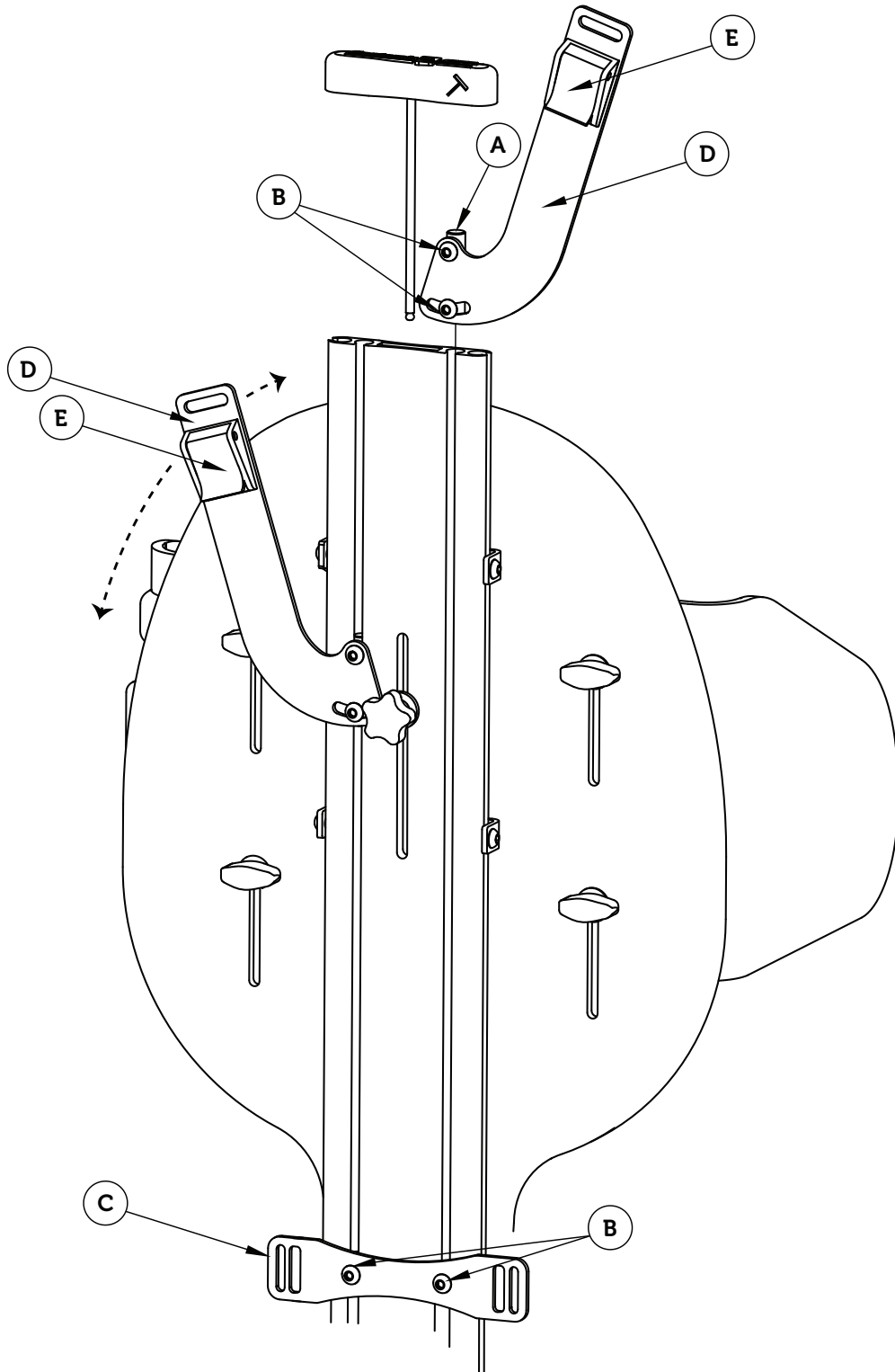

Sargsprint (A)  
4 st

M6 Skruv (B)  
6 st

Nedre beslag (C)  
Ingår som standard

Nedre beslag (F)  
Alternativt 2 st



## Höftbälte

### Justering av höftbältesbeslag

För att flytta position på höftbältesinfästningen lossar du skruvarna (A) något och justerar till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (A).

### Montering av höftbälte

När höftbältet ska monteras i höftbältesbeslagen använder du dig av ett tri-glidespänne. För montering enligt tri-glidemetoden, gör som bilden visar.

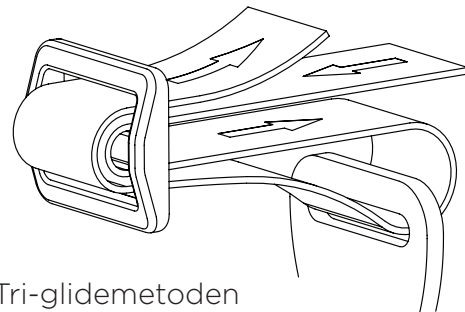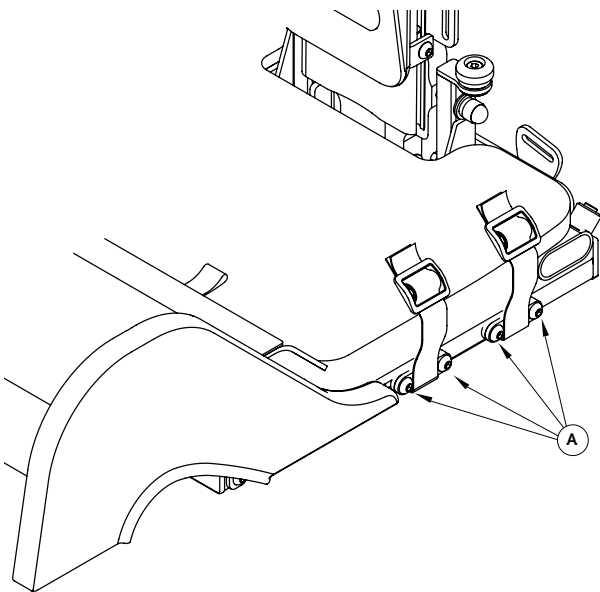

Tri-glidemetoden




Säkerställ att bandet inte kläms fast mellan distansen och beslaget.

## Vrsthållare

Fotplattan är förberedd för montering av vrsthållare. ontering av vrsthållarna på helt justerbart & delat justerbart fotstöd görs under den justerbara fotplattan.



Kontrollera att plösen ej veckat sig på vrsthållaren.

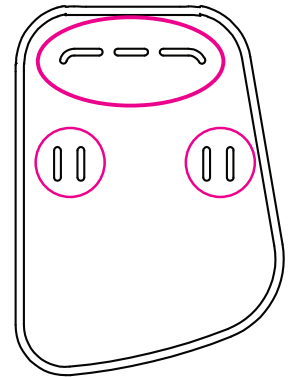

## Armstöd från sits

### Montering av armstöd från sits

Skjut in armstödet i avsett rör på sittdelsbasens sida. När du uppnått önskad breddposition av armstödet drar du åt låsskruven (A).

### Breddjustering

För att ändra bredd på armstödet lossar du skruven (A) och flyttar sedan armstödet till önskad position. Dra sedan åt skruven.

### Höjjustering

Om du vill justera höjden på armstödet lossar du spakvredet (B) och flyttar sedan armstödet till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet (B).

### Vinkeljustering uppåt/nedåt


Om du vill justera vinkel på armstödet lossar du spakvredet (C) och flyttar sedan armstödet till önskad vinkel. Dra sedan åt spakvredet (C).

**Vinkeljustering i sidled** Om du vill justera plattan i sidled och vinkel, lossa skruvarna (D) och flytta sedan armstödet till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (D).

### Montering av skålade armstöd:

Armstöden ska monteras enligt bild med de höga sidorna utåt, bort från kroppen.



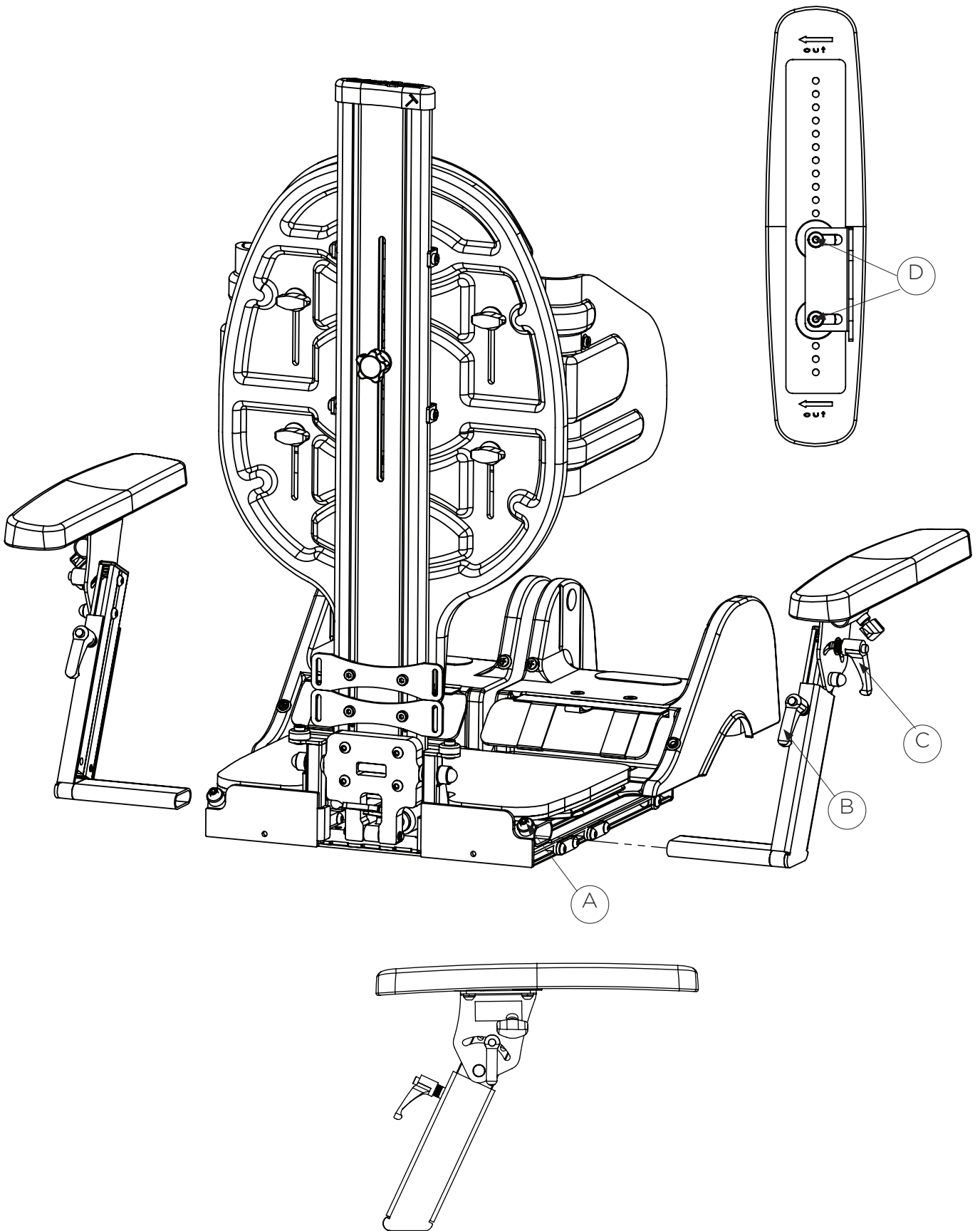

## Armstöd från rygg, fast

### Montering av armstöd från rygg

Innan montering av armstöd från rygg kan utföras måste du först ta bort justeringsnyckeln och eventuellt andra detaljer som kan sitta i vägen. Dessa detaljer kan exempelvis vara huvudstöd, övre monteringsbeslag och körbåge.

Skjut i armstödsbeslagets sargsprintar i ryggprofilens spår. När du uppnått önskad position drar du åt skruvarna (A). Montera eventuellt tillbaka de detaljer du plockade bort för att kunna montera armstödsbeslaget.

### Höjjustering

För att höjjustera armstödet lossar du skruvarna (A) något och flyttar sedan armstödet till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (A).

### Breddjustering


För att ändra bredd på armstödet lossar du skruven (B) och flyttar sedan armstödet till önskad position. Dra sedan åt skruven.

### Vinkeljustering uppåt/nedåt

Om du vill justera vinkel på armstödet lossar du spakvredet (C) och flyttar sedan armstödet till önskad vinkel. Dra sedan åt spakvredet (C).

### Vinkeljustering i sidled

Om du vill justera plattan i sidled och vinkel, lossa skruvarna (D) och flytta sedan armstödet till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (D).

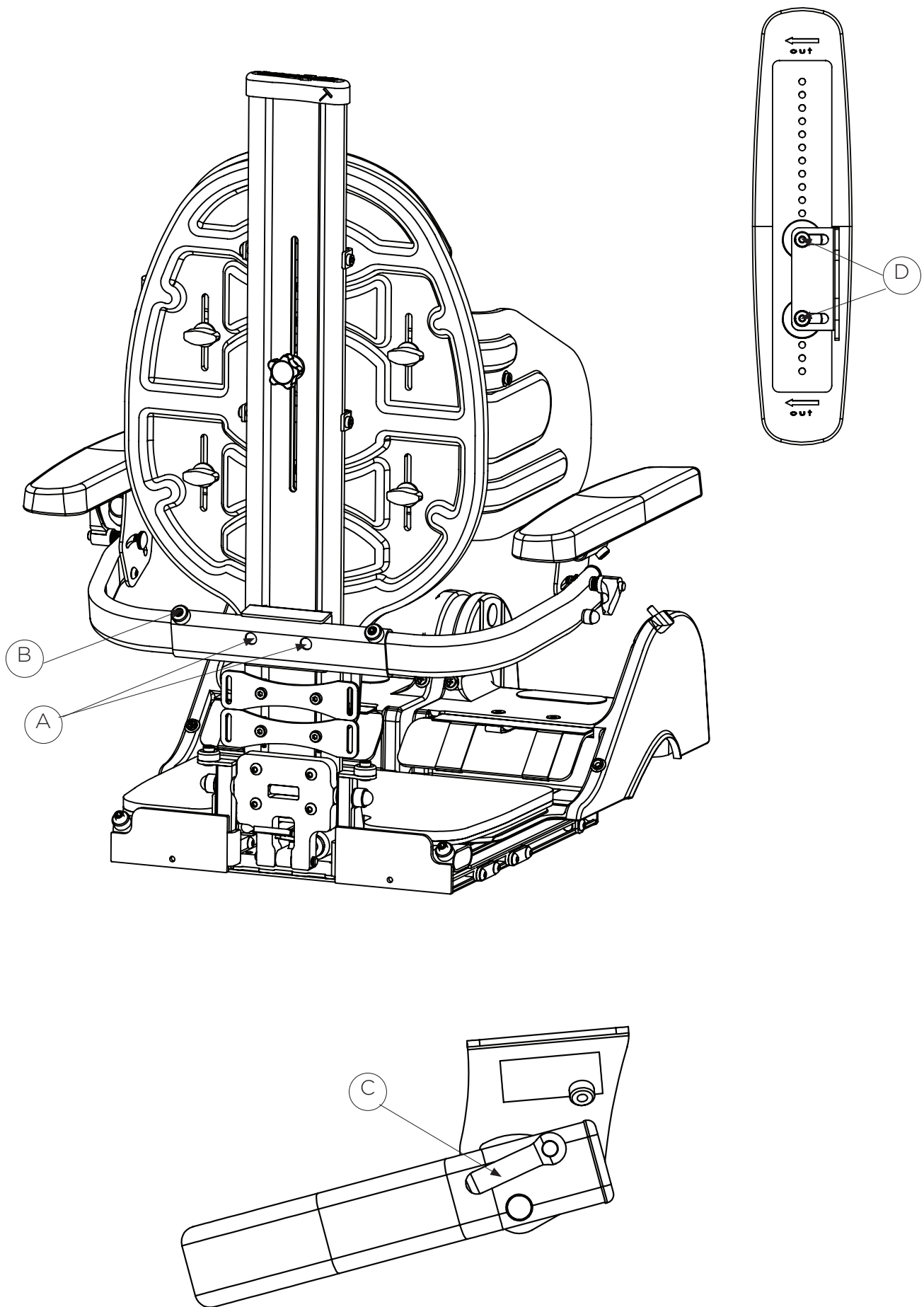

## Armstöd från rygg, vikbart

### Montering av vikbara armstöd från rygg

Innan montering av armstöd från rygg kan ske måste du först ta bort justeringsnyckeln och eventuellt andra detaljer som kan sitta i vägen. Dessa detaljer kan exempelvis vara huvudstöd, övre monteringsbeslag och körbåge.

Skjut i armstödsbeslagets sargsprintar i ryggprofilens spår. När du uppnått önskad position drar du åt skruvarna (A). Montera eventuellt tillbaka de detaljer du plockade bort för att kunna montera armstödsbeslaget.

### Höjjustering

För att höjjustera armstödet lossar du skruvarna (A) något och flyttar sedan armstödet till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (A).

### Breddjustering

För att ändra bredd på armstödet lossar du skruven (B) och flyttar sedan armstödet till önskad position. Dra sedan åt skruven.

### Vinkeljustering uppåt/nedåt

Om du vill justera vinkel på armstödet lossar du spakvredet (C) och flyttar sedan armstödet till önskad vinkel. Dra sedan åt spakvredet (C).





### Vinkeljustering i sidled

Om du vill justera plattan i sidled och vinkel, lossa skruvarna (D) och flytta sedan armstödet till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (D).

### Den vikbara funktionen

För att vika armstödet åt sidan, dra låsbulten (E) nedåt och vik sedan undan armstödet. Säkerställ att ett klickljud hörs när du vikt tillbaka armstödet. Möjlighet till att vinkelställa ges genom trehålspositionen för låsbulten.



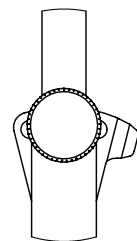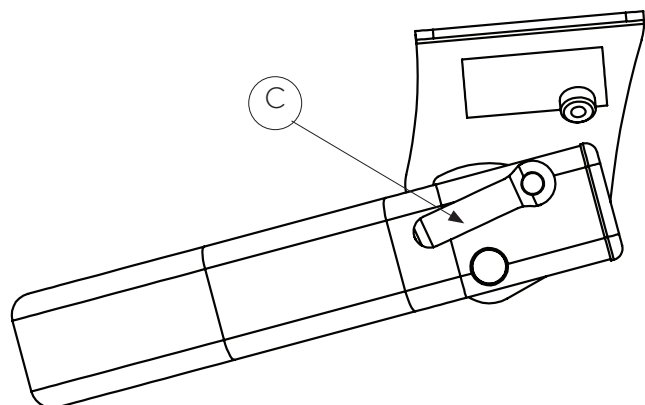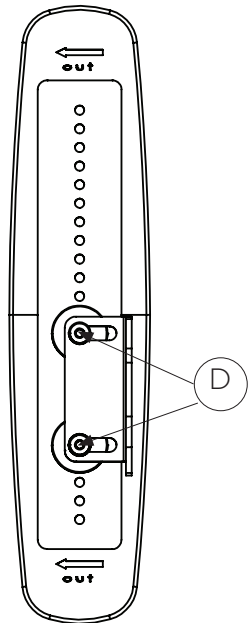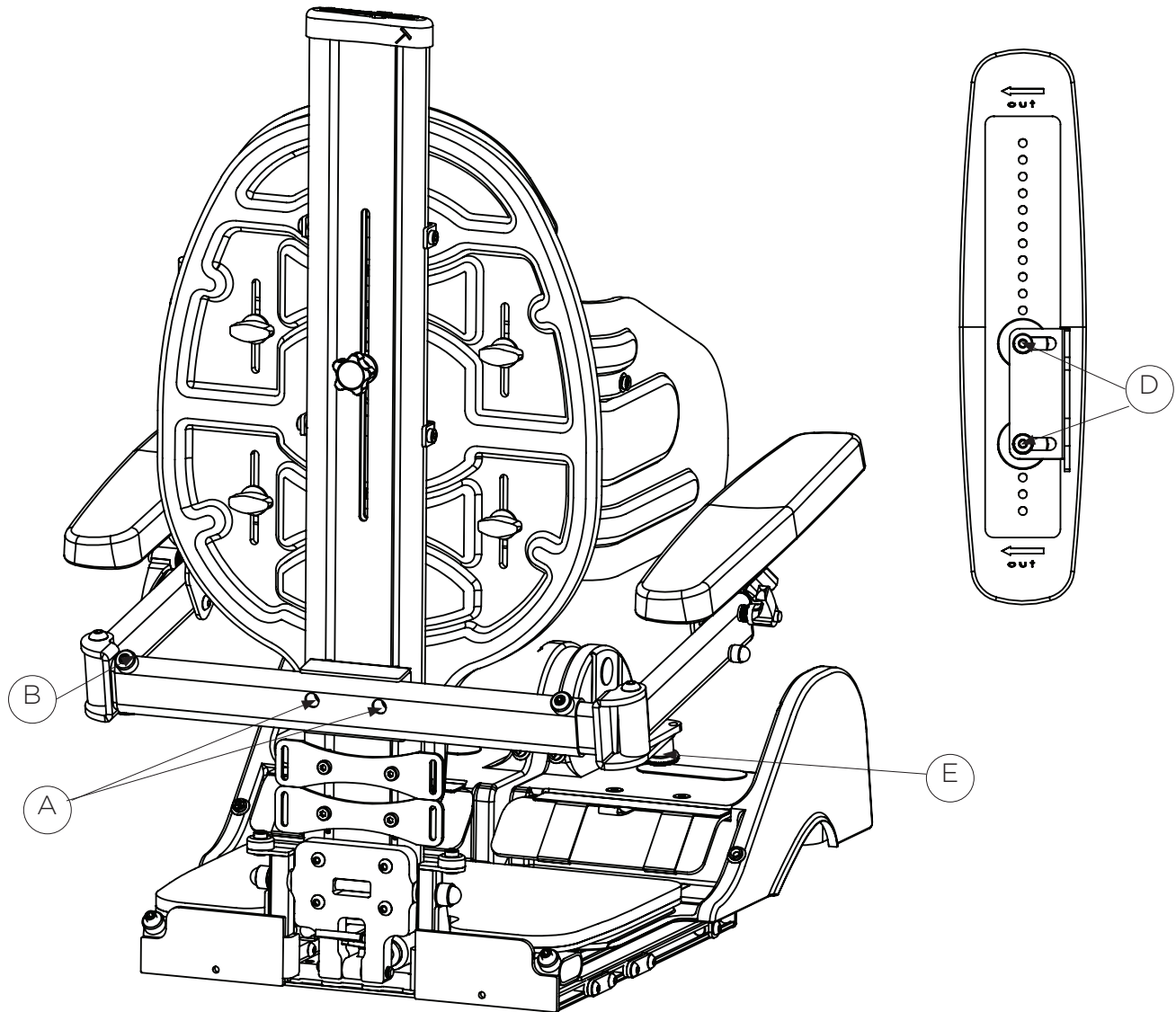

Trehålsposition  
För att vinkelställa armstöden

## Överarmsstöd

### Montering av överarmsstöd

Montera överarmsstödet med hjälp av fingervred (A), bricka (B), distans (D) och vagnsbult (E). Notera att vagnsbulten i bålstöden måste bytas ut mot medföljande längre vagnsbult. För närmare beskrivning om hur du monterar (se avsnitt bålstöd). Stick igenom vagnsbulten (E) genom bålstödet och ryggplattan. Möt sedan upp med distans (D), överarmstödsbeslag (C), bricka (B) och slutligen fingervred (A).

### Höjjustering av överarmsstöd


För att höjjustera överarmsstödet lossar du fingervredet (A) och justerar sedan till önskad höjd. Dra åt fingervredet (A) när du uppnått önskad position.

### Breddjustering av överarmsstöd

För att breddjustera överarmsstödet lossar du skruvarna (E) och justerar sedan till önskad bredd. Dra åt skruvarna (E) när du uppnått önskad position.

### Polstring

När polstringen behöver tvättas kan du enkelt dra bort denna från Överarmstödsplattan genom att sträcka resåren på baksidan av polstringen. För att återmontera polstringen, trä polstringen över överarmstödsplattan och se till att den sitter centrerat på överarmstödsplattan.

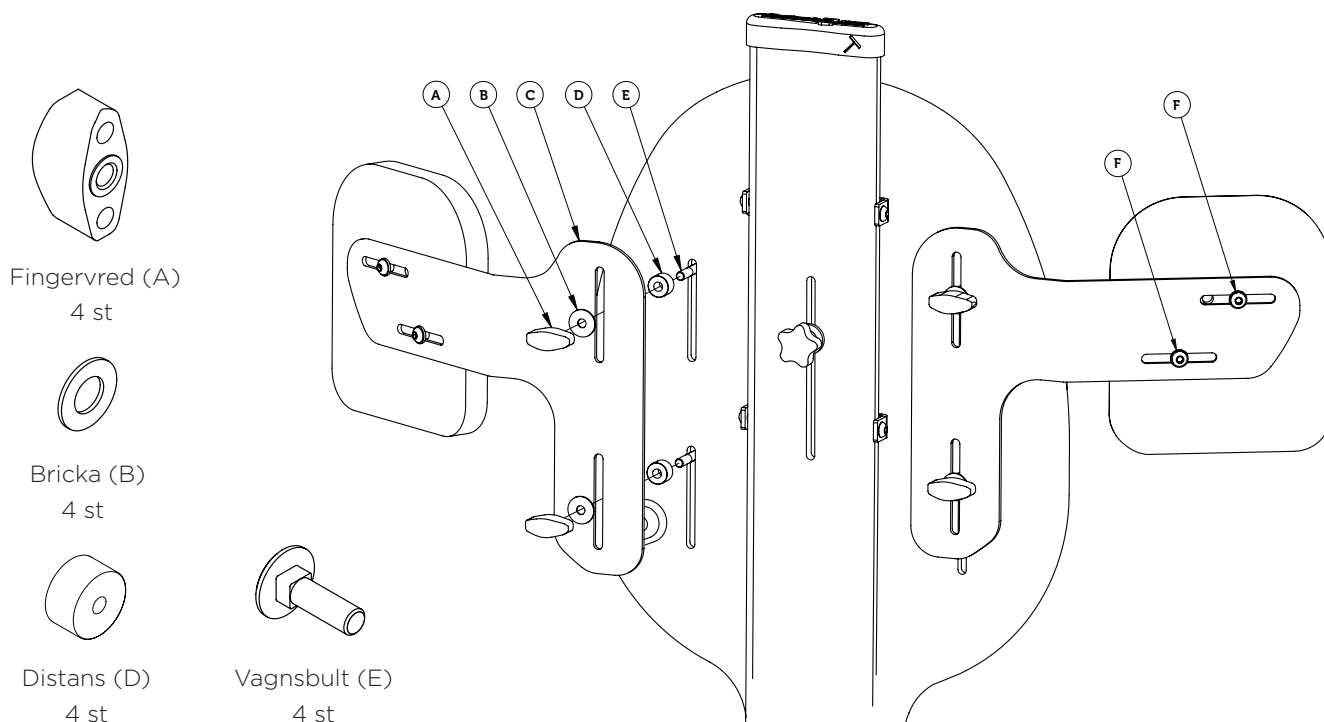


Vagnsbulten i bålstöden måste bytas ut mot medföljande längre vagnsbult vid montering av överarmstöd.  
Vid justering av överarmstödet lösgörs även bålstödet för justering.

## Handbåge

### Montering av handbåge

Bågen skjuts in i rör under armstödsplattorna och spärras med vred (A) på båda sidor. Bågen kan skjutas ut på brukarens vänstra sida och roteras bort medan den högra sidan fortfarande sitter kvar i fäströret.

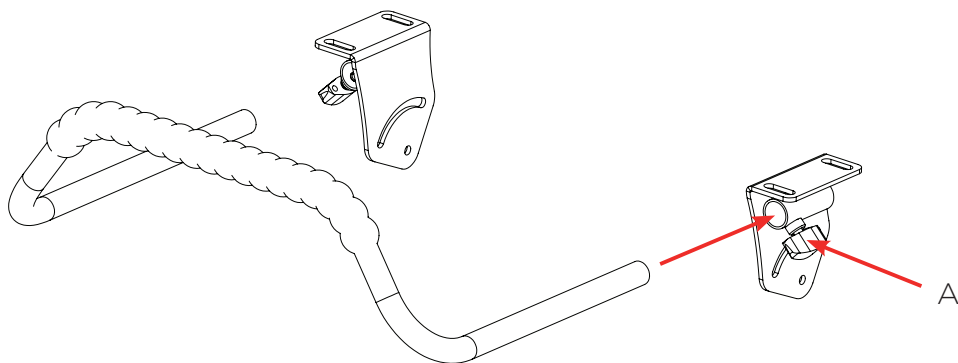

## Bord, fast

### Montering av bord

Lägg bordet på armstödsplattorna och justera bredden och djupet på armstöden så de hamnar rätt under bordet. Vrid in bordets låsarmar under armstödsplattan.

### Byte av monteringshål


Det finns 3 st infästningsbredder att välja mellan. För att byta bredd används valfritt monteringshål under armstödspolstringen i bordets bakkant. I grundutförandet är låsarmen infäst i mittenhålet.

För att byta monteringshål måste du först lyfta på polstringen i bakkant.

Markeringarna i bordets yttre bakkant visar bara vilken storlek bordet har.




Var noga med att ej lyfta bordet i framkant.

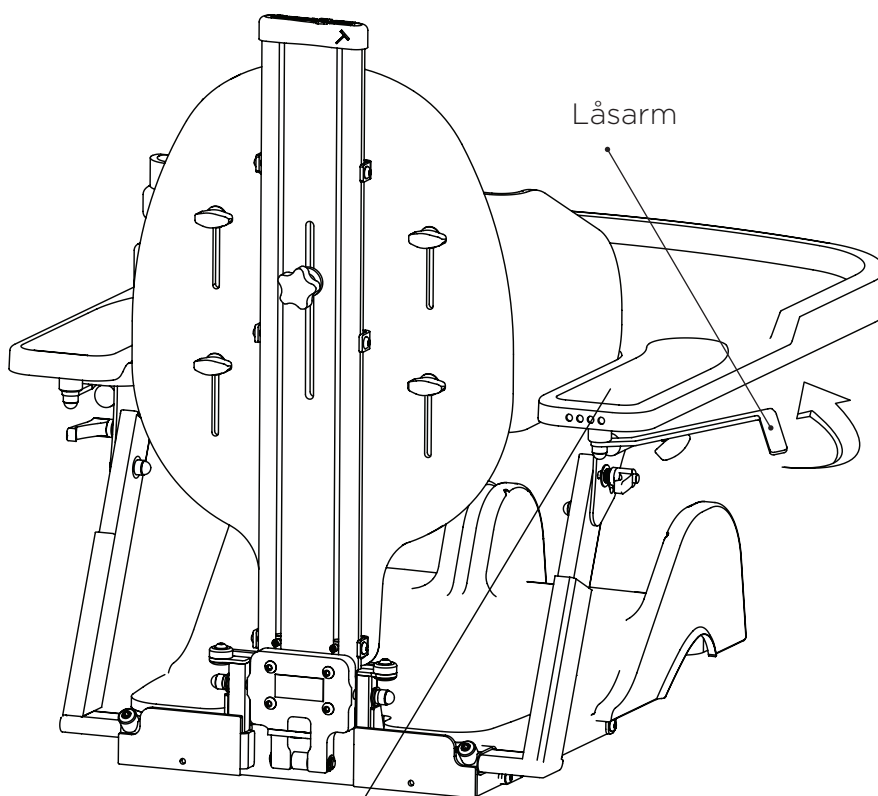

### Infästningsbredder


Välj mellan tre olika monteringshål

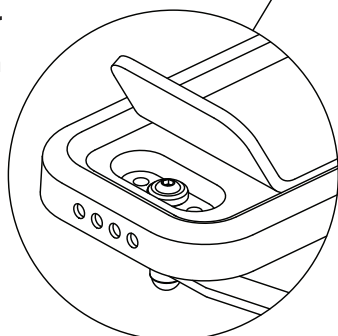

## Bord, vikbart

### Montering av bord, vikbart


För att montera det uppfällbara bordet trär du in bordets monteringsrör (A) genom röret (B) som finns under armstödsplattan. Skjut in bordet till önskad position och låt det vila på armstödplattorna. Dra åt fingervredet (C) för att låsa fast bordet.

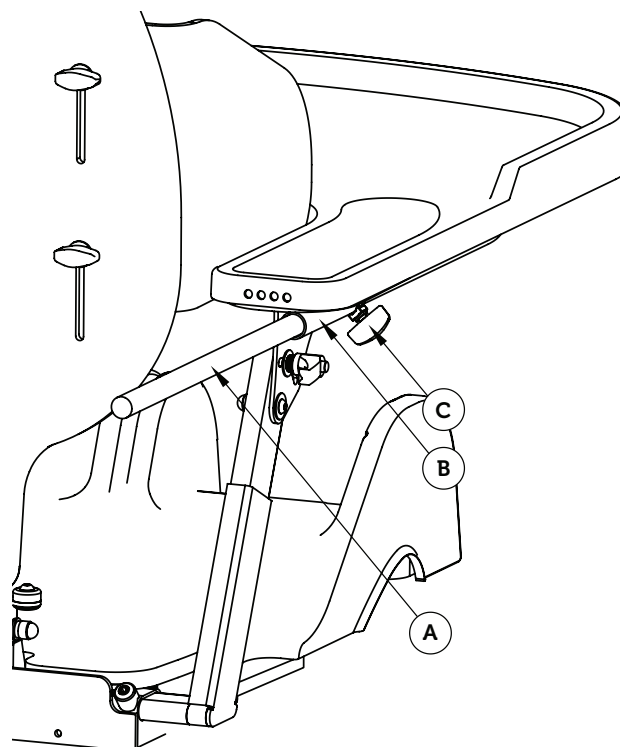


### Att använda den vikbara funktionen

För att fälla bordet åt sidan lossa först fingervredet (C) något. Lyft sedan bordet något och dra det framåt. Lyft bordet ytterligare och fäll det åt sidan. När bordet är i sitt nedersta läge, skjuter du det bakåt igen och drar åt fingervredet (C).


- 1) Dra fram bordet
- 2) Lyft och dra åt sidan
- 3) Fäll hela vägen ner så att bordet hänger och skjut sedan tillbaka bordet mot ursprungsläget

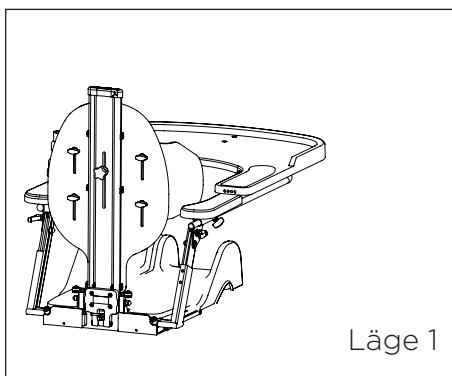

Läge 1

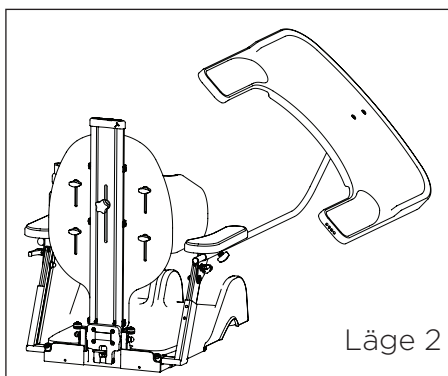

Läge 2

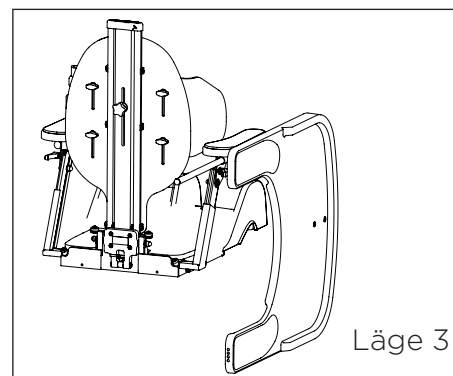

Läge 3



Glöm ej att dra åt fingervredet (C) efter fällning av bordet. Om låsarmar används, ska dessa vridas in under armstödsplattan.



Se till att dra bordet tillräckligt långt framåt vid sidofällning så att brukaren ej skadas.

## Bord, förstärkt

### Montering av förstärkt bord

För att montera det förstärkta bordet trär du in bordets monteringsrör (A) genom röret (B) som finns under armstödsplattan.

Skjut sedan in bordet till önskad position och låt det vila på armstödplattorna.

Dra åt fingervredet (C) för att låsa fast bordet.

Vrid sedan in låsarmen tills den hamnar innanför kanten på armstödplattan.

### Breddjustering av förstärkt bord

Istället för att breddjustera armstöden kan du välja att breddjustera bordets infästningsbeslag så det passar mot infästningsrören i armstödsbeslagen.



För att breddjustera bordet lossar du skruvarna (D) något och justerar till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (D).



Om inte breddjusteringen i bordets infästningsbeslag räcker till kan eventuellt viss justering av armstödsbredden behöva göras.

### Förstärkt bord

Underifrån

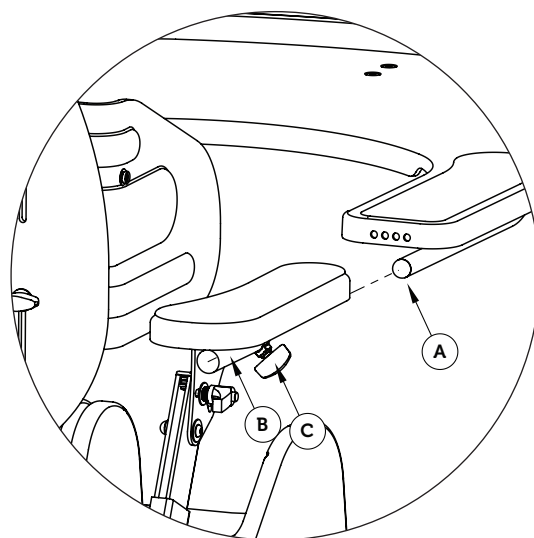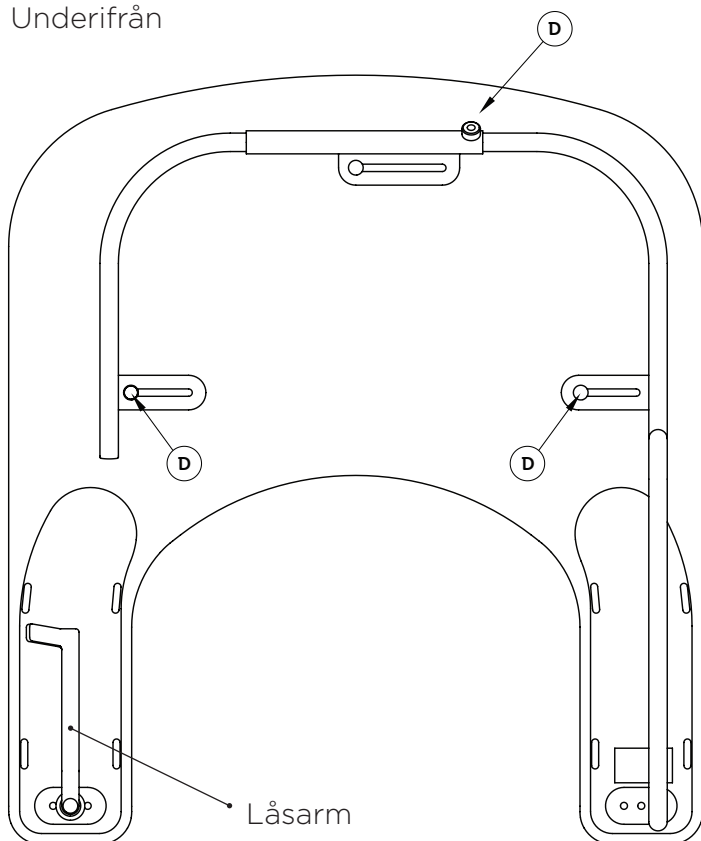


## Stödbord

### Montering av bordet

Lägg bordet på armstödsplattorna (B) och justera bredden och djupet på armstöden så de hamnar rätt under stödbordet.

Vrid sedan in bordets låsarmar (A) under armstödsplattan.

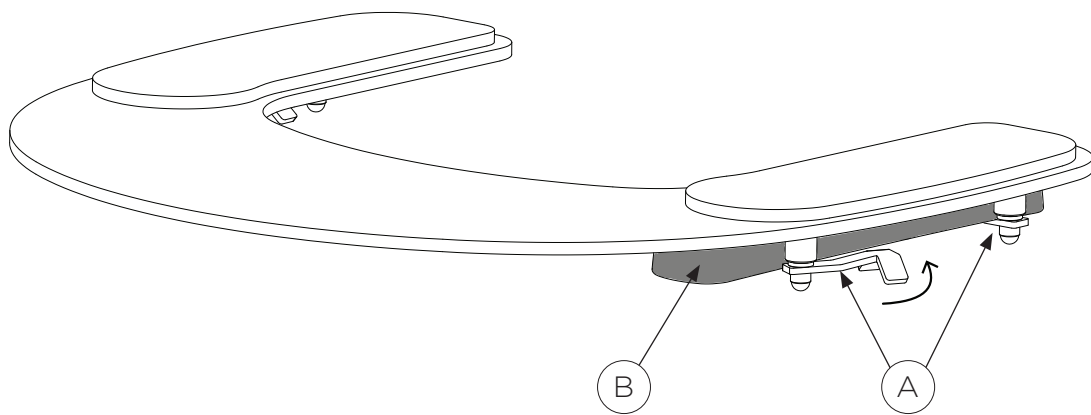

## Fotstöd

### Montering av fotstöd

Oavsett variant av fotstöd sker montering på samma sätt. Börja med att ta bort ändavslutet (A) från bendelsprofilen (B) och för sedan in sargsprintarna (C) så att de ligger mitt för de befintliga hålen i bendelsprofilen (B). Fäst sedan fotstödet genom att skruva fast det med skruvarna (D) i sargsprintarna (C) genom hålen i bendelsprofilen (B).



Du behöver ej demontera bendelen från profilen för att montera fotstödet.

### Säkerhetsstopp

Säkerhetsstopp (G) i form av en sargsprint finns monterad i botten av fotstödsprofilen innanför ändavslutet. Säkerhetsstoppet (G) kan även användas för att hitta tillbaka till en förinställd höjdposition.



Montera ett extra säkerhetsstopp ovanför fotstödet i fotstödsprofilens spår för att enkelt hitta tillbaka till en alternativ höjdposition (exempelvis med eller utan skor).

### Justering av vinkel vid knäleden

När fotstödet är monterat i bendelsprofilen finns möjlighet att vinkeljustera fotstödet vid knäleden. Lossa spakvredet (E) något och justera till önskad vinkel. Dra sedan åt spakvredet.

### Justering av vinkel vid fotled

När fotstödet är monterat i bendelsprofilen finns möjlighet att vinkeljustera fotstödet vid fotleden. Lossa skruven (F) något och justera till önskad vinkel. Dra sedan åt skruven.

### Justering av fotplattans höjd

För höjdjustering släpp på vred (H) och justera fotplattan till önskad höjd.


### Alternativ montering av fotstöd

Om du vill komma närmare knäleden finns ett alternativt monteringsätt där du monterar fotstödsfästet på motsatt sida om bendelsprofilen (B).



För justering vid benlängdsskillnad eller abduktion används delat fotstöd. Se även kapitel Sittdel.



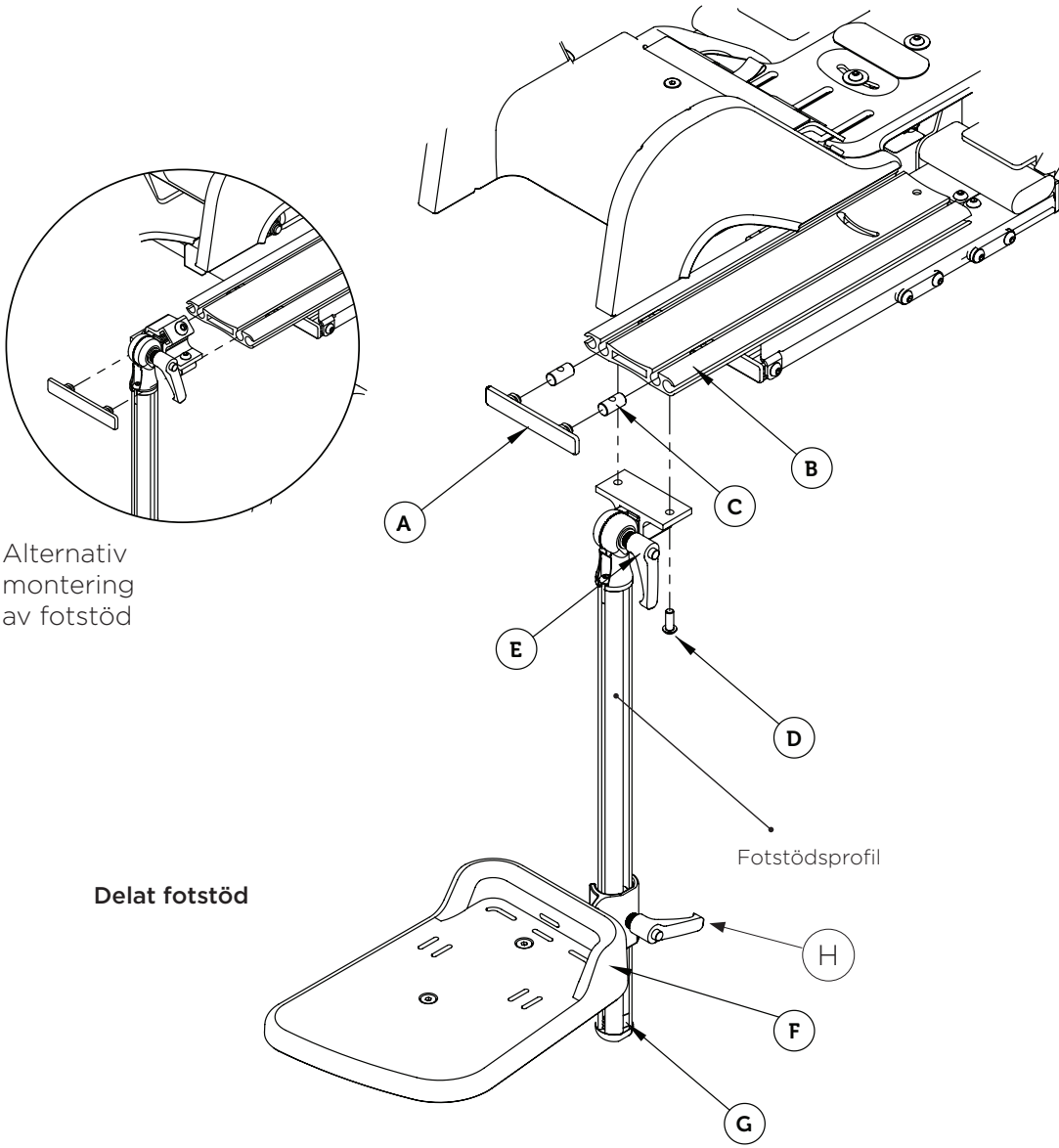


Alternativ  
montering  
av fotstöd

**Delat fotstöd**

Fotstödsprofil

**Helt fotstöd**

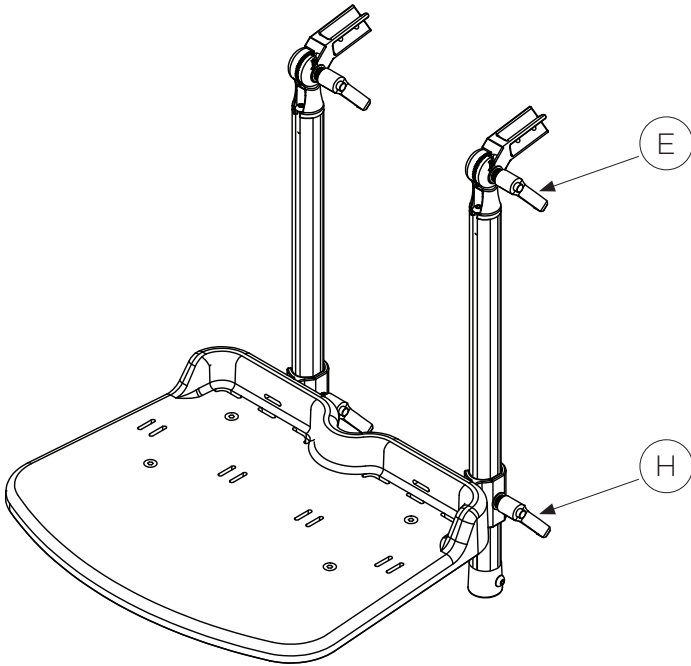

## Fotstödsbeslag

### Fast fotstödsbeslag (1)

För att höjjustera fotstödet lossar du spakvredet (A) något för att justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet.

För att vinkeljustera vid fotleden lossar du skruven (E) och justerar till önskad vinkel. Dra sedan åt skruven.

### Fjädrande fotstödsadapter (2)

För att höjjustera fotstödet lossar du skruven (D) och eventuellt skruven (E) något för att sedan justera till önskad höjd. Dra åt skruven (D). Välj längd på fjäderväg genom att justera skruven (E) till önskad position och dra åt den.

För att vinkeljustera vid fotleden lossar du skruven (E) och justerar till önskad vinkel. Dra sedan åt skruven.



Fjädringens motstånd kan justeras med en spårmejsel genom att skruva på skruven i fjäderpaketet (F).


### Uppfällbart fotstödsbeslag (3)

För att höjjustera fotstödet lossar du spakvredet (A) något för att justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet. För att använda den uppfällbara funktionen, lyft fotstödsplattan i framkant.

### Kulledsadapter (4)

För att höjjustera fotstödet lossar du spakvredet (A) något för att justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet.

För att använda kulledsfunktionen lossar du först skruvarna (B) och (C) och justerar till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (B) och säkerhetslås positionen med skruven (C).

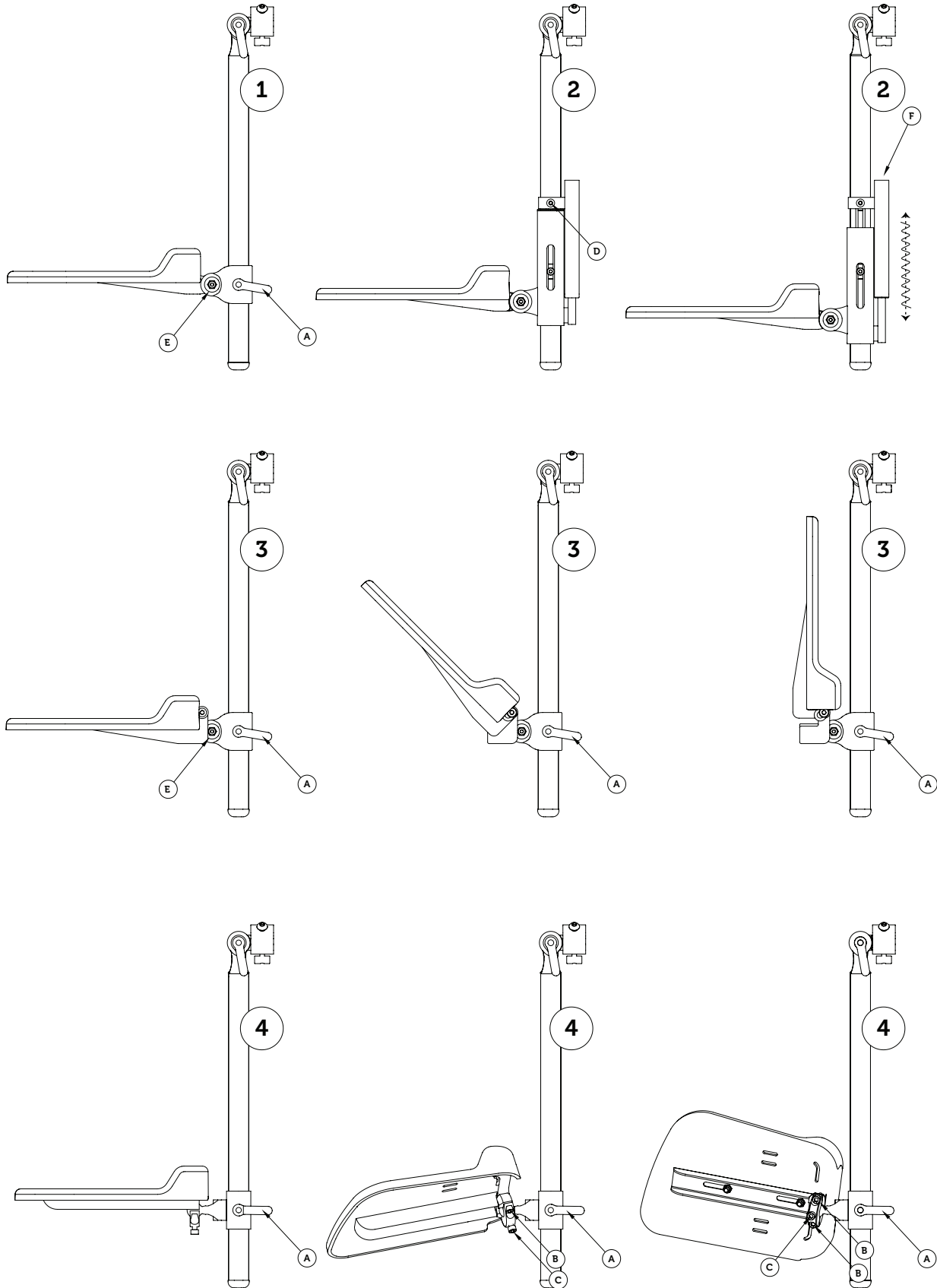


## Fotlåda dubbelstag

### Montering av fotlåda vid efterbeställning

Byt ut nuvarande fotplatta mot den medföljande. Eftersom att fotlådan är konstruerad på ett sådant sätt så att passar både enkelstag och dubbelstag behöver fotplattan borrar beroende på vilken typ av fotplatta du har.

För att montera fotlådan börjar du med att skjuta in sargsprinten (A) på fotlådan (B) i fotstödsstaget (C). Ställ sedan in fotstödet (D) på önskad höjd och dra åt spakvredet (E). Ställ in önskad höjd och bredd på fotlådan med hjälp av skruvarna (F) och (G). Plaststaget (H) på fotlådan ska föras igenom spåret (I) på fotstödsplattan. Avsluta med att montera medföljande polstring och kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.



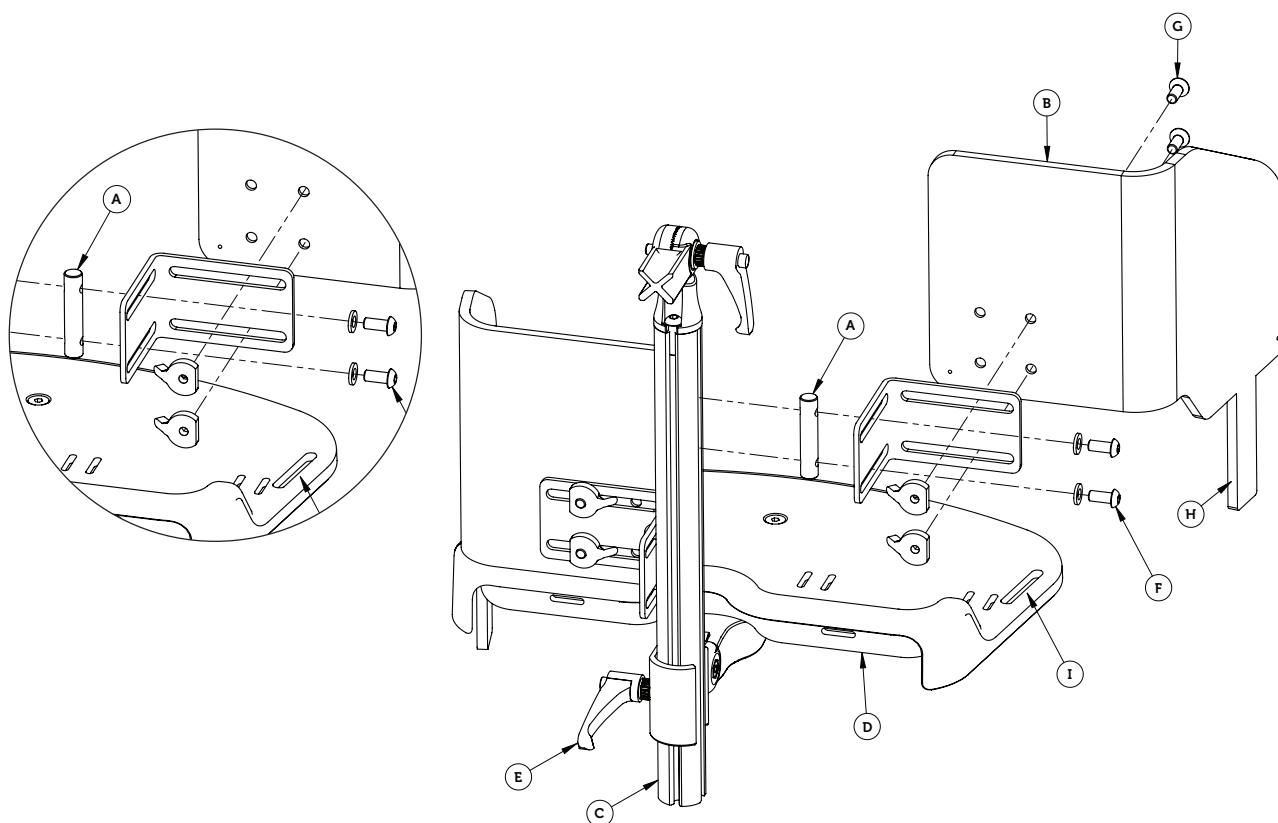


Plaststaget (H) kan efter injustering av önskad höjd kapas eller värmas in under fotstödsplattan enligt egna önskemål. Markeringar för borrhål finns markerat under fotplattan.

### Från enkelstag till dubbelstag och vice versa

Som standard kommer fotlåda storlek 2, 3 och 4 förmonterade för dubbelstag och storlek 1 är förmonterad för enkelstag.

För att ändra mellan de olika varianterna vänder du vinkelblecket (A) 180 grader och byter sedan sida på sargsprinten (B).

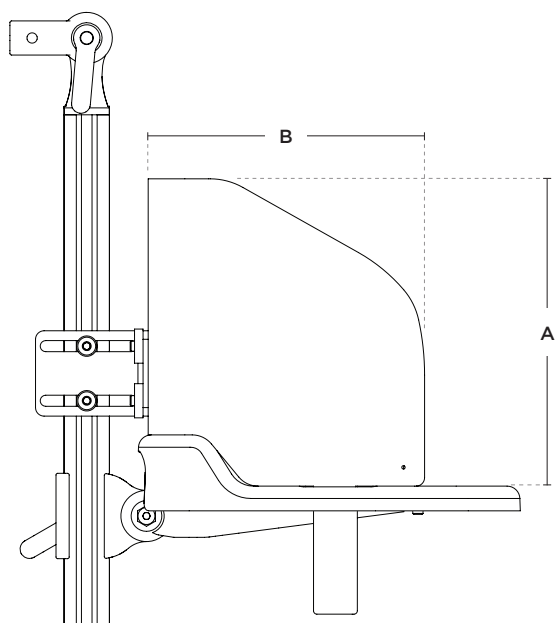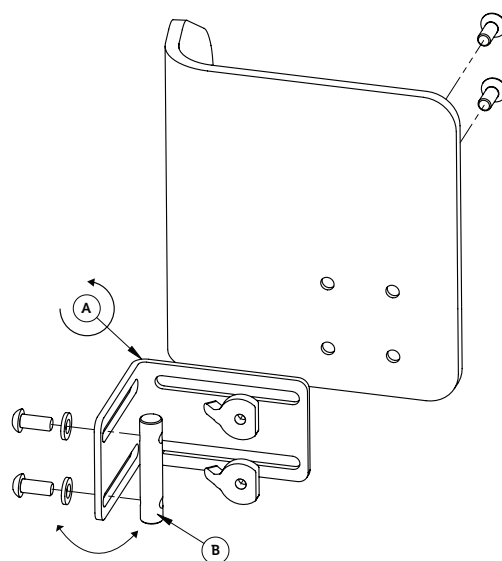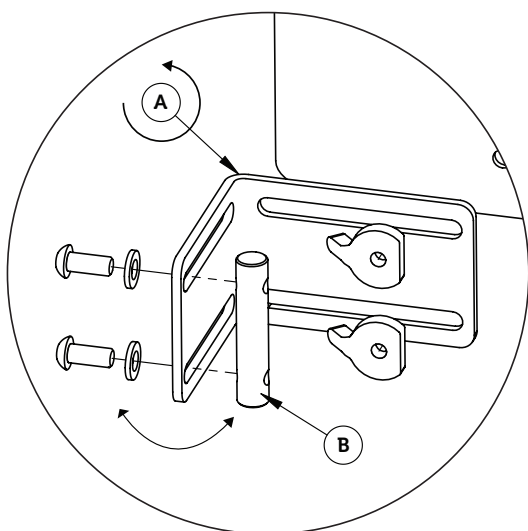

### Tekniska data

För hel / delad fotplatta	Storlek	Höjd (A)	Djup (B)
990043 / 990048	3	205 mm	190 mm
990044 / 990049	4	235 mm	240 mm

## Vadstöd

### Montering av vadstöd

Innan montering av vadstöd kan utföras måste du först ta bort eventuella fotstöd. Börja med att ta bort ändavslutet (G) och lossa sedan på spakvredet (F) som håller fotstödet på plats på fotstödsstaget. Dra sedan fotstödsplattan och dess beslag nedåt.

Montera vadstödet genom att skjuta i sargsprinten (C) i fotstödsstaget, justera till önskad höjd och dra åt skruvarna (E). Montera därefter tillbaka fotstödet och ändavslutet (G).



För återmontering av fotstöd se avsnitt Fotstöd.

### Höjd- och djupjustering av vadstöd



För att höjd- och djup justera vadstödet lossar du skruvarna (E) något för att sedan justera till önskad höjd/djup. Dra sedan åt skruvarna (E).

### Breddjustering av vadstöd


För att breddjustera vadstödet lossar du skruvarna (A) något för att sedan justera till önskad bredd. Dra sedan åt skruvarna (A).



Glöm inte att sätta tillbaka fotstöd och ändavslut efter montering av vadstöd.

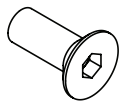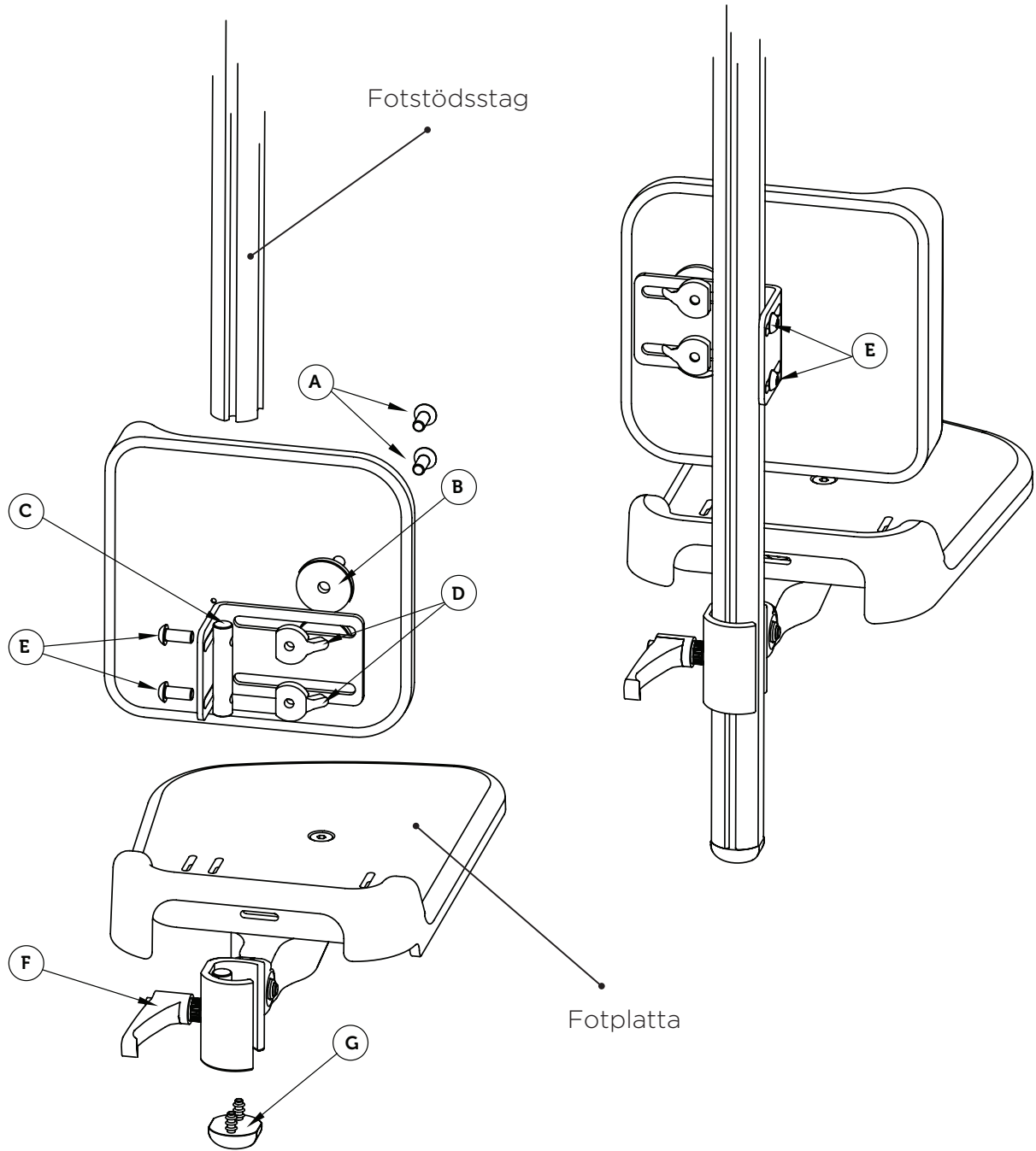


M6 Försänkt (A)  
4 st

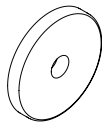


Distans (B)  
4 st



Sargsprint (C)  
2 st

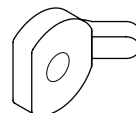

Spårmutter (D)  
4 st

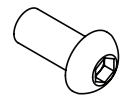


M6 Skruv (E)  
4 st

## Körbåge

### Montering av körbåge

Innan montering av körbågen kan ske måste du först ta bort justeringsnyckeln och eventuellt andra detaljer som kan sitta i vägen. Dessa detaljer kan exempelvis vara huvudstöd och övre monteringsbeslag.

Skjut i körbågens sargsprinter i ryggprofilens spår. När du uppnått önskad position drar du åt skruvarna (A). Montera eventuellt tillbaka de detaljer du plockade bort för att kunna montera körbågen.

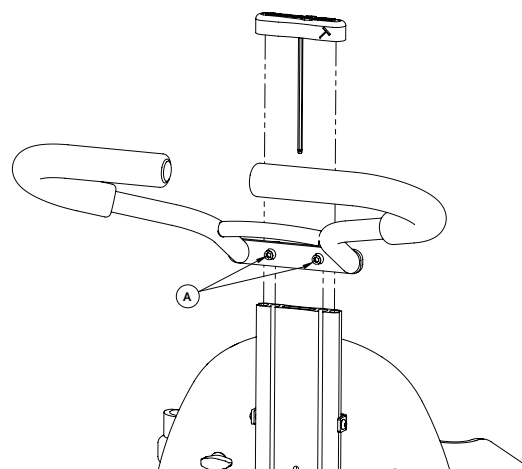

### Höjdjustering av körbåge

För att höjdjustera körbågen lossar du skruvarna (A) något och flyttar sedan körbågen till önskad höjd. Dra åt skruvarna (A) när önskad höjd är uppnådd.





Du behöver aldrig lossa skruvarna helt för att höjdjustera körbågen, det räcker med att lossa dem något.



## Svankstöd/Svankstöd med pump

- A) Ta bort ryggefodret.
- B) Fäst svankstödet på ryggefodret (inom det markerade område) med hjälp av medföljande karborre.
- C) Sätt tillbaka ryggefodret.

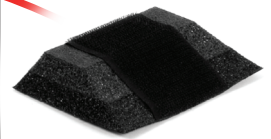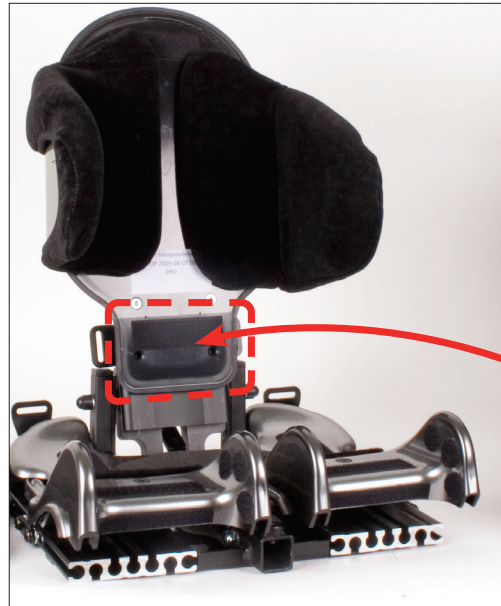

Svankstödskil

## Värmefoder

### Värmefoder

Värmepaketet håller kroppstemperaturen automatiskt och förhindrar avkyllning vid kallt väder. När kroppstemperatur uppnåtts slår värmepaketet av för att spara energi. Om temperaturen sjunker aktiveras det igen och värmer på nytt upp till kroppstemperatur.

Kontakterna som sitter monterade är väl utvalda så att det inte skall gå att koppla fel. Man får på inga villkor utsätta kontakter, batteri eller laddare för vatten eller fukt.

### Montering av värmefoder

Värmefodret monteras under sitt- och ryggdelsfodret med hjälp av kardborre.


### Värmedyna

De inmonterade värmedynorna har inbyggd temperaturreglering med ett temperaturområde från +27° C till +32° C.

Isoleringen tål både låga såväl som höga temperaturer och påverkas inte av solljus, fuktighet eller kemikalier. Materialet i dynan är flamskyddat (FMVSS 302). Värmedynan är av ventilerbart material för att undvika kondens.

### Batteri

Batteriet är uppladdningsbart (Ni-MH) och får endast laddas med den medföljande laddaren. Då batteriet är uttjänt skall detta lämnas för återvinning på din lokala återvinningsstation.

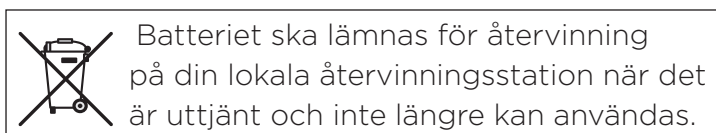

### Laddning av batteri

Följ nedanstående steg för att ladda batteriet på ett korrekt sätt.

1. Anslut laddaren till ett vägguttag 230V, 50Hz.
2. Anslut laddkontakten till manöverkåpan.
3. När batteriet ansluts blinkar laddaren långsamt gult för att starta med en långsam laddning. Efter en stund övergår laddaren till snabbladdning, vilket indikeras med snabb blinkning i grönt.
4. Låt batteriet vara anslutet tills lampan lyser ett konstant grönt ljus, vilket indikerar att laddningen är klar och batteriet går över till underhållsladdning.
5. Ta ut nätsladden ur vägguttaget.
6. Koppla bort laddkontakten från manöverkåpan.

Information och anvisningar kring värmefoder, se separat bruksanvisning.

### Batteriet blinkar gult

Om batteriet är trasigt blinkar lampan på laddaren snabbt med ett gult sken.

## Sammanfattning och efterkontroll

Efter att montering och/eller justering är genomförd, kontrollera att produkterna (huvudprodukt samt tillbehör) är monterade på ett riktigt sätt enligt bruksanvisningen och fungerar som avsett.

Kontrollera inställningarna på produkten och dess tillbehör så att brukaren har en korrekt sittposition.

Efter alla monterings- justerings- eller servicearbeten ska samtliga vred, infästningsskruvar och muttrar kontrolleras och dras åt.

Kontrollera så att hjälpmedlet är korrekt balanserat för att säkerställa att ev tipprisk utesluts.

Om brister uppmärksammas, använd ej produkten. Kontakta din distributör av hjälpmedlet för åtgärd.

# Transport i fordon

Vid transport i bil med Sharky Pro monterad på underrede ska anvisningar från tillverkaren av underredet följas.

## Säkerhetsband

Ett band levereras till sitsen med avsikt att spännas från sitsens rygg och runt chassits körbåge. Se till att detta band alltid sitter stabilt och spänt under transport.

## Krocktestad och godkänd

Produkten är krocktestad och godkänd enligt ISO 16840-4. Denna standard medger att sittsystemet kan användas på underreden godkända enligt ISO 7176-19 med bibehållet krockgodkännande.



Krockgodkännande gäller brukarvikter upp till 75 kg.

# Underhåll och skötselanvisningar

Denna produkt är ett medicinsktekniskt hjälpmedel avsett för flergångsbruk. För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert samt nå bedömd livslängd är det därför viktigt med tillsyn, underhåll och rengöring. Vid utbyte av delar i samband med underhåll och service ska alltid originaldelar från Anatomic Sitt användas.

Definitioner:

Generellt skiljer man på avhjälpande underhåll, service och förebyggande underhåll.

- Med **avhjälpande underhåll** avses åtgärder för att reparera en trasig produkt, ett akut underhåll, svårt att planera i tid och ofta beroende av produktens användning.
- **Service** avser en enklare översyn som kan förlänga produktens livslängd. Här ingår exempelvis kontroll av skruvar och fästelement, rörliga delar, allmänt slitage mm samt mindre reparationer.
- Med **förebyggande underhåll** avses åtgärder föranledda av förutsägbara begränsningar i produktens prestanda. Denna typ av underhåll kan ses som åtgärder av engångskaraktär som är planerade till tid, art och omfattning. För denna produkt fordras inget förebyggande underhåll under produktens förväntade livslängd.

## Kontroll före användning

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert är det viktigt med tillsyn och rengöring.

Tillsyn och kontroll ska utföras före varje användning enligt nedan punkter:

- Kontrollera produkten och dess tillbehör med avseende på lösa delar, slitage och skador. Kontrollera särskilt skruvar och muttrar samt vred.
- Kontrollera att sitsen är ordentligt fastsatt på underredet
- Kontrollera produktens stabilitet
- Kontrollera produktens rörliga funktioner, exempelvis ryggvinkling avseende rörlighet samt låsning.
- Kontrollera bälten och selar avseende slitage, funktion samt infästning.

Om brister uppmärksammas, använd ej produkten. Kontakta din distributör av hjälpmedlet för åtgärd.

## Skötsel

Behovet av rengöring skiftar och måste bedömas från fall till fall beroende på produktens användning men minst en gång varje vecka rekommenderas.

Rengör plast och metalldelar med svamp/trasa och antibakteriella, milda rengöringsmedel. Använd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel, frätande ämnen eller lösningsmedel.

Foder och bälten/selar kan tvättas i 60°C fintvätt. Följ separata tvättrådsetiketter på produkterna. För mer information se aktuella bruksanvisningar för respektive positioneringshjälpmedel.

## Service och avhjälpande underhåll

Service utförs för att i första hand förlänga produktens livslängd och för att kontrollera eventuellt behov av avhjälpande underhåll. Behovet av översyn/service skiftar och får bedömas från fall till fall beroende på produktens användning och slitage men minst en gång var 6:e månad rekommenderas.

Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt av kvalificerad personal, se avsnitt Säkerhetsföreskrifter i bruksanvisningen. När trasiga, slitna eller spruckna delar byts ut, använd bara originaldelar från Anatomic Sitt så produkten bibehåller sin CE-märkning. Reservdelar kan beställas enligt separat reservdelslista/sprängskiss för aktuell produkt.

Vid varje servicetillfälle ska det säkerställas att produktens funktioner är tillförlitliga och att produkten är säker att använda. Om det finns brister som påverkar säkerheten och inte kan åtgärdas ska produkten tas ur bruk.

För rengöring av produkten, se avsnittet Skötsel.

### Kontrollera följande och åtgärda vid behov:

- Kontrollera produktens samtliga funktioner.
- Kontrollera produkten och dess tillbehör med avseende på lösa delar, slitage och skador.
- Kontrollera att alla skruvar, muttrar och bultar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att alla vred är hela och fungerar.
- Kontrollera att sitsen är ordentligt fastsatt på underredet
- Kontrollera säkerhetsbandet på ryggen så det är utan skador och låser korrekt.
- Kontrollera produktens rörliga funktioner, exempelvis ryggvinkling. Både avseende justeringsmöjligheter, rörlighet samt låsning.
- Kontrollera att kolven låser i valt läge
- Kontrollera ev. slitage på alla leder, taggleder och fästen. Säkerställ att de låser som de ska.
- Kontrollera bälten och selar avseende slitage, funktion samt infästning.
- Kontrollera märkning, etiketter och varningssymboler så de är hela och läsbara.

## Efterkontroll

När service är utförd, kontrollera att produkterna (huvudprodukt samt tillbehör) är monterade på ett riktigt sätt enligt bruksanvisningen och fungerar som avsett.

## Rekonditionering

Rekonditionering görs lämpligen om hjälpmedlet är personligt och ska ges till en ny brukare eller långtidsförvaras. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt av kvalificerad personal, se avsnitt Säkerhetsföreskrifter i bruksanvisningen.

Vid utbyte av delar ska Anatomic Sitt originaldelar användas.

För information om produkten och dess funktioner, se bruksanvisning på [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com). För information om produktens livslängd se avsnitt, Begränsningar i bruksanvisningen.

Kontrollera alltid vid rekonditionering att hjälpmedlet inte är specialanpassat, innan det skickas till ny brukare.

Vid varje rekonditioneringstillfälle bör det säkerställas att produktens funktioner är tillförlitliga och att den är säker att användas. Om det finns brister som inte kan åtgärdas genom rekonditionering, ska produkten tas ur bruk och återvinnas.

## Rengöring

Rengör plast och metalledar med svamp/trasa och antibakteriella, milda rengöringsmedel. Använd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel, frätande ämnen eller lösningsmedel.

Avlägsna polstring, foder och bälten/selar. Polstring är en förbrukningsvara och ska bytas ut vid behov. Foder och bälten/selar kan tvättas i 60°C fintvätt. Följ separata tvättrådsetiketter på produkterna. För mer information se aktuella bruksanvisningar för respektive positioneringshjälpmedel.

Produkten kan med fördel rengöras i tvättkabinett, 60°C i max 10 minuter. Avlägsna foder och bälten/selar vid rengöring av sittsystemet i tvättkabinett.

## Tork

Sittsystemet kan torkas i kabinett i max 60°C i upp till 10 minuter.

### **Kontroller vid rekonditionering**

Efter rengöring och torkning kontrolleras produkten på skador/slitage. Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se avsnitt Begränsningar i bruksanvisningen) när en bedömning görs för att kontrollera om produkten är lämplig att rekonditionera.

Trasiga, slitna eller spruckna delar byts ut. Använd bara originaldelar från Anatomic Sitt. Reservdelar kan beställas enligt separat reservdelslista/sprängskiss för aktuell produkt. För att produkten ska behålla sin CE-märkning får hjälpmedlet endast förses med reservdelar levererade av Anatomic Sitt AB.

Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna.  
Säkerställ att bruksanvisning och alla originaletiketter medföljer vid ny förskrivning.

### **Etiketter/dekaler**

Vid behov av nya etiketter och dekaler, kontakta Anatomic Sitt. För dess placering på hjälpmedlet se [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com) där återfinns även bruksanvisning.



## Kontrollpunkter

Övergripande:

- Kontrollera hela produkten och dess tillbehör för att identifiera trasiga, spruckna eller slitna delar som ska bytas ut.
- Kontrollera produktens samtliga funktioner eller slitna delar som ska bytas ut.

Sitt/ryggdel:

- Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna.
- Kontrollera att stolens justeringsmöjligheter fungerar.
- Kontrollera att ryggvinklingsfunktionen fungerar och att kolven låser i valt läge.
- Kontrollera foder och byt vid behov.

Fotstöd:

- Gör funktionskontroll av höjd- och vinkeljustering.
- Kontrollera ev. slitage på alla taggleder och säkerställ att de låser som de ska.

Huvudstöd:

- Kontrollera fodret och byt vid behov.
- Kontrollera så huvudstödslederna låser.
- Kontrollera fästet på huvudstödet så det låser.

Armstöd:

- Kontrollera armstödens justeringar för höjd, djup och bredd.
- Kontrollera armstödsfästena så de låser som de ska.

Fästsystem:

- Kontrollera funktionen så att det låser.

Säkerhetsband:

- Kontrollera säkerhetsbandet på ryggen så att det inte har skador och att det låser.

Övriga ev. tillbehör:

- Kontrollera alla delar efter slitage, byt vid behov.
- Kontrollera ev. låsningar och justeringsmöjligheter.

## Efterkontroll

När rekonditionering är utförd kontrollera att produkterna (huvudprodukt samt tillbehör) är monterade på ett riktigt sätt enligt bruksanvisningen och fungerar som avsett. Kontrollera också att märkning, etiketter och varningssymboler är hela och läsbara.

# Avfallshantering

## Återvinning

En förbrukad del eller produkt ska demonteras. Delarna ska separeras efter materialtyp och lämnas på återvinningscentral eller motsvarande. Gaskolv sorteras som farligt avfall.

# Garanti och retur

## Garanti och reklamation

Garanti gäller generellt ett (1) år mot fabrikationsfel fr.o.m. leveransdatum eller enligt avtal. Garanti utgår inte för yttre påverkan eller onormal hantering. För garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

För att på bästa sätt kunna bedömma reklamationen ska produkten vara torr och rengjord när den skickas åter.

Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation eller eventuellt garantiutbyte. Bifoga en kopia på fakturan och ange att produkten skall tillbaka till dig efter reparation. Ange leveransadress, kontaktperson samt telefonnummer. Blankett för reklamation finns att hämta på vår hemsida.

Förpacka den torra och rena produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

## Returer

Felbeställda eller fellevererade varor skall returneras inom 20 dagar från leveransdatum. Bifoga alltid en kopia på både följesedel och faktura. Ange orsak till retur av dina varor. Returblankett finns på vår hemsida.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Observera att specialanpassade produkter inte går att returnera!

# Revision

I denna version av bruksanvisningen har följande ändringar gjorts.

## Symboler

Ny klämrisksymbol s. 6

## Produktmärkning

Ny etikettutformning s. 7

## Montering och Justeringsanvisningar

Benlängdsskillnad/sittdjup s. 22-23  
Diverse textformuleringar ändrade

## Revisionsförteckning

ver. 2.0 - 2021-03-09  
ver. 2.1 - 2021-05-26  
ver. 2.2 - 2021-10-18  
ver. 2.3 - 2021-12-21  
ver. 2.3 - 2023-02-20  
ver. 2.4 - 2023-09-13

**SE**

**Anatomic Sitt AB (tillverkare)**

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

**Besöksadress**

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

*World wide*

[anatomicsitt.com](http://anatomicsitt.com)

[info@anatomicsitt.com](mailto:info@anatomicsitt.com)

[facebook.com/anatomicsitt](https://facebook.com/anatomicsitt)

[youtube.com/anatomicsitt](https://youtube.com/anatomicsitt)

